



Référence rapide

Stealth Products



Siège en fibre de carbone

---

Installation de la base du fauteuil

Les produits de Stealth visent la satisfaction du client à 100%. Votre entière satisfaction est importante. Veuillez nous contacter avec vos commentaires ou modifications suggérées qui permettront d'améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de ces produits. Vous pouvez nous joindre à l'adresse :

104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Téléphone : (512) 715-9995    Numéro sans frais : 1 (800) 965-9229

Fax : (512) 715-9954        Numéro sans frais : 1 (800) 806-1225

info@stealthproducts.com    www.stealthproducts.com

## **Généralités**

Lire et comprendre toutes les instructions avant l'utilisation du produit. Le fait de ne pas suivre les instructions et mises en garde dans ce document peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort. Une mauvaise utilisation du produit résultant du non-respect des instructions annulera la garantie.

Cesser immédiatement d'utiliser le produit si une fonction est compromise, des pièces sont manquantes, lâches, ou s'il présente des signes d'usure excessive. Consulter votre fournisseur pour les réparations, de réglage ou le remplacement.

Si le présent document contient des informations que vous ne comprenez pas, ou en cas de préoccupations au sujet de la sécurité ou du fonctionnement du produit, contacter votre fournisseur.

## Informations importantes!

Toutes les personnes responsables du réglage, de l'ajustement et de l'usage quotidien des appareils décrits dans ces instructions doivent connaître et comprendre tous les aspects liés à la sécurité des appareils mentionnés. Pour que nos produits soient utilisés avec succès, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions et les mises en garde;
- Maintenir nos produits selon nos instructions en matière de soins et d'entretien.
- Les appareils devraient être installés et réglés par un technicien qualifié.

## Commande de documents

Vous pouvez télécharger des exemplaires supplémentaires de ce manuel du propriétaire et d'installation sur le site Web de Stealth : [www.stealthproducts.com](http://www.stealthproducts.com)

REF

### **P116D250R1**

Document #250 Révision 1

Vendredi, le 20 novembre 2015

Copyright © 2015 Stealth Products, LLC

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
Tous droits réservés.

Publié par Stealth Products, LLC

Date d'installation : \_\_\_\_\_

Revendeur : \_\_\_\_\_

Cachet du  
revendeur :



Numéro de  
série :



Pour les réclamations de garantie au Royaume-Uni, veuillez contacter :



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Allemagne



Les supports dorsaux ADI sont conçus et fabriqués selon les normes les plus élevées. Notre support dorsal ADI est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de 24 mois. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, Stealth Products réparera ou remplacera, à notre discrétion, le support dorsal ADI. Cette garantie ne couvre pas les supports dorsaux qui ne sont pas utilisés à bon escient par l'utilisateur et jugés comme tel par Stealth Products, LLC.

Les revendications et les réparations devraient être traitées par le fournisseur de Stealth Products le plus proche.

## 4.1 Exclusions de garantie

Cette garantie ne couvre pas les éléments qui peuvent nécessiter un remplacement en raison de l'usure normale :

- Revêtement extérieur
- Revêtement intérieur
- Des circonstances qui échappent au contrôle de Stealth
- La main d'œuvre, les appels de service, le transport et d'autres frais engagés pour la réparation du produit, sauf autorisation expresse, À L'AVANCE, par Stealth Products, LLC.
- Réparations et/ou les modifications faites à une pièce sans le consentement spécifique de Stealth.

Les exclusions comprennent également des composants présentant des dommages causés par :

- L'exposition à l'humidité




### *Avis*

Toute substitution de la quincaillerie fournie annulera la garantie. La mauvaise utilisation des articles et les « cas de force majeure » (par ex., inondation, tornade, etc.) ne sont pas couverts par la garantie.

|  |            |
|--|------------|
| <b>1.0 Satisfaction du client</b> .....      | <b>i</b>   |
| <b>2.0 Informations importantes</b> .....    | <b>ii</b>  |
| <b>3.0 Introduction</b> .....                | <b>iii</b> |
| <b>4.0 Garantie</b> .....                    | <b>iv</b>  |
| 4.1 Exclusions de garantie .....             | iv         |
| <b>5.0 Table des matières</b> .....          | <b>v</b>   |
| <b>6.0 Étiquettes de mise en garde</b> ..... | <b>vi</b>  |
| 6.1 Étiquettes de mise en garde.....         | vi         |
| 6.2 Responsabilité limitée .....             | vi         |
| 6.3 Tests.....                               | vi         |
| <b>7.0 Instructions d'installation</b> ..... | <b>1</b>   |
| 7.1 Outils requis pour l'installation.....   | 1          |
| 7.2 Installation .....                       | 1          |
| <b>8.0 Première utilisation</b> .....        | <b>3</b>   |
| 8.1 Assistance des revendeurs .....          | 3          |
| 8.2 Tests des utilisateurs .....             | 3          |
| 8.3 Conditions d'utilisation.....            | 3          |
| <b>9.0 Entretien</b> .....                   | <b>4</b>   |
| 9.1 Nettoyage .....                          | 4          |
| 9.2 Désinfection .....                       | 4          |

## 6.1 Étiquettes de mise en garde

Les mises en garde sont incluses pour la sécurité de l'utilisateur, du client, de l'opérateur et de la propriété. Veuillez lire et comprendre ce que les mots-indicateurs **SÉCURITÉ**, **AVIS**, **ATTENTION**, **MISE EN GARDE** et **DANGER** signifient, comment ils pourraient affecter l'utilisateur, ceux autour de l'utilisateur et la propriété.

|   |  |
|---|--|
|  <b>DANGER</b>        | Identifie une situation <b>imminente</b> qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des <b>blessures graves</b> , la <b>mort</b> , et des <b>dommages matériels</b> .           |
|  <b>MISE EN GARDE</b> | Identifie une situation <b>potentielle</b> qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des <b>blessures graves</b> , la <b>mort</b> , et des <b>dommages matériels</b> .         |
|  <b>ATTENTION</b>      | Identifie une situation <b>potentielle</b> qui (si elle n'est pas évitée) entraînera des <b>lésions mineures à modérées</b> , et des <b>dommages matériels</b> .                   |
| <i>Avis</i>   | Identifie des informations importantes qui ne sont pas liées à des blessures, mais à des <b>dommages matériels</b> potentiels.   |
| <b>SÉCURITÉ</b>   | Indique les étapes ou les instructions pour des pratiques sûres, des rappels de procédures de sécurité, ou des équipements de sécurité importants qui pourraient être nécessaires. |

## 6.2 Responsabilité limitée

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les dommages matériels pouvant découler de l'échec de l'utilisateur ou d'autres personnes de suivre les recommandations, les mises en garde et les instructions dans ce manuel.

## 6.3 Tests

Une configuration et une conduite initiales doivent être effectuées dans un espace ouvert sans obstacles jusqu'à ce que l'utilisateur soit parfaitement en mesure de conduire en toute sécurité.

Le produit doit toujours être testé sans qu'une personne soit assise dans le fauteuil roulant jusqu'à ce que chaque modification de l'installation physique ou réglage soit terminé.

## 7.1 Outils requis pour l'installation

- Clés à fourche de 1/2 po, 2 chaque
- Clé allen de 1/8 po, 1 chacune
- Foret de 3/16 po. Fleuret, un chacun

### *Avis*

À titre de référence, les supports sont livrés entièrement montés. Les bases de fauteuils ne sont pas préforés pour éviter des interférences avec d'autres pièces sur le cadre.


## 7.2 Installation



1. Avant de retirer la bascule du fauteuil OEM, marquer le cadre de gauche et de droite du fauteuil sur le bord antérieur de la bascule du fauteuil OEM.



2. Placer le support avant sur le cadre à environ 2,5 po à l'intérieur du bord antérieur de l'emplacement de la base du fauteuil d'origine qui a été marqué.
3. Placer le support arrière sur le cadre selon le poids approximatif supportant l'emplacement de l'utilisateur.

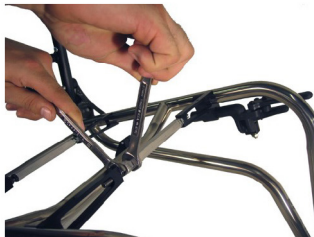



4. Tourner la barre hexagonale du centre de sorte que les supports soient « ajustés » dans les tubes du cadre. Ne pas trop serrer. Cela entraînera la flexion du cadre.
5. Placer une planche ou une règle droite à travers les supports et éliminer tout flambement.
6. Serrer les contre-écrous avec la clé de 1/2 po.



7. Placer le panneau de la base en fibre de carbone sur le cadre du fauteuil et centrer les bords.
8. Pour monter la base du fauteuil, vous devez d'abord marquer l'emplacement de chaque trou à travers les trous taraudés de 10/32 po. dans le support. Utiliser un tracer courbe de 90 ° ou choisir de marquer les trous.



9. Percer quatre trous de 3/16 po où la base du fauteuil est marquée.



10. Serrer les quatre vis boutons de 10/32 po avec des rondelles dans les supports.

### MISE GARDE

Utiliser uniquement la quincaillerie fournie avec la base CF. Ne pas substituer des vis, des supports ou des pinces.

## 8.1 Assistance des revendeurs

Lors de la première utilisation par le client, il est conseillé que le revendeur ou le technicien de maintenance aide et explique la configuration au client (l'utilisateur et/ou le préposé). Si nécessaire, le revendeur peut faire les derniers réglages.

**⚠ ATTENTION** Protéger tous les supports dorsaux des forces contondantes qui peuvent causer des dommages et/ou des ruptures.

### *Avis*

La base CF peut ne pas correspondre à tous les fauteuils. Veuillez consulter votre médecin ou fournisseur qui vous fournit l'équipement.

## 8.2 Tests des utilisateurs

Il est important que le client soit pleinement conscient de l'installation, de la façon de l'utiliser, et de ce qui peut être réglé afin d'acquérir autant que possible la mobilité. En tant que revendeur, procéder comme suit :

- Expliquer et montrer au client comment vous avez exécuté l'installation, et expliquer la fonction de la quincaillerie.
- Si nécessaire, régler la quincaillerie à la position appropriée.
- Expliquer au client, les problèmes potentiels et la façon de les résoudre.

**⚠ ATTENTION** Ne pas utiliser les supports dorsaux ADI dans le véhicule durant le transport.

## 8.3 Conditions d'utilisation

La quincaillerie ADI est destinée à être utilisée telle installée par le concessionnaire, selon les instructions d'installation dans ce manuel.

- Les conditions d'utilisation prévues sont communiquées par le revendeur ou le technicien de maintenance à l'utilisateur et/ou préposé lors de la première utilisation.
- Si les conditions d'utilisation changent considérablement, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien qualifié afin d'éviter une usure excessive déchirure ou des dommages involontaires.

## 9.1 Nettoyage

- Utiliser un chiffon doux pour nettoyer la coque arrière.
- Laver à la main la housse en mousse avec de l'eau savonneuse ou un détergent doux et laisser sécher.
- La housse de mousse NE devrait PAS se mouiller.

**⚠ MISE EN GARDE**

Ne pas laver à des températures au-dessus de 70 °C (160 °F).

**⚠ ATTENTION**

L'institution DOIT nettoyer et désinfecter le produit entre plusieurs usages de patients.

**⚠ MISE EN GARDE**

Ne pas laver ou sécher à la machine.

## 9.2 Désinfection

- Essuyer doucement avec un chiffon imbibé d'un désinfectant ménager.
- Laisser la mousse sécher entièrement à l'air.

**⚠ MISE EN GARDE**

Ne pas immerger la mousse dans de l'eau.

**⚠ ATTENTION**

Toujours vérifier toute la quincaillerie pour s'assurer qu'elle est fixée avant d'utiliser les bases de fauteuils CF.

**⚠ MISE EN GARDE**

250 lb (113,40 kg) limite de poids de l'utilisateur.

*Avis*

L'altération d'un support dorsal ADI en aucune façon et/ou une mauvaise installation annulera la garantie.



Stealth Products, LLC • [info@stealthproducts.com](mailto:info@stealthproducts.com) • [www.stealthproducts.com](http://www.stealthproducts.com)  
+1(800) 965-9229 | +1(512) 715-9995 | 104 John Kelly Drive, Burnet TX 78611

Date de révision, 2015-11-20