


Stealth Products


Quincaillerie de montage pour l'entraînement alternatif

Installation rapide

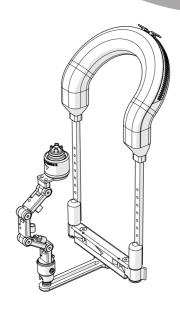

IDCH

Harnais de contrôle i-Drive

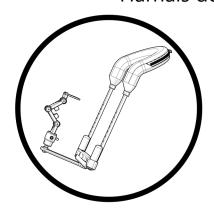

Consignes d'installation pour les produits

Stealth: IDCH- (P, S, M, L)

Compatible avec les manettes

de Stealth: | IDPMP-1, IDPMP-9

mo-Vis': IDM-MICRO-9, IDM-MULTI-9

Engagement de Stealth

1.1

Les produits de Stealth visent la satisfaction du client à 100%. Votre entière satisfaction est importante. Veuillez nous contacter avec vos commentaires ou modifications suggérées qui permettront d'améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos produits de notre quincaillerie d'escamotage. Vous pouvez nous joindre à l'adresse:



Stealth Products, LLC

104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Téléphone: (512) 715-9995 Sans frais: 1(800) 965-9229
Télécopieur: (512) 715-9954 Sans frais: 1(800) 806-1225
info@stealthproducts.com www.stealthproducts.com



MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Allemagne



Date d'installation:	
Concessionnaire:	
Cachet du concessionnaire:	
Cachet du concessionnaire:	

Étiquettes de mise en garde

2.1

Les mises en garde sont incluses pour la sécurité de l'utilisateur, du client, de l'opérateur et de la propriété. Veuillez lire et comprendre ce que les mots indicateurs **SÉCURITÉ**, **AVIS, ATTENTION, MISE EN GARDE** et **DANGER** signifient, comment ils pourraient affecter l'utilisateur, ceux autour de l'utilisateur et la propriété.

▲ DANGER	identifie une situation imminente qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , la mort , et des dommages matériels .
Å MISE EN GARDE	identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , la mort , et des dommages matériels .
ATTENTION	identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures mineures à modérées , et des dommages matériels .
AVIS	identifie des informations importantes qui ne sont pas liées à des blessures, mais à des dommages matériels potentiels.
SÉCURITÉ	indique les étapes ou les instructions pour des pratiques sûres, des rappels de procédures de sécurité, ou des équipements de sécurité importants qui pourraient être nécessaires.

Responsabilité limitée

2.2

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les dommages matériels pouvant découler du défaut de l'utilisateur ou d'autres personnes à suivre les recommandations, les mises en garde et les instructions contenues dans ce manuel.


Tests 2.3

La configuration et conduite initiales doivent être effectuées dans un espace ouvert sans obstacles jusqu'à ce que l'utilisateur soit parfaitement en mesure de conduire en toute sécurité.

Le harnais de contrôle i-Drive et la manette devraient être testés par les fournisseurs de soins et l'utilisateur final et adaptés spécifiquement à leurs besoins.


1.0	Satisfaction du client	i
	1.1 Engagement de Stealth	i
2.0	Mises en garde	ii
	2.1 Étiquettes de mise en garde	ii
	2.2 Responsabilité limitée	ii
	2.3 Tests	ii
3.0	Table des matières	ii
4.0	Table des matières	1
	4.1 Quincaillerie de montage	1
	4.2 Outils de montage	2
5.0	Consignes d'installation	3
	5.1 Installation de la manette Multi / IDPMP	3
	5.2 Installation de la manette Micro	4
6.0	Fonctionnement	6
	6.1 Ajout / suppression du maillon	6
	6.2 Réglage de la hauteur	7
	6.3 Réglage du maillon pivotant	8
	6.4 Réglage du support de la manette	9
	6.5 Réglage latéral	10
	6.6 Réglage de la profondeur	10
	6.7 Remplacement de la courroie IDCH	11
	6.8 Retrait du collier	13
7.0	Garantie	14
	7.1 En cas de défaillance du produit	14
8.0	Remarques	a

Pièces de la quincaillerie de montage

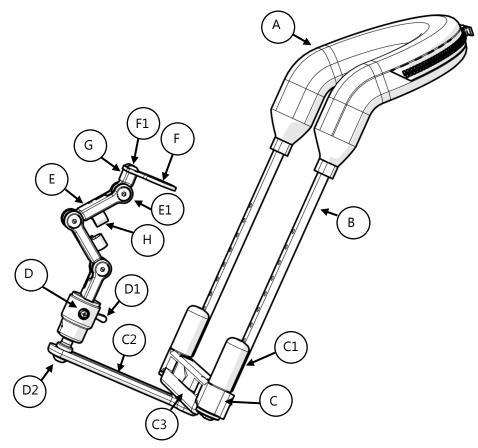

	Description		
Α	Collier		
В	BRAS IDCH		
С	Loquet pour le IDCH	C1	Réglage de la hauteur du loquet
		C2	Rail à profondeur réglable
		C3	Réglage latéral du rail
D	Maillon pivotant pour IDCH D1	D1	Poignée de réglage de la
		rotation	
		D2	M6 Screw
E	Maillon Niño pour IDCH	E1	M5X.8X20 MM FHS (3)
F	Support de manette	F1	M5X.8X6 MM BHS (2)
G	Maillon Niño pour le support		
н	Pince à canne de 1 po		


Outils de montage de la quincaillerie

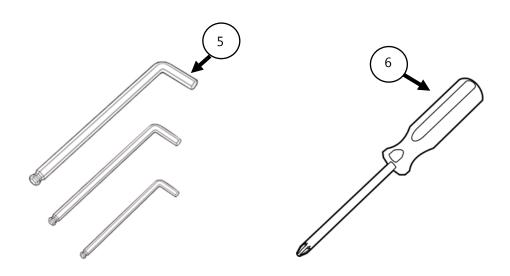

Outils		Description	
5	Poignée en T ¹	Poignée en T de 2 mm	
		Poignée en T de 3mm	
		Poignée en T de 4mm	
6	Tournevis Phillips	Petit	

Installation de la manette Multi / IDPMP

5.1

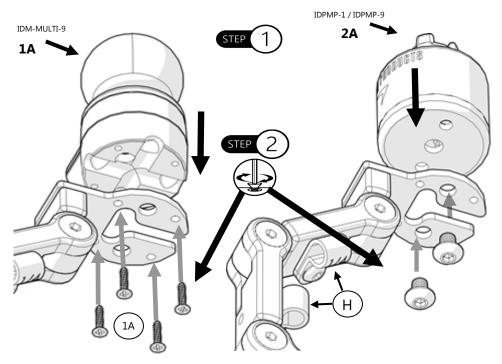

- * Les ports USB sur le côté droit du client orientés vers l'avant. Configuration standard.
- * Orienter la fossette sur le dessus du boîtier, le plus éloigné du client et orientée vers l'avant.

1A	Montage de la manette Multi	M4 x .7x10mm PHS (included in IDM-Muti-9 accessory pack).	2A	Montage de la manette IDPMP-1 / IDPMP-9	10-32 x 1/4 BHS (2)
	Tournevis Phillips	Petit		Poignée en T ¹	Poignée en T de 2 mm


- **Étape 1:** placer la manette Multi ou IDPMP en haut du support de la manette. Faire correspondre les trous sur la base de la manette avec les trous du le support.
- **Étape 2:** sécuriser la manette au support à travers les trous correspondants en insérant les vis fournies.

Étape 3: sécuriser le cordon d'alimentation avec les pinces de 1/4 po (H).

A MISE EN GARDE


s'assurer que le cordon d'alimentation de la manette est acheminé à travers la découpe de

Installation de la manette Micro levier

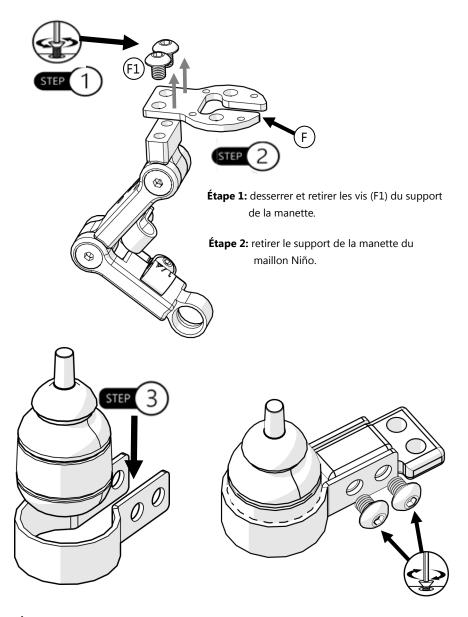

Étape 3: desserrer légèrement les vis M5 x 0,8 x 6 mm BHS et glisser la manette Micro à travers la sangle. Serrer les vis avec une poignée en T de 3 mm.


^{*}Pour la configuration standard, orienter la flèche sur la face inférieure de la manette, vers la direction opposée au client

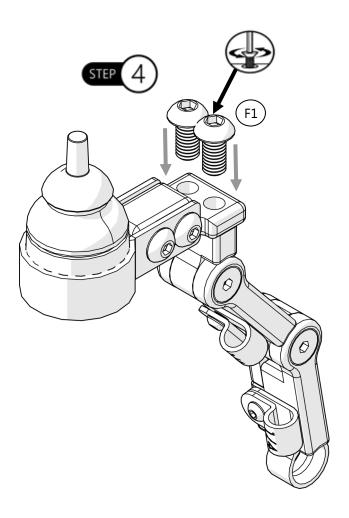

Étape 4: fixer la sangle du support de la manette au maillon Niño avec les vis (F1) et serrer avec la poignée en T de 3 mm.

Ajout/suppression du maillon

6.1

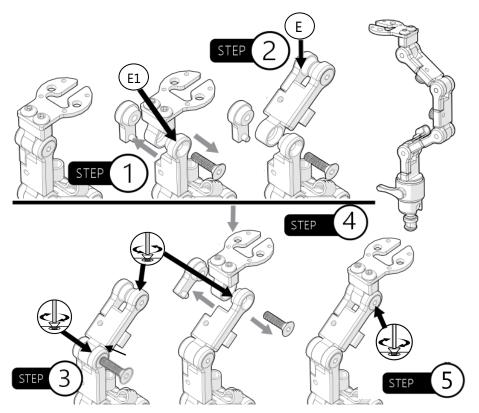

Si une hauteur supplémentaire est nécessaire:

- **Étape 1:** repérer la vis du maillon (E1) sur le maillon supérieur. Retirer la vis e M5 x 0,8 x 20 mm FHS à partir du maillon en détachant le support de la manette et l'écrou du maillon.
- Étape 2: aligner les trous sur le maillon et ajouter le maillon IDCH-Link (E) à l'extrémité ouverte.
- Étape 3: insérer la vis du maillon (E1) et serrer avec une poignée en T de 3 mm.
- Étape 4: retirer la vis de la partie supérieure du nouveau maillon.
- **Étape 5:** ajouter le support de la manette et l'écrou du maillon, en alignant tous les trous. Insérer la vis et serrer.


ATTENTION

ne pas trop serrer les vis. Cela pourrait foirer les vis de la manette, ce qui peut causer une perte de contrôle efficace par le client.

Réglage de la hauteur

6.2

Ajouter des maillons pour régler la hauteur avant de déterminer si les bras doivent être coupés. S'il n'existe aucune autre option, suivez les étapes ci-dessous.

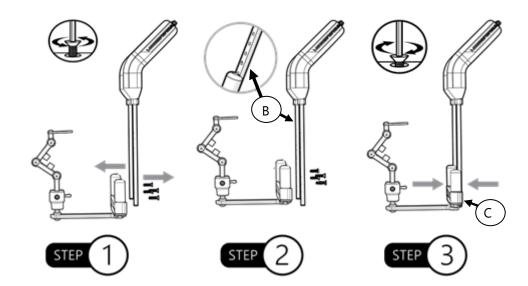

Étape 1: desserrer et retirer la vis M3 x 0,5 x 12 mm FHS avec la poignée en T de 2 mm. Déterminer la hauteur correcte du support qui est appropriée pour l'utilisateur.

- **Étape 2:** une fois que la hauteur souhaitée a été déterminée, couper les bras (B). Les réglages de la hauteur des bras ne doivent être effectués qu'en incréments de 1/2 po.
- **Étape 3:** enclencher les bras dans le loquet (C). En utilisant la poignée en T de 2 mm, serrer la vis M3 x 0,5 x 12 mm FHS en place.

SÉCURITÉ

les réglages doivent toujours être effectués par un technicien qualifié.

AVIS


couper les bras ne devrait être fait qu'en dernier recours. Les coupes sur les bras doivent être effectuées sur le trou en dessous de l'emplacement de montage souhaité. S'assurer que la coupe est effectuée à travers le milieu du trou.

↑ ATTENTION

lisser tous les bords tranchants, après avoir terminé de couper les bras.

Réglages du maillon pivotant

6.3

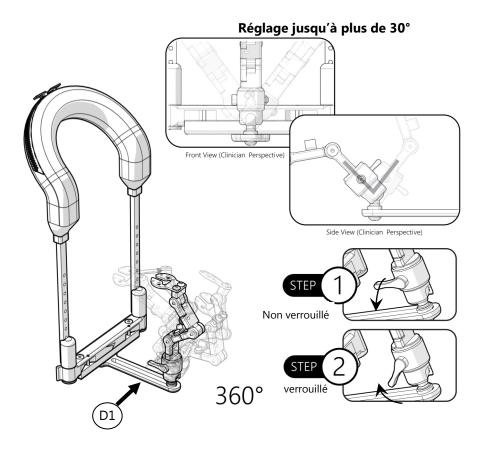

Étape 1: tourner la poignée (D1) vers le bas pour déverrouiller et régler.


Étape 2: orienter à l'angle souhaité selon les besoins du client.

Étape 3: tourner la poignée (D1) vers le haut pour verrouiller en place.

Réglage du support de la manette

6.4

Pour régler l'angle du support de la manette Multi ou IDPMP:

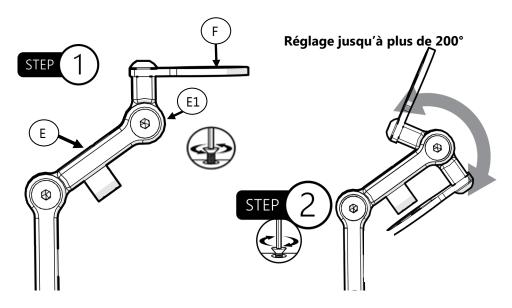


Étape 1: desserrer la vis (E1) sur l'écrou du maillon Niño (E).

Étape 2: régler le support de la manette (F) à l'angle souhaité et serrer la vis (E1) avec la poignée en T de 3 mm.

 \triangle **ATTENTION** *ne pas trop serrer.*

Réglage latéral

6.5

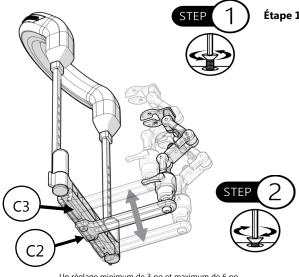


Étape 1: desserrer la vis M5 x 0,8 x 12 mm FHS sur le rail et positionner le rail latéral à l'emplacement souhaité sur le rail horizontal (C3). La plage de réglages dépend de la taille du harnais de contrôle.


Un réglage minimum de 3 po et maximum de 6 po selon la taille du collier.

Étape 2: serrer les vis lorsque le rail est à l'emplacement correct en utilisant la poignée en T de 3 mm.


Réglage de la profondeur

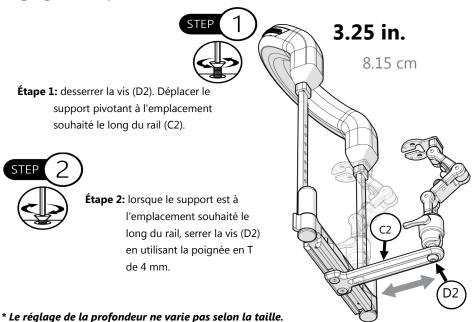



Remplacement de la courroie IDCH

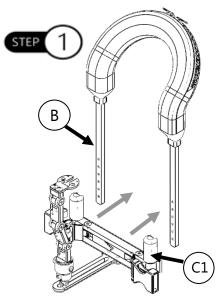


Étape 1: desserrer et retirer la vis M3 x 0,5 x 12 mm FHS avec la poignée en T de 2 mm. Séparer les bras (B) du loquet (C1).

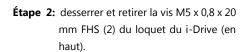

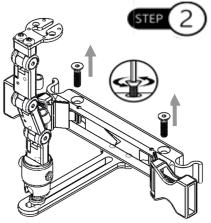

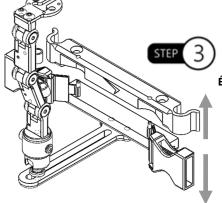


Étape 3: séparer le loquet du rail. Tirer tout droit vers le haut.

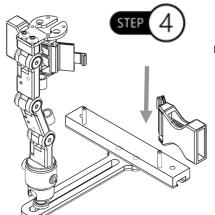

Étape 4: retirer les boucles hors des broches.

Remplacer les nouvelles boucles en glissant les sangles de 3/8 po sur les broches. Faire correspondre les trous du rail avec les trous du loquet et enclencher ensemble.

Étape 5: tirer légèrement sur la boucle femelle pour assurer que les sangles sont bien accrochées à la goupille élastique fendue. Insérer la vis M5 x 0,8 x 20 mm FHS (2) et serrer.

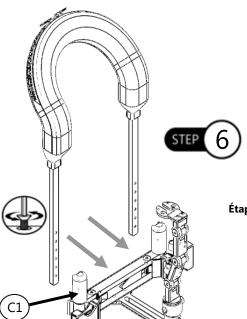


Étape 6: enclencher les bras dans le loquet (C1). En utilisant la poignée en T de 2 mm et serrer les vis M3 x 0,5 x 12 mm FHS en place.

Retrait du collier 6.8

Le rail peut être libéré du collier (perspective du client).

Trois (3) différentes options sont disponibles pour retirer les bras du loquet; vers la gauche, vers la droite, ou retrait complet.

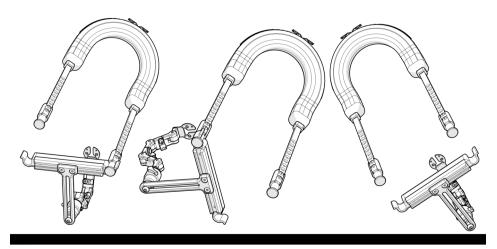

Retrait vers la gauchepivoter vers le côté droit du client Retrait vers la droite pivoter vers le côté gauche du client

Retrait complet

Étape 1: pour votre sécurité, déboucler la ceinture du collier.

Étape 2: choisir la direction pour libérer les bras du loquet.

Étape 3: tenir fermement le loquet et le bras.

Étape 4: tirer le loquet loin du client.

Étape 5: fixer et tourner le loquet.

Étape 6: retirer d'autour du cou.

Garantie 7.0

Les coussins/housses sont conçus et fabriqués selon les normes les plus élevées. Nos coussins/housses sont garantis exempts de défauts de matériau et de main-d'œuvre pour une période de 24 mois. En cas de défaut de matériau ou de main-d'œuvre, Stealth Products réparera ou remplacera, à sa discrétion, le coussin/housse du produit. Cette garantie ne couvre pas les coussins/housses ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'abus par l'utilisateur et jugé comme tel par Stealth Products, LLC.

Les réclamations et les réparations devraient être traitées par le fournisseur de Stealth Products le plus proche

Personne n'est autorisé à modifier, à prolonger, ou à renoncer aux garanties de Stealth Products, LLC. Stealth Products garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de main-d'œuvre:

Matériel: 5 ans

Composants électroniques: 3 ans

Limitations

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui nécessitent un remplacement en raison de l'usure normale:

- Revêtement extérieur.
- Revêtement intérieur.
- Des circonstances indépendantes de la volonté de Stealth.
- La main-d'œuvre, les appels de service, les frais d'expédition et autres frais engagés pour la réparation du produit, sauf autorisation expresse, PRÉALABLE, par Stealth Products, LLC.
- Les réparations et/ou les modifications apportées à une pièce sans l'accord spécifique de Stealth.

Les exclusions comprennent également des composants présentant des dommages causés par:

L'exposition à l'humidité

En cas de défaillance du produit

En cas de défaillance du produit couverte par notre garantie, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous:

- 1. Appelez Stealth au +1 (512) 715-9995 ou sans frais au + 1-800-965-9229.
- Demandez au service des retours de vous fournir un numéro d'autorisation de retour (NAR) et suivez les instructions du service des retours ou de la documentation.

Remarques	8.0





Stealth Products, LLC. • info@stealthproducts.com • www.stealthproducts.com +1(800) 965-9229 | +1(512) 715-9995 | 104 John Kelly Drive, Burnet TX 78611

P132D407R1