


# ISTRUZIONI DI BASE

---

## Euro Seat 2

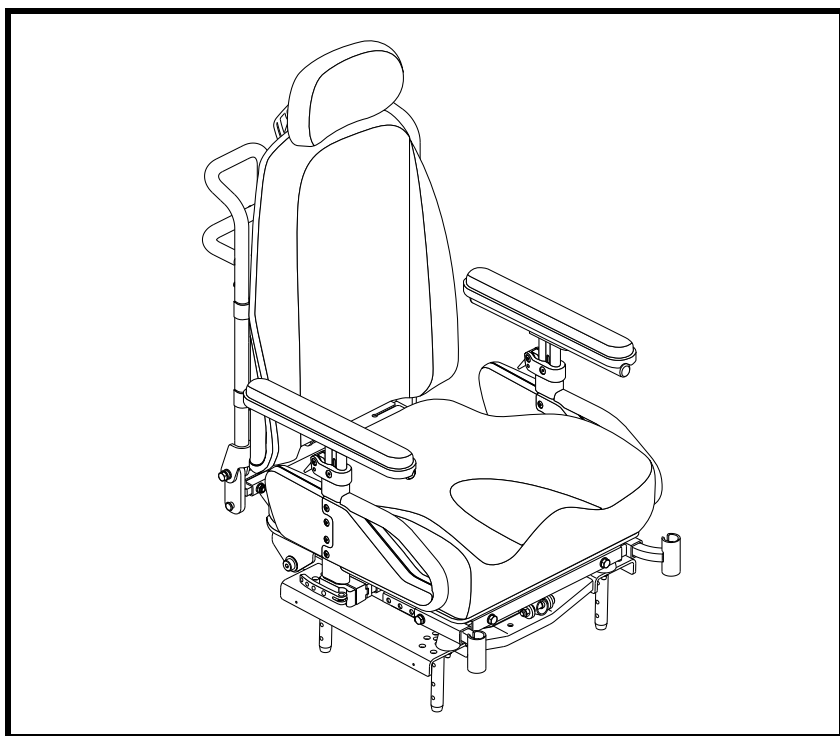

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products Corp.

# DIRETTIVE PER LA SICUREZZA



**AVVERTENZA!** L'impostazione iniziale di questo prodotto deve essere eseguita da un fornitore autorizzato Pride o da un tecnico qualificato, che dovrà osservare tutte le procedure descritte nel presente manuale.

I simboli riportati di seguito vengono utilizzati nel presente manuale e sulla carrozzina per identificare avvertenze e informazioni importanti. È molto importante leggerli e comprenderli completamente.



**AVVERTENZA!** La mancata osservanza delle procedure previste può provocare lesioni alle persone, danni ai componenti o malfunzionamento (simbolo nero su triangolo giallo con bordo nero).



**OBBLIGATORIO!** Queste azioni devono essere eseguite come descritto. La mancata esecuzione delle azioni obbligatorie può causare lesioni alle persone e/o danni alle apparecchiature (simbolo bianco su punto blu con bordo bianco).



**VIETATO!** Queste azioni sono proibite. Non devono mai essere eseguite e per nessun motivo. L'esecuzione di un'azione proibita può causare lesioni alle persone e/o danni alle apparecchiature (simbolo nero con cerchio rosso e barra rossa).

*NOTA: Il presente manuale per l'utente è redatto sulla base delle ultime specifiche tecniche e sulle informazioni del prodotto, disponibili al momento della pubblicazione. Pride si riserva il diritto apportare modifiche qualora fossero necessarie. Qualsiasi modifica apportata ai nostri prodotti può generare lievi differenze tra le illustrazioni e le spiegazioni contenute nel presente manuale ed il prodotto acquistato. La versione più recente del presente manuale È disponibile sul nostro sito web.*



Copyright © 2011  
Pride Mobility Products Italia S.r.l.  
INFMANU4133/Rev A/February 2011

# INDICE

<b>ETICHETTARE LE INFORMAZIONI</b> .....	4
<b>INTRODUZIONE</b> .....	5
<b>L'EURO SEAT 2</b> .....	6
<b>PRECAUZIONI</b> .....	8
<b>REGOLAZIONI DI COMODITÀ</b> .....	9
<b>POSIZIONARE LA CENTRALINA</b> .....	18
<b>CINTURA DI POSIZIONAMENTO</b> .....	20
<b>ACCESSORI ELETTRICI</b> .....	22
<b>CURA E MANUTENZIONE</b> .....	23
<b>GARANZIA</b> .....	23
<b>APPENDIX I - SPECIFICHE</b> .....	24

# ETICHELLARE LE INFORMAZIONI

## SIMBOLI DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

I simboli in basso sono utilizzati sul sistema di seduta per identificare le avvertenze, le attenzioni e le azioni proibite. È molto importante leggere e comprendere a fondo i simboli riportati.



**Leggere e seguire le informazioni contenute nel manuale per l'utente.**



**Se possibile, evitare l'esposizione a pioggia, neve, ghiaccio, sale ed acqua stagnante. Mantenere e conservare in un luogo pulito ed asciutto.**



**EMI-RFI Questo prodotto è stato collaudato ed approvato con un livello di immunità pari a 20 V/m.**



**Fissare correttamente il cavo della centralina onde evitare che possa incastrarsi nelle ruote, nel telaio o che si possa danneggiare nel passaggio attraverso le porte.**



**Indica che il sistema di seduta testato e approvato è conforme ai requisiti ISO 7176-19.**

## INTRODUZIONE

BENVENUTI alla Pride Mobility Products (Pride). Il prodotto acquistato unisce componenti allo stato dell'arte con **sicurezza**, comfort e stile. Siamo certi che le caratteristiche del design possano offrire le comodità attese nelle attività quotidiane. La comprensione dell'uso e della cura **sicuri** del prodotto garantiranno anni di funzionamento e servizio senza problemi.

Prima di utilizzare il prodotto **leggere ed osservare** tutte le istruzioni, le avvertenze e le note contenute nel presente manuale e nei manuali aggiuntivi sulle centraline applicate, sui poggiapiedi e sui sistemi di seduta. La Vostra **sicurezza** dipende dal buon senso dell'utente, del fornitore, dell'assistente o del professionista sanitario.

Il presente manuale deve essere usato unitamente al manuale per l'utente fornito con la carrozzina. Se il manuale contiene informazioni di difficile comprensione, oppure in caso sia necessaria assistenza per l'installazione o l'uso, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato Pride. **La mancata osservanza delle istruzioni, avvertenze e note contenute nel presente manuale ed applicate sul prodotto Pride può comportare lesioni alle persone e/o danni al prodotto ed annullare la garanzia del prodotto Pride.**

## CONTRATTO D'ACQUISTO

Accettando la fornitura di questo prodotto, Vi impegnate a non cambiare, modificare o alterare il prodotto, né a rimuovere o rendere inattivi o insicuri dispositivi di protezione, schermi o altre funzioni di sicurezza del prodotto; e a non evitare, rifiutare o dimenticare di installare i kit di adattamento forniti regolarmente dalla Pride per migliorare o preservare l'uso sicuro del prodotto.

## COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Siamo lieti di ricevere domande, commenti e suggerimenti in merito a questo manuale. Desideriamo anche conoscere la Vostra opinione rispetto alla sicurezza e all'affidabilità della nuova Carrozzina elettrica e all'assistenza ricevuta dal rappresentante autorizzato Pride.

Si prega di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo in modo da tenerVi al corrente delle informazioni importanti in merito alla sicurezza, ai nuovi prodotti e alle nuove opzioni che possono incrementare la possibilità di utilizzo della Vostra Carrozzina.

**NOTA: in caso di smarrimento della scheda di registrazione del prodotto o del presente manuale per l'utente, è possibile contattare Pride che sarà lieta di inviarne immediatamente uno nuovo.**

### **Il mio rivenditore autorizzato Pride è:**

Nome: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Numero di telefono: \_\_\_\_\_

Data dell'acquisto: \_\_\_\_\_

### **L'EURO SEAT 2**

L'Euro Seat 2 è un esclusivo sistema di seduta specificamente studiato per la carrozzina elettrica Pride. È completamente regolabile per soddisfare le necessità individuali dell'utente ed è montato su una base elettronica Pride per offrire la massima manovrabilità.

La confezione dell'acquirente include fissanti a gancio e a cinghia per unire il cuscino alla base del sedile. Questi dispositivi di fissaggio non sono previsti per l'uso su cuscini con materiale antiscivolo, poiché potrebbero danneggiare il cuscino del sedile.

La **figura 1** illustra i componenti del l'Euro Seat 2. Utilizzare questo diagramma per conoscere la funzione e l'ubicazione di ogni componente prima di usare l'Euro Seat 2.

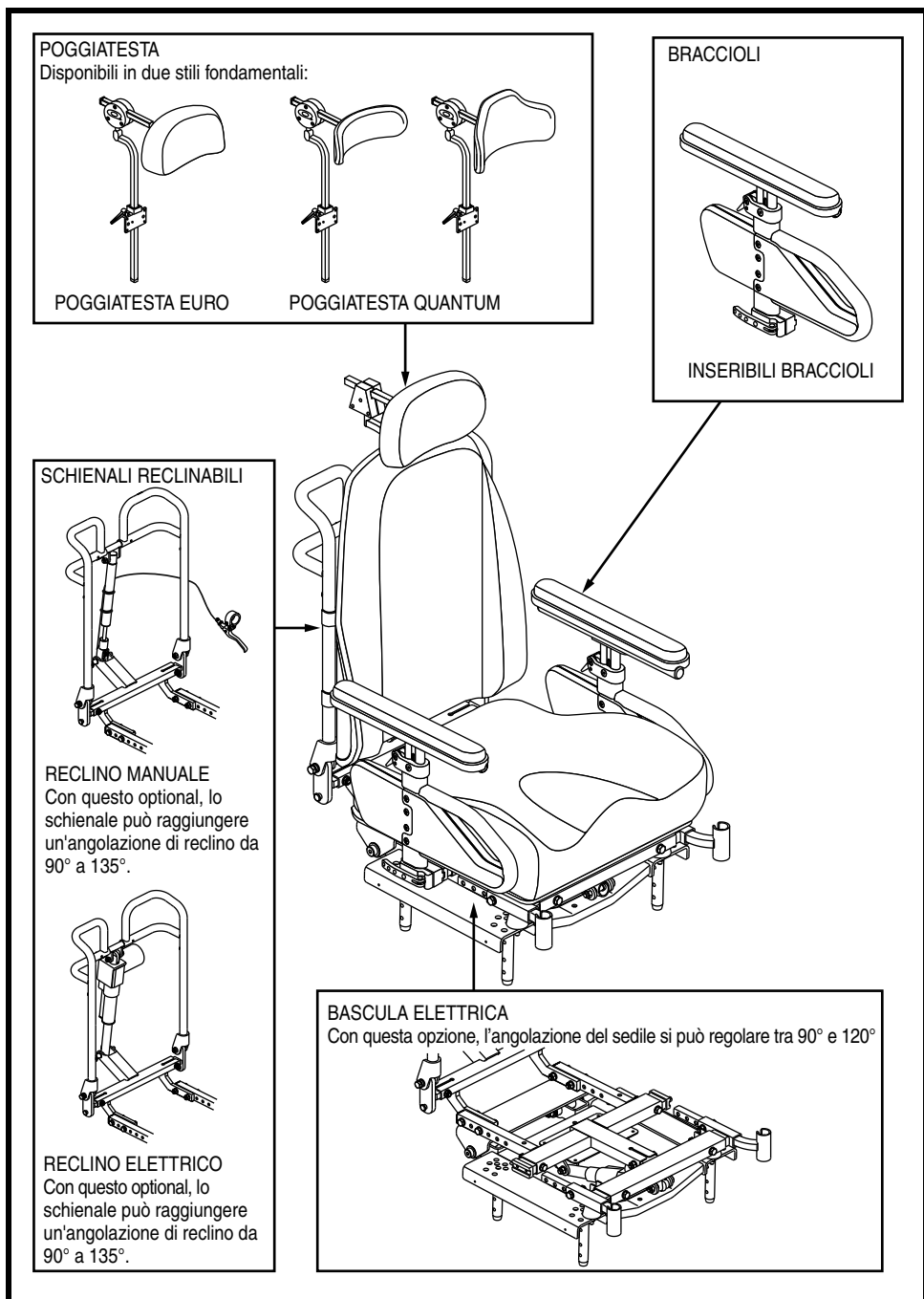


Figura 1. Componenti Euro Seat 2

## PRECAUZIONI

Prima di usare l'Euro Seat 2, leggere quanto segue. Le presenti linee guida servono all'utente per aiutarlo nell'uso sicuro del sistema di seduta.

- Spegnerne l'alimentazione elettrica prima di sedersi sull'Euro Seat 2.
- Farsi sempre aiutare durante il trasferimento sull'Euro Seat 2.
- Seguire tutte le procedure ed osservare le avvertenze illustrate nel manuale per l'utente della carrozzina elettrica.

**AVVERTENZA! Se le parti del sistema di seduta Euro Seat 2 si allentassero, riferire immediatamente il problema al rivenditore autorizzato Pride.**

**ATTENZIONE! La Pride sconsiglia l'utilizzo dell'Euro Seat 2 come sistema di seduta in un veicolo a motore. L'utente dovrà essere trasferito sul sedile del veicolo a motore ed indossare la cintura di sicurezza predisposta se disponibile. Se il vostro ausilio è dotato di un apposito sistema di sicurezza, vogliate consultare l'informativa aggiuntiva del manuale sulla sicurezza fornitavi con l'ausilio .**



**ATTENZIONE! Non superare la portata massima indicata nel manuale della vostra carrozzina o 136 kg quest'ultimo valore è inferiore.**

**ATTENZIONE! Temperature estreme potrebbero incidere sulle temperature di componenti dell'Euro Seat 2 e conseguentemente causare irritazioni cutanee. Impiegare la massima attenzione se la vostra carrozzina è stata utilizzata o immagazzinata in ambiente estremamente caldo o freddo.**

**ATTENZIONE! I cuscini a schiuma standard ed altro tipo di supporto simile non sono stati ideati per migliorare problematiche di pressione. Se soffrite o siete a rischio di piaghe, avrete bisogno di un sistema posturale antidecupito specifico e di un dispositivo per controllare la vostra postura. Consultare il vostro medico o fisioterapista per valutare se è necessario tale dispositivo per il vostro benessere.**



## REGOLAZIONI DI COMODITÀ

Esistono diverse regolazioni possibili per aumentare la comodità dell'Euro Seat 2, per esempio l'altezza e l'angolazione del sedile, la posizione dei braccioli e la posizione della centralina.

**AVVERTENZA! Il centro di gravità della Carrozzina elettrica è stato impostato in fabbrica in una posizione che soddisfa le necessità della maggioranza demografica degli utenti. Il fornitore autorizzato Pride ha valutato la Carrozzina elettrica ed effettuato le modifiche necessarie idonee ai requisiti specifici. Non modificare la configurazione della seduta senza prima contattare Pride Mobility Products Italia S.r.l. o il fornitore autorizzato Pride.**



**AVVERTENZA! Alcuni componenti della Carrozzina sono pesanti. Per sollevarli o trasportarli può essere necessaria assistenza. Consultare la tabella delle specifiche tecniche per il peso individuale dei componenti prima di smontare la carrozzina.**

**AVVERTENZA! Prima di eseguire regolazioni/riparazioni, rimuovere l'occupante della Carrozzina.**

**AVVERTENZA! Verificare che l'alimentazione della centralina sia spenta e che la carrozzina non sia in modalità di sblocco ruote prima di eseguire qualunque procedura di regolazione.**

**Per la regolazione di comodità può essere necessario quanto segue:**


- set chiavi esagonali metriche/standard
- chiave regolabile
- set prese e cricco metrici/standard

### Regolazione altezza e angolazione del sedile

Solitamente l'Euro Seat 2 è collegato ad una base elettrica con quattro torrette in acciaio. Sollevando le torrette è possibile modificare l'altezza del sedile. Sollevando o abbassando solo una serie di torrette del sedile (anteriore o posteriore), è possibile anche modificare l'angolazione della base del sedile.

**Per modificare l'altezza o l'angolazione del sedile:**

1. Rimuovere il perno di fissaggio da ciascuno dei quattro connettori di montaggio del sedile. **Vedere figura 2.**
2. Sollevare o abbassare ciascuna torretta del sedile sulla posizione desiderata. Per modificare l'angolazione, posizionare la torretta anteriore o posteriore più in alto o più in basso dell'altra.
3. Reinstallare il perno di fissaggio in ciascun connettore di montaggio del sedile.

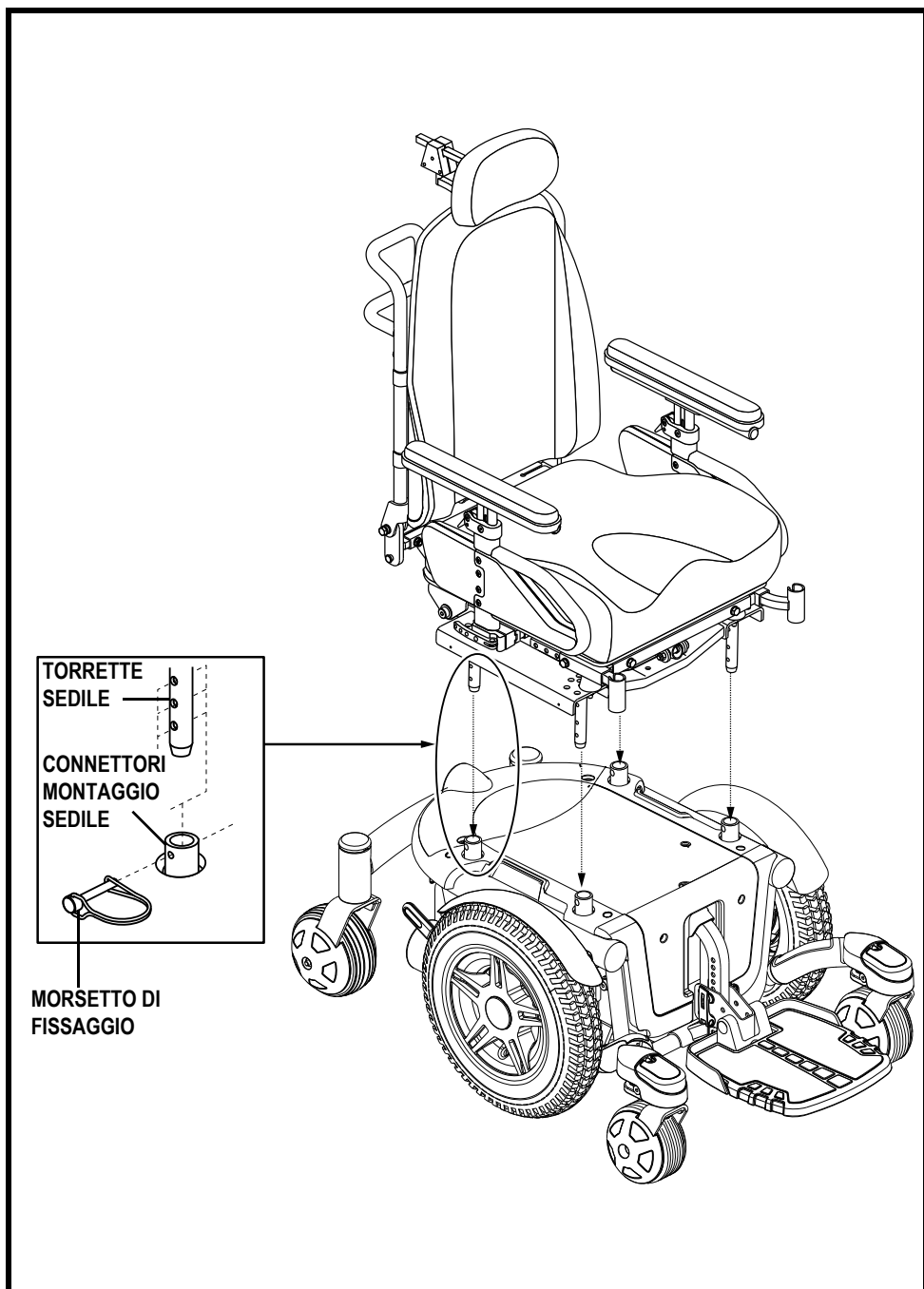


**Figura 2. Regolazione altezza e angolazione del sedile**

## Regolazione manuale schienale reclinabile


Il sedile può essere dotato di una leva di inclinazione manuale che consente di regolare l'angolazione dello schienale dalla posizione minima (90° dalla base del sedile) alla massima (135° dalla base del sedile). **Vedere figura 3 e 4.**

### Per regolare l'angolazione dello schienale:

1. Con la schiena appoggiata con forza allo schienale, schiacciare la leva manuale apposta montata sul bracciolo. **Vedere figura 3.**
2. Impostare lo schienale all'angolazione desiderata piegandosi in avanti o all'indietro.
3. Quando lo schienale è sull'angolazione desiderata, rilasciare la leva di reclino manuale.

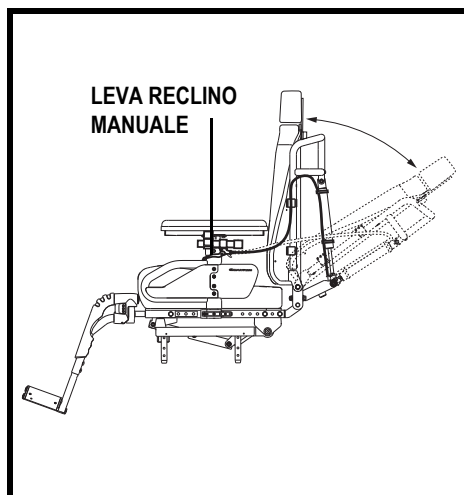

**Figura 3. Regolazione manuale del reclino dello schienale**

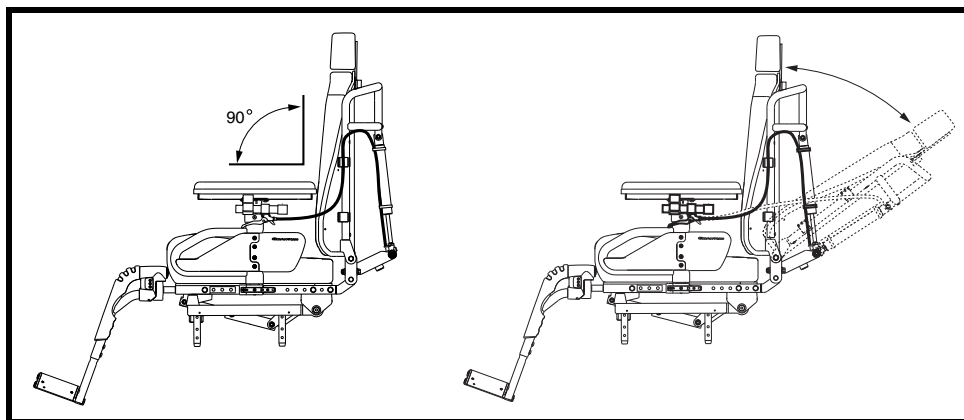

**Figura 4. Angolazione di inclinazione minima e massima**

## Regolazione angolazione del sedile (basculamento)

Il sedile può disporre di un meccanismo che consente di regolarne l'angolazione (profondità) da  $-5^{\circ}$  a  $+10^{\circ}$  in incrementi da  $2,5^{\circ}$ .

### Per modificare l'angolazione del sedile:

1. Rimuovere l'occupante della Carrozzina elettrica.
2. Estrarre il bullone di regolazione dell'angolazione del sedile. **Vedere figura 5.**
3. Regolare il sedile sull'angolazione desiderata.
4. Reinstallare il bullone di regolazione dell'angolazione del sedile.

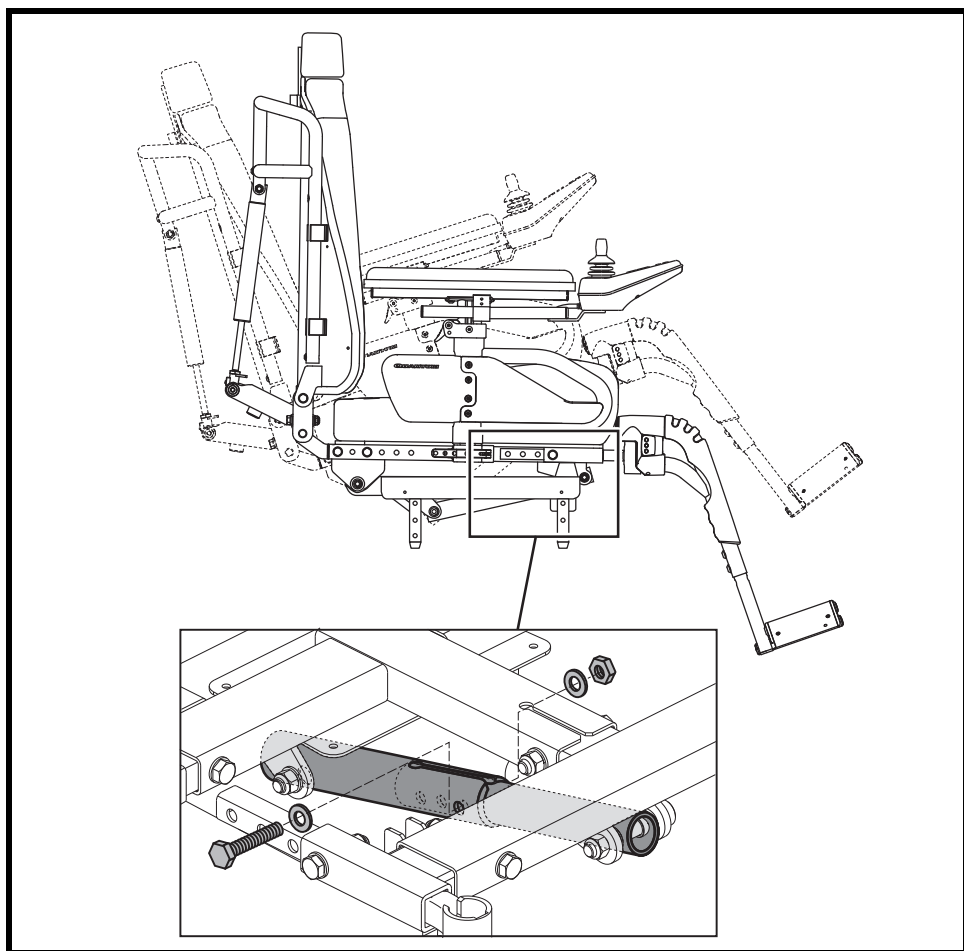



Figura 5. Regolazione angolazione del sedile (basculamento)

## Regolazione della larghezza del sedile

La larghezza del sedile è regolabile da 40,6 a 50,8 cm.

### Per regolare la larghezza del sedile:

1. Rimuovere il cuscino del sedile.
2. Allentare i fissaggi del supporto del bracciolo. **Vedere figura 6.**
3. Riposizionare il supporto del bracciolo sulla larghezza desiderata del sedile.
4. Stringere i componenti di fissaggio del bracciolo.
5. Regolare la larghezza dell'altro bracciolo se necessario.
6. Rimontare il cuscino del sedile.

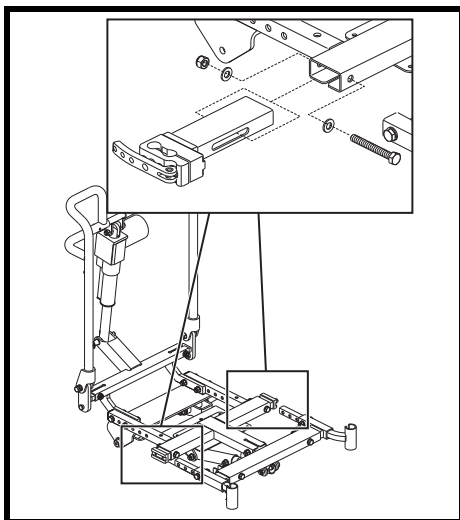


**Figura 6. Regolazione della larghezza del sedile**

## Regolazione della larghezza del poggiatesta

La larghezza del poggiatesta è regolabile da 40,6 a 50,8 cm.

### Per regolare la larghezza del poggiatesta:

1. Rimuovere il cuscino del sedile.
2. Allentare i fissaggi del supporto del poggiatesta. **Vedere figura 7.**
3. Riposizionare il supporto del poggiatesta sulla larghezza desiderata del sedile.
4. Stringere i fissaggi del supporto del poggiatesta.
5. Regolare la larghezza dell'altro poggiatesta se necessario.
6. Rimontare il cuscino del sedile.

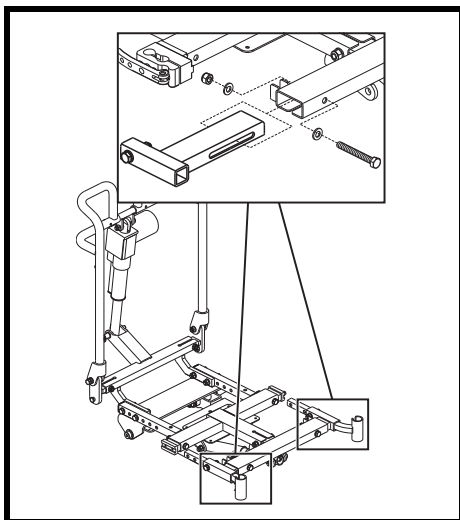

**Figura 7. Regolazione della larghezza del poggiatesta**

**AVVERTENZA!** Non tentare di sollevare o spostare la carrozzina o il sistema di seduta mediante le parti mobili, compresi braccioli, poggiatesta anteriori, cuscini, schienale, scocche o centralina. Per sollevare la carrozzina o il sistema di seduta, usare solamente componenti del telaio solidi e non rimovibili.




**ATTENZIONE!** Evitare di porre tutto il peso del corpo sui braccioli della Carrozzina o sistema di seduta e non usarli per sopportare pesi, per esempio durante il trasferimento. Questo tipo di uso può causare il ribaltamento della Carrozzina e la conseguente caduta.

**ATTENZIONE!** Il joystick e la staffa del joystick non sono elementi predisposti per il carico di pesi sulla vostra Carrozzina. Non utilizzare la staffa del joystick per portare dei carichi, come ad esempio nei trasferimenti/spostamenti. Tale utilizzo può causare danni a questi componenti, con conseguente caduta dalla Carrozzina e lesioni personali.

## Regolazione dell'altezza del bracciolo

Le regolazioni dell'altezza del bracciolo sono eseguibili sia nella parte superiore sia in quella inferiore. L'intervallo totale di regolazione dell'altezza è di 15,24 cm—da 27,94 a 43,18 cm. Questo intervallo si misura dal vassoio del sedile alla parte superiore del cuscinetto del bracciolo.

Le regolazioni dell'altezza della parte superiore non richiedono strumenti. L'intervallo di regolazione dell'altezza della parte superiore è di 7,62 cm in incrementi da 0,95 cm. L'intervallo di regolazione dell'altezza della parte inferiore è di 7,62 cm in incrementi da 2,54 cm.

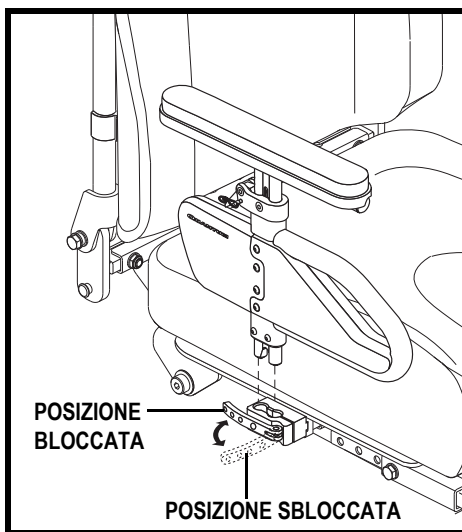

**Figura 8. Rimozione/Installazione bracciolo**

**Per rimuovere il gruppo dei braccioli:**

1. Ruotare la leva di blocco del bracciolo in avanti. **Vedere figura 8.**
2. Sollevare i braccioli.

**Per installare il gruppo dei braccioli:**


1. Posizionare il gruppo del bracciolo nel blocco corrispondente. **Vedere figura 8.**
2. Ruotare la leva di blocco del bracciolo all'indietro.

**Per regolare l'altezza della parte superiore:**


1. Se disponibile, estrarre il perno di blocco opzionale. **Vedere figura 9.**
2. Tirare il bracciolo verso l'alto per sollevarlo, oppure premere la leva di rilascio per abbassare il bracciolo all'altezza desiderata.
3. Se disponibile, reinserire il perno di blocco.
4. Ripetere l'operazione per l'altro bracciolo se necessario.

**Per regolare l'altezza della parte inferiore:**

1. Rimuovere le due viti a testa piatta dalla barra di regolazione. **Vedere figura 10.**
2. Sollevare o abbassare il bracciolo.
3. Allineare i fori del bracciolo.
4. Reinstallare le due viti a testa piatta nella barra di regolazione.
5. Ripetere l'operazione per l'altro bracciolo se necessario.

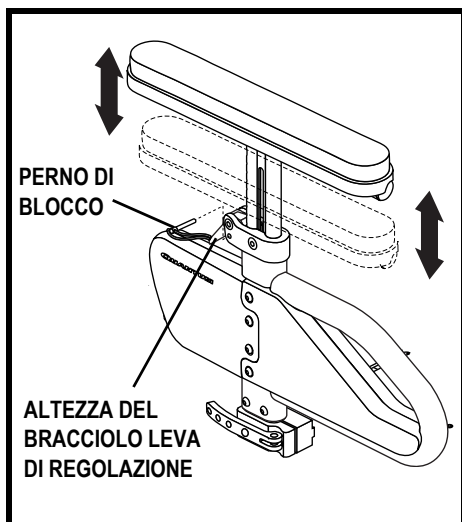

**Figura 9. Regolazione dell'altezza della parte superiore del bracciolo**

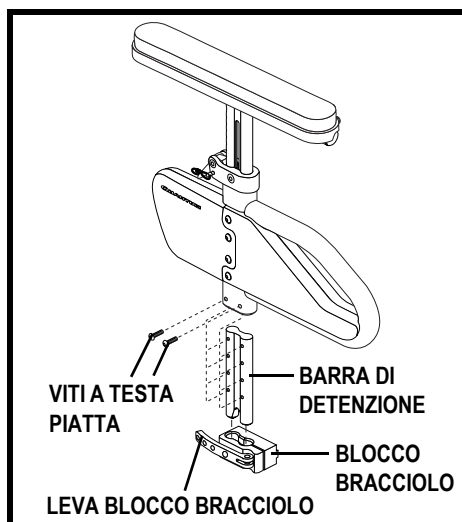

**Figura 10. Regolazione dell'altezza della parte inferiore del bracciolo**

## Regolazione del poggiatesta

Il sedile è dotato di un poggiatesta Euro o Quantum.

### Per regolare l'altezza del poggiatesta Euro:

1. Allentare la leva di blocco della staffa del poggiatesta. **Vedere figura 11.**
2. Spingere il poggiatesta su o giù sulla posizione desiderata.
3. Stringere la leva di blocco della staffa del poggiatesta per fissare il poggiatesta sulla posizione desiderata.


### Per regolare altezza, profondità o angolazione del poggiatesta:

1. Allentare le viti di regolazione che corrispondono alle posizioni desiderate. **Vedere figura 12.**
2. Posizionare il poggiatesta sulla posizione desiderata.
3. Stringere le viti di regolazione.

**NOTA:** Una volta eseguite le regolazioni, quando il poggiatesta è sulla posizione desiderata, verificare che tutti i componenti di fissaggio siano stretti.



**AVVERTENZA!** Non estendere l'altezza totale del poggiatesta oltre 17,78 cm oltre il braccio del poggiatesta stesso.

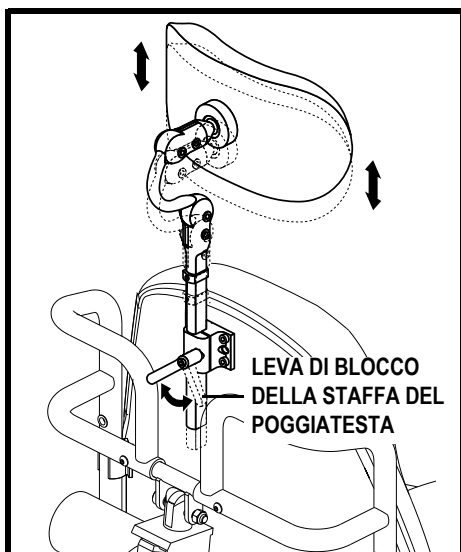

**Figura 11. Regolazione dell'altezza del poggiatesta Euro**



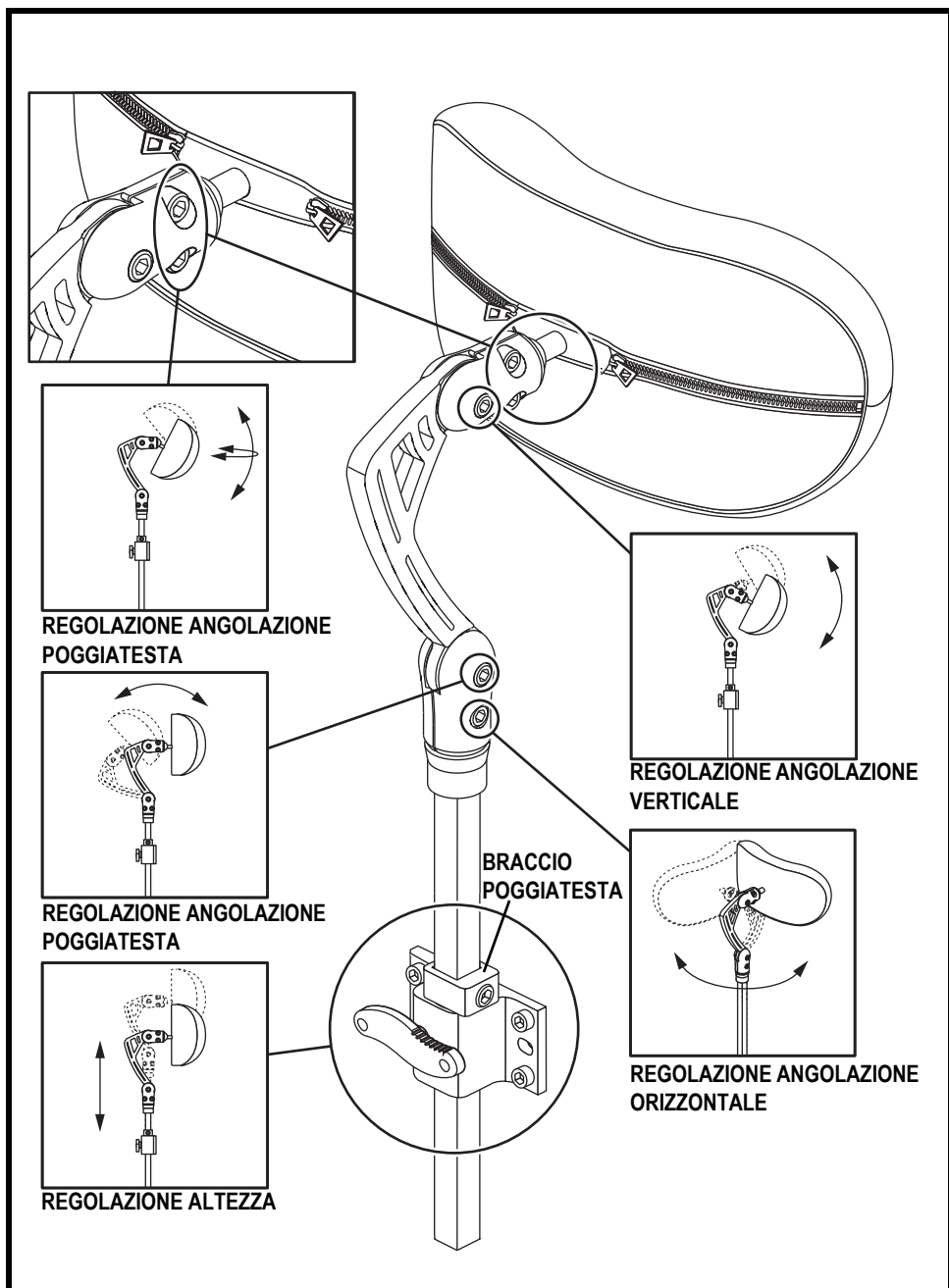


Figura 12. Regolazione dell'altezza del poggiatesta Quantum

## POSIZIONARE LA CENTRALINA

E' possibile posizionare la centralina sul bracciolo di destra o su quello di sinistra.




**OBBLIGATORIO! Prevenire i danni ai cavi della centralina! Evitare di posizionare i cavi della centralina verso l'esterno del cuscinetto del bracciolo. Dirigere i cavi sotto il bracciolo o verso l'interno del cuscinetto del bracciolo. Usare i punti di fissaggio corretti per impedire che il cavo resti impigliato nelle ruote motrici, incastrato nel sedile, o danneggiato attraverso le porte.**

*NOTA: La centralina si fissa mediante un blocco di montaggio, oppure secondo il montaggio illustrato nella figura 8. Seguire le istruzioni corrette illustrate in basso per modificare la posizione della centralina.*

Per modificare la posizione della centralina in un blocco di montaggio:


1. Scollegare l'alimentazione alla centralina.
2. Scollegare il connettore della centralina dalla base di alimentazione. Consultare il manuale della carrozzina.
3. Tagliare i ferma-cavo che unisce il cavo della centralina al bracciolo.
4. Allentare le viti di montaggio nel blocco di montaggio. **Vedere figura 13.**
5. Spostare il blocco di montaggio della centralina e la centralina all'altro bracciolo e stringere le viti di montaggio.
6. Usare i ferma-cavi per fissare il cavo della centralina e il cavo della leva di reclinamento manuale ai braccioli.
7. Portare il cavo della centralina davanti alla base di alimentazione e ricollegare la centralina. **Vedere figura 15.**

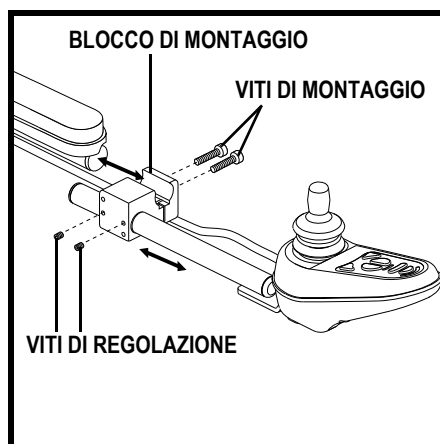


**Figure 13. Posizione della centralina - blocco di montaggio**

**Per modificare la posizione della centralina in un montaggio del tipo illustrato nella figura 8:**

1. Scollegare l'alimentazione alla centralina.
2. Scollegare il connettore della centralina dalla base di alimentazione. Consultare il manuale della carrozzina.
3. Tagliare i ferma-cavo che unisce il cavo della centralina al bracciolo.
4. Allentare le viti di regolazione nella morsetteria della figura 8, ubicate sul bracciolo. **Vedere figura 14.**
5. Estrarre la centralina dalla morsetteria allentata.
6. Allentare le viti di regolazione nella morsetteria sull'altro bracciolo.
7. Rimuovere il gruppo della leva del reclino manuale ed inserirlo nella morsetteria sul bracciolo opposto. **Vedere figura 3.**
8. Stringere le viti di regolazione per fissare il gruppo della leva del reclino manuale nel morsetto della figura 8.
9. Inserire la centralina nella morsetteria.
10. Stringere le viti di regolazione per fissare la centralina nel morsetto della figura 8.
11. Usare i ferma-cavi per fissare il cavo della centralina e il cavo della leva di reclino manuale ai braccioli.
12. Portare il cavo della centralina davanti alla base di alimentazione e ricollegare la centralina. **Vedere figura 15.**

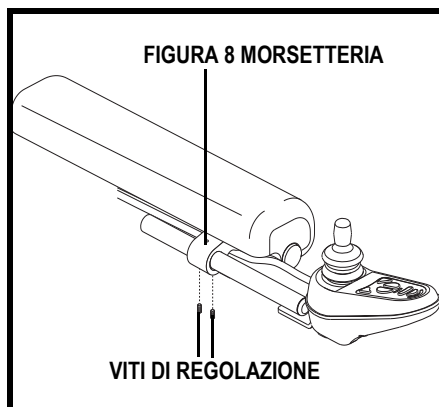

**Figura 14. Posizione della centralina - montaggio figura 8**

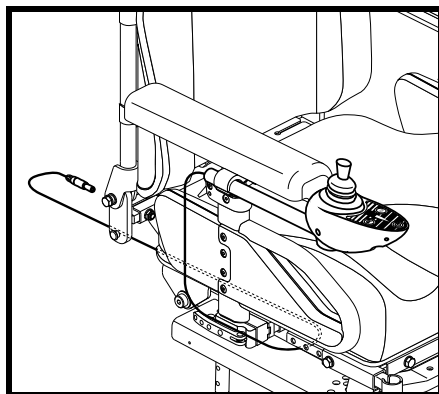

**Figura 15. Percorso del cavo**

**Per allontanare la centralina:**

1. Scollegare l'alimentazione alla centralina.
2. Allentare le viti di montaggio nel blocco di montaggio. **Vedere figura 13 o 14.**
3. Spostare la centralina dentro o fuori dal blocco di montaggio sulla posizione desiderata.
4. Stringere le viti di fermo per fissare la centralina.

**CINTURA DI POSIZIONAMENTO**

L'Euro Seat 2 può disporre di una cintura di posizionamento regolabile secondo la comodità dell'operatore. **Vedere figura 16.** La cintura di posizionamento è progettata per sostenere l'operatore in modo che non scivoli verso il basso o in avanti nel sedile e può essere regolata per maggiore comfort dell'operatore. La cintura di posizionamento non è prevista per essere usata come dispositivo di contenimento.



**AVVERTENZA! La cintura di posizionamento non è progettata per essere usata come la cintura di sicurezza di un veicolo a motore. Inoltre la Carrozzina non è idonea per essere utilizzata come sedile in un veicolo. Chiunque viaggi in un veicolo deve essere seduto correttamente ed indossare la cintura di sicurezza certificata dal produttore del veicolo stesso.**

**Montaggio cinture di sicurezza:**

1. Inserire la vite attraverso la guarnizione e la barra di montaggio sull'estremità della cintura di posizionamento. **Vedere figura 16.**
2. Installare la vite attraverso il distanziatore di acciaio, la rondella e quindi lo schienale, includendo il distanziatore grande di zinco.
3. Installare la rondella e il dado nel gruppo e quindi stringere il dado mediante due chiavi regolabili.
4. Ripetere i passaggi 1-3 per l'altro lato.

**Per regolare la cintura di posizionamento per il comfort dell'operatore:**

1. Una volta seduto, inserire la barra metallica su un lato della cintura nell'alloggiamento in plastica sul lato opposto fino al clic.
2. Tirare la fascia in eccesso attaccata alla barra di metallo fino a quando è salda, ma non stretta da risultare scomoda.

**Per rilasciare la cintura di posizionamento:**

1. Premere il meccanismo a pulsante sull'alloggiamento di plastica.

**OBBLIGATORIO! Prima dell'uso, accertare che la cintura di posizionamento sia adeguatamente fissata alla Carrozzina elettrica e che sia regolata secondo la comodità dell'operatore.**



**OBBLIGATORIO! Prima di usare la Carrozzina elettrica, verificare che la cintura di posizionamento non presenti parti allentate o danneggiate. Se si riscontra un problema, contattare lo rivenditore autorizzato Pride per assistenza e riparazioni.**

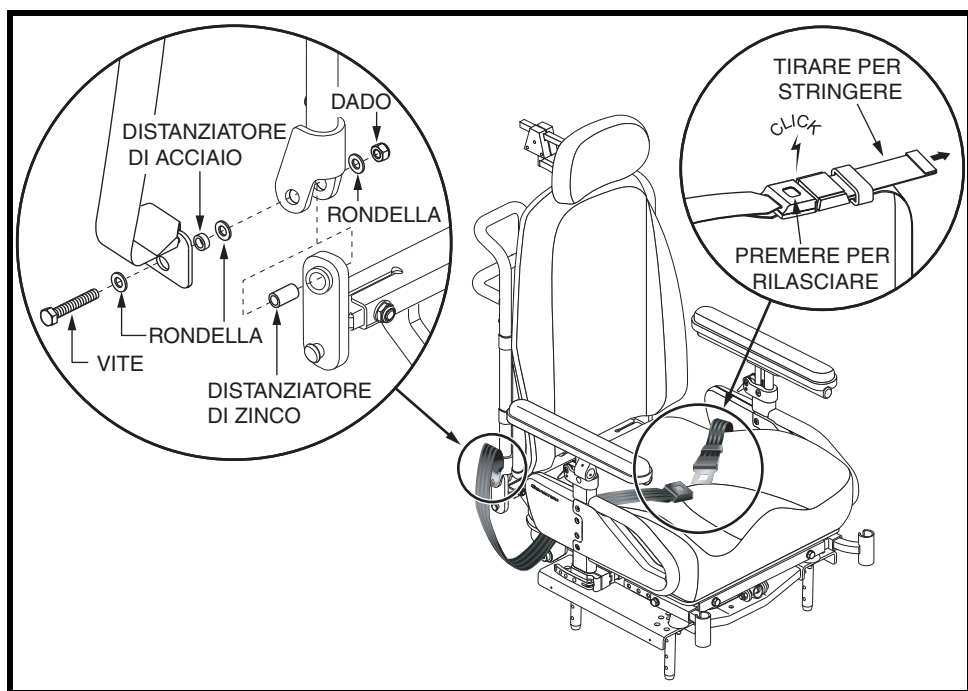


Figura 16. Regolazione della cintura di posizionamento

## ACCESSORI ELETTRICI

L'Euro Seat 2 può disporre di posizionamento elettrico opzionale, per esempio basculazione elettrica, reclino elettrico e poggiapiedi anteriori elettrici. Consultare le informazioni supplementari della centralina fornite con il manuale della carrozzina per le istruzioni sulle modalità d'uso degli accessori elettrici. **Vedere figure 17 e 18** per l'ampiezza della basculazione e reclino elettrico.

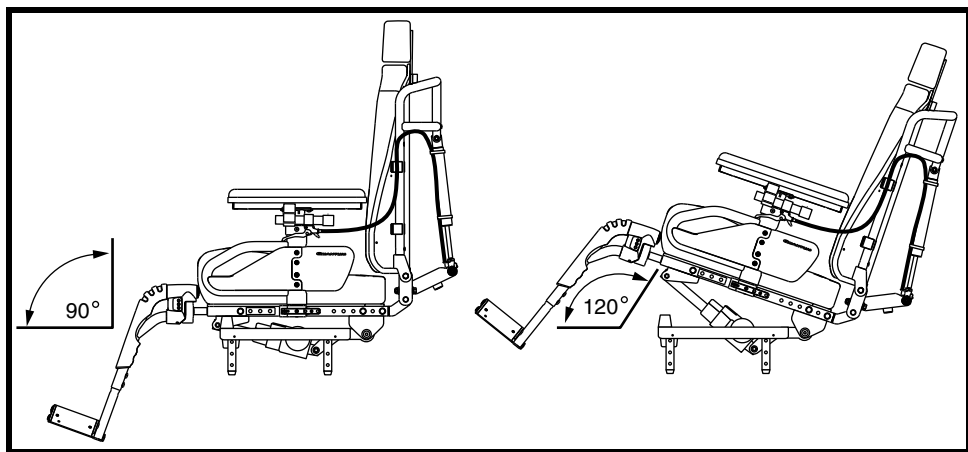


Figura 17. Basculazione elettrica Euro Seat 2

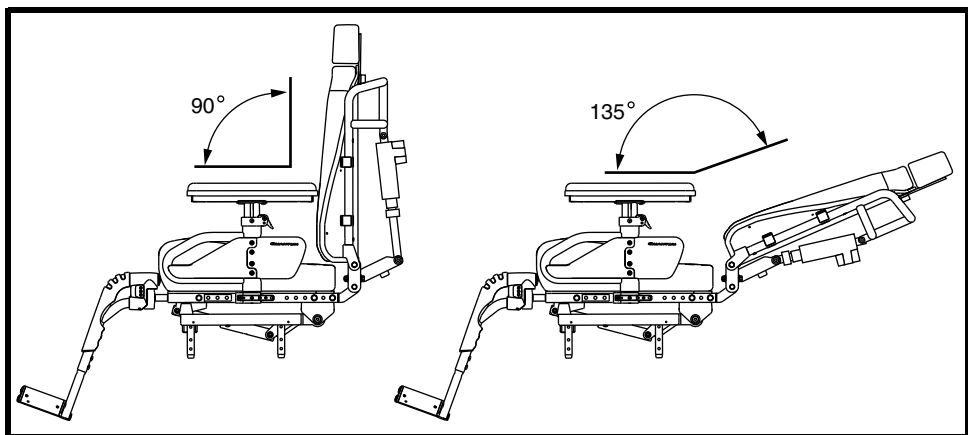


Figura 18. Movimento di reclino elettrico Euro Seat 2

**NOTA:** *Quando il sedile è inclinato o reclinato di oltre 120°, un inibitore toglie l'alimentazione ai motori della carrozzina. Riportando il sedile ad un'angolazione inferiore a 120° ripristina l'alimentazione dei motori.*

## CURA E MANUTENZIONE

- Verificare che tutta la bulloneria sia ben fissata, ma non stringere troppo.
- Per pulire il sistema di seduta, passare un panno bagnato con sapone neutro e acqua. Asciugare bene l'apparecchio prima dell'uso.



**VIETATO! Evitare l'esposizione a pioggia, neve, ghiaccio, sale ed acqua stagnante. Mantenere e conservare in un luogo pulito ed asciutto.**

**AVVERTENZA! Pride raccomanda vivamente di non fumare sigarette quando si sta seduti nella Carrozzina, sebbene la Carrozzina abbia superato i requisiti necessari dei test antifumo. In caso si decida di fumare sigarette quando si è seduti sulla Carrozzina, osservare le seguenti direttive di sicurezza.**



- Non abbandonare sigarette accese.
- Tenere i posacenere a distanza di sicurezza dai cuscini del sedile.
- Verificare sempre che le sigarette siano completamente spente prima dello smaltimento.

**ATTENZIONE! Non utilizzare detergenti per la pulizia del vinile sul sedile che potrebbe diventare scivoloso o danneggiarsi. Utilizzare acqua saponata ed asciugare a fondo il sedile.**

## GARANZIA

Per le informazioni sulla garanzia, consultare il manuale della carrozzina.

# APPENDIX I - SPECIFICHE

Tabella specifiche Euro Seat 2

Peso di sedile:	Reclino Manuale: 16 in. sedile: 29,71 kg Schienale morbido 18 in. sedile: 35,61 kg Schienale solido 20 in. sedile: 36,74 kg Schienale solido Bascula elettrica: 16 in. sedile: 31,07 kg Schienale morbido 18 in. sedile: 37,19 kg Schienale solido 20 in. sedile: 38,33 kg Schienale solido Reclino elettrico: 16 in. sedile: 36,51 kg Schienale solido 18 in. sedile: 36,97 kg Schienale solido 20 in. sedile: 38,10 kg Schienale solido Bascula elettrica/Reclino elettrico: 16 in. sedile: 38,10 kg Schienale solido 18 in. sedile: 38,56 kg Schienale solido 20 in. sedile: 39,69 kg Schienale solido
Dimensioni:	16 in. x 16 in., 16 in. x 18 in., 18 in. x 18 in., 20 in. x 20 in.
Altezza schienale:	56 cm
Rivestimento sedile:	Vinile
Braccioli:	Estraibili
Poggiatesta:	Poggiatesta Euro Poggiatesta Quantum (Opzionale; 2 stili)
Capacita di carico massima:	136 kg



# NOTE

# NOTE

# NOTE

# **Pride**<sup>®</sup>

*Mobility Products Corp.*

**Pride Mobility Products Corporation**

182 Susquehanna Avenue  
Exeter, PA 18643-2694  
USA

**Pride Mobility Products Company**

380 Vansickle Road Unit 350  
St. Catharines, Ontario L2R 6P7  
Canada

**Pride Mobility Products Ltd.**

32 Wedgwood Road  
Bicester, Oxon OX26 4UL  
UK

**Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.**

21 Healey Road  
Dandenong, 3175  
Victoria, Australia

**Pride Mobility Products Italia S.r.l.**

Via del Progresso - ang. Via del Lavoro  
Loc. Prato della Corte  
00065-Fiano Romano (RM)

**Pride Mobility Products Europe B.V.**

Castricummer Werf 26  
1901 RW Castricum  
The Netherlands



I N F M A N U 4 1 3 3