


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

Synergy[®]
Structure 2[™]

ACN# 088 609 661

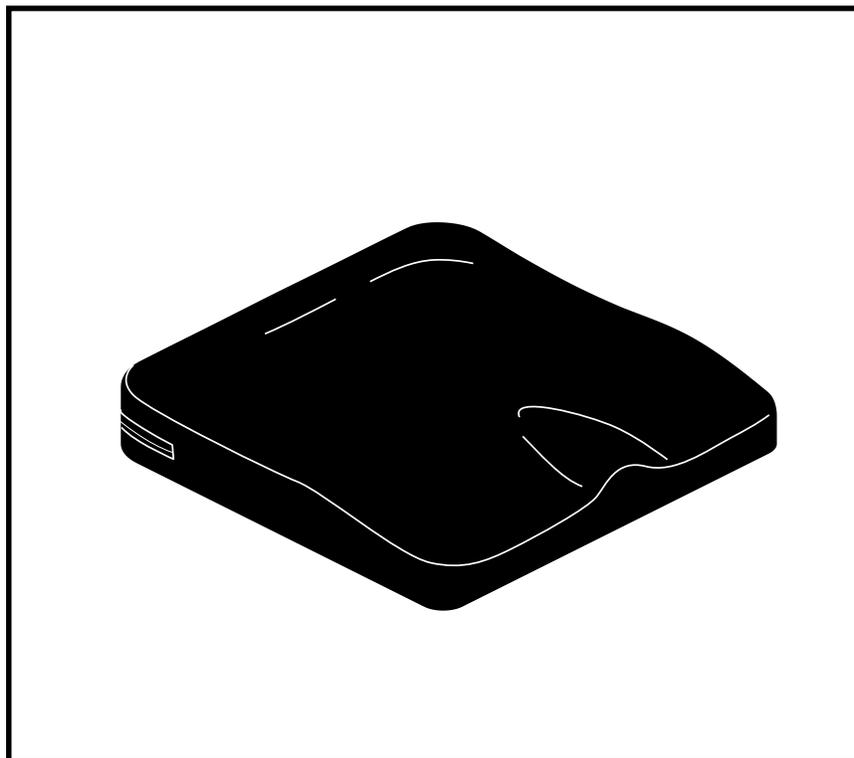

QUANTUM[®]
REHAB
FEEL THE POWER[™]

A Division of Pride Mobility Products[®] Corp.

ETICHETTE INFORMATIVE

I simboli riportati di seguito vengono utilizzati nel presente manuale e sulla carrozzina per identificare avvertenze e informazioni importanti. È molto importante leggerli e comprenderli completamente.



AVVERTENZA! Indica una condizione/situazione potenzialmente pericolosa. La mancata osservanza delle procedure prescritte può provocare lesioni personali, danni ai componenti o malfunzionamento. Sul prodotto, questa icona è rappresentata da un simbolo nero in un triangolo giallo con bordo nero.



OBBLIGATORIO! Queste azioni devono essere eseguite come descritto. La mancata osservanza delle azioni obbligatorie può causare lesioni alle persone e/o danni alle apparecchiature. Sul prodotto, questa icona è rappresentata da un simbolo bianco in un punto nero con bordo bianco.



VIETATO! Queste azioni sono vietate. Non devono mai essere eseguite e per nessun motivo. L'esecuzione di un'azione proibita può causare lesioni al personale e/o danni alle apparecchiature. Sul prodotto, questa icona è rappresentata da un simbolo nero con un cerchio rosso in una riga rossa.



Leggere e seguire le informazioni contenute nel manuale per l'utente.



ACN 088 609 661

Copyright © 2007
Pride Mobility Products Corporation
INFMANU3474/Rev A/August 2007

INDICE

INTRODUZIONE	4
SYNERGY STRUCTURE 2	6
PULIZIA	7
MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEGLI INSERTI DI POSIZIONAMENTO	8
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE	10
GARANZIA	10

INTRODUZIONE

BENVENUTI alla Quantum Rehab, una divisione della Pride Mobility Products Corporation (Pride). Il prodotto acquistato unisce componenti allo stato dell'arte con **sicurezza**, comfort e stile. Siamo certi che le caratteristiche del design possano offrire le comodità attese nelle attività quotidiane. La comprensione dell'uso e della cura **sicuri** del prodotto garantiranno anni di funzionamento e servizio senza problemi.

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta **leggere e osservare** tutte le istruzioni, le avvertenze e le note contenute nel presente manuale e nel resto della documentazione acclusa. Inoltre, la **sicurezza** dipende dal buon senso dell'utente, del fornitore, dell'assistente o del professionista sanitario.

Il presente manuale deve essere usato unitamente al manuale per l'utente fornito con la carrozzina. Se il manuale contiene informazioni di difficile comprensione, oppure in caso sia necessaria assistenza per l'installazione o l'uso, si prega di contattare il proprio Rivenditore autorizzato. **La mancata osservanza delle istruzioni, avvertenze e note contenute nel presente manuale ed applicate sul prodotto Pride può comportare lesioni alle persone e/o danni al prodotto ed annullare la garanzia del prodotto Pride.**

CONTRATTO DELL'ACQUIRENTE

Accettando la fornitura di questo prodotto, l'acquirente si impegna a non cambiare, modificare o alterare il prodotto, a non rimuovere o rendere inattivi o insicuri dispositivi di protezione, schermi o altre funzioni di sicurezza del prodotto, a non rifiutare, dimenticare o mancare di installare i kit di adattamento forniti periodicamente dalla Pride per migliorare o preservare l'uso sicuro del prodotto.

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Siamo lieti di ricevere domande, commenti e suggerimenti in merito a questo manuale. Desideriamo anche conoscere la Vostra opinione rispetto alla sicurezza e all'affidabilità del nuovo prodotto Pride e all'assistenza ricevuta dal Rivenditore autorizzato. Per contattarci, scrivete al seguente indirizzo:

Pride Mobility Products Italia Srl
Via del Progresso - Ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
e-mail: cservice@pride-italia.com

NOTA: in caso di smarrimento della scheda di registrazione del prodotto o del presente manuale per l'utente, è possibile contattare Pride che sarà lieta di inviarne immediatamente uno nuovo.

Il mio rivenditore Quantum Rehab è:

Nome: _____

Indirizzo: _____

Numero di telefono: _____

Data dell'acquisto: _____

SYNERGY STRUCTURE 2

Synergy Structure 2 è etichettato per garantire un corretto posizionamento sulla carrozzina.



AVVERTENZA! La modifica della posizione impostata dall'assistente sanitario può causare incastramento, abrasioni cutanee o ulcere/piaghe da decubito.

NOTA: *Synergy Structure 2 è fornito smontato e sono disponibili kit opzionali che contengono elementi aggiuntivi per il posizionamento corretto del bacino e delle gambe. Questi elementi devono essere disposti da un professionista medico, paramedico o tecnico ortopedico prima dell'uso del cuscino. Se in qualunque momento durante l'uso fosse necessario regolare gli elementi di posizionamento, contattare il tecnico ortopedico che ha predisposto tali elementi.*

Per posizionare Synergy Structure 2 sulla carrozzina:

1. Localizzare l'etichetta "Fondo anteriore" sotto il cuscino.
2. Posizionare il cuscino sul sedile in modo che l'etichetta "Fondo anteriore" sia sul lato anteriore del sedile, con il lato dell'etichetta rivolto verso il basso. La cerniera sul cuscino è rivolta verso la parte posteriore del sedile. Vedere figura 1.

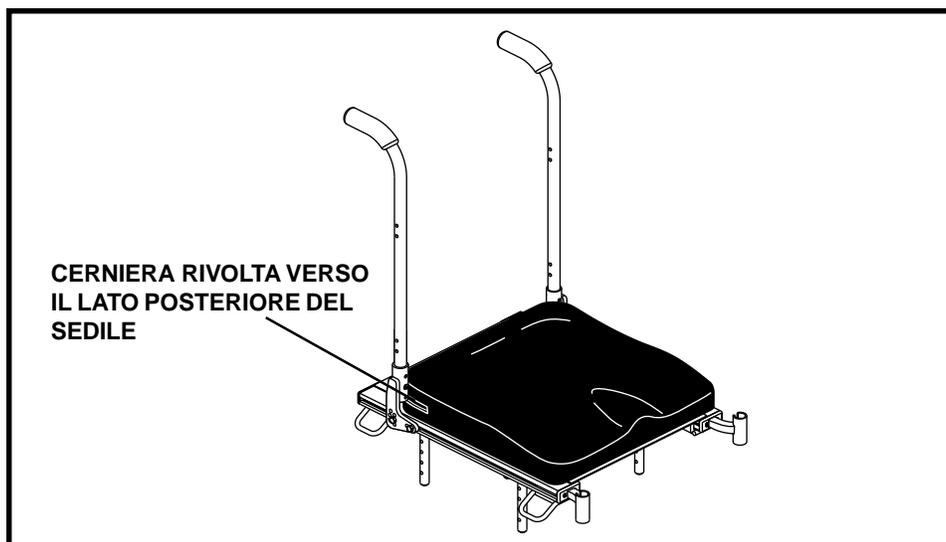


Figura 1. Collocazione del cuscino

PULIZIA

Synergy Structure 2 si pulisce facilmente.

Per pulire Synergy Structure 2:

1. Localizzare la cerniera sul lato posteriore della fodera traspirante. Vedere figura 2.
2. Aprire la copertura esterna ed estrarre gli elementi montati del cuscino interno.
3. Lavare la fodera traspirante in lavatrice a FREDDO.



AVVERTENZA! Per prevenire danni alla copertura del sedile, non usare candeggina quando si lava la fodera traspirante.

4. Spruzzare la copertura imbottita, la sottofascia di gel e gli elementi opzionali con un disinfettante, pulire e lasciare asciugare all'aria.



AVVERTENZA! Durante la pulizia non rimuovere gli elementi di posizionamento.

5. Asciugare la fodera traspirante all'aria.



AVVERTENZA! Per prevenire il restringimento della fodera traspirante, non asciugarla con un'asciugatrice.

6. Quando la fodera è asciutta, reinserire i componenti montati del cuscino interno. Chiudere la cerniera della fodera traspirante e riporre Synergy Structure 2 sul sedile della carrozzina.

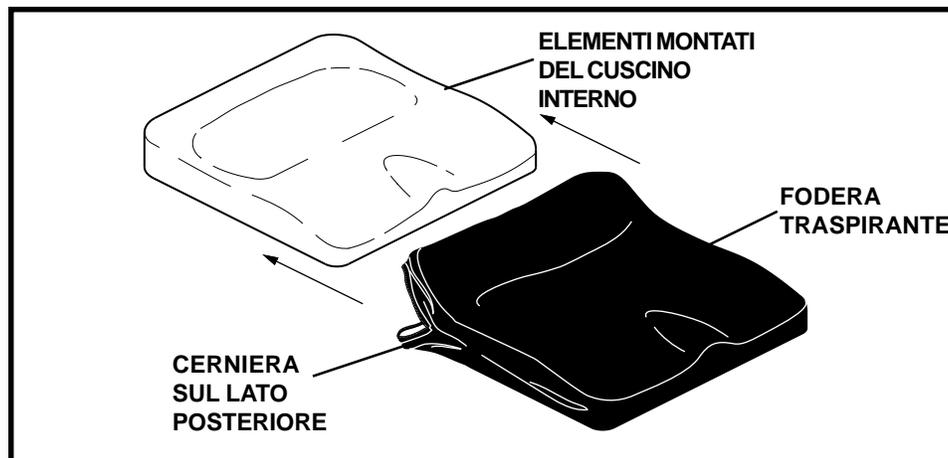


Figura 2. Synergy Structure 2

MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEGLI INSERTI DI POSIZIONAMENTO

Synergy Structure 2 è fornito smontato e sono disponibili elementi aggiuntivi per il posizionamento corretto. Gli elementi di posizionamento sono composti da cuscinetti che "si attaccano" alla base con un velcro riutilizzabile e con fissanti, che possono essere usati in qualunque combinazione per ottimizzare il comfort dell'utente. Gli elementi di posizionamento sono regolabili secondo quanto necessario.

Per montare Synergy Structure 2:

1. Collocare gli eventuali elementi di posizionamento sulla base del cuscino secondo quanto necessario per ottenere il corretto posizionamento. Vedere figura 3.
2. Posizionare la sottofascia di gel sulla base del cuscino come illustrato nella figura 3.
3. Posizionare la copertura imbottita sulla base del cuscino come illustrato nella figura 3.
4. Posizionare il cuscino montato nella fodera traspirante e chiudere la cerniera.

Per regolare gli elementi di posizionamento:

1. Rimuovere la fodera traspirante.
2. Rimuovere la copertura imbottita dalla base del cuscino.
3. Rimuovere la sottofascia di gel dalla base del cuscino.
4. Posizionare o regolare gli elementi di posizionamento opzionali secondo quanto necessario.
5. Rimontare il cuscino come descritto sopra.

NOTA: Pride raccomanda che gli elementi di posizionamento di Synergy Structure 2 siano montati e regolati solamente dal Vostro operatore sanitario. Questi elementi devono essere disposti da un professionista medico, paramedico o tecnico ortopedico prima dell'uso del cuscino. Non cercare di regolare gli elementi di posizionamento mentre si è seduti sul cuscino.

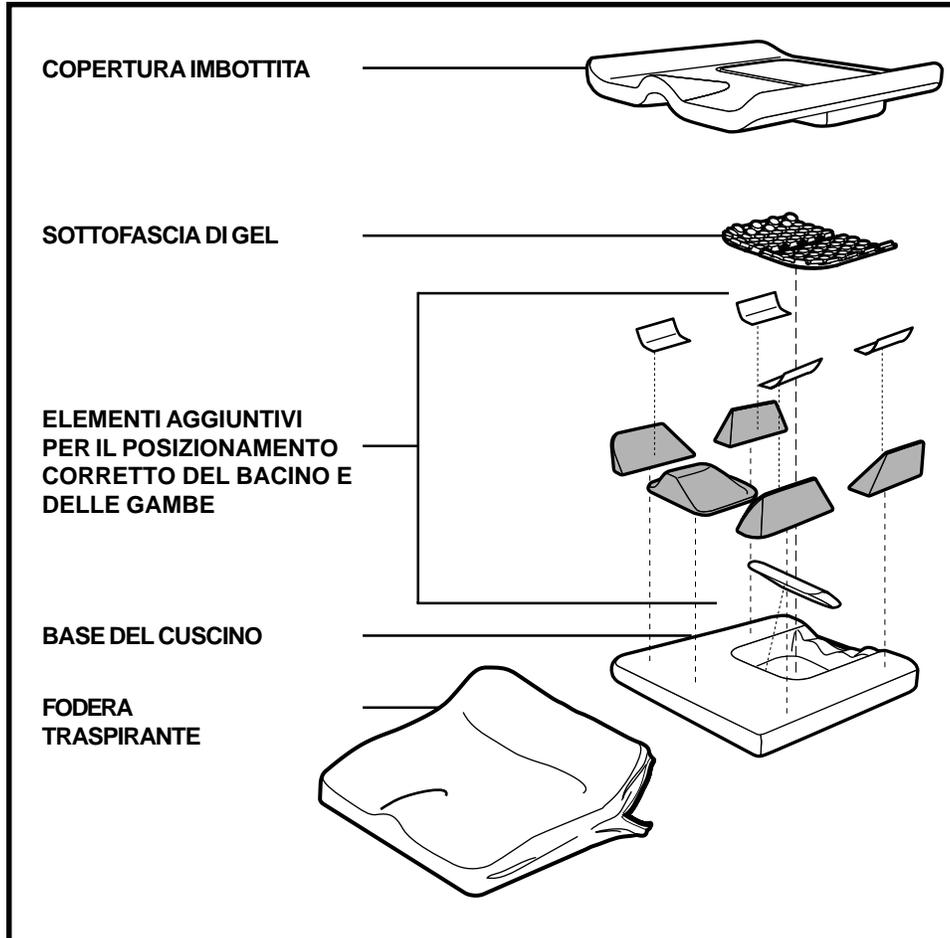


Figura 3. Il cuscino Structure 2, smontato

NOTA: *Gli elementi di posizionamento possono comprendere velcro riutilizzabile e stabilizzatori a fascia che forniscono maggiore stabilità per l'uso degli elementi stessi.*

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Synergy Structure 2 deve essere conservato in un posto asciutto, non soggetto a bruschi cambi di temperatura.



AVVERTENZA! Sebbene il cuscino per la carrozzina abbia superato i requisiti di controllo necessari per fumo da sigaretta, Pride consiglia di osservare le seguenti linee guida:

- Non abbandonare sigarette accese.
- Tenere i posacenere a distanza di sicurezza dal cuscino.
- Verificare sempre che le sigarette siano completamente spente prima dello smaltimento.

GARANZIA

Il cuscino Synergy Structure 2 è studiato e prodotto secondo i massimi standard. Il cuscino Synergy è garantito privo di difetti materiali e di produzione per un periodo di 24 mesi. In caso di difetti materiali e di lavorazione, Pride Mobility Products Italia riparerà o sostituirà, a propria discrezione, il cuscino Synergy. Questa garanzia non è applicabile a cuscini maltrattati o male utilizzati dall'utente e ritenuti tali da Pride Mobility Products Italia.

I reclami e le riparazioni devono essere presentati attraverso il Rivenditore Autorizzato.

NOTE

QUANTUM[®] **REHAB** **FEEL THE POWER[™]**

A Division of Pride Mobility Products[®] Corp.

Pride Mobility Products Corporation

182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Pride Mobility Products Company

380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.

Unit 106, Heyford Park Camp Road
Upper Heyford, Oxfordshire OX25 5HA

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.

21 Healey Road
Dandenong, 3175
Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.

Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.

Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands

Pride
Mobility Products Corp.

www.pridemobility.com

www.prideservice.com

www.quantumrehab.com

* I NFMANU3474 *