


SILVER BOOM 250

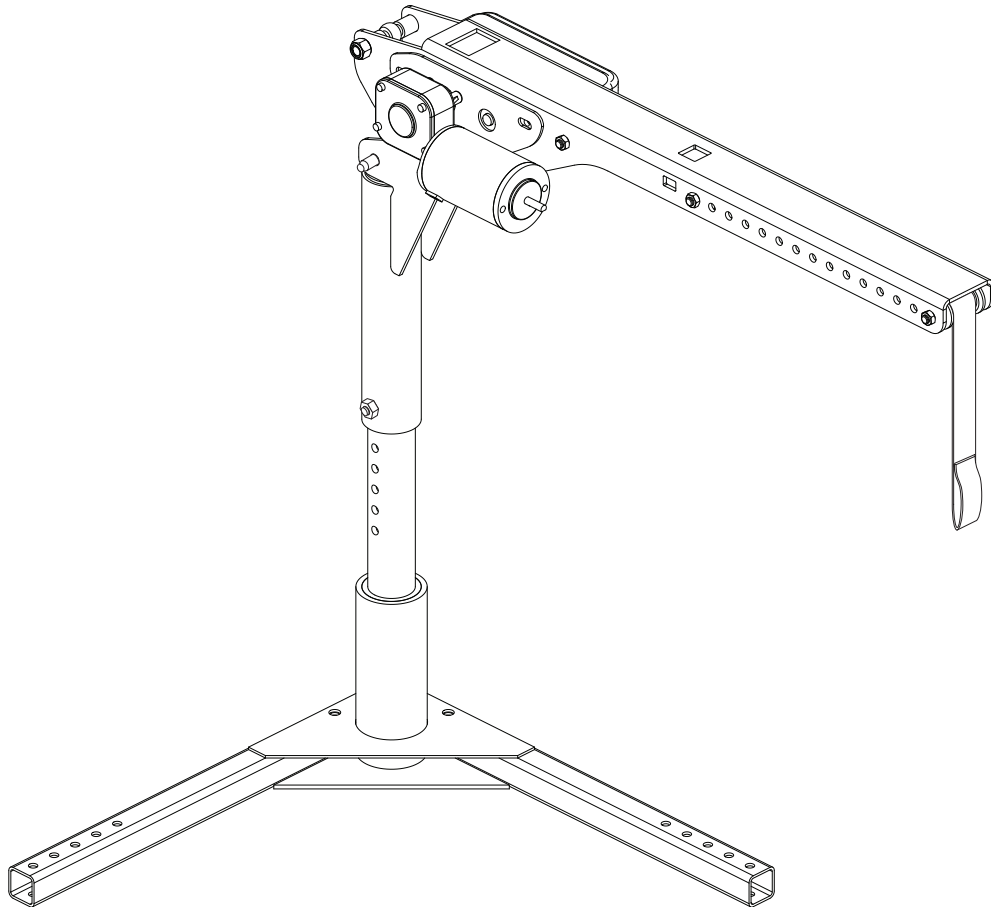

MANUEL DE L'UTILISATEUR

CONSIGNES DE SECURITE



MISE EN GARDE! Votre détaillant Pride ou un technicien qualifié doit faire le montage initial de ce le système de levage et suivre toutes les toutes procédures énumérées dans ce manuel.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et moments d'attention particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.



MISE EN GARDE! Indique une condition/situation potentiellement dangereuse. Vous devez respecter les consignes sous peine de vous blesser, de causer des dommages et/ou un mauvais fonctionnement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire sur un triangle jaune avec bordure noire.



OBLIGATOIRE! Ces actions doivent être exécutées selon les consignes sous peine de vous blesser, ou d'endommager l'appareil. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur blanche avec un point bleu et bordure blanche.



INTERDIT! Ces actions sont interdites. Vous ne devez sous aucune considération, entreprendre ces actions. Ces actions peuvent entraîner des blessures et/ou dommages à votre équipement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire avec un rond rouge et barre rouge.

S.V.P. veuillez compléter les informations ci dessous:

Détaillant Pride: _____	
Adresse: _____	
Téléphone: _____	
Date d'achat: _____	Numéro de série: _____

NOTE: Ce manuel a été préparé à partir des spécifications et informations disponibles au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements lorsque est nécessaire. Certains changements peuvent causer de légères variations entre les illustrations, les explications de ce manuel et l'appareil que vous avez acheté. La dernière version de ce manuel est sur notre site Internet.



I. TABLE DES MATIERES

I. INTRODUCTION	4
II. SECURITE	5
III. INSTALLATION	8
IV. FONCTIONNEMENT	12
V. PROBLEMES ET SOLUTIONS	14
VI. SOINS ET ENTRETIEN	16
VII. GARANTIE	17

I. INTRODUCTION

Bienvenue chez Pride Mobility Products. Félicitations pour l'acquisition de votre nouvelle Silver Boom 250. Cette appareil de levage de conception moderne possède des caractéristiques découlant des plus récents avancements technologique. Nous sommes convaincus que sa fiabilité, ses fonctionnalités et les services qu'il vous rendra feront de vous un propriétaire satisfait.

Chez Pride, la sécurité passe avant tout. **Nous vous prions de prendre le temps de lire les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser votre équipement pour la première fois. Pride a préparé ce manuel d'utilisation dans votre intérêt.** Il est essentiel que vous compreniez bien les consignes de sécurité concernant votre nouveau Silver Boom 250.

Pride ne pourra être tenu responsable pour les dommages à la propriété ou les blessures découlant d'une mauvaise utilisation du Silver Boom 250. De plus, Pride ne pourra être tenu responsable pour les dommages à la propriété ou les blessures dans l'éventualité ou une personne ne respecte pas les instructions et recommandations présentées dans ce manuel, dans tout autre documentation émise par Pride contenant des consignes sur l'utilisation du Silver Boom 250 et de sa rampe.

ACHAT PRIVE ET PAR INTERNET

Si vous avez acheté votre système de levage via Internet ou d'une personne privée, et que vous avez des questions concernant l'utilisation sécuritaire et/ou l'entretien de votre système de levage, S.V.P. visitez le site de Pride au www.pridemobility.com ou contactez votre détaillant Pride.

CONVENTION A L'ACHAT

En acceptant ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisable les protecteurs et/ou gardes de sécurité, dispositifs de sécurité. Vous vous engagez à ne pas refuser ni négliger de faire installer les trousse de mise à jour au besoin, fournies par Pride afin de maintenir ou améliorer l'aspect sécuritaire de votre produit.

ECHANGE D'INFORMATIONS

Nous aimerions recevoir vos commentaires, questions et suggestions au sujet de ce manuel. Nous aimerions aussi recevoir vos commentaires concernant la fiabilité et la sécurité de votre nouvel Silver Boom 250 et le service offert par votre détaillant Pride.

Nous aimerions être avisés si vous déménagez, car nous pourrions vous tenir informés si des mesures venaient à être prises pour augmenter la sécurité de votre système de levage, ou encore sur les nouveaux produits, nouvelles options qui augmenteraient le plaisir associé à l'utilisation de votre Silver Boom 250. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante:

USA:

Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Ave.
Exeter, PA 18643-2694

Canada:

Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road, Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7

NOTE: Si vous perdez ou égarez votre carte de garantie ou votre manuel du propriétaire, téléphonez ou écrivez-nous, c'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir immédiatement des documents de remplacement.

II. SECURITE

PICTOGRAMMES DE SECURITE

Les pictogrammes ci-dessous sont apposés sur le système de levage pour indiquer les actions obligatoires, mises en garde et actions prohibées. Il est très important de les lire et de bien les comprendre.




Lisez et suivez les consignes et informations contenues dans ce manuel.

Capacité de levage maximale.

Ne prenez pas place sur votre appareil motorisé lorsque celui-ci est arrimé à l'appareil de levage ou pendant son transport.



Prenez garde aux endroits où vous pouvez pincer ou écraser vos doigts lors du montage et de l'utilisation.

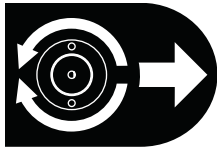

Commande manuelle.




Contient du plomb.



Ne pas déployer la sangle de levage au-delà de l'étiquette de mise en garde qui se trouve sur la sangle.


Mise en garde! Pièces mobiles!

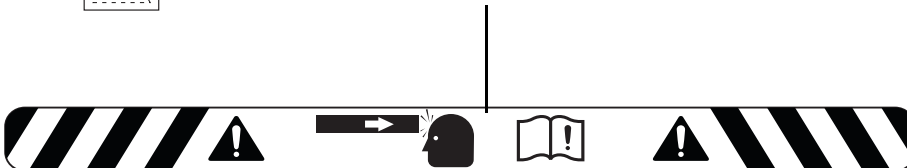

II. SECURITE



Mise au rebut et recyclage – Contactez votre détaillant Pride pour connaître la méthode de mise au rebut et/ou de recyclage de votre produit Pride et son emballage.

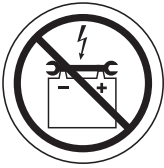

Tenez les outils et autres objets en métal loin des bornes des batteries. Un contact avec un outil en métal peut provoquer un choc électrique.



Ne laissez pas d'enfants jouer sans surveillance près des batteries pendant la recharge.



Les batteries contiennent des produits corrosifs.



Prenez garde aux risques d'explosion!



N'utilisez que des batteries scellées "AGM" ou des batteries au gel afin de réduire les risques de fuite ou d'explosion.



Portez des lunettes de protection.



Autant que possible, évitez d'exposer à la pluie, à la neige, à la glace, au sel ou à de l'eau stagnante. Gardez le fauteuil bien propre et au sec.

II. SECURITE

FORCE DE LEVAGE

La force de levage maximale de votre Silver Boom 250 est de 113 kg (250 lb). Sous aucune considération, la limite de poids de levage maximale du Silver Boom 250 ne doit être dépassée. Si vous tentez de soulever un poids plus grand que celui pour lequel votre Silver Boom 250 a été conçu, vous risquez de provoquer une défaillance entraînant des dommages à votre appareil de mobilité, des blessures à la personne utilisant l'appareil de levage ou les deux. Référez-vous au manuel d'informations de votre appareil motorisé pour connaître son poids total avant d'entreprendre son levage.



MISE EN GARDE! L'ajout d'accessoires, de batteries très grande capacité ou d'un siège électrique fera augmenter le poids de votre scooter/fauteuil motorisé. Demandez à votre détaillant Appareil de levage Silver Boom 250 de vérifier le poids total de votre appareil après les ajouts pour vous assurer que celui-ci ne dépasse pas la norme de 113 kg (250 lb).

INSTALLATION

Votre système de levage Silver Boom 250 est un appareil conçu pour un fonctionnement à l'extérieur et pour une installation dans les véhicules. Vous devez lire et bien comprendre les instructions d'installation fournies dans ce manuel ainsi que celles contenues dans le manuel de votre véhicule avant de commencer l'installation de l'appareil de levage. La distance entre la flèche et l'appareil de mobilité ne doit pas dépasser 50 po (127 cm) lorsque la flèche est en pleine extension.

LEVAGE D'UN PRODUIT NON-PRIDE

Le système est très versatile, Il peut soulever des produits autres que ceux fabriqué par Pride. Le fabricant n'a pas de contrôle et ne peut pas anticiper l'utilisation qui peut être faite du Silver Boom 250. Le levage d'un produit autre qu'un Pride à l'aide de cet appareil est entièrement à vos risques. Pride ne pourra être tenu responsable des blessures et dommages découlant de son utilisation.

INSPECTION AVANT LEVAGE

Vérifiez la sangle de levage du Silver Boom 250 avant chaque utilisation pour s'assurer qu'elle n'est pas tordue, qu'il n'y pas d'effilochage ou des signes d'usure. Si des signes d'usure sont évidents, votre sangle de levage devra être remplacée par votre détaillant Pride autorisé.



MISE EN GARDE! Une sangle de levage effilochée ou usagée peut se casser et causer des dommages à l'appareil de mobilité en cours de levage et des blessures à l'opérateur du système de levage.

POSITIONNEMENT DE L' OPERATEUR

Gardez vos mains éloignées de la sangle de levage pendant que le Silver Boom 250 est en train de lever/ abaisser un appareil de mobilité. L'opérateur du système de levage doit se tenir à une distance sécuritaire de l'appareil en train d'être levé/abaissé afin de s'assurer que ses pieds ne sont jamais situés sous un appareil de mobilité surélevé.

POSITIONNEMENT DU VEHICULE DE TRANSPORT

Assurez-vous que votre véhicule est stationné sur un terrain plat et à niveau et que le frein à main est engagé et bien serré avant d'essayer de lever un appareil de mobilité.



MISE EN GARDE! Lorsque le véhicule n'est pas sur un terrain à niveau et que vous essayez de lever un appareil de mobilité, celui-ci basculera vers ou hors du véhicule et il sera très difficile de faire rentrer l'appareil de mobilité dans le véhicule.

III. INSTALLATION

INSTALLATION DU SILVER BOOM 250

NOTE: Le Silver Boom 250 est un système de levage conçu pour l'extérieur. Reportez-vous à la base de données de compatibilité en ligne située à www.pridemobility.com pour des renseignements concernant la compatibilité système de levage/véhicule ou contactez votre détaillant Pride autorisé.

MISE EN GARDE! Le Silver Boom 250 doit être installé par un technicien qualifié seulement.



MISE EN GARDE! Il faut au moins deux personnes pour soulever et déposer le Silver Boom 250 à l'intérieur d'un véhicule. Utilisez une bonne technique de levage et prenez garde de tenter de soulever un poids trop grand pour vos capacités.



MISE EN GARDE! Attention à vos doigts! Ne soulevez pas la structure par les points de pivot lors de l'installation du Silver Boom 250.

NOTE: Utilisez seulement la quincaillerie fournie avec le Silver Boom 250 pour son installation.

NOTE: Pour préserver les données du système du véhicule, le système d'alimentation du véhicule pourrait avoir besoin d'être connecté à une autre source d'alimentation, avant de retirer la batterie. Pour déconnecter proprement la batterie, référez-vous au manuel d'instructions du véhicule pour plus d'informations.

Suivez ces étapes pour l'installation:

1. Installez la trousse d'ancrage du Silver Boom 250 dans le véhicule.

NOTE: La trousse d'ancrage est différente en fonction du type et du modèle de véhicule. Pride recommande l'utilisation du système de sécurisation fourni avec le levage et que vous suiviez toutes les instructions fournies par le fabricant pour l'installation.

2. Branchez le Silver Boom 250 à une source d'alimentation. Voir "Installation du câble".

NOTE: Si votre appareil de levage est équipé d'une batterie interne facultative, référez-vous à "Installation de la batterie interne".

3. Veillez à ce que toute la quincaillerie de montage soit bien serrée et que tous les dégagements requis ont été atteints.

NOTE: Le Silver Boom 250 peut comprendre un ensemble d'extensions L-Base en option. Pour plus d'informations sur l'installation de l'extension L-Base, référez-vous aux instructions complémentaires ou contactez votre détaillant Pride autorisé.

III. INSTALLATION

REGLAGE DE LA FLECHE

La flèche peut être réglée pour votre commodité. Voir la figure 1.

NOTE: Si votre Silver Boom 250 est équipé d'une flèche déportée facultative, suivez les instructions ci-dessous pour faire des réglages. Voir la figure 3.

Pour soulever ou abaisser le montant supérieur:

1. Retirez l'écrou et le boulon du montant supérieur. Voir la figure 1.
2. Soulevez ou abaissez le montant supérieur à la position désirée, et assurez-vous de faire correspondre les trous de réglage du montant supérieur avec les trous de réglage du montant inférieur.
3. Réinstallez le boulon dans le trou de réglage et serrez avec l'écrou.

Pour régler le positionnement de la sangle de levage:

Pour plus de commodité, la sangle de levage peut être réglée vers l'intérieur (vers le montant) ou vers l'extérieur (hors du montant).

1. Retirez les écrous du boulon fileté qui sécurise la sangle à la flèche. Voir la figure 1.
2. Roulez la sangle à la position désirée en alignant le rouleau de la sangle avec le trou de réglage désiré dans la flèche. Voir la figure 1.
3. Insérer le boulon fileté dans le trou de réglage et réinstallez les écrous.

NOTE: L'angle de la flèche peut être réglé pour tenir compte de certaines limitations d'hauteur. Voir la figure 1.

NOTE: Ne pas forcer le boulon fileté dans le trou de réglage.

Pour abaisser la flèche:

1. Retirez la broche située entre la flèche et le montant supérieur. Abaissez la flèche jusqu'à ce qu'elle soit parallèle avec le montant supérieur. Voir la figure 4.
2. Réinsérez la broche en haut du montant supérieur pour sécuriser la flèche en place. Voir la figure 4.

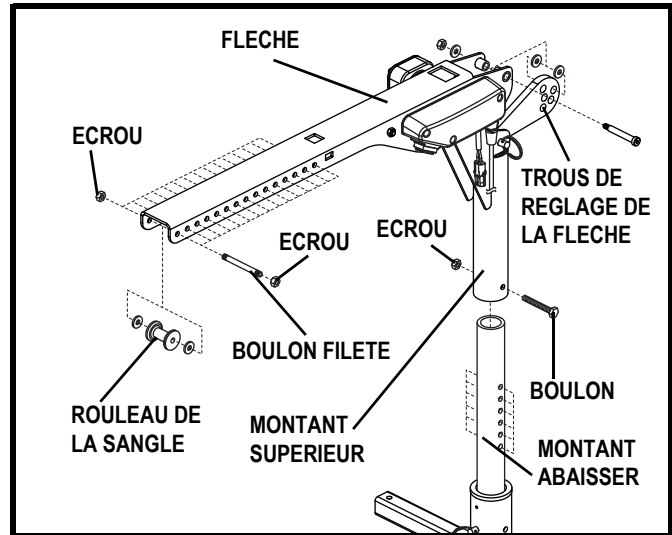


Figure 1. Réglage du montant supérieur

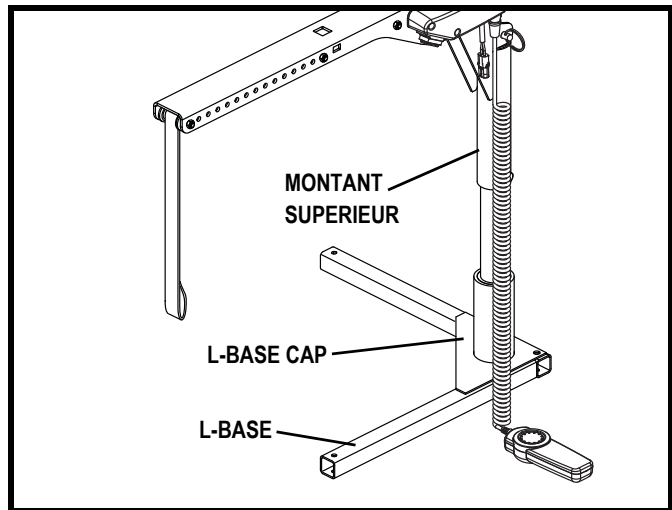


Figure 2. Silver Boom 250 complètement assemblé

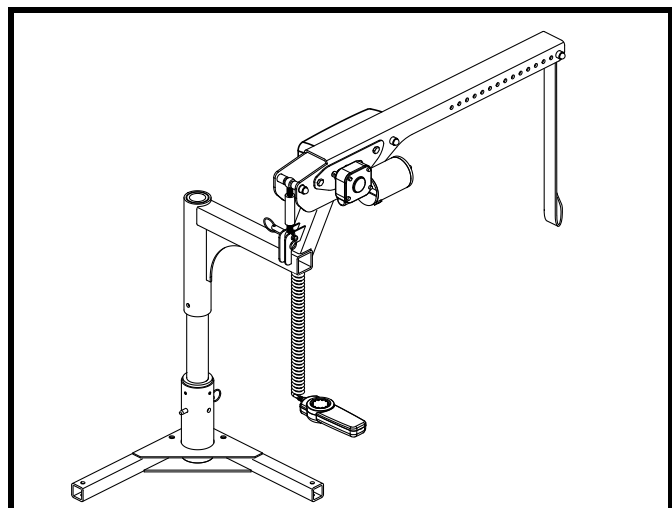


Figure 3. Flèche déportée facultative

III. INSTALLATION

INSTALLATION DU CABLAGE ELECTRIQUE

1. Acheminez le kit de câblage de la batterie (à partir du système de levage) à travers l'intérieur du véhicule jusqu'à la batterie du véhicule. **Voir la figure 5.** Cachez le câble derrière ou sous les panneaux intérieurs. Assurez-vous que le câble soit protégé par un passe-fil en caoutchouc quand il passe à travers les panneaux de métal et dans le compartiment du moteur. A l'intérieur du compartiment du moteur, fixez le câble au pare-feu et à l'aile intérieure avec les attaches à fil en plastique fournies. Faites attention de ne pas causer des éraflures au câble d'alimentation. Il est important de fixer le câble d'alimentation à différents points le long de son parcours.

2. Insérez le fil rouge positif (+) du câble d'alimentation au raccord du fil rouge positif (+) de la batterie, puis sertissez pour fixer le fil.
3. Connectez le fil rouge positif (+) de la batterie à la borne positive (+) de la batterie et le fil négatif noir de terre (-) à la borne négative (-) de la batterie.



MISE EN GARDE! Le fil rouge positif (+) doit être raccordé directement à la borne positive (+) de la batterie.

MISE EN GARDE! Le fil noir négatif (-) doit être raccordé directement à la borne négative (-) de la batterie.

4. Connectez le faisceau provenant du boîtier du moteur au faisceau provenant de la batterie.

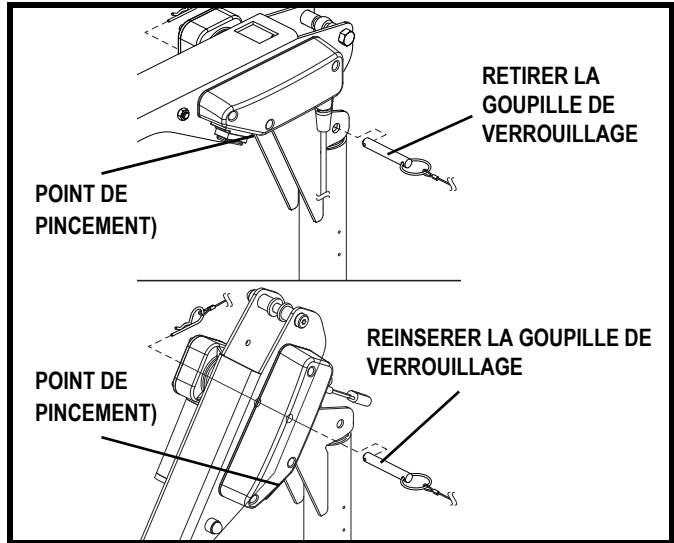


Figure 4. Sécuriser la flèche

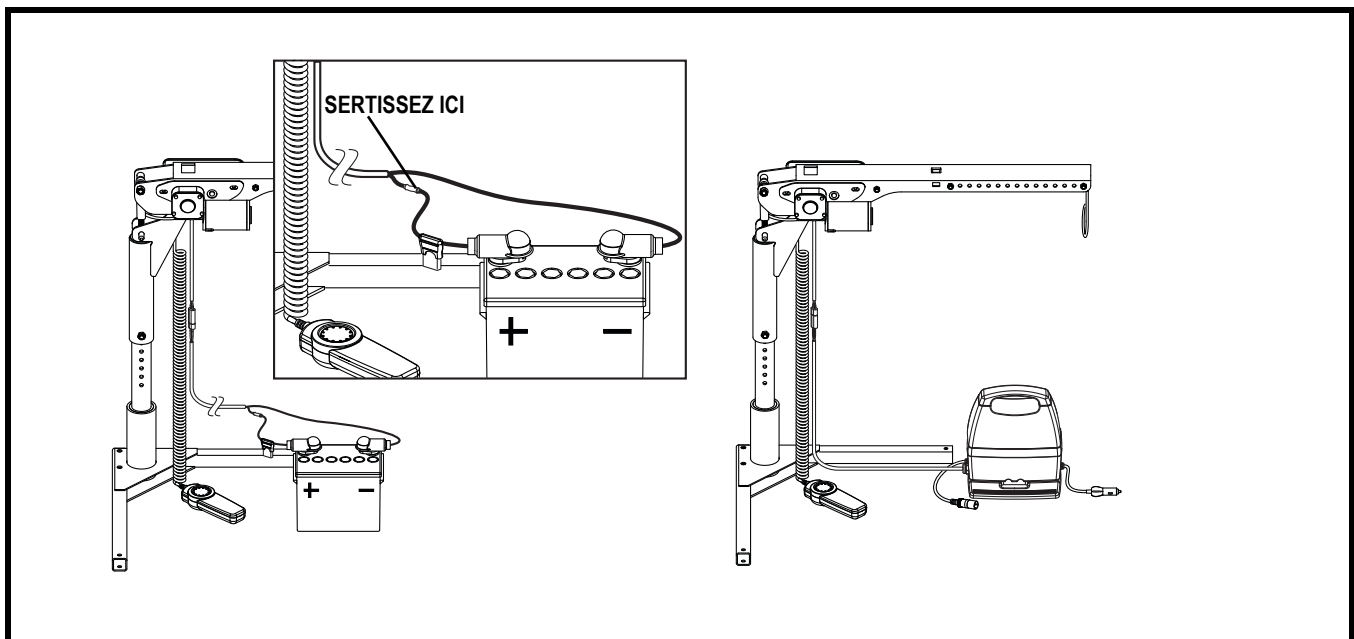


Figure 5. Connexions de câblage électrique

III. INSTALLATION

Installation d'une batterie interne facultative

La batterie interne facultative est conçue pour faciliter l'installation sans avoir à faire passer un câble vers la batterie du véhicule. S'il vous plaît référez-vous au manuel d'installation fourni avec la batterie pour les instructions de fonctionnement correct et les connexions du câblage.

Voici les étapes pour installer la batterie interne:

1. Placez la batterie dans le boîtier en alignant les connecteurs situés en dessous de la batterie avec les réceptacles à l'intérieur du boîtier. **Voir la figure 6.**
2. Branchez le connecteur mâle du câble de batterie avec le connecteur femelle à la base du Silver Boom 250. **Voir la figure 6.**
3. Fixez le câble de batterie et les autres fils avec des attaches à fil.

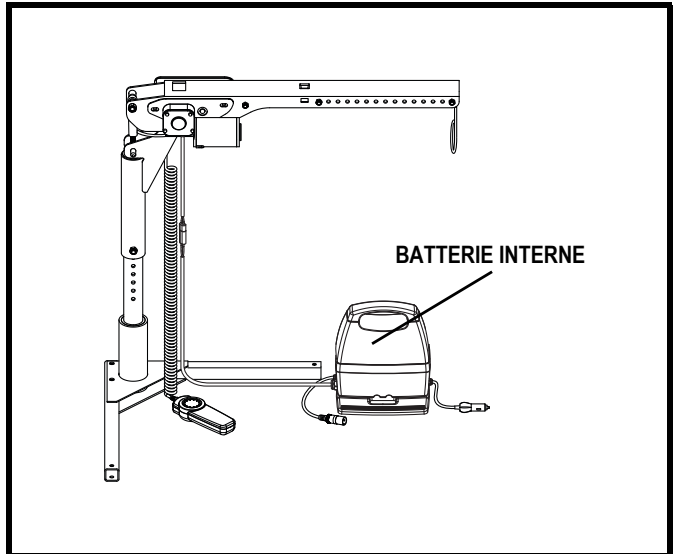


Figure 6. Installation batterie interne

IV. FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DE L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

Votre Silver Boom 250 est équipé d'un interrupteur d'alimentation qui active/désactive le fonctionnement. Appuyez sur UP (HAUT) pour allumer l'appareil ou appuyez sur DOWN (BAS) pour éteindre l'appareil. Voir la figure 9.

NOTE: Le commutateur ON/OFF (Marche/Arrêt) fonctionne également comme le bouton de réinitialisation du disjoncteur. Voir la figure 9.

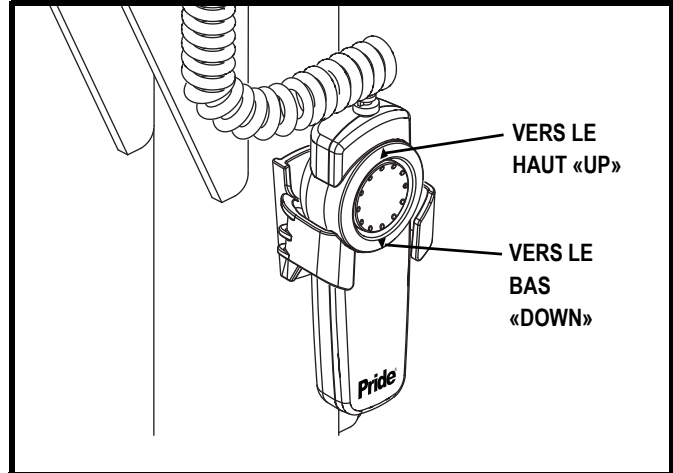


Figure 7. Manette commande

FONCTIONNEMENT DE LA MANETTE DE COMMANDE

La commande manuelle du Silver Boom 250 contrôle la sangle de levage dans les deux directions: haut et bas. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que la position désirée soit atteinte. Voir la figure 7.

NOTE: Rangez la commande manuelle dans le support de la commande manuelle (situé sur la flèche) après l'opération et pendant l'entreposage.

LEVAGE DE L'APPAREIL DE MOBILITE



MISE EN GARDE! Avant d'utiliser le Silver Boom 250 pour la première fois, soyez absolument certain que vous avez le dispositif d'attelage approprié pour votre appareil de mobilité installé.

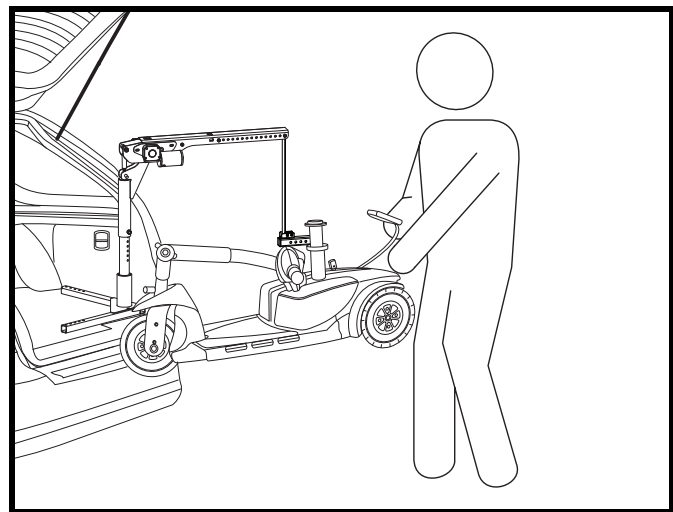


Figure 8. Levage de l'appareil de mobilité

1. Préparez votre appareil de mobilité pour le transport. Assurez-vous que l'alimentation est coupée et sécurisez correctement la batterie. Vous aurez peut-être besoin de baisser le guidon et/ou d'enlever le siège.
2. Posez votre appareil de mobilité par terre derrière le système de levage installé. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre l'appareil de mobilité et le pare-chocs du véhicule pour s'assurer que l'appareil de mobilité ne touche pas le pare-chocs durant le levage. Si l'appareil de mobilité est trop loin du pare-chocs du véhicule, il sera traîné quand vous essaieriez de le soulever.
3. Positionnez la flèche au-dessus de l'appareil de mobilité.
4. Faire fonctionner le système de levage vers le bas. Abaissez la sangle de levage jusqu'à ce qu'elle tombe tout droit sur la barre en T ou sur le collier du dispositif d'attelage.



MISE EN GARDE! Vérifiez la sangle de levage avant chaque utilisation pour s'assurer qu'elle n'est pas tordue, qu'il n'y pas d'effilochage ou des signes d'usure.

MISE EN GARDE! Évitez de décharger dans le trafic routier.

NOTE: Maintenir une tension sur la sangle de levage avec votre main libre lors de l'abaissement de la flèche.



MISE EN GARDE ! Ne pas déployer la sangle de levage au-delà de l'étiquette de mise en garde qui se trouve sur la sangle.

IV. FONCTIONNEMENT

- Assurez vous que le système d'encrage de levage soit bien arrimé.



MISE EN GARDE! Danger de pincement/écrasement! Toujours garder les mains éloignées de la sangle de levage lorsque le Silver Boom 250 est entrain de lever/abaisser un appareil de mobilité. L'opérateur du système de levage doit se tenir à une distance sécuritaire de l'appareil de mobilité pour s'assurer que les pieds ne sont jamais placés sous un appareil de mobilité surélevé.

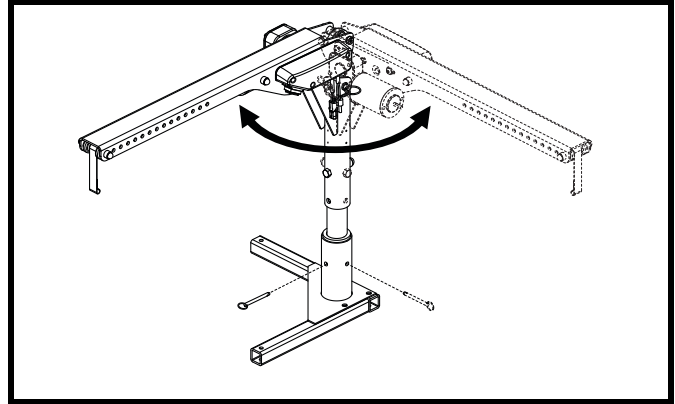


Figure 9. Sécurisez la flèche pour prévenir qu'elle pivote

NOTE: Ne traînez pas l'appareil de mobilité à sa position en utilisant le système de levage. Si l'appareil de mobilité traîne, cela veut dire qu'il est trop loin du véhicule.

Pour éviter que l'appareil de mobilité soit traîné :

- Relâchez la tension sur la sangle de levage.
- Essayez de le soulever à nouveau.
- Tenter l'ascenseur encore



OBLIGATOIRE! Le Silver Boom 250 est conçu pour soulever un poids maximum de 250 lb (113 kg). Ne pas dépasser cette limite.

- Faire fonctionner le système de levage vers le haut.
- Si l'appareil de mobilité commence à s'incliner, abaissez le complètement et ajuster le dispositif d'attelage en déplaçant la barre d'attelage dans le sens de l'inclinaison (lorsque vous utilisez un bras en C).
- Serrez la barre d'attelage une fois que le point d'équilibre correct a été atteint (lorsque vous utilisez un bras en C).
- Lorsque l'appareil de mobilité est surélevé de façon qu'il puisse entrer dans le véhicule, arrêter le système de levage. **Voir la figure 8.**
- Pivotez la flèche vers le véhicule. Lorsque l'appareil de mobilité est à l'intérieur du véhicule, abaissez la sangle de levage jusqu'à ce que toutes les roues de l'appareil de mobilité soient sur une surface solide.

NOTE: Une fois que l'appareil de mobilité est installé dans le véhicule assurez-vous qu'il soit bien sécurisé afin d'éviter qu'il glisse.

- Eteindre le Silver Boom 250 afin d'empêcher tout mouvement accidentel lors du transport de votre appareil de mobilité.



MISE EN GARDE! Votre Silver Boom 250 a été conçu principalement pour être monté dans un véhicule à moteur. Monter votre Silver Boom 250 sur une plate-forme, où la hauteur du système de levage peut entraîner le déploiement de la sangle de levage au-delà d'un point sécuritaire, peut endommager le Silver Boom 250 et blesser l'opérateur du système de levage.



MANDATORY! Fixez la flèche de façon qu'elle ne pivote pas en cours de transport. Une flèche qui pivote est un danger.



MISE EN GARDE! Ne pas trop serrer la sangle. Cela peut causer des contraintes excessives sur le moteur, causant le déclenchement du disjoncteur.

V. PROBLEMS ET SOLUTIONS

LE SYSTÈME DE LEVAGE NE FONCTIONNE PAS

- Vérifiez le bouton de réinitialisation du disjoncteur. Réinitialisez si nécessaire. **Voir la figure 10.**
- Si le bouton de réinitialisation du disjoncteur n'est pas déclenché, vérifiez le fusible câblé pour voir s'il a sauté. Remplacez-le si nécessaire. **Voir la figure 11.**
- Assurez-vous que toutes les connexions du câblage sont sécurisées.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation connecté à la borne positive de la batterie est bien serré et non corrodé.
- Vérifiez le fusible situé sur le fil d'alimentation rouge près de la batterie. S'il a sauté, le remplacer par un nouveau fusible de 15 ampères. **Voir la figure 11.**



MISE EN GARDE! Les caractéristiques du fusible de rechange doivent correspondre exactement à celles de l'ancien fusible. Si vous n'utilisez pas des fusibles qui ont les caractéristiques nominales appropriées, cela peut causer des dommages au système électrique.

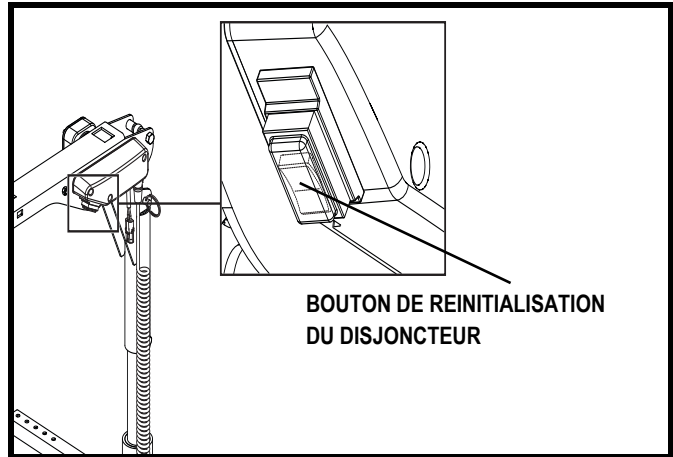


Figure 10. Bouton de Réinitialisation du Disjoncteur

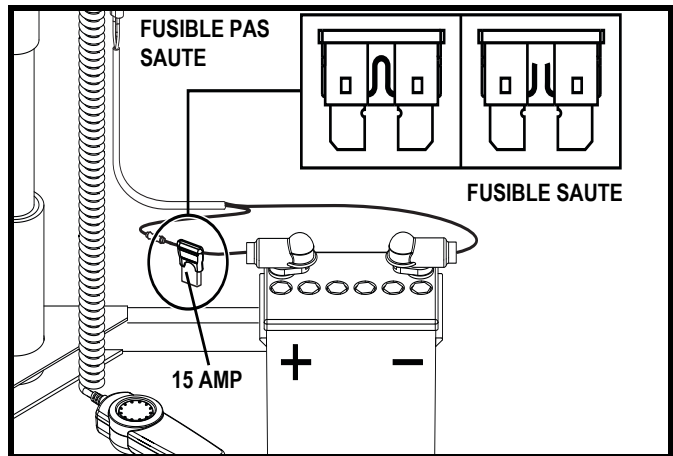


Figure 11. Fusible câblé

LE SYSTÈME DE LEVAGE CESSE DE FONCTIONNER

Si le moteur de votre Silver Boom 250 est sous contrainte excessive en raison de charges lourdes, le disjoncteur principal (**voir la figure 10**) peut se déclencher pour protéger le moteur et l'électronique de dommages. Lorsque le disjoncteur se déclenche, tout le système électrique s'arrête.



MISE EN GARDE! N'essayez jamais de soulever plus de 250 lb. (113 kg) avec le Silver Boom 250.

Pour réinitialiser le disjoncteur principal:

1. Attendez une ou deux minutes pour que l'électronique se "refroidisse".
2. Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser le disjoncteur. **Voir la figure 10.**

Si le disjoncteur se déclenche fréquemment, contactez votre détaillant Pride autorisé.

LA SANGLE DE LEVAGE SE DEPLACE EN SENS INVERSE DU BOUTON SÉLECTIONNÉ SUR LA COMMANDE MANUELLE

Avant chaque utilisation, vérifiez que la sangle de levage se déplace dans la bonne direction. Si la sangle se déplace dans la mauvaise direction lorsque vous appuyez sur le bouton haut ou bas, vous devez restaurer le déplacement approprié de la sangle de levage.

V. PROBLEMS ET SOLUTIONS

Pour restaurer le déplacement approprié de la sangle de levage:

1. Tirez légèrement sur la sangle et faire fonctionner le système de levage jusqu'à ce que la sangle soit complètement étendue au-delà de l'étiquette de mise en garde " stop ".
2. Permettre à la sangle de se rembobiner. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de torsions dans la sangle.

Observez le déplacement de la sangle, qui devrait correspondre avec le bouton appuyé sur la commande manuelle. Si vous rencontrez toujours des problèmes, contactez votre détaillant Pride autorisé.

VI. SOINS ET ENTRETIEN

L'entretien de routine suivant doit être effectué aux intervalles indiqués. Défaut d'effectuer les procédures d'entretien nécessaires dans les délais prévus peut annuler la garantie du produit Pride.

Effectuez avant l'usage quotidien:

- Vérifiez la sangle de levage pour des signes d'usure et la remplacer si nécessaire.
- Vérifiez tous les connecteurs électriques extérieurs pour voir s'ils sont endommagés et les remplacer si nécessaire.

Effectuer tous les 6 mois:

Inspectez toute la quincaillerie de montage pour défauts et pour s'assurer que tout est bien réglé. Toute quincaillerie qui est desserrée doit être serrée ou remplacée si nécessaire.

Effectuer tous les 6 à 12 mois:

- Retirez le montant vertical et le lubrifiez avec une " graisse universelle à base de pétrole ".
- Vérifiez les chaînes pour dommages et les remplacer si nécessaire.
- Lubrifiez les chaînes avec une " graisse universelle à base de pétrole ".
- Vérifiez les protecteurs en plastiques pour fissures ou dommages et les remplacer si nécessaire.

VII. GARANTIE

GARANTIE LIMITEE TRANSFERABLE DE TROIS ANS

Pride réparera ou remplacera à ses frais, pour une période de 3 ans pour l'acheteur d'origine seulement, les pièces défectueuses (matériel ou fabrication) après qu'un représentant autorisé Pride ait inspecté l'appareil:

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces sujettes à l'usure normale.

- Main-d'oeuvre, appel de service, frais de transport ou tous autres frais, sauf s'ils ont été autorisés au préalable par Pride.

Dommages causés par:

- Contamination
- Négligence, abus, accidents, mauvais usage
- Fuites ou renversements du liquide des batteries
- Utilisation commerciale ou anormale
- Utilisation, entreposage ou entretien non conforme
- Réparations ou modifications faites sans l'approbation écrite de PrideMobility Products.
- Circonstances hors du contrôle de Pride Mobility Products

GARANTIE DE UN AN

La batterie est protégée par une garantie distincte de un (1) an du fabricant. Les batteries ne sont pas garanties par Pride Mobility Products.

SERVICE ET REPARATION SOUS GARANTIE

Le service sous garantie doit être fait par un détaillant autorisé Pride. Ne retournez pas de pièces sans l'autorisation écrite de Pride. Tous les frais de transport et assurances sont sous la charge de l'acheteur.

Le non-respect des instructions contenues dans ce manuel et/ou sur les autocollants apposés sur votre appareil peut provoquer des accidents avec blessures, des dommages et entraîner l'annulation de la garantie.

Il n'y a pas d'autre garantie expresse.

GARANTIES IMPLICITES


Les garanties implicites incluant celles concernant la "commercialité" du produit et sa conformité à l'usage prescrit sont limitées à un (1) an à compter de la date d'achat et jusqu'à la limite prescrite par la loi. Ceci est la seule garantie. Pride ne peut être tenu responsable des dommages résultant des garanties.

Certains états et certaines provinces ne permettent pas l'utilisation de clauses d'exclusion ou de limitation aux dommages accessoires et aux dommages consécutifs à l'utilisation d'un produit.

Cette garantie vous donne des droits. Par ailleurs, certains états et certaines provinces vous en accordent d'autres qui peuvent varier d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

S.V.P. complétez et retournez la carte d'enregistrement de garantie chez Pride Mobility Products. Nous pourrions ainsi vous fournir un meilleur soutien technique.

NOTES

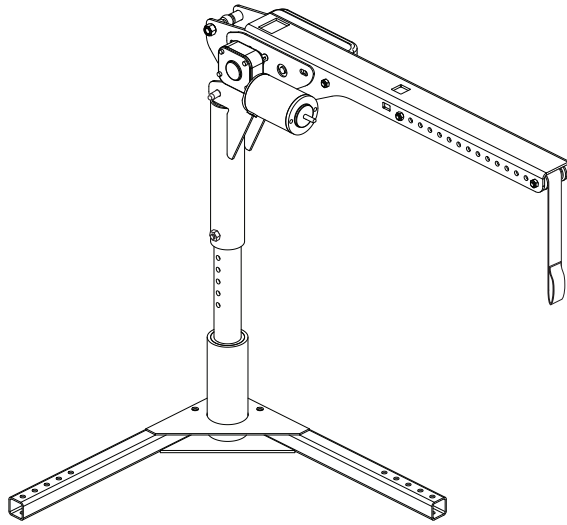

Pride® Lifts & Ramps