

TRAVEL PAL

Het Ultieme in Mode & Prestatie



GEBRUIKSHANDLEIDING

Pride

Mobility Products Europe B.V.
www.pridemobility.com

Tijnmuiden 28 1046 AL Amsterdam The Netherlands

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde Pride-leverancier of een bevoegde monteur te geschieden.


Lees eerst deze handleiding en volg alle instructies op, voordat u van plan bent uw scooter voor het eerst te gaan gebruiken. De volgende symbolen zullen in deze handleiding worden gebruikt om waarschuwing en gevaar aan te geven.



WAARSCHUWING! Geeft een toestand of situatie aan die mogelijk gevaarlijk kan zijn. Indien de aangegeven procedures niet opgevolgd worden, kunnen hierdoor persoonlijke verwondingen, beschadiging van onderdelen, of storingen veroorzaakt worden. Op het product wordt deze afbeelding weergegeven als een zwart symbool op een gele driehoek met een zwart kader.



VERPLICHT! Deze handelingen dienen uitgevoerd te worden zoals is voorgeschreven. Indien verplichte handelingen niet uitgevoerd worden, kunnen hierdoor persoonlijke verwondingen en/of beschadiging van de apparatuur veroorzaakt worden. Op het product wordt deze afbeelding weergegeven als een wit symbool op een blauwe stip met een wit kader.

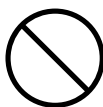


VERBODEN! Deze handelingen zijn verboden. Deze handelingen dienen op geen enkel ogenblik, of onder welke omstandigheden dan ook, uitgevoerd te worden. Indien een verboden handeling uitgevoerd wordt, kunnen hierdoor persoonlijke verwondingen, en/of beschadiging van de apparatuur veroorzaakt worden. Op het product wordt deze afbeelding weergegeven als een zwart symbool met een rode cirkel en een rode schuine streep.

Vul alstublieft de volgende informatie in voor snelle referentie:

Pride Leverancier: _____
Adres: _____
Telefoon nummer: _____
Koop Datum: _____ Serie nummer: _____

OPMERKING: Deze eigenaarhandleiding is samengesteld uit de laatste specificaties en product informatie op de tijd van publicatie. We reserveren het recht om veranderingen aan te brengen als die nodig worden. Enige veranderingen aan onze producten kunnen geringe verschillen tussen de illustraties en de verklaringen in deze handleiding tot stand brengen en het product welk u gekocht heeft. De meest recente/huidige versie van deze handleiding is via onze website verkrijgbaar.

DEALER:

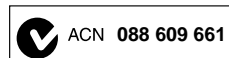

I N H O U D

I. INLEIDING	4
II. VEILIGHEID	5
III. UW SCOOTER	18
IV. BATTERIJEN EN HET LADEN	23
V. GEBRUIK	28
VI. DEMONTAGE EN MONTAGE	30
VII. HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	31
VIII. VERZORGING EN ONDERHOUD	34
IX. GARANTIE	36
APPENDIX I: SPECIFICATIES	37

I . I N L E I D I N G

VEILIGHEID

WELKOM bij Pride Mobility Products Europe B.V. (Pride). Het product dat u gekocht hebt combineert state of the art onderdelen met **veiligheid**, comfort en styling. Wij zijn er zeker van dat de ontwerp kenmerken u van de gemakken zullen voorzien die u verwacht in het dagelijkse leven. Begrijpen hoe u dit product **veilig** moet bedienen en verzorgen zullen u jaren probleemloos dienst en service geven.

Lees en volg alle voorschriften, waarschuwingen en aantekeningen in deze handleiding en alle andere bijgesloten literatuur voor u probeert om dit product voor de eerste keer te bedienen. Daarnaast berust uw **veiligheid** op u, en op uw leverancier, hulpverlener of medische begeleider in het gebruik van uw beste inzicht.

Als er enige informatie is in dit handboek welk u niet begrijpt, of als u verdere hulp nodig heeft in de assemblage of bediening, neem alstublieft contact op met uw bevoegde Pride Leverancier. Nalatigheid om de voorschriften, waarschuwingen, en aantekeningen in deze handleiding te volgen en deze op uw Pride product kunnen persoonlijk letsel of schade aan het product als gevolg hebben en de Pride product garantie laten vervallen.

LEVERANCIER OVEREENKOMST

Door ontvangst van dit product belooft u dat u dit product niet zult veranderen, wijzigen, of modificeren, of enige beschermingen, beveiligingen of andere veiligheid karakteristieken van dit product zult verwijderen of onbruikbaar zult maken; falen, weigeren of verzuimen om enige vernieuwing kits van tijd tot tijd te installeren die door Pride worden voorzien om het veilige gebruik van dit product te verbeteren of te preserven.

TRANSPORT EN LEVERING

Controleer voordat u uw Travel Scooter gebruikt dat alle onderdelen geleverd zijn, aangezien sommige onderdelen afzonderlijk verpakt kunnen zijn. Neem onmiddellijk contact met uw goedgekeurde Pride-leverancier op als er enige onderdelen ontbreken. In het geval dat de verpakking of de inhoud tijdens het transport beschadigd zijn, verzoeken wij u contact met de verantwoordelijke transportfirma op te nemen.

INFORMATIE-UITWISSELING

Wij willen uw vragen, commentaar en suggesties horen over dit handboek. We willen ook graag horen over de veiligheid en betrouwbaarheid van uw nieuwe Travel Scooter en over de service die u ontvangt van uw bevoegde Pride Leverancier. Geef ons alstublieft uw adres verandering, zodat we u op de hoogte kunnen houden over veiligheid, nieuwe producten, en nieuwe opties die uw vermogen om uw Travel Scooter te gebruiken en genieten kunnen verbeteren. Neem alstublieft contact op met ons op het adres hieronder:

Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands

AANMERKING: *Als u ooit uw product registratie kaart verliest of misplaatst, of uw kopie van deze handleiding, neem aub contact op met ons, en we sturen u graag meteen een nieuwe op.*

II. VEILIGHEID

PRODUCT VEILIGHEID SYMBOLEN

De symbolen hieronder zijn gebruikt op de Travel Scooter om waarschuwingen, verplichte handelingen, and verboden handelingen aan te geven. Het is ten zeerste belangrijk dat u deze leest en volkomen begrijpt.



Knijp/drang punten gecreëerd gedurende assemblage.



Batterijen bevatten corrosieve chemicaliën. Gebruik alleen AGM of Gel-Cell batterijen om het risico van lekken of explosies te verminderen.



EMI-RFI- Dit product is getest en voldoet aan de immuniteitseis van 20 V/m.



Het mobiliteitshulpmiddel mag niet opgetild worden terwijl u erin zit.



Het mobiliteitshulpmiddel mag niet opgetild worden terwijl u erin zit.



Er bestaat gevaar voor explosie!



Lees en volg de informatie in de gebruikers handleiding.

II. VEILIGHEID



Maximum gewichtscapaciteit.



Ontsloten en in freewheel modus.

Plaats eenheid op begane grond and sta achter of aan een kant wanneer veranderen van drive mode naar freewheel mode of freewheel mode naar drive mode.

Vergrendeld en in drive mode.



Draag een chemische veiligheidsbril.



Gebruik uitsluitend AGM of gel accu's.



Verwijder de anti-tip wielen niet.




Voorkomt blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of staand water wanneer mogelijk. Onderhoudt en sla op in een schone en droge conditie.


II. VEILIGHEID



Verwijdering van de aarding tak kan een elektrisch gevaar scheppen. Als het nodig is, monteer een toegestane driestand adapter naar een stopcontact met een tweestand stekker toegang.

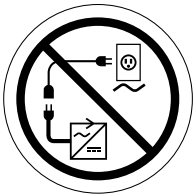

Voorkomt persoonlijk letsel en gereedschap schade. Verbindt geen verlengsnoer aan de AC/DC omvormer of de batterij oplader.

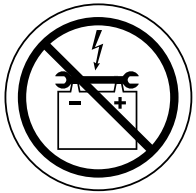

Contact met gereedschappen kan een elektrische schok veroorzaken.




Gebruik geen cel telefoon, walkietalkie, laptop of andere radio transistor gedurende gebruik.



Laat kinderen tijdens het opladen van de accu's niet zonder toezicht in de buurt van de scootmobiel spelen.



Hou uw handen tijdens het rijden uit de buurt van de banden. Let er op dat los hangende kleding in de aandrijfwielen vast kan raken.

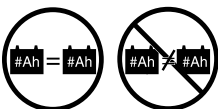


Gebruik geen accu's met een afwijkende capaciteit (Ah). Nieuwe accu's mogen niet samen met oude accu's toegepast worden. Vervang beide accu's altijd op hetzelfde tijdstip.

II. VEILIGHEID



Acculader, alleen voor gebruik binnenshuis.

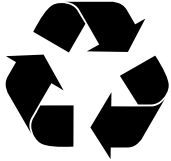

Afvoer en recycling: Neem contact met uw goedgekeurde Pride-leverancier op voor informatie over het op juiste wijze afvoeren van uw Pride-product en de verpakking ervan.



Afvoer en recycling: Neem contact met uw goedgekeurde Pride-leverancier op voor informatie over het op juiste wijze afvoeren van uw Pride-product en de verpakking ervan.



Bevat lood.

II . V E I L I G H E I D

ALGEMEEN



VERPLICHT! Voordat u voor het eerst uw Travel Scooter gaat gebruiken dient u eerst deze handleiding volledig te lezen en te begrijpen.

Uw Travel Scooter is ontworpen om uw leven te vergemakkelijken en uw mobiliteit te vergroten. Pride levert een groot aantal producten die het best tegemoetkomen aan de behoeften van de Travel Scootergebruiker. Houd u er rekening mee dat de uiteindelijke beslissing voor keuze en aankoop betreffende het type Travel Scooter dat gebruikt gaat worden uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van de Travel Scootergebruiker en zijn/haar medische begeleider (zoals arts, fysiotherapeut etc.).

De inhoud van deze handleiding is gebaseerd op de verwachting dat een deskundige op het gebied van revalidatiehulpmiddelen de Travel Scooter heeft afgesteld naar de behoeften van de gebruiker en zorgvuldige instructies heeft gegeven.

Er zijn bepaalde situaties, incl. enkele medische omstandigheden, waarin de gebruiker in het bijzijn van een deskundige zal moeten oefenen. Dit kan een familielid zijn of een hulpverlener die speciaal getraind is in de begeleiding van een Travel Scootergebruiker bij diverse dagelijkse activiteiten.

In het begin zult u mogelijk situaties tegenkomen waarin u enige oefening nodig hebt. Neem hiervoor de tijd en u zult al snel volledig vertrouwd raken met uw Travel Scooter.

Hieronder volgen enkele voorzorgsmaatregelen, tips en overige veiligheidsoverwegingen die bedoeld zijn om u bekend te maken met het gebruik van uw nieuwe Travel Scooter.

WIJZIGINGEN

Pride heeft uw Travel Scooter ontworpen om u mobiliteit en comfort te verschaffen. Er is een groot aantal toebehoren verkrijgbaar om uw Travel Scooter nog meer aan te passen aan uw persoonlijke behoeften en wensen. Echter, onder geen enkele omstandigheid mag u veranderingen aan uw Travel Scooter aanbrengen, zoals delen toevoegen of verwijderen, functies onklaar maken etc.



WAARSCHUWING! Breng nooit veranderingen aan uw Travel Scooter aan op een wijze die niet door Pride is goedgekeurd. Gebruik geen accessoires die niet voor gebruik bij Pride-producten getest en goedgekeurd zijn.

AFNEEMBARE DELEN



WAARSCHUWING! Probeer nooit uw Travel Scooter bij welk verwijderbaar onderdeel ook op te tillen, met inbegrip van de armleningen, zitting of afdekkap.

II. VEILIGHEID

VEILIGHEIDSTEST VOORAF

Maak uzelf vertrouwd met de Travel Scooter en zijn mogelijkheden. Pride adviseert om voor ieder gebruik een veiligheidscheck uit te voeren om er zeker van te zijn dat uw Travel Scooter soepel en veilig functioneert.

Voert u de volgende inspecties uit voordat u uw Travel Scooter gaat gebruiken:

- Controleer alle elektrische verbindingen. Verzekert u ervan dat ze goed vast zitten en niet verroest zijn.
- Controleer de remmen.
- Controleer de acculading.

LET OP: Constateert u een probleem, neem dan contact op met uw Pride-leverancier.

DRAAGGEWICHT

Uw Travel Scooter heeft een maximum gewichtscapaciteit. Verwijst u zich alstublieft naar de specificatie tabel voor deze limiet.



VERPLICHT! Zorg ervoor dat u de voorgeschreven gewichtscapaciteit van uw scootmobiel niet overschrijdt. Als de gewichtscapaciteit overschreden wordt, vervalt hierdoor uw garantie. Pride stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen en/of beschadigingen aan eigendommen als gevolg van het niet naleven van gewichtsbependingen.



WAARSCHUWING! Vervoer geen passagiers met uw scootmobiel. Mocht u passagiers met uw scootmobiel vervoeren, kan dit het zwaartepunt negatief beïnvloeden, met als gevolg dat het vervoermiddel om kan vallen, of dat u zelf uit de scootmobiel valt.

OPRITTEN EN HELLINGEN

Steeds meer gebouwen hebben opritten met een bepaald stijgingspercentage, ontworpen voor een veilige en makkelijke entree. Sommige opritten zijn voorzien van een bocht, zodat u daarvoor enige ervaring nodig hebt met uw Travel Scooter.

- Rijd u uiterst voorzichtig wanneer u een oprit of helling gaat afdalen.
- Neem bij een scherpe hoek langzaam, ruime bochten met uw voorwiel. Als u dat doet, zullen de achterwielen volgen en niet tegen de scherpe hoek aanrijden of blijven steken achter een reling.
- Wanneer u van een oprit naar beneden rijdt, zet dan uw snelheidsknop op de laagste stand om zo een veilige, gecontroleerde afdaling te garanderen.
- Vermijd plotselinge stops en starts.

Probeert u bij het beklimmen van een helling uw Travel Scooter rijdende te houden. Moet u al stoppen, start u dan weer langzaam en geeft u voorzichtig gas. Bij het dalen dient u de snelheidsknop op de laagste stand te zetten en alleen vooruit te rijden. Mocht uw Travel Scooter sneller dan u wenst of aankunt de helling afdalen, zet hem dan volledig stop door de gashendel los te laten. Duw vervolgens de gashendel voorzichtig naar voren om zo veilig en gecontroleerd af te dalen.



WAARSCHUWING! Rijd bij het klimmen niet zigzaggend omhoog maar rijd in één keer recht omhoog. Dit vermindert de kans op kantelen of vallen. Betrach steeds uiterste voorzichtigheid bij het klimmen.

WAARSCHUWING! Rijdt uw Travel Scooter niet langs de zijkant van een beklimming of afdaling; zet uw Travel Scooter niet stil, als dat mogelijk is, gedurende een beklimming.

II. VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Vermijd gevaarlijke hellingen, bijv. terrein bedekt met sneeuw, ijs, natte bladeren etc.



WAARSCHUWING! Zet bij een beklimming of afdaling uw Travel Scooter nooit in de vrijloop, terwijl u op uw Travel Scooter zit of er naast staat.

WAARSCHUWING! Ook al is uw Travel Scooter vaardig om hellingen te beklimmen die groter zijn dan aangegeven op figuur 1, probeer onder geen omstandigheden de hellinggegevens of welke andere gegevens dan ook in deze handleiding te overschrijden.


Sommige hellingen zijn van nature of speciaal aangelegd, niet direct geschikt voor Travel Scooters. **Figuur 1** laten de stabiliteit van uw Travel Scooter zien en tonen welke helling u kunt berijden bij diverse draaggewichten en onder gecontroleerde testcondities.

Deze testen zijn uitgevoerd met de Travel Scooter stoel in de hoogste stand en zo ver mogelijk naar achteren ingesteld. Gebruik deze informatie als een leidraad. De hellingscapaciteit van uw Travel Scooter wordt beïnvloed door uw gewicht, de snelheid van de Travel Scooter, de hoek waarin u de helling nadert en de instellingen van uw Travel Scooter.

WAARSCHUWING! Zowel het voorste als het achterste mandje mogen nooit meer dan 6,8 kg aan artikelen bevatten.



WAARSCHUWING! Poging om steilere hellingen te nemen dan in figuur 1 zijn aangegeven kunnen uw Travel Scooter in een onstabiele positie brengen of zelfs doen kantelen.

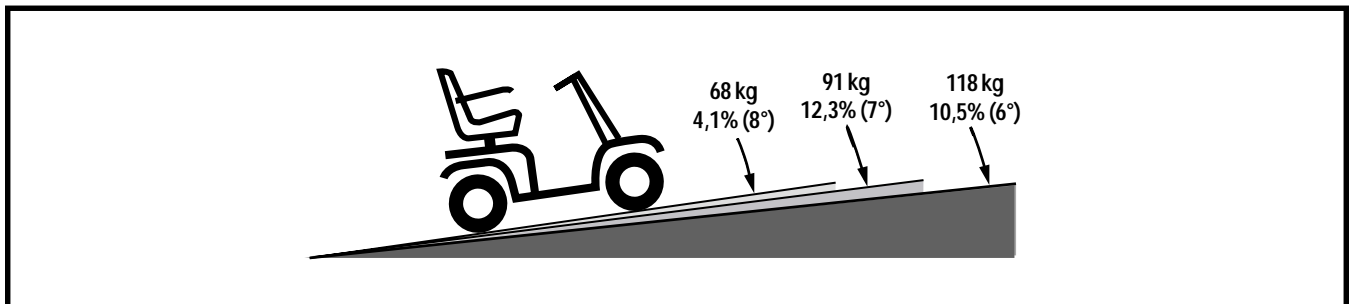


Figuur 1. De Travel Pal al aanbevolen hellinghoek


II. VEILIGHEID

Wanneer u een helling nadert kunt u het beste naar voren leunen. **Zie figuren 2 en 2A.** Dan schuift het zwaartepunt van u en uw Travel Scooter naar de voorkant van de Travel Scooter voor een betere stabiliteit.

OPMERKING: *Terwijl u hellingen neemt, kan de bekrachtigde Travel Scooter ongeveer 30,5 cm ‘terug rollen’ voor de rem grijpt, als de gaspedaal bedieningshendel wordt losgelaten terwijl u vooruit gaat. Als de gaspedaal bedieningshendel wordt losgelaten terwijl u achteruit gaat, kan de bekrachtigde Travel Scooter ongeveer een meter ‘terug rollen’ voor de rem grijpt.*

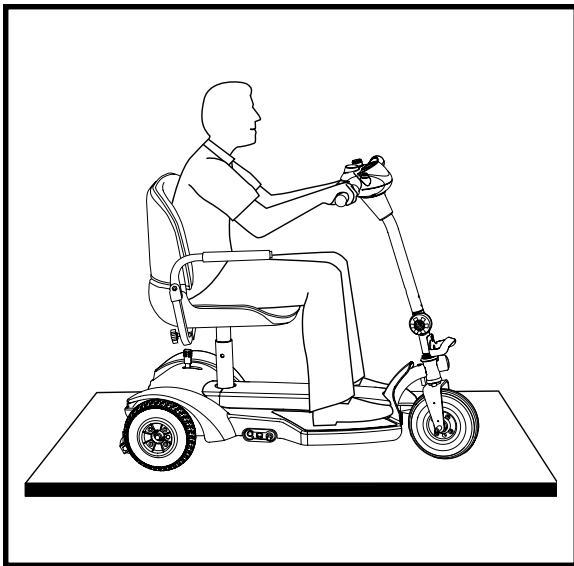

Figuur 2. Normale rijpositie

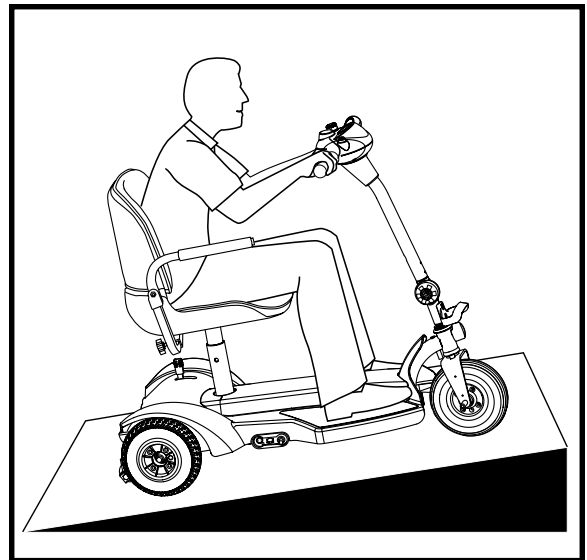

Figuur 2A. Verhoogde stabiliteit rijpositie

HET NEMEN VAN BOCHTEN

Extreem hoge snelheid in bochten kan leiden tot kantelen van uw Travel Scooter. Factoren die het kantelgevaar vergroten zijn o.a. (maar niet uitsluitend): de snelheid in bochten, de stuurhoek (d.w.z. hoe scherp u draait) oneffen terrein, hellend terrein, het rijden van een terrein met weinig trekkracht naar een terrein met veel trekkracht (zoals bijvoorbeeld komend van een grasrijk terrein op een geplaveid terrein - speciaal bij het draaien met hoge snelheid) en abrupte verandering van richting. Hoge snelheid bij bochten wordt sterk afgeraden. Wanneer u het gevoel heeft dat uw Travel Scooter kan gaan kantelen, verminder dan uw snelheid en pas uw stuurhoek aan (d.w.z. maak de draai minder scherp).



WAARSCHUWING! Verminder uw snelheid bij het nemen van een scherpe bocht. Wanneer u met hoge snelheid op uw Travel Scooter rijdt, neem dan geen scherpe bochten. Dit verkleint aanzienlijk de kans op kantelen of vallen. Gebruik altijd uw nuchtere verstand bij het nemen van bochten.

REMMEN

Uw Travel Scooter is uitgevoerd met twee sterke remsystemen:

- Regenererend: gebruikt elektrische energie om snel af te remmen wanneer de gashendel in de neutraal-/stopstand wordt gezet en.
- Motorrem zorgt voor automatische blokkering nadat de Travel Scooter bijna tot stilstand is gebracht, of wanneer om wat voor reden dan ook de energie wegvalt.

II. VEILIGHEID

WEGDEK

Uw Travel Scooter is ontworpen om u te voorzien van optimale stabiliteit onder normale rijomstandigheden, zoals verhard wegdek, beton of asfalt. Pride begrijpt echter dat er momenten zullen zijn waarop u ook voor andere soorten wegdek kan komen te staan. Om deze reden is uw Travel Scooter ook ontworpen om goed te gebruiken op overige vaste ondergronden, zoals gras of gravel.

- Minder uw snelheid wanneer u op oneffen terrein en/of zachte ondergrond rijdt.
- Vermijd hoog gras dat zich in de motor kan draaien.
- Vermijd losse gravel en zand.
- Mocht u twijfels hebben over een terrein, vermijd het dan.

OPENBARE WEGEN



WAARSCHUWING! Gebruik uw Travel Scooter niet op openbare wegen en autowegen. Bedenk dat het voor het verkeer moeilijk is u op uw Travel Scooter te zien. Gedraagt u zich als voetganger. Wacht bij het oversteken tot de weg vrij is en steek dan over met grote voorzichtigheid.

VASTE OBSTAKELS (TREDEN, TROTTOIRBANDEN, ETC.)

Benader een trottoirband altijd loodrecht bij het klimmen of dalen. **Zie figuren 3 en 3A.**

WAARSCHUWING! Kom niet te dicht bij hoge randen, onbeschermde richels, trottoirbanden of andere plaatsen waar u gemakkelijk vanaf kunt glijden.


WAARSCHUWING! Probeer niet met uw Travel Scooter een extreem hoog obstakel te nemen. Dit kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of tot schade.




WAARSCHUWING! Laat uw Travel Scooter nooit achterwaarts een verhoging afrijden. Dit verhoogt het risico op kantelen en de kans op persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING! Zorg dat uw Travel Scooter loodrecht een obstakel nadert. Zie Figuren 3 en 3A.

WAARSCHUWING! Probeer niet een trottoirband te nemen hoger dan 5 cm.

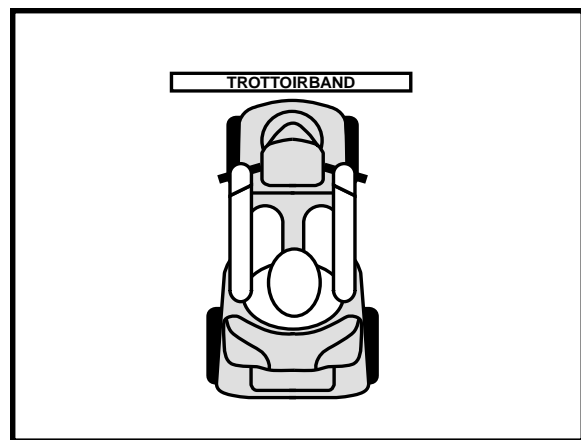

Figuur 3. Juiste benadering

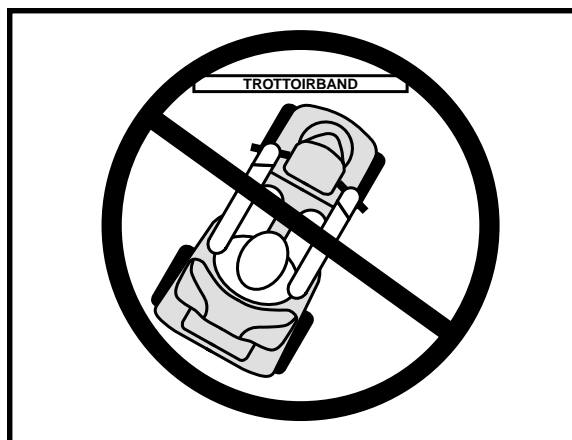

Figuur 3A. Foute benadering

II. VEILIGHEID

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ SLECHT WEER

Het bloot stellen van uw Travel Scooter aan slechte weersomstandigheden dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien u tijdens het rijden in uw Travel Scooter wordt overvallen door regen, sneeuw, extreme kou of hitte dient u bij de eerste mogelijkheid te schuilen. Draai uw Travel Scooter grondig droog voordat u hem weg zet, laadt, of weer gebruikt.



VERPLICHT! Gebruik van de Travel Scooter in regen, sneeuw, zout, mist en nevel, en op glad wegdek kan verwondingen en/of schade aan de Travel Scooter of de elektrische installatie veroorzaken. Onderhoud en zet de Travel Scooter weg in droge en schone toestand.



WAARSCHUWING! Langdurige blootstelling aan warme of koude omstandigheden kan een effect hebben op de temperatuur van beklede en niet-beklede items aan uw Travel Scooter, waardoor mogelijk huidirritatie kan ontstaan. Wees voorzichtig bij het gebruik van uw Travel Scooter in buitengewoon warme of koude omstandigheden, of indien u uw scootmobiel gedurende langere tijd aan direct zonlicht blootstelt.

RIJLOOPSTAND

Uw Travel Scooter is uitgerust met een handmatige vrijloophendel die, wanneer deze is ontkoppeld, het mogelijk maakt uw Travel Scooter handmatig voort te bewegen. Voor meer informatie over het ontkoppelen van de vrijloophendel, zie III. “Uw Scooter.”



WAARSCHUWING! Als u uw Travel Scooter in de vrijloop stand zet, zijn de remmen niet ingeschakeld.

- Ontkoppel de aandrijfmotoren alleen op een horizontaal oppervlak.
- Vergeet niet de sleutel uit het contactslot te verwijderen.
- U dient naast de scootmobiel te staan tijdens het in- en uitschakelen van de vrijloopmodus. Doe dit nooit terwijl u op de Travel Scooter zit.
- Plaats de Travel Scooter na het duwen altijd weer terug in de aandrijfmodus, om de remmen vast te zetten.

Een aanvullend kenmerk van de Travel Scooter is de “druk-te-snel” beveiliging welk de Travel Scooter beveiligd tegen te grote snelheid opname terwijl deze in freewheel stand staat.

“Druk-te-snel” functioneert anders, afhankelijk van welk van de twee condities:

- Als de sleutel “uit” staat wanneer in freewheel mode, activeert de Scooters controller een regeneratief remmen wanneer de Scootmobiel sneller dan de maximum drempel welk van te voren is ingesteld wordt gedrukt. In dit geval functioneert de controller als een snelheidscontroleur.
- Als de sleutel “aan” staat wanneer in freewheel mode, komt u aanzienlijke weerstand tegen op alle snelheden. Dit voorkomt dat de Scootmobiel ongewenste vaart krijgt als het handbediende freewheel hendel per ongeluk zou worden losgelaten terwijl u de Scootmobiel rijdt.

TRAPPEN EN ROLTRAPPEN

Scooters zijn niet ontworpen om trappen en roltrappen op of af te gaan. Gebruik altijd de lift.



WAARSCHUWING! Gebruik uw Travel Scooter niet op trappen en/of roltrappen.

DEUREN

- Stel vast of een deur naar u toe draait of van u af.
- Gebruik uw hand om de deurknop om te draaien, of de deur naar u toe te trekken of weg te duwen.
- Rijd langzaam vooruit om de deur open te duwen. Of rijd langzaam achteruit om de deur open te trekken.

II. VEILIGHEID

LIFTEN

De hedendaagse liften hebben een veiligheidsmechanisme in de deurrand waardoor bij aanraking de deuren opnieuw opengaan.

- Wanneer u in de deuropening van een lift staat terwijl de deuren dichtgaan, duw dan tegen de rubber deurrand of zorg dat uw Travel Scooter deze rand raakt en de deuren zullen weer opengaan.
- Zorg ervoor dat boodschappen, tassen of Travel Scooter accessoires niet tussen de liftdeuren blijven steken.

TILHULPMIDDELEN

Tijdens het reizen met uw Travel Scooter heeft u misschien een tillift nodig als hulp bij het transport. Pride adviseert dan om strikt de instructies en veiligheidsvoorschriften bij dit betreffende hulpmiddel op te volgen alvorens het te gebruiken.



WAARSCHUWING! Ga nooit op uw scootmobiel zitten als deze wordt gebruikt in combinatie met een lift of een vergelijkbaar product. Uw Travel Scooter is daar niet voor gemaakt en schade of verwondingen veroorzaakt door dergelijk gebruik vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Pride.

BATTERIJEN

Naast de hieronder vermelde waarschuwingen dient u ook alle overige informatie omtrent het behandelen van batterijen goed door te lezen.



VERPLICHT! De accupolen, aansluitklemmen en aanverwante accessoires bevatten lood en loodverbindingen. Draag bij het hanteren van accu's een chemische veiligheidsbril en geschikte handschoenen, en was uw handen na gebruik.

WAARSCHUWING! Scooter batterijen zijn zwaar (zie specificatie tabel). Aarzel niet om hulp in te roepen als u niet in staat bent zoveel gewicht op te tillen. Til op de juiste wijze en nooit meer dan waar u fysiek toe in staat bent.



WAARSCHUWING! Bescherm de accu's altijd tegen bevriezen en laad nooit een bevroren accu op. Een bevroren accu kan door opladen beschadigd worden.

WAARSCHUWING! RODE (+) kabels moeten aangesloten worden aan de positieve (+) batterij pool. ZWARTE (-) kabels moeten aangesloten worden aan de negatieve (-) batterij pool. Op alle accupolen dienen beschermkappen te zitten. Indien u een kabel beschadigt, **VERVANG** deze dan meteen.

RECYCLING EN VERWIJDERING VAN BATTERIJEN

Als u een beschadigde batterij aantreft, zorg er dan voor dat u die meteen in een plastic tas verpakt en contact opneemt met uw bevoegde Pride leverancier voor verwijderingsinstructies. Uw bevoegde Pride leverancier heeft ook de nodige informatie over het recyclen van batterijen, wat natuurlijk onze voorkeur is.

II. VEILIGHEID

TRANSPORT IN EEN RIJDEND VOERTUIG

Pride raadt u aan niet in uw Travel Scooter te blijven zitten tijdens transport in een motorvoertuig. De Travel Scooter dient in de kofferbak van de auto of in de laadruimte van een pickup te worden opgeborgen waarbij de accu's verwijderd en zorgvuldig vastgezet dienen te worden.

WAARSCHUWING! Blijf niet in uw Travel Scooter zitten terwijl deze in een rijdend voertuig staat.



WAARSCHUWING! Controleer altijd of uw Travel Scooter en zijn accu's goed vastgezet zijn tijdens transport. Accu's dienen recht op vastgezet zijn en op de accupolen dienen beschermkappen aangebracht te zijn. Accu's mogen niet samen met brandbare of ontplofbare items vervoerd worden.

HET VOORKOMEN VAN ONBEDOELD WEGRIJDEN



WAARSCHUWING! Verwacht u voor langere tijd stil te staan terwijl u in uw Travel Scooter zit, zet dan de Travel Scooter uit. Dit voorkomt dat de Travel Scooter onverwacht in beweging komt door het per ongeluk aanraken van de gashendel.

HET OP-EN AFSTAPPEN VAN UW TRAVEL SCOOTER

Hiervoor is een goed evenwichtsgevoel vereist. Neem daarom de volgende veiligheidstips goed door.

- Verwijder de sleutel uit het contact.
- Zorg dat uw Travel Scooter niet in de vrijloopstand staat. Zie III. "Uw Scooter."
- Zorg dat de stoel goed vergrendeld is

WAARSCHUWING! Gaat u zo ver mogelijk achterin de stoel zitten om te voorkomen dat de Travel Scooter kantelt.



WAARSCHUWING! Breng nooit al uw gewicht op de armleuningen van de Travel Scooter aan en gebruik de armleuningen niet voor het dragen van gewicht, zoals bij verplaatsen. Hierdoor kan de Travel Scooter omvallen, met als resultaat dat u uit de Travel Scooter valt, met persoonlijke verwonding tot gevolg.

WAARSCHUWING! Plaats niet al uw gewicht op de voetenplank. Dit kan de Travel Scooter doen kantelen.

REIKEN EN BUKKEN

Vermijd alle reik- en bukbewegingen wanneer uw Travel Scooter in beweging is. Als u een van deze bewegingen moet maken is het belangrijk dat u een stabiel punt van zwaartekracht behoudt zodat de Travel Scooter niet kan omkiepen. Pride recommandeert dat de Travel Scooter gebruiker bepaald wat zijn of haar persoonlijke beperkingen zijn en het reiken en bukken uitoefenen in aanwezigheid van een gekwalificeerde persoon van de gezondheidszorg.



WAARSCHUWING! Buig niet opzij of voorover om objecten van de vloer op te rapen. Zulke bewegingen kunnen het punt van zwaartekracht en het verdelingsgewicht van de Travel Scooter veranderen en kan de oorzaak zijn dat de Travel Scooter omkiept.



VERBODEN! Hou uw handen tijdens het rijden uit de buurt van de banden. Let er op dat los hangende kleding in de aandrijfwielen vast kan raken.

GEBRUIK VAN MEDICIJNEN/LICHAMELIJKE BEPERKINGEN

Een Travel Scootergebruiker dient zorgvuldig en verstandig met zijn Travel Scooter om te gaan. Zeker bij gebruik van medicijnen of bij lichamelijke beperkingen dient men zich goed bewust te zijn van de veiligheidsvoorschriften.

II. VEILIGHEID



WAARSCHUWING! Raadpleeg uw arts wanneer u medicijnen gebruikt of lichamelijke beperkingen hebt. Sommige medicijnen of beperkingen kunnen uw rijgedrag beïnvloeden.

ALCOHOL

Een Travel Scootergebruiker dien zorgvuldig en verstandig met zijn Travel Scooter om te gaan. Hieronder valt ook het zich bewust zijn van veiligheidskwesties na gebruik van alcohol, of tijdens het roken.

WAARSCHUWING! Gebruik uw Travel Scooter niet als u onder invloed bent van alcohol. Alcohol kan uw rijgedrag beïnvloeden.



WAARSCHUWING! Pride raad u ten strengste aan geen sigaretten te roken terwijl u op uw Travel Scooter zit, alhoewel deze aan alle vereiste testvoorschriften betreffende het roken van sigaretten voldoet. U dient zich aan de volgende veiligheidsvoorschriften te houden als u toch besluit sigaretten te roken terwijl u op uw Travel Scooter zit.

- Laat brandende sigaretten niet onbeheerd achter.
- Houd asbakken op veilige afstand van de kussens van de zitting.
- Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig uitgedrukt zijn voordat u ze weggooit.

ELEKTROMAGNETISCHE EN RADIO FREQUENTIE INVLOED (EMI/RFI)



WAARSCHUWING! Laboratorium testen hebben uitgewezen dat elektromagnetische en radio frequentie golven een negatief effect op de prestaties van elektrisch aangedreven voertuigen.

Elektromagnetische en radio frequentie invloed kan worden veroorzaakt door bronnen als mobiele telefoons, mobiele twee-weg radio's (zoals walkietalkies), radio stations, TV stations, amateur radio (HAM) zenders, draadloze computers, magnetron, pacemakers en middellange afstand mobiele ontvangers die worden gebruikt door hulpverleningsvoertuigen. In sommige gevallen kunnen dergelijke golven onbedoelde bewegingen veroorzaken of schade toebrengen aan het controle systeem. Ieder elektrisch aangedreven voertuig beschikt over een bepaalde immuniteit (of weerstand) voor EMI. Hoe hoger het niveau van immuniteit, des te groter de bescherming tegen EMI. Dit product is getest en voldoet aan een immuniteitsniveau van V/M.



WAARSCHUWING! Wees er op verdacht dat mobiele telefoons, twee-weg radio's, laptops en andere types radiozenders onbedoelde bewegingen van uw elektrisch aangedreven voertuig kunnen veroorzaken als gevolg van EMI. Wees voorzichtig als u één van deze dingen gebruikt terwijl u rijdt in uw elektrische voertuig en zorg er voor dat u niet te dicht in de buurt van radio en TV stations komt.



WAARSCHUWING! Het toevoegen van accessoires of onderdelen aan uw elektrisch aangedreven voertuig kan de gevoeligheid van het voertuig ten opzichte van EMI verhogen. Verander uw Travel Scooter alleen met goedkeuring van Pride.

WAARSCHUWING! Het elektrisch aangedreven voertuig zelf kan ook storingen veroorzaken aan andere elektrische apparatuur in de buurt, zoals alarm systemen.

LET OP: Voor meer informatie over EMI/RFI, bezoekt u de website van Resource Center op www.pridemobility.com. Indien onbedoelde bewegingen of remmen optreden, schakelt u de Travel Scooter zo snel mogelijk uit als veiligerwijze mogelijk is. Neem contact op met een erkende leverancier om het incident te melden.


III. UW SCOOTER

ONDERDELEN VAN DE CONSOLE AAN DE STUURSTANG

De console aan de stuurstang bevat alle bedieningselementen die u nodig heeft voor het rijden op uw Travel Scooter, met inbegrip van het contactslot, de snelheidsregelhendel, claxonknop, snelheidsafstelknop en de accutoestandmeter. **Zie figuur 4.**



WAARSCHUWING! Stel uw bedieningspaneel niet bloot aan vocht. Indien het toch wordt blootgesteld aan vocht, probeer dan uw Scooter niet te gebruiken voordat het paneel volledig is opgedroogd.

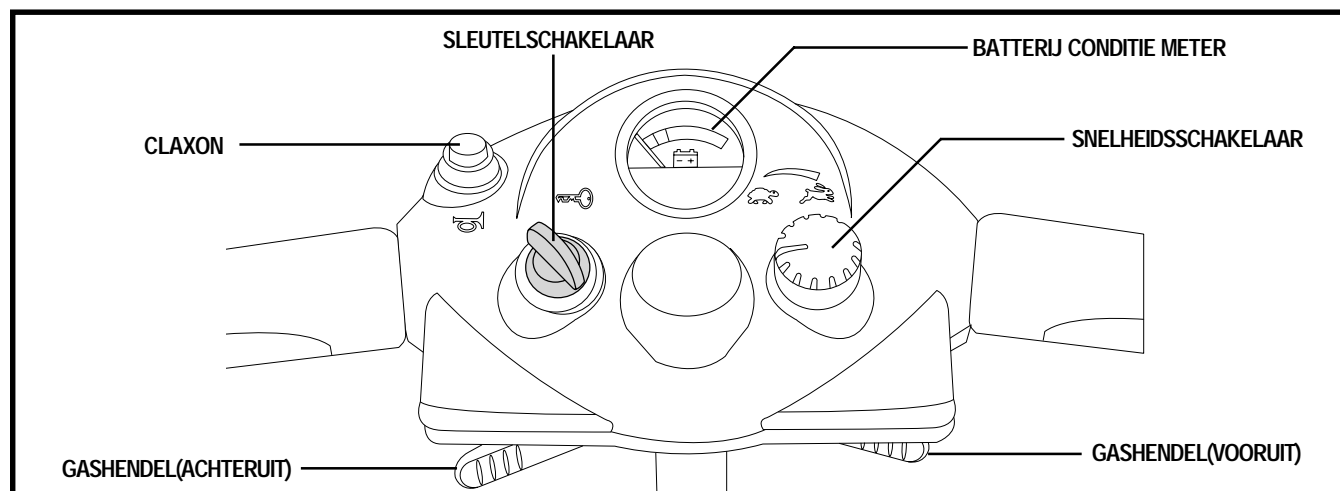

Figuur 4. Bedieningspaneel

Sleutelschakelaar

- Steek de sleutel in contactslot en draai met de klok mee om de Travel Scooter in te schakelen.
- Draai de sleutel tegen de klok in en verwijder van de sleutel om de Travel Scooter uit te schakelen.

Maar, om onbevoegd gebruik van uw Travel Scooter tegen te gaan, is het aan te raden dat u de sleutel volledig verwijdert.



WAARSCHUWING! Als u de sleutel uit de schakelaar neemt terwijl uw Travel Scooter in beweging is zullen de elektronische remmen automatisch inschakelen en uw Travel Scooter komt tot een abrupte stop.

Gashendel

Deze hendels geven u de controle over de snelheid voor- en achteruit van de Scooter of, afhankelijk van de stand van de knop van de Scooter voor instelling.

- Plaats uw rechterhand op de rechter handgreep en uw linkerhand op de linker handgreep.
- Gebruik uw rechter duim om tegen de rechter hendel te drukken, om zo de rem te ontkoppelen en vooruit te rijden.
- Laat de hendel los en laat uw Travel Scooter volledig tot stilstand komen voordat u de linker gashendel indrukt om achteruit te rijden.
- Wanneer de gashendel volledig wordt losgelaten, valt deze automatisch terug in de "stop" positie en ontkoppelt de remmen.

Claxon

Deze knop activeert de claxon. Zorg dat de sleutel goed in de schakelaar zit. Pas dan kan de claxon functioneren. Aarzel niet uw claxon te gebruiken in gevaarlijke situaties.

III. UW SCOOTER

Batterij Conditie Meter

Als u de sleutel in de schakelaar steekt, zal deze meter de globale batterij conditie weergeven. Voor verdere informatie over de batterij conditie meter, zie IV. “Batterijen en het Laden.”

Snelheidsschakelaar

Deze schakelaar maakt het mogelijk de snelheid van te voren in te stellen.

- De afbeelding van de schildpad geeft de langzaamste stand aan.
- De afbeelding van de haas geeft de snelste stand aan.

ONDERSTE STUURSTANGONDERDELEN

Stuurstangafstelknop

Uw Travel Scooter is uitgerust met een afstelbare zwenkbare stuurstang die u in een stand kunt plaatsen die u het meeste comfort biedt.




WAARSCHUWING! Neem de sleutel uit de schakelaar voordat u de stuurkolom gaat aanpassen. Probeer nooit uw stuur aan te passen terwijl uw Travel Scooter in beweging is.

1. Draai de knop om het stuur te verstellen linksom en maak zo de stuurkolom los. **Zie figuur 5.**
2. Stel het stuur in op een comfortabele stand.
3. Draai de knop rechtsom om deze weer goed vast te draaien.

OPMERKING: Om de stuurstang in zijn laagste stand te plaatsen, dient u eerst de zitting te verwijderen.

Handgreep van de stuurstang

De handgreep van de stuurstang bevindt zich onder de stuurstangafstelknop (zie figuur 5) en deze moet gebruikt worden om de voorzijde van de Travel Scooter tijdens opslag of transport op te tillen. Controleer dat de vergrendelingsknop van de stuurstang in de vergrendelde stand staat, voordat u de Travel Scooter met behulp van de handgreep van de stuurstang optilt.

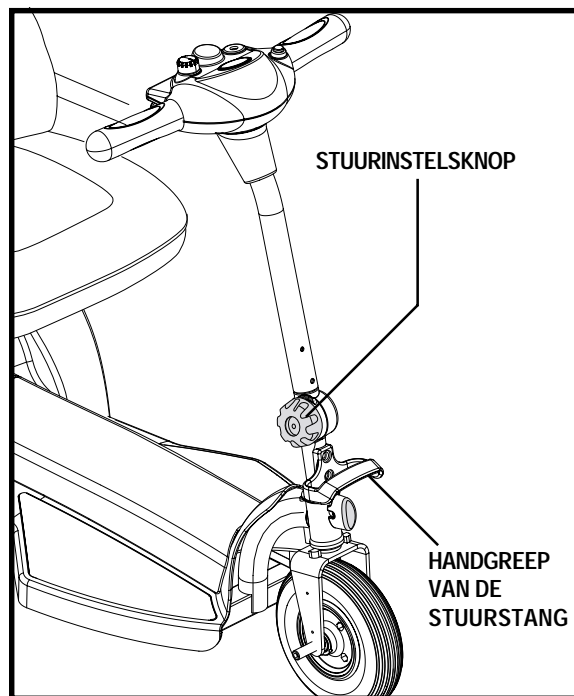

Figuur 5. Stuurinstelling

III. UW SCOOTER


Vergrendelingsknop van de stuurstang

De stuurstang kan met behulp van de vergrendelingsknop in de recht vooruit wijzende stand vergrendeld worden. Het vergrendelen van de stuurstang is nuttig bij het transporteren van de Travel Scooter, omdat het voorwiel hierdoor gestabiliseerd wordt en de Travel Scooter geen zijwaartse beweging maken kan.




WAARSCHUWING! Controleer voordat u op uw Travel Scooter gaat zitten altijd dat de vergrendelingsknop van de stuurstang in de ontgrendelde stand staat. Zie afbeelding 7A. Het rijden met de vergrendelingsknop van de stuurstang in de vergrendelde stand kan persoonlijke verwonding tot gevolg hebben.

Vanuit de ontgrendelde stand (zie figuur 6) vergrendelt u het voorwiel door de vergrendelingsknop van de stuurstang in te duwen en vervolgens een kwartslag rechtsom te draaien. Zie figuur 6A.

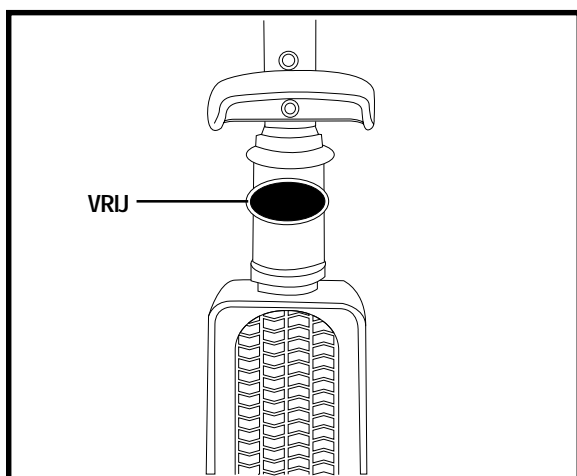

Figuur 6. Stuurkolom (Vrij)

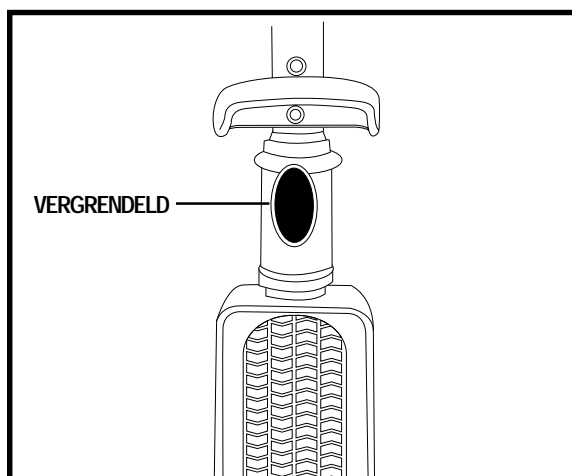


Figuur 6A. Stuurkolom (vergrendeld)

AFSTELLINGEN AAN DE ZITTING

De hoogte van de zitting afstellen:

1. Verwijder de zitting door deze recht omhoog van de Travel Scooter af te trekken.
2. Gebruik de bijgevoegde ring om het palletje uit de laagste stoelpositie te trekken en te verwijderen.
3. Stel de bovenste stoelpositie naar boven of beneden in om de gewenste zithoogte te bereiken.
4. Terwijl u de hoogste stoelpositie op deze hoogte houdt, zorgt u ervoor dat de instellingsgaten met de hoogste en laagste stoelpositie overeenkomen.
5. Steek het palletje er helemaal in.
6. Zet de stoel terug.

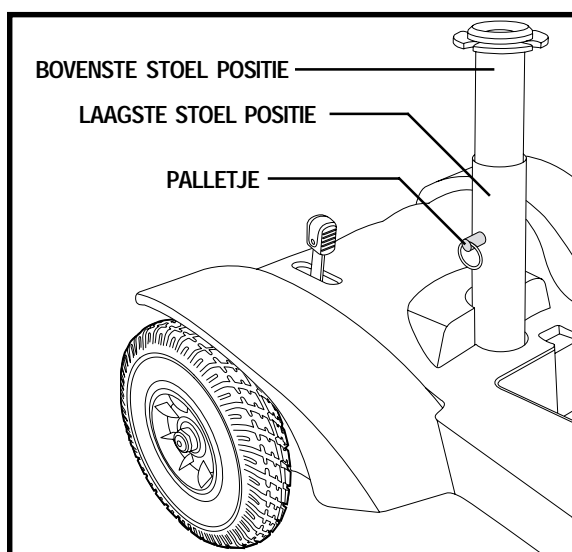

Figuur 7. Zithoogte instelling

III. UW SCOOTER

De breedte van de arMLEUNINGEN afstellen:

1. Draai de afstelknoppen van de arMLEUNINGEN aan de achterzijde van de zitting los.
2. Schuif de arMLEUNINGEN naar binnen of naar buiten tot de gewenste breedte afgesteld is.
3. Draai de afstelknoppen van de arMLEUNINGEN weer vast.

LET OP: De arMLEUNINGEN kunnen ook naar boven draaien om in en uit de Travel Scooter stappen makkelijker te maken.

ONDERDELEN VAN HET ACHTERSTE GEDEELTE


De hendel voor de vrijloop, de wieltjes tegen het omvallen, de motor-/achteraseenheid en de onderdelen van het oplaadsysteem bevinden zich aan het achterste gedeelte van uw Travel Scooter. Zie figuur 8.

WAARSCHUWING! Verwijder de sleutel uit het contactslot voordat u uw Travel Scooter in de vrijloopmodus plaatst, of uit de vrijloopmodus haalt.



WAARSCHUWING! U mag nooit op een Travel Scooter gaan zitten als deze zich in de vrijloopmodus bevindt.

WAARSCHUWING! Plaats een Travel Scooter nooit in de vrijloopmodus als deze op een helling staat.

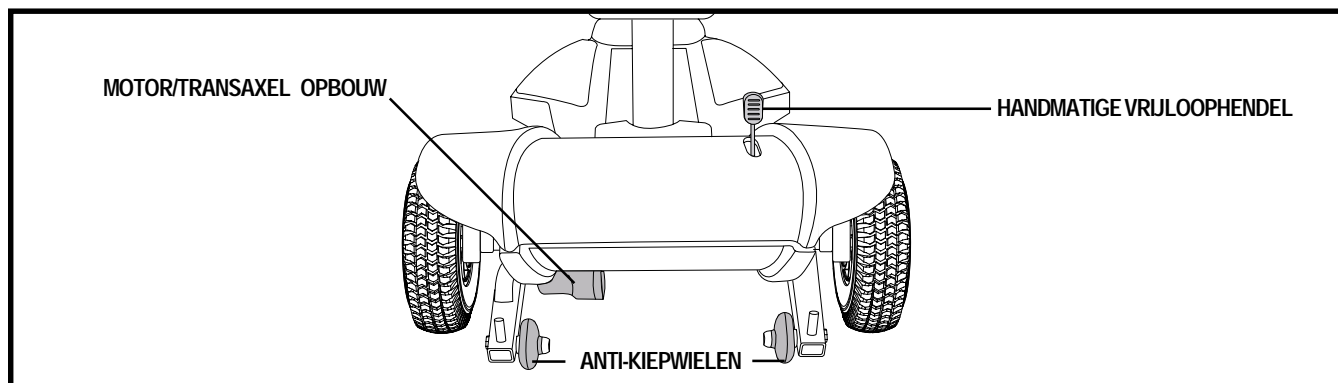

Figuur 8. Achterdeel

Handmatig te Bedienen Vrijloophendel

Wanneer u uw Travel Scooter een klein stukje wilt verplaatsen kunt u deze in de vrijloop positie zetten.

1. Duw de handmatige vrijloophendel voorruit om het rij- en remsysteem te ontkoppelen. U kunt nu uw Travel Scooter duwen.
2. Duw de handmatige vrijloophendel naar achteren om het rij- en remsysteem in te schakelen; hiermee haalt u uw Travel Scooter uit de vrijloopstand.

WAARSCHUWING! Als u uw Travel Scooter in de vrijloop stand zet, zijn de remmen niet ingeschakeld.



- Ontkoppel de aandrijfmotoren alleen op een horizontaal oppervlak.
- Vergeet niet de sleutel uit het contactslot te verwijderen.
- U dient naast de scootmobiel te staan tijdens het in- en uitschakelen van de vrijloopmodus. Doe dit nooit terwijl u op de Travel Scooter zit.
- Plaats de Travel Scooter na het duwen altijd weer terug in de aandrijfmodus, om de remmen vast te zetten.

III. UW SCOOTER

Anti-kiepwielen

De anti-kiepwielen zijn belangrijk voor uw veiligheid. Ze zitten aan het achterdeel van uw Travel Scooter gelast.



VERBODEN! Haal de anti-kiep wielen er niet af of verander uw scootmobiel op geen enkele wijze zonder toestemming van Pride.

Motor/Transaxel Opbouw

De motor/transaxel opbouw is een elektromechanische unit die de elektrische energie van de accu's omzet in de gecontroleerde mechanische energie die de wielen van uw Travel Scooter aandrijft.


Laadcontact

Steek het snoer van de oplader in het laadcontact van uw Travel Scooter. **Zie figuur 9.**


Hoofd Stroomonderbreker (Reset Knop)

Wanneer het voltage van de batterijen laag wordt of uw Travel Scooter moet uiterste inspanning leveren bijvoorbeeld bij zware lading of steile hellingen, dan kan de hoofd stroomonderbreker zichzelf uitschakelen om zo de motor en elektronica te beschermen. **Zie figuur 9.**

- De hoofd stroomonderbreker reset knop komt te voorschijn wanneer de schakelaar losschiet.
- Wanneer de schakelaar losschiet, wordt het gehele elektronische systeem van uw Travel Scooter stopgezet.
- Wacht vervolgens een paar minuten om de elektronica "rust te geven."
- Druk de reset knop in om de hoofd stroomonderbreker te resetten.
- Wanneer de hoofd stroomonderbreker herhaaldelijk losschiet, kan het zijn dat u uw batterijen vaker dient op te laden. Ook zou het kunnen zijn dat u uw leverancier moet vragen de batterijen te testen.
- Indien de hoofd stroomonderbreker er herhaaldelijk uit springt, dient u uw Pride dealer te bezoeken voor service.

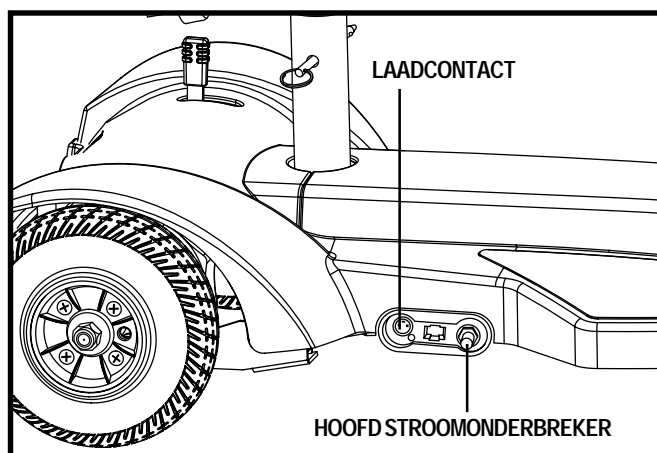

Figuur 9. Onderdelen van het oplaadsysteem

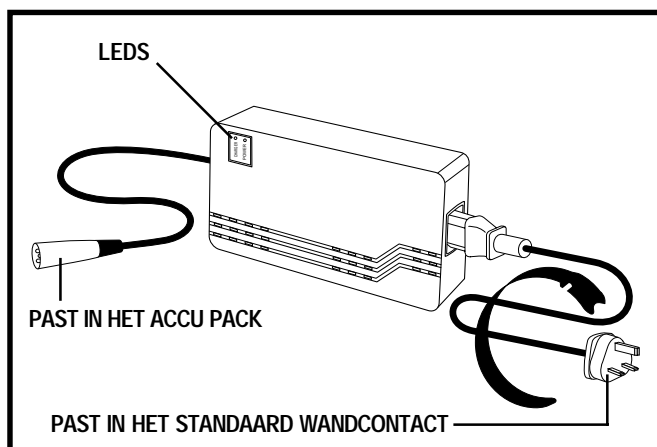

Figuur 10. Externe batterijlader

EXTERNE BATTERIJLADER

De externe batterijlader laad uw Travel Scooterbatterijen op wanneer deze aangesloten is aan het laadcontact op uw Travel Scooter (dit bevindt zich op de accuhouder) en het stopkontakt in de muur. **Zie figuur 10.**


De LED lichtjes op de lader geven verschillende stadia aan in het laadproces: stroomtoevoer van de lader is aan, laadproces in werking, laadproces voltooid. Kijk op de label op de lader voor een complete uitleg van de indicaties.

IV. BATTERIJEN EN HET LADEN

Uw Travel Scooter is voorzien van twee 12 ampère batterijen die gesloten zijn en onderhoudsvrij. Houdt uw batterijen zoveel mogelijk geladen om uw Travel Scooter soepel te laten rijden. Laad de batterijen op voordat u uw Travel Scooter voor de eerste keer gaat gebruiken.

HET LEZEN VAN UW BATTERIJVOLTAGE

De batterij conditiemeter op het bedieningspaneel geeft in kleurcodes een indicatie van de hoeveelheid energie in uw batterijen. Van rechts naar links, groen; volledig geladen batterijen, geel; afnemende lading, en rood; opladen dient onmiddellijk te gebeuren. **Zie figuur 11.** Om uw lading te controleren dient u eerst het laadsnoer uit het stopcontact te halen en uw Travel Scooter aan te zetten.

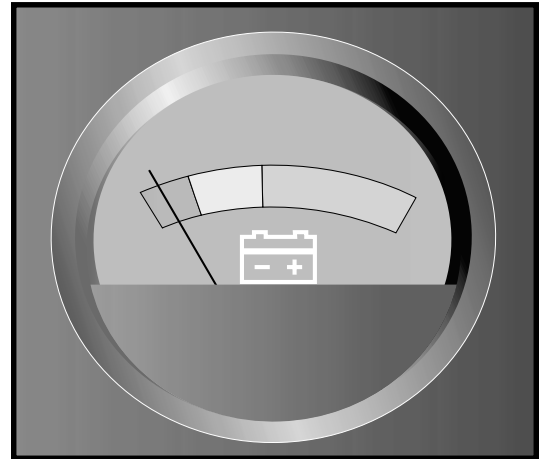

Figuur 11. Batterij Conditie Meter

HET LADEN VAN UW BATTERIJEN



VERBODEN! Gebruik nooit een verlengsnoer om uw batterijlader aan te sluiten. Sluit de batterijlader direct aan een standaard stopcontact in de muur.



VERBODEN! Het verwijderen van de aarde van uw stekker kan electrisch gevaar veroorzaken. Indien nodig, installeer een beproefde adapter aan het stopcontact zonder randaardeaansluiting.



VERBODEN! Sta niet toe dat kinderen zonder toezicht in de buurt van de Travel Scooter spelen als de accu's worden geladen. Pride raadt u aan, de accu's niet op te laden terwijl er iemand op de Travel Scooter zit.



VERPLICHT! Lees de instructies van de acculader in deze gebruiksaanwijzing en in de gebruiksaanwijzing die bij de lader hoort voordat u de accu's gaat laden.



WAARSCHUWING! Explosieve gassen kunnen vrijkomen tijdens het laadproces van de accu's. Houd de scootmobiel en de acculader ver verwijderd van ontstekingsbronnen zoals vlammen of vonken en zorg voor voldoende ventilatie tijdens het laden van de accu's.

WAARSCHUWING! U moet de accu's van uw Travel Scooter met behulp van de afzonderlijke meegeleverde acculader opladen. Gebruik geen acculader van het type dat voor automobielen gebruikt wordt.



WAARSCHUWING! Verzekert u er van, dat beide einden van de voedingskabel droog en schoon zijn, voordat u de kabel in de lader of in de wandcontactdoos steekt.

WAARSCHUWING! Probeer niet de accubehuizing te openen. Indien het er op lijkt dat de lader niet naar behoren werkt neemt u contact op met uw erkende Pride leverancier.

WAARSCHUWING! Indien de acculader is voorzien van koelopeningen dient u geen voorwerpen door deze openingen proberen te steken.




WAARSCHUWING! Indien uw losse acculader niet is getest en goedgekeurd voor gebruik buitenshuis, dient u deze niet bloot te stellen aan ongunstige of extreme weersomstandigheden. Als de acculader is blootgesteld aan ongunstige of extreme weersomstandigheden, dient u deze de gelegenheid te geven zich aan de nieuwe omgevingsomstandigheden aan te passen voordat u hem weer binnenshuis gebruikt. Neem de gebruiksaanwijzing van de acculader in acht voor verdere informatie.

IV. BATTERIJEN EN HET LADEN

Volg deze stappen om veilig uw batterijen te kunnen laden:

1. Plaats uw Travel Scooter dichtbij een standaard wandcontact. **Zie figuur 12.**
2. Verwijder de sleutel uit het contact.
3. Zorg er voor dat handmatige vrijloophendel in de rijpositie staat.
4. Verwijder de afdekking van het stopcontact voor de stroomdraad van de acculader en steek de 3-voudige connector aan het uiteinde van de draad in het stopcontact.
5. Steek de stekker van het laadapparaat in het contact op uw Travel Scooter, daarna de andere in het wandcontact. We raden u aan de accu's ten minste 8 tot 14 uren te laden.
6. Zodra de accu's geheel zijn opgeladen, koppelt u de stekker los van het wandcontact en daarna van de lader.
7. Breng de afdekking van het stopcontact voor de stroomdraad van de acculader weer aan.

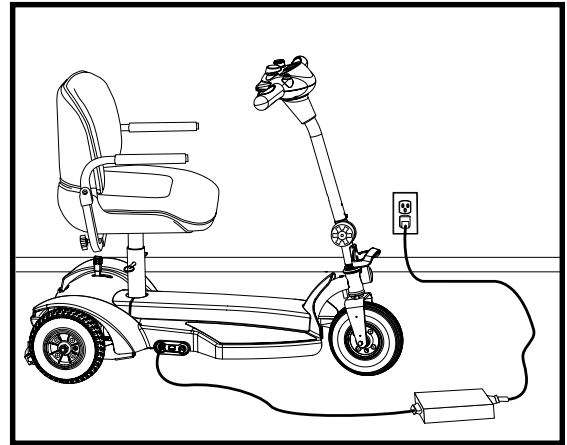

Figuur 12. Het laden van de accu's

LET OP: Er zit een laad-blokkeringsfunctie op uw Travel Scooter. Uw Travel Scooter zal niet rijden en de batterij conditiemeter zal niet werken terwijl de batterijen worden opgeladen.

OPMERKING: Voor verdere informatie betreffende het opladen van accu's, raadpleegt u de gebruikshandleiding bij uw acculader.

DE ACCU'S VAN UW TRAVEL SCOOTER VERVANGEN

Probeer uw accu's niet zelf te vervangen als u er niet zeker van bent dat u de onderstaande stappen uit kunt voeren. Neem in dat geval voor ondersteuning contact op met uw goedgekeurde Pride-leverancier.

Om zeker te zijn van volledig compatibiliteit en optimale prestaties, beveelt Pride het gebruik van originele (OE) vervangingsaccu's aan; deze zijn verkrijgbaar bij uw goedgekeurde Pride-leverancier.



VERPLICHT! De accupolen, aansluitklemmen en aanverwante accessoires bevatten lood en loodverbindingen. Draag bij het hanteren van accu's een chemische veiligheidsbril en geschikte handschoenen, en was uw handen na gebruik.



WAARSCHUWING! Gebruik altijd twee accu's van exact hetzelfde type, met identieke chemische samenstelling en capaciteit (Ah). Raadpleeg de specificatietabel die in deze handleiding en in de bij de acculader geleverde handleiding opgenomen is, voor aanbevolen type en capaciteit.

WAARSCHUWING! Neem contact met uw Pride-leverancier op indien u vragen heeft met betrekking tot de accu's in uw Travel Scooter.



WAARSCHUWING! Vervang de accu's niet als er iemand in de Travel Scooter zit.

WAARSCHUWING! De accu's in uw scootmobiel mogen alleen door een goedgekeurde Pride-leverancier of een bevoegde monteur onderhouden of vervangen worden.

IV. BATTERIJEN EN HET LADEN


Verwijderen van de accu's

1. Neem de sleutel uit het contactslot.
2. Verwijder de zitting door deze recht omhoog van de Travel Scooter af te trekken.
3. Verwijder de vergrendelpen en de bovenste stang van de zitting. Zie figuur 13.
4. Plaats de Travel Scooter zodanig dat u bij de onderzijde ervan kan komen en verwijder de vier (4) schroeven waarmee de kunststofkap aan het frame bevestigd is. Zie figuur 14.
5. Zet de Travel Scooter weer rechtop.
6. Verwijder de kap en leg deze opzij.
7. Ontkoppel de rode (+) pluskabel en de zwarte (-) minkabel van de accu door ze in een rechte lijn van de accupool te trekken. Zie figuur 15.
8. Maak de accuriemen los en verwijder de te vervangen accu of accu's.


Vervangen van de accu's

1. Plaats de nieuwe accu of accu's in de Travel Scooter (met de accupolen omhoog gericht) en maak de accuriemen vast.
2. Sluit de twee (2) accukabels opnieuw op de accupolen aan.
 - De rode kabel op de pluspool (+).
 - De zwarte kabel op de minpool (-).
3. Monteer de kap opnieuw op het frame van de Travel Scooter.
4. Breng de schroeven waarmee de kap aan het frame bevestigd is opnieuw aan en draai ze vast.
5. Monteer de bovenste stang van de zitting en de vergrendelpen opnieuw.
6. Breng de zitting weer aan.


AANMERKING: Als u een beschadigde batterij aantreft, zorg er dan voor dat u die meteen in een plastic tas verpakt en contact opneemt met uw bevoegde Pride leverancier voor verwijderingsinstructies. Uw bevoegde Pride leverancier heeft ook de nodige informatie over het recyclen van batterijen, wat natuurlijk onze voorkeur is.

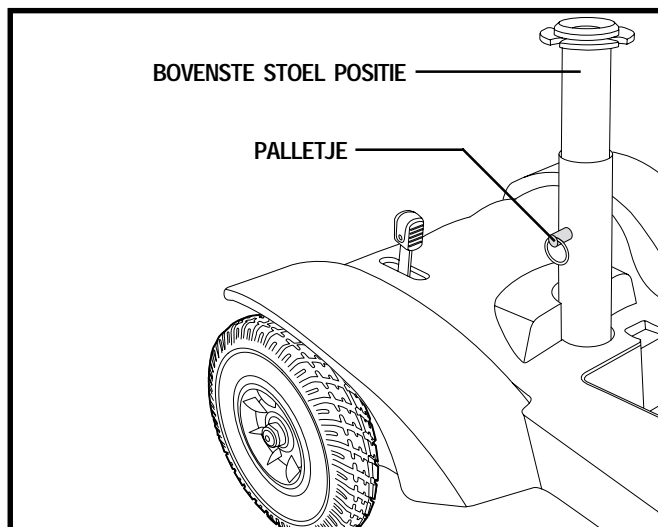

Figuur 13. Verwijderen van de stang van de zitting

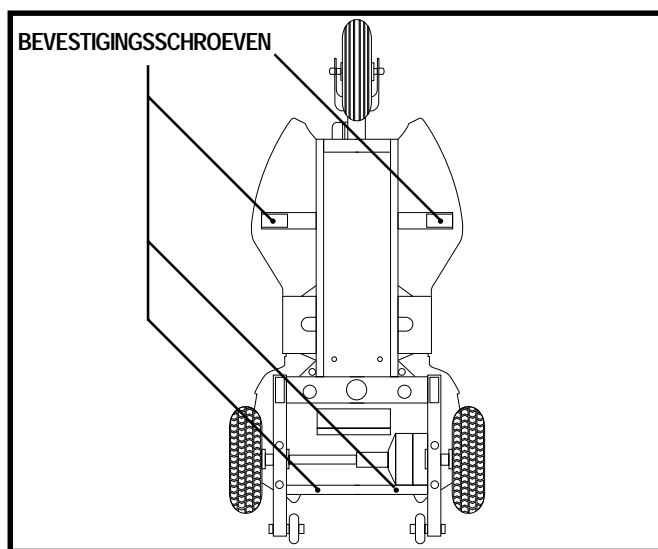

Figuur 14. Bevestigingsschroeven voor de kap

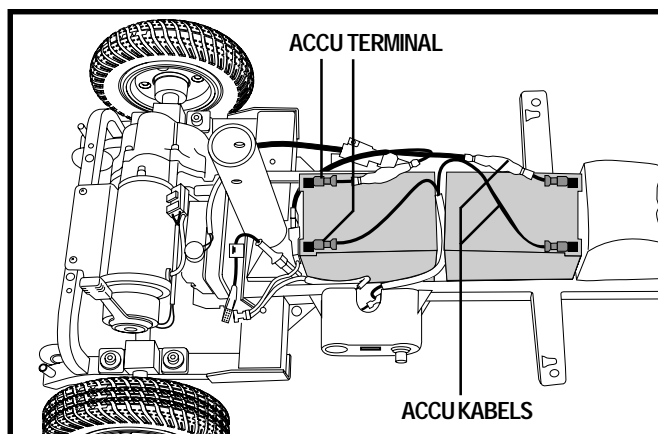

Figuur 15. Accupoolaansluitingen

IV. BATTERIJEN EN HET LADEN

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hoe werkt de lader?

Wanneer uw Travel Scooter's batterij voltage laag is, werkt de lader harder, en zendt meer elektrische stroom naar de batterijen om deze op niveau te brengen. Als het voltage een volle lading bereikt, zal de lader steeds minder en minder elektrische stroom naar de batterijen sturen. Als de batterijen volledig opgeladen zijn is de stroom die verstuurd wordt door de lader bijna nul ampère. Daarom, als de lader is aangesloten blijft er stroom op de batterijen maar worden ze niet overladen. Wij raden u niet aan om de batterijen van uw Travel Scooter meer dan 24 uur op te laden.

Hoe vaak moet ik de batterijen opladen?

Twee grote factoren moeten beschouwd worden wanneer u beslist hoe vaak u de batterijen moet opladen:

- Dagelijks gebruik van uw Travel Scooter.
- Sporadisch gebruik van uw Travel Scooter.

Met deze 2 factoren in gedachte kunt u vaststellen hoe vaak en hoe lang u uw batterijen moet opladen. We hebben de externe lader ontwikkeld zodat deze uw batterijen niet kan overladen. Echter, u kunt enige problemen tegenkomen als u uw batterijen niet vaak genoeg oplaadt en als u de batterijen niet regelmatig oplaadt. Hier volgen 5 regels die u een veilige en betrouwbare batterij lading verzorgt.

- Als u uw Travel Scooter dagelijks gebruikt, laadt dan de batterijen op als u de Travel Scooter niet meer gebruikt aan het einde van de dag. Uw Travel Scooter zal elke morgen weer volledig opgeladen zijn voor uw dagelijks gebruik. We raden u aan dat u uw batterijen oplaadt voor 8 – 14 uur na elk dagelijks gebruik.
- Als u uw Travel Scooter 1 keer per week of minder gebruikt, laadt dan de batterijen op voor 12 – 14 uur op zijn minst 1 keer per week.
- Houd uw batterijen volledig geladen.
- Vermijd te diepe ontlading van uw batterijen.
- Laad uw batterijen niet langer dan 24 uur aan een stuk.

Hoe kan ik de voor de Travel Scooter gunstigste afstand per lading bereiken?

Zelden zult u ideale rij-omstandigheden hebben, gladde, strakke of harde rij-oppervlakten, geen tegenwind of bochten. Vaak zult u hellingen, stoepen, bochten, wind, oneffen en losse ondergrond tegenkomen. Al deze rij-omstandigheden hebben invloed op de afstand of rijtijd per batterijlading. Nu volgen enkele suggesties om voor de Travel Scooter gunstigste afstand per batterijlading te kunnen bereiken.

- Laad altijd de batterijen de dag voor gebruik.
- Plan uw route om zoveel mogelijk hellingen, hobbelige of zachte ondergronden te voorkomen.
- Beperk uw bagagegewicht tot de noodzakelijke dingen.
- Probeer zoveel mogelijk een gelijke snelheid te houden als u op uw Travel Scooter rijdt.
- Vermijd veel start- en stopsituaties, rij regelmatig.

Wat voor type en maat batterijen moet ik gebruiken?

Uw Travel Scooter is voorzien van twee gesloten, onderhoudsvrije accu's. Gebruik geen natte accu's welk afneembare dopjes hebben.



WAARSCHUWING! Batterijen bevatten corrosieve chemicaliën. Gebruik alleen AGM of Gel-Cell batterijen om lekkage en explosieve condities te verminderen.

IV. BATTERIJEN EN HET LADEN

Waarom lijken mijn nieuwe accu's soms week?

Deep-cycle batterijen gebruiken een verschillende chemicalien technologie dan de batterijen van een auto of andere normaal voorkomende batterijen. Deep-cycle batterijen zijn specifiek ontwikkeld om kracht te verzorgen, te ontladen, en dan weer relatief snel op te laden.

Wij werken dicht met onze batterij fabrikant om batterijen te voorzien die het beste de specifieke behoeften van uw Travel Scooter ten goede komen. Verse batterijen komen dagelijks aan bij Pride en worden volledig opgeladen naar onze klanten opgestuurd. Gedurende het opsturen kunnen de batterijen extreme temperaturen tegen komen die hun initiale prestatie kunnen beïnvloeden. Hitte vermindert de laadkracht van een batterij, kou verlangzaamt de laadkracht beschikbaar en rekt de tijd uit die nodig is om de batterij opnieuw op te laden.



WAARSCHUWING! Laad de accu's van uw Travel Scooter niet op indien deze bevroren zijn. Koude of bevroren accu's moeten eerst gedurende enige dagen weer op kunnen warmen voordat ze opgeladen worden.

Het kan een paar dagen duren voor de temperatuur van uw Travel Scooter's batterijen stabilizeren en zich aanpassen aan hun nieuwe kamer of omgeving temperatuur. Meer belangrijk, het duurt een paar opladings cycles (gedeeltelijk ontladen gevolgd door volledig herladen) om de kritische chemische balance vast te stellen die nodig is om een diep cycle batterij piek prestatie en lang leven vast te stellen.

Volg de volgende stappen om ervoor te zorgen dat u uw nieuwe batterijen een goede start bezorgt.

1. Laad uw batterijen volledig op voordat u ze de eerste keer gebruikt. Deze lading brengt de batterijen tot 88% van de top prestatie.
2. Gebruik uw Travel Scooter in veilige en vertrouwde gebieden zodat u gewend raakt aan de hendeling van uw nieuwe Travel Scooter en belast de batterijen niet te zwaar de eerste keer. Neem geen "heuvels" en rij geen al te lange afstanden.
3. Laad uw batterijen volledig op. Deze lading brengt de batterijen tot over 90% van de top prestatie.
4. Gebruik uw Travel Scooter.
5. Laad uw batterijen wederom volledig.
6. Na vier of vijf ladingen brengt dit de batterijen tot 100% van de top prestatie en zullen ze per lading een langere tijd meegaan.

Hoe kan ik voor een maximale levensduur van de accu's zorgen?

Volledig geladen, goed behandelde accu's zorgen voor een betrouwbare capaciteit en gaan langer mee. Houd zo veel mogelijk de accu's volledig gevuld. Accu's die diep ontladen zijn, onregelmatig geladen of opgeslagen zijn zonder een volle lading, kunnen daardoor permanent beschadigd worden. Ze zijn dan onbetrouwbaar in gebruik.

Hoe te hendelen bij openbaar vervoer?

Als u met uw Travel Scooter gebruik wenst te maken van het openbaar vervoer, dient u vooraf contact op te nemen met de vervoerder om u zelf op de hoogte te stellen van hun specifieke voorwaarden.

V. GEBRUIK

VOORDAT U OP UW SCOOTER START

- Heeft u uw batterijen volledig opgeladen? Zie IV. “Batterijen en het laden.”
- Is de handmatige vrijloophendel in de rijpositie (naar achteren)? Laat de handmatige vrijloophendel nooit in de vrijloophendel positie (naar voren) staan tenzij u de Travel Scooter handmatig aan het voortbewegen bent.
- Is de stuurkolom ontgrendeld? **Zie figuur 7 en 7A.**

HET OPSTAPPEN OP UW TRAVEL SCOOTER



WAARSCHUWING! Probeer nooit in of uit uw Travel Scooter te stappen zonder dat u eerst de sleutel uit de schakelaar hebt gehaald. Dit voorkomt dat de Travel Scooter in beweging komt wanneer per ongeluk de gashendel wordt aangeraakt.

1. Overtuig u ervan dat de sleutel uit de schakelaar is gehaald.
2. Laat de hendel los en zorg dat de stoel weer vast in positie wordt vergrendeld. **Zie figuur 16.**
3. Ga ontspannen en veilig op de zitting zitten en draai de zitting naar voren.
4. Laat de hendel los en zorg dat de stoel weer vast in positie wordt vergrendeld.
5. Zet uw voeten veilig op de bodem van de Travel Scooter.

VOORZORG EN CONTROLE

- Zit u comfortabel op uw stoel?
- Staat de stoel op de juiste hoogte afgesteld?
- Is de stoel goed vastgezet?
- Is de verstelbare stuurkolom op een comfortabele stand gezet en goed vastgezet?
- Bevindt de vergrendelingsknop van de stuurstang zich in de ontgrendelde stand?
- Is de sleutel volledig in de schakelaar gestoken? Zie III. “Uw Scooter.”
- Werkt de claxon goed?
- Is uw voorgestelde route vrij van mensen, dieren en hindernissen?
- Heeft u uw route geplanned om adverse terrein mis tel open en zoveel hellingen als mogelijk?

UW TRAVEL SCOOTER TIJDENS GEBRUIK



WAARSCHUWING! De volgende punten kunnen sturen en stabiliteit anders beïnvloeden terwijl u uw Travel Scooter rijdt:

- Vast houden aan of vast maken van een riem om uw huisdier te lopen.
- Dragen van passagiers (inclusief huisdieren).
- Enige artikelen van de helmstok hangen.
- Trekken of worden geduwd door een ander gemotoriseerd voertuig.

Zulke praktijken kunnen verlies van controle en/of omkantelen veroorzaken, daarbij in persoonlijk letsel en/of schade aan uw Travel Scooter veroorzaken.

V. GEBRUIK

Houd allebei de handen aan het stuur en uw voeten te allen tijde op de vloerplaat terwijl u de scootmobiel beweegt. Deze rij positie geeft u de meeste controle over het voertuig.

- Stel de snelheidsschakelaar in op de gewenste stand.
- Druk uw duim tegen de gewenste gashendel.
- De elektromagnetische rem wordt automatisch ontkoppeld en de Travel Scooter accelereert soepel naar de snelheid die u van te voren hebt ingesteld.
- Trek aan de linker handgreep om linksaf te gaan.
- Trek aan de rechter handgreep om rechtsaf te gaan.
- Beweeg het stuur naar de middenpositie om rechtdoor te gaan.
- Laat de gashendel langzaam los om volledig tot stilstand te komen.
- De elektromechanische rem zal automatisch in werking treden als uw Travel Scooter tot stilstand komt.

AANMERKING: Uw Travel Scooter's achteruitrij snelheid is langerzamer dan dat van de vooruit snelheid die u van de voren in zet met de snelheid instelling knop.

HET AFSTAPPEN VAN UW TRAVEL SCOOTER


1. Breng uw Travel Scooter volledig tot stilstand.
2. Verwijder de sleutel uit de schakelaar.
3. Sta voorzichtig op uit de Travel Scooter en ga naast de Travel Scooter staan.

VI. DEMONTAGE EN MONTAGE

DEMONTAGE

Er zijn geen gereedschappen nodig om uw Travel Scooter te demonteren of te monteren. Demonteer of monteer uw Travel Scooter altijd op een vlak, droog oppervlak met genoeg ruimte om te werken. Houd u in gedachten dat gedemonteerde onderdelen van een Travel Scooter altijd meer plaats in beslag nemen dan gemonteerde.

U kunt de Travel Scooter in twee delen uit elkaar nemen: de zitting en het hoofdframe. **Zie figuur 16.**

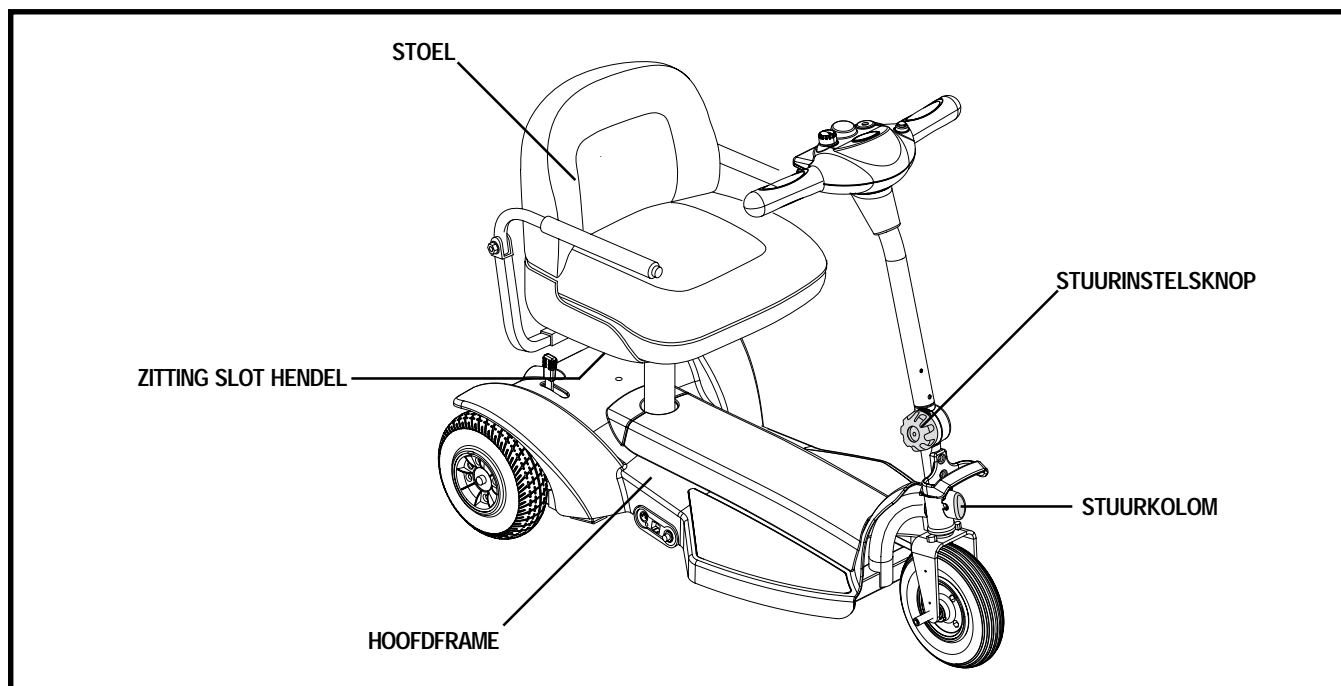

Figuur 16. Gedemonteerde Travel Scooter

De Travel Scooter uit elkaar nemen:

1. Draai de vergrendelingsknop van de stuurstang in de vergrendelde stand. Zie III. "Uw Scooter."
2. Verwijder de zitting door deze recht omhoog van de Travel Scooter af te trekken.
3. Draai de stuurstangafstelknop los en zet de stuurstang in zijn laagste stand; draai de stuurstangafstelknop vervolgens weer vast.

MONTAGE

De Travel Scooter in elkaar zetten:

1. Draai de stuurstangafstelknop los en zet de stuurstang in de gewenste stand; draai de stuurstangafstelknop vervolgens weer vast.
2. Draai de vergrendelingsknop van de stuurstang in de ONTGRENDELDE stand. **Zie figuur 7.**
3. Installeer de zitting.

VII. HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Ieder elektromechanisch deel heeft van tijd tot tijd onderhoud nodig. Hoewel de meeste van de problemen die mogelijkwijze voorkomen, kunnen meestal opgelost worden met enig nadenken en gevoel. Veel van deze problemen ontstaan wanneer de accu niet goed opgeladen zijn of namelijk de accu niet goed meer zijn en geen lading meer vast kunnen houden.

DIAGNOSTISCHE PIEPCODES

De diagnostische piepcodes van uw Travel Scooter bieden u de mogelijkheid om gemakkelijk en snel een eenvoudige foutdiagnose uit te voeren. U hoort een diagnostische piepcode indien een van de onderstaande omstandigheden optreedt.

OPMERKING: *U kunt uw Travel Scooter pas weer gebruiken als de oorzaak van de piepcode verholpen is en u de Travel Scooter uit- en vervolgens weer ingeschakeld heeft.*

PIEPCODE	CONDITIE	OPLOSSING
1,1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temperatuur >92°C of < -25°C. 2. Overmatige gewichtsbelasting van het voertuig. 3. Gebruik onder extreme omstandigheden. 4. De elektromagnetische rem laat niet los. 	Laat uw Travel Scooter afkoelen of verplaats hem naar een warmere plek. Indien nodig drukt u op de resetknop van de hoofdzekering.
1,2	<ol style="list-style-type: none"> 1. De ingangsdraad van de snelheidsregeling is open of kortgesloten. 2. De potentiometer van de snelheidsregeling is defect. 3. Het verkeerde type snelheidsregeling werd geselecteerd. 	Neem contact op met uw goedgekeurde Pride-leverancier.
1,4	<ol style="list-style-type: none"> 1. De accuspanning is lager dan 16 V. 2. Slecht contact bij de accu of regelaar. 	Laad de accu's op en/of controleer de aansluitingen.
1,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accuspanning > 32 V. 2. Voertuig in gebruik met acculader aangesloten. 3. Onderbroken accu-aansluiting. 	Ontkoppel de acculader. Controleer de accu-aansluitingen.
2,1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aansturing hoofdrelais defect in open stand. 	Neem contact op met uw goedgekeurde Pride-leverancier.
2,3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hoofdrelais vastgelast, of vastzittend open stand. 2. Fout aansturing hoofdrelais 3. Weerstand van de remspoel te hoog. 	Neem contact op met uw goedgekeurde Pride-inleverancier.

VII. HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PIEPCODE	CONDITIE	OPLOSSING
2,4	1. Aansturing hoofdrelais defect in gesloten stand.	Neem contact op met uw goedgekeurde Pride-leverancier.
3,1	1. Verkeerd afgestelde snelheidsregeling. 2. Defecte potentiometer van de snelheidsregeling, of defect mechanisme van de snelheidsregeling.	Neem contact op met uw goedgekeurde Pride-leverancier.
3,2	1. Aansturing elektromagnetische rem kortgesloten. 2. Spoel van de elektromagnetische rem is open.	Draai de sleutel in het contactslot naar de stand UIT, plaats de vrijloophendel vervolgens in de rijmodus en start de Travel Scooter opnieuw.
3,3	1. Lage accuspanning. 2. Contactslot (KSI) en snelheidsregeling hetzelfde moment ingeschakeld.	Laad de accu's op. Start de Travel Scooter opnieuw, zonder dat u de snelheidsregelhendel op aanraakt.
3,4	1. Aansturing elektromagnetische rem is open. 2. Spoel van de elektromagnetische rem kortgesloten.	Neem contact op met uw goedgekeurde Pride-leverancier.
3,5	1. Onjuiste volgorde van snelheidsregeling en contactslot (KSI), of van de snelheidsregeling- en blokkeeringen. 2. Verkeerd afgestelde potentiometer van de snelheidsregeling.	Draai de sleutel in het contactslot naar de stand UIT en vervolgens weer naar de stand AAN.
4,1	1. Kortsluiting in de motor of in de motorbedrading. 2. Defecte regelaar.	Neem contact op met uw goedgekeurde Pride-leverancier.
4,2	1. De motorspanning komt niet overeen met het verzoek faalveilige snelheidsregeling 2. Kortsluiting in de motor of in de motorbedrading. 3. Defecte regelaar.	Neem contact op met uw goedgekeurde Pride-leverancier.
4,3	1. EEPROM-defect of -fout.	Neem contact op met uw goedgekeurde Pride-leverancier.
4,4	1. EEPROM-defect of -fout. 2. Kortsluiting in de motor of in de motorbedrading.	Neem contact op met uw goedgekeurde Pride-leverancier.

VII. HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Wat te doen als de motor loopt maar mijn Travel Scooter komt niet in beweging?

- Waarschijnlijk staat uw Travel Scooter nog in de vrijloopstand.
- Als de handmatige vrijloophendel naar voren is geduwd, worden de remmen ontkoppeld, en gaat er geen stroom meer naar de motor/transaxle.
- Trek de handmatige vrijloophendel naar achteren om de normale werking van uw Travel Scooter weer te herstellen.

Wat te doen als de automatische zekering er steeds uit springt?

- Laad de batterijen van de Travel Scooter vaker op. Zie IV. "Batterijen en het laden".
- Zie IV. "Accu's en opladen" of "Appendix I: Specificaties", voor informatie betreffende het type accu in uw Travel Scooter.
- Als het probleem blijft bestaan, laat dan de beide batterijen van uw Travel Scooter testen door uw bevoegde Pride leverancier.

Wat te doen als de batterij-conditiemeter op de Travel Scooter steeds wegzakt en de motor stottert of weigert als ik de gashendel indruk?

- Laad uw batterijen volledig op. Zie IV. "Batterijen en het laden."
- Laat uw bevoegde Pride leverancier de lading van iedere batterij testen.

Wat te doen als al mijn Travel Scooter systemen lijken te zijn uitgevallen?

- Overtuig u ervan dat de sleutel helemaal in de sleutelschakelaar zit.
- Controleer of de batterijen volledig zijn opgeladen. Zie IV. "Batterijen en het laden".
- Druk op de resetknop voor de hoofdstroomonderbreking Zie III. "Uw Scooter."
- Controleer dat de uitschakeltimer niet geactiveerd is. Zie hieronder.
- Controleer dat alle accu-aansluitingen goed vast zitten, indien u niet lang geleden een accu verwisseld heeft.

ENERGIE VERBRUIK AFNEMING TIMER ONDERDEEL

Uw Travel Scooter heeft een energie besparend automatisch afnemend onderdeel bestemd om uw Travel Scooters batterij leven te besparen. Als u per ongeluk de sleutel in het sleutelgat laat zitten in de "aan" positie maar uw Travel Scooter niet gebruikt voor ongeveer 20 minuten, slaat de Travel Scooters controller automatisch af. Alhoewel de controller af is gesloten, en de Travel Scooter niet kan bewegen, zal de kracht nog steeds worden geleverd aan het Travel Scooters verlichting systeem.

Als het energie verbruik afnemend onderdeel in werking gaat, neem de volgende stappen om normale functie weer opnieuw te hervatten.

1. Verwijder de sleutel van het sleutelgat.
2. Steek de sleutel weer in en voer het energie verbruik van uw Travel Scooter op.

Als u problemen heeft met uw Travel Scooter, die u niet kunt oplossen, neem dan direct contact op met uw bevoegde Pride leverancier voor informatie, onderhoud en service.

VIII. VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw Travel Scooter heeft een minimum aan verzorging en onderhoud nodig. Als u denkt niet te kunnen voldoen aan het onderhoud dat hieronder is aangegeven, kunt u dit overleggen met uw bevoegde Pride leverancier. De volgende gebieden hebben een periodieke inspectie nodig of verzorging en/of onderhoud.

BANDEN CONDITIE EN LOOPVLAK

- Inspecteer uw banden regelmatig op onregelmatigheden of zwakke plekken.
- Gebruik een rubber conditioner op de zijvlakken van de banden van uw Travel Scooter om deze goed te houden.



WAARSCHUWING! Gebruik geen rubber conditioner op het loopvlak van de banden; de banden kunnen hierdoor gevaarlijk glad worden.

WIELVERVANGING

Als uw Travel Scooter is uitgerust met een massief bandinzetstuk, moet het gehele wiel vervangen worden. Neem contact met uw goedgekeurde Pride-leverancier op voor informatie over vervangingswielen voor uw Travel Scooter.



WAARSCHUWING! De wielen van uw Travel Scooter mogen alleen door een goedgekeurde Pride-leverancier of een bevoegde monteur onderhouden of vervangen worden.

VERVANGING VAN EEN NYLON MOER

Iedere nylon moer die bij periodieke onderhoudswerkzaamheden, montage of demontage wordt verwijderd aan de Travel Scooter dient te worden vervangen door een nieuw exemplaar. Nylon moeren kunnen niet worden hergebruikt, omdat er schade kan ontstaan aan de nylon schroefdraad, waardoor er niet meer sprake is van een goede bevestiging. Vervangende nylon moeren zijn verkrijgbaar bij een lokale ijzerwarenhandel of bij uw erkende Pride leverancier.

UITERLIJKE OPPERVLAKKEN

- Bumpers en andere oppervlakken kunnen ook onderhouden worden met rubber of vinyl conditioner.



WAARSCHUWING! Gebruik geen rubber of vinyl conditioner op een vinyl stoel of bodemplaat matten; deze kunnen hierdoor gevaarlijk glad worden.

- Neem een lichte coating of autowas voor de kappen om de glans van de kappen te behouden: deze zijn gevormd van duurzaam ABS plastic.

SCHOONMAKEN EN DESINFECTEREN

- Gebruik een vochtige doek en een mild, niet schurend reinigingsmiddel om de plastic en metalen delen van uw Travel Scooter schoon te maken. Vermijdt het gebruik van producten die krassen op het oppervlak van uw Travel Scooter zouden kunnen veroorzaken.
- Indien noodzakelijk kunt u het product reinigen met een goedgekeurd desinfectiemiddel. Zorg er voor gebruik voor, dat het middel veilig is voor gebruik op uw Travel Scooter.



WAARSCHUWING! Zorg dat u alle instructies voor het correcte gebruik van het desinfectie- en/of reinigingsmiddel opvolgt voordat u het bij uw voertuig toepast. Als u dit niet doet, kan dit huidirritatie of vroegtijdige slijtage aan de bekleding en/of lak van de scootmobiel veroorzaken.

VIII. VERZORGING EN ONDERHOUD

ACCU TERMINAAL CONNECTIES

- Maak zeker dat de terminal connecties vast blijven en niet zijn gecorrodeerd.
- De accu's moeten vlak in de accu schachten zitten.

SLAGER EN DE MOTOR/TRANSAXEL

U hoeft deze onderdelen niet te oliën, omdat deze alle zijn voorgeolied en afgesloten.

BEDIENINGSPANEEL, LADER EN ACHTER ELECTRONIE

- Houdt deze gedeelten vrij van vocht.
- Laat deze gedeelten gronding drogen als ze blootgesteld zijn geweest aan vocht, voor u uw Travel Scooter weer gebruikt.

BEDRADING HARNAS

- Regelmatig controleer alle bedrading connecties.
- Regelmatig controleer alle bedrading isolatie, inclusief de acculader, voor slijtage of schade.
- Laat iedere beschadigde aansluiting, verbinding of isolatie repareren of vervangen door een bevoegde Pride service monteur, voordat u uw scootmobiel gaat gebruiken..



VERBODEN! Alhoewel de Travel Scooter aan de vereiste testvoorschriften betreffende het binnendringen van vloeistoffen voldoet, dient u elektrische aansluitingen uit de buurt van vocht te houden, met inbegrip van rechtstreekse blootstelling aan water of lichaamsvloeistoffen en incontinentie. Inspecteer de elektrische onderdelen regelmatig op tekenen van corrosie en vervang ze indien nodig.

OPSLAG

Als u van plan bent uw Travel Scooter een bepaalde periode niet te gebruiken, is het raadzaam het volgende te doen:

- Laad de batterijen volledig op voordat u ze gaat opslaan.
- Sla uw Travel Scooter op in een warme droge omgeving.
- Vermijd de opslag van uw Travel Scooter in ruimten waar deze wordt blootgesteld aan grote temperatuursverschillen.



WAARSCHUWING! Bescherm batterijen altijd van vriezende temperaturen en laad een bevroren batterij nooit op. Dit beschadigt de batterij en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Accu's die geregeld diep ontladen worden, slechts zo nu en dan opgeladen worden, bij extreme temperatuur opgeslagen worden, of zonder volledig opgeladen te zijn opgeslagen worden, kunnen permanent beschadigd worden, met een onbetrouwbare werking en geringe levensduur tot gevolg. Wij raden u aan de accu's van de scootmobiel gedurende langere opslagperioden periodiek op te laden, om de juiste prestaties te behouden.

Het is ook een goed idee om het frame van uw scootmobiel gedurende langere opslagperioden door middel van eronder geplaatste planken van de grond te tillen. Dit neemt het gewicht van de banden af, waardoor de kans kleiner wordt dat er bij de contactoppervlakken met de vloer vlakke plekken op de banden ontstaan.

AFVOER VAN UW TRAVEL SCOOTER

U dient uw Travel Scooter volgens de plaatselijk geldende regels af te voeren. Neem contact op met lokale afvalverwerking of uw erkende Pride leverancier voor informatie over de juiste wijze van afvoer van de verpakkingen van uw Travel Scooter, het metalen frame, de plastic onderdelen, electronica en de accu's.

XI. GARANTIE

TWEE JARIGE BEPERKTE GARANTIE

Structureel geraamte, inclusief:

- Platform
- Vork
- Geraamte lassen

Drijf trein, inclusief:

- Differentieel
- Motor
- Remmen

EEN JARIGE BEPERKTE GARANTIE

Uw Pride Scooter is volledige gegarandeerd voor twaalf (12) maanden van de datum van koop tegen fouten komende uit vervaardigen of materialen. Deze garantie haalt niet weg van, maar is in toegift tot, uw legale rechten.

Op alle elektronische onderdelen, met inbegrip van regelaars en acculaders, geldt een garantie van één (1) jaar. Onderhoud aan de regelaar of de acculader moet door Pride uitgevoerd worden. Bij het openen of uit elkaar nemen van deze items vervalt de garantie ervan.

NIET ONDER DE GARANTIE VALLENDE

Deze garantie strekt zich niet uit naar die zaken die misschien vervangen moeten worden door normaal gebruik (banden, riemen, lampen, vinyl, plastic, motor borstels, zekeringen, en batterijen), of schade aan dit product door misbruik of ongeluk voor welk Pride of de agent van Pride niet voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Deze garantie omvat geen arbeid of oproep.

BATTERIJEN


Batterijen zijn voor zes (6) maanden gegarandeerd.

Langzame achteruitgang in dienst omdat de batterij in een ontladen staat is gelaten, is in koude condities gelaten voor een lange periode of versleten door zwaar gebruik is niet omvat.


SERVICE CONTROLE EN GARANTIE SERVICE

Garantie service kan door een bevoegde Pride Leverancier worden gedaan. Neem alstublieft contact op met uw bevoegde Pride Leverancier voor advies over de huidige kost voor een service bezoek.

APPENDIX I: SPECIFICATIES

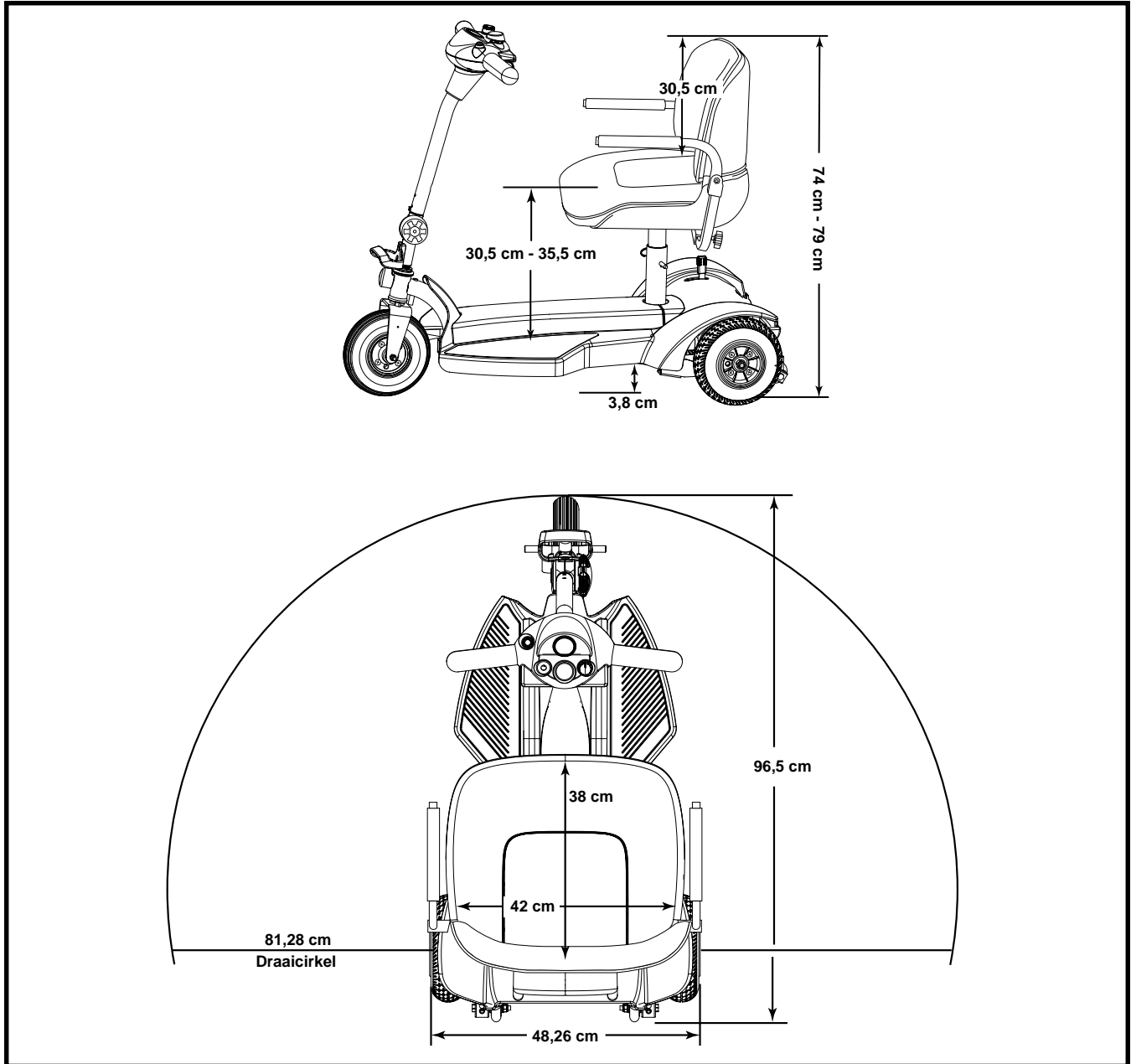

Figuur 17. Afmetingen Scooter

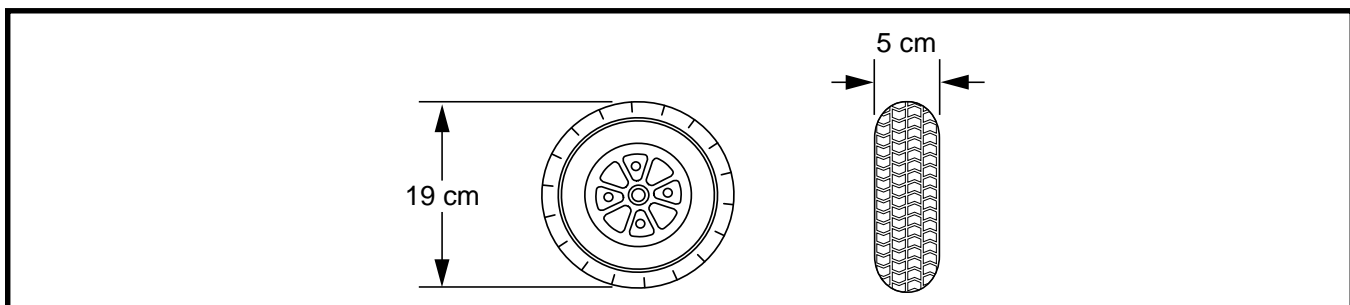

Figuur 18. Afmetingen banden (voorkant en achterkant)

APPENDIX I: SPECIFICATIES

Model nummer	SC31
Klasse	B
Maximale veilige hellingshoek	Zie figuur 1.
Maximale klimprestatie	Zie figuur 1.
Maximale klimprestatie bij obstakels	5 cm
Lengte ²	96,5 cm
Breedte ²	48,26 cm
Zwaarste component bij demontage	Hoofdframe: 23,36 kg
Draaicirkel ²	81,28 cm
Snelheid (max.) ¹	Tot 6,84 km/h
Afstand per laadbeurt ¹	Tot 16 km met 12 AH accu's
Bodemvrijheid ²	3,8 cm
Scooter le belasting	118 kg
Stoel	Type: Opvouwbaar, met vinyl bekleed vormgegeven schuimrubber Afmetingen: 42 cm breed 38 cm diep 30,5 cm hoog Materiaal: Zwart vinyl
Aandrijving	Achterwielaandrijving, gesloten transaxle, 24 Volt DC motor
Remsysteem	Elektromagnetische remmen
Banden	Massief Afmetingen: 5 cm x 19 cm (voor en achter)
Batterijen	Type: 2 x 12 volt, deep-cycle Capaciteit: 12 Ah
Accugewicht	3,8 kg elk
Lader	Externe lader

¹ Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (AH), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden.

² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ of -) 3%.

³ AGM- of gelcel-type vereist. Zie IV. "Accu's en opladen."

LET OP: alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.



Pride

Mobility Products Europe B.V.

***Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands***

www.pridemobility.com

*** I NFMANU3650 ***