

Jazzy 1103

Manuel de l' utilisateur



Enfin une Chaise Motorisée Sensationnelle

Pride

Mobility Products Europe B.V.

*Tijmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands*

www.pridemobility.com

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|----|
| I. INTRODUCTION | 4 |
| II. SÉCURITÉ PERSONNELLE | 6 |
| III. VOTRE JAZZY 1103 | 8 |
| IV. RÉGLAGES POUR LE CONFORT | 12 |
| V. DÉMONTAGE | 16 |
| VI. BATTERIES ET RECHARGE | 17 |
| VII. FONCTIONNEMENT | 22 |
| VIII. SOINS ET ENTRETIEN | 25 |
| IX. ACCESSOIRES EN OPTION | 30 |
| X. GARANTIE | 34 |

I . I N T R O D U C T I O N

Félicitations, vous venez de faire l'acquisition de votre Jazzy 1103 de Pride Mobility Products Europe B.V. Voilà un appareil aux lignes modernes fabriqué avec les composantes de la plus haute technologie disponible dans l'industrie. Nous sommes certains que votre Jazzy 1103 va améliorer votre confort de vie.

Nous sommes convaincus que la fiabilité de votre fauteuil roulant motorisé et les fiers services qu'il vous rendra feront de vous un propriétaire enchanté. La compagnie Pride se réserve le droit d'apporter des modifications et des mises à jour de ses produits antérieurs. Les modifications de ces produits peuvent causer des variations entre les illustrations contenues dans ce manuel et le produit que vous avez reçu.

Pride Mobility Products Europe B.V. n'est pas responsable pour les dommages ou blessures subis lors d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation dangereuse du fauteuil roulant motorisé. La responsabilité de Pride Mobility Products Europe B.V. se limite au remplacement des pièces seulement. Les pièces seront remplacées mais aucune responsabilité pour des dommages ou blessures ne pourra être considérée par Pride Mobility Products Europe B.V.

Pride Mobility Products Europe B.V. interdit l'utilisation du Jazzy 1103 lorsque l'on consomme de l'alcool. La consommation d'alcool peut réduire votre capacité à opérer de façon sécuritaire un véhicule motorisé. Vous pouvez aussi enfreindre des règlements locaux. Certains médicaments et handicaps physiques peuvent réduire votre habilité à conduire. Si vous avez un doute sur votre capacité à utiliser un fauteuil roulant motorisé s'il vous plaît consulter un médecin.

Votre Jazzy 1103

Couleur _____ Numéro de série _____

Date d'achat _____ Options _____

Votre détaillant autorisé Pride:

I. INTRODUCTION

Nous aimerions recevoir vos commentaires, questions et suggestions au sujet de ce manuel. Nous aimerions aussi vos commentaires au sujet de la fiabilité et de la sécurité de votre nouveau Jazzy. Avez-vous reçu le service auquel vous vous attendiez de votre détaillant Pride Mobility Products Europe B.V. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante:

Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijmuiden 28
1046 AL Amsterdam
Attention : Service technique

Si vous plaît assurez-vous de bien retourner votre carte d'enregistrement de garantie. Également nous aviser de tout changement d'adresse de façon à ce que nous puissions vous informer sur les améliorations sécuritaires, les nouveaux produits et les nouvelles options qui pourraient augmenter votre habilité à utiliser et apprécier pleinement votre Jazzy.



MISE EN GARDE! Avant de faire fonctionner votre Jazzy 1103 pour la première fois il est impératif que vous lisiez complètement le manuel d'instruction. De cette façon vous serez certain que votre Jazzy est dans sa condition de fonctionnement optimal. Si vous êtes incertain ou avez des questions, appelez votre détaillant Pride ou contactez nous.

AVIS

Système d'attache spécialisés

Pride Mobility Products et ses détaillants autorisés n'assument aucune responsabilité découlant de l'utilisation des systèmes d'attache spécialisés. Les systèmes d'attache spécialisés doivent être installés et entretenus par le fabricant ou son représentant autorisé.

II. SÉCURITÉ PERSONNELLE

Votre Jazzy 1103 est un appareil dernier cri d'aide à la mobilité. Cependant certaines conditions médicales demanderont de la pratique en présence d'un assistant pour opérer votre Jazzy. Voici quelques conseils qui vous aideront à vous familiariser avec votre Jazzy.

Lorsque vous êtes assis dans votre Jazzy

Votre Jazzy 1103 est un appareil motorisé. Lorsque vous êtes assis dans votre Jazzy et que vous pensez rester au même endroit pour un bout de temps, fermez l'alimentation du fauteuil. Ceci éliminera la possibilité d'un mouvement imprévu et économisera vos batteries.

Transfert

Faire des transferts vers un fauteuil roulant nécessite un bon sens de l'équilibre. Avant de faire un premier transfert assurez-vous qu'il y ait quelqu'un pour vous aider. Ceci réduira le risque d'accident et de blessures. Afin de réduire les risques au minimum voici quelques conseils :

1. Vérifiez que le fauteuil soit éteint.
2. Assurez-vous que le fauteuil ne soit pas au neutre (freewheel) (moteur désembrayé manuellement)
3. Relevez les appuis bras.
4. Relevez les repose - pieds de façon à ne pas à être gêné pendant le transfert.



MISE EN GARDE! Évitez de mettre tout votre poids sur le repose - pieds du fauteuil car celui-ci pourrait basculer et entraîner un accident.

Transport en véhicules motorisés

Même si votre Jazzy a été équipé d'une ceinture de sécurité celle-ci n'a pas été prévue pour l'utilisation à bord d'un véhicule motorisé. (automobile camion, etc.)

- Ne laissez jamais personne s'asseoir dans votre Jazzy dans un véhicule en mouvement.
- Toujours vous assurer que votre Jazzy est bien attaché lorsqu'il est transporté dans un véhicule.

Limite de poids

La capacité maximale de poids de votre Jazzy 1103 est de 100 kg. Excéder cette limite annulera votre garantie et pourrait entraîner des blessures.

Escalier et escalier roulant

Un fauteuil roulant n'est pas fait pour être utilisé dans un escalier ou un escalier roulant. Toujours utiliser un ascenseur. Si vous essayez de gravir un escalier vous pourriez vous blesser ou blesser d'autres personnes.

II. SÉCURITÉ PERSONNELLE



MISE EN GARDE! Le jazzy 1103 mini a été conçu pour l'utilisation à l'intérieur seulement. L'utilisation à l'extérieur doit être limitée aux endroits aménagés selon les normes de l'american disability association (ADA).

Chemin public et stationnement

Il est difficile pour les automobilistes de vous voir lorsque vous êtes assis dans votre Jazzy. Afin d'éviter des accidents n'assumez pas que l'on vous a vu. Attendez que la circulation soit terminée et avancez avec précaution.

NOTE: Certaines municipalités ont des règlements interdisant l'utilisation de fauteuils roulants sur la voie publique. Vérifiez auprès des autorités locales avant de vous aventurer sur la rue.

Marches et trottoirs

- N'essayez jamais de monter une marche ou un trottoir de plus de 2,5cm de haut.
- Toujours demander de l'aide.
- Ne jamais essayer de reculer dans des marches, descendre d'un trottoir du reculons. Cette manoeuvre est dangereuse car le Jazzy 1103 pourrait se renverser.

Terrain incliné et pente


Lorsque vous gravissez une pente ne faites pas de zigzag. Montez en ligne droite car ceci réduira au maximum le risque de renversement et de chute. Soyez toujours extrêmement prudent lorsque vous gravissez une pente.

- Ne jamais monter ou descendre une pente potentiellement dangereuse (gazonnée, glacée, enneigée etc.)
- Lorsque vous montez une pente, essayez de monter d'un seul trait. Si vous devez vous arrêter redémarrez doucement et accélérez lentement.

Lorsque vous descendez une pente, allez lentement. Si votre Jazzy accélère plus que vous ne le voulez arrêtez-vous complètement en relâchant la manette "joystick." Redémarrez doucement en poussant la manette "joystick" très légèrement.

Inclinaison maximum recommandée

Nous avons effectué des tests très poussés avec le Jazzy 1103 . Nos tests démontrent que l'inclinaison maximum que vous pouvez gravir est de 9%. L'inclinaison maximum de la majorité des rampes d'accès que l'on retrouve est 9%. Toute tentative de gravir une pente plus abrupte pourrait provoquer de l'instabilité et entraîner un accident grave.

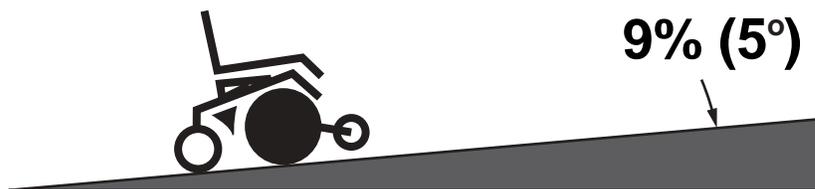

III. VOTRE JAZZY 1103

Votre Jazzy possède deux composantes principales : le siège et la base motorisée. Il existe plusieurs versions de siège qui peuvent accommoder la plupart des utilisateurs. Un siège typique comprend l'assise, les appuis bras, le dossier et la manette de contrôle (joystick). Le siège peut être muni des options suivantes : panier, support pour canne/béquilles, supports pour tasse ou un commutateur pour le siège électrique.

La base de votre fauteuil Jazzy en est le coeur. Elle contient les moteurs/freins, deux transmissions, deux roues d'entraînement, deux roues pivotantes, deux roues antibascule, deux batteries, une couette de fils électriques. En option vous trouverez un siège élévateur électrique et un contrôleur à distance.



Figure 1. Le Jazzy 1103

III. VOTRE JAZZY 1103

| Spécifications | |
|---------------------------------|--|
| Suspension | Traction: roues pneumatiques de 25 cm/centrées (pneu solide en option) Roulettes arrière: articulées de 20 cm bande de roulement solide Roulettes antibascule: roues de 15 cm montées à l'avant, bande de roulement solide |
| Vitesse maximum | 6 km/hr |
| Frein | "Frein intelligent" électronique régénératif, frein de stationnement à disque |
| Dégagement /sol | 7,5 cm |
| Rayon de virage | 43 cm |
| Dimension | Longueur hors tout 86 cm Largeur hors tout 58 cm |
| Options de siège | Siège à dossier court Siège à dossier (standard) Siège à haut dossier avec appui-tête Siège électrique disponible en option |
| Traction | 2 moteurs/roues centrées |
| Batteries | 2 batteries 12 volts type U-1 |
| Autonomie | Jusqu'à 40 km |
| Chargeur | Non intégré |
| Composantes électronique | Contrôleur Pilot 50 amp |
| Capacité de poids | 108 kg maximum |
| Poids du Jazzy | Base: 32 kg Siège: 13 kg Batteries: 11 kg chacune |
| Garantie | Un an sous conditions |

III. VOTRE JAZZY 1103

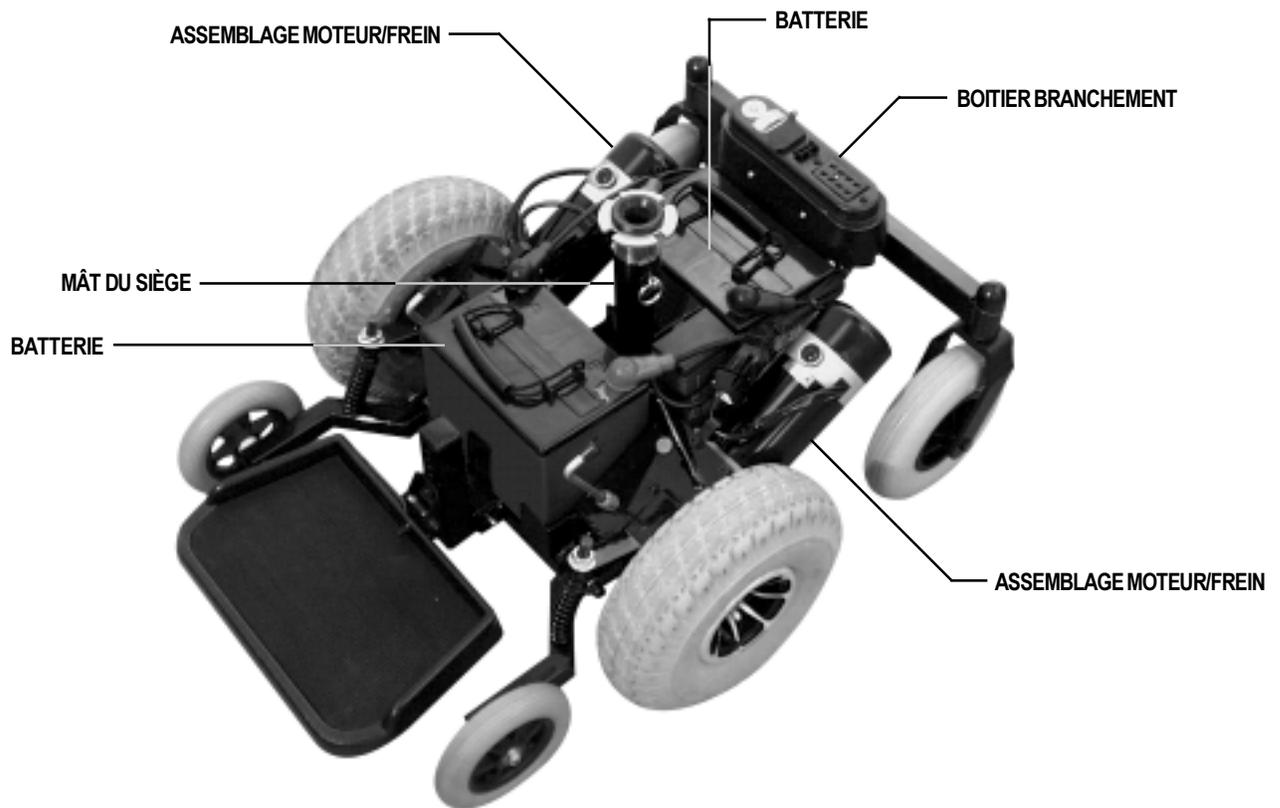


Figure 2. Base Motorisée du 1103 (sans le capot)

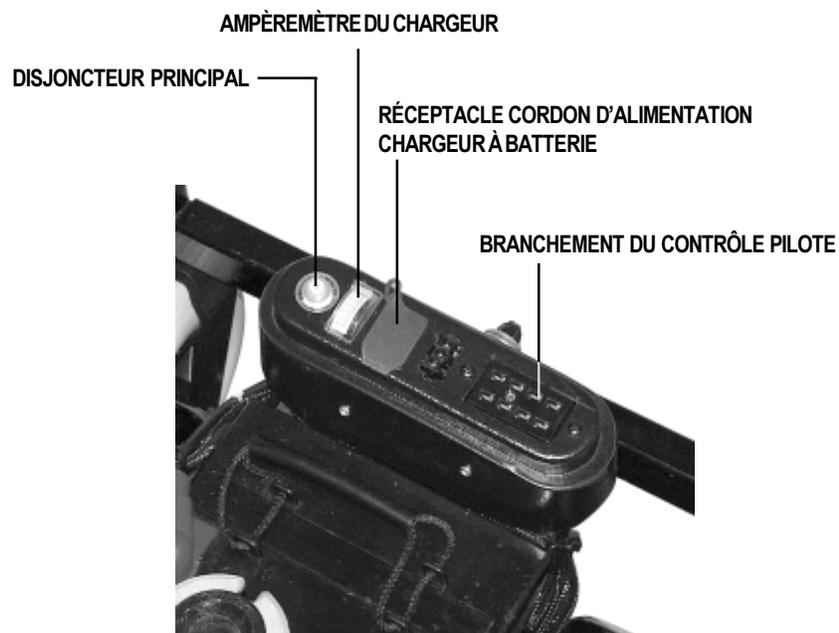


Figure 3. Boîtier Branchement Électronique (sans siège électrique)

III. VOTRE JAZZY 1103

Boîtier de Branchement Électronique:

Le boîtier de branchement est situé à l'arrière du Jazzy. Voir figure 3. Vous y trouverez le réceptacle du cordon d'alimentation du chargeur de batterie, l'ampèremètre du chargeur, le disjoncteur principal, les connecteurs de la manette de contrôle.

- **Ampèremètre:** Affiche le courant sous forme d'ampère. Voir figure 3. Pour plus d'informations consulter la section X de ce manuel.
- **Réceptacle Cordon d'alimentation:** Celui-ci alimente le chargeur à batteries. Le cordon est typiquement rangé dans la pochette du siège. Pour plus d'informations consulter la section VII de ce manuel.
- **Disjoncteur principal (Breaker):** Celui-ci est une composante de sécurité qui protège votre Jazzy.1103 Lorsque les batteries sont trop faibles ou que la demande est trop importante (exemple: surcharge de poids) le disjoncteur principal coupera l'alimentation aux moteurs et aux circuits électroniques afin de les protéger. Si celui-ci saute, arrêtez-vous quelques minutes, enfoncez le disjoncteur à nouveau et continuez votre route. Si le disjoncteur saute à nouveau, faites vérifier votre appareil chez votre concessionnaire Pride Mobility Products Europe B.V.
- **Connecteurs de couette du contrôleur:** Endroit où la manette de contrôle (joystick) est branché à la base motorisée.

Levier de désembrayage

Pour faciliter le déplacement votre Jazzy 1103 est équipé de 2 leviers de désembrayage (freewheel) .Vous pouvez désembrayer les moteurs pour pousser et manoeuvrer la chaise manuellement.

Comment embrayer et désembrayer votre Jazzy:

1. Trouvez les deux (2) leviers sur le dessus du capot de chaque côté.
2. Tournez les leviers vers l'extérieur pour embrayer les moteurs.
3. Tournez-les vers l'intérieur pour désembrayer à nouveau.

NOTE: Il est important de se rappeler que lorsque le Jazzy est désembrayé les freins sont relâchés.



MISE EN GARDE! Ne jamais utiliser le Jazzy 1103 alors que les moteurs sont désembrayés. Faites attention de ne pas laisser le Jazzy désembrayé (freewheel) lorsqu'il est sur une surface inclinée car il risque de rouler tout seul et provoquer un accident.

IV. REGLAGES POUR LE CONFORT

Après avoir utilisé votre Jazzy pendant quelque temps, vous aurez probablement envie de régler votre siège. Les réglages consistent à élever le siège, changer l'angle du siège et régler l'angle des appuis-bras. Si votre Jazzy a été adapté par votre détaillant s'il vous plaît consulter un professionnel avant de procéder à des changements de position de siège. Certains changements peuvent amener un déplacement du centre de gravité et réduire la performance de votre fauteuil.

Hauteur du siège et angle du siège

Vous pouvez changer la hauteur du siège dans l'une des trois réglages.

Pour changer la hauteur du siège:

1. Retirez le siège. Voir "Démontage".
2. Retirer le capot.
3. Utiliser deux clés 9/16 pour desserrer et retirez le boulon à tête hexagonale. Voir figure 4.
4. Placez le mât de siège à la hauteur désirée.
5. Aligner les trous du mât avec ceux de la base du mât.
6. Réinstallez le boulon hexagonale et resserrez-le.

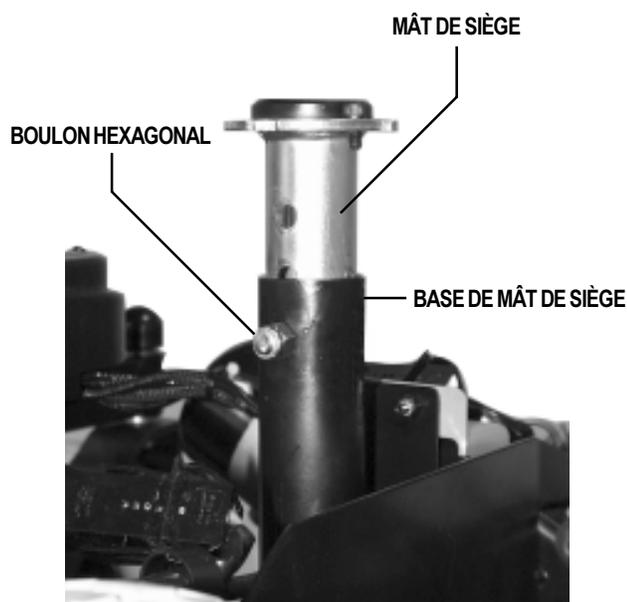


Figure 4. Réglage largeur des bras

DESSERREZ LES BOUTONS POUR DÉPLACER
LES APPUIS-BRAS



Figure 5. Réglage largeur appuis-bras

Pour régler les appuis-bras en largeur:

1. Desserrez les deux boutons à l'arrière du dossier. Voir figure 5.
2. Faites glisser les appuis-bras à la position désirée.
3. Resserrez les deux boutons.

IV. REGLAGES POUR LE CONFORT

Réglage de l'angle des appuis-bras

Vous pouvez régler l'angle des appuis-bras selon votre convenance. Voir figure 6.

Pour changer l'angle des appuis - bras :

1. Soulevez l'appui-bras perpendiculairement au plancher.
2. À l'aide d'une clé hexagonale 7/16" desserrez l'écrou.
3. Tournez le boulon dans le sens des aiguilles pour soulever le devant du bras ou tournez dans le sens contraire pour abaisser le bras.
4. Resserrez l'écrou 7/16" pour verrouiller en place.

Extension pour la manette (joystick)

Faites glisser la manette facilement pour l'éloigner, ou la rapprocher du bras.

Pour régler la longueur de l'extension

1. Utilisez la clé hexagonale 3/16" pour desserrer les vis.
2. Faites glisser la manette dans la position désirée. Voir figure 7.
3. Resserrez la vis dans le sens des aiguilles.

RÉGLAGE DE LA POSITION DE LA MANETTE (JOYSTICK)

La manette peut être montée à droite ou à gauche.

Pour régler la position de la manette:

1. Débranchez le harnais de contrôle à sa connexion. Voir figure 3. À la page 9.
2. Coupez le collier de plastique qui retient le câble du contrôleur au bras. Voir figure 8.
3. Utilisez une clé hexagonale de 3/16" pour desserrer la vis. Voir figure 7.
4. Démontez la manette en la faisant glisser.
5. Desserrez la vis dans l'autre bras.
6. Montez la manette sur le bras.
7. Resserrez la vis.
8. Attachez le câble du contrôleur à l'appui-bras avec un collier plastique. Voir figure 8.



Figure 6



Figure 7



Figure 8

IV. REGLAGES POUR LE CONFORT

Hauteur du repose-pied

Le repose-pied peut facilement être réglé à six niveaux différents. Voir figure 9.

Pour élever ou abaisser le repose-pied:

1. Enlevez le siège et le capot. Voir “Démontage.”
2. Enlevez les deux boulons 7/16” qui retiennent le repose-pied.
3. Élevez ou abaissez le repose-pied à la hauteur désirée.
4. Réinstallez les boulons dans le repose-pied et serrez.

Réglage de l’angle du repose-pied

Vous pouvez régler l’angle du repose-pied avec une clé hexagonale 3/16”. Voir figure 9.

Pour régler l’angle du repose-pied:

1. Tournez la vis dans le sens des aiguilles pour élever le repose-pied.
2. Tournez la vis dans l’autre sens pour abaisser le repose-pied.


Longueur du repose-pied

Votre Jazzy 1103 possède une goupille qui bloque le repose-pied en place. Pride fournit également un boulon et un écrou à insertion de nylon pour un verrouillage plus permanent.

Pour régler la longueur du repose-pied:

1. Retirez la goupille du support du repose-pied.
2. Glissez la tige du repose-pied à la longueur désirée.
3. Remettez la goupille en place ou utilisez le boulon et l’écrou (serrez à l’aide de deux clés 7/16”).

RÉGLAGE HAUTEUR DU REPOSE-PIED

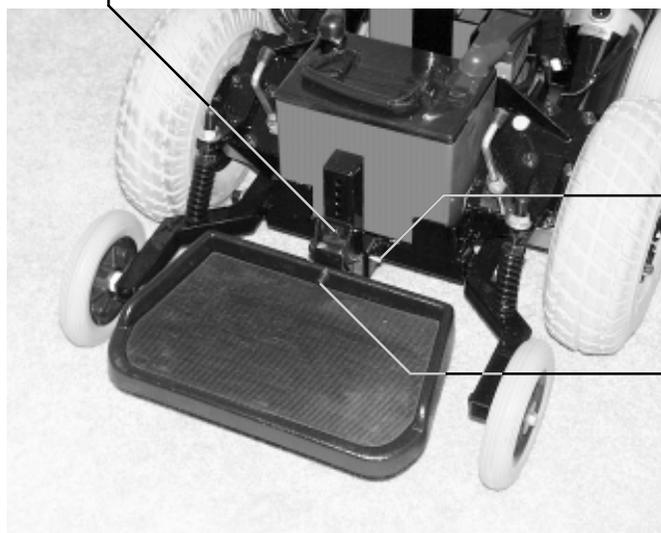

RÉGLAGE LONGUEUR DU REPOSE-PIED (GOUPILLE MONTRÉE ICI)

RÉGLAGE ANGLE DU REPOSE-PIED

Figure 9. Réglage du repose-pied

IV. REGLAGES POUR LE CONFORT



MISE EN GARDE! Nous recommandons de consulter votre détaillant de Jazzy avant de changer le réglage des roulettes antibascule ou d'enlever les roulettes car ceci rendra votre fauteuil instable et dangereux!

Le concept de roues de traction sous le centre du Jazzy 1103 assure une performance et un degré de sécurité supérieure. Les roulettes antibascule sont partie intégrante du concept et assurent la stabilité lors de la décélération. Elles ont été réglées à l'usine à 1,25 cm au dessus du niveau du sol. Ceci est le réglage idéal pour la plupart des utilisateurs de Jazzy 1103. Cependant, il se peut que certaines situations demandent un réglage différent. Par exemple. Si vous utiliser votre Jazzy sur un plancher recouvert de tapis à long poil, vous remarquerez que les roues ont tendance à traîner au sol. Dans ce cas, vous aurez besoin de relever le réglage de roulettes antibascule. Si vous roulez surtout sur une surface plane comme de la tuile de linoléum ou de céramique, vous trouverez peut-être que le Jazzy bascule un peu trop vers l'avant pour votre confort. (Ceci est vrai surtout pour les personnes de petits poids.) Dans ce cas, il pourra être nécessaire d'abaisser le niveau de réglage des roulettes antibascule.

Suggestion: Avant de changer le réglage des roulettes nous recommandons de consulter votre détaillant Pride. Il se peut que de simplement déplacer votre siège de 2,5cm vers l'arrière soit suffisant pour régler le problème.

Outils nécessaires: clé de 1/2 pouce, clé hexagonale de 5/32", clé de 3/4 de pouce .

Pour régler les roulettes antibascule:

1. Retirez le siège, le capot et les batteries. (Voir Démontage et Batteries et recharge)
2. Identifiez l'écrou de verrouillage et la vis de réglage sur les roulettes antibascule. Voir figure 10.
3. Utilisez la clé 1/2 pouce pour desserrer l'écrou.
4. Utiliser la clé hexagonale pour tourner la vis de réglage. Tournez dans le sens des aiguilles horaires pour élever les roulettes. Tournez dans le sens opposé pour abaisser les roulettes.
5. Resserrez l'écrou de verrouillage.

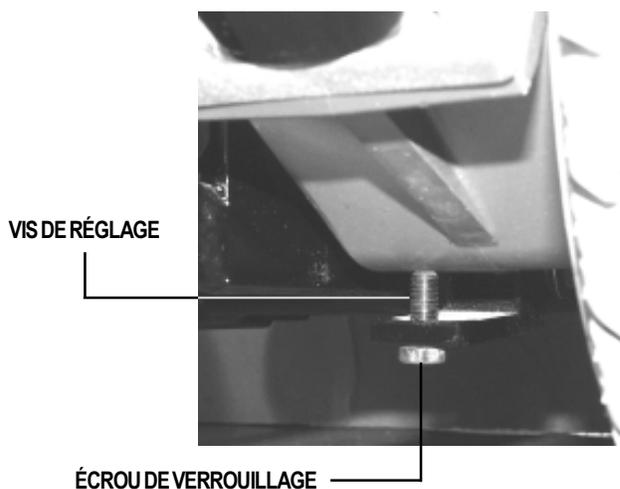


Figure 10. Réglage des roulettes antibascule

V. DÉMONTAGE

Reglage de la suspension

La suspension peut être réglée de façon à obtenir l'équilibre idéal entre la performance et la stabilité. Vous pouvez régler la suspension plus ferme ou moins ferme.

Pour régler la fermeté de la suspension:

1. Enlevez le siège et le capot. (Voir "Démontage.")
2. Identifiez l'écrou de réglage du ressort de suspension. Voir figure 11.
3. Utilisez une clé $\frac{3}{4}$ de pouce pour desserrer l'écrou de verrouillage.
4. Pour augmenter la tension et rendre la suspension plus ferme, tournez l'écrou de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour réduire la tension, tournez l'écrou de réglage dans le sens contraire.
5. Resserrez l'écrou de verrouillage sur le dessus.

Enlèvement du siège

Le siège peut-être démonté pour faciliter le transport de votre Jazzy.

Pour enlever le siège:

1. Éteignez votre appareil.
2. Vérifiez que votre Jazzy n'est pas désembrayé.
3. Débranchez la couette de fils derrière le siège.
4. Soulevez le siège et retirez le mât de son socle sur la base.

Enlèvement du capot

Le capot est fabriqué d'une seule pièce de plastique moulé qui recouvre l'ossature de la base. Vous devez retirer le capot si vous devez retirer les batteries ou vérifier les branchements.

Pour enlever le capot:

1. Éteignez votre appareil.
2. Vérifiez que votre Jazzy n'est pas désembrayé.
3. Débranchez la couette de fils derrière le siège.
4. Soulevez le siège et retirez le mât de son socle sur la base.
5. Soulevez le capot à la verticale. Il devrait s'enlever facilement.
6. Embrayez les moteurs à nouveau.

Enlèvement des batteries

Pour enlever les batteries, Voir "Remplacement des batteries."

VI. BATTERIES ET RECHARGE

Votre Jazzy utilise deux batteries 12 volt à cycles profonds. Ces batteries sont scellées et sans entretien. Considérant le fait qu'elles sont scellées, il n'est pas nécessaire de vérifier le niveau de liquide. Elles ont été conçues pour être déchargées longtemps et profondément. Même si ces batteries ont la même apparence qu'une batterie d'automobile, elles ne peuvent être substituées. Une batterie d'automobile n'a pas été conçue pour être déchargée longtemps et profondément et peut s'avérer dangereuse.

La Recharge Des Batteries

La recharge des batteries est un des aspects les plus important pour votre Jazzy 1103. Le chargeur à batteries à été conçu pour donner la meilleure performance possible à vos batteries en rechargeant vos batteries rapidement et efficacement. Le système est composé du chargeur, l'ampèremètre et d'un fusible. Le chargeur est situé entre les batteries. Voir figure 17. L'ampèremètre se situe sur le boîtier à l'arrière du Jazzy. Le fusible est en dessous du boîtier électronique. L'ampèremètre vous indique le taux de charge nécessaire pour compléter la recharge . Il indique aussi si le chargeur fonctionne correctement. Le chargeur et l'ampèremètre ne fonctionne que si le Jazzy est branché au mur.



MISE EN GARDE! Ne rechargez les batteries qu'avec le chargeur du Jazzy 1103. N'utilisez pas un chargeur de batterie de type automobile.



Figure 17. Chargeur

VI. BATTERIES ET RECHARGE

Pour charger votre Jazzy avec le chargeur:

1. Positionnez le derrière de votre Jazzy près d'une prise de courant ordinaire.
2. Assurez-vous que le Jazzy est éteint et qu'il soit embrayé.
3. Branchez le cordon du chargeur dans la prise située à l'avant de la manette de contrôle. (Voir figure 3 à la page 9.)
4. Allongez le cordon et branchez-le au mur. Un dispositif empêche le Jazzy de fonctionner lorsque celui-ci est branché.
5. Nous recommandons de recharger les batteries pendant 8 à 14 heures. Alors que les batteries se chargent, Les diodes vertes, jaunes et rouges vont s'allumer. Lorsque les rouges sont allumées, les batteries sont rechargées.
6. Lorsque les batteries du Jazzy 1103 sont complètement chargées, débranchez le cordon d'alimentation de la prise dans le mur et de la manette de contrôle

NOTE: Votre chargeur pourrait être différent de celui illustré dans ce manuel. Veuillez vous référer au manuel d'instruction qui l'accompagne si cela est le cas.

Voici les conseils pour bien roder vos batteries

1. Rechargez vos batteries complètement avant d'utiliser votre appareil la première fois. Ceci amènera les batteries à environ 90 % de leur capacité.
2. Maintenant utilisez votre appareil autour de la maison de façon à vous habituer au contrôle et d'en apprécier le confort. Ceci vous permettra de roder vos batteries.
3. Rechargez vos batteries à nouveau pour environ 8 à 14 heures. Utilisez votre Jazzy à nouveau de façon à continuer le rodage. Vos batteries dépassent maintenant 90 % de leur capacité.
4. Après quatre ou cinq cycles de décharge et recharge vos batteries atteindront 100% de leur capacité et vous dureront plusieurs années grâce aux soins que vous leur avez apporté.

Comment fonctionne le chargeur?

Le chargeur utilise le courant ordinaire de 120VAC (courant alternatif) et le convertit en courant 28 VDC (courant direct). Les batteries de votre Jazzy 1103 fournissent du courant direct pour faire fonctionner votre fauteuil électrique. Lorsque les batteries sont faibles le chargeur travaille plus fort pour les recharger. Voilà pourquoi l'aiguille de l'ampèremètre monte à 3.5 amp ou plus. Lorsque les batteries approchent la pleine charge, le chargeur travaillera moins fort. Ceci explique pourquoi l'aiguille de l'ampèremètre descend vers le zéro lorsque les batteries sont complètement chargées. Le chargeur ne peut pas trop charger vos batteries. Le chargeur ne peut recharger des batteries qui sont complètement à plat. Si jamais vos batteries sont complètement à plat, contactez votre détaillant autorisé.

VI. BATTERIES ET RECHARGE

Puis-je utiliser un autre chargeur?

Pour conserver vos batteries dans le meilleur état possible, nous recommandons de recharger les batteries ensemble avec le chargeur fourni avec le Jazzy 1103. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un autre chargeur (ex: chargeur de batterie automobile).

À quelle fréquence dois-je recharger mes batteries?

Plusieurs facteurs influencent la nécessité de recharger des batteries. Utilisez -vous votre VMP à chaque jour ou occasionnellement? D'autres facteurs comme le poids du conducteur, les bagages, un terrain rugueux ou lisse, plat ou incliné doivent être pris en considération. Connaissant ces variables vous devrez vous poser deux questions? Dois-je recharger mes batteries souvent et combien de temps? Le chargeur de batteries intégré a été conçu de façon à ne jamais surcharger les batteries. Le problème le plus fréquent est celui de ne pas charger ses batteries régulièrement. Si vous suivez les conseils décrits ci-dessous vous aurez des batteries fiables et durables.

Utilisation Quotidienne

Rechargez vos batteries dès que vous avez fini d'utiliser votre appareil. La chargeur a un contrôle automatique et ne surchargera pas vos batteries. Votre Jazzy1103 sera prêt chaque matin pour une journée de service. Nous recommandons de charger vos batteries pendant 8 à 14 heures après une journée d'utilisation.

Utilisation Occasionnelle (une fois par semaine ou moins)

Nous recommandons de recharger vos batteries au moins une fois par semaine au moins pour une période de 12 à 14 h.

NOTE: Gardez vos batteries bien chargées et évitez de les décharger complètement. Ne jamais recharger des batteries plus de 24 h.

Comment obtenir la distance maximum avec mes batteries?

Les conditions de conduite ne sont jamais idéales, le vent, les courbes, les pentes, le terrain rugueux ou accidenté. Le plus souvent nous faisons face à des pentes, des craques dans les trottoirs, du gravier, des courbes etc. ces facteurs affecteront la distance que vous pourrez parcourir avec votre Jazzy. Voici quelques suggestions et trucs pour obtenir le maximum de distance.

- Ayez toujours des batteries pleinement rechargées avant de partir.
- Maintenez **30-35 lb** de pression dans les pneus de traction.
- Planifiez votre sortie de façon à éviter les côtes et les surfaces difficiles.
- Emportez le minimum de bagages.

VI. BATTERIES ET RECHARGE

Quel type de batteries devrais-je utiliser?

Nous recommandons le type cycle profond (deep cycle) sans entretien et scellé à l'usine éliminant ainsi les risques de fuite. Les batteries de type scellé à l'acide ou au gel sont des batteries deep cycle de performances similaires.

Quels sont les spécifications de mes batteries?

Voici les spécifications pour commander des batteries:

Type : Cycle profond "Deep Cycle" (scellé à l'acide ou au gel)
Format : U-1
Voltage : 12 Volts chacune
Ampère: 30-35 A.H. (ampère/heure)

Pourquoi mes nouvelles batteries me semblent-elles faibles?

Les batteries de type "deep cycle" sont très différentes des batteries utilisées dans une automobile. La chimie utilisée dans ces batteries permet de donner beaucoup de puissance et de pouvoir être rechargé rapidement grâce aux soins et à l'attention qu'elles ont reçus.

Nous collaborons avec notre fournisseur de batteries de façon à obtenir les batteries les mieux adaptées à votre Jazzy 1103. Nous recevons régulièrement des batteries fraîches chargées à bloc. Pendant le transport les batteries sont exposées à des conditions de température parfois extrêmes qui peuvent affecter la performance de nouvelles batteries. La chaleur et le froid extrême réduisent la charge et prolongent le temps nécessaire pour recharger une batterie.

Une batterie peut prendre jusqu'à quelques jours pour se stabiliser à la température ambiante. De plus, il est important de noter qu'il faudra quelques cycles d'utilisation et recharge avant que vos batteries atteignent l'équilibre chimique essentiel à leurs performances et longévité.

Il est rentable de prendre le temps pour bien roder les batteries.

NOTE: les batteries donneront une performance proportionnelle aux soins quelles ont reçues.

Comment puis-je prolonger la vie de mes batteries?

Une batterie pleinement chargée est une batterie en forme. Une batterie de type "deep cycle," fournira une bonne performance pendant plusieurs années à condition qu'elle soit gardée chargée le plus souvent possible. Prenez note qu'une batterie qui n'est pas rechargée assez souvent, qu'on laisse se décharger complètement ou qu'on entrepose déchargée peut-être endommagée et sera peu fiable et non performante.

VI. BATTERIES ET RECHARGE

Comment dois-je entreposer mon Jazzy 1103 et mes batteries?

Si vous utilisez votre Jazzy occasionnellement nous recommandons de garder vos batteries en forme en les rechargeant au moins une fois par semaine.

Si vous pensez ne pas utiliser votre Jazzy pour une période prolongée, rechargez les batteries complètement avant de l'entreposer. Débranchez les batteries et entreposez-les dans un endroit à l'abri du gel et au sec. Évitez les températures extrêmes et surtout n'essayez pas de recharger une batterie congelée. Une batterie congelée devrait être laissée à la température de la pièce plusieurs jours avant d'être rechargée.

Si votre Jazzy est équipé des pneus solides (pleins), il est recommandé de mettre des blocs de bois sous la structure du Jazzy pour éviter de déformer les pneus.

Au sujet des transports publics?

Les batteries scellées et les batteries au gel ont été conçues pour l'utilisation dans les fauteuils roulants et les Jazzy. Elles rencontrent les spécifications exigées par les transporteurs aériens (FAA), autobus et trains. Elles ne peuvent couler car elles sont étanches. Nous suggérons de communiquer avec la compagnie de transport pour vérifier leurs exigences.

Si vous désirez envoyer votre Jazzy par transporteur nous recommandons de d'emballer le Jazzy 1103 dans son emballage d'origine et d'emballer les batteries dans des boîtes séparées. Ne pas faire transporter des batteries autres que celles de type **scellé**.

VII. FONCTIONNEMENT

Le Jazzy 1103 fonctionne grâce à la manette de contrôle. Le contrôle transmet au fauteuil les commandes de vitesse et de direction.

Pour faire fonctionner votre Jazzy:

1. Allumez votre appareil en pressant sur le commutateur (on/off button). La jauge de niveau des batteries s'allumera et vous donnera une lecture.
2. Poussez le mât de la manette dans la direction désirée. Plus vous poussez loin la manette de son point mort, plus grande vitesse vous obtiendrez.

Contrôle type « à distance » (joystick)

Le contrôle transmet au fauteuil les commandes de vitesse et de direction. Le contrôle a un système de vérification interne qui détecte tous problèmes potentiels et ce 100 fois par seconde. Si un problème est détecté le fauteuil pourrait s'arrêter dépendant de la gravité du problème. (Voir code de problèmes). Le contrôle a été conçu pour maximiser la sécurité du conducteur dans des conditions normales d'utilisation. Cependant il ne peut détecter des conditions environnementales et d'utilisation dépassant les limites de cet appareil. Il est très important que vous respectiez les consignes décrites dans ce manuel. Le contrôle « à distance » est composé d'une boîte de contrôle et d'une manette(joystick). Typiquement la manette est installée à l'extrémité de l'appui - bras droit ou gauche. Voir Figure 18. La boîte de contrôle à distance est située en dessous de l'avant du fauteuil. La manette envoie les signaux à la boîte de contrôle par un câble attaché à l'arrière de la manette. Ce câble est connecté au contrôleur en passant au travers du compartiment utilitaire.



Figure 18. Manette de Contrôle "Pilot"

Contrôle type « pilote » (joystick)

Le contrôle de type pilote est maintenant disponible sur le Jazzy 1103. Le contrôle « pilote » est situé directement sous la manette au bout de l'appui - bras. Voir figure 18. Le contrôle « pilote » est branché aux moteurs, aux batteries et au chargeur par un câble relié au boîtier. Voir figure 3.

Caractéristiques de la manette (joystick)

La manette de contrôle a les mêmes fonctions dans toutes les configurations. La manette contrôle la vitesse et la direction de la chaise. Lorsque vous bougez la manette de la position neutre « centrée » le frein électromagnétique est relâché automatiquement pour permettre à la chaise de rouler. Plus vous poussez la manette loin du centre plus vite le fauteuil se déplacera. Lorsque vous relâchez la manette (joystick) et la laissez retourner à la position centrée, le fauteuil s'arrêtera et le frein automatique s'engagera. Ceci vous permet de ralentir et de vous arrêter complètement. Si votre Jazzy se met à rouler de façon inattendue, relâchez immédiatement la manette (joystick) et le fauteuil devrait s'arrêter immédiatement à moins que la manette ne soit défectueuse.

NOTE: En cas d'urgence utilisez le commutateur (ON/OFF) pour stopper votre Jazzy.

VI. FONCTIONNEMENT

Réglage de la vitesse et de la sensibilité

Chaque contrôle est équipé d'un bouton de réglage de sensibilité et vitesse qui vous permet de sélectionner le réglage le mieux adapté à votre environnement et à vos besoins. Voir figure 13 à la page 20. Le bouton de réglage de sensibilité permet de régler la sensibilité à laquelle répond la manette de votre Jazzy 1103. Lorsque ce bouton est tourné complètement dans le sens contraire des aiguilles la sensibilité est au minimum et le Jazzy accélérera et ralentira doucement. Lorsque le bouton est tourné complètement dans le sens des aiguilles d'une montre le fauteuil répondra aux commandes vivement.

Conseils: Nous recommandons de régler le bouton de vitesse et sensibilité au « minimum dans le sens contraire aux aiguilles » pour vos premières sorties jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec votre Jazzy 1103.

Jauge d'état des batteries

La jauge est située immédiatement devant la manette de contrôle (joystick). Celle-ci vous permet de superviser l'état de vos batteries. Il vous indique la quantité approximative d'énergie restante dans les batteries. Voir figure 18.

- Les barres jaunes, rouges et vertes indiquent que les batteries sont pleines.
- Rouges et jaunes indiquent que vous devriez charger vos batteries si possible.
- Rouges seulement indiquent que les batteries sont faibles et qu'elles doivent être chargées le plus tôt possible au risque de tomber en panne.

NOTE: Lorsque les batteries approchent du moment où elles doivent être chargées, la première lumière rouge se mettra à clignoter pour vous le rappeler.

Code des problèmes

En plus de vous indiquer la quantité d'énergie restante dans vos batteries l'indicateur vous informe sur les problèmes possibles avec votre Jazzy 1103. Si l'indicateur clignote rapidement, c'est l'indice qu'il y a un problème potentiel.

L'indicateur possède des barres lumineuses individuelles. Dépendant du nombre de barres qui clignotent, elles indiqueront un problème en particulier. Par exemple: si la première barre clignote en rouge ceci indique que les batteries doivent être rechargées. Le tableau qui suit indique les erreurs possibles et la séquence des lumières associées (Clignotement rapide).

VII. FONCTIONNEMENT

| Barres | Diagnostic | Solutions |
|-----------|-------------------------|---|
| 10 vertes | voltage élevé | vérifiez batteries |
| 9 vertes | solénoïde frein | vérifiez câble frein/moteur |
| 8 vertes | défaut contrôle | contactez votre détaillant autorisé |
| 7 jaunes | défaut manette | contactez votre détaillant autorisé |
| 6 jaunes | désactivation | débranchez chargeur/vérifiez branchement |
| 5 jaunes | câblage moteur droit | vérifiez câblage moteur droit |
| 4 jaunes | moteur droit débranché | vérifiez câblage moteur droit |
| 3 rouges | câblage moteur gauche | vérifiez câblage moteur gauche |
| 2 rouges | moteur gauche débranché | vérifiez câblage moteur gauche |
| 1 rouges | bas voltage batteries | vérifiez batteries/câblage recharge batteries |

Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, voyez votre détaillant autorisé de Jazzy.

Protection thermique

Votre Jazzy possède une protection thermique de ses circuits. La température des moteurs est surveillée constamment. Si la température s'élève à un niveau trop élevé (plus de 50 °C), les circuits réduiront automatiquement le voltage d'alimentation des moteurs de façon à réduire leur température et les protéger. Pour chaque degré au dessus de 50 °C, le voltage sera réduit de 5 volts. Ceci réduira la vitesse et permettra aux composantes de refroidir. Le voltage normal sera rétabli automatiquement dès que la température aura baissé, le Jazzy 1103 reprendra alors sa vitesse normale.

VIII. SOINS ET ENTRETIEN

Votre Jazzy est une chaise motorisée des plus sophistiquées. Comme tout véhicule motorisé il a besoin d'un entretien régulier. Vous pouvez faire votre entretien de routine. D'autres entretiens plus importants doivent être fait chez votre détaillant autorisé. L'entretien préventif est très important. Si vous faites votre entretien de routine de façon régulière, votre Jazzy vous donnera plusieurs années de service sans problème. Si vous avez des questions au sujet de l'entretien de votre Jazzy contactez votre détaillant.



MISE EN GARDE! Votre Jazzy 1103, comme tout équipement électronique, est susceptible d'être endommager par les éléments. Évitez les endroits humides. Le contact direct avec de l'eau ou de l'humidité excessive pourrait provoquer des problèmes de fonctionnement électrique ou mécanique. L'eau peut endommager le système électrique ou provoquer de la corrosion dans la structure.

Au cas ou votre Jazzy 1103 viendrait en contact avec de l'eau:

1. Asséchez autant que possible votre Jazzy avec une serviette sèche.
2. Laissez votre Jazzy reposer pendant 24 heures dans un endroit chaud et sec de façon à laisser évaporer l'eau qui aurait pu s'infiltrer.
3. Faites tous les tests et vérifications avant d'utiliser votre Jazzy à nouveau.
4. Si vous détectez quelque problème que ce soit, contacter votre détaillant autorisé de Jazzy.

Température

Quelques composantes de votre Jazzy sont sensibles aux températures extrêmes.

- Dans les températures très froides les batteries peuvent geler. La température à laquelle une batterie gèlera peut varier grandement en fonction de plusieurs facteurs tels que : charge de la batterie, utilisation, type de batterie (i.e. batterie au gel ou liquide)
- Dans les températures très chaudes (plus de 50 °C) votre Jazzy ralentira automatiquement afin de prévenir les dommages aux composantes électriques ou aux moteurs (Voir protection thermique).

Conseils généraux

- Évitez de cogner ou de frapper le contrôleur et plus spécialement la manette (joystick).
- Évitez d'exposer votre Jazzy à des conditions extrêmes de froid, de chaleur, d'humidité.
- Nettoyer la manette si elle a été contaminée avec de la nourriture ou des liquides.
- Vérifiez toutes les connexions sur le boîtier électronique, vérifiez les connexions du chargeur également.
- Lorsque la jauge de charge est complètement allumée, les batteries sont pleines et le système est O.K.
- Lorsqu'une barre rouge clignote, les batteries doivent être rechargées mais le système est O.K.
- Lorsque l'indicateur clignote rapidement, le système a détecté un problème dans les circuits de votre Jazzy, (Voir code de problème).
- Assurez-vous que vos pneus sont bien gonflés **30-35 psi**.
- Protégez vos pneus avec un conditionneur. Vérifiez l'usure.
- Le capot a été traité à l'usine avec un scellant transparent. Vous pouvez le protéger avec une couche de cire pour protéger le lustre.

VIII. SOINS ET ENTRETIEN

- Vérifiez toutes les connexions : corrosion sur les batteries et contact bien serré. Les batteries doivent être bien à plat avec leurs poteaux se faisant face. (Voir diagramme sur l'autocollant collé sur la structure).
- Tous les roulements à billes des essieux sont lubrifiés à l'usine et ne nécessitent aucun autre entretien.

Routine Journalière

- Le contrôleur hors tension (off), vérifiez la manette (joystick). Assurez-vous qu'elle n'est pas croche, qu'elle revient bien au centre lorsque vous la relâchez. Vérifiez la housse de caoutchouc pour des dommages. Vérifiez visuellement seulement, ne tentez pas de la réparer. Contactez votre détaillant autorisé si il y a un problème.
- Inspectez visuellement le câble du contrôleur. Si vous découvrez des coupures ou des fils exposés, contactez votre détaillant de Jazzy 1103.

Vérification Hebdomadaire

- Débranchez et inspectez les câbles du contrôleur et du chargeur pour la corrosion. Contactez votre détaillant autorisé au besoin.
- Assurez-vous que les pièces de votre Jazzy soient bien fixées. Attention de ne pas trop serrer les vis.
- Vérifiez la pression des pneus: **30-35 psi**. Si vous constatez que vos pneus fuient, faites remplacer le tube chez votre détaillant Pride.
- Vérifiez les freins: ce test doit être exécuté sur une surface à niveau et avec au moins trois pieds de dégagement autour de votre Jazzy.

Vérification des freins:

1. Mettez l'appareil sous tension et baissez le bouton de contrôle de vitesse au minimum.
2. Attendez une seconde, vérifiez l'état des batteries. Assurez-vous que la jauge reste allumée.
3. Poussez doucement la manette vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez le frein électrique faire «click».

NOTE: votre Jazzy peut bouger pendant ce test. Relâchez immédiatement la manette. Vous devez entendre chacun des freins électriques fonctionner quelques secondes après avoir bougé la manette de contrôle.

4. Répétez ce test trois fois, en poussant la manette vers l'avant, l'arrière, à gauche et à droite.

Vérification Mensuelle

- Vérifiez que les roulettes antibascule ne frottent pas le sol lorsque vous utiliser votre Jazzy. Faites le réglage au besoin. Voir Réglage des roulettes antibascule.
- Vérifiez l'usure des roulettes. Remplacez - les au besoin.
- Vérifiez l'usure des pneus de traction. Voyez votre détaillant autorisé pour les faire remplacer.
- Vérifiez l'usure des roulettes arrière. Remplacez - les au besoin.
- Vérifiez les fourches des roulettes arrière pour dommages ou usures qui indiquent si les roulements à billes doivent être réglés ou remplacés. Voyez votre détaillant Pride pour les réparations.
- Gardez votre Jazzy propre et libre de contaminants tels que: aliments, cheveux, boisson etc.

VIII. SOINS ET ENTRETIEN

VÉRIFICATION ANNUELLE

Apportez votre Jazzy chez votre détaillant autorisé pour une vérification annuelle. Vous serez certain que votre Jazzy fonctionnera correctement et préviendrez des complications futures.

ENTREPOSAGE

Votre Jazzy doit être entreposé dans un endroit sec à température contrôlée. Pour l'entreposage, débranchez les batteries. Voir "Batteries et Recharge." Si vous négligez de débrancher les batteries, vous risquez de causer de la corrosion et des dommages au système électrique.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Ne jamais arroser votre Jazzy avec un boyau d'arrosage.
- Le capot de votre Jazzy possède une couche de scellant de protection. Simplement l'essuyer avec un linge humide. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer le siège de vinyle car il pourrait devenir glissant et craquer prématurément. Utiliser de l'eau savonneuse et essuyer le complètement.

PNEUS ET CHAMBRES A AIR

Votre Jazzy 1103 est équipé de pneumatiques. Vous devez vérifier la pression au moins une fois par semaine. Ceci allongera la vie utile de vos pneus et assurera un meilleur fonctionnement de votre Jazzy. Si vous faites une crevaison, le tube peut être réparé. Les pneus et tubes de remplacement sont disponibles chez votre détaillant de Jazzy 1103.



MISE EN GARDE! Mise en garde Dégonflez le pneu complètement avant d'entreprendre la réparation.

Suivez les instructions suivantes pour réparer rapidement:

1. Dégonflez complètement le pneu.
2. Avec une clé 9/16, enlevez le boulon au centre de la roue.
3. Enlevez la roue de l'essieu, utiliser l'outil spécialisé (extracteur).
4. Avec une clé 1/2 à rochet et une clé ouverte, démontez la jante en 2 pièces.
5. Enlevez le vieux pneu et le tube et remplacez - les au besoin.
6. Remplacez les 2 pièces de la jante ensemble, et réinstallez les boulons.
7. Remontez la roue sur l'essieu et resserrez le boulon à 16 lb de torsion.
8. Gonflez le pneu à **30-35psi**.

VIII. SOINS ET ENTRETIEN

REPLACEMENT DES BATTERIES

Pour remplacer les batteries:

1. Éteignez votre appareil.
2. Débranchez le câble du contrôleur. (Voir “Démontage.”)
3. Enlevez le siège.
4. Enlevez le capot.
5. Embrayez les moteurs Voir “Lever de désembrayage.”
6. Retirez les écrous papillons des bornes et débranchez les batteries.
7. Installez vos nouvelles batteries dans votre Jazzy 1103 avec les bornes des batteries se faisant face du côté intérieur.
8. Branchez le fil marqué (+) à la borne positive (rouge) la plus proche.
9. Connectez le fil marqué d’un (-) à la borne négative (noir) la plus proche.
10. Connectez un fil de circuit du fusible à la borne positive libre et l’autre fil du circuit du fusible à la borne négative restante.
11. Disposez des vieilles batteries selon les normes et lois locales.

Brosses du moteur

Les moteurs électriques du Jazzy utilisent des brosses au carbone. Ces brosses s’useront après un certain temps. Les brosses font le contact à l’intérieur du moteur et permettent le fonctionnement. Elles ont été conçues pour fournir plusieurs milliers d’heures d’opération. Cependant si elles deviennent encrassées par des dépôts de carbone, les moteurs fonctionneront mal ou ne fonctionneront pas du tout. Nous recommandons de faire inspecter vos brosses tous les 6 mois chez votre détaillant autorisé. Si l’inspection dévoile des brosses usées, elles doivent être remplacées sous peine d’endommager le moteur.

Négliger de remplacer les brosses pourrait annuler votre garantie.

Pour inspecter ou nettoyer les brosses:

1. Enlevez le siège et le capot. Voir “Démontage.”
2. Enlevez les couvercles des brosses. Voir figure 19.
3. Enlevez les brosses.
4. Vérifiez l’usure. Voir figure 20.
5. Remplacez les brosses au besoin. Contactez votre détaillant autorisé pour obtenir des brosses de remplacement.

VIII. SOINS ET ENTRETIEN

Solutions aux problèmes

Si votre Jazzy refuse de s'allumer :

- Vérifiez les connexions de vos batteries.
- Vérifiez les connexions du contrôleur.
- Vérifiez le fusible du coupe circuit et remettez-le en marche au besoin.

Si toutes les conditions semblent normales, vous pouvez vérifier l'état de vos batteries à l'aide d'un vérificateur de charge à l'effort. Ce vérificateur peut être acheté chez un détaillant de pièces et outils automobile. Si une batterie est défectueuse, nous recommandons de changer les deux batteries. Si votre Jazzy refuse toujours de s'allumer, contactez votre détaillant Pride.

Problèmes et symptômes nécessitant un appel chez votre détaillant

Les symptômes suivants peuvent indiquer un problème sérieux avec votre Jazzy. Si ces symptômes surviennent, révisez la section discutant des problèmes dans ce manuel.

Au besoin contactez votre détaillant Pride. Avant de placer l'appel, assurez-vous d'avoir sous la main le numéro de modèle, le numéro de série, la nature du problème et le code du problème si possible.

- Moteur bruyant
- Fil et câble usé
- Connecteur fendu ou brisé
- Pneus usés inégalement
- Fonctionnement erratique
- Mauvais alignement des roues
- Direction brisée ou tordue
- Votre Jazzy refuse de s'allumer
- Votre Jazzy s'allume mais refuse de démarrer

COUVERCLE DE BROSE



Figure 19. Couvertures de brosses

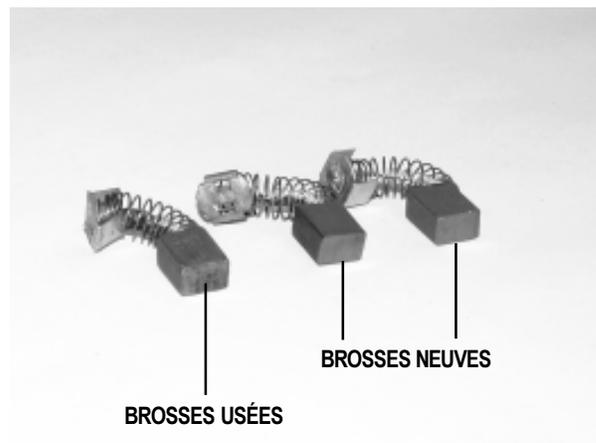


Figure 20. Brosses moteur

IX. ACCESSOIRES EN OPTION

Siège électrique optionnel

Votre Jazzy peut être équipé du siège électrique élévateur. Cette option améliore les performances de votre Jazzy de plusieurs manières.

- En élevant le siège vous pouvez atteindre des choses dans un rayon plus grand et vous augmenter votre autonomie dans plusieurs situations différentes.
- Changer la hauteur de votre siège électriquement et faire des transferts sur n'importe quel siège que vous désirez.
- En élevant le siège lorsque vous parlez à quelqu'un, la communication est améliorée.

En contrepartie des avantages apportés par le siège électrique, vous devrez tenir compte de ses limitations.

Suivez à la lettre les consignes de sécurité pour éviter les accidents fâcheux.

MISE EN GARDE (SIÈGE ÉLECTRIQUE)

- Bien lire le manuel au complet avant d'utiliser votre Jazzy.
- L'option siège électrique a été conçue pour être utilisée sur une surface plane et non sur une pente.
- Toujours utiliser votre ceinture de sécurité lorsque vous utilisez le siège électrique. Également, votre siège électrique coupe de moitié la vitesse de déplacement lorsque le siège est élevé de plus de 3 cm. Vérifiez le fonctionnement de cette option avant d'utiliser votre Jazzy.
- Ne jamais élever le siège électrique si votre Jazzy n'est pas sur une surface horizontale. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner le renversement de votre fauteuil et causer des blessures.
- Mais jamais soulever le siège de sa position la plus basse lorsque vous roulez sur une surface rugueuse ou inégale. Le non respect de cette consigne peut entraîner leur renversement de votre fauteuil et causer des blessures.
- Si votre siège est partiellement élevé, utilisez votre Jazzy sur une surface plane et horizontale seulement.
- Ne jamais élever le siège lorsque le Jazzy est désembrayé. (Freewheel)

Le commutateur est situé près de la manette de contrôle (joystick).

IX. ACCESSOIRES EN OPTION

Siège électrique optionnel (suite)

Placez d'abord votre Jazzy sur une surface plane et horizontale. Pesez vers l'avant sur le commutateur pour élever le siège. Voir figure 16. Lorsque vous relâchez le bouton il revient automatiquement à son centre et le siège cesse de monter. Pour continuer à monter, pesez sur le bouton à nouveau. Lorsque le siège atteindra son élévation maximum il s'arrêtera de lui-même, cependant vous entendrez le bruit de son moteur qui continue de tourner. C'est normal puisque le siège fonctionne à l'aide d'une transmission automatique. SVP ne laissez pas le moteur tourner inutilement lorsque le siège atteint son élévation maximum ou minimum, ceci allongera la vie utile du moteur. Pesez vers l'arrière pour faire descendre le siège, de nouveau, le siège s'arrêtera si vous relâchez le bouton. Lorsque vous descendez le siège, assurez - vous qu'il a atteint son point le plus bas.

Pour faire pivoter le siège, trouvez la manette sous le coté gauche (coté opposé à la manette "joystick"). Pesez sur la manette pour faire pivoter le siège de 90 degrés.

COMMUTATEUR DU SIÈGE ÉLECTRIQUE



Figure 21. Commutateur du siège électrique



Figure 22. Boîtier Commutateur siège électrique

IX. ACCESSOIRES EN OPTION

Voici les accessoires disponibles pour votre Jazzy chez votre détaillant Pride.

Ceinture de positionnement (standard)

La ceinture est conçue pour supporter et aider le conducteur à ne pas glisser sur le siège.

- La ceinture de positionnement n'est pas une ceinture de sécurité (de retenue).
- Assurez-vous que la ceinture ne cause pas d'inconfort.

NOTE: Cette ceinture n'a pas été conçue pour être utilisée comme dans une voiture automobile. Le Jazzy Ceinture de positionnement ne doit pas être utilisé comme un siège dans un véhicule automobile en mouvement. Toute personne se déplaçant dans une automobile doit être assise dans un siège approuvé par le fabricant.

Support réservoir d'oxygène

Le support amovible est monté sur le dossier d'oxygène du siège via l'attache prévue à cette fin.

Support pour canne et béquilles

Le support amovible peut être monté sur le dossier du siège via l'attache prévue à cet effet.

Support pour marchette

Le support amovible peut être monté sur le dossier du siège via l'attache prévue à cet effet. Il peut supporter une marchette de grandeur standard.



Figure 23. Ceinture de positionnement

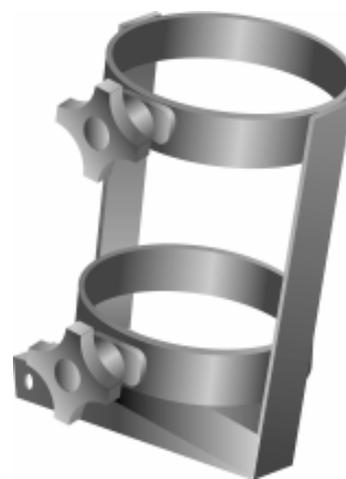


Figure 24. Support réservoir



Figure 25. Support Canne et Béquilles



Figure 26. Support de Marchette

IX. ACCESSOIRES EN OPTION

Panier arrière

Le panier arrière peut être monté sur le dossier du siège. Il a une poignée de transport et peut être enlevé facilement de votre Jazzy.

Support rétractable pour manette (Joystick)

Cet accessoire vous permet de rétracter le support de la manette vers le côté du fauteuil sans avoir à le débrancher.

Repose-pieds éleveurs

Ces repose-pieds supportent chaque jambe indépendamment dans une multitude d'élévation.

Repose-pieds rétractables

Peuvent être rétractés de chaque côté pour faciliter vos transferts.

Système de siège spécialisé

Votre Jazzy peut être équipé d'un siège spécial de type Versa Seat. Contactez votre détaillant de Jazzy pour les informations.

Bras réglable en hauteur

Votre Jazzy peut recevoir des bras réglables en hauteur par tranche de 1 pouce.

Pour régler la hauteur des bras:

1. Retirez la goupille du bras.
2. Réglez le bras à la hauteur désirée.
3. Remplacez la goupille dans le bras.



Figure 27. Panier Arrière



Figure 28. Support de tasse Le support de tasse se monte sur l'appui-bras.

X. GARANTIE

Garantie de un an:

Garantie d'un an à partir de la date de l'achat, Pride Mobility Products Europe B.V., réparera ou remplacera selon notre choix, à nos frais, pour l'acheteur d'origine seulement, les pièces défectueuses (matériel ou confection) après inspection par un représentant autorisé de Pride Mobility Products Europe B.V.:

■ Pièces composant la structure

Pendant la première année suivant la date d'achat, Pride Mobility Products Europe B.V. réparera ou remplacera pour l'acheteur d'origine, à nos frais, les pièces défectueuses (matériel ou confection) après inspection par un représentant autorisé de Pride Mobility Products Europe B.V. :

■ Composantes électroniques

Pendant un an à partir de la date de l'achat, Pride Mobility Products Europe B.V., réparera ou remplacera selon notre choix, à nos frais, pour l'acheteur d'origine seulement, les pièces défectueuses (matériel ou confection) après inspection par un représentant autorisé de Pride Mobility Products Europe B.V. :

■ Module Moteur/Transmission

Limite de la garantie:

Moteur: Si le moteur est endommagé par ce que vous avez négligé de remplacer les brosses. Les brosses sont un item sujet à l'usure et ne sont pas couvertes par la garantie.

Frein: Garantie de un an sur le fonctionnement du frein électrique. Les sabots de frein sont des items sujets à l'usure et ne sont pas couverts par la garantie.

Garantie limitée 6 mois:

Garantie de 6 mois à partir de la date de l'achat, Pride Mobility Products Europe B.V., réparera ou remplacera selon notre choix, à nos frais, pour l'acheteur d'origine seulement, les pièces défectueuses (matériel ou confection) après inspection par un représentant autorisé de Pride:

- Composantes en plastique à l'exception du capot.
- Composantes en caoutchouc. À l'exception des pneus et tubes.
- Roulement à billes et coussinets.
- Roulettes arrière et roulettes antibascule.

Les batteries sont garanties par le fabricant de batteries. Pride Mobility Products Europe B.V. ne donne aucune garantie pour les batteries.

X. GARANTIE

Les réparations sous garantie doivent être autorisées et effectuées chez un détaillant Pride Mobility Products Europe B.V. Ne pas retourner des pièces défectueuses chez Pride Mobility Products Europe B.V. sans avoir obtenu une autorisation au préalable. Tous les frais de transport et d'emballage sont la responsabilité de l'acheteur d'origine.

Exclusion de la garantie:

- Capot et appui - pieds en plastique ABS sont des items sujets à l'usure et ne sont pas couverts par cette garantie.
- Batteries: le fabricant de batteries garantit les batteries pour une période de 6 mois.
- Pneus et tubes.
- Rembourrage - fauteuil
- Réparations ou modifications faites sans l'approbation spécifique de Pride.
- Circonstances hors du contrôle de Pride Mobility Products Europe B.V.
- La main-d'oeuvre, appel de services, frais de transport ou autres frais à moins d'avoir été autorisé au préalable par Pride Mobility Products
- **Domages causés par:**
 - Fuite ou renversement du liquide des batteries.
 - Négligence, abus, accident, mauvais usage.
 - Utilisation, entreposage ou entretien non conforme.
 - Utilisation commerciale ou autre que normale.

Il n'y a pas d'autre garantie expresse ou implicite.

Si pendant la période de garantie une pièce s'avérait défectueuse Pride Mobility Products Europe B.V. corrigera le défaut en conformité avec la description des limitations décrites ci-haut. Les garanties décrites ci-haut sont les seules garanties offertes pour ce produit. Mis à part les engagements contenus dans la présente garantie.

Pride Mobility Products Europe B.V. se dégage de toute responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de tous dommages directs ou indirects, prévisibles ou imprévisibles, perte du libre usage ou perte de temps résultant de l'utilisation de ce Jazzy 1103, Pride Mobility Products Europe B.V. ne donne aucune garantie en ce qui a trait à l'usage ou à l'utilisation de ce type de Jazzy.

Certains états et provinces ne permettent pas l'utilisation de clauses d'exclusion ou de limitation aux dommages accessoires et dommages consécutifs à l'utilisation d'un produit.

Pride Mobility Products Europe B.V. ne sera pas tenue responsable pour les dommages accessoires ou consécutifs ou tous autres pertes et dommages associés à cette garantie.

Cette garantie vous donne des droits. Par contre certains états et provinces vous en accordent d'autres qui peuvent varier d'un état à l'autre.

SVP complétez la carte d'enregistrement afin d'obtenir toute l'aide technique et service de Pride Mobility Products Europe B.V.