

Jazzy 1120 2000

Le Manuel Propriétaire

AVERTISSEMENT:
Lisez tous les
instructions dans cet
manuel avant
l'utilisation de votre
Jazzy.



≡ Enfin une Chaise Motorisée Sensationnelle!™

Pride

Mobility Products Europe B.V.

Tijmuiden 28
1046 AL Amsterdam

www.pridemobility.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SVP, prenez le temps de lire toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser votre Jazzy pour la première fois.

Les symboles suivants sont utilisés pour vous mettre en garde ou vous informer d'une mesure sécuritaire. Il est très important que vous en preniez connaissance.



MISE EN GARDE! L'ommission de respecter ces avertissements pourrait entraîner des blessures corporelles.



ATTENTION! L'ommission de respecter ces mises en garde pourrait entraîner des dommages à votre véhicule motorisé.

DES MATIERES

I. L'INTRODUCTION.....	4
II. LA SÉCURITÉ	6
III. LA JAZZY 1120₂₀₀₀	12
IV. L'ASSEMBLAGE	18
V. L'AJUSTMENTS POUR LE CONFORT	20
VI. LE DÉMONTAGE	26
VII. L'OPÉRATION	27
VIII. LES BATTERIES ET LE CHARGEMENT	34
IX. LE SOIN ET LA MAINTENANCE	38
X. LES OPTIONS ET LES ACCESSOIRES	43
XI. LA GARANTIE.....	44

I. L'INTRODUCTION

Bienvenue À Produits de Pride Mobilité de l'Europe B.V. (Pride). Félicitations sur l'acquisition de votre nouvelle Chaise D'énergie de Jazzy (Jazzy Power Chair). Le dessiner de Jazzy est une combinaison des constituents plus moderne et du stylisme très attractif. Nous sommes certains que les caractéristiques de dessiner et l'opération sans l'interruption de votre Chaise D'énergie de Jazzy sera porte une vie plus confortable pour vous.

Votre sécurité est très importance at Pride. Près d'essayez votre nouvelle Jazzy, s'il vous plait lirez at observez toutes l'intructions dans cet manuel. Cettes instructions étaiits produits pour votre assistance. Votre compréhension de cettes instructions est essentielle pour l'opération sans d'accidents de votre nouvelle Chaise D'énergie de Jazzy.

Pride n'est pas responsable pour des dégats de la propriété ou de la blessure personnel venir a l'utilizations sans sécurité de la Chaise D'énergie de Jazzy. Aussi, Pride n'est pas responsable pour des dégats de la propriété ou de la blessure personnel venir a l'échec des personnes et/ou l'utilisateur d'observent l'instructions et les recommandations dans cet manuel ou des autres publications de Jazzy publier par Pride ou sur La Chaise D'énergie de Jazzy.

Cet manuel de propriétaire et un compilation des spécifications et l'informations de produit disponible au moment de la publication. Nous nous reservons le doit de faire de changements quand nécessaire. Des changes de nos produits peut-etre auront quelque différences entre des illustrations et des eplications dans cet manuel et la produit que vous avez acheté.

Si vous experiencez des problèmes avec notre nouvelle Jazzy que ne pouvez pas résoudre, ou si vous sentez qu'il n'y a pas possible pour vous d'observez des intructions et ou recommandations dans cet manuel, si'l vous plait contactez votre représentant autorisé de Pride pour l'assistance. Quand vous comprenez les mécanismes d'opérations et les soins nécessaire pour votre Jazzy, nous sommes certains que la Jazzy vous donnera beaucoupes des ans de plaisir et la service sans interruptions.

L'ÉCHANGE D'INFORMATION

Nous sommes intéressé dans vos questions, commentaires, et suggestions de cet manuel. Aussi nous avons des intèrets dans la sécurité et fiabilité de votre nouvelle Chaise-Énergie (Power Chair) de Jazzy, et la service provisioné par votre représentat(e) autorisé de Pride.

S'il vous plait vous avisez des changements dans votre adresse pour assurez la continuation de nouvelle information de sécurité, des nouveaux produits, des options nouveaux pour l'enhancement de votre satisfaction de vos Jazzy. Notre adresse est:

Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijmuiden 28
1046 AL Amsterdam

I. L'INTRODUCTION

LA SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DE PRIDE

Puisque vous êtes un propriétaire d'un produit de Pride, nous vous invitons d'enregistrer la garantie de votre produit et participez dans la société des propriétaires de Pride. Vous pouvez enregistrer dans cette société par complétez et retournez la carte de registration renfermé ou par visitez la site internet de Pride a www.pridemobility.com. Quand vous êtes un membre de la société, la chaque fois vous visitez notre site, vous sera avoir l'accès du lieu pédagogique de plus interactifs et honnête pour les personnes avec exigences mobilité, leurs familles, et amis.

À notre page-chez, cliquez le bouton "Owner's Club" pour l'entrée de page des propriétaires courants et potentiels de produits de Pride. Aussi vous obtenez d'accès a des entrevues, des histoires, des idées recreationels, des allusions de la vie journalier, des informations de produits et fonds, et des conseils interactifs de message. Les conseils de message vous invite a la communication avec des autre clients et des représentantes de Pride. Les représentantes sont présent pour votre questions et concernes. Il y a une cadeau gratuit pour la registration avec La Société des Propriétaires de Pride (Pride Owner's Club).

Mon Représentante Autorisé de Pride est:

Nom: _____

Adresse: _____

Numéro de Téléphone: _____

l'Information de Référence Vite du Produit:

Le Modèle Jazzy: _____

Numéro de Série: _____

Date D'Achète: _____

NB: Si vous perdez votre carte de la garantie ou cet manuel propriétaire, appelez ou écrivez a notre bureau pour le remplacement immédiatement.

II. LA SÉCURITÉ

GÉNÉRAL

La Chaise-Énergie de Jazzy 1120₂₀₀₀ est un appareil plus moderne pour l'amélioration de la vie par l'augmentation de la mobilité. Pride fournit une variété de produits pour la meilleure adéquation des besoins individuels de l'utilisateur de la Chaise-Énergie. C'est important que vous réalisiez que le choix final et la décision de la chaise appropriée sont la responsabilité de l'utilisateur et son professionnel de santé (le médecin, kinésithérapeute, etc.).

Des matières de ce manuel ont supposé que l'utilisateur de la Chaise-Énergie a obtenu la chaise appropriée par l'assistance d'un expert d'appareil mobile et le physicien professionnel et/ou votre représentant autorisé de Pride pour l'utilisation de ce produit. Pride n'est pas responsable d'échec de l'assistance.

Il y a quelques instances, comme certaines conditions médicales, quand il faut que l'utilisateur de Chaise-Énergie pratique l'opération de 1120₂₀₀₀ avec un expert. Le définitif d'un expert est un membre de famille de l'utilisateur ou un médecin professionnel de santé qui peuvent assister l'utilisateur dans une variété de activités de la vie journalière.

Quelques points pour aider l'utilisateur de chaise-énergie dans la opération sécurisée de 1120₂₀₀₀ suivantes.

L'EXAMINATION ET LA SÉCURITÉ PRÈS CONDUITE

Prenez le temps de se familiariser avec votre 1120₂₀₀₀ chaise-énergie et ses capacités. Pour l'opération lisse et sécurisée de votre chaise, faites ces examinations avant de chaque utilisation. Pour l'information sur les inspections nécessaires, s'il vous plaît regardez IX. "Le Soins et La Maintenance".

Avant d'utiliser votre 1120₂₀₀₀ s'il vous plaît faites des inspections qui suivent:

- Examinez pour la correcte inflation des pneus. Conservez **30 - 35 psi** dans chaque pneu conduit.
- Examinez toutes les connexions électriques. Faites certain qu'ils sont resserrés et n'ont pas corrodés.
- Examinez toutes les connexions du plateau d'usage. Assurez qu'ils ont bien sécurisé.
- Examinez les freins.
- Examinez la vie des batteries.

Si vous avez des problèmes, contactez votre représentant autorisé de Pride avant l'utilisation de votre 1120₂₀₀₀.

LIMITATIONS DE POIDS

La limitation de poids pour votre 1120₂₀₀₀ est 136 kg.



MISE EN GARDE! Si la limitation de poids est dépassée, ce qui peut éventuellement entraîner l'invalidation de votre garantie et aussi causer des blessures personnelles et des dommages à votre 1120₂₀₀₀.

II. LA SÉCURITÉ

L'INFORMATION D'INCLINAISON

Pour la raison d'accès facile et sécurisée, plus des meubles ont des rampes avec l'inclinaison des degrés spécifiques. Quelques des rampes ont des courbes de 90 degrés qui demandent les bonnes techniques de tourner sur votre 1120₂₀₀₀.

Quand vous ascendez un inclinaison, assurez que votre 1120₂₀₀₀ est en marche. S'il que vous arrêtez, commencer lentement après, et accélérer avec la prudence. Quand vous descendez, placer la manette de gaz sur le plus lente et seulement conduire en avant. Si votre 1120₂₀₀₀ avance plus fort que vous désirez, arrêter le Jazzy par desserrer le palonnier. Après l'arrête, poussez le palonnier gentille et assurer une descente sécurisé.

MISE EN GARDE! Quand l'ascension sur un inclinaison, ne conduisez pas en zigzag ou n'avancez pas en angle. Maintenez votre 1120₂₀₀₀ à la ligne toute droite sur un inclinaison. La possibilité d'un tombe est réduit par cette pratique. Toujours pratiquez beaucoup de prudence sur un inclinaison.



MISE EN GARDE! N'ascendez ou descendez pas un inclinaison avec du risque (exemple: les régions neigeuse, la glace, la gazon couper, ou des feuilles mouille).

MISE EN GARDE! Ne jamais voyagez en arrière pendant un descende d'inclinaison. Cette peut être résultat dans la blessure personnel et/ou le dégats de votre 1120₂₀₀₀.

MISE EN GARDE! Ne voyagez pas sur un inclinaison avec une pente se plus que cinq degrés. La blessure personnel ou le dégats de votre 1120₂₀₀₀ peut résulter.



La Figure 1. L'Inclinaison Maximum



La Figure 2. Maximum Decline

LES RÉGIONS D'EXTERIEUR POUR CONDUIRE

À dessein, votre 1120₂₀₀₀ vous pourvoyez de la stabilité optimum dans des conditions normale de conduisant des régions sèche et plaien, composé de la concret ou de la asphalte. Mais, quelque fois vous serez rencontrer des régions qui ne sont pas faire de la concret ou d'asphalte. Pour cette raison, votre 1120₂₀₀₀ est dessiné de marche sur la terre ferme, l'herbe, et le gravier. Aussi vous pouvez utiliser votre 1120₂₀₀₀ sur les pelouses et dans les régions des parcs.

- Évitez des herbes troo hautes qui peuvent emmelé dans l'engrenage en marche.
- Évitez la terre ou le gravier qui ne sont pas firmes.
- Si vous n'etes pas certain d'une surface, simplement l'éviter.

II. LA SÉCURITÉ

LA MODE ROUE-LIBRE

Votre 1120₂₀₀₀ est équipé avec des leviers de la roue-libre pour l'utilisation de l'énergie manuelle de la chaise par un expert. Pour plus d'information pour le placement de votre 1120₂₀₀₀ dans et hors de la mode roue-libre, regardez III. "La Jazzy 1120₂₀₀₀."

MISE EN GARDE! N'utilisez pas votre 1120₂₀₀₀ dans la mode roue-libre sans un expert. La blessure personnel peut resulte.



MISE EN GARDE! N'essayez pas de placer la chaise a la rue mode roe-libre vous-meme quand vous etes la restez. La blessure personnel peut resulte. Prenez l'assistance de votre gardien.

MISE EN GARDE! Ne placez pas votre 1120₂₀₀₀ dans la mode roue-libre sur un inclinaison. La blessure personnel peut resulte, si la chaise perde tout le controle.

LES OBSTACLES STATIONNAIRE (DES MARCHES, DES BORBURES, ETC.)

MISE EN GARDE! Sans l'assistance d'un gardien, n'essayez pas un montre uo un descende d'obstacle plus que i pouce dans votre 1120₂₀₀₀.



MISE EN GARDE! N'essayez pas descende en arriere a la marche, au bordure, ou des autres obstacles dans votre 1120₂₀₀₀. Cet peut etre cause un renversement de la 1120₂₀₀₀ et la blessure personnel.

L'INFLATION DU PNEU

Si votre 1120₂₀₀₀ est équipé avec des pneus pneumatiques, inspectez la pression d'air chaque semaine. Cette inspection doit augmenter la vie de vos pneus et assurer l'opération confortable de votre chaise-énergie.

MISE EN GARDE!Faites certain que l'inflation dans les pneus est 30 - 35 psi. Ne gonflez pas vos pneus sous ou sur cette point. La pression en bas de cette point peut resulte dans perdre de controle et les pneus trop inflaté put cause l'explosion. La blessure personnel très serieuse peut resulte.



MISE EN GARDE! Gonflez des pneus conduire de votre 1120₂₀₀₀ a la source d'air avec un manomètre. La pression d'air précis pour des pneus conduire de votre 1120₂₀₀₀ est 30-35psi. Si la source d'air n'equipé pas un manomètre, les pneus peut etre trop gonflé et explode. La blessure personnel peut result.

LES RUES PUBLIC ET LES RÉGIONS STATIONNEMENTS

MISE EN GARDE! N'operez pas votre 1120₂₀₀₀ sur des rues public ou des chaussées. Il peut etre difficile pour le trafic de vous vu dans votre 1120. Suivez toutes les loies du piéton trafic, puis avance avec le beaucoup de prudence



NB: Vous pouvez placer les ordres pour les accessoires de la sécurité comme le réflecteur, les drapeaux fluorescents, et un paquet variable de luminescent de votre représentante autorisé au Pride.

II. LA SÉCURITÉ

LES ESCALIERS ET LES ESCALIERS ROULANTS

Les chaises-énergie ne sont pas capable de monte ou descende les escaliers ou les escaliers roulants. Toujours utilisez un ascenseur.



MISE EN GARDE! N'utilisez jamais votre Jazzy sur les escaliers ou les escaliers roulants. La blessure personnel ou les dégats de votre 1120₂₀₀₀ peuvent résulter.

LES PRODUITS D'ENLEVEMENT/D'ÉLÉVATION

Une enlevement uo une élévation peut etre necessaire a la transport pour aide votre voyage dans dans votre Jazzy. Près d'utilisez cette produit, Pride recommande que vous réexaminez les instructions, specifications et l'information de la sécurité de la fabricant des produits de l'enlevement ou l'élévation.

LE TRANSPORT DE VÉHICULE MOTEUR

En ce moment, il n'y a pas des niveaux qui sont approuver pour des système du lien dans une voiture en marche pour des personee dans la chaise-énergie. Bien que votre Jazzy est équipé avec une ceinture du positionnement, il ne dessiné pas pour la contrainte nécessaire pendant la voiture est en marche. Il faut que des personnes dans une vehicule d'automobile ont bien attaché leurs ceintures de la sécurité.



MISE EN GARDE! N'assiez jamais dans votre chaise-énergie quand il est dans une voiture en marche. La blessure personnel peut resulter.

MISE EN GARDE! Toujourfaites certain que votre Jazzy chaise-énergie est sécurisé proprementpendant le transport. Autrement la blessure personnel et/ou le dégats de votre Jazzy peuvent resulter.

LES CEINTURES POSITIONNEMENT

Votre représentante de Pride, le thérapeute(s), ou des autre professionnels due la santé sont responsable pour la détermination de votre exigences pour une ceinture du positionnement pour l'opération sécurée de votre Jazzy.



MISE EN GARDE! Faites certain que votre ceinture du positionnement est bien attaché pour l'opération sécurée de votre Jazzy. La personnel très serieuse peut resulter si vous tombez de votre Jazzy.

INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET FRÉQUENCE RADIO (IEM ET IFR)

La performance de votre Jazzy peut être affecté par des champs électromagnétiques de telephones portatifs ou des autres appareils radiants comme, les radiotéléphones portatifs, les stations de radio et television, les liaisons sans fils d'ordinateur, les sources micro-ondes, et les transmetteurs d'appel. Aussi votre Jazzy peut résulter dans derangements de champs électromagnétiques.

II. LA SÉCURITÉ

LES PRÉCAUTIONS CONTRE LE MÉTEO MAUVAIS



MISE EN GARDE! N'opérez pas votre Jazzy dans les conditions glacial ou glissant, ou sur les surfaces salé. Cettes surfaces peuvent résulter dans une accident, la blessure ppersonnel, et le changement de la fonction de votre Jazzy.

MISE EN GARDE! N'exposez jamais votre Jazzy d'humidité (la pluie, le neige, la brume, ou un lave). Cette exposition peut endommager votre Jazzy. Si la chaise-énergie était dans la brume, ne l'utilisez pas jusqu'il est sèche.

DES TRANSFERTS

Un bien sens d'équilibre est nécessaire pour des transferts dans et hors de votre Jazzy. Toujours avez un attendant ou un professionnel de la santé pour l'érudition de transfert de vous-meme correctement.

Pour l'élimination de possibilité de la blessure personnel, Pride recommend que vous pratiquez des choses qui suivantes près d'utilisation de la chaise-énergie:

- Fermez l'énergie. Regardez VII. "L'Opération."
- Ensurez que votre 1120₂₀₀₀ n'est pas dans la mode roe-libre. Regardez III. "La Jazzy 1120₂₀₀₀."
- Faites certain que vos scies a bras sont poincons ou s'enlevent de votre 1120₂₀₀₀. Regardez V. "Les Ajustments Pour Le Confort".
- Pendant le transfert, s'enleve la siel-pied, ou les siels-jambes a coté; pendant le transfert ce sera empecher un piège. Regardez V. "L'Ajustements pour le Confort."
- Reduisez le distance entre votre chaise-énergie et l'objet que vous serez transférer.
- Pendant le transfert, tournez les deux roues d'arrière envers du destination du traanfert pour plus de stabilité.



MISE EN GARDE! Près d'un transfert, positionez vous-meme le plus en arrière que possible dans le siège de votre Jazzy pour le prévention de renversement et la blessure personnel.

MISE EN GARDE! N'utilisez pas vos scies a bras pour porte des poids.

MISE EN GARDE! Ne placez pas tous vos poids sur le siel-pied. cet action peut résulter dans le renversement de la chaise-énergie et la blessure personnel.

S'ÉTENDRE ET SE PENCHER

Pour la prévention de renversement de votre Jazzy, c'est importante que quand vous vous penchez ou étendez, vous avez un centre de la pesanteur solide. Au Pride, nous recommandons que l'utilisateur de la chaise-énergie connaisse des limitations personnels et pratique se pencher et s'étendre avec un expert.



ATTENTION! Ne jamais se pencher ou s'étendre pour les choses sur la planche qui sont entre vos genoux. Cets mouvements peuvent changer votre centre de la pesanteur et la distribution des poids de votre Jazzy. Le renversement de la Jazzy ou la blessure personnel peuvent résulter.

II. LA SÉCURITÉ

LES BATTERIES

Plus des avertissements en bas, faites certain que vous utilisez tous les autres information des batteries. Pour plus d'information, regardez VIII. "Les Batteries et Le Chargement."



MISE EN GARDE! Les poids de chaque batterie de votre Jazzy est approximativement 38 livres. Soulevement du poids plus de votre capacité peut resulter dans la blessure personnel.

MISE EN GARDE! Les poteaux des batteries, des terminales, et des accessoires associé sont composer du plomb et des composés du plomb. Lavez les mains après le contact.

MISE EN GARDE! Toujours protégez les batteries et ne changez jamais quand ils sont pret la prévention du mouvement pas désiré.

LE DISCHARGE ET LE RECYCLAGE DE BATTERIE

Si vous avez un batterie endommagé ou se fêlé, immédiatement le mette dans un sac plastique et appelez votre représentant au Pride pour les instructions sur le discharge. Votre représentant au Pride a des informations nécessaire pour le recyclage de la batterie.

PRÉVENTION DES MOUVEMENTS DE LA CHAISE PAS INTENTIONÉ



MISE EN GARDE! Si vous restez dans la meme position pour un long temp, fermer l'énergie. Cet pour la prévention du mouvement pas intentioné parce que de contact accidentel du palonnier. Cet aussi éliminer la possibilité du mouvement pas nécessaire des source électromagnetiques. Autrement c'est un mesure de la preventionla de la blessure personnel.

LES DROGUES ORDONNANCE/ LES LIMITATIONS PHYSICALE

Le bons sens est très nécessaire dans l'opération de votre Jazzy. Cet compris la conscience de matières de la sécurité pendant vous prenez les drogues a l'ordonnance et vos limitations physique.



MISE EN GARDE! Consultez votre physicien si vous prenez les médications ou si vous avez quelque limitations physique. Quelque des medications et des limitations physique peuvent détériorer votre capacité d'opération sécurée de votre Jazzy.

L'ALCOOL

L'utilisateur doit exercise bons sens et l'attention pendant l'opération de la Jazzy. Cet compris de la conscience des matières de la sécurité pendant sous l'influence d'alcool.



MISE EN GARDE! N'opérez pas votre Jazzy pendant vous etes sous l'fluence d'alcool, parce qu'il peut resulter dans le détérioration de votre capacité d'opération sécurée.


LES PIÈCES AMOVIBLES



MISE EN GARDE! N'essayez pas transferrez ou déplacez votre chaise par des pièces amovibles. La blessure personnel ou le des dégats peuvent resulter.

III. LA JAZZY 1120₂₀₀₀

Votre Jazzy a deux assemblages principaux: le siège et la base d'énergie. Regardez la figure 3. Pour le confort de utilisateur, il ya un variété des options pour l'embase. Normalement, l'assemblage d'embase es compris de scie a bras, le dos du siège, et le palonnier ou le controleur. Aussi votre Jazzy peut etre a quelque options d'accessoires, comme une corbeille, un récipient d'une canne/une béquille, un récipient d'un tasse, et/ou un commutateur du siège d'énergie. Regardez section X. "Les Option et Les Accessoires." L'assemblage pour la base d'énergie est la coeur de votre Jazzy. L'assemblage la compris des deux roues de conduire, des deux roues de contre-renversement, des deux roues d'arrière, un commutateur de contact avec le harnais, et un linceul du comp. Regardez la figure 3 jusqu'a 5.

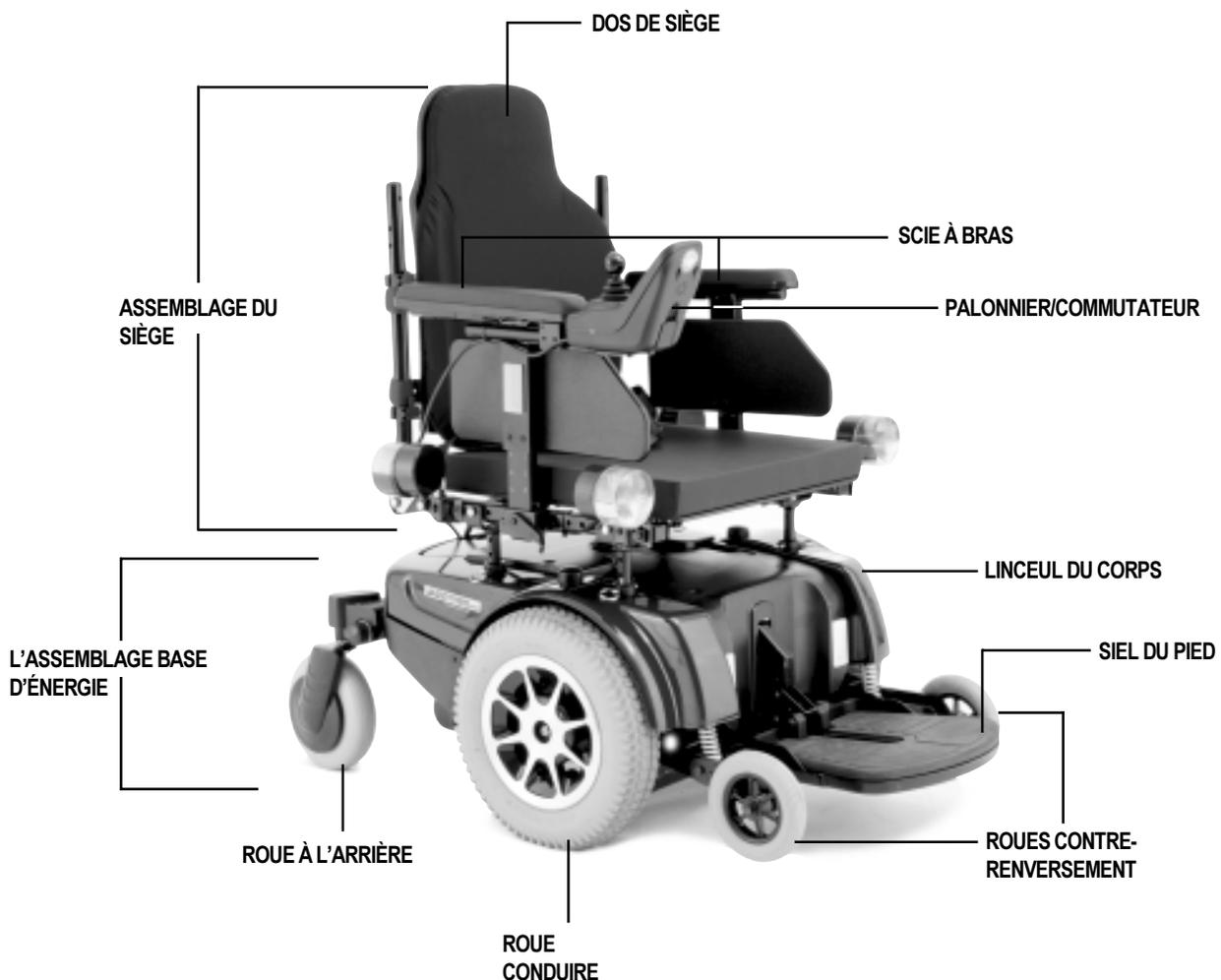

La Figure 3. La Jazzy 1120₂₀₀₀

III. LA JAZZY 1120₂₀₀₀

PLATEAU D'USAGE

L'emplacement du plateau d'usage est en arrière de votre Jazzy. Cet plateau compris du coupe-circuit principal, le connecteur d'accessoires (facultatif), le connecteur du siège d'énergie. et le régulateur de connecteurs du harnais. Regardez la figure 4.

- **Le coupe-circuit principal:** Le coupe-circuit principal est une caractéristique pour la sécurité dans votre Jazzy. Regardez la figure 4. Pour la prévention de dégats des moteurs et des objets électroniques, le coupe-circuit principal est actif quand il ya trop de tension (poids excessives) sur des batteries et des moteurs. Si le circuit est actif, permettez votre Jazzy un reste d'une minute. Puis, poussez la bouton du coupe-circuit, activez le régulateur du palonnier, et continuez l'opération normal. Si le coupe-circuit continue l'activité, contact votre représentant autroisé du Pride.
- **Le connecteur d'accessoires (facultatif):** Ici le harnais facultatif connecte avec le régulateur (siège d'énergie, l'éclairage).
- **Le controleur de connecteurs du harnais:** Ici le palonnier connecte avec les moteurs, les batteries, et le chargeur. Si votre Jazzy a un régulateur de Remote Plus, il ya seulement un connecteur sur le plateau. Regardez la figure 4.
- **Le connecteur du siège-énergie (facultatif):** Cet connecteur est pour le relier de siège-énergie. Regardez la figure 4.



MISE EN GARDE! Il ya des pièces électroniques et des connecteurs dans le plateau d'usage. Ne mettez pas des choses dans cet plateau. L'utilisation de cet plateau pour l'entreposage peut etre resulte dans des court-circuits, le feu, des dégats de votre Jazzy et/ou la blessure personnel.



La Figure 4. Utility Tray

III. LA JAZZY 1120₂₀₀₀

LES LEVIERS DE LA ROUE-LIBRE

Pour votre convience, votre Jazzy est équipé avec un levier de la roue-libre. Regardez les figures 5 et 6. Cet levier permettre l'obtention des moteurs de conduire et l'opération manuel.

Pour le désembrayage du conduire et le remplacement de roue-libre:

1. Poussez le loquet de sécurité en haut. Regardez la figure 5.
2. Tirez le levier de le roue-libre en haut.

Pour l'engagement du conduire et sortie le mode roue-libre:

Poussez le levier de roue-libre en bas. Regardez la figure 6.

MISE EN GARDE! N'utilisez pas votre Jazzy dans le mode roue-libre sans le presence d'un attendant. La blessure personnel peut etre resulte.




MISE EN GARDE! N'essayez pas l'engagement de mode roue-libre quand vous etes dans la chaise. La blessure personnel peut etre resulte. Demandez l'assistance de votre attendant.

MISE EN GARDE! Ne placez pas votre Jazzy dans le mode roue-libre sur un inclinaison. Si vous perdez controle, la blessure personnel peut etre resulte.

Si vous avec de difficultés au mouvement du levier, balancez votre Jazzy gentillment. Puis le levier doit arrivé a la position que vous desirez.



ATTENTION! Cet très importante de souviens que quand votre Jazzy est dans le mode de la roue-libre, parce que le système du frein n'est pas engagé.

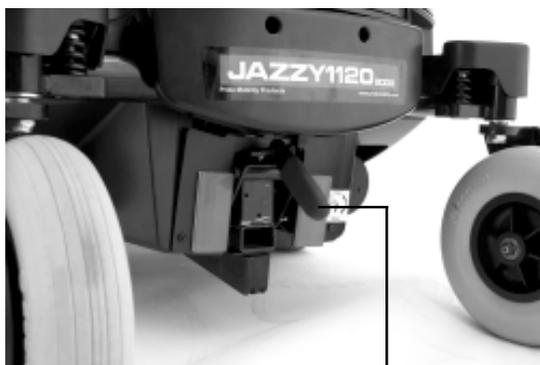

LEVIER ROUE-LIBRE (POSITION EN HAUT)

La Figure 5. Désembrayage de Conduire



LEVIER ROUE-LIBRE (POSITION EN BAS)

La Figure 6. Éngagement de Conduire

III. LA JAZZY 1120₂₀₀₀

LE SYSTÈME DE TRAC-ACTIVE


Votre Jazzy est équipé par un système de la suspension de trac-active (STA/ATS en Anglais). Le dessein du STA vous permettez de l'opération confortable sur des terrains différents et d'obstacles. Avec le STA, votre roues contre-renversement d'antérieure marchent avec votre moteur suspension pour vous aidez l'opération au-dessus des obstacles.

Quand les roues contre-renversement d'antérieure contacte un obstacle, l'assemblage des roues contre-renversement d'antérieure est tiré en haut. À la meme temp, votre moteurs poussent la Jazzy au-dessus d'un obstacle et limitent la possibilité de votre Jazzy de marche sur l'obstacle.

Aussi le STA aide dans les conditions de la journalier. Par instance, quand vous dégagez le palonnier, votre Jazzy va plus lentement. Quand la chaise va plus lente, les roues contre-renversement d'antérieure sont tombent automatiquement a la terre. Cette action reduit le renversement d'antérieure qui normallment resulte avec les chaises avec le conduire de roue-centre.

LE SUSPENSION À L'ARRIÈRE

Votre Jazzy 1120₂₀₀₀ est équipé par le suspension arrière. Regardez la figure 7. Cet système du suspension marche avec le STA et assure l'opération confortable quand vous etes sur des surfaces rugeuse et en haut ou en bas des trottoirs. Cet système marche par permettement de fourchette directrice de respond aux mouvements de poids sur la chaise et la terre regeuse. Quand vous conduirez au-dessus des obstacles, la roue directrice arrière sera pivot. Cet système aussi amélioré l'opération quand les roues contre-renversement d'antérieure sont en bas du surface.

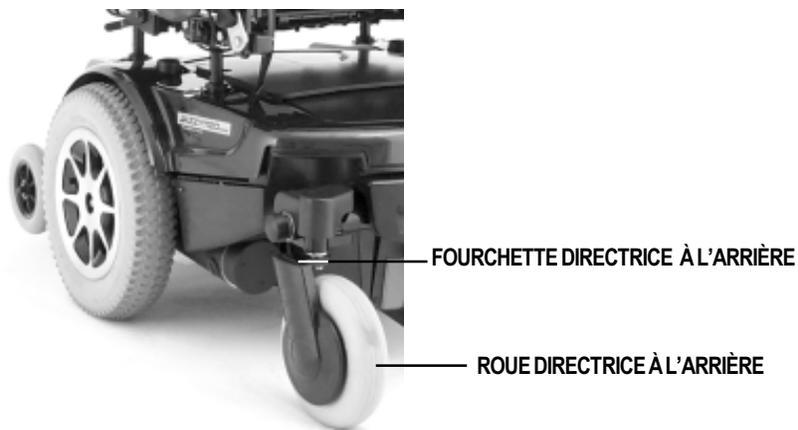


La Figure 7. Suspension À L'Arrière

III. LA JAZZY 1120₂₀₀₀

L'EMBALLAGE COMPLET D'ÉCLAIRAGE

L'emballage complet d'éclairage compris des phares, des feus arrières, et des feus directionel. Regardez la figure 8 et 9. Le contacteur d'éclairage est sur le palonnier Remote Plus/controlleur. Regardez la figure 10. Les phares et les feu d'arrière sont activés quand l'énergie de la chaise est activé. Quand le système n'est pas allumé, les éclats lumineux sont activé avec le contacteur d'éclairage.

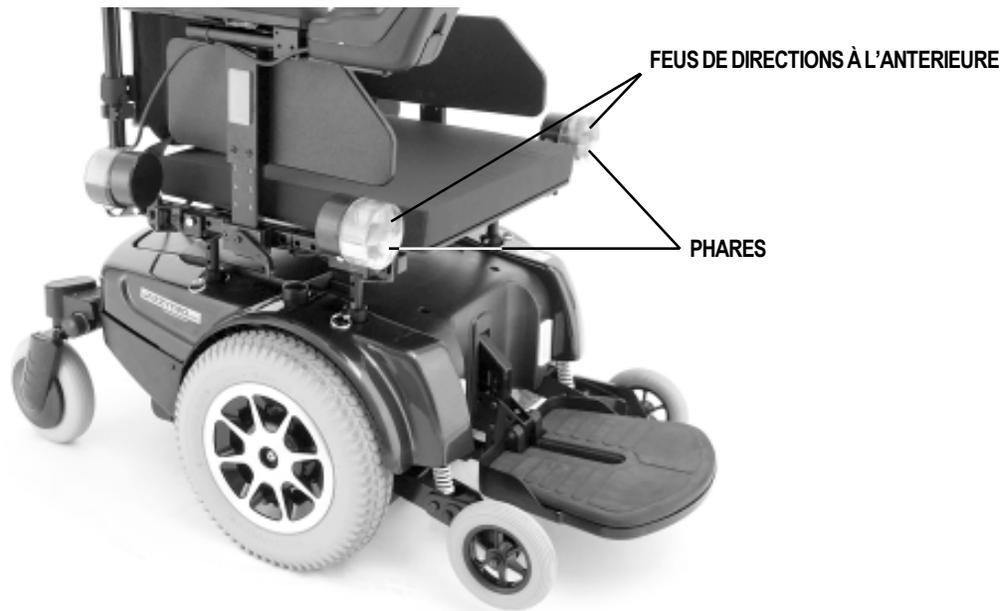

La Figure 8. L'Emballage Complet D'Éclairage (À L'Anterieure)



La Figure 9. L'Emballage Complet D'Éclairage (À L'Arrière)



La Figure 10. Controleur Remote PkPustroller

III. LA JAZZY 1120₂₀₀₀

Les Spécifications	
Classification d'usage:	A
Pente sécurisée max.:	12%
Compétence de montage max.:	12%
Compétence de montage obstacle max.:	10 cm
Suspension:	Le suspension complet avec Active-Trac Le suspension directrice arrière
Roues Conduire:	36 cm, pneumatique (pneus solide sont facultatifs)
Directrices Arrière:	20 cm, solide, articulation arrière
Contre-renversement:	15 cm, solide, monté a l'antérieure
Vitesse Maximum:	9.6 mph
Freins:	Electronique régénératif, "Freins Intelligents", le frein du parc disc
Déblaiement de la Terre:	9 cm
Demi-Diamètre de Tournir:	50 cm
Taille D'ensemble:	La longueur: 100 cm La largeur: 65 cm
Options De S'Asseors:	noire moyen (normal) Dos-Haut avec sciel tete Siège a dossier Réglable Siège Versa Inclinasion Versa Option D'Élevation D'énergie
Train Conduire:	Deux moteur, roue du milieu
Batteries:	Deux 12-volt, Batteries de Groupe 24 (NF-22 pour l'option de siège -énergie)
Rayon:	À peu près de 40 km
Chargeur du Batterie:	À bord Sortie a bord (facultatif)
Contrôleur Moteur:	Controleur Dynamique de Dauphin (Dolphin) Controleur Remote Plus
Capacité du poids:	136 kg
Poids de la Jazzy:	La basse: 38 kg Le siège: 13 kg Les Batteries: chacune 20 kg
Waranties:	Un warantie limité de la vie sur le cadre Un warantie de deux ans sur les électroniques

IV. L'ASSEMBLAGE

L'AJUSTMENT D'ANGLE DU SIÈGE

Cependant sur la préférence d'utilisateur, le dossier du siège peut ajuster dans les quatre angles différents (À 90°, 102°, 105°, ou 107° angles).

Pour l'ajustment d'angle du siège:

1. Utilisez une clé de hex et une clé écrous de 10 mm pour l'ablation du verrou ajustable sur les deux gonds du siège.
2. Mettez à l'angle désiré.
3. Rétablissez le verrou et bien tendre.

L'INSTALLATION DU SIÈGE (LE SIÈGE AVEC LE CADRE-H)

La méthode d'installation normal du siège inclus le cadre du siège (cadre-H) et quatre (4) angles du siège ajustements qui sont sur la base d'énergie.

L'installation du siège:

1. Mettez le siège sur les tours du siège arrière.
2. Poussez le siège en arrière et en bas jusqu'à des loquets sont engagé sur les tours du siège à l'antérieure.
3. Fichiez le câble contrôleur dans le connecteur sur le plateau d'usage.
4. Fichiez le commutateur câble du siège d'énergie (si équipé) dans le connecteur sur le plateau d'usage.
5. Securez le câble contrôleur à la scie à bras avec un ou plus d'un fil électrique(s). Regardez la figure 11.
6. Pour assurez que le câble n'est pas dans le gond du siège, contrôlez le câble. Regardez la figure 11.




La Figure 11. Connecteur de Cable Contrôleur

L'INSTALLATION DU PALONNIER

La configuration divers et des options que vous choisissez pour votre Jazzy, peut être expédié sans le palonnier déjà dans la scie à bras.

Pour l'installation du palonnier:

1. Utilisez une clé hex de 5mm à desserrer la hélice attaché. Regardez la figure 12.
2. Glissez la fixation à double patte articulée du palonnier dans ou dehors de la scie à bras à la position que vous désirez. Regardez la figure 12.
3. Resserez la hélice attaché.

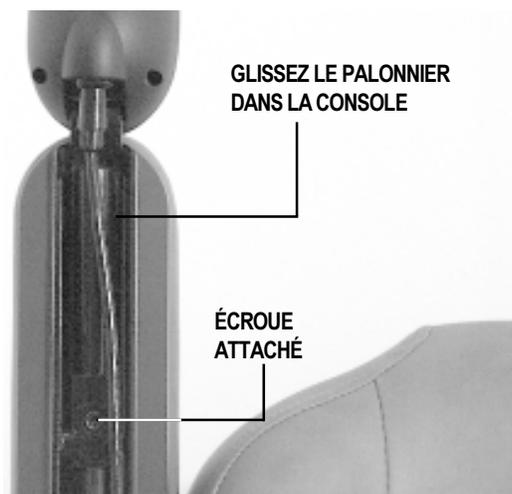

La Figure 12. L'Installation de Palonnier

IV. L'ASSEMBLAGE

L'INSTALLATION DE L'OPTION DU SIÈGE D'ÉNERGIE


Votre Jazzy peut être équipé par l'option du siège-énergie. Pendant le siège est une sorte de style pour cette modèle, le manière d'attachement de basse du siège peut être différent.

L'installation du siège-énergie:

1. Alignez le manche du siège avec le trou dans l'actuateur. Regardez la figure 13.
2. Insérez le siège dans l'actuateur et poussez le levier du siège en avant.
3. Serrurez le siège dans la place correctment.

L'OPTION DU SIÈGE VERSA OU D'INCLINAISON VERSA (VERSA SEAT/VERSA TILT)

Si votre Jazzy est équipé par un siège versa ou un inclinaison versa, s'il vou plait examinez le manuel avec le siège versa/ l'inclinaison versa.

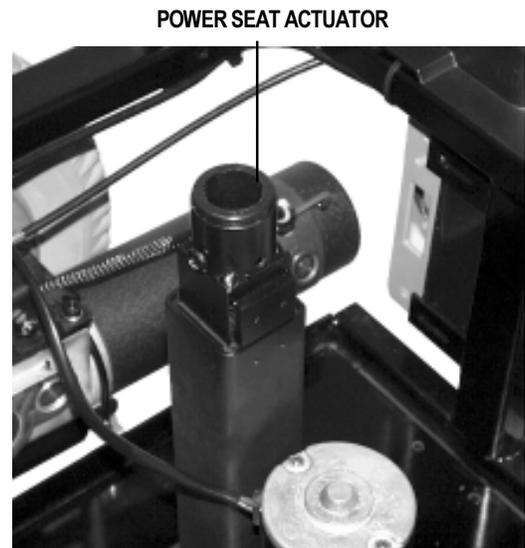

La Figure 13. L'Actuateur du Siège Énergie

V. LES AJUSTEMENTS POUR LE CONFORT

Quand vous êtes confortable avec l'opération de votre Jazzy, vous pouvez chercher le besoin d'ajuster votre position dans le siège. Il y a quelques ajustements que vous pouvez faire pour votre confort, comme la hauteur et l'angle du siège, la largeur de la scie à bras, l'angle et le haut de positionnement du palonnier, et la hauteur du siège à pied, la profondeur et l'angle de siège.



ATTENTION! Si la configuration de votre Jazzy était de votre représentant autorisé de Pride, s'il vous plaît consultez votre professionnelle de santé près de faites des changements à la position de siège et des autres ajustements. Quelques ajustements peuvent dégrader l'efficacité et la sécurité de votre Jazzy avec un changement de la centre de la pesanteur.

LA HAUTEUR ET L'ANGLE DU SIÈGE


Vous pouvez changer la hauteur du siège par une ou deux mécanismes(s): manuellement ou automatiquement. (Si la Jazzy est équipée par l'option exaltant d'énergie du siège, regardez "L'option Exaltant D'énergie Du Siège" plus avancée de cette section.

Le changement de la hauteur du siège:

1. Enlevez le siège. Regardez VI. "Le Démontage."
2. Enlevez la cadre du pied.
3. Enlevez l'enveloppe de protection intermédiaire par le dévissage de deux 1/4 tours de boulonneries.
4. Enlevez le goupillon d'arrêt au tour du siège. Regardez la figure 14.
5. Élevez ou baissez chaque tour du siège à la position désirée.
6. Installez le goupillon d'arrêt dans chaque tour du siège.
7. Rétablissez l'enveloppe de protection intermédiaire et le cadre du pied.
8. Installez le siège.

Le changement d'angle du siège:

1. Enlevez le gong verrou du siège avec un clé hex de 4mm et une clé à écrous de 11mm. Regardez la figure 15.
2. Ajustez le dossier du siège à l'angle désiré et rétablissez le gong verrou du siège.
3. Resserrez des verrous avec la clé de hex et la clé à écrous.

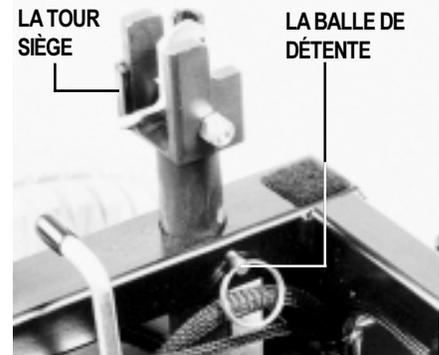


La Figure 14. La Hauteur Du Siège

GONGE VERROU DU SIÈGE



La Figure 15. L'angle Du Siège

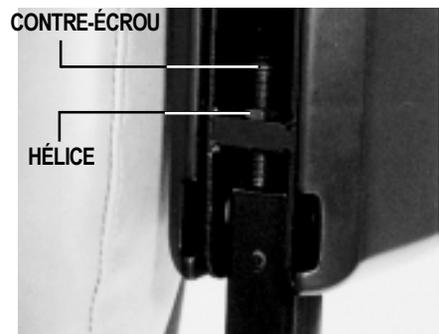

La Figure 16. L'angle Du Scie à Bras



La Figure 17. La Largeur Du Scie à Bras

V. LES AJUSTEMENTS POUR LE CONFORT

L'ANGLE DU SCIE A BRAS

Vous pouvez ajuster l'angle du scie a bras pour vos besoins spécifiques.

Le changement d'angle du scie a bras:

1. Levez le scie a bras en haut et perpendiculaire de la planche.
2. Utilisez une clé a écrous de 11mm a desserrez le contre-écrou.
3. Utilisez une clé hex de 4mm a desserrez la hélice d'ajustement.
4. Tournez la hélice dans le sens horaire de baissez l'antérieure de scie a bras, ou tournez la hélice contre sens horaire d'élèvez l'antérieure de scie a bras.
5. Serrerez la hélice d'ajustement dans son place par le serrage de contre-écrou.

LA LARGEUR DE SCIE À BRAS

Le changement de la largeur de scie a bras:

1. Emplacez les deux hélices attaché en bas de siège. Regardez la figure 17.
2. Desserrez des hélices attaché par un clé hex de 3mm.
3. Glissez les scies a bras dans ou en dehors de la largeur vous desirez.
4. Reserrez des hélices attaché.

LA HAUTEUR DE SCIE A BRAS (FACULTATIF)

Votre Jazzy peut être équipé par les scies a bras avec la hauteur ajustable.

Le changement de la hauteur du scie a bras:


1. Desserrez la hélice attaché en bas du scie a bras avec une clé hex de 5mm.
2. Enlevez le goujon d'arrêt du balle de scie a bras.
3. Déplacez le scie a bras en haut ou en bas, jusqu'à la hauteur vous desirez.
4. Alignez les trous et rétablissez le goujon d'arrêt.
5. Reserrez des hélices attaché.

L'EXTENSION DU PALONNIER


Le control du palonnier peut facilement glisse en dehors de scie a bras ou envers de scie a bras.

Pour l'extension du palonnier:


1. Utilisez une clé hex de 5mm de desserrez des hélices attaché. Regardez la figure 18.
2. Glissez la fixation a double patte articulée du palonnier dans ou en dehors des scies a bras a la position vous desirez.
3. Reserrez des hélices attaché.

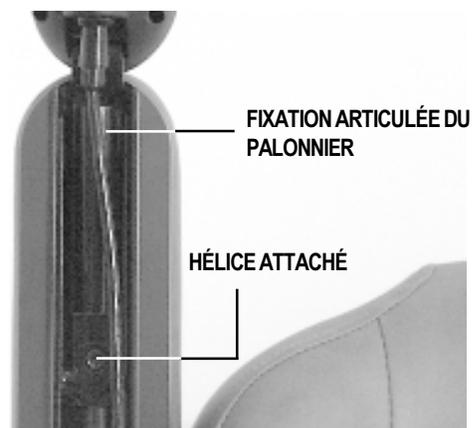

La Figure 18. L'extension Du Palonnier

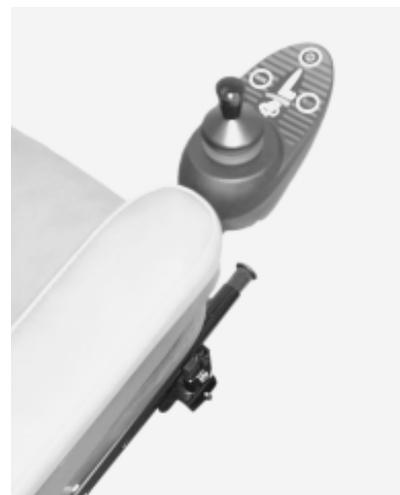

La Figure 19. Le Palonnier Avec L'oscillation (Position En Avant)

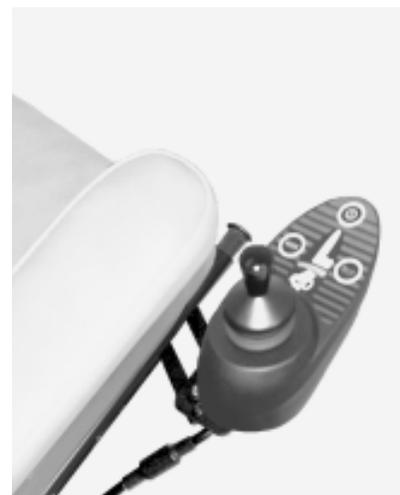

La Figure 20. Le Palonnier Avec L'oscillation (La Position Retracte)

V. LES AJUSTEMENTS POUR LE CONFORT

LE PALLONNIER AVEC L'OSCILLATION

Votre Jazzy peut être équipé par un palonnier qui peut osciller. Cette option permet de vous le mouvement du palonnier d'avant à bras jusqu'à côté de scie à bras sans le démontage. Regardez les figures 19 et 20.

Le palonnier peut monter à gauche ou à droite de votre Jazzy. Contactez votre représentant autorisé de Pride.

LA HAUTEUR DU SIEL PIED

La hauteur du siel pied est facilement ajustée à une de la six hauteurs différentes dans les incréments de 2.54cm.


Élever ou baisser le siel pied:

1. Enlevez les écrous et les verrous du patte d'attache. Regardez la figure 21.
2. Enlevez ou en bassez le siel pied à la hauteur vous desirez.
3. Rétablissez les écrous et les verrous dans le patte d'attache du siel pied et resserrez.


LA PROFONDEUR DU SIEL PIED

L'ajustement de la profondeur du siel pied:

1. Enlevez les écrous et les verrous du patte d'attache. Regardez la figure 22.
2. Placez le siel pied dans ou dehors de profondeur vous desirez.
3. Rétablissez le goujon d'arrêt de 8mm dans le patte d'attache et resserrez.

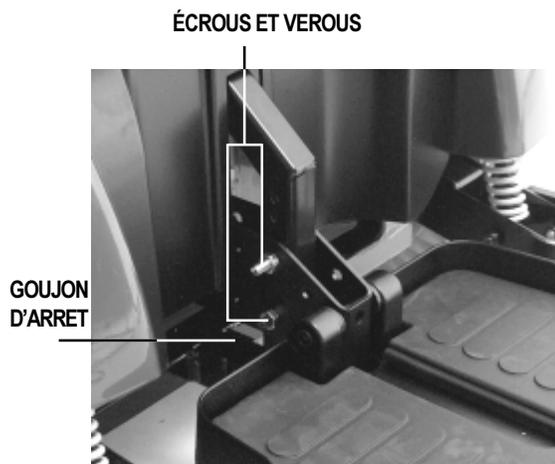

La Figure 21. Hauteur et Profondeur du Scie A Pied

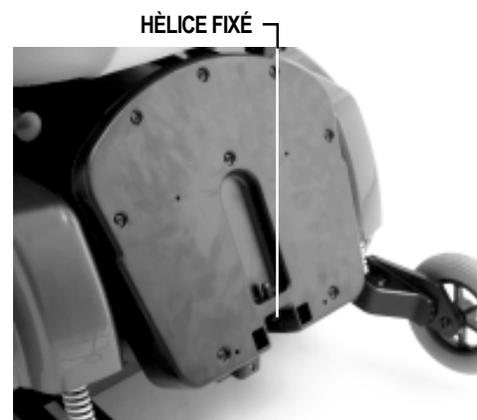

La Figure 22. L'angle du Scie A Pied



La Figure 23. Scie Aux Pieds Par L'oscillations

V. LES AJUSTEMENTS POUR LE CONFORT

L'ANGLE DU SIEL PIED

Faites les ajustements d'angle du siel pied avec une clé hex de 5mm. Regardez la figure 22.

L'ajustement d'angle du siel pied:

1. Tournez la hélice fixé en sens horaire d'enleve la facade d'antérieure du siel pied.
2. Tournez la hélice fixé contre le sens horaire de basse la facade d'antérieure du siel pied.

L'ajustement de la hauteur du ESJ:

1. Enlevez les deux hélices a coté de chaque extension du scie au jambe. Regardez la figure 25.
2. Glissez le scie au jambe dans ou dehors de la longueur vous desirez.
3. Rétablissez les deux hélices sur chaque extension du scie au jambe.

DOSSIER EN HAUT AVEC LE REPOSE-TETE (FACULTATIF)

Si votre Jazzy est équipé avec un siège deluxe du dossier en haut, vous pouvez ajuster le hauteur de repose-tête.

L'ajustement de l'hauteur du repose-tête:

1. Poussez le bouton pour faire le dégagement du repose-tête.
2. Placez le repose-tête en haut ou en bas a la position que vous desirez.

L'OPTION D'OSCILLATIONS DU SIEL PIED

Les scies aux pieds qui fait d'oscillations sont facultatifs (SPD/SFR en anglais). Il vous permet de mettre des siels pieds a coté de la chaise près d'un transfert de votre Jazzy.

L'oscillations des siels pieds:


1. Poussez le levier de dégagement. Regardez la figure 23.
2. Oscillez le scie a pied a coté de la chaise.

L'OPTION D'ELEVATION DU SCIE AU JAMBE

L'option d'élévation du scie au jambie (ESJ/ELR en anglais) permet un grand rayon d'ajustement entre 0° - 70° pour l'angle jambe et un rayon d'ajustement du scie au jambe de 31-51cm.

L'ajustement pour l'angle de ESJ:

1. Pressez le levier de dégagement. Regardez la figure 24.
2. Placez le scie au jambe a l'angle que vous desirez.

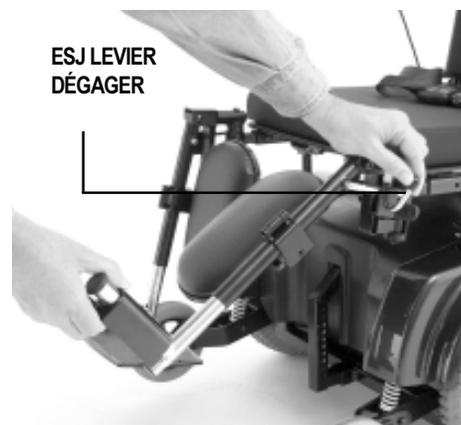

La Figure 24. Option D'élévation de Scies au Jambes



La Figure 25. Option D'élévation do Scie au Jambes



La Figure 26. Hauteur de Siège

V. LES AJUSTEMENTS POUR LE CONFORT

LES AVERTISSEMENTS ET LES ATTENTIONS DU SIÈGE-ÉNERGIE

MISE EN GARDE! Jamais n'enlevez pas le siège a la position de plus bas quand sur un inclinaison. L'échec de faites ça peut resulte dans un renversement de votre Jazzy et la blessure personnel.



MISE EN GARDE! Jamais enlevez le siège a la position de plus bas quand l'opération de votre Jazzy sur la surface rugueuse. L'échec de faites ça peut resulte dans un rensversement de votre Jazzy et la blessure personnel.

MISE EN GARDE! Jamais enlevez l'élévation d'énergie du siège quand la chaise est a la mode roue-libre.

COMMUTATEUR SIÈGE ÉNERGIE



Figure 26. Hauteur de Siège

ATTENTION! L'option du siège-énergie est pour l'usage seulement sur les surfaces lisses.



ATTENTION! Toujours attachez la ceinture de sécurité quand l'opération élévation d'énergie du siège. L'option d'élévation d'énergie du siège est équipé avec une système qui réduit la vitesse de votre Jazzy par un demi quand le siège est élevé plus que 2,54-5,08cm. Toujours examinez que la système est marcher properrement près d'utilisation de votre Jazzy.

ATTENTION! Quand le siège d'élévation est enlevé a la position plus bas utilisez votre Jazzy seulement sur une surface lisse. Pressez en avant le commutateur de siège d'énergie pour enlevez le siège. Regardez la figure 26.

L'OPTION D'ÉLÉVATION D'ÉNERGIE DU SIÈGE

Si votre Jazzy est équipé par l'option d'élévation d'énergie du siège, vous pouvez echanger l'hauteur du siège automatiquement. La position du commutateur pour la hateur du siège est sur le scie a bras, ou sur le palonnier (Controleur Remote Plus).

Pour echanger l'hauteur du siège:

1. Pressez en avant le commutateur pour le siège d'énergie pour enlèvez le siège. Regardez la figure 26.
2. Tirez en arrière sur le commutateur de siège d'énergie pour baissez le siège.

V. LES AJUSTEMENTS POUR LE CONFORT

LES ROUES CONTRE-RENVERSEMENT

Les roues contre-renversement sont des roues conçues pour vous donner plus de stabilité sur des surfaces rugueuses. Les roues contre-point sont déjà fixées à la manufacture à la hauteur de 1,27 cm de la terre. Cette fixation est pour les surfaces lisses ou l'usage de votre Jazzy sur des surfaces rugueuses, c'est peut-être nécessaire d'ajuster les roues contre-renversement plus approprié pour vous. Dans l'occasion d'un ou autre des deux choses vous deviez ajuster les roues contre-renversement.

- Quand vous arrêtez, votre Jazzy renverse excessivement.
- Les roues contre-renversement toujours touchent la terre.



MISE EN GARDE! Si la limite du gonfrage de pneu est excédée une explosion peut être résultée. Aussi cet excès peut être résulté dans la blessure personnelle et/ou des dégâts de votre Jazzy.

NOTEZ BIEN: Il faut que chaque pneu conduise au moins que 30-35 lbs. de pression d'air pour permettre l'ajustement correct des roues contre-renversement.

L'ajustement de roues contre-renversement:

1. Placez un visseur de 13 mm sur le contre-écrou d'intérieur du bras d'attache contre-renversement, situé après le montant amortisseur. Regardez la figure 27.
2. Tournez le contre-écrou contre le sens horaire à desserrer.
3. Placez votre visseur de 13 mm sur le can ajustable situé à l'autre côté du contre-écrou. Regardez la figure 28.
4. Pour l'ajustement de contre-renversement vers le haut, tournez le cam en contre le sens horaire. Pour l'ajustement de contre-renversement vers le bas, tournez le cam en le sens horaire.
5. Tournez le contre-écrou en le sens horaire de resserrer et placez le roue contre-renversement dans la position nouvelle.
6. Répétez 1 jusqu'à 5 pour roue contre-renversement.



MISE EN GARDE! Si les roues contre-renversement sont trop en haut, votre Jazzy peut être renversé en avant. Vous pouvez ajuster ça de faire un petit ajustement à l'programme de décélération régler à l'avance dans le contrôleur ou par placez l'assemblage du siège à l'arrière de votre Jazzy l'échec de faites ça peut être résulté dans la blessure personnelle.

MISE EN GARDE! Faites certaine que les deux roues contre-renversement sont à la même hauteur. L'échec de faites ça, peut être résulté dans le déséquilibre de votre Jazzy et la blessure personnelle.



La Figure 27. Ajustement de Roue Contre-Renversement



La Figure 28. Ajustement de Roue Contre-Renversement (Cam)

VI. LE DÉMONTAGE

L'ENLÈVEMENT DU SIÈGE

Pour un voyage, vous pouvez enlever le siège. Si vous avez un siège versa, s'il vous plaît examinez Le Manuel De Propriétaire pour le Siège Versa.

Enlèvement du siège:

1. Fermez l'énergie.
2. Faites certaine que votre Jazzy pas a la mode roue-libre.
3. Retirez la fiche du harnais principal en arrière de siège.
4. Pressez le deux pistons devant le siège a la mem temps, perdant vous soulevez la façade antérieure de siège. Regardez la figure 29.
5. Soulevez le siège en haut et gentillement boussez le dos sur des tours front du siège.
6. Tirez le siège en avant et le soulevez des tours du siège a la arrière.



La Figure 29. Enlèvement le Siège

Enlèvement du siège d'énergie:

1. Dégagez le siège par placez le levier de siège dégagement en arrière.
2. Soulevez la plaque de siège énergie.
3. Soulevez le siège d'actuateur.



La Figure 30. Enlèvement le Cadre-Pied

ENLÈVEMENT DE CADRE-PIED

Le cadre-pied aidez la protections des constituants de l'environnement. Regardez la figure 30. Il faut que vous enlèvez le cadre-pied pour changez des batteries ou examinez des connections cable.

Enlèvement de cadre-pied:

1. Fermez l'énergie.
2. Faites certaine que votre Jazzy n'est pas dans la mode roue-libre. Regardez III. "La Jazzy 1120₂₀₀₀."
3. Enlèvez l'épingle a la base du patte d'attache de plaque pied.
4. Soulevez le cadre-pied en haut approximativement 5,08 et tirez en vers de vous.

ENLÈVEMENT DE BATTERIE



MISE EN GARDE! Le poids de chaque batterie de votre Jazzy 1120₂₀₀₀ est approximativement 20kg seulement plus que votre capacité peut resulte dans la blessure personnel.

Enlèvement des batteries:

1. Fermez l'énergie.
2. Enlèvez le cadre-pied.
3. Dégagez des p[oint de separation par les tirez en vers de vous.
4. Maintenant vous pouvez enlèvez les batteries de votre Jazzy.

VII. L'OPÉRATION

L'OPÉRATION DE CONTROLEUR DYNAMIQUE

Il y a deux constituents principaux dans le contrôleur Dynamique de la système ordinateur - le remote maître et le module d'énergie. Le maître vous permet de contrôler des fonctions fondamentales comme la direction et la vitesse et aussi des fonctions accessoires comme le siège énergie et le système d'inclinaison. Les caractéristiques de conduite comme l'accélération, la décélération, et la vitesse sont programmées en avance au Pride. La programmation nécessite un outil spécial et seulement disponible des représentants autorisés au Pride. Par conséquent, seulement les représentants de Pride sont autorisés de reprogrammer le contrôleur.



La Figure 31. Contrôleur Dynamique Dauphin

LE TÉLÉ CLAVIER DE DAUPHIN

On/Off Bouton

Pour commencer ou fermez l'énergie de la système.



ATTENTION! Le commencement de votre 1120₂₀₀₀ sans le palonnier à la position centre, peut résulter dans un défaut dans la système. Regardez Dehors De Centre Pendant Commencement (DDCPC). Cet défaut peut être indiqué par un code éclair de 1.

L'état de système LED

LED indique l'état de la système. Cet constituant est normalement en marche quand le système commence et n'est pas en marche quand la système est formé. Quand la système détecte un défaut, il y a des codes éclair d'attention.

Le Region de la fermeture magnetique

Fermez la système pour la prevention de conduisant pas autorisé. Votre Jazzy a un constituant qui vous permet de bloquer des utilisateurs qui ne sont pas autorisé. Pour cet fonction vous besoin la clé magnetique. Si vous perdez cette clé, contactez votre representante de Pride.

L'indicateur pour condition de batterie

Cet indicateur compris de dix LEDs qui sont placés autour d'icone de batterie. A la gauche jusqu'à la droite, les premières trois sont vertes. Cette lumière sont les indicateurs précis de la capacité de batterie. Toutes les LEDs marquent si la capacité de batterie est au moins de 85%. Les numéros de LEDs réduits, quand le voltage diminué. Quand la capacité de batterie est 10% ou moins, tous les LEDs éclair.

VII. L'OPÉRATION

Sélection de programme conduire

Permettez vous de choisir une programme conduire. Regardez La Programme Conduire en bas.

Le visuel de programme conduire (aussi le visuel de télé état)

Cet visuel est un sept segment LED pour la programme conduire.

Gauche/Droite commutateurs indicateur

Mouvement a l'indicateur rendement a la gauche ou a la droite. Pressez une fois pour le commencé et une autre fois pour la fermé. Aussi, vous pouvez fermez l'indicateur par l'indicateur opposé (le commutateur risque).

Le commutateur risque

Mouvement des deux l'indicateur rendement a la meme temp. Vous pouvez arrêtés ça par pressez le commutateur risque un autre fois.

Le commutateur lumière

Placez des phare/feus arrières en marche ou pas en marche independement des autres indicateurs.

La sélection d'actuateurs avec LEDs

Cets commutateurs peuts controle jusqu'a cinq actuateurs independement. Cets actuateurs controlent l'élévation siège énergie, les scies aux jambes énergie, les siège inclinable énergie, ou l'inclinaison dans siège espace. Si votre controleur est programmé avec conduire inhibition pendant l'opération d'actuateur, la symbole pour inhibition conduire sera visible.

L'avertisseur

Activé l'avertisseur.

Les fonctions palonnier

Le fonction palonnier est semblable des configurations controleur. Le palonnier controle la direction et la vitesse de la chaise- d'énergie. Quand vous placez le palonnier a la position neutre (centre), le frein électromagnetique sera dégagé et permettre la mouvement de la chaise. Le plus loin vous pouvez la palonnier a la position centre, la chaise sera aller plus vite. Vous égagez le frein électromagnetique quand vous dégagé le palonnier. Cet action décélééré la chaise et la chaise sera arreter. Vous aussi pouvez utilisez las actuateur énergie de control palonnier.

Pour l'activation de système Bloquer:

1. Mettez la clé magnetique sur ou près de la symbole clé. La système sera bipe et réduit l'énergie. Aucune de LED's doit en marche.
2. Pressez le commutateur (on/off) de mettre la chasie en marche. La symbole clé sera projeter, mais vous ne pouvez pas le conduire parce qu'il a bloquer.
3. Mettez la clé magnetique sur ou près de la symbole clé un autre fois pour ouvriez la système. Quand la symbole clé arret de projetez, vous pouvez conduit votre 1120₂₀₀₀.

Si vous commencez le 1120₂₀₀₀ pendant il est dans la mode bloquer, votre 1120₂₀₀₀ il ferme après une minute automatiquement.

VII. L'OPÉRATION



MISE EN GARDE! Ne pas utiliser le bouton ON/OFF d'arrêter la chaise. La blessure personnel peut resuite.

La mode de programme conduire

Votre 1120₂₀₀₀ controleur etait déjà programmé pour les cinq modes de conduire -- 1(plus lente) a 5(plus vite). La mode de programme indiqué par un nombre dans le centre de clavier. Pressez la sélection clé pour programme conduire pour le chargement de la mode.

Le mechanismé batterie conserveur

Quand la capacité de batterie reduit au moins de 21V (normalement deux LEDs), le controleur sera reduit la performance de la chaise dénergie pour conserve l'énergie de batterie.

Les codes projeter

Si la système controleur detect eun défaut dans ce système, l'état système LED projete un code. Regardez Le Relève des dérangement.

Dehors de neutre a commencement (DDNC)

Votre 1120₂₀₀₀ est équipé par DDNC. Si vous commercez la système et le palonnier n'est pas a la position neutre, l'état système projete rapidement pour le temp que le palonnier n'est pas a la poistion neutre ou pour cinq secondes. Si toutes les segments sur la système sont projetent, vous avez peut etre activer code projeter 1.

L'opération actuateur dauphin

Le clavier dauphin est capable de controle jusqu'a cinq actuateurs. Vous controlez par des clé actuateurs et le palonnier.

Le Déplacement s'actuateur:

1. Pressez la clé actuateur.
2. POur diplacez d'actuateur, placez le palonnier plus de demi voyage dans en avance ou en arriere.

La mode ou coucher

La controleur de 1120₂₀₀₀ a une mode en coucher. Si le palonnier ne déplace pas pour quelque temp, la mode en coucher est un circuit encastré qui automatiquement ferme l'énergie principal. Cet facteur de temp est programmé dans votre console palonnier. Les luminière de batterie condition sur le palonnier indique la mode an coucher par un signal chaque cinq seconde. Pressez la bouton ON/OFF deux fois pour reactivement d'énergie.

La thermique reduction

Les deux controllers de 1120₂₀₀₀ sont équipés avec un circuit de thermique reduction. Cet circuit note la température des moteurs et de controleur. Si les moteurs ou le controleur. Le controleur reduit le voltage par 5V, pour chaque degré plus que 122°F/50°C. Cet action reduit la vitesse et permet les constituents de rester. Quand la température est normale, votre 1120₂₀₀₀ resume la vitesse normale.

VII. L'OPÉRATION

Les Codes Projeter

Dans le système, le contrôleur est programmé de détecter les défauts. Il y a un code projeté si le système contrôleur prévient l'opération de 1120₂₀₀₀. Quand un code projeté si le système contrôleur prévient l'opération de 1120₂₀₀₀. Un code projeté est indiqué par un projetement D'États de Système LED. L'États de Système LED sera projeté pour quelque temps, sécurité de votre 1120₂₀₀₀, la chaise sera arrêter. Si non, votre 1120₂₀₀₀ continue l'opération. Quelques codes projeté sera arrêt si la condition la correcte lui-même. Les autres sont résolvent par fermez l'énergie et le recommencez.

Si vous faites des actions correctives, premièrement faites certaine que vous avez des batterie chargé complètement et vous réduisez l'énergie de la système près d'examinez des connexions électrique. Dans le chaque cas, si la mesure corrective ne marche pas, contactez votre représentante de Pride.

Le Code	Le Titre	L'action Correctif
1	Défaut Module DX	Fermez et recommencez le contrôleur. Si Ça ne marche pas, examinez des connexions au palonnier, le module énergie, et le accessoires de votre Jazzy. Si le ne marche pas, contactez votre représentante de Pride.
2	Accessoire DX Défaut	Vous avez peut être un court-circuit à l'accessoires. Réduisez l'énergie et examinez les connexions des accessoires.
3	Module Gauche Défaut	Examinez le connexion entre le module d'énergie et le moteur gauche. Il y a peut être un court ou un mal connexion. Le moteur lui même peut être mal.
4	Module Droit Défaut	Examinez le connexion entre le module d'énergie et le moteur droit. Il y a peut être un court ou un mal connexion. Le moteur lui même peut être mal.
5	Stationnement Frein Gauche Défaut	Examinez le connexion entre le module d'énergie et le moteur gauche. Il y a peut être un court ou un mal connexion.
6	Stationnement Frein Droit Défaut	Examinez le connexion entre le module d'énergie et le moteur droit. Il y a peut être un court ou un mal connexion.
7	Batterie Bas Défaut	Examinez les connexions et les terminales de batterie. Examinez que le coupe-circuit n'activé pas. Rajustez si nécessaire.
8	Trop Voltage Défaut	Contactez votre représentante autorisé de Pride.
9	CANL Défaut	Contactez votre représentante autorisé de Pride.
10	CANH Défaut	Contactez votre représentante autorisé de Pride.
11	Caler Retard Défaut	Fermez et recommencez le système.
12	Module Désadaptation	Contactez votre représentante autorisé de Pride

VII. L'OPÉRATION

LE CONTROLEUR REMOTE PLUS

Le système de contrôleur Remote Plus comprend d'un palonnier (regardez la figure 32) et le boîtier de contrôleur. Le palonnier envoie un signal au boîtier de contrôleur avec un câble attaché à l'arrière du palonnier. Ce câble connecte le boîtier de contrôleur à travers le plateau d'usage. Le palonnier Remote Plus est normalement situé à la fin de la droite ou gauche de la scie à bras. Le boîtier de contrôleur Remote Plus est situé en bas de l'avant de la base énergétique.

Les Fonctions Du Palonnier

La fonction du palonnier est semblable à toutes les configurations de contrôleur. Regardez la figure 33. Quand vous déplacez le palonnier à la position neutre (centre), les freins électromagnétiques sont libérés et permettent le mouvement de la chaise. Plus vous le poussez, plus la chaise va vite. Quand vous libérez le palonnier et le ramenez à la position neutre, vous libérez les freins électromagnétiques. Cette action résulte dans la décélération et l'arrêt de la chaise. Immédiatement libérez le palonnier, si le mouvement de Jazzy est inattendu. Sauf le palonnier est endommagé, cette action doit arrêter votre Jazzy.



MISE EN GARDE! N'utilisez pas la clé "ON/OFF" d'arrêter la chaise. Cette action peut être le résultat d'une blessure personnelle.

Le Compteur de Condition de Batterie


Le compteur de condition de batterie comprend dix LEDs au-dessus de l'indicateur de vitesse. Regardez la figure 32. Ces lumières sont un indicateur précis de la capacité de la batterie. Aussi des lumières vous alertent des défauts dans votre système. Regardez "Les Codes Ennuis."

La Clé ON/OFF


Cette clé ferme et commence votre ensemble.

La Clé Avertisseur


Cette clé active l'avertisseur.

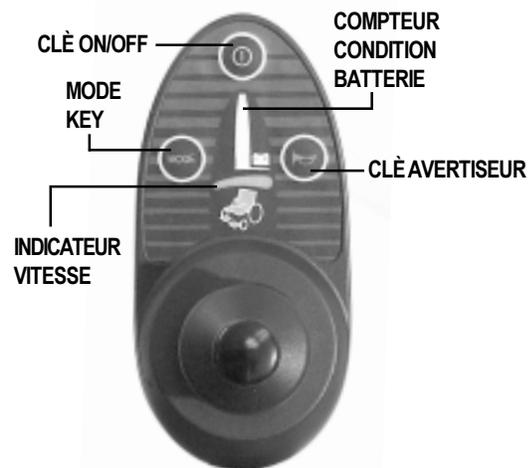

La Figure 32. Remote Plus Constituants Palonnier

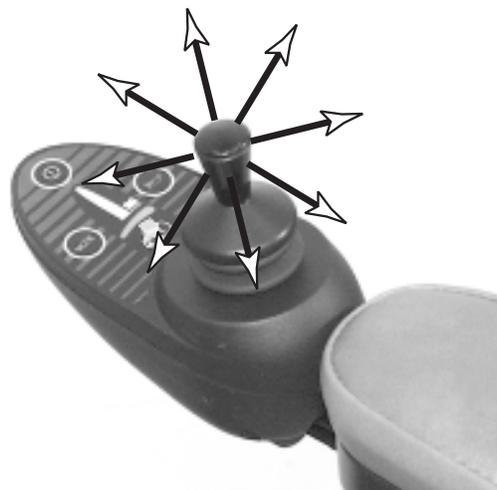

La Figure 33. Mouvement Palonnier

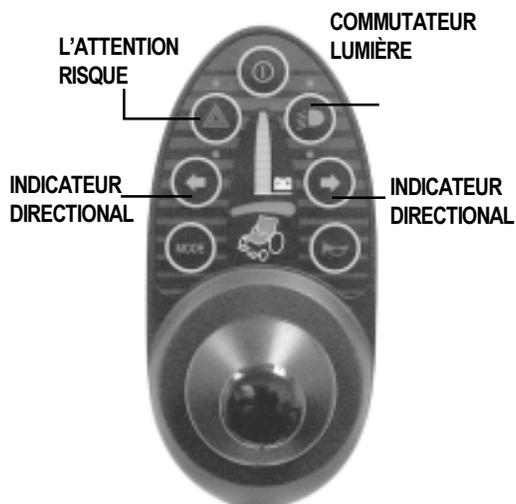

La Figure 34. Remote Plus Constituants Facultatifs

VII. L'OPÉRATION

Les Ajustements De Vitesse et L'Actuateur

Le contrôleur palonnier Remote Plus est équipé avec la clé mode et un indicateur vitesse. Regardez la figure 32. La mode clé permettez vous d'accès des fonctions différentes de la chaise d'énergie. L'activation de la clé mode vous permettez l'ajustements de vitesse maximum de la chaise. Pour l'augmentation ou le réduction de la vitesse, activez la clé mode. Le déplacement du palonnier a la gauche sera réduit la vitesse. Le déplacement du palonnier a la droite sera réduit la vitesse. Les indicateurs vitesse LEDs sont illuminer de gauche a la droite. Si un LED est illuminé, la vitesse est sur le fixature plus moins. Si tous les LEDs sont illuminé, la vitesse est sur le fixature maximum. Après le choix de la vitesse vous desirez, activez la clé mode un autre fois pour retournez a la mode conduire ou deplacez le palonnier a la direction en avant ou en arrière de votre Jazzy a la vitesse désiré.

NOTEZ BIEN: Nous recommandons que jusqu'à vous êtes plus confortable avec votre Jazzy, utilisez la vitesse plus lente que possible.

Si votre Jazzy est équipé avec les fonctions du siège d'énergie, vous pouvez accès le contrôle de siège par pressement de la clé mode deux fois. Poussez le palonnier a la droite pour arrivez a la fonction de siège vous voulez. Le LED sera illuminer dans les positions différentes pour l'indications de fonction qui active. Quand le LED est illuminé a la position approprié, poussez le palonnier en avant de souleve l'actuateur et tirez le palonnier en renvers de debaïsse l'actuateur. Pour retournez a la mode conduire, encore activez la clé mode.

LA MODE COUCHER

Votre contrôleur Remote Plus compris de la mode coucher. Cette mode est un circuit encastré qui automatiquement fermer l'énergie principal si le palonnier ne déplace pas pour approximativement cinq minutes. Les lumières de condition batterie indiquent la mode coucher par un signal chaque de cinq secondes. Pour le réactivation, poussez la clé 'on/off' deux fois.

La Thermique Reduction

Les deux contrôleurs de 1120₂₀₀₀ sont équipés avec un circuit de thermique reduction. Cet circuit note la température des moteurs et de contrôleur. Si les moteurs ou le contrôleur. Le contrôleur réduit le voltage par 5V, pour chaque degré plus que 122°F/50°C. Cet action réduit la vitesse et permet les constituents de rester. Quand la température est normale, votre 1120₂₀₀₀ resume la vitesse normale.

LES CODES ENUIS

Plus d'indication l'état courant de batterie, le compteur de condition batterie aussi indique quelques problème avec votre Jazzy. Ce compteur compris de dix segments individuels. Les nombres de segments qui sont projeté donne l'information spécifique. Si le segment compteur est projeté rapidement, il y a peut être un défaut au contrôleur. Par instance, première segment rouge qui projete rapidement est un indication de déplétion de voltage batterie. La liste en bas indique des explications possible associé avec le compteur des lumières projetent.

VII. L'OPÉRATION

LEDs Projecteur	Le Diagnostic	La Solution
10 Verts	Voltage Batterie en Haut	Examinez Batteries
9 Verts	Solenoid Défaut Frein	Examinez Cablage Moteur/Frein
8 Verts	Possible Défaut Controleur	Contactez Représentant Autorisé de Pride
7 Jaunes	Possible Défaut Palonnier	Contactez Représentant Autorisé de Pride
6 Jaunes	Activement D' Inhibiteur	Retirez la fiche Chargeur/Examinez Connexions
5 Jaunes	Cablage Moteur Défaut Droite	Examinez Cablage Moteur Droite
4 Jaunes	Déconnexion de Moteur Droite	Examinez Cablage Moteur Droite
3 Rouges	Cablage Moteur Défaut Gauche	Examinez Cablage Moteur Gauche
2 Rouges	Déconnexion de Moteur Gauche	Examinez Cablage Moteur Gauche
1 Rouges	Voltage Batterie en Bas	Examinez Batteries/Cablage Batterie

Si vous ne résoudrez pas votre problème, contactez votre représentant autorisé de Pride.

LES CONSTITUENTS FACULTATIFS DE REMOTE PLUS

Regardez la figure 34 pour les constituents facultatifs:

- **Le commutateur lumière:** Si votre Jazzy est équipé avec un commutateur lumière avec le paquet delux de lumière, il y a un commutateur lumière située sur le controleur du palonnier. Cet commutateur activé des lumières, quand votre Jazzy est commencé.
- **Les signals directionels:** Meme si le Jazzy n'activé pas, le commutateur lumière commence le lumière.
- **Attention de Risque:** Cette clé commence les lumières.
- **Énlevement énergétique du siège en haut ou en bas (ne démontré pas):** Cettes clés élimine le besoin d'un commutateur énlevement énergétique du siège.

VIII. LES BATTERIES ET LE CHARGEMENT

LES BATTERIES LE CHARGEMENT

Votre Jazzy utilise deux 12-volt batteries plus vitesse de périodes profonds. Cets batteries sont sécurisé et sauf de la maintenance. Parce qu'ils sont sécurés, il est pas nécessaire pour vous d'examinez le niveau d'électrolute. Le dessein des batteries de période profond peut résister la décharge plus long et plus profond. Ils sont résembler les batteries d'automobile, mais ils ne sont pas interchangeable. Les batteries d'automobile n'avait pas le capacité de Le chargement des batteries par l'utilisation du chargeur hors bord:



MISE EN GARDE! Les poteaux des batteries, les terminales, et les accessoires relatives du plomb et des composés du plomb. Lavez les mains après le contact.

1. Placez votre Jazzy a coté d'un débouché du mur.
2. Faites certain que le controleur d'énergie est fermé.
3. Enlevez le fiche courir située sur le plateau d'usage.
4. Fichez le 3-épingle cable d'extension dans le chargeur, et puis dans le connecteur de plateau d'usage.
5. Fichez le chargeur dans le débouché du mur.
6. L'ammètre indique la quantité du charge nécessaire pour une minute. Ca permet le chargeur d'échauffer. L'ammètre doit deplacer a la 5 ampères, et puis diminuer a la 0 ampère.
7. Nous vous recommandons de charger les batteries de 8 a 14 heures.
8. Quand vos batteries sont chargent complètement, détachez le cord de chargeur du débouché du mur.
9. Détachez le chargeur du plateau d'usage a l'arrière.
10. Resserez le fiche courir dans son connecteur.

NB: Si le fiche ne connecte pas, votre Jazzy ne marche pas.

11. Remplacez le couvert d'arrière.

EN CAISSE DU BATTERIE

L' en caisse des batteries pour l'efficacité maximum:

1. Avant le première utilisation, rechargez tous les batteries nouveaux. Cet action augmente le niveau de la performance de batteirie par 90%.
2. Vous pouvez opérer votre Jazzy a chez vous et a votre cour. Commencez lentement, et n'allez pas trop loin jusqu'a vous etes plus confortable avec les controles et l'en caisse dans les batteries.
3. Donnez les batteries un autre charge complet pour 8 a 14 heures et encore opérez votre Jazzy.
4. Après quatre ou cinq périodes du chargement, les batteries arrivent a la performance de 100% et marchent pour un long temp.

VIII. LES BATTERIES ET LE CHARGEMENT

LES BATTERIES ET LE CHARGEMENT (DES QUESTIONS FRÉQUENTES)

Est-ce que je peut utiliser un autre chargeur du batterie?

Seulement utilisez le chargeur avec votre Jazzy. C'est l'outil plus sécuritaire et efficace pour le chargement des batteries. Nous ne recommandons pas l'utilisation des autres chargeurs.

Combien des fois je devrai changer les batteries?

Il ya beaucoup de considerations pour la fréquence du changement des batteries. Quelques fois vous utilisez votre Jazzy de tous les jours et dans les autres fois vous ne l'utilisez pas pour un long temps.

■ Utilisation Journalier

Si vous toujours utilisez votre Jazzy, charger les batteries après l'utilisation. Votre Jazzy sera prêt chaque matin pour vous donner le service complet du jour. Nous recommandons que vous chargez les batteries pour 8 à 14 heures après l'utilisation journalier. Ne chargez pas les batteries pour plus que 24 heures dans une période de chargement.

■ Utilisations Pas Fréquence

Si vous n'utilisez pas votre Jazzy fréquemment (un fois dans une semaine ou moins), chargez les batteries un fois chaque semaine pour 12 à 14 heures.

NB: Gardez vos batteries chargées complètement et évitez trop de déchargement des batteries. Ne chargez pas les batteries plus que 24 heures dans une période de chargement.

Comment est-ce que je peut obtenir le rayon et le distance maximum dans le chaque charge?

C'est très rare que vous sera avoir une situation idéale pour conduire, comme la surface lisse, plane et solide, sans le vent, la colline, ou les courbures.

- Toujours examinez les batteries près d'utilisation.
- Gardez 30-35psi dans les roues-conduire pneumatiques.
- Organisez votre voyage si possible en avance pour l'évitement des inclinaisons.
- Seulement portez des choses essentielles pour limiter les poids.
- Essayez de garder une vitesse égale et évitez beaucoup d'arrêts et recommencement.

Quel sorte de batterie est-ce que je peut utiliser?

Nous recommandons les batteries de période profonde qui sont sécurisées et sans maintenance. Les deux plomb-acide (SLA) et une cellule gel sont des batteries de périodes profondes et les ont de la performance semblable.



MISE EN GARDE! Les poteaux des batteries, les terminales, et les accessoires relatives du plomb et des composés du plomb. Lavez les mains après le contact.

VIII. LES BATTERIES ET LE CHARGEMENT

Utilisez ces spécifications pour la commande des batteries de période profonde:

Les Spécifications du Batterie	
Genre:	Période profonde du plomb-acide ferme ou du cellule gel
Taille:	La Groupe 24
Voltage:	12 volts chacun
Amperage:	70 ou 80 amp heures
Taille:	NF-22 (seulement option du siège-énergie)
Voltage:	12 volts chacun
Ampérage:	45 - 55 amp heures

Pourquoi mes batteries semblent faibles?

Les batteries avec des périodes-profonds ont la technologie chimique plus différente que les batteries dans les voitures, des batteries au nickel-cadmium, ou les autres sortes de batteries. Les batteries de période profonde spécifiquement donnent l'énergie, et se rechargent très vite après la décharge. Il faut que les batteries fermées du plomb-acide se chargent fréquemment. Elles n'ont pas la même mémoire que les batteries au nickel-cadmium.

Nous travaillons avec le fabricant de batteries pour les batteries qui sont meilleures pour vos besoins spécifiques de Jazzy. Les nouvelles batteries qui se chargent arrivent régulièrement au Pride et nous les envoyons ponctuellement. Pendant qu'elles sont dans le chargement, elles peuvent s'exposer à des températures extrêmes qui peuvent affecter leurs performances. La chaleur réduit la charge de la batterie et le froid réduit l'énergie disponible et augmente le temps pour le rechargement de la batterie (semblable à la batterie d'une voiture). La batterie peut prendre quelques jours pour la stabilisation et l'ajustement de la nouvelle température. De plus importante est la batterie besoin quelques périodes de charges (la charge partielle suivie par la charge complète) pour obtenir la balance critique du chemin qui est très essentiel pour la performance et la longue vie de la batterie. S'il vous plaît prenez le temps pour charger votre batterie correctement.

NB: La vie de la batterie dépend fréquemment de son entretien.

Comment est-ce que je peux assurer la plus longue durée de vie de la batterie?

Une batterie de période profonde qui est pleinement chargée fournit de la performance efficace et prolonge la durée de vie. Mettez vos batteries de la Jazzy pleinement chargées quand possible. Les batteries qui sont profondément déchargées, rarement rechargées, ou gardées sans une charge complète peuvent endommager en permanence et résulter dans une opération peu fiable et une durée de vie limitée de la Jazzy.

Comment est-ce que je peux garder ma Jazzy et ses batteries?

Si vous n'utilisez pas votre Jazzy régulièrement, nous recommandons la maintenance de la performance des batteries par le chargement le moins d'une fois chaque semaine.

Si vous n'utilisez pas votre Jazzy pendant un long temps, pleinement chargez les batteries avant l'entreposage. Détachez les harnais de la batterie et gardez la Jazzy dans un endroit chaud et sec.

NB: Si vous gardez votre Jazzy pendant un long temps, vous pouvez bloquer l'unité avec quelques bords dessus le cadre. C'est pour l'enlèvement des pneus de la terre pour la prévention des.

VIII. LES BATTERIES ET LE CHARGEMENT

Comment est-ce que je peut utiliser le tranportation public?

Si vous voulez utiliser le transport public pendant l'utilisation de votre Jazzy, il faut que vous contactez le fournisseur de la tranportation en avance pour la détermination des exigences spécifiques. Regardez II. "La Sécurité."

La dessein des batteries du plomb-acide qui sont ferment et le cellule du gel pour l'utilisation dans les chaise-énergie et des autres véhicules automobiles. Normalement cette sortes des batteries sont sauf dans toutes les formes des tranportations comme l'avion, l'autobus, et les trains. Nous vous recommandons de contacter votre fournisseur de la tranportation pour des exigences nécessaire pour la transport et le d'emballage.

Qu'est ce que je besoin connait de la navigation?

Si vous voulez naviger votre Jazzy a la destination finale avec un compagnie du cargo, emballez votre Jazzy dans le conteneur original et navigez les batteries dans des autres boites.

LA MAINTENANCE RÉGULIER

Votre Jazzy est une chaise-énergie le plus raffiné. Comme des autres vehicules motorisé, c'est nécessaire de vous faites les examinations réguliers de la maintenance. Vous pouvez faire quelqu'examinations vous-meme, mais des autres ont besoin l'assistance de votre fournisseur de Pride autorisé.

Comme plus des equipments électriques, votre Jazzy peut etre endommager par des éléments. Évitez tous les régions humides.



ATTENTION! l'exposition directe de l'eau ou l'humidité peuvent résulter dans un mauvais fonctionnement électrique ou mécanique. L'eau peut résulter dans la corrosion des constituants électriques et la rouille de la cadre de la chaise.

Si votre Jazzy contacte l'eau:

1. Pêchez votre Jazzy très bien avec un serviette pêche.
2. Permettez votre Jazzy de reste dans une place chauffée, et pêche pour 12 heures pour l'évaporation d'eau invisible.
3. Examinez l'opération du palonnier et les freins avant le prochaine utilisation de votre Jazzy.
4. S'il ya des inconséquences dans l'opération, prenez votre Jazzy a votre fournisseur de Pride.

LA TEMPÉRATURE

Quelques parts de votre Jazzy sont susceptible des changements extrêmes de la température. Toujours gardez votre Jazzy entre la température de 18°F/-8°C and 122°F/50°C.

- Dans les températures trop froids, les batteries peuvent geler. La température spécifique de geleur depende sur quelques choses, comme le charge de la batterie, l'usage, la composition de la batteries (ex. plomb-acide fermé ou cellule du gell).
- Les températures plus de 122°F/50°C peuvent resulter l'opération de votre Jazzy a la vitesse lente. Cette réduction dans la vitesse est pour la sécurité dans le controleur pour la prévention des dégats du moteur et les autres pièces électriques. Regardez VII. "L'Opération."

IX. LE SOIN ET LA MAINTENANCE

LES INSTRUCTIONS GÉNÉRALE

- Evitez des contacts accidentels du contrôleur, spécialement le pallonier.
- Evitez trop de l'exposition de votre Jazzy aux conditions extrêmes, comme la chaleur, le froid, ou l'humidité.
- Ne le salissez pas le contrôleur.
- Examinez tous les contrôleurs sur le plateau d'usage pour assurer qu'ils sont proprement sécurés. Aussi examinez le chargeur du connecteur harnais.
- Quand la mètre condition de la batterie est illuminer complètement, les batteries sont pleinment charger, et la système contrôleur marche bien.
- Si une LED rouge sur la mètre condition de la batterie signale lentement, les batteries besoins le chargement, mais le contrôleur et la système contrôleur marche bien.
- Si la mètre condition de la batterie signale rapidement, il y a peut etre un défaut dans les circuits du contrôleur ou dans les autres circuits de votre Jazzy. Regardez VII. "L' Opération."

MISE EN GARDE! Les poids de chaque batterie de votre Jazzy est approximativement 38 livres. Soulevement du poid plus de votre capabilité peut resulter dans la blessure personnel.



MISE EN GARDE! Les poteaux des batteries, des terminales, et des accessoires associé sont composer du plomb et des composés du plomb. Lavez les mains après le contacte.

MISE EN GARDE! Toujours protectez les batteries et ne changez jamais quand ils sont pret la prévention du mouvement pas désiré.

- Faites certain que les pneus conduire sont gonfler a 30 - 35 psi. Regardez la figure 35.
- Utilisez un baume démelant du caoutchouc sur les flancs des pneus pour leurs préservation.

MISE EN GARDE! Faites certain que l'inflation dans les pneus est 30-35 psi. Ne gonflez pas vos pneus sous ou sur cette point. La pression en bas de cette point peut resulter dans perdre de controle et les pneus trop inflaté put cause l'explosion. La blessure personnel très seriuse peut résulter.



MISE EN GARDE! Gonflez des pneus conduire de votre 1120₂₀₀₀ a la source d'air avec un manomètre. La pression d'air précis pour des pneus conduire de votre 1120₂₀₀₀ est 30-35psi. Si la source d'air n'équipé pas un manomètre, les pneus peut etre trop gonflé et explode. La blessure personnel peut résulter.



Figure 35. Examinez le Presure du Pneu

- Il y a un pulvérisation d'une couche du dispositif a sceller transparent sur le linceul du corps. Vous pouvez appliquer une couche lustre de la voiture pour une apparition de plus brillant.



MISE EN GARDE! N'utilisez pas le baume démelant du caoutchouc sur la section l'écartement des roues. Ils peuvent devenir glissants.

- Examinez toutes les connexions électriques. Faites certain qu'il sont bien attaché et pas corrodé. Il faut que les batteries sont plat dans le puits de la batterie, avec les terminales vers l'intérieur. Soumettez a la cadre decal pour la mise de la cablage correcte.
- Touts les supports du pneu sont déjà graissé et scellé. Plus de graissage n'est pas nécessaire.

IX. LE SOIN ET LA MAINTENANCE

LES EXAMINATIONS JOURNALIER

- Après fermez le controleur, examinez le pallonnier. Faites certain qu'il n'est pas tordu ou endommagé et il rétourne a la centre après vous le dégagez. Examinez la botte de la couche autour de la basse du pallonnier pour les dégats. Examinez la botte visuellement. N'essayez pas la réparation. S'il y a une problème, contactez votre fournisseur autorisé au Pride.
- Examinez visuellement les harnais du controleur. Faites certain qu'ils ne sont pas écorché ou couper ou avont des fils exposé. S'il y a une problème avec des harnais du controleur, contactez votre fournisseur autorisé au Pride.

LES EXAMINATIONS HEBDOMADAIRE

- Détachez et examinez le controleur et les harnais du chargeur du le plateau d'usage pour la corrosion. Si nécessaire, contactez votre fournisseur autorisé au Pride.
- Assurez que toutes les pièces de la système controleur sont biens attaché a votre Jazzy. Ne trop resserez pas des hélices.
- Examinez pour la correcte gonflage du pneu. Il doit etre **30-35 psi** dans le chaque pneu. Si un pneu ne garde pas l'air, contactez votre fournisseur autorisé au Pride pour un remplacement.
- Calibrez le palonnier s'il y a une différence perceptible dans la performance ou si le palonnier ne marche pas correctement. Vous pouvez faire ca pour le controleur Remote Plus.
- Examinez les freins. Cet essai doit etre sur une surface plain avec le moin d'espace d'une mètre pour votre Jazzy.

To check the brakes:

1. Commencez le controleur et reduisez la vitesse et le bouton réponse d'ajustement.
2. Après un seconde, faites certain qu'il est encore marcher.
3. Lentement poussez le palonnier en avant jusqu'a vous entendez un petit bruit des freins stationne électrique. Dégagez le palonnier immediatement. Dans les quelques secondes, vous devez entendre le frein stationnes électrique après chaque mouvement du palonnier. Répétez cet essai les trois fois, par la mouvement du pallonnier a la centre, au gauche, et au droite.
4. Si le le frein stationnes électrique ne fait pas le bruit ou si le bruit est plus bas de normale, cet peut indiquer un problème d'un ou les deux le freins stationnes électrique. Contactez votre fournisseur autorisé au Pride.

Le calibration du palonnier (seulement Remote Plus):

1. Placez le palonnier a la positon en marche arriere et le gardez comme ca. Commencez le controleur.
2. La mètre condition de la batterie illumine une fois d'un LED jusqu'a 10 LED, et encore retourne a une LED. il sait ca deux fois et puis signale rapidement.
3. Fermez le controleur.
4. Placez le palonnier dans la position plus en avance et le gardez comme ca. Commencez le controleur.
5. La mètre condition de la batterie illumine une fois d'un LED jusqu'a 10 LED, et encore retourne a une LED. il sait ca deux fois et puis signale rapidement.
6. Fermez le controleur. Maintenant le palonnier et le controleur seront fonctionner correctement ensemble.

IX. LE SOIN ET LA MAINTENANCE

LES EXAMINATIONS MENSUEL

- Examinez que les roues contre renversement ne touchent pas la terre quand vous utilisez la Jazzy. Regardez V. “Les Ajustements Pour Le Confort.”
- Examinez pour la détérioration sur les roues contre renversement. Remplacez quand nécessaire.
- Examinez pour la détérioration des roues conduire. Contactez votre fournisseur autorisé au Pride.
- Examinez pour la détérioration sur des roues en arrières. Remplacez quand nécessaire.
- Examinez les fourchettes en arrière pour des dégats ou des flottements qui indiquent la possibilité de l’ajustements ou des remplacements des supports. Contactez votre fournisseur autorisé au Pride.
- Toujours nettoyez votre Jazzy et ne permettez pas l’accumulation des matériaux, comme la boue, la terre, la cheveau, la norriture, la boisson, etc.

LES EXAMINATIONS ANNUEL

Prennez votre Jazzy au fournisseur autorisé du Pride pour la maintenace annuel. Cet pour l’assurance d’opération correcte et la prévention des complications d’avenir.

L’ENTREPOSAGE

Ne gardez pas votre Jazzy a la place de la température extrême. Quand l’entreposage, détachez les batteries de la Jazzy. Regardez VIII. “Les Batteries et Le Chargement.”



MISE EN GARDE! Si vous ne gardez pas votre Jazzy correctement, le cadre peut corroder et les électroniques peuvent endommager.

LES INSTRUCTIONS NETTOYAGE



ATTENTION! Ne nettoyez jamais votre Jazzy avec un tuyau ou la placez sous le contacte directe de l’eau. votre Jazzy a un linceul du corp du plastique (ABS) qui vous permet l’utilisations d’une étoffe humide.

ATTENTION! N’utilisez jamais des chemins pour la nettoyage du siège vinyle, parce qu’il peut resulter dans le siège glissant ou trop sèche. Utilisez une étoffe humide et un savon douce, puis essuyez parfaitement.

LES PNEUS ET LES TUBES


Si votre Jazzy est équipé avec les roues pneumatiques, vous devez examiner le presure de l’air le moins de un fois chaque semaine. Cet assurez la vie des pneus et l’opération correcte de votre chaise. Si vous avez un pneu plat, remplace le tube. Contactez votre fournisseur autorisé pour remplacement des pneus et des tubes.



MISE EN GARDE Faites certain que les pneus ne sont pas gouflager avant l’essayez de la réparation.

Suivez ces instructions pour la réparation vite et sécur:

1. Complètement dégonflez la pneu si pneumatique.
2. Utilisez un visseur socle de 199mm pour l’enlèvement d’écrou du moyeu centrale. Regardez la figure 36.
3. Tirez la roue du boulon.
4. Enlèvez les verrous qui gardent les moitiés des roues.
5. Enlèvez le vieux tube et/ou le pneu et le remplacez par un nouveau.
6. Réassemblez les roues.
7. Glissez le roue encore dans le fut.
8. Installez l’écrou de la roue conduire dans le moyeu centrale et resserez.
9. Gonflez le pneu de **30 - 35 psi**.

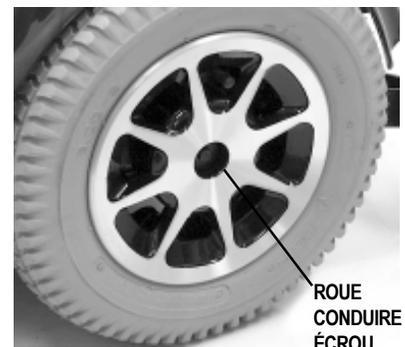

La Figure 36. La Roue Conduire

IX. LE SOIN ET LA MAINTENANCE

REPLACEMENT DES BATTERIES

Pour remplacez les batteries:

Il y un dessin sur la décalcomanie sur le cadre de la Jazzy 1120₂₀₀₀ près du plateau de batterie. Regardez la figure 37.

1. Enlèvez l'estoquiau de la dessus du cadre pied.
2. Enbaissez le cadre pied.
3. Trouvez les deux harnais du cablage qui sont attachent des batteries.
4. Détachez les deux harnais de leurs attachement par tirer les détachements en vers de vous meme.



MISE EN GARDE! Les poids de chaque batterie de votre Jazzy est approximativement 38 livres. Soulevement du poid plus de votre capacité peut resulter dans la blessure personnel.

5. Enlèvez les batteries de l'assemblage d'énergie.
6. Détachez les harnais des batteries des terminales positives et negatives.
7. Remplacez les vieilles batteries par les nouvelles.

NB: C'est plus facile de vous connecte les harnais des batteries quand vous avez les batteries a un distance de votre Jazzy. C'est vous donne plus d'espace pour marcher.

8. Attachez le fil avec le nom BAT(+) a la terminale (rouge) positif de la batterie. Attachez le fil avec le nom BAT(-) a la terminale (noire) negatif de la batterie. Installez la batterie a l'arriere de votre Jazzy au plateau batterie avec les terminales de batterie en vers de la centre de la Jazzy (a l'intérieure). Fichez l'harnais cablage dans un vite fil du détachement.
9. Attachez le fil avec le nom BAT(+) a l'autre terminale (rouge) positif de la batterie. Attachez le fil avec le nom BAT(-) a la terminale (noire) negatif de la batterie. Installez la batterie a l'antérieure de votre Jazzy au plateau batterie avec les terminales de batterie en vers de la centre de la Jazzy (a l'intérieure).Fichez l'harnais cablage dans un vite fil du détachement.
10. Remplacez le cadre pied par l'utilisation d'un estoquiau de 8mm pour le sécurer.

NB: C'est très importante d'assure que les connexions des batteries sont tendus et sécurés.

LES BROSSES DU MOTEUR

Les moteurs électriques qui donnent l'énergie de votre Jazzy utiliser les brosse du carbone. Cettes brosses peuvent détériorer après quelque temp. Les brosses moteurs dans l'assemblage du moteur sont les deux points de contact avec le moteur qui donnent l'énergie au moteur. Leurs dessein devient fournir plus des milles heure d'opération. Mais, si les brosses devienent sale avec l'accumulation de carbone ou la détérioration, le moteur ne marche pas bien. Nous recommandons que votre fournisseur autorisé au Pride examine les brosses un fois chaque les six mois si votre Jazzy ne marche malvausement. Si l'examination trouve trop de détérioration sur les brosses, leurs remplacement est urgente.

COUVERT DE BROSSSE MOTEUR

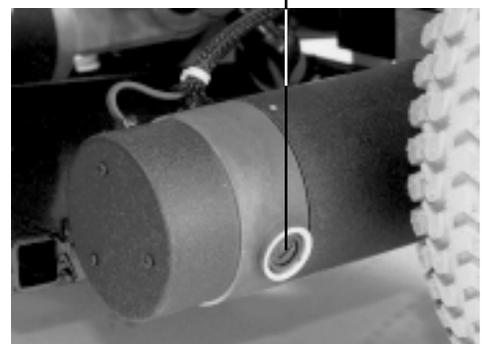


Figure 38. Le Moteur

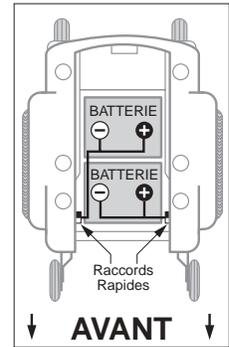


Figure 37. les Connexions Batterie

IX. LE SOIN ET LA MAINTENANCE

NB: L'échec de la maintenance des brosses peut ressembler dans le vide de votre garantie.

L'examen ou le remplacement des brosses moteur:

1. Enlevez le siège, le couvercle du corps, et les batteries. Regardez VI. "Le Démontage."
2. Desserrez les couvercles des brosses moteur. Regardez la figure 39.
3. Enlevez les brosses.
4. Examinez pour la détérioration.
5. Remplacez les brosses, si nécessaire. Contactez votre fournisseur autorisé de Pride pour les remplacements des brosses.

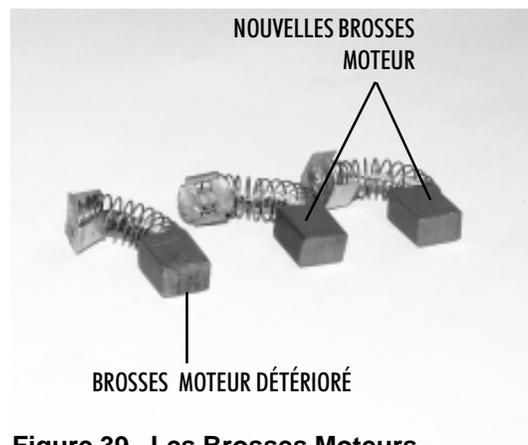


Figure 39. Les Brosses Moteurs

L'AMMENDMENT DE LA MAINTENANCE

Si l'indicateur de la batterie n'illumine pas quand vous commencez l'énergie:

- Examinez les connexions du harnais. Faites certain qu'il sont bien attacher.
- Examinez le coupe circuit. Réajustez si nécessaire.
- Examinez les connexions de la batterie.

Si cetttes conditions sont normale, vous pouvez essayer les batteries avec un testeur du charge. Cets testeurs sont disponible a les marchés des pièces automotif. Détachez les deux batteries avant l'essayer le charge et suivez les instructions avec le testeur du charge. Si l'un ou l'autre de la batterie manquent l'essayer, remplacez les deux. Si votre Jazzy encore ne marche pas, contactez votre fournisseur autorisé de Pride.

QUAND VOUS DEVEZ CONTACTE VOTRE FOURNISEUR AUTORISÉ DE PRIDE POUR LA SERVICE

Les symptomes qui suivants sont vous indiquer les problèmes serieuse avec votre Jazzy. Si nécessaire, contactez votre fournisseur autorisé de Pride. Quand vous appelez avoir pret, la numéro de la modèle, la numéro de série, le genre de la problème, et la code d'ennui, si disponible.

- La bruit dans le moteur
- La détérioration des harnais
- les connecteurs avec des fentes ou cassé
- La détérioration des pneus
- Le mouvement saccadé
- Tire a un coté
- les assemblages des roues plier ou cassé
- Ne commence pas
- Commence, mais n'avance pas

X. L'OPTIONS ET L'ACCESORIES

Les accessoires qui suivantes sont disponible a la fournisseur autorisé de Pride.

LA CEINTURE DE POSITIONNEMENT

NB: La ceinture de positionnement n'est pas faire pour l'utilisations comme un ceinture de sécurité dans un véhicule d'automobile. Aussi votre Jazzy ne doit pas utiliser comme un siège dans les véhicules. Les personnes qui voyagent dans un véhicule doit avoir la ceinture de la sécurité approuvé par le manufacture. Regardez la figure 40.



Figure 40. La ceinture de positionnement

LE CONTENEUR DE RÉSERVOIR OXYGÈNE

L'amovible conteneur de réservoir oxygène est située a l'arrière du siège par la patte d'accessoire. Regardez la figure 41.

LE CONTENEUR DE LA CANNE ET LA BÉQUILLE

L'amovible conteneur de la canne et la béquille est située a l'arrière du siège par la patte d'accessoire. Regardez la figure 42.

LE CONTEUR DE MARCHEUR

L'amovible conteneur de marcheur est située a l'arrière du siège par la patte d'accessoire. Regardez la figure 43. Il peut contenir un marcheur de taille normal.

LA CORBEILLE ARRIÈRE

La corbeille arrière est situé a la patte accessoire. Regardez la figure 44. Il a un manche qui vous pouves utiliser quand vous enlèvez la corbeille de votre Jazzy.

LE CONTENEUR DU TASSE (PAS EXPOSÉ ICI)

Le conteneur du tasse est située sur le scie a bras.



Figure 41. Le conteneur de réservoir oxygène

Figure 42. Le conteneur de la canne et la béquille



Figure 43. le conteur de marcheur



Figure 44. La corbeille arrière

XI. LA GARANTIE

LA GARANTIE VIVANT LIMITÉ

Les composants structural des cadre, prep y compris: la plate-forme, le fourchette, le poteau du siège, et les cadres soudures.

LA GARANTIE DE DEUX ANS LIMITÉ

Le train conduire, prep y compris: le moteur, et le frein.

LA GARANTIE DE DEUX ANS LIMITÉ

Votre Jazzy est complètement garantie pour douze (12) mois a la date vous l'achetez contre les défauts qui resultent venir a des défauts du manufacture ou des matériaux.

Toutes les pièces élélectronique, pret y compris des controleurs, ont la waratie d'un (1) an. Il fautque la service du controleur est par votre fournisseur autorisé de Pride. Si vous essayez de faire les réparations, ce peut vide la warantie sur l'article.

NE SONT PAS SOUS LA GARANTIE

La warantie ne compris pas des articles qui peuvent besoin le remplacement pour la raison de la détérioration normale (les pneus, les ceintures, les bulbes, la garniture, les linceuls plastics, les brosses moteur, les plombs, et les batteries), ou les dégats de la produits qui resultent a la raison d'utilisation incorrect ou accidentel. Cette warantie n'inclus pas le travail ou les coups de service.

LES BATTERIES

Les batteries sont dessous une garantie pour douze (12) mois du manufacture originale.

La détérioration graduelle dans la performance a raison d'etre dans un état sans le charge, l'exposition des coditions très froides pour un long temp, ou beaucoupes d'utilisation ne sont pas inclus.

SERVICE D'EXAMINATIONS ET LA GARANTIE

La service de garantie peut faire par votre fournisseur autorisé de Pride. S'il vous plait contactez votre fournisseur autorisé de Pride pour l'information sur la prix de la visite pour la service.

DES NOTES

DES NOTES

DES NOTES