

Jazzy 1120 2000

Betriebshandbuch

ACHTUNG!
Alles in diesem
Betriebshandbuch lesen
bevor Sie Ihren Jazzy
benutzen.



≡ Wie sich ein elektronisch angetriebener Rollstuhl anfühlen sollte!™

Pride

Mobility Products Europe B.V.

*Tijmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands*

www.pridemobility.com

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bevor Sie versuchen Ihren elektronisch angetriebenen Stuhl zu benutzen, lesen und befolgen Sie die Instruktionen in diesem Handbuch.

Nachstehende Symbole werden laufend in diesem Handbuch Warnungen aufzeigen sowie zur Vorsicht mahnen. Es ist sehr wichtig diese zu lesen und vor allem zu verstehen.



WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Warnungen im Handbuch koennte zu persoenlichen Verletzungen fuehren.



VORSICHT! Nichtbeachtung der Mahnungen zur Vorsicht im Handbuch koennte die Beschaedigung Ihres Jazzys zur Folge haben.

INHALT

I. EINLEITUNG	4
II. SICHERHEIT	6
III. DER JAZZY 1120₂₀₀₀	12
IV. ZUSAMMENBAU	19
V. BEHAGLICHKEITSEINSTELLUNGEN	21
VI. DEMONTIERUNG	26
VII. BEDIENUNG	27
VIII. BATTERIEN UND BATTERIELADUNG	34
IX. PFLEGE UND WARTUNG	38
X. ZUBEHOER UND SONDERAUSSTATTUNGEN	43
XI. GARANTIE	45

I. EINLEITUNG

Willkommen bei Pride Mobility Products Europe B.V. (Pride). Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Jazzy. Der Entwurf des Jazzy s vereinigt den fortschrittlichen, neuesten Stand der Technik mit modernem, attraktiven Stil. Wir sind sicher, dass die Ausstattungen und die problemfreie Bedienung Ihres neuen Jazzy Ihr taegliches Leben einfacher machen wird.

Ihre Sicherheit ist sehr wichtig fuer uns. **Bitte lesen Sie und folgen Sie den Instruktionen in diesem Betriebshandbuch bevor Sie Ihren Jazzy das erste Mal benutzen.** Diese Instruktionen wurden zu Ihrem Vorteil geschrieben. Es ist wichtig, dass Sie diese Instruktionen voellig verstehen um die sichere Bedienung Ihres neuen Jazzy's zu gewaehrleisten.

Pride uebernimmt keine Verantwortung fuer Schaeden oder Verletzungen zugezogen durch unsachgemaesses oder unsicheres Benutzen des Jazzy's. Pride uebernimmt keine Verantwortung fuer Schaeden oder Verletzungen zugezogen waehrend des Versuches den Instruktionen und Empfehlungen, dargestellt in diesem Betriebshandbuch, sowie den Instruktionen am Produkt selbst dargestellt oder beigefuegt, zu befolgen.

Dieses Betriebshandbuch wurde erstellt mit den neuesten Spezifikationen und Produktinformationen, die zur Zeit vorliegen. Wir behalten uns das Recht vor, Aenderungen zu machen wenn es noetig wird. Aenderungen des Produktes koennten kleine Unterschiede zwischen dem gekauften Produkt und dem Betriebshandbuch aufzeigen.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Jazzy erleben, die Sie selbst nicht loesen koennen, oder wenn Sie sich nicht faehig fuehlen, den Instruktionen und/oder Empfehlungen in diesem Betriebshandbuch zu folgen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.

Wenn Sie verstehen wie Ihr Jazzy funktioniert und wie Sie auf Ihren Jazzy achten muessen, werden Sie viele problemfreie und vergnuegungsvolle Jahre erleben.

INFORMATIONSAUSSTAUSCH

Willkommen sind Fragen, Kommentare und Empfehlungen, die Sie bezueglich diesem Betriebshandbuch haben. Willkommen sind auch Kommentare bezueglich der Sicherheit und Zuverlaessigkeit Ihres neuen Jazzy Leistungsstuhl, sowie ueber die Wartung.

Bitte melden Sie Adressaenderungen, sodass wir Sie in Kenntnis setzen koennen von Informationen ueber Sicherheit, neuen Produkten und neuen Moeglichkeiten, die die Faehigkeiten zum Nutzen und Genuss Ihres Jazzys erhoehen. Sie koennen uns via Post erreichen:

Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijmuiden 28
1046 AL Amsterdam

I. EINLEITUNG

PRIDE BESITZERKLUB MITGLIEDER

Als Besitzer eines Pride Produktes, sind Sie eingeladen Ihre Garantieeinschreibung einzusenden und werden damit in den Pride Besitzerklub aufgenommen. Fuellen Sie Ihren Garantieschein aus und senden Sie ihn ein, oder besuchen Sie Pride's Webseite bei www.pridemobility.com. Als registriertes Mitglied werden Sie Zugang zu den besten interaktiven und paedagogischen Treffpunkten haben fuer Leute mit der Notwendigkeit beweglich zu sein, deren Familien und Freunde.

Von der Hauptseite, klicken Sie auf die "Besitzerklub" Ikone um auf die Seite zu kommen, die den gegenwaertigen und zukuenftigen Pride Produktbesitzern gewidmet ist. Sie werden Zugang zu Unterhaltungen, Geschichten, Freizeitsideen, taegliche Hinweise, Produkt und Zahlungsinformation und interaktiven Mitteilungsplakaten haben. Mitteilungsplakate geben Ihnen die Moeglichkeit sich mit anderen Pridekunden sowie Pridevertretern zu unterhalten, die Ihre Fragen beantworten. Sie werden ein freies Geschenk bekommen wenn Sie Mitglied im Pride Besitzerklub werden.

Mein zustaendiger Pride Haendler ist:

Name: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Information:

Jazzy Model: _____

Fortlaufende Herstellungsnummer: _____

Kaufdatum: _____

ANMERKUNG: Sollten Sie jemals Ihren Garantieschein oder dieses Betriebshandbuch verlieren, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns und wir werden Ihnen sofort ein Neues zuschicken.

II. SICHERHEIT

ALLGEMEIN

Der Jazzy 1120₂₀₀₀ ist ein Lebensverbesserungsgeraet entwickelt zum neuesten technischen Stand um die Beweglichkeit zu erhoehen. Pride stellt eine umfangreiche Auswahl von Produkten zur Verfuegung, die sich am Besten den individuellen Beduerfnissen des Jazzy Benutzers anpassen. Bitte sind Sie sich bewusst, dass die endgueltige Auswahl und die Kaufentscheidung betreffend der Sorte des Jazzys, Sie sich aussuchen koennen, die Verantwortung des Benutzers und dessen berufliche medizinischen Ueberwachungspersonen (z.B. Arzt, Therapeut, usw.) ist.

Der Inhalt dieses Betriebshandbuches ist darauf basiert, dass der Beweglichkeitsgeraetsachversteaendige den Jazzys dem Benutzer richtig anpasst und dass er dem verschreibenden Arzt/Therapeuten und/oder dem zustaendigen Pride Haendler beim Aussuchen und mit den Instruktionen fuer die Benutzung des Produktes geholfen hat. Fuer Nichterhaltung vorgennanter Hilfe und Einweisung uebernimmt Pride keine Verantwortung.

Es gibt bestimmte Situationen, medizinische Behinderungen eingeschlossen, wobei der Besitzer die Bedienung des 1120₂₀₀₀ im Beisein eines trainierten Begleiter ueben muss. Ein Begleiter kann ein Familienmitglied oder ein beruflicher Pfleger sein, der speziell zur Hilfe bei verschiedenen taeglichen Lebensaktivitaeten des Jazzy Benutzers ausgebildet ist.

Nachstehend Sicherheitshinweise, die dem Jazzy Benutzer behilflich sind, sich an die Bedienung des 1120₂₀₀₀ zu gewoehnen.

SICHERHEITS-PRUEFUNGEN VOR BENUTZUNG

Machen Sie sich vertraut mit Ihrem 1120₂₀₀₀ Jazzy und dessen Faehigkeiten. Pride empfiehlt vor jedem Gebrauch diese Pruefungen durchzufuehren um sicherzustellen, dass Ihr Jazzy reibungslos und sicher funktioniert. Fuer Einzelheiten der Durchfuehrung dieser notwendigen Pruefungen, siehe IX. "Pflege und Wartung."

Folgende Pruefungen vor der Benutzung Ihres 1120₂₀₀₀ durchfuehren.

- Den Luftdruck der Reifen pruefen. Den Druck zwischen **30 - 35 atue** in jedem Reifen halten.
- Alle elektrischen Anschuesse kontrollieren. Sicherstellen, dass sie fest und nicht oxidiert sind.
- Alle Steuergeraeteanschluesse zur elektrischen Versorgungswanne kontrollieren.
- Die Bremsen kontrollieren.
- Batterieleistung kontrollieren.

Sollten Sie auf Probleme stossen, setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung um Hilfe zu bekommen, die Probleme zu loesen bevor Sie Ihren 1120₂₀₀₀ aktiv benutzen.

GEWICHTSBEGRENZUNGEN

Ihr 1120₂₀₀₀ kann Gewicht bis zu 100 kg tragen.



WARNUNG! Ueberschreitung der Gewichtsbesgrenzung macht Ihre Garantie ungueltig und koennte zu koerperlichen Verletzungen sowie Schaden an Ihrem Jazzy 1120₂₀₀₀ fuehren.

II. SICHERHEIT

STEIGUNG- UND NEIGUNGSINFORMATION

Mehr und mehr Gebaeude haben Rampen mit spezifischen Neigungsgraden dafuer gedacht den Zugang leichter und sicherer zu machen. Manche Rampen haben Drehrueckschalter (90 Grad Drehung), die erfordern, dass Sie gute Eckenkontrolle mit Ihrem 1120₂₀₀₀ haben.

Wenn Sie sich einer Steigungen naehern, versuchen Sie Ihren 1120₂₀₀₀ immer in Bewegung zu halten. Wenn Sie anhalten muessen, fahren Sie langsam an und beschleunigen Sie mit Vorsicht. Wenn Sie ein Gefaele hinunter fahren, stellen Sie die Drosselklappensteuerung auf die langsamste Einstellung und fahren Sie nur vorwaerts. Sollte Ihr 1120₂₀₀₀ das Gefaele schneller als erwartet oder gewuenscht hinunterfahren, den Steuerknuettel loesen damit Sie zum kompletten Stillstand kommen, dann den Steuerknuettel langsam nach vorne druecken um eine kontrollierte und sichere Abfahrt zu gewaehrleisten.


WARNUNG! Wenn Sie sich einer Steigung naehern, nicht im Zick-Zack fahren oder in einem Winkel anfahren. Fahren Sie Ihren 1120₂₀₀₀ die Steigung gerade hoch. Dies reduziert die Moeglichkeit des Umkippens oder Fallen. Jedenfalls immer groesste Vorsicht beim Befahren einer Steigung benutzen.




WARNUNG! Potentielle gefaehrliche Steigungen oder Gefaele sollten Sie nie befahren (z.B. Gebiete bedeckt mit Schnee, Eis, geschnittenem Grass oder nassen Blaettern).

WARNUNG! Nie ein Gefaele rueckwaerts hinunterfahren. Dies koennte zur persoenlichen Verletzung und/oder zum Schaden an Ihrem Jazzy fuehren..

WARNUNG! Jeder Versuch eine Steigung oder ein Gefaele von mehr als 5 Grad zu befahren koennte Ihren 1120₂₀₀₀ entstabilisieren und in eine unsichere Position bringen mit der Gefahr umzukippen mit der Folge einer persoenlichen Verletzung oder Beschaedigung Ihres 1120₂₀₀₀.

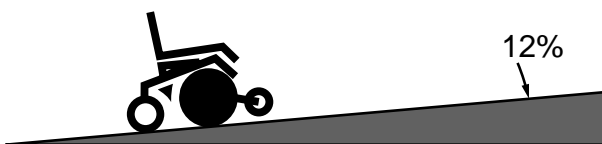

Zeichnung 1. Maximale Steigung.

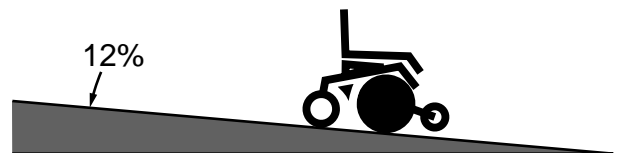

Zeichnung 2. Maximales Gefaele.

FAHRFLAECHEN IM FREIEN

Ihr 1120₂₀₀₀ ist entworfen worden um Ihnen die optimale Stabilitaet unter normalen Fahrzustaenden zu gewaehrleisten wie auf trockenen, ebenen Zement- oder Asphaltflaechen. Pride erkennt jedoch, dass Zeiten geben wird wenn Sie auf Flaechen stossen, die nicht aus Zement oder Asphalt bestehen. Aus diesem Grund haben wir den 1120₂₀₀₀ so entworfen, dass er ausgezeichnete Leistung auf harter Erde, Gras und Kies bringt. Sie koennen Ihren 1120₂₀₀₀ sicher auf Rasen und in Parks fahren.

- Vermeiden Sie hohes Gras, das sich in das Fahrwerk entwickeln koennte.
- Vermeiden Sie lockere Erde und Sand.
- Sollten Sie sich unsicher fuehlen, auf bestimmten Flaechen zu fahren, umgehen Sie diese Flaechen.

II. SICHERHEIT

FREILAUFZUSTAND

Ihr 1120₂₀₀₀ ist mit einem Freilaufhebel ausgestattet damit ein trainierter Begleiter den Jazzy manuell manoeuvrieren kann. Fuer weitere Information wie Ihr Jazzy in und aus dem Freilaufzustand gebracht wird, siehe III. "The 1120₂₀₀₀".



WARNUNG! Ihren 1120₂₀₀₀ nie ohne Begleitung im Freilaufzustand benutzen. Dies koennte persoenliche Verletzung zur Folge haben.

WARNUNG! Ihren Jazzy nicht eigenmaechtig in den Freilaufzustand bringen waehrend Sie darauf sitzen. Dies koennte persoenliche Verletzungen zur Folge haben. Fragen Sie Ihren Begleiter fuer Hilfe.

WARNUNG! Ihren 1120₂₀₀₀ nicht in Freilaufzustand bringen waehrend Sie auf einer Steigung stehen. Der Jazzy koennte sich selbststaendig machen und unkontrolliert zu rollen anfangen was zur persoenlichen Verletzung fuehren kann.

FESTE HINDERNISSE (STUFEN, RANDSTEINE, USW.)



WARNUNG! Hindernisse, die hoeher als 3 cm sind nicht ohne die Hilfe eines Begleiters hinunter- oder hinauffahren.

WARNUNG! Niemals rueckwaerts mit Ihrem Jazzy Stufen oder einen Randstein hinunterfahren. Dies koennte zur Folge haben, dass Ihr Jazzy kippt und zur persoenlichen Verletzung fuehrt.

REIFENDRUCK

Ihr 1120₂₀₀₀ ist mit pneumatischen Reifen ausgestattet. Den Luftdruck mindestens einmal in der Woche pruefen lassen. Dies verlaengert das Leben der Reifen und hilft eine reibungslose Bedienung zu sichern.



WARNUNG! Reifen muessen einen Druck von 30-35 atue haben. Nicht ueber- oder zuwenig aufpumpen. Bei zu niedrigem Druck koennten Sie die Kontrolle verlieren, zu hoher Druck koennte das Explodieren der Reifen zur Folge haben. Dies koennte sehr ernste, persoenliche Verletzung mit sich bringen.

WARNUNG! Die Reifen Ihres 1120₂₀₀₀ nur mit einem geregelten Aufpumpgeraet mit Druckanzeige aufpumpen. Der korrekte Luftdruck fuer die 1120₂₀₀₀ Reifen ist 30 - 35 atue. Aufpumpen der Reifen ohne Druckanzeige koennte diese ueberfuellen was zu einem geplatzten Reifen und zur persoenlichen Verletzung fuehren kann.

OEFFENTLICHE STRASSEN UND PARKPLAETZE



WARNUNG! Ihren 1120₂₀₀₀ nicht auf belebten Strassen und Fahrbahnen fahren. Seien Sie sich immer bewusst, dass die Moeglichkeit besteht, dass Autofahrer Sie nicht wahrnehmen wenn Sie auf Ihrem 1120₂₀₀₀ sitzen. Alle Strassen- und Gehwegeregeln beachten. Warten bis Ihr Weg frei ist und dann mit groesster Vorsicht weiterfahren.

ANMERKUNGEN: Sicherheitsausstattungen, wie Rueckstrahler, leuchtfarbige Fahnen und verschiedene Lichtenanlagen koennen Sie bei Ihrem zustaendigen Pride Haendler erstehen.

II. SICHERHEIT

STUFEN UND ROLLTREPPEN

Elektronisch angetriebene Stuehle sind nicht entworfen worden Stufen zu besteigen oder auf Rolltreppen zu fahren. Immer den Aufzug benutzen.



WARNUNG! Niemals mit Ihrem Jazzy versuchen Stufen oder Rolltreppen zu bewaeltigen. Sie koennten damit andere Personen sowie sich selbst verletzen und den 1120₂₀₀₀ beschaedigen.

HEBEBUEHNE/AUFZUG PRODUKT

Sollten Sie mit Ihrem 1120₂₀₀₀ viel reisen werden Sie es einfacher finden eine Hebebuehne/Aufzug zum Transport zu benutzen. Pride empfiehlt Ihnen genauestens den Instruktionen, Spezifikationen und Sicherheitsinformationen, vom Hersteller mitgeliefert, zu folgen, bevor Sie das Produkt benutzen.

TRANSPORT IM MOTORISIERTEN FAHRZEUG

Zur dieser Zeit gibt es noch keine Vorschriften oder Normen von Befestigungen fuer ein motorisiertes Fahrzeug, das Personen in einem elektronischen angetriebenen Stuhl sitzend transportiert.

Auch wenn Ihr 1120₂₀₀₀ mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet ist, ist dieser Gurt nicht dafuer gedacht, um richtigen Halt waehrend des Transportes zu gewaehrleisten. Jede Person, in einem Fahrzeug reisend, sollte in den Fahrzeugsitzen mit dem dazugehoerenden Sicherheitsgurt angeschnallt sein.



WARNUNG! Niemals in einem elektronisch angetriebenen Stuhl in einem sich fortbewegendem Fahrzeug sitzen. Poesoenliche Verletzung koennte die Folge sein.

WARNUNG! Immer sicherstellen, dass Ihr 1120₂₀₀₀ ordentlich und sicher fuer den Transport befestigt ist. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu poesoenlichen Verletzung und/oder Schaden an Ihrem 1120₂₀₀₀ fuehren.

SICHERHEITSGURT

Ihr zustaendiger Pride Haendler, Arzt und Therapeut sind verantwortlich fuer die Festlegung ob Sie einen Sicherheitsgurt, um Ihren 1120₂₀₀₀ sicher zu benutzen, benoetigen.



WARNUNG! Sollten Sie einen Sicherheitsgurt, zur sicheren Benutzung Ihres 1120₂₀₀₀, benoetigen, sicherstellen dass dieser ordentlich befestigt ist. Serioese poesoenliche Verletzung koennten Ihnen beim Fall von Ihrem 1120₂₀₀₀ zustossen.

ELEKTROMAGNETISCHE FELDER UND STOERUNGEN DURCH RADIOFREQUENZEN (EMF & RF)

Die Leistung Ihres Jazzys auf der Strasse koennte negativ durch elektromagnetische Felder beeinflusst Werden, ausgeloeset bei Mobiltelefonen oder anderen abstrahlenden Geraete wie Handradios, Rechner-Verbindungen, Microwellen-Energiequellen und Funkrufsender. Umgekehrt koennte auch Ihr Jazzy die elektromagnetischen Felder stoeren oder negativ beeinflussen.

II. SICHERHEITS

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI UNFREUNDLICHEM WETTER



WARNUNG! Den 1120₂₀₀₀ nicht auf glatten, rutschigen oder gesalzene Flächen (wie Bürgersteige oder Strassen) fahren. Dies könnte einen Unfall mit persönlicher Verletzung sowie nachteilige Auswirkungen auf die Leistung und/oder Sicherheit Ihres 1120₂₀₀₀ mit sich führen.

WARNUNG! Ihren 1120₂₀₀₀ keiner Feuchtigkeit wie Regen, Schnee, Nebel oder Wäsche aussetzen. Nässe kann Ihren 1120₂₀₀₀ beschädigen. Niemals Ihren 1120₂₀₀₀ fahren wenn er in irgendeiner Weise Feuchtigkeit ausgesetzt war. Warten bis er völlig trocken ist.

AUF- UND ABSTEIGEN

Für das Auf- und Absteigen von Ihrem 1120₂₀₀₀ benötigen Sie ein gutes Gefühl für Gleichgewicht. Haben Sie immer einen Begleiter dabei solange Sie lernen Ihren Jazzy zu besteigen.

Um die Möglichkeit der Verletzung zu vermeiden empfiehlt Pride dass Sie oder Ihr Begleiter nachstehende Aufgaben durchführen bevor Sie sich auf den Jazzy begeben oder davon absteigen:

- Den Jazzy ausschalten. Siehe VII. "Bedienung."
- Sicherstellen, dass der 1120₂₀₀₀ nicht im Freilaufzustand ist. Siehe III. "Der 1120₂₀₀₀"
- Sicherstellen, dass die Armlehnen nach oben stehen oder von Ihrem 1120₂₀₀₀ abgenommen sind. Siehe V. "Behaglichkeitseinstellungen."
- Die Fusstüte nach oben stellen oder zur Seite bewegen. Dies verhindert, dass Ihre Füße sich in den Stützen verfangen während Sie auf- oder absteigen. Siehe V. "Behaglichkeitseinstellungen."
- Die Entfernung zwischen dem Jazzy und dem Gegenstand auf den Sie umsteigen reduzieren.
- Beide hinteren Lenkrollen in gewünschte Ab- oder Aufsteigrichtung drehen um die Stabilität zu verbessern während Sie auf- oder absteigen.



WARNUNG! Bevor Sie umsteigen, setzen Sie sich auf dem Sitz ganz zurück um den 1120₂₀₀₀ vom Vorwärtskippen zu bewahren und um Verletzung zu vermeiden.

WARNUNG! Die Armlehnen nicht als Abstützung benutzen. Dies könnte den 1120₂₀₀₀ umkippen und persönliche Verletzung verursachen.

WARNUNG! Auch nicht Ihr volles Gewicht auf die Fusstüten verlagern. Dies könnte den Stuhl kippen und persönliche Verletzung verursachen.

GREIFEN UND BIEGEN

Sollten Sie nach etwas greifen, sich biegen oder anlehnen während Sie auf Ihrem Jazzy sitzen, ist es wichtig die Schwerkraft im Gleichgewicht zu halten um den Stuhl vor dem Kippen zu bewahren. Pride empfiehlt dem Besitzer des Jazzy's seine persönlichen Beschränkungen zu erkennen, sowie das Greifen und Biegen im Beisein eines qualifizierten Begleiters zu praktizieren.



WARNUNG! Biegen, lehnen oder greifen Sie nicht nach Gegenständen wenn Sie diese nur erreichen können wenn Sie im Sitz nach vorne rutschen um diese zwischen Ihren Knien hochzunehmen. Diese Bewegungen können Ihre Schwerkraft und Gewichtsverteilung verschieben, damit Ihren 1120₂₀₀₀ zum Kippen bringen was persönliche Verletzung mit sich führen kann.

II. SICHERHEIT

BATTERIEN

Zusaetzlich zu den nachfolgenden Warnungen machen Sie sicher, dass Sie alle anderen Batterieumgangs-Instruktionen befolgen. Siehe VIII. "Batterien und Batterieladung."

WARNUNG! Jede 1120₂₀₀₀ Batterie wiegt ungefaehr 17.27 kg. Wenn Sie dieses Gewicht nicht heben koennen, fragen Sie bitte fuer Hilfe. Gewicht hochheben, das zu schwer ist, koennte zur persoenlichen Verletzung fuehren.



WARNUNG! Batteriestuetzen, Anschlussklemmen und zugehoerige Ausstattungen enthalten Blei und Bleiverbindungen. Haende waschen nach jeder Beruehrung.

WARNUNG! Immer Ihre Batterien vor eiskalten Temperaturen schuetzen und nie eine gefrorene Batterie laden. Eine gefrorene Batterie zu wechseln koennte zur persoenlichen Verletzungen fuehren und /oder Schaden an der Batterie verursachen .

BATTERIE-ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Sollten Sie eine beschaedigte Batterie haben packen Sie diese bitte in eine Plastiktueete und verstaendigen Sie Ihren zustaendigen Pridehaendler. Er wird Ihnen Anweisungen bezueglich der Batterie-Entsorgung oder Wiederverwertung geben. Ihr zustaendiger Pridehaendler hat die notwendige Information bezueglich Entsorgung und Wiederverwertung der Batterie was in diesem Falle von uns vorgeschlagen wird.

VERHINDERUNG UNGEWOLLTER BEWEGUNG DES JAZZYS



WARNUNG! Sollten Sie fuer laengere in Ihrem Jazzy sitzend warten muessen, schalten Sie ihn aus. Dies verhindert eine ungewollte Bewegung des Jazzys bei unabsichtlicher Beruehrung des Steuerknueppels. Dies vermeidet auch die Moeglichkeit der ungewollten Bewegung des Jazzys durch Strahlungen von elektromagnetischen Quellen. Missachtung dieser Vorsichtsmassnahme koennte persoenliche Verletzung zur Folge haben.

MEDIKAMENTE/KOERPERLICHE BEHINDERUNGEN

Der 1120₂₀₀₀ Benutzer muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand den Jazzy bedienen. Dies schliesst das Bewusstsein ueber die Sicherheitsbedingungen bei Einnahme von Medikamenten und/oder bei koerperlichen Behinderungen ein.



WARNUNG! Fragen Sie Ihren Arzt sollten Sie Medikamente nehmen oder wenn Sie koerperliche Behinderungen haben. Manche Medikamente und Behinderungen koennten eine einschraenkende Auswirkung auf Ihre Fahrtuechtigkeit haben.

ALKOHOL

Der 1120₂₀₀₀ Benutzer muss mit Vorsicht und mit gesundem Menschenverstand den Jazzy bedienen. Dies schliesst das Bewusstsein ueber die Sicherheitsbedingungen auch unter dem Einfluss von Alkohol ein.



WARNUNG! Den 1120₂₀₀₀ nicht bedienen waehrend Sie unter dem Einfluss von Alkohol sind. Dies koennte einschraenkende Auswirkung auf Ihre Fahrtuechtigkeit haben.

ABNEHMBARE TEILE




WARNUNG! Den Jazzy nicht versuchen an abnehmbaren Teilen hochzuheben. Dies koennte zu persoenlicher Verletzung fuehren oder Schaden an Ihrem Jazzy verursachen.

III. DER JAZZY 1120₂₀₀₀

Ihr Jazzy hat zwei Hauptbestandteile: den Sitz und das elektronische Grundbestandteil. Siehe Zeichnung 3. Es gibt unterschiedliche Sitzvarianten entworfen um den Grossteil der Benutzer zu befriedigen. Eine normale Sitzausstattung schliesst die Armlehnen, Rueckenlehne und das Steuerknuettelsteuergeraet ein. Ihr Jazzy koennte auch bereits zusaetzlich erhaeltliche Sonderausstattungen enthalten wie einen Korb, einen Getraenkehalter und/oder einen Schalter fuer die elektrische Sitzeinstellung. Siehe X. "Zubehoer und Sonderausstattungen."

Das elektronische Grundbestandteil ist das Zentrum Ihres Jazzy's. Es schliesst zwei Antriebsraeder, zwei nicht-kippbare Raeder, zwei hintere Lenkrollenraeder, Steuergeraethaltegurte und ein Gehaeuse ein. Siehe Zeichnung 1 bis 3.

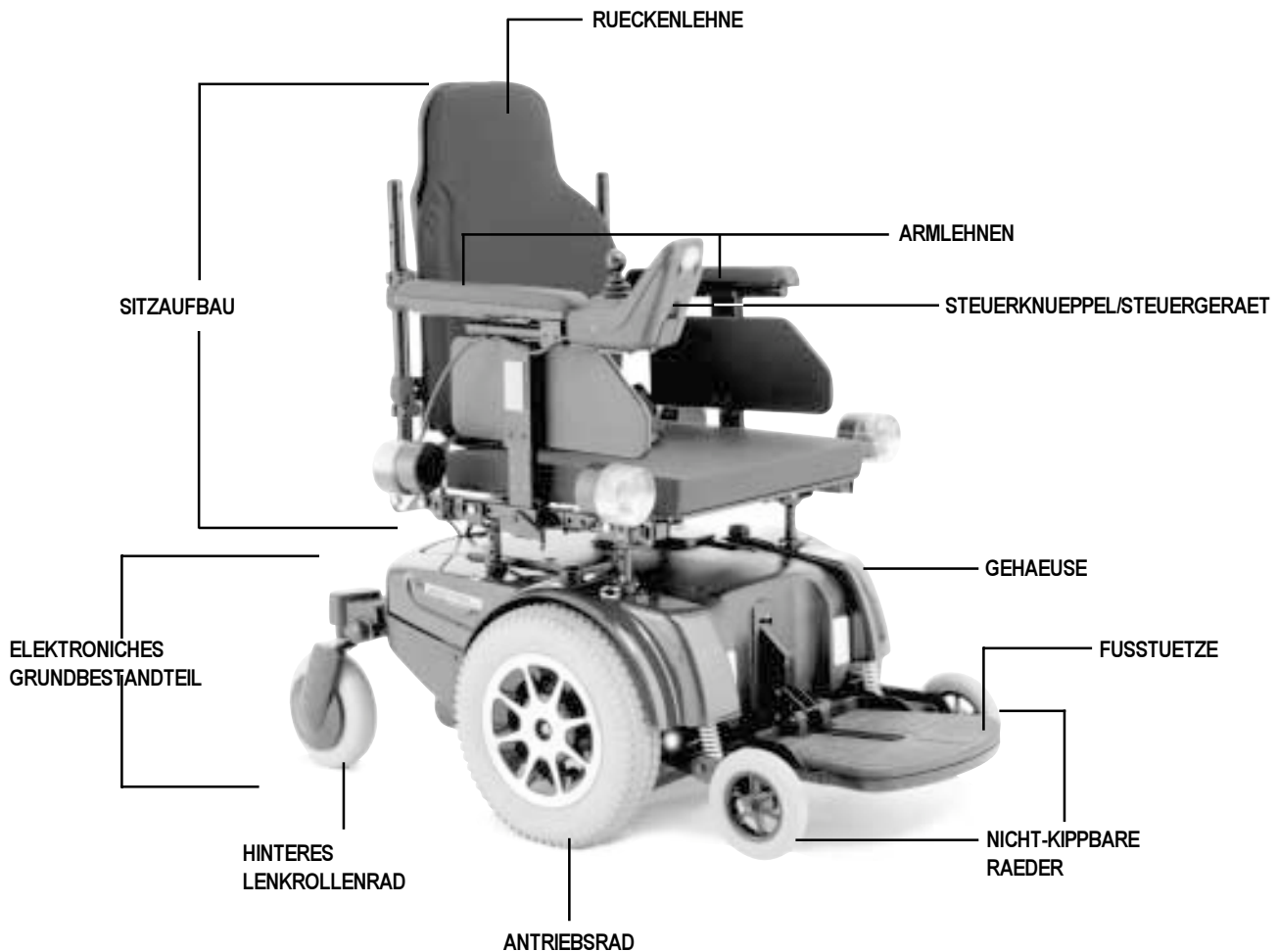

Zeichnung 3. Der Jazzy 1120₂₀₀₀

III. DER JAZZY 1120₂₀₀₀

ELEKTRONISCHE VERSORUNGSWANNE

Die elektronische Versorgungswanne ist am hinterem Teil Ihres Jazzy's angebracht. Sie enthaelt Hauptstromkreisunterbrecher, die Verbindungen fuer Sonderausstattungen (wahlweise) die elektrische Sitzeinstellungsverbindung und die Steuergeraethalerverbindungen. Siehe Zeichnung 4.

- **Hauptstromkreisunterbrecher:** eine Sicherheit eingebaut in den Jazzy. Siehe Zeichnung 4. Wenn die Batterien und die Motoren ueberbelastet sind (z.B. von uebermaessiger Belastung), der Hauptstromkreisunterbrecher schaltet aus um Schaden an den Motoren und den elektrischen Teilen zu vermeiden. Sollte der Hauptstromkreisunterbrecher ausschalten, geben Sie dem Jazzy eine Minute "Pause". Danach den Hauptstromkreisunterbrecherknopf druecken, Steuerknueppel/Steuergeraet einschalten und normale Bedienung weiter fuehren. Sollte der Hauptstromkreisunterbrecher zu oft abschalten, setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.
- **Sonderausstattungs-Verbindung (wahlweise):** Dies ist die Stelle, die die Sonderhalterung zum Steuergeraet verbindet (elektronischer Sitz, Lichtanlage).
- **Steuergeraethalterungs-Verbindung:** Dies ist die Stelle, die den Steuerknueppel mit dem Motor, den Batterien und dem Ladegeraet verbindet. Sollte Ihr Jazzy mit einer Fernbedienung ausgestattet sein, ist dafuer nur eine Verbindung vorhanden. Siehe Zeichnung 4.
- **Elektronische Sitzeinstellungsverbindung (wahlweise):** Dies ist fuer die elektronische Sitzeinstellung als Sonderaustattung. Siehe Zeichnung 4.



WARNUNG! Die elektronische Versorgungswanne enthaelt die elektronischen Bestandteile und Verbindungen. Nichts in der Versorgungswanne lagern. Dies koennte zu Kurzschlussen, Feuer, Schaden an Ihrem Jazzy und/oder zu persoenlichern Verletzungen fuehren.



Zeichnung 4. Elektrische Versorgungswanne.

III. DER JAZZY 1120₂₀₀₀

FREILAUFHEBEL

Zu Ihrem Komfort ist Ihr Jazzy mit einem Freilaufhebel ausgestattet. Siehe Zeichnungen 5 und 6. Dies erlaubt Ihnen die Antriebsmotoren abzuschalten und den Jazzy manuell zu bewegen.

Antrieb abschalten und den Jazzy in den Freilaufzustand bringen:

1. Die Sicherheitsverriegelung nach oben stellen. Siehe Zeichnung 5.
2. Den Freilaufhebel nach oben ziehen.

Antrieb einschalten und den Jazzy aus dem Freilaufzustand nehmen:

Den Freilaufhebel nach unten druecken. Siehe Zeichnung 6.

WARNUNG! Ihren Jazzy nicht im Freilaufzustand ohne einen Begleiter benutzen. Poesonliche Verletzung koennte die Folge sein .



WARNUNG! Ihr Jazzy nicht eigenstaendig in Freilaufzustand bringen wenn Sie darauf sitzen. Poesonliche Verletzung koennte die Folge sein. Fragen Sie Ihren Begleiter fuer Hilfe.

WARNUNG! Ihr Jazzy nicht in den Freilaufzustand bringen waehrend Sie auf einer Steigung stehen. Der Jazzy koennte unkontrollierbar ins Rollen kommen was poesonliche Verletzung zur Folge haben koennte.

Sollte es zu schwer sein, den Hebel in eine der beiden Positionen zu bewegen, schaukeln Sie Ihren Jazzy langsam hin und her. Der Hebel sollte sich in die gewuenschte Position einstellen lassen.



VORSICHT! Es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass wenn der Jazzy im Freilaufzustand ist, das Bremssystem abgeschaltet ist.



Zeichnung 5. Antrieb ausgeschaltet



Zeichnung 6. Antrieb eingeschaltet

III. DER JAZZY 1120₂₀₀₀

AKTIV-SPUR SYSTEM


Ihr Jazzy ist mit einem Aktiv-Spur System (ASS) ausgestattet. ASS ist ein Aufhaengungssystem entworfen um dem Jazzy zu helfen verschiedene Gelaende und Hindernisse zu ueberqueren und sich weiterhin problemlos bedienen zu lassen. Mit ASS, die vorderen nicht-kippbaren Raeder funktionieren im Zusammenhang mit der Motoraufhaengung um Ihren Jazzy reibungslos ueber Hindernisse zu manoevrieren.

Sobald die vorderen nicht-kippbaren Raeder in Kontakt mit einem Hindernis kommen, wird der nicht-kippbare Radaufbau nach oben gezogen. Zur selben Zeit werden die Motoren nach unten gebracht. Dies erlaubt den Motoren den Jazzy ueber Hindernisse zu manoevrieren und beschaenkt die Moeglichkeit, dass Ihr Jazzy an einem Hindernis haengen bleibt.

ASS hilft auch waehrend der taeglichen Benutzung. Zum Beispiel, wenn Sie den Steuerknueppel loesen, faehrt Ihr Jazzy langsamer. Sobald der Jazzy langsamer faehrt, senken sich die nicht-kippbare Raeder automatisch zum Boden. Dies reduziert die Moeglichkeit des vorwaerts kippen, dem man typischer Weise bei Jazzys mit Zentralradantrieb begegnet.

HINTERRADAUFHAENGUNG

Ihr 1120₂₀₀₀ ist mit einer Hinterradaufhaengung ausgestattet. Siehe Zeichnung 7. Dieses Aufhaengungssystem funktioniert im Zusammenhang mit dem ASS und ist entworfen worden um reibungslos ueber unebene Gelaende sowie auf und ab von Randsteinen zu fahren. Dieses System funktioniert dadurch, dass die Lenkrollgabeln auf Gewichtverschiebungen und unebene Gelaende reagieren. Die Lenkrollenraeder drehen sich waehrend Sie ueber die Hindernisse fahren. Dieses System verbessert die Leistung auch wenn die vorderen nicht-kippbaren Raeder niedriger zum Boden eingestellt sind.

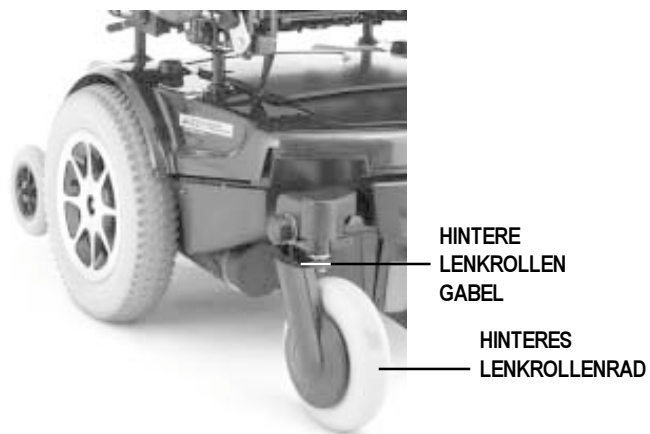


Zeichnung 7. Hinterradaufhaengung

III. DER JAZZY 1120₂₀₀₀

KOMPLETTES BELEUCHTUNGSSYSTEM

Das komplette Beleuchtungssystem besteht aus den Hauptscheinwerfern, Ruecklichtern und Blinklichter. Siehe Zeichnungen 8 und 9. Der Lichtschalter ist am "Remote Plus" Steuerkneuppel/Steuergeraet zu finden. Siehe Zeichnung 10. Die Hauptscheinwerfer und Ruecklichter funktionieren nur wenn der Jazzy eingeschaltet ist. Sobald der Jazzy ausgeschaltet ist, setzt der Lichtschalter automatisch die Warnlichter in Gang.

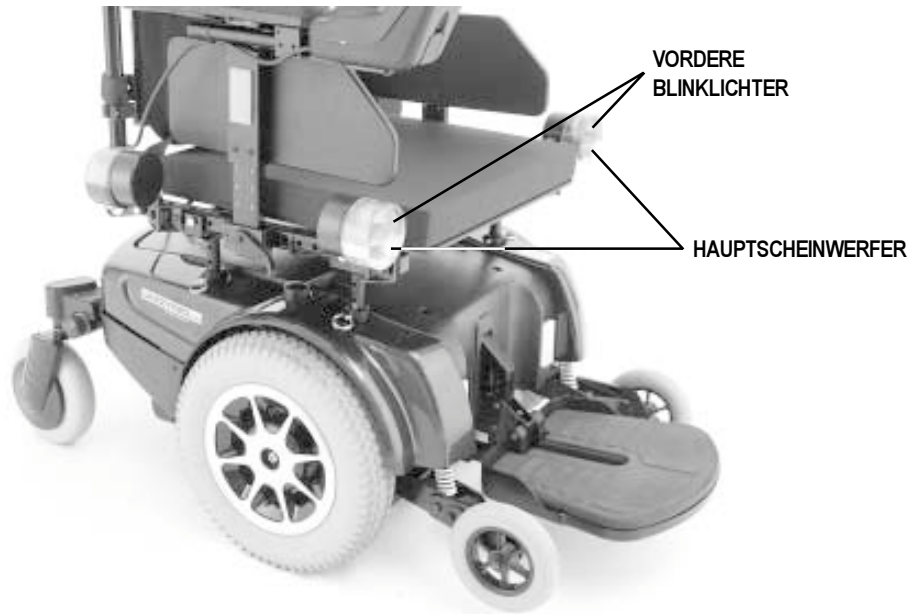

Zeichnung 8. Komplettes Beleuchtungssystem (Vorne)



Zeichnung 9. Komplettes Beleuchtungssystem (Hinten)

Zeichnung 10. "Remote Plus" Steuergeraet Kontroller

III. DER JAZZY 1120₂₀₀₀

Spezifikationen	
Klasse:	B
Max. sichere Steigung:	12%
Max. Steigungsfähigkeit:	12%
Max. Hindernis-Besteigungsfähigkeit:	10cm
Aufhängung:	Volle Aufhängung mit Aktiv-Spur Hintere Lenkrollenaufhängung
Antriebsräder:	36 cm, pneumatisch (solide Räder auf Wunsch erhältlich)
Hintere Lenkrollen:	20 cm, solide, hinten befestigt
Nicht-kippbar:	15 cm, solide, vorne befestigt
Maximale Geschwindigkeit:	9.6 kph
Bremsen:	Elektronisch regenerativ, "Intelligentes Bremsen," Scheibenhandbremse
Bodenfreiheit:	9 cm
Drehradius:	50 cm
Gesamtgröße:	Laenge: 100 cm Breite: 65 cm
Auswahl von Sitzen:	Halbhöhe Rückenlehne (normale Ausstattung) Hohe Rückenlehne mit Kopfstütze Liegesitz Versasitz Versa Schwenkvorrichtung Elektronische Höhenverstellung
Triebstrang:	Zwei-motorig, Mittelrad
Batterien:	Zwei 12-Volt, Batterien Gruppe 24 (NF-22 Batterien bei Wahl der elektronischen Höhenverstellung)
Reichweite:	Bis zu 40 km
Batterieladegerät:	Eingebaut Nicht eingebaut (auf Wunsch)
Motorkontroller:	Dynamische Dolphin Steuerung "Remote Plus" Steuergerät
Gewichtskapazität:	136 kg
Jazzy Gewichte:	Basis: 38 kg Sitz: 13 kg Batterien: jede 20 kg
Garantie:	Lebenslange beschränkte Garantie auf das Gehäuse Zweijährige Garantie auf die elektrische Ausstattung

IV. ZUSAMMENBAU

SITZWINKELEINSTELLUNG

Die Rueckenlehne kann man in vier verschiedene Winkel einstellen entsprechend des Wunsches des Benutzers. Sie koennen folgenden Winkel einstellen: 90°, 102°, 105°, und 107 ° .

Den Winkel einstellen:

1. Benutzen Sie einen Sechskantschluessel und einen 10 mm Schraubenschluessel um den einstellbaren Bolzen an beiden Sitzscharnieren abzumachen.
2. Den gewuenschten Winkel einstellen .
3. Den Bolzen wieder befestigen und anziehen.

SITZ INSTALLIERUNG (SITZ MIT H-RAHMEN)

Das Verfahren der normalen Sitzeinstellungen schliesst den Sitzrahmen (H-Rahmen) und vier (4) einstellbare Sitzpfosten, an der elektronisches Grundbestandteil zu finden, ein.

Den Sitz installieren:

1. Den Sitz auf die hinteren Sitztuerme stellen.
2. Den Sitz zurueck und nach unten schieben bis die Sperrvorrichtungen an beiden Sitzpfosten ineinandergreifen.
3. Das Kontrollkabel in die Verbindung an der elektronischen Versorgungswanne einstecken.
4. Das elektronische Sitzschalterkabel (wenn damit ausgestattet) an der Versorgungswanne einstecken.
5. Das Kontrollkabel zum Armlehnenempfaenger mit einem oder mehreren Bindedraehten befestigen. Siehe Zeichnung 11.
6. Das Kabel so legen, dass es sich nicht in den Sitzscharnieren verklemmt. Siehe Zeichnung 11.




Zeichnung 11. Kontrollkabel Verbindung

STEUERKNUEPPEL INSTALLIERUNG

Abhaengig der verschiedenen Konfigurationen und der Ausstattung, die Sie fuer Ihren Jazzy ausgesucht haben, koennte dieser ohne einen installierten Steuerknueppel in der Armlehne versand worden sein.

Den Steuerknueppel installieren:

1. Einen 5mm Sechskantschluessel benutzen um die Einstellschraube zu entfernen. Siehe Zeichnung 12.
2. Den Steuerknueppel hinein oder heraus aus der Armlehne in die gewuenschte Position schieben. Siehe Zeichnung 12.
3. Die Klemmschraube befestigen.

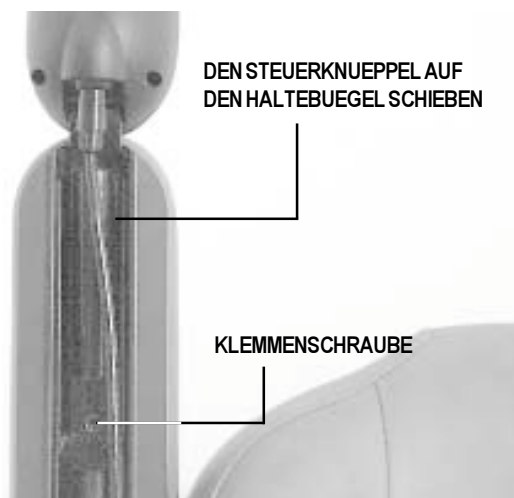

Zeichnung 12. Steuerknueppel Installation

IV. ZUSAMMENBAU

INSTALLATION DES ELEKTRONISCHEN SITZ (SONDERAUSSTATTUNG)


Ihr Jazzy koennte mit der elektronischen Sitzsonderausstattung geliefert werden. Waehrend der Sitz selbst einer von mehreren Stilen, die fuer dieses Modell angeboten werden sein kann, ist die Befestigung des Sitzes am Jazzy unterschiedlich.

Den elektronischen Sitz installieren:

1. Die Sitzwelle mit der Bohrung im Schaft ausrichten. Siehe Zeichnung 13.
2. Den Sitz in den Schaft fuehren und den Sitzhebel nach vorne druecken.
3. Den Sitz in seiner Position befestigen.

VERSA-SITZ ODER VERSA-SCHWENK AUSSTATTUNG

Wenn Ihr Jazzy mit einem Versa-Sitz oder einer Versa-Schwenkausstattung eingerichtet ist beziehen Sie sich auf das mit dem Sitz gelieferten Handbuch.

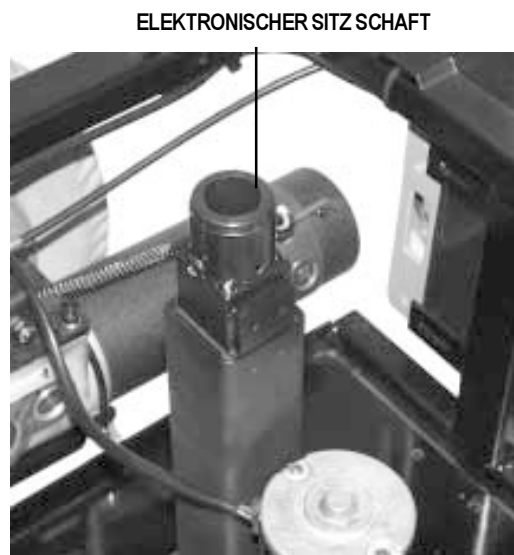

Zeichnung 13. Elektronischer Sitz Schaft

V. BEHAGLICHKEITSEINSTELLUNGEN

Sobald Sie mit der Bedienung Ihres Jazzy's vertraut sind, koennten Sie es notwendig finden, Ihre Sitzposition zu verstellen. Es gibt manche Einstellungen, die Sie selbst durchfuehren koennen, um Ihre Bequemheit zu erhoehen, wie dass Einstellen der Sitzhoehe und -winkel, Armlehnenabstand, Winkel und Hoehe der Steuerkneuppelposition, Hoehe, Tiefe und Winkel der Fusstuetze.



VORSICHT! Wenn Ihr Jazzy bei Ihrem zuständigen Pride Haendler zusammengebaut wurde, beraten Sie sich bitte mit Ihrem Arzt bevor Sie Aenderungen an Ihrer Sitzposition oder andere Einstellungen vornehmen. Manche Aenderungen der vorhandenen Einstellungen koennten die Leistung und die Sicherheit Ihres Jazzy's verringern, in dem Sie den Schwerpunkt veraendern.

SITZHOEHE UND WINKEL


Sie haben eine von zwei Moeglichkeiten die Sitzhoehe zu aendern: entweder manuell oder automatisch. (Wenn mit dem wahlweise elektronisch erhoehbaren Sitz ausgestattet, Siehe "elektronisch erhoehbare Sitzausstattung" nachstehend in diesem Kapitel).

Die Sitzhoehe verstellen:

1. Den Sitz abnehmen. Siehe VI. "Demontierung."
2. Den Fussrahmen abnehmen.
3. Das mittlere Gehaeuse abnehmen bei loesen von zwei 1/4 Drehbefestigern.
4. Den Ballsperrungsstift von jedem Sitzturm abnehmen. Siehe Zeichnung 14.
5. Erhoehen oder erniedrigen Sie jeden Sitzturm in die gewuenschte Position.
6. Den Ballsperrungsstift an jedem Sitzturm installieren.
7. Das mittlere Gehaeuse und den Fussrahmen wieder einbauen.
8. Den Sitz wieder einbauen.

Den Sitzwinkel verstellen:


1. Den Sitzscharnierbolzen mit einem 4mm Sechskantschluessel und einem 11mm Schraubenschluessel abnehmen. Siehe Zeichnung 15.
2. Die Rueckenlehne zum gewuenschten Winkel einstellen und den Sitzscharnierbolzen wieder einstecken.
3. Die Bolzen mit dem Sechskantschluessel und Schraubenschluessel befestigen.

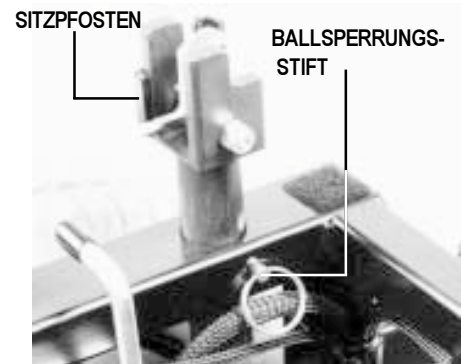

Zeichnung 14. Sitzhoehe



Zeichnung 15. Sitzwinkel

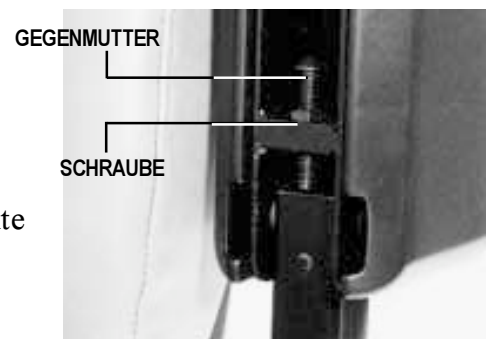

Zeichnung 16. Armlehnenwinkel



Zeichnung 17.
Armlehnenabstand

V. BEHAGLICHKEITSEINSTELLUNGEN

ARMLEHNEN WINKEL

Sie koennen den Armlehnenwinkel auf Ihre spezifischen Beduerfnisse einstellen.

Den Armlehnenwinkel zu verstellen:

1. Die Armlehne gerade hoch heben so dass Sie senkrecht zum Boden steht.
2. Mit dem 11mm Schraubenschluessel die Gegenmutter lockern. Siehe Zeichnung 16.
3. Mit dem 4mm Sechskantschluessel die Einstellschraube lockern.
4. Die Schraube uhrzeigerweise drehen um die Vorderseite der Armlehne zu erniedrigen oder die Schraube gegenuhrzeigerweise drehen um die Vorderseite der Armlehne zur erhoehen.
5. Die Einstellschraube befestigen in dem Sie die Gegenmutter festziehen.

ARMLEHNENABSTAND

Den Armlehnenabstand verstellen:

1. Die zwei Klemmschrauben unter dem Sitz finden. Siehe Zeichnung 17.
2. Die Klemmschraube mit einem Sechskantschluessel lockern.
3. Die Armlehne zum gewuenschten Abstand bringen.
4. Die Klemmschraube wieder befestigen.

ARMLEHNENHOEHE (WAHLWEISE)


Ihr Jazzy kann mit hoeheneinstellbaren Armlehnen ausgestattet werden.

Die Armlehnenehoehe verstellen:

1. Die Klemmschraube unter der Armlehne mit einem 5mm Sechskantschluessel loesen.
2. Den Kugelrastenanschlussstift von der Armlehne loesen .
3. Die Armlehne hoch oder nach unten in die gewuenschte Hoehe einstellen.
4. Die Loecher ausrichten und den Kugelrastenanschlussstift wieder einfuehren.
5. Die Klemmschraube befestigen.

STUERKNUEPPEL VERLAENGERUNG

Der Steuerknueppel/Steuergeraet kann sehr leicht nach vorne oder neben die Armlehne bewegt werden.

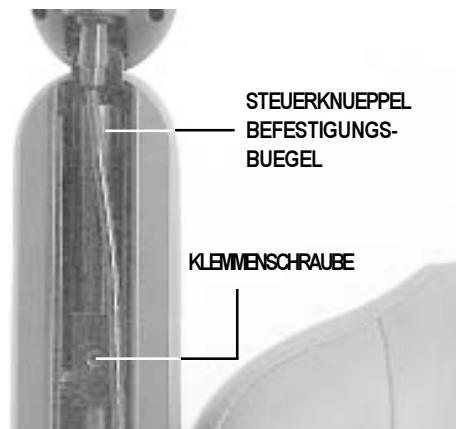

Zeichnung 18.
Steuerknueppelverlaengerung



Zeichnung 19. Beweglicher Steuerknueppel (Vorwaerts Position)



Zeichnung 20. Beweglicher Steuerknueppel (Zurueckgesetzte Position)

V. BEHAGLICHKEITS-EINSTELLUNGEN

Den Steuerknueppel verlaengern:

1. Loesen Sie die Klemmschraube mit einem 5mm Sechskantschluessel. Siehe Zeichnung 18.
2. Schieben Sie die Steuerknueppelplatte hinein oder heraus aus der Armlehne fuer die gewuenschte Position.
3. Die Klemmschraube wieder befestigen.

BEWEGLICHER STEUERKNUEPPEL

SPEPERRUNGSSTIFT

Ihr Jazzy koennte mit einem beweglichen Steuerknueppel ausgestattet sein. Dies erlaubt Ihnen den Steuerknueppel von vorne der Armlehne zur Seite der Armlehne zu verschieben, ohne ihn abzubauen. Siehe Zeichnung 19 und 20.

Der Steuerknueppel kann an der linken oder rechten Seite Ihres Jazzy's festgemacht werden. Setzen Sie sich mit Ihrem zustaeudigen Pride Haendler in Verbindung.

FUSSTUETZENHOEHE

Die Fusstuetzenhoehe kann man leicht in eine von sechs Positionen, in 2,54 cm Abstaenden, einstellen.

Die Fusstuetze erhoehen oder erniedrigen:


1. Die Muttern und die Schraubenbolzen vom Buegel abmachen. Siehe Zeichnung 21.
2. Die Fusstuetze in die gewuenschte Position erhoehen oder erniedrigen.
3. Die Muttern und die Schraubenbolzen wieder in der Fusstuetze installieren und befestigen.

FUSSTUETZENTIEFE

Die Fusstuetzentiefe einstellen:


1. Die Muttern und die Schraubenbolzen vom Buegel abmachen. Siehe Zeichnung 21.
2. Die Fusstuetze ein oder aus zur gewuenschten Tiefe bewegen.
3. Den 8mm Anschlussstift im Buegel installieren.

MUTTERN UND SCHRAUBENBOLZEN

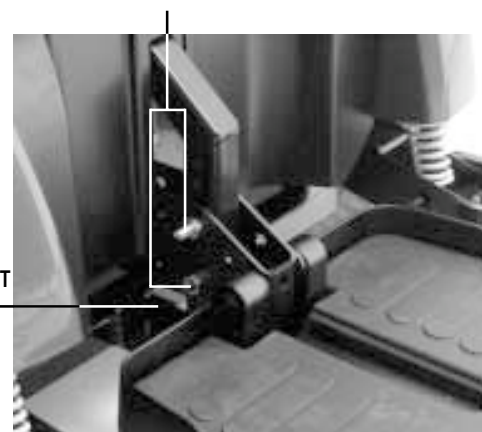

Zeichnung 21. Fusstuetzenhoehe und -tiefe

KLEMMSCHRAUBE

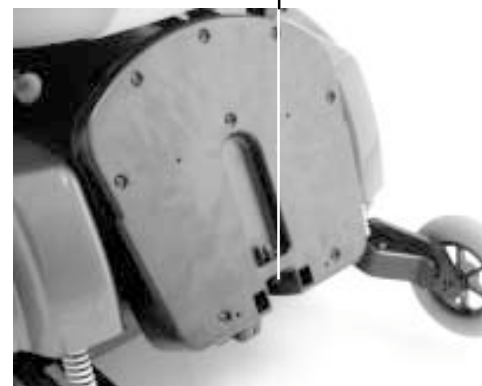

Zeichnung 22. Fusstuetzenwinkel

BFS
LOESUNGSHEBEL



Zeichnung 23. Bewegliche Fusstuetzen

V. BEHAGLICHKEITS-EINSTELLUNGEN

FUSSTUETZENWINKEL

Sie koennen den Fusstuetzenwinkel mit einem 5mm Sechskantschluessel einstellen. Siehe Zeichnung 22.

Den Fusstuetzenwinkel einstellen:

1. Die Klemmschraube uhrzeigerweise drehen um das vordere Teil der Fusstuetze zu erhoehen..
2. Die Klemmschraube gegenuhrzeigerweise drehen um das vordere Teil der Fusstuetze zu erniedrigen.

BEWEGLICHE FUSSTUETZEN (WAHLWEISE)

Bewegliche Fusstuetzen (BFS) sind als Sonderausstattung erhaeltlich. Dies erlaubt Ihnen die Fusstuetze zur Seite zu schwingen, bevor Sie auf oder von Ihrem Jazzy steigen.

Die Fusstuetze bewegen:

1. Den Freigabehebel druecken. Siehe Zeichnung 23.
2. Die Fusstuetze zur Seite schieben.

HOEHENVERSTELLBARE BEINSTUETZEN (WAHLWEISE)

Hoehenverstellbare Beinstuetzen (HBS) bieten Ihnen unzaehlige Einstellungen zwischen 0° – 70° fuer die Beinabwinkelung an sowie eine Beinstuetzenverlaengerung im Bereich von 38 – 51 cm.

Den HBS-Winkel einstellen:

1. Den Freigabehebel druecken. Siehe Zeichnung 24.
2. Die Beinstuetze zum gewuenschten Winkel bewegen.

Die HBS-Hoehe einstellen:


1. Die zwei Schrauben von beiden Seiten der Beinstuetzenverlaengerung installieren. Siehe Zeichnung 25.
2. Die Beinstuetze zur gewuenschte Laenge herausziehen oder zum Kuerzen einschieben.
3. Beide Schrauben wieder an beiden, Seiten der Beinstuetzenverlaengerung installieren.

HOHE RUECKENLEHNE MIT KOPFUETZE (WAHLWEISE)


Wenn Ihr Jazzy mit dem Luxus eines hohen Ruecklehnensitzes ausgestattet ist, koennen Sie auch die Kopfuetze einstellen.

Die Kopfuetzenhoehe einstellen:

1. Den Kopfuetzenloesungsknopf druecken.
2. Die Kopfuetze hoch oder hinunter in die gewuenschte Position bringen. Stuetze rastet ein.

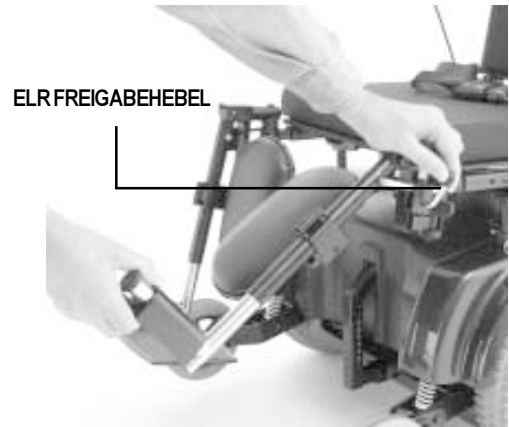

Zeichnung 24. Hoehenverstellbare Beinstuetzen

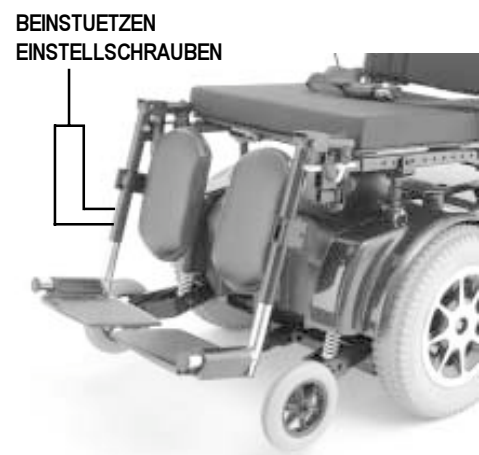

Zeichnung 25. Hoehenverstellbare Beinstuetzen

V. BEHAGLICHKEITS- EINSTELLUNGEN

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNUNGEN FUER DEN ELEKTRONISCH VERSTELLBAREN SITZ

WARNUNG! Nie den Sitz von der niedrigsten Position hoeherstellen wenn Sie sich auf einer Steigung befinden. Nichtbeachten dieser Warnung koennte den Jazzy umkippen und serioese persoenliche Verletzungen mit sich fuehren.



WARNUNG! Nie den Sitz von der niedrigsten in eine hoehere Position bewegen wenn Sie unebene Flaechen befahren. Nichtbeachten dieser Warnung koennte den Jazzy umkippen und serioese persoenliche Verletzungen mit sich fuehren.

WARNING! Niemals den elektronisch verstellbaren Sitz erhoehen wenn der Jazzy im Lehrlaufzustand ist.



Zeichnung 26. Sitzhoehe

VORSICHT! Das Einstellen des elektronisch verstellbaren Sitzes darf nur durchgefuehrt werden wenn der Jazzy auf ebener Flaechen steht oder faehrt.



VORSICHT! Immer den Sicherheitsgurt bei Einstellung des Sitzes angeschnallt haben. Der elektronisch verstellbare Sitz ist so ausgestattet, dass das System, waehrend der Erhoehung des Sitzes von 2,54 – 5,08 cm, die Geschwindigkeit auf die Haelfte reduziert. Vor Benutzung des Jazzy's das System immer auf korrekte Funktion ueberpruefen.

VORSICHT! Ihr Jazzy immer nur auf ebene Flaechen stellen wenn Sie den elektronisch verstellbaren Sitz von einer niedrigen Position erhoehen wollen.

AUSSTATTUNG MIT DEM ELEKTRONISCH VERSTELLBAREN SITZ

Ist Ihr Jazzy mit dem elektronisch verstellbaren Sitz ausgestattet, koennen Sie die Hoeheneinstellung automatisch einstellen. Der Hebel ist entweder an einer der Armlehnen oder am Steuerknuettel festgemacht ("Remote Plus" Steuergeraet).

Die Sitzhoehe verstellen:

1. Um den Sitz zu erhoehen, den Hebel nach vorne bewegen. Siehe Zeichnung 26.
2. Den Hebel zurueckziehen wird den Sitz nach unten bewegen.

V. BEHAGLICHKEITS-EINSTELLUNGEN

NICHT KIPP-BARE RAEDER

Diese nicht-kippbaren Raeder wurden entworfen um Ihrem Jazzy auf unebenen Flaechen erhoehnte Stabilitaet zu gewaehrleisten. Die nicht-kippbaren Raeder werden bereits in der Fabrik auf eine Hoehe von 1,27 cm, von der Bodenflaeche eingestellt. Diese Einstellung ist fuer Benutzung auf ebenen Flaechen oder im Haus gedacht. Sollten Sie vorhaben Ihren Jazzy auf unebenen Flaechen zu benutzen wird es notwendig sein die nicht-kippbaren Raeder entsprechend einzustellen. Die nicht-kippbaren Raeder benoetigen eine Einstellung wenn Nachstehendes auftritt:

- Beim Anhalten der Jazzy uebermaessig nach vorne kippt.
- Die nicht-kippbaren Raeder laufend auf der Bodenflaeche streifen.

ANMERKUNG: Jeder Reifen muss mindestens einen Luftdruck von 30 - 35 atue haben damit die nicht-kippbarem Raeder richtig eingestellt werden koennen.



WARNUNG! Die Reifen zu stark aufpumpen kann diese zum Explodieren bringen mit der Folge von persoenlichen Verletzungen und Beschaedigung von Eigentum.

Einstellen der nicht-kippbaren Raeder:

1. Die innere Klemmschraube an der Haltestange unterhalb der Feder mit einem 13mm Schraubenschluessel festhalten. Siehe Zeichnung 27.
2. Die Klemmschraube gegenuhrzeigerweise drehen und aufschrauben.
3. Mit dem 13mm Schraubenschluessel die Einstellungsnocke auf der gegenueberliegenden Seite der Klemmschraube halten. Siehe Zeichnung 28.
4. Um das nicht-kippbare Rad zu erhoehen, die Nocke gegenuhrzeigerweise drehen. Um das Rad zu erniedrigen, die Nocke uhrzeigerweise drehen.
5. Danach die Klemmschraube uhrzeigerweise drehen und dabei das Rad in der neuen Stellung festhalten.
6. Die Punkte 1-5 fuer das andere Rad wiederholen.



Zeichnung 27. Nicht-kippbare Radeinstellung (Klemmschraube)



Zeichnung 28. Nicht-kippbare Radeinstellung (Nocke)



WARNUNG! Je hoeher Sie die nicht-kippbaren Raeder einstellen desto groesser ist die Gefahr des Jazzy's beim Bremsen nach vorne zu kippen. Sie koennen diese Situation etwas ausgleichen durch eine kleine Aenderung zur vorprogrammierten Einstellung der Geschwindigkeitsverringerung am Steuergeraet oder durch Verschieben des Sitzes nach hinten. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu persoenlichen Verletzungen fuehren .

WARNUNG! Sicherstellen, dass beide nicht-kippbaren Raeder dieselbe Hoeheneinstellung (von der Bodenflaeche) haben. Nichtbeachtung macht Ihr Jazzy einseitig und kann zu persoenlichen Verletzungen fuehren.

VI. DEMONTIERUNG

ABBAU DES SITZES

Zum Transport Ihres Jazzy's koennen Sie den Sitz abbauen. Wenn Sie einen Versasitz haben, beziehen Sie sich auf das Versasitz Instruktionsbetriebshandbuch.

Den Sitz abbauen:

1. Den Jazzy ausschalten.
2. Sichern, dass der Jazzy nicht im Freilaufzustand ist.
3. Das Hauptkabelgeschirr hinter dem Sitz ausstecken.
4. Beide Kolben gleichzeitig vorne am Sitzrahmen niederdruecken waehrend Sie das Sitzvorderteil hochheben. Siehe Zeichnung 29.
5. Den Sitz hochheben und vorsichtig auf die vorderen Sitztuerme auflegen.
6. Den Sitz nach vorne ziehen und von den hinteren Sitztuermen abnehmen.

Den elektrisch verstellbaren Sitz abnehmen:

1. Den Sitz lockern indem Sie den Loesehebel rueckwaerts bewegen.
2. Die Sitzplatte hochheben.
3. Den Sitz vom Schaft abnehmen.

DEN FUSSRAHMEN ABNEHMEN

Der Fussrahmen schuetzt die Jazzy Bestandteile vor Verschmutzungen. Siehe Zeichnung 30. Sie muessen den Fussrahmen abnehmen um die Batterien zu wechseln und die Kabelverbindungen zu ueberpruefen.

Den Fussrahmen Abmachen

1. Den Jazzy ausschalten..
2. Sichern, dass der Jazzy nicht im Freilaufzustand ist. Siehe III. "Der Jazzy 1120₂₀₀₀".
3. Den 8mm Stift an der Basis der Fussplattenklammer finden und abnehmen.
4. Den Fussrahmen ungefaehr 5.08 cm gerade hochheben und in Ihre Richtung ziehen..

BATTERIEABNAHME



WARNUNG! Jeder der 1120₂₀₀₀ Batterien wiegt ungefaehr 20 kg. Gewicht hochheben, das zu schwer ist, koennte zur personlichen Verletzung fuehren.

Die Batterien abnehmen:

1. Den Jazzy ausschalten.
2. Den Fussrahmen abnehmen.
3. Die Abkoppelungen trennen indem Sie sie zu Ihnen ziehen.
4. Jetzt koennen Sie die Batterien von Ihrem Jazzy abnehmen.



Zeichnung 29. Abnahme des Sitzes



Zeichnung 30. Abnahme des Fussrahmens

VII. BEDIENUNG

BEDIENUNG DES DYNAMISCHEN STEUERGERAETES

Es gibt zwei Hauptbestandteile in dem dynamischen computergesteuerten Steuergeraetsystem— die Hauptfernbedienung und das elektronisches Leistungsmodum. Die Hauptfernbedienung erlaubt Ihnen des 1120₂₀₀₀ grundlegende Funktionen wie die Richtung und Geschwindigkeit einschliesslich der Sonderausstattungsfunktionen wie die elektronische Sitzbewegung oder das Schwenksystem zu kontrollieren. Die Fahreigenschaften wie Beschleunigung, Reduzierung und Geschwindigkeit werden von Pride vorprogrammiert. Das dafuer benoetigte Spezialwerkzeug ist ausschliesslich nur fuer Pride Haendler verfuegbar. Infolgendessen, nur Pride Wartungstechniker sind autorisiert Steuergeraete zu programmieren.

“DOLPHIN” FERNBEDIENUNGSTASTENFELD An und Auschalter

Schaltet das Leistungssystem an und aus.



Zeichnung 31. Dynamisches “Dolphin” Steuergeraet



VORSICHT! Wenn Sie Ihren 1120₂₀₀₀ anschalten und der Steuerknueppel ist nicht in Leerlaufstellung (mittlere Position), koennen Sie eine Stoerung im System verursachen. Siehe nachstehend “Aus der Leerlaufstellung nehmen wenn der Jazzy angelassen wird”. Diese Stoerung wuerde mit einem Warnungsblinklicht 1 angezeigt. Sollte dies verkommen, den Jazzy ausschalten und wieder einschalten jedoch sicherstellen, dass sich der Steuerknueppel im Leerlaufzustand befindet (mittlere Position).

LED System Zustand

Zeigt den Systemzustand an. Es ist normalerweise eingeschaltet wenn das System an ist und ist ausgeschaltet wenn das System nicht laeuft. Durch Blinken der Warnlichter zeigt das System Stoerungen an.

Magnetische Absperrung

Schaltet das System aus um unbefugtes Fahren zu vermeiden. Dafuer erhalten Sie einen magnetischen Schluessel der mit Ihrem 1120₂₀₀₀ geliefert wird. Sollten Sie den Schluessel verlieren, setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.

Batteriestandanzeige

Die Batterieanzeige enthaelt zehn LEDs, die in einem Bogen ueber der Batterie Ikone formiert ist. Von links nach rechts sind die ersten Drei rot, die zweiten Vier orange und die letzten Drei gruen. Diese Lichter sind genaue Anzeigen der benutzbaren Batteriekapazitaet. Hat die Batterie mindestens 85% Kapazitaet leuchten alle LEDs. Sowie die Batterievoltts fallen, die Anzahl der LED Anzeigen reduzieren sich von rechts nach links. Wenn die Batteriekapazitaet weniger als 10% betraegt werden die LEDs jede Sekunde aufblinken.

Auswahl eines Fahrprogrammes

Dies erlaubt Ihnen ein Fahrprogramm einzustellen. Siehe nachfolgend “Fahrprogramm”.

VII. BEDIENUNG

Anzeige des Fahrprogrammes (Auch Fernbedienungszustandanzeige)

Dies ist eine siebenteilige LED-Anzeige, die das Fahrprogramm anzeigt.

Fernbedienungszustands LED

Dies blinkt auf wenn eine innere DX Remote Stoerung oder wenn ein "Aus dem Leerlauf nehmen, wenn der Jazzy angelassen wird" Stoerung auftritt. Siehe nachfolgend "Aus dem Leerlauf nehmen, wenn der Jazzy angelassen wird.

Rechte und Linke Blinklichtschalter

Schaltet entweder das linke oder das rechte Blinklicht ein. Einmal druecken um anzuschalten, wieder druecken um auszuschalten. Sie koennen das Blinklicht auch ausschalten in dem Sie den anderen Blinklichtschalter oder die Warnungsanlage betaetigen.

Lichtschalter

Schaltet die Hauptlichter/Ruecklichter unabhaengig von anderen Anzeigen an und aus.

Warnblinkschalter

Schaltet beide Blinklichtanlagen zur selben Zeit an. Diese koennen Sie nur ausschalten indem Sie den Warnblinkschalter nochmal druecken.

Ausloese-Wahlschalter mit LED-Anzeige

Diese koennen bis zu fuenf Ausloeser unabhaengig voneinander kontrollieren. Diese koennen den elektronisch verstellbaren Sitz, die elektronisch verstellbare Fusstuetze , den elektronisch verstellbaren Liegesitz oder den schwenkbaren Sitz kontrollieren. Wenn Ihr Steuergeraet mit Fahrhemmung-waehrend der Ausloesebedienung-programmiert ist, das Fahrhemmungszeichen wird waehrend der Ausloesebedienung angezeigt.

Hupe

Schaltet die Hupe ein.

Steuerknuempelfunktionen

Alle Steuerknuempelfunktionen sind fuer alle Steuergeraetekonfigurationen gleich. Der Steuerknuempel kontrolliert die Richtung und Geschwindigkeit des elektronisch angetriebenen Stuhles. Wenn Sie den Jazzy aus Leerlaufzustand (mittlere Position) nehmen, loest sich die elektromagnetische Bremse und der Jazzy kann sich bewegen. Je weiter Sie den Steuerknuempel von der mittleren Position oder von der Leerlaufstellung nach vorne druecken desto schneller bewegt sich der Jazzy. Wenn Sie den Steuerknuempel loslassen und ihn wieder in die mittlere Position bringen werden die elektromagnetischen Bremsen eingeschaltet. Dadurch wird der Jazzy langsamer und kommt zum kompletten Stillstand. Sie koennen auch den Steuerknuempelkontrollausloeser benutzen.

Das magnetische Absperrsystem einschalten:

1. Den magentischen Schluessel an oder neben das Schluesselsymbol halten. Das System piepst und schaltet sich automatisch aus. Keine LED-Anzeigen sollte aufleuchten.

VII. BEDIENUNG



WARNUNG! Den An- und Auschalter nicht benutzen um den Jazzy zum Anhalten zu bringen. Persönliche Verletzung koennten die Folge sein.

2. Den An- und Ausschalter druecken um den Jazzy einzuschalten. Das Schluesselsymbol wird aufblinken jedoch werden Sie ihn nicht fahren koennen. Dies heisst, dass er immer noch gesperrt ist.
3. Den magnetischen Schluessel nochmals an oder neben das Schluesselsymbol halten um das System aufzusperrern. Wenn das Schluesselsymbol nicht mehr aufblinkt koennen Sie Ihren 1120₂₀₀₀ wieder fahren.

Sollten Sie den 1120₂₀₀₀ einschalten solange er gesperrt ist und nicht innerhalb einer Minute aufsperrern wird er sich automatisch abschalten.

Fahrgeschwindigkeits-Modus

Ihr 1120₂₀₀₀ ist auf fuenf verschiedene Geschwindigkeiten —1 (langsamste) zu 5 (schnellste) bereits in der Fabrik vorprogrammiert worden. Das Programm-Modus ist mit einer Nummer in der Mitte des Tastenfelds angezeigt. Den Geschwindigkeitsauswahlknopf druecken um den Modus zu aendern.

Batterien-Spareigenschaft

Wenn die Batteriekapazitaet unter 21 V (zwei LEDs) faellt, das Steuergeraet verringert automatisch die Leistung des Jazzy's um den Strom der Batterien zu sparen.

Stoerungs-Code

Entdeckt Ihr Steuergeraet eine Stoerung im System, die Systemstandanzeige wird einen Code aufblinken. Siehe Fehlerortung.

Aus dem Leerlauf waehrend des Einschaltens

Ihr Steuerknuettel ist mit der Eigenschaft "Aus dem Leerlauf waehrend des Einschaltens" ausgestattet. Wenn Sie das System einschalten und Ihr Steuerknuettel nicht in der neutralen Position ist, leuchtet die Systemstandanzeige laufend auf und zwar solange bis Ihr Steuerknuettel aus der neutralen Position genommen wird oder fuenf Sekunden. Sollte dies geschehen sein und alle Segmente an der Systemstandsanzeige blinken haben Sie wahrscheinlich Code 1 ausgeloeset.

Die Dolphinausloesebedienung

Das Dolphin Tastenfeld besitzt die Moeglichkeit bis zu fuenf Ausloeser zu kontrollieren. Sie kontrollieren durch die Ausloesertasten am Steuerknuettel.

Den Dolphinausloeser bewegen:

1. Die Ausloesertasten druecken.
2. Den Steuerknuettel etwas ueber den halben Weg nach Vorne oder nach Hinten bewegen um den Ausloeser zu bewegen.

Ruhestellung

Eine besondere Eigenschaft des 1120₂₀₀₀ ist die Ruhestellung. Die Ruhestellung ist ein eingebauter Stromkreis, der den Jazzy automatisch abschaltet sollte der Steuerknuettel fuer einen bestimmten Zeitraum nicht in irgendeine Richtung bewegt wird. Diese Zeitspanne ist in Ihrem Steuerknuettel vorprogrammiert. Die Batteriezustandslichter am Steuerknuettel werden jede 5 Sekunden aufblinken wenn der Jazzy in

VII. BEDIENUNG

Ruhestellung ist. Um die Elektrizitaet wieder einzuschalten und weiterzufahren muessen Sie den An/Ausschalter zweimal druecken.

Thermostat

Beide 1120₂₀₀₀ Steuergeraete sind mit einem Thermostat ausgestattet. Dieser Thermostat ueberwacht die Temperatur der Motoren und Steuergeraete. In dem Falle, dass die Motoren oder Steuergeraete ueberhitzt werden (ueber 50°C), das Steuergeraet reduziert die Motorvolts. Fuer jedes Grad ueber 50°C wird das Steuergeraet fuef Volt reduzieren. Dies wiederum reduziert die Geschwindigkeit und gibt den Bestandteilen Zeit zum Abkuehlen. Sobald die Temperatur wieder einen normalen Zustand erreicht hat, wird Ihr 1120₂₀₀₀ zur ueblichen Geschwindigkeit zurueckkehren.

Stoerungs-Code

Ihr Steuergeraet ist programmiert um Stoerungen innerhalb des eigenen Systems zu finden. Sollte etwas am Steuergeraetsystem geschehen, das Ihren 1120₂₀₀₀ vom Fahren abhaelt, wird ein Stoerungscode aufblinken. Ein Stoerungscode wird angezeigt durch pulsierendes Aufleuchten der Systemstandsanzeige. Die Systemstandsanzeige wird einige Zeit aufblinken, fuer ungefaehr 2 Sekunden ruhen, dann wieder aufblinken. Stoerungen, die die Sicherheit Ihres 1120₂₀₀₀ gefaehrden wird den 1120₂₀₀₀ zum Anhalten bringen, weaehrend nicht so schwerwiegende Stoerungen Ihnen erlauben den Jazzy weiterhin zu bedienen. Manches Aufblinken wird von selbst aufhoeren sollte sich der Zustand sich von selbst verbessern. Andere koennen nur durch An- und Einschalten beseitigt werden.

Sollten Sie eine der korrigierenden Handlungen durchfuehren machen Sie als Erstes sicher, dass die Batterien voll geladen sind und das System abschalten bevor Sie die elektronischen Bestandteile ueberpruefen. In jedem Fall sollte die korrigierende Handlung nicht zu Ihrer Zufriedenheit ausarbeiten benachrichtigen Sie Ihren zustaendigen Pride Haendler.

Code	Bezeichnung	Behebungsaktionen
1	DX Modus Fehler	Das Steuergeraet aus- und einschalten. Sollte dies nicht arbeiten, die Verbindungen am Steuerknueppel pruefen, den Elektromodus sowie jedes andere Zubehoermodus das Ihr Jazzy hat. Sollte dies immer noch nicht arbeiten, benachrichtigen Sie Ihren zustaendigen Pride-Haendler.
2	DX Zubehoer Fehler	Jazzy ausschalten und alle Verbindungen zum Zubehoer pruefen. Eine der Sicherungen koennte einen Kurzschluss haben (z. B. eine Lichtbirne ist nicht in Ordnung).
3	Motor Fehler links	Die Verbindung zwischen dem Elektromodus und dem linken Motor pruefen. Sie koennten eine schlechte Verbindung oder Kurzschluss haben, oder Motor ist nicht mehr gut.
4	Motor Fehler rechts	Die Verbindung zwischen dem Elektromodus und dem rechten Motor pruefen. Sie koennten eine schlechte Verbindung oder Kurzschluss haben, oder Motor ist nicht mehr gut.
5	Fehler Handbremse links	Die Verbindung zwischen dem Elektromodus und dem linken Motor pruefen. Sie koennten eine schlechte Verbindung oder Kurzschluss haben.
6	Fehler Handbremse rechts	Die Verbindung zwischen dem Elektromodus und dem rechten Motor pruefen. Sie koennten eine schlechte Verbindung oder Kurzschluss haben.
7	Fehler Batterieladung niedrig	Die Batterieverbindungen und Pole pruefen. Pruefen ob der Stromkreisunterbrecher einen Kurzschluss hat. Re-set wenn notwendig.
8	Fehler Batterieladung zu hoch	Setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.
9	CANL Fehler	Setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.
10	CANH Fehler	Setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.
11	Fehler - Absterben	Das System ab- und dann wieder anschalten.
12	Modus passt nicht zusammen	Setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.

VII. BEDIENUNG

REMOTE PLUS STEUERGERAET

Der "Remote Plus" Steuergeraet System besteht aus dem Steuerknueppel (siehe Zeichnung 32) und dem Steuergeraetkasten. Der Steuerknueppel schickt ueber ein Kabel, das hinten am Steuerknueppel befestigt ist, zum Steuergeraetkasten Signale. Das Kabel ist durch die Leistungswanne mit dem Steuergeraetkasten verbunden. Der "Remote Plus" Steuerknueppel ist normalerweise am Ende der rechten oder linken Armlehne befestigt. Der "Remote Plus" Steuergeraetkasten ist vorne an dem elektronischen Grundbestandteil unten angebracht.

Steuerknueppel Funktionen

Die Steuerknueppel Funktion ist aehnlich aller Steuergeraet Konfigurationen. Der Steuerknueppel kontrolliert die Richtung und die Geschwindigkeit des Jazzy's. Siehe Zeichnung 33. Wenn Sie den Steuerknueppel von der Leerlaufposition (mittleren) bewegen, loesen sich die elektromagnetischen Bremsen und der Jazzy bewegt sich. Je weiter Sie den Steuerknueppel von der Leerlaufposition wegfuehren, desto schneller bewegt sich Ihr Jazzy. Wenn Sie den Steuerknueppel loslassen und ihn wieder in die Leerlaufstellung zurueckkommen lassen, schalten sich die elektromagnetischen Bremsen ein. Dies laesst Ihr Jazzy langsamer werden und zum Anhalten bringen. Sollte sich Ihr Jazzy auf unvorhergesehene Art und Weise bewegen lassen Sie den Steuerknueppel sofort los. Es sei denn, dass der Steuerknueppel beschaedigt ist sollte diese Handlung den Jazzy zum Anhalten bringen.



WARNUNG! Benutzen Sie nie den Ein- und Ausschalter um den Jazzy zum Halten zu bringen. Dies koennte zur Verletzungen fuehren.

Batteriezustands-Messgeraet


Das Batteriezustands-Messgeraet besteht aus LEDs oberhalb der Geschwindigkeitsanzeige. Siehe Zeichnung 32. Die Leuchten zeigen Ihnen den genauen Batterienzustand an. Sie machen Sie auch auf jegliche Stoerungen innerhalb Ihres Jazzy's aufmerksam. Siehe "Fehler Code" auf der folgenden Seite.

An/Ausschalter


Der An- und Ausschalter schaltet den Jazzy an und aus.

Hupenknopf


Dieser Knopf loest die Hupe aus.

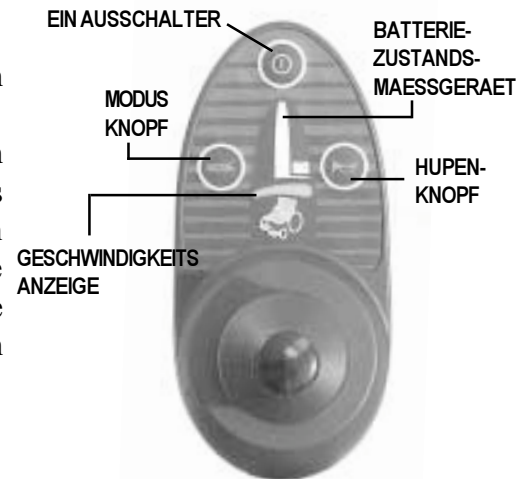

Zeichnung 32. "Remote Plus" Steuerknueppel Ausstattung

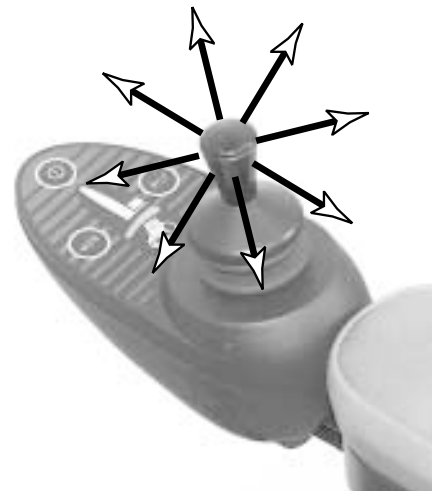

Zeichnung 33. Steuerknueppel Bewegung

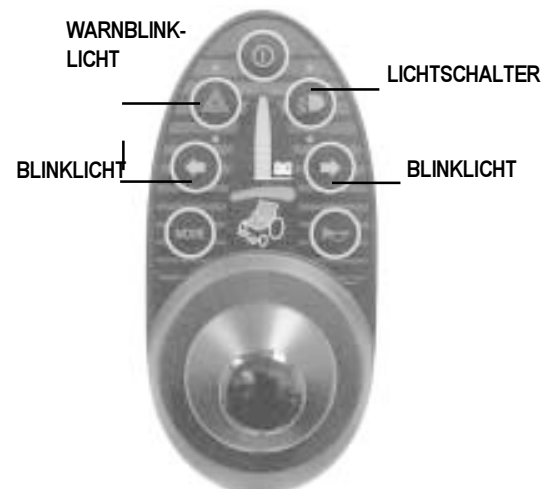

Zeichnung 34. "Remote Plus" Sonderausstattungen

VII. BEDIENUNG

Geschwindigkeits- und Ausloesereinstellungen

Der "Remot Plus" Steuerknueppel ist mit einem Modusknopf und einem Geschwindigkeitsanzeiger ausgestattet. Siehe Zeichnung 32. Mit dem Modusknopf haben Sie zu den verschiedenen Funktionen Zugang. Mit Betaetigen des Modusknopfes koennen Sie die maximale Fahrgeschwindigkeit einstellen. Um die allgemeine Geschwindigkeit zu erniedrigen oder erhoehen, betaetigen Sie den Knopf einmal. Den Steuerknueppel nach rechts druecken erhoehrt die Geschwindigkeitseinstellung. Den Steuerknueppel nach links druecken erniedrigt die Geschwindigkeitseinstellung. Die Geschwindigkeitsanzeigen LEDs leuchten von links nach rechts auf. Wenn ein LED leuchtet ist die Geschwindigkeit auf das Langsamste eingestellt. Wenn alle fuenf LEDs aufleuchten ist die Geschwindigkeit auf das Schnellste eingestellt. Nachdem Sie Ihre gewuenschte Geschwindigkeit ausgesucht haben, betaetigen Sie den Knopf um weiterzufahren oder bewegen sie einfach den Steuerknueppel nach vorne oder hinten und Ihr Jazzy wird in der festgelegten Geschwindigkeit fahrbereit sein.

ANMERKUNG: Fuer Ihre ersten Fahrten mit Ihrem Jazzy empfehlen wir die Geschwindigkeit auf der langsamsten Einstellung zu haben, bis Sie sich mit Ihrem Jazzy sicherer fuehlen.

Ist Ihr Jazzy mit einem elektronischen Sitz ausgestattet, koennen Sie das dazugehoerige Steuergeraet durch zweimaliges Druecken des Modusknopfes betaetigen. Den Steuerknueppel nach rechts schieben fuer die gewuenschte Sitzfunktion. Die LED-Anzeige wird in verschiedenen Positionen aufleuchten und damit anzeigen welche Sitzfunktion ausgeloeset ist. Wenn die LED-Anzeige an der richtigen Stelle aufleuchtet, den Steuerknueppel nach vorne, um den Schaft zu erhoehen, druecken oder den Steuerknueppel zu sich ziehen um den Schaft zu erniedrigen. Um in Fahrstellung zurueckzukommen den Modusknopf erneut druecken.

FEHLER-CODE

Zusaetzlich zum Zustand der derzeitigen Batterieladung kann das Batteriezustandsmessgeraet eventuelle Stoerungen am Jazzy anzeigen. Das Batteriezustandsmessgeraet hat zehn verschiedene Querstriche. Diese Querstriche geben Ihnen Information durch Aufleuchten an. Leuchtet das Messgeraet schnell auf zeigt das Steuergeraet wahrscheinlich eine Stoerung auf. Zum Beispiel, der erste, rote Querstrich leuchtet schnell auf zeigt an, dass die Batterie fast leer ist. Nachstehend eine Liste mit moeglichen Fehlern angezeigt durch rasches Aufleuchten der Querstriche am Messgeraet.

VII. BEDIENUNG

Aufleuchtende LEDs	Diagnose	Loesung
10 gruen	Hohe Batterievoltage	Batterien pruefen
9 gruen	Solenoid Bremsen Fehler	Motor/Bremsleitungen pruefen
8 gruen	Moegliche Steuergereate Stoerung	Pride Haendler benachrichtigen
7 gelb	Steuerknuettel Stoerung	Pride Haendler benachrichtigen
6 gelb	Sperrung aktiv	Ladegeraet ausschalten/Verbindungen pruefen
5 gelb	Rechtes Motorkabel Fehler	Rechtes Motorkabel pruefen
4 gelb	Rechter Motor ausgeschaltet	Rechtes Motorkabel pruefen
3 rot	Linkes Motorkabel Fehler	Linkes Motorkabel pruefen
2 rot	Linker Motor ausgeschaltet	Linkes Motorkabel pruefen
1 rot	Niedrige Batterievoltage	Batterien/Batterienkabel pruefen

Sollten Sie das Problem nicht loesen koennen, benachrichtigen Sie Ihren zustaendigen Pride Haendler.

“REMOTE PLUS” ZUSAETZLICHE AUSSTATTUNGEN

Siehe Zeichnung 34 bezueglich nachstehender Ausstattungen:

- **Lichtschalter:** Ist Ihr Jazzy mit der “DELUXE” Lichtenanlage ausgestattet, gibt es dafuer am Steuerknuettel einen Schalter. Wenn Ihr Jazzy eingeschaltet ist, aktiviert der Schalter das Licht.
- **Blinklichter:** Die Pfeilknoepfe aktivieren die Blinklichter egal ob der Jazzy ein- oder ausgeschaltet ist.
- **Warnblinklicht:** Der Schalter betreibt das Warnblinklicht.
- **Elektronische Sitzverstellung (nicht illustriert):** Diese Schalter schliessen die Notwendigkeit fuer einen zusaetzlichen elektronischen Sitzverstellungsschalter aus.

V III. BATTERIEN UND BATTERIELADUNG

BATTERIEN

Ihr Jazzy benutzt zwei langhaltende, 12-Volt, jederzeit aufladbare Batterien, die verschlossen und wartungsfrei sind. Weil sie verschlossen sind, brauchen Sie die Batteriesaeure (Fluessigkeit) nicht untersuchen. Jedezeit aufladbare Batterien sind entworfen um laengere und oeftere Entladungen aufzunehmen. Obwohl Sie Aehnlichkeiten zu Autobatterien haben, sind sie nicht auswechselbar. Autobatterien sind nicht entworfen worden lange und oeftere Entladung zu ertragen, und sind nicht sicher fuer die Benutzung im elektronisch angetriebenen Stuehlen.



WARNUNG! Batteriepfosten und alle Batteriezuhoere enthalten Blei und Bleiverbindungen. Haende waschen nach Beruehrung.

BATTERIEN AUFLADEN

Batterien Aufladung:

1. Stellen Sie Ihren Jazzy neben eine normale Steckdose.
2. Sichern, dass das Steuergeraet aus ist.
3. Den Stecker von der elektronischen Versorgungswanne abnehmen.
4. Das 3-Stifte Verlaengerungskabel ins Aufladegeraet einstecken und dann in die Versorgungswannenverbindung.
5. Das Aufladegeraet in die Steckdose einstecken.
6. Das Amperemessgeraet zeigt an wieviel Ladung die Batterien benoetigen. Ungefaher eine Minute warten bis das Ladegeraet warm ist. Das Amperemessgeraet sollte 5 Ampere anzeigen und dann wieder in die 0-Stellung gehen.
7. Wir empfehlen die Batterien zwischen 8-14 Stunden aufzuladen. Sowie sich die Batterien aufladen, die Amperemessgeraetnadel bewegt sich langsam zu 0. Wenn die Batterien voll aufgeladen sind, vibriert die Nadel an oder um 0 auf der Amperemessgeraetskala.
8. Wenn die Jazzybatterien aufgeladen sind, das Ladegeraet aus der Steckdose ausstecken.
9. Das Ladegeraet von der Versorgungswanne abnehmen.
10. Den Stecker wieder in die Versorgungswanne einstecken.

ANMERKUNG: Ist der Stecker nicht in die Versorgungswanne eingesteckt, laeuft Ihr Jazzy nicht..

11. Die hintere Haube wieder befestigen.

EINFAHREN NEUER BATTERIEN

Zum Einfahren neuer Batterien fuer maximale Leistungsfahigkeit:

1. Neue Batterien vor der ersten Benutzung voll aufladen. Dies bringt die Batterien zu 90% ihrer vollen Leistung.
2. Den Jazzy im Hause und Garten fahren. Bewegt sich zuerst langsam, fahren Sie jedoch nicht zu weit bis Sie sich an Ihr Jazzy gewoehnt haben und die Batterien eingefahren sind.
3. Laden Sie die Batterien nochmals fuer 8-14 Stunden auf, dann fahren Sie Ihr Jazzy wieder. Die Batterien sollten nun ueber 90% ihrer Leistung erbringen.
4. Nach vier oder fuenf Aufladungen sollten die Batterien 100%ige Leistung bringen und fuer einen laengeren Zeitraum zur Benutzung bereit sein.

VIII. BATTERIEN UND BATTERIELADUNG

BATTERIEN UND AUFLADUNG—LAUFEND GESTELLTE FRAGEN

Kann ich ein anderes Ladegeraet benutzen?

Nur das Ladegeraet mitgeliefert mit Ihrem Jazzy benutzen. Es ist das sicherste und leistungsfahigste Werkzeug um die Batterien aufzuladen. Wir empfehlen grundsatzlich keine anderen Batterien zu benutzen.

Wie oft muss ich die Batterien laden?

Viele Faktoren muessen Sie bei der Entscheidung, wie oft die Batterien geladen werden sollten, beruecksichtigen. Es koennte sein, dass Sie Ihr Jazzy taeglich den ganzen Tag fahren oder vielleicht auch fuer Wochen nicht benutzen.

■ Taegliche Benutzung

Benutzen Sie Ihr Jazzy taeglich, sollten Sie die Batterien nach Beendigung des Tages aufladen. Ihr Jazzy ist dann jeden Morgen fuer den taeglichen Gebrauch vorbereitet. Es wird empfohlen, dass Sie die Batterien 8-14 Stunden aufladen nach einem ganzttaegigen Gebrauch. Die Batterien nicht laenger als 24 Stunden aufladen.

■ Periodische Benutzung

Benutzen Sie Ihr Jazzy nur ab und zu (einmal in der Woche oder weniger) sollten Sie die Batterien wenigstens einaml in der Woche fuer 12-14 Stunden aufladen.

ANMERKUNG: Die Batterien immer aufgeladen halten und totale Entladung vermeiden. Die Batterien nie laenger als 24 Stunden aufladen.

Wie kann ich die maximale Laufzeit oder Entfernung pro Ladung erreichen?

Selten werden Sie auf ideale Fahrzustaende stossen-wie glatte, flache, harte Fahrflaechen ohne Wind und Kurven. Sie werden oft auf Berge, Buergersteigrisse, unebene und lockere Flaechen , Kurven und Wind stossen. All diese Faktoren haben eine bestimmte Auswirkung auf die Entfernung oder die Laufzeit Ihrer Batterieladung. Nachstehend einige Vorschlaege um maximale Laufzeit pro Ladung zu erhalten.

- Die Batterien immer voellig aufladen bevor Sie Ihr Jazzy benutzen.
- Behalten Sie immer einen **30 - 35 atue** Druck in Ihren Reifen
- Planen Sie Ihre Fahrstrecke so, dass sie keine Steigungen einschliesst.
- Beschraenken Sie Ihr Gepaeck auf notwendige Stuecke.
- Halten Sie gleichmaessige Geschwindigkeit und vemeiden Sie Stop-und-Go fahren.

Welche Type von Batterie sollte ich benutzen?

Wir raten zu versiegelt, immer aufladbare Batterien, die wartungsfrei sind. Beide, versiegelte Blei-Saeure und Gel-Zellen Batterien welche in der Leistung aehnlich sind.



WARNUNG! Batteriepfosten, Anschluesse und zugehoerige Bestandteile enthalten Blei und Bleiverbindungen. Immer nach Beruehrung die Haende waschen.

VIII. BATTERIEN UND BATTERIELADUNG

Die folgenden Spezifikationen angeben, wenn Sie neue Batterien bestellen:

Batteriespezifikationen	
Typ:	Laufend aufladbar, versiegelte Bleisaeure oder Gel-Zellen
Groesse:	Gruppe 24
Volt:	12 Volt jede
Ampere:	70 oder 80 Amperestunden
Groesse:	NF-22 (nur fuer Ausstattung mit elektronischem Sitz)
Volt:	12 Volt jede
Ampere:	45 - 55 Ampere

Warum scheinen meine neuen Batterien schwach zu sein?

Laufend aufladbare Batterien haben eine andere chemische Zusammenstellung als Autobatterien, Nickel-Cadmium-Batterien (nicads) oder jede andere gewoehnliche Batterie. Laufend aufladbare Batterien sind spezifisch dazu entworfen worden um Strom zur Verfuegung zu stellen, die Ladung zu leeren und dann eine relative schnelle Wiederaufladung anzunehmen. Diese Batterien sollten so oft wie moeglich aufgeladen werden, denn Sie haben kein "Gedaechtnis" wie Nickel-Cadmium-Batterien.

Wir arbeiten in engem Zusammenhang mit unserem Batteriehersteller um Ihnen die fuer den Jazzy'z spezifisch elektrische Forderung ausgestatteten Batterien zur Verfuegung zu stellen. Neue Batterien kommen taeglich bei Pride an und werden voll geladen sofort verschifft. Waehrend dem Versand stossen die Batterien auf extreme Temperaturenwechsel, die die Anfangsleistung beeinflussen koennten. Hitze entleert die Batterie und Kaelte verlangsamt den Stromausstoss und verlaengert den Zeitraum bis zur naechsten Aufladung (genau wie bei einer Autobatterie). Es koennte einige Tage dauern bis sich die Temperatur der Batterien stabilisiert und sich ihrer Umgebungstemperatur anpassen. Viel wichtiger ist, dass die Batterien einige Male aufgeladen werden um das kritische chemische Gleichgewicht, das wichtig ist, um die Hoechstleistung und langes Leben der Batterien zu gewaehrleisten. Nehmen Sie sich die Zeit um die Batterien richtig einzufahren.

ANMERKUNG: Die Lebenszeit einer Batterie ist oft ein Spiegelbild der Sorgfalt, die sie erhalten.

Wie kann ich maximales Batterieleben sicherstellen?

Eine voellig aufgeladene Batterie stellt eine zuverlaessige Leistung und verlaengertes Leben sicher. Die Batterien Ihres Jazzy's immer voll aufgeladen halten. Batterien, die immer leer sind oder nicht voll aufgeladen werden, koennten stark beschaedigt werden und somit zur unzuverlaessigen Jazzy-Leistung fuehren sowie zu einer verkuerzten Lebensdauer.

Wie soll ich meinen Jazzy und die Batterien lagern?

Sollten Sie Ihr Jazzy nicht regelmaessig benutzen, empfehlen wir, um die Lebensdauer der Batterien zu erhalten, die Batterien wenigstens einmal in der Woche aufzuladen. Sollten Sie planen Ihr Jazzy fuer einen laengeren Zeitraum nicht zu benutzen, laden Sie die Battrien voll auf. Trennen Sie die Batteriekabel von den Anschlussklemmen und lagern Sie Ihr Jazzy in einer warmen, trockenen Umgebung. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen wie Frost und zu heisse Bedingungen und versuchen Sie nie eine gefrorene Batterie aufzuladen. Eine kalte oder gefrorene Battrie sollte fuer einige Tage langsam erwaermt werden bevor sie aufgeladen wird.

VIII. BATTERIEN UND BATTERIELADUNG

ANMERKUNG: Sollten Sie Ihr Jazzy fuer laengere Zeit aufbewahren, sollten Sie die Einheit erhoehrt, mit einigen Brettern unter dem Rahmen, abstellen. Dies hilft dabei, dass die Reifen keine Druckstellen entwickeln (abgefahren).

Oeffentliche Verkehrsmittel?

Sollten Sie sich vornehmen mit Ihrem Jazzy oeffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, muessen Sie sich zuerst mit den zustaendigen Firmen in Verbindung setzen um die spezifischen Beduerfnisse zu erfragen. Siehe II. "Sicherheit" fuer naehere Einzelheiten.

Versiegelte Blei-Saeure und Gel-Zellen Batterien sind entworfen fuer elektronsiche bewegbare Stuehle und andere Mobilfahrzeuge. Im Allgemeinen sind diese Batterien sicher zum Transportieren in allen Arten von Befoerderungsmitteln wie Flugzeuge, Busse und Zuege. Wir empfehlen Ihnen jedoch sich mit der entsprechenden Transportfirma in Verbindung-bezueglich des Transportes und Verpackung-zu setzen.

Was ist mit Verschiffen?

Sollten Sie den Wunsch haben eine Transportfirma mit der Verschiffung zu beauftragen, verpacken Sie Ihr Jazzy in die originale Verpackung und senden Sie die Batterien separat.

ROUTINE WARTUNG

Ihr Jazzy ist ein anspruchsvoller elektronisch angetriebener Stuhl. Wie jedes andere motorisierte Fahrzeug benoetigt er regelmaessige Wartungsdienste. Sie koennen einige selbst durchfuehren, andere benoetigen die Hilfe Ihres zustaendigen Pride Haendler. Vorbeugende Wartung ist sehr wichtig. Wenn Sie die Wartung, wie in diesem Teil beschrieben, regelmaessig durchfuehren koennen Sie sicher sein, dass Ihr Jazzy fuer Jahre sorgenfrei laufen wird. Sollten Sie irgendwelche Zweifel bezueglich der Wartung Ihres Jazzy's haben, stellen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung. Ihr Jazzy, wie meist alle elektrischen Ausstattungen, ist sehr empfaenglich fuer Stoerungen von ausserhalb. Vermeiden Sie auf jeden Fall jede Art von Feuchtigkeit.



VORSICHT! Direkter Einfluss von Wasser oder Feuchtigkeit koennte Ihr Jazzy elektronisch und mechanisch versagen lassen. Wasser fuehrt bei den elektronischen Bestandteilen zur Korrosion und zum Verrosten des Rahmen.

Sollte Ihr Jazzy mit Wasser in Beruehrung kommen:

1. Ihr Jazzy so gut wie moeglich mit einem Tuch abtrocknen.
2. Ihr Jazzy in einem warmen, trockenen Platz 12 Stunden abstellen damit nicht gesehenes Wasser verdampfen kann.
3. Steuerkneueppelfunktion und Bremsen kontrollieren, bevor Sie den Jazzy fahren.
4. Sollten Sie Unregelmassigkeiten feststellen, nehmen Sie Ihr Jazzy zu Ihrem zustaendigen Pride Haendler.

TEMPERATUR

Manche Teile Ihres Jazzy's sind sehr empfindlich bei Temperaturwechsel. Halten Sie Ihr Jazzy wenn moeglich in Temperaturen zwischen 18°F/-8°C und 122°F/50°C.

- In extrem kalten Temperaturen koennten die Batterien gefrieren. Ein genauer Gefrierpunkt haengt von einigen Faktoren wie Batterieladung, Benutzung, welche Art der Batterien (Blei-Saeure oder Gel-Zellen) ab.

IX. PFLEGE UND WARTUNG

- Temperaturen ueber 50°C koennte Ihr Jazzy verlangsamen. Die Verlangsamung ist eine in das Steuergeraet eingebaute Sicherheit, die Schaden am Motor und anderen elektrischen Bestandteilen verhindern soll. Siehe VII. "Bedienung."

ALLGEMEINE RICHTLINIEN

- Vermeiden Sie am Steuergeraet zu klopfen oder es anstossen, besonders den Steuerknuettel.
- Vermeiden Sie die Aussetzung Ihres Jazzy's zu extremer Hitze, Kaelte und Feuchtigkeit.
- Steuergeraet sauber halten.
- Alle Steuergeraetverbindungen an der elektornischen Versorgungswanne kontrollieren um sicherzustellen, dass alle fest und ordentlich gesichert sind.
- Wenn das Batteriezustandsmessgeraet voll aufleuchtet sind die Batterien voll aufgeladen und das Steuergeraet und das elektronische System sind in Ordnung.

WARNUNG! Jede Batterie wiegt ungefaehr 38 Pfund. Sollten Sie nicht faehig sein dieses Gewicht zu heben, fragen Sie fuer Hilfe. Sich ueberheben kann zur Verletzung fuehren.



WARNUNG! Batterieposten, Anschluesse und Zubehoer enthalten Blei und Bleiverbindung. Haende nach Beruehrung waschen.

WARNUNG! Die Batterien vor dem Einfrieren schuetzen und niemals eine gefrorene Batterie laden. Aufladen einer gefrorenen Batterie koennte zu persoenlichen Verletzungen und Beschaedigung der Batterie fuehren.

- Sollte ein rotes Licht am Batteriezustandsmessgeraet langsam aufblinken benoetigen die Batterien Aufladung, das Steuergeraet und das elektronische System sind in Ordnung .
- Blinkt die Leuchte am Batteriezustandsmessgeraet laufend auf hat das Steuergeraet eine Stoerung entweder innerhalb des eigenen Stromkreises oder des Jazzy's entdeckt. Siehe VII. "Bedienung."
- Sicherstellen, dass Ihre Reifen einen Druck von 30 - 35 atue haben. Siehe Zeichnung 35.
- Benutzen Sie ein Gummischutzmittel um die Reifenseiten zu schuetzen.

WARNUNG! Sicherstellen, dass Ihre Reifen einen Druck von 30-35 atue haben. Die Reifen duerfen keinen Unter- oder Ueberdruck haben. Unterdruck koennte dazu fuehren, dass Sie die Kontrolle verlieren, Reifen mit Ueberdruck koennten explodieren. Serioese persoenliche Verletzungen koennten daraus resultieren.



WARNUNG! Pumpen Sie die Reifen Ihres 1120₂₀₀₀ mit einer Pumpe mit Druckmessgeraet aus. Der korrekte Luftdruck fuer die Reifen Ihres Jazzy's ist 30 - 35 atue. Aufpumpen mit einer Pumpe ohne Druckmessgeraet koennte diese ueberfullen mit dem Ergebnis eines geplatzen Reifen was zur persoenlichen Verletzung fuehren kann.



Zeichnung 35. Luftdruck Pruefen

- Das Gehaeuse ist mit einem klaren Lack eingesprueht. Sie koennen das Gehaeuse mit Autowachs polieren um den Hochglanz zu bewahren.



WARNUNG! Kein Gummischutzmittel an das Reifenprofil schmieren. Reifen koennten glatt werden..

IX. PFLEGE UND WARTUNG

- Alle elektrischen Verbindungen ueberpruefen. Sicherstellen, dass sie fest und nicht oxydiert sind. Batterien muessen flach in den Mulden sitzen mit den Anschluessen nach innen. Beziehen Sie sich auf dem Aufkleber am Rahmen bezueglich des korrekten Kabeldiagramm.
- Alle Radverschraubungen sind vorgeschmiert und versiegelt. Diese bemoetigen keine zusaetzliche Wartung.

TAEGLICHE PRUEFUNGEN

- Den Steuerkneuppel pruefen wenn das Steuergeraet ausgeschaltet ist. Sicherstellen, dass er nicht verbogen oder beschaedigt ist und dass er in die mittlere Position zurueckkehrt, wenn Sie ihn loslassen. Pruefen Sie den Gummischutz auf Beschaedigung. Nicht versuchen zu reparieren falls der Schutz beschaedigt ist. Den zustaendigen Pride Haendler aufsuchen wenn Sie damit ein Problem haben.
- Steuergeraetkabel und Verbindungen pruefen. Sicherstellen dass keines der Kabel beschaedigt, geschnitten oder freigelegt ist. Den zustaendigen Pride Haendler aufsuchen wenn Sie Probleme damit haben.

WOECHENTLICHE PRUEFUNGEN

- Steuergeraet und Kabelverbindung von der Leistungswanne ausstecken. Auf oxydierte Stellen achten. Wenn notwendig den zustaendigen Pride Haendler aufsuchen.
- Sicherstellen, dass alle Teile des Steuergeraetsystem am Jazzy korrekt befestigt sind. Schrauben nicht zu fest anziehen.
- Reifendruck pruefen. Luftdruck in jedem Reifen sollte 30-35 atue sein. Sollte ein Reifen Druck verlieren, den zustaendigen Pride Haendler aufsuchen.
- Steuerkneuppel ausrichten sollten Sie einen Unterschied gegenueber der normalen Bedienung feststellen oder wenn der Steuerkneuppel nicht ordentlich funktioniert. Dasselbe gilt fuer das "Remote Plus" Steuergeraet.
- Bremsen pruefen. Test sollte auf einer geraden, ebenen Flaeche ausgefuehrt werden, mit einem Freiraum von etwa einem Meter.

Bremsen pruefen:

1. Steuergeraet einschalten und den Geschwindigkeitseinstellungsknopf auf niedrig stellen.
2. Nach einer Sekunde die Batteriezustandsanzeige pruefen. Sicherstellen, dass es anbleibt.
3. Den Steuerkneuppel langsam nach vorne druecken bis Sie einen Klick von den Handbremsen hoeren. Den Steuerkneuppel sofort loslassen. Sie sollten innerhalb weniger Sekunden das Klicken jeder Handbremse hoeren. Wiederholen Sie diesen Test dreimal, den Steuerkneuppel zurueckziehen, dann nach links und rechts bewegen.
4. Sollten Sie feststellen, dass die Handbremsen entweder nicht wie immer das Klickgeraesch verursachen oder leiser als normal sind, koennte dies ein Problem mit einer oder beiden Handbremsen anzeigen. Setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.

Steuerkneuppel ausrichten (nur "Remote Plus"):

1. Steuerkneuppel in Rueckwaertsposition bringen und festhalten. Steuergeraet einschalten.
2. Batteriezustandsanzeigen LEDs sollten von einem zu zehn LEDs aufleuchten und zurueck zu einem gehen. Es macht dies zweimal und blinkt danach schnell.
3. Steuergeraet ausschalten.
4. Steuerkneuppel in die Vorwaertsposition bringen und festhalten; dann Steuergeraet einschalten.

IX. PFLEGE UND WARTUNG

5. Batteriezustandsanzeigen LEDs sollten von einem zu zehn LEDs aufleuchten und zurueck zu einem gehen. Es macht dies zweimal, blinkt dann einmal auf und danach laufend.
6. Steuergeraet ausschalten. Nun sind Steuergeraet und Steuerknueppel eingestellt und sollten ordentlich zusammenarbeiten.

MONATLICHE PRUEFUNGEN

- Pruefen, dass die nicht-kippbaren Raeder nicht am Boden streifen wenn Sie Ihr Jazzy benutzen. Wenn notwendig stellen Sie sie entsprechend ein. Siehe V. "Behaglichkeitseinstellungen".
- Pruefen Sie die nicht-kippbaren Raeder auf Abnutzung. Erneuern Sie diese wenn notwendig.
- Pruefen Sie die Reifen auf Abnutzung. Setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler bezueglich notwendigen Reparaturen in Verbindung.
- Pruefen Sie die hinteren Lenkrollenraeder auf Abnutzung. Erneuern Sie diese wenn notwendig.
- Hintere Gabeln pruefen ob sie verbogen oder Lose sind, was darauf hinweist, dass sie eventuell neu eingestellt oder die Lager erneuert werden muessen.
- Halten Sie Ihr Jazzy sauber und frei von jeglichem Schmutz, Haaren, Essensrueckstaenden, Getraenkereste, usw.

IX. PFLEGE UND WARTUNG

JAEHRLICHE PRUEFUNGEN

Bringen Sie Ihr Jazzy fuer den jaehrlichen Wartungsdienst zu Ihrem zustaendigen Pride Haendler. Damit ist gesichert, dass Ihr Jazzy ordentlich funktioniert und hilft zukuenftige Probleme zu vermeiden.

LAGERUNG

Ihr Jazzy sollte in einem trockenen Platz abgestellt werden wo er keinen extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Zur Lagerung entfernen Sie die Batterien vom Jazzy. Siehe VIII. "Batterien und Batterieladung"



WARNUNG! Sollten Sie die Einheit nicht richtig lagern, koennte der Rahmen rosten und die elektronische Anlage beschaedigt werden.

ANLEITUNGEN ZUR SAEUBERUNG



VORSICHT! Niemals Ihr Jazzy abspritzen oder in direkten Kontakt mit Wasser bringen. Ihr Jazzy hat ein lackiertes ABS Gehaeuse, das einfach nur mit einem feuchten Tuch abgerieben werden kann.

VORSICHT! Niemals chemische Mittel zur Vinylsitzreinigung benutzen denn diese koennten Sitze rutschig machen, austrocknen oder Risse verursachen. Ein feuchtes Tuch mit milder Seife genuegt, danach ordentlich trocken reiben.

REIFEN UND SCHLAEUCHE


Ist Ihr Jazzy mit pneumatischen Reifen ausgestattet sollten Sie den Luftdruck mindestens einmal pro Woche pruefen. Dies verlaengert die Lebensdauer Ihrer Reifen und gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Jazzy ordentlich funktioniert. Haben Sie einen platten Reifen erneuern Sie den Schlauch. Ersatzreifen und Schlaeuche sind immer bei Ihrem zustaendigen Pride Haendler zu erhalten.



WARNUNG! Sichern, dass der Reifen keine Luft enthaelt wenn Sie ihn reparieren.

Folgen Sie nachstehenden Punkte fuer eine schnelle und sichere Reparatur:

1. Luft aus pneumatischen Reifen lassen.
2. Mit einem 19mm Schraubenschluessel die Antriebsradmutter von der Mitte des Rims abschrauben. Siehe Zeichnung 36.
3. Rad von der Achse abziehen.
4. Bolzen, die die Radhaelften zusammenhalten abnehmen.
5. Alten Schlauch und/oder Reifen entnehmen und mit einem neuen Schlauch und/oder Reifen austauschen.
6. Rad wieder zusammenbauen.
7. Rad wieder auf die Achse schieben.
8. Installieren der Antriebsradmutter in die Mitte des Rims und festziehen.
9. Reifen aufpumpen -Druck 30 - 35 atue.

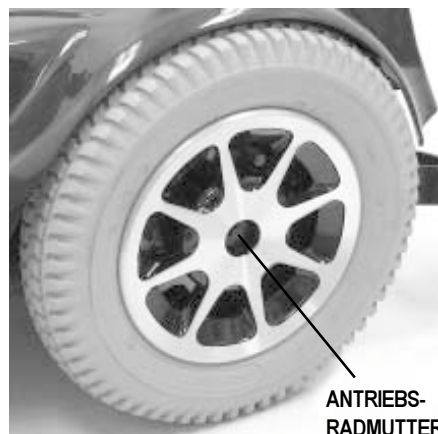

Zeichnung 36. Antriebsradmutter


IX. PFLEGE UND WARTUNG

BATTERIEN AUS WECHSELN

Batterieauswechseln:

Ein Diagramm ist auf eine Platte am Jazzy Rahmen in der Naehue der Batterien aufgedruekt. Siehe Zeichnung 37.

1. 8mm Stift vom unteren Rahmen entfernen.
2. Rahmen gerade hochheben.
3. Die zwei Verbindungskabel an Ihren Batterien finden.
4. Die zwei Verbindungskabel von den Verbindungen abnehmen.
5. Batterien von der elektronischen Basis abnehmen.

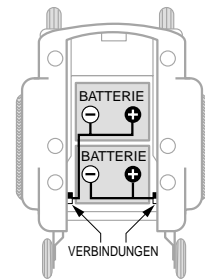

↓ VORNE ↓

Zeichnung 37.
Batterieverbindungen



WARNUNG! Jede Batterie wiegt ungefaehr 20 kg. Um Verletzungen zu vermeiden heben Sie dieses Gewicht nicht, wenn dies zu schwueer Sie ist.

6. Nehmen Sie die Kabel von den positiven und negativen Polen ab.
7. Neue mit alten Batterien auswechseln.


ANMERKUNG: Es ist einfacher die Verbindungskabel von den Batterien abzunehmen, wenn Sie die Batterien vorher abnehmen. Dies gibt Ihnen mehr Arbeitsraum.

8. Stecken Sie das mit BAT (+) bezeichnete Kabel zu dem positiven (rot) Pol an der Batterie ein. Stecken Sie das mit BAT (-) bezeichnete Kabel zu dem negativen (schwarz) Pol an der Batterie ein. Stellen Sie die Batterie am Ende auf die Jazzy Batterieplatte, die Pole nach innen zur Mitte zeigend, ab. Kabel wieder einstecken.
9. Stecken Sie das mit BAT (+) bezeichnete Kabel zu dem positiven (rot) Pol an der anderen Batterie ein. Stecken Sie das mit BAT (-) bezeichnete Kabel zu dem negativen (schwarz) Pol an der Batterie ein. Stellen Sie die Batterie auf die vordere Seite der Jazzy Batterieplatte, die Pole nach innen zur Mitte zeigend, ab. Kabel wieder einstecken.
10. Den vorderen Rahmen mit einem 8 mm Sperrungsstift befestigen.

ANMERKUNG: Es ist wichtig sicherzumachen, dass die Batterieverbindungen fest und sicher sind.

MOTOR BUERSTEN

Der elektrische Motor, der Ihren Jazzy antreibt hat Kohlenbuersten. Diese Buersten nuetzen sich mit der Zeit ab. Sie sind die zwei Kontakte innerhalb des Motores angebracht, die den Strom zum Motor liefern. Sie sind entworfen um einige Tausend Stunden Leistung zu liefern. Jedenfalls, wenn die Buersten mit Kohlenstaub schmutzig werden oder abgenutzt sind, wird der Motor schlecht oder ueberhaupt nicht laufen. Wir empfehlen, dass Ihr zustaendiger Pride Haendler die Motorbuersten alle sechs Monate prueft oder auch frueher wenn der Motor schlecht laeuft. Sollte die Pruefung ergeben, dass die Buersten zu sehr abgenutzt sind, muessen Sie erneuert werden oder der Motor wird nicht mehr laufen.

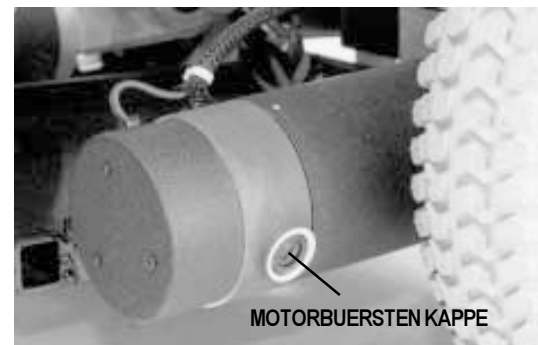


Zeichnung 38. Motor Buersten

IX. PFLEGE UND WARTUNG

ANMERKUNG: Sollten Sie Ihre Motorbuersten nicht regelmassig warten, koennte dies Ihre Garantie ungueltig machen.

Pruefen und Auswechseln der Motorbuersten:

1. Sitz, Gehaeuse und Batterien abnehmen. Siehe VI. "Demontage".
2. Den Motorbuerstenverschluss abschrauben. Siehe Zeichnung 39.
3. Buersten entnehmen.
4. Auf Abnutzung pruefen.
5. Buersten erneuern wenn notwendig. Setzen Sie sich mit Ihrem zustaeudigen Pride Haendler bezueglich neuer Buersten in Verbindung.

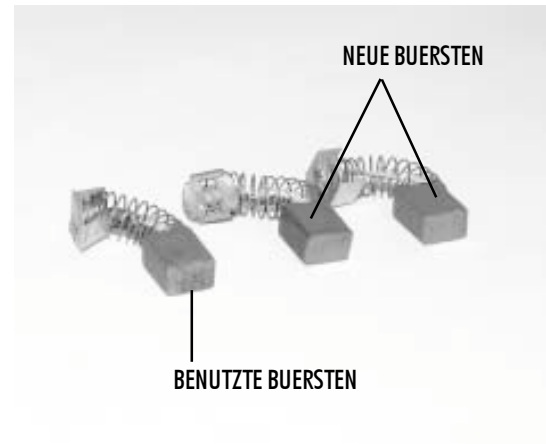

Zeichnung 39. Motorbuersten

WARTUNG

Sollte die Batteriezustandsanzeige nicht aufleuchten wenn Sie den Strom einschalten:

- Verbindungskabel pruefen. Sicher, dass diese festgemacht sind.
- Stromkreisunterbrecher pruefen. Wieder einstellen wenn notwendig.
- Batterieverbindungen pruefen.

Sind obige Konditionen normal, pruefen Sie die Batterien mit einem Testgeraet. Testgeraete koennen in einem Autozubehoerladen gekauft werden. Beide Batterien ausstecken bevor Sie diese testen. Sollte die eine oder die andere Batterie den Test nicht bestehen, erneuern Sie beide Batterien. Sollte Ihr Jazzy immer noch nicht einschalten, setzen Sie sich mit Ihrem zustaeudigen Pride Haendler in Verbindung.

WANN SIE IHREN ZUSTAENDIGEN PRIDE HAENDLER FUER WARTUNGSDIENSTE SEHEN SOLLTEN

Folgende Symptome koennt ein serioeses Problem mit Ihrem Jazzy anzeigen. Wenn noetig setzen Sie sich mit Ihrem zustaeudigen Pride Haendler in Verbindung. Beim Anruf haben Sie Folgendes vorliegen: MODELL NUMMER, FORTLAUFENDE HERSTELLNUMMER, WAS DAS PROBLEM IST UND DEN FEHLER-CODE.

- MOTORGERAEUSCH
- VERSCHMORTE KABEL
- GERISSENE ODER GEBROCHENE VERBINDUNGEN
- UNGLEICHE ABNUTZUNG DER REIFEN
- UNGLEICHMAESSIGE BEWEGUNG
- IN EINE RICHTUNG ZIEHEN
- VERBOGENE ODER GEBROCHENE RADAUFHAENGUNG
- BEKOMMT KEINEN STROM
- LAESST SICH EINSCHALTEN, FAEHRT ABER NICHT

Das folgende Zubehoer ist von Ihrem zustaeudigen Pride Haendler erhaltbar.

X. SONDERAUSSTATTUNGEN UND ZUBEHÖR

SICHERHEITSGURT

Der Sicherheitsgurt (siehe Zeichnung 40) ist entworfen um den Benutzer vor dem Abgleiten im Jazzy zu bewahren. Der Gurt ist nicht dafür gedacht die Person festzubinden. Sicherstellen dass der Gurt sicher befestigt ist und nicht unbequem.

ANMERKUNG: Der Gurt ist nicht zur Benutzung als Sicherheitsgurt beim Transport des Jazzy's in einem Auto gedacht. Des weiteren ist der Jazzy nicht als Sitzgelegenheit während des Transportes geeignet. Jede Person im Auto mitfahrend sollte die richtigen, im Fahrzeug vom Hersteller genehmigten, Sicherheitsgurte anlegen.



Zeichnung 40. Sicherheitsgurt

SAUERSTOFFTANKHALTER

Der abnehmbare Halter ist am Ende des Sitzes mit speziellen Klammern befestigt. Siehe Zeichnung 41.



Zeichnung 41. Sauerstofftankhalter

X. SONDERAUSSTATTUNGEN UND ZUBEHOER

STOCK- UND KRUECKENHALTER

Der abnehmbare Halter ist am Ende des Sitzes mit speziellen Klammern befestigt. Siehe Zeichnung 42.

GEHHILFENHALTER

Der abnehmbare Halter ist am Ende des Sitzes mit speziellen Klammern befestigt. Siehe Zeichnung 43. Der Halter kann die normale Groesse einer Gehhilfe halten.

KORB FUER HINTEN

Der Korb ist am Zuberhoertraeger befestigt. Siehe Zeichnung 44. Er hat einen Buegel zum leichteren Abnehmen.

GETRAENKEHALTER (NICHT ILLUSTRIRT)

Der Getraenkehalter ist an der Armlehne befestigt.



Zeichnung 42. Stock- und Krueckenhalter



Zeichnung 43. Gehhilfenhalter



Zeichnung 44. Korb fuer Hinten

XI. GARANTIE

LEBENSLANGE BESCHRAENKTE GARANTIE

Konstruktionsrahmen Bestandteile. Eingeschlossen sind Ladeflaeche, Gabel, Sitzstange und Rahmen Schweissnaechte.

ZWEIJAEHRIGE BESCHRAENKTE GARANTIE

Antrieb. Eingeschlossen sind Ausgleichsgetriebe, Motor und Bremse.

EINJAEHRIGE BESCHRAENKTE GARANTIE

Ihr Jazzy hat eine volle 12-monatige Garantie, mit dem Kaufdatum beginnend, fuer Fehler in der Fertigung oder eventueller Materialdefekte. Diese Garantie beeintraehtigt nicht sondern ist eine Ergaenzung zu Ihren gesetzlichen Rechten.

Alle elektrischen Teile einschliesslich der Kontrollen, haben eine Garantie von einem Jahr. Wartung der Kontrollen muss von einem zustaeendigen Pride Haendler durchgefuehrt werden. Jeder Versuch diese Teile zu oeffnen oder auseinanderzunehmen macht die Garantie fuer diese Teile ungueltig.

NICHT UNTER GARANTIE

Nicht garantiert sind Teile, welche durch normale Abnutzung ersetzt werden muessen (Reifen, Gurte, Birnen, Bezuege, Plastikhaube, Motorbuersten, Sicherungen und Batterien) oder Schaden, der durch Missbrauch oder Unfall entstanden ist und wofuer Pride oder dessen Haendler nicht verantwortlich gemacht werden kann. Diese Garantie enthaelt nicht Arbeitszeiten oder Wartungsdienste.

BATTERIEN

Die Batterien sind fuer (12) Monate vom Originalhersteller garantiert.

Allmaeliche Leistungsver schlechtung (weil laengere Zeit nicht aufgeladen, zulange kalten Temperaturen ausgesetzt oder Verbrauch durch laufende Benutzung) ist nicht unter Garantie.

WARTUNGSDIENST UND BEDIENUNG

Nur ein von Pride bevollmaechtigter Haendler kann den Wartungsdienst leisten. Setzen Sie sich mit Ihrem Pride Haendler bezueglich Kosten und Kostenvoranschlaege in Verbindung.

