


BASISINSTRUCTIES VOOR BEDIENING

TRU-Balance™ Power- positioneringsystemen

Bevat: TRU-Balance Power Tilt, TRU-Balance Power Recline, TRU-Balance Power Tilt en Recline, en TRU-Balance Power Lift en Tilt

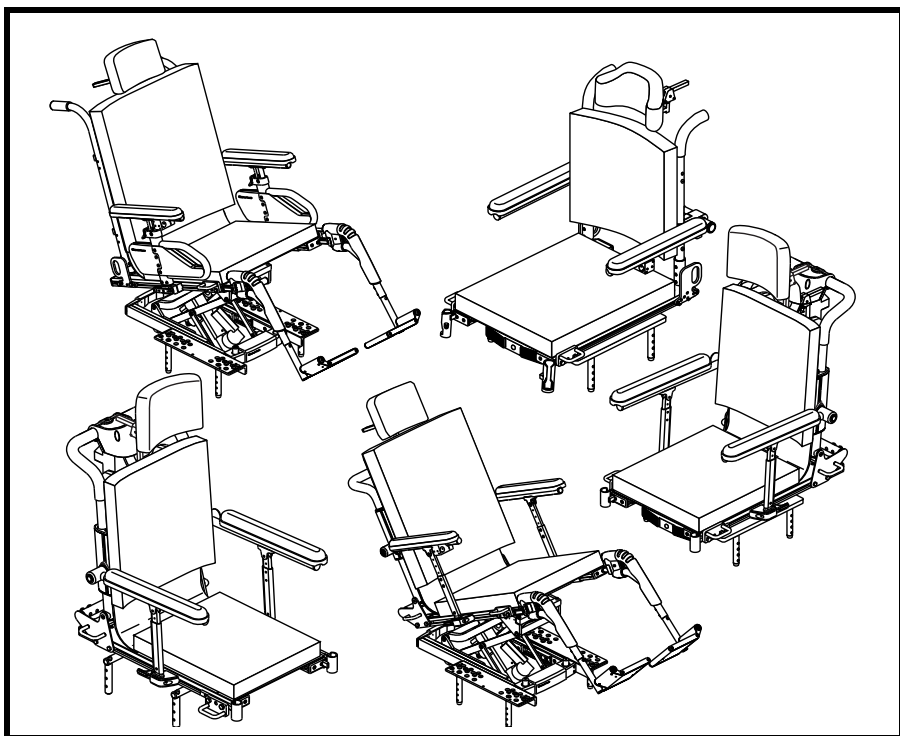

QUANTUM REHAB®

A DIVISION OF PRIDE MOBILITY PRODUCTS® CORP.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN



WAARSCHUWING! Een Quantum Rehab-leverancier of een bevoegd technicus moet de initiële installatie van dit product uitvoeren en dient alle instructies van deze handleiding uit te voeren.

Onderstaande symbolen worden overal in deze handleiding en op het product gebruikt ter aanduiding van waarschuwingen en belangrijke informatie. Het is zeer belangrijk dat u deze symbolen doorneemt en volledig begrijpt.



WAARSCHUWING! Wijst op een mogelijk gevaarlijke omstandigheid/situatie. Verzuim in het naleven van de voorgeschreven procedures kan leiden tot persoonlijk letsel, beschadiging van onderdelen of defecten. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een zwart symbool op een gele driehoek met een zwarte rand.



VERPLICHT! Deze handelingen dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven. Verzuim in het uitvoeren van verplichte handelingen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van apparatuur. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een wit symbool op een blauwe stip met een witte rand.



VERBODEN! Deze handelingen zijn verboden. Deze handelingen mogen op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid worden uitgevoerd. Het uitvoeren van verboden handelingen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van apparatuur. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een zwart symbool met een rode cirkel en een rode schuine streep.

NB: Deze instructies zijn samengesteld uit de meest recente specificaties en productinformatie die beschikbaar was ten tijde van publicatie. We behouden ons het recht voor om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen. Eventuele wijzigingen aan onze producten kunnen resulteren in lichte afwijkingen tussen de afbeeldingen en de uitleg in deze handleiding en het product dat u hebt gekocht. De nieuwste/meest recente versie van deze handleiding is beschikbaar op onze website.



Copyright © 2013

Pride Mobility Products Europe B.V.

INFMANU4520/Rev A/April 2013

INHOUDSOPGAVE

LABELINFORMATIE	4
INLEIDING	5
HET TRU-BALANCE POWER-POSITIONERINGSSYSTEEM	7
VOORZORGSMAATREGELEN	7
BEDIENING VAN HET TRU-BALANCE POWER- POSITIONERINGSSYSTEEM	13
ARMLEUNINGOPTIES	27
Opklapbaar	28
Steekleuning voor zwaar gebruik	30
Snel in hoogte verstelbare steekleuning met enkele steun ...	32
Opklapbaar en in hoogte verstelbaar met twee steunen	35
ArMLEUNINGEN voor Schuifbeperking	37
CONTROLLER-POSITIE	38
LIFTOPTIE VOOR ELEKTRISCH VERSTELBARE ZITTING	39
HANDMATIGE OPTIE VOOR ACHTEROVERLEUNEN (UITSLUITEND TRU-BALANCE POWER TILT)	40
VERZORGING EN ONDERHOUD	41
GARANTIE	42

LABELINFORMATIE

VEILIGHEIDSSYMBOLEN VAN HET PRODUCT

Onderstaande symbolen worden op het zittingsysteem gebruikt ter aanduiding van waarschuwingen en verplichte en verboden handelingen. Het is zeer belangrijk dat u deze symbolen doorneemt en volledig begrijpt.



Lees de informatie in de gebruikershandleiding door en volg deze op.



Vermijd blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of staand water indien mogelijk. Onderhoud en opslag in schone en droge toestand.



EMI-RFI — Dit product is getest en doorstaat een immuñiteitsniveau van 20 V/m.



Gebruik de juiste verbindingpunten voor de bedrading van de controller, zodat de bedrading niet verstrikt kan raken in de aandrijfwielen of afgekneld kan worden in het frame van de zitting of beschadigd kan raken bij het rijden door deuropeningen.



Maximaal zittinggewicht.



Knel-/Knijppunten die tijdens assemblage zijn ontstaan.



Only a Quantum Rehab Provider
or an authorized technician can
set or adjust the seat position!
Refer to Owner's Manual.



Raadpleeg uw Quantum Rehab-leverancier voordat u wijzigingen aanbrengt in de configuratie van uw zittingsysteem.

INLEIDING

WELKOM bij Quantum Rehab, een onderdeel van Pride Mobility Products Corporation (Pride). Het product dat u hebt gekocht combineert geavanceerde onderdelen met **veiligheid**, comfort en styling in gedachten. We hebben er vertrouwen in dat het ontwerp u het gemak zal bieden dat u verwacht tijdens uw dagelijkse activiteiten. Door te begrijpen hoe u dit product **veilig** kunt bedienen en verzorgen, zult u jarenlang kunnen genieten van zorgeloos gebruik en service.

Lees en volg alle aanwijzingen, waarschuwingen en opmerkingen in deze handleiding voor het eerste gebruik van het product. U dient voor het eerste gebruik tevens alle aanwijzingen, waarschuwingen en opmerkingen te lezen in alle aanvullende instructieboekjes voor de controller, de elementen aan de voorkant en/of het zittingsysteem die samen met uw elektrische rolstoel werden geleverd. Uw **veiligheid** is tevens afhankelijk van het gezonde verstand van u, uw leverancier, uw verzorger en uw zorgverlener.

Deze handleiding dient te worden gebruikt in aanvulling op de gebruikershandleiding van het elektrische onderstel, dat met uw elektrische rolstoel werd geleverd. Indien er in deze handleiding informatie staat die u niet begrijpt of als u extra hulp nodig hebt bij de installatie of de bediening, neemt u dan contact op met uw Quantum Rehab-leverancier. **Verzuim in het opvolgen van de aanwijzingen, de waarschuwingen en de opmerkingen in deze handleiding en op het Pride-product kan leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging en de productgarantie van Pride zal hierdoor komen te vervallen.**

KOOPOVEREENKOMST

Door het accepteren van levering van dit product belooft u dat u geen wijzigingen, veranderingen of aanpassingen aan dit product zult aanbrengen. Tevens zult u geen bescherming, beveiliging of andere veiligheidsvoorzieningen van het product verwijderen of onbruikbaar maken. Bovendien zult u niet verzuimen, weigeren of nalaten om eventuele aanpassingsets, die regelmatig door Pride worden geleverd ter verbetering of behoud van het veilige gebruik van het product, te installeren.

UITWISSELING VAN INFORMATIE

We horen het graag als u vragen, opmerkingen en suggesties over deze handleiding hebt. We horen ook graag over de veiligheid en

betrouwbaarheid van uw nieuwe Pride-product en over de service van uw Quantum Rehab-leverancier. Meld alstublieft eventuele adreswijzigingen, zodat we u op de hoogte kunnen houden van belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid, nieuwe producten en nieuwe opties waardoor het gebruik en het genot van uw Pride-product kunnen worden verbeterd.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaand adres:

Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands

NB: Neem a.u.b. contact met ons op indien u of deze handleiding mocht kwijtraken. Wij sturen u graag onmiddellijk een nieuw exemplaar toe.

Mijn Quantum Rehab-leverancier is:

Naam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Aankoopdatum: _____

HET TRU-BALANCE POWER-POSITIONERINGSSYSTEEM

Het TRU-Balance Power Positioneringssysteem is een uniek zittingssysteem dat speciaal is ontworpen voor de elektrische rolstoel van Pride. Het systeem is volledig verstelbaar om tegemoet te komen aan de persoonlijke behoeften van de gebruiker en het wordt geplaatst op een elektrisch onderstel van Pride voor maximale wendbaarheid.

Herbruikbare haak- en lussluitingen bevinden zich in uw gebruikerspakket voor gebruik bij bevestiging van het zittingkussen op het zittingonderstel. Deze sluitingen zijn niet bedoeld voor gebruik bij kussens met anti-slipmateriaal, omdat zij het zittingkussen kunnen beschadigen.

Figuren 1, 2, 3 en 4 geven informatie over de TRU-Balance Power Tilt (elektrisch verstelbaar kantelen), TRU-Balance Power Recline (elektrisch verstelbaar achteroverleunen), TRU-Balance Power Tilt en Recline (elektrisch verstelbaar kantelen en achteroverleunen), en over de onderdelen van TRU-Balance Lift en Tilt (verhogen en kantelen). Gebruik deze diagrammen om vertrouwd te raken met de functie en locatie van ieder onderdeel, voordat u gebruik gaat maken van het TRU-Balance Power-positioneringssysteem.

VOORZORGSMAATREGELEN

Lees het onderstaande zorgvuldig door, voordat u gebruik gaat maken van het TRU-Balance Power-positioneringssysteem. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u te helpen bij de veilige bediening van het zittingssysteem.

- Schakel de stroomvoorziening uit voordat u gaat zitten in het TRU-Balance Power-positioneringssysteem.
- U dient altijd hulp te krijgen als u gaat zitten in het TRU-Balance Power-positioneringssysteem.
- Volg alle procedures en besteed aandacht aan de waarschuwingen die worden beschreven in de gebruikershandleiding van uw elektrische rolstoel.

WAARSCHUWING! Het zwaartepunt van uw zittingssysteem is in de fabriek ingesteld op een positie die overeenkomt met de behoeften van de demografische meerderheid van de gebruikers. Uw Quantum Rehab-leverancier heeft uw zittingssysteem beoordeeld en eventuele noodzakelijke aanpassingen aangebracht om tegemoet te komen aan uw specifieke behoeften. Neem contact op met Pride Mobility Products of uw Quantum Rehab-leverancier, voordat u eventueel wijzigingen aanbrengt in de configuratie van uw zitting.



WAARSCHUWING! Indien de onderdelen op uw zittingssysteem los gaan zitten, meld dit probleem dan onmiddellijk bij uw Quantum Rehab-leverancier.

WAARSCHUWING! Indien er een onderbreking optreedt in de stroomvoorziening naar de elektrische rolstoel, verplaats u dan naar een veilige plek en vraag om hulp, indien nodig. Neem onmiddellijk contact op met uw Quantum Rehab-leverancier om het incident te melden.



WAARSCHUWING! Uw zittingsysteem is niet goedgekeurd voor gebruik als een zitplaats in een voertuig. Gebruik de zitplaatsen en inzittendengordels die zijn geleverd door de fabrikant van het voertuig.



VERPLICHT! Houd u aan de maximale gewichtscapaciteit vermeld in de gebruikshandleiding van uw elektrische rolstoel en blijf hierbij in ieder geval onder de 136 kg.

Elektromagnetische en radiofrequentie-interferentie (EMI/RFI)



WAARSCHUWING! Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat elektromagnetische en radiofrequentiegolven een nadelig effect kunnen hebben op de prestaties van elektrische mobiliteitsvoertuigen.

Electromagnetische en radiofrequentie-interferentie kan afkomstig zijn van bronnen zoals mobiele telefoons, apparatuur voor twee-weg radiocommunicatie (zoals walkie-talkies), radiostations, tv-stations, amateurradio (HAM)-zenders, draadloze computerverbindingen, microgolfsignalen, semafoonzenders en mobiele middengolfontvangers die worden gebruikt door voertuigen van hulpdiensten. In sommige gevallen kunnen deze golven onbedoelde bewegingen of schade aan het controlesysteem veroorzaken. Ieder elektrisch bestuurd mobiliteitsvoertuig heeft een immuniteit (of weerstand) voor EMI. Hoe hoger het immuniteitsniveau, des te groter de bescherming tegen EMI. Dit product is getest en doorstaat een immuniteitsniveau van 20 V/m.



WAARSCHUWING! Houd er rekening mee dat mobiele telefoons, twee-weg radio's, laptops en andere soorten radiozenders door EMI onbedoelde bewegingen van uw elektrisch aangestuurde mobiliteitsvoertuig kunnen veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer u dergelijke artikelen gebruikt terwijl u uw mobiliteitsvoertuig bedient en vermijd het om in de nabijheid van radio- en tv-stations te komen.

WAARSCHUWING! Door accessoires of onderdelen toe te voegen aan uw elektrisch aangestuurde mobiliteitsvoertuig kan de gevoeligheid van uw voertuig voor EMI toenemen. Breng geen enkele wijziging aan in uw elektrische rolstoel, indien deze wijziging niet is goedgekeurd door Pride.




WAARSCHUWING! Het elektrisch aangestuurde mobiliteitsvoertuig zelf kan de werking van andere elektrische apparatuur in de nabijheid, zoals alarmsystemen, beïnvloeden.

NB: Ga voor meer informatie over EMI/RFI naar het Resource Center van www.pridemobility.com. Indien onbedoelde bewegingen optreden of als de remmen ontkoppeld raken, schakel de elektrische rolstoel dan uit, zodra het veilig is om dit te doen. Bel Pride of uw Quantum Rehab-leverancier om het incident te melden.


HANDMATIG VERSTELBAAR ACHTEROVERLEUNEN (OPTIONEEL)

Met deze optie kan de rugleuning worden aangepast om achterover te leunen tot een hoek tussen 90° en 180°:

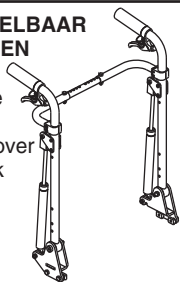


BEDIENINGSMODULE VAN BEGELEIDER

Hiermee kan een begeleider de actuatoren bedienen. Iedere handeling die wordt uitgevoerd met de bedieningsmodule voor begeleiders overschrijft de schakelhandelingen van de gebruiker.

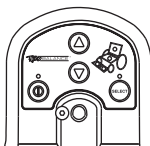

ARMLEUNINGEN


Beschikbaar in vier basistypes:

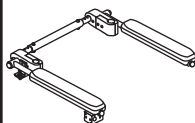


Opklapbaar (standaard)



Steekleuning voor zwaar gebruik

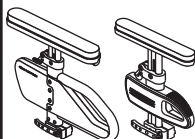

Met enkele steun en snel in hoogte verstelbaar
Steekleuning
(beschikbaar in maten voor volwassenen en kinderen)

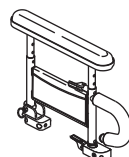


Twee steunen en in
hoogte verstelbaar,
opklapbaar

4-WEG SCHAKELBEDIENING (OPTIONEEL)

Voor bediening door de gebruiker van de kanteling, de stoelverhoger en de scharnierende beensteunactuatoren (indien aanwezig).



4-weg
tuimelschakelaar

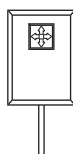


4-weg
schakelknop



Bediening met vier
drukknoppen







Figuur 1. Onderdelen van TRU-Balance Power Tilt

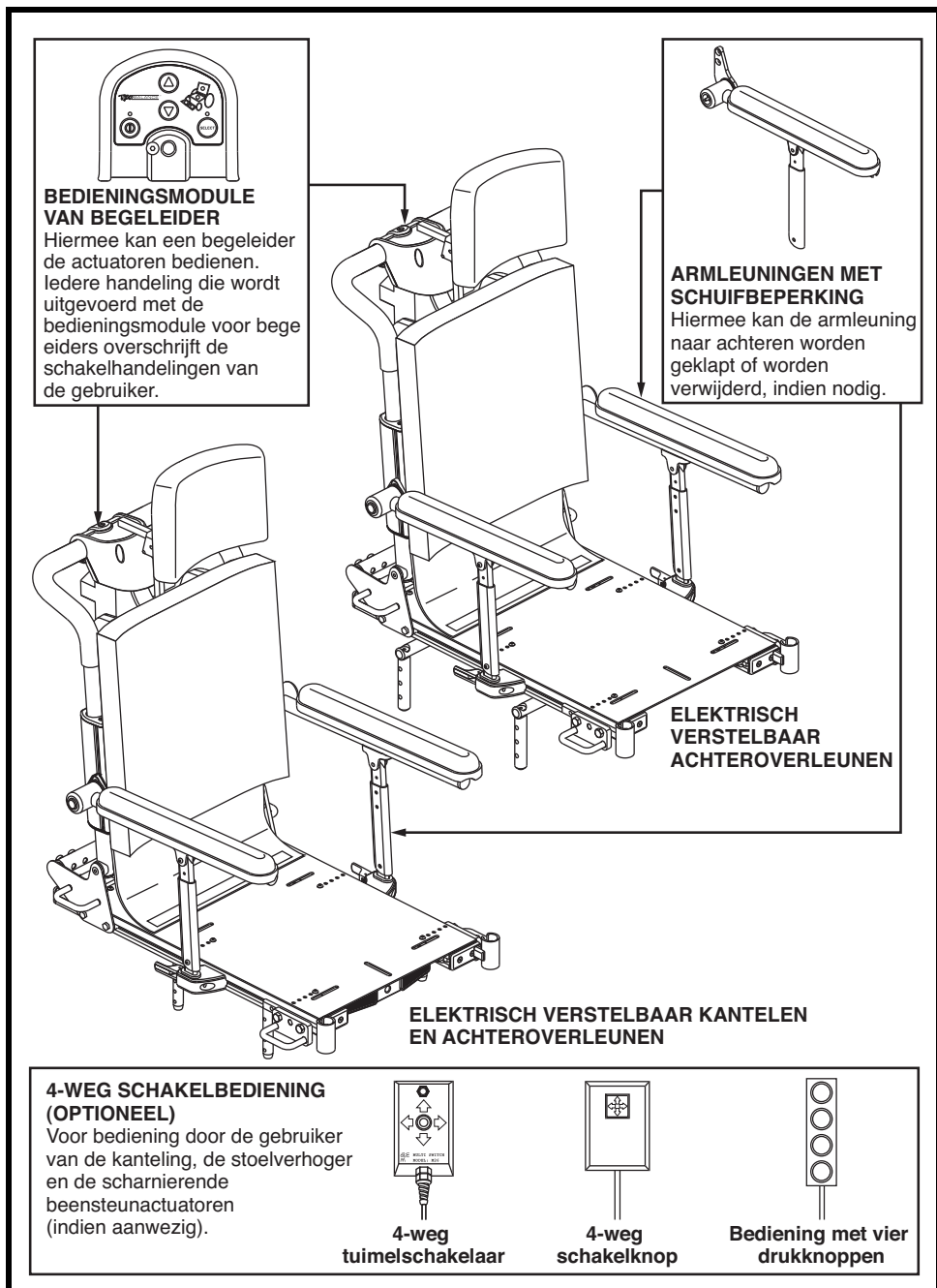

Figuur 2. Onderdelen van TRU-Balance Power Recline en TRU-Balance Power Tilt en Recline


ARMLEUNINGEN

Beschikbaar in vier basistypes:

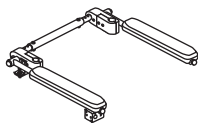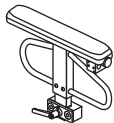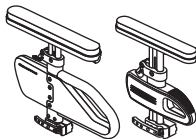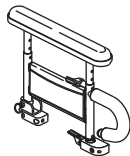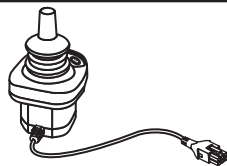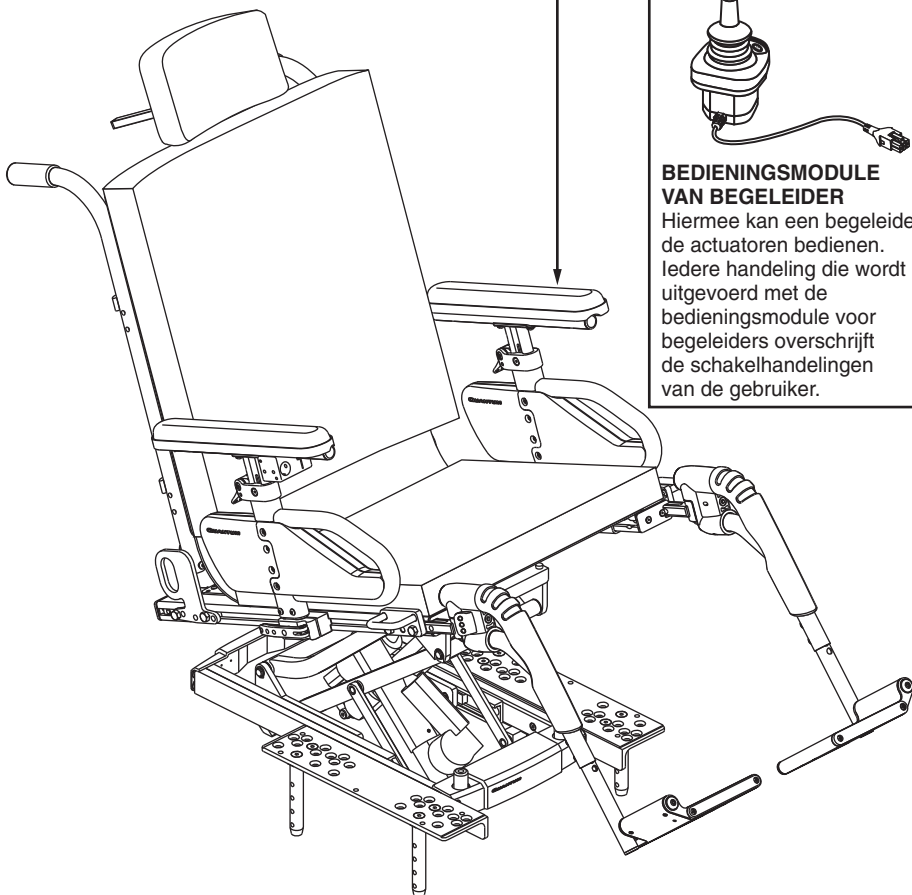**Opklapbaar
(standaard)****Steekleuning voor
zwaar gebruik****Met enkele steun en snel
in hoogte verstelbaar
Steekleuning
(beschikbaar in maten voor
volwassenen en kinderen)****Twee steunen
en in hoogte
verstelbaar,
opklapbaar****BEDIENINGSMODULE
VAN BEGELEIDER**

Hiermee kan een begeleider de actuatoren bedienen. Iedere handeling die wordt uitgevoerd met de bedieningsmodule voor begeleiders overschrijft de schakelhandelingen van de gebruiker.

Figuur 3. Onderdelen van TRU-Balance Power Lift en Tilt

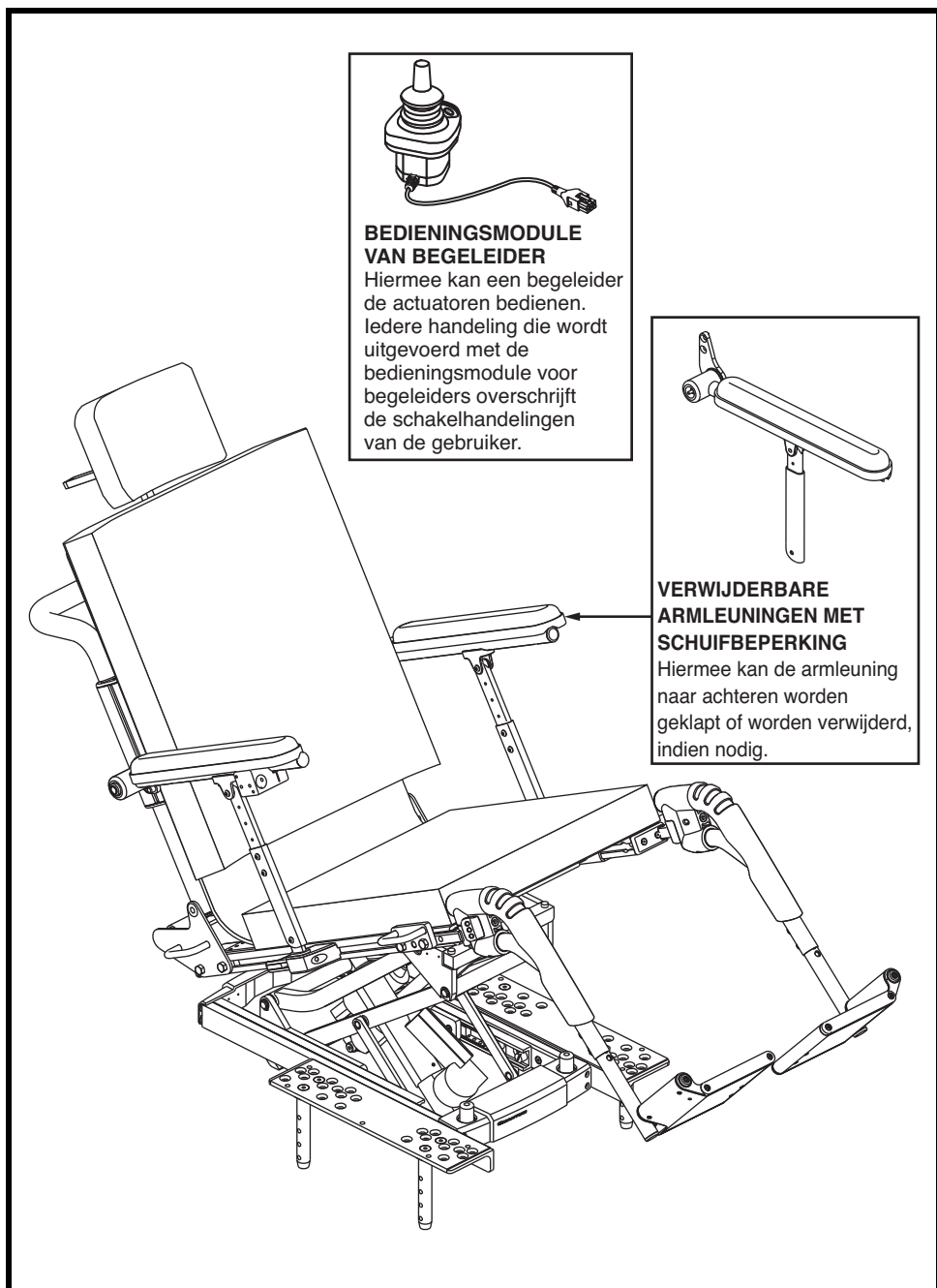

Figuur 4. Onderdelen van TRU-Balance Power Lift en Tilt met optioneel achteroverleunen

BEDIENING VAN HET THE TRU-BALANCE POWER-POSITIONERINGSSYSTEEM

Het TRU-Balance Power Positionering-systeem kan bediend worden met een PG- of Q-Logic-controller, een speciale controller of een schakelknop (zie figuur 11, 12, 13, 14 of 15). Uw TRU-Balance-zittingsysteem biedt een kanteling tot 55°, kan achterover leunen van 95°-168° en kan kantelen/achterover leunen tot 168°. Zie figuren 6, 7 en 8.

NB: *Bepaalde configuraties van een TRU-Balance Power Tilt op een Quantum R-4000 elektrisch onderstel hebben een maximale kantelhoek van 45°.*

Uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem heeft een voedingsbeperking, zodat u niet met uw elektrische rolstoel kunt rijden in de kantelpositie. Een volledige beperking wordt geactiveerd bij 20°-55°. Zie figuur 5.

	Achterover-leunen Vergrendeling	Kantelen Vergrendeling	Verhogen Vergrendeling	1/4-snelheid	Vol vermogen Vergrendeling
Verhoogd				Ingeschakeld	
Meer dan 20° gekanteld			X		Ingeschakeld
Meer dan 20° achterover geleund			X		Ingeschakeld
Meer dan 170° gekanteld/achterover geleund	X	X	X		Ingeschakeld

Figuur 5. Overzicht van beperkingen




WAARSCHUWING! Controleer de directe omgeving om ervoor te zorgen dat er niets in het mechanisme zit, voordat de functies voor kantelen, achterover leunen en/of verhoging worden gebruikt. Houd de omgeving vóór en tijdens de bewegingen vrij.

NB: *Indien uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem is uitgerust met elektrisch verstelbare kantelfuncties, dan heeft uw zittingsysteem mogelijk veiligheidsdrukschakelaars. Indien er een obstakel wordt aangetroffen op het schakelaargebied terwijl u probeert terug te keren naar een zitpositie, dan zal het kantelmechanisme automatisch stoppen.*


NB: *Er zijn geen veiligheidsdrukschakelaars als uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem is uitgerust met zowel een elektrisch verstelbare kantel- als liftstoel.*

NB: *Toevoeging van een optionele houder voor beademingsapparatuur aan uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem kan het totale gewicht, de omvang en/of het zwaartepunt van uw elektrische rolstoel wijzigen. Neem contact op met uw Quantum Rehab-leverancier, voordat u wijzigingen aanbrengt aan de stoelconfiguratie.*

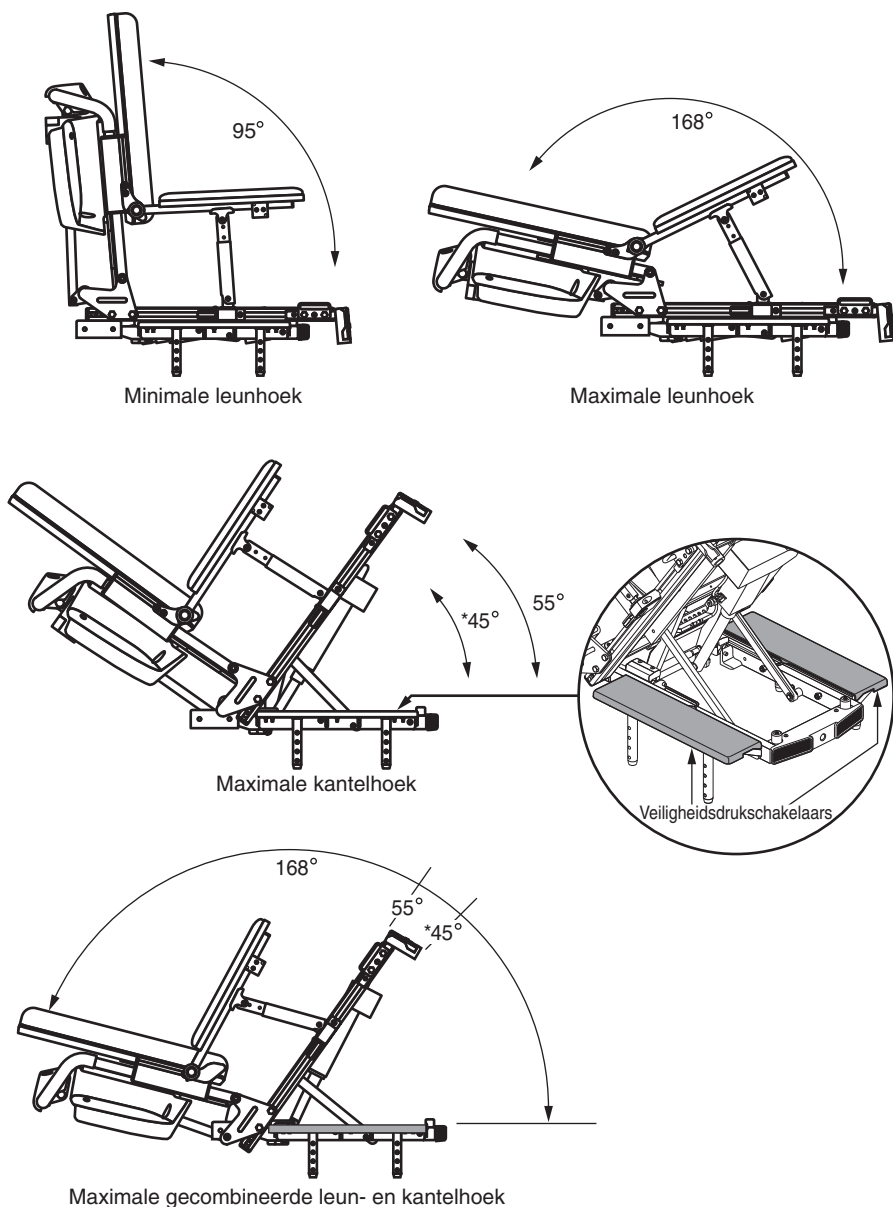


* De maximale kantelhoek van bepaalde configuraties op een Quantum R-4000 is 45°.

Figuur 6. Actieradius van TRU-Balance Power Tilt en Recline

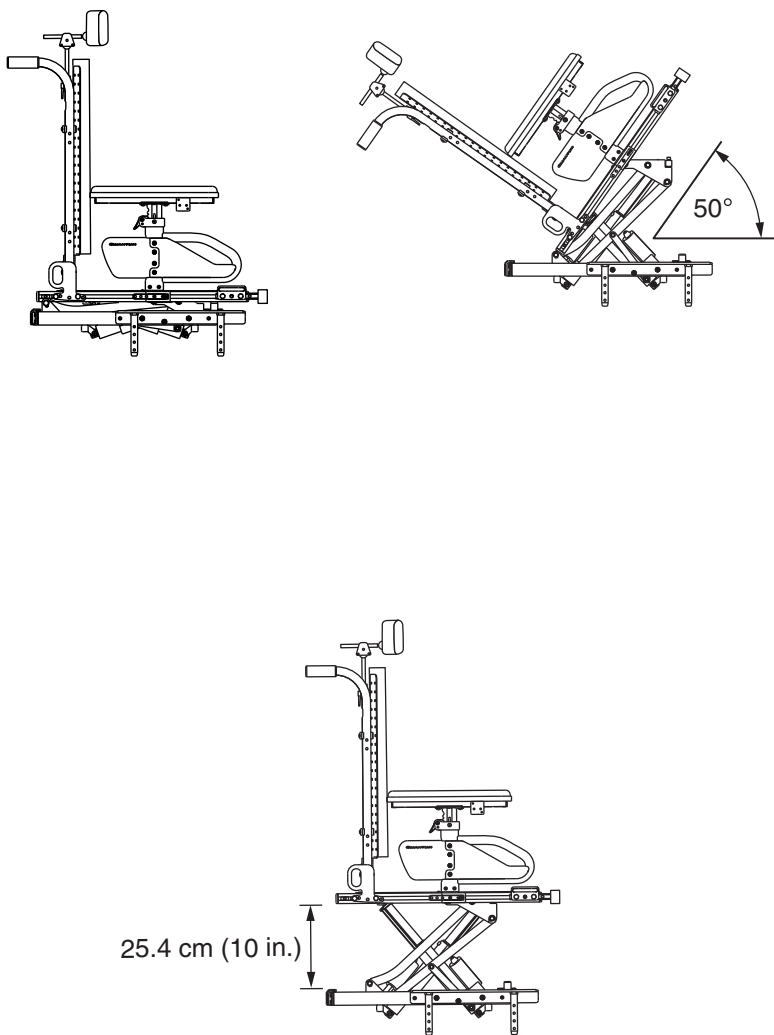

Figuur 7. Actieradius van TRU-Balance Power Lift en Tilt

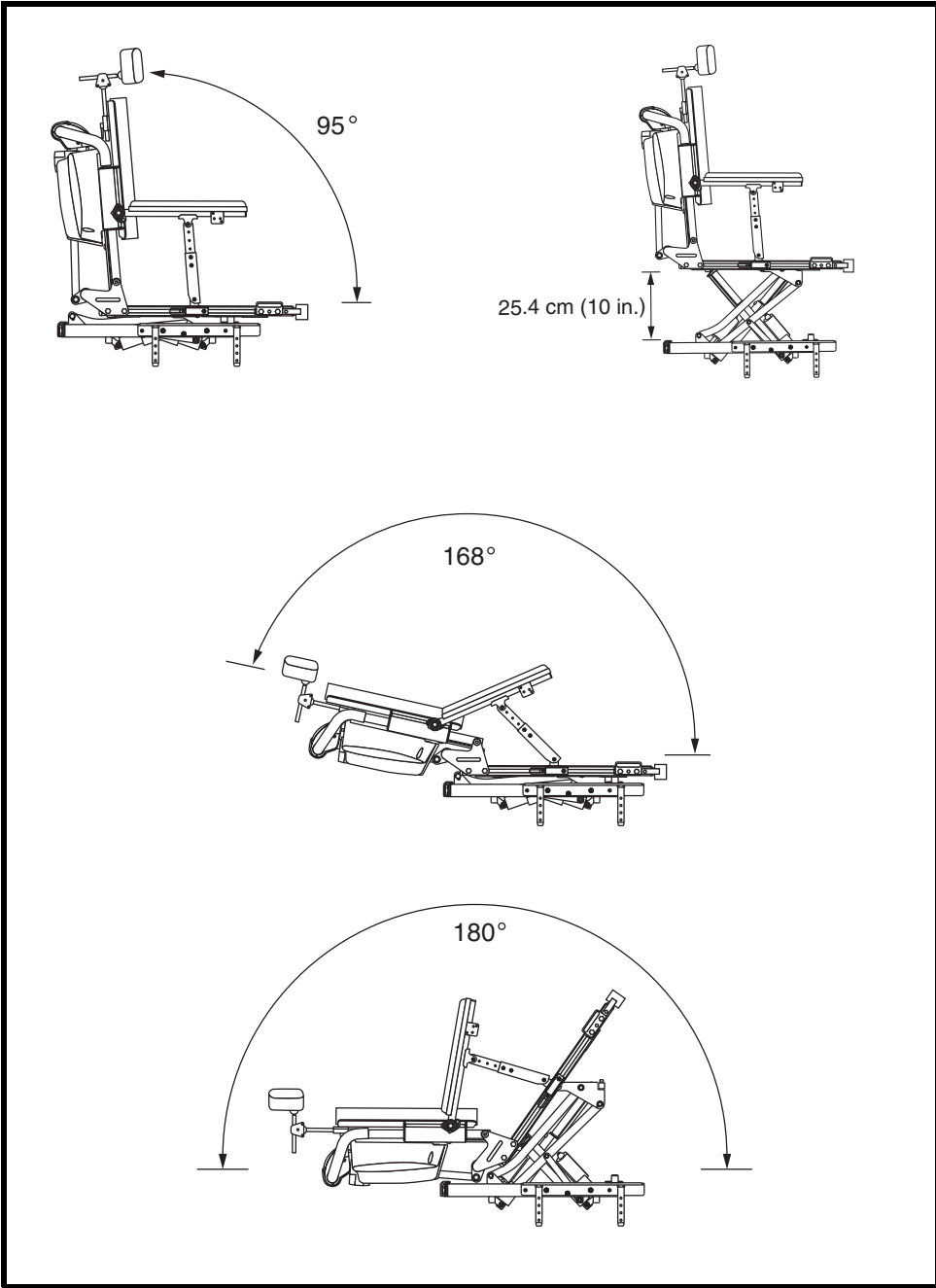

Figuur 8. Actieradius van TRU-Balance Power Lift en Tilt with Optional Recline

Opklapbare rugbuizen

Met behulp van de opklapbare rugbuizen kan de gebruiker de rugleuning naar voren kantelen voor gemakkelijk vervoer.


Om de rugleuning naar voren te kantelen:

1. Draai de hendel voor ontgrendeling op beide rugbuizen naar de achterkant van de stoel om de rugbuizen te ontgrendelen. **Zie figuur 9.**
2. Vouw de rugleuning omlaag.


Om de rugleuning weer in de verticale positie te plaatsen:

1. Til de rugleuning van de stoel omhoog en plaats deze in de verticale positie.
2. Draai de hendel voor ontgrendeling op beide rugbuizen naar de voorkant van de stoel om de rugbuizen te vergrendelen. **Zie figuur 10.** Zorg ervoor dat een rode sticker op de hendel niet zichtbaar is.

WAARSCHUWING!
Indien een rode sticker zichtbaar is, dan is de hendel voor ontgrendeling niet volledig vergrendeld. Zorg ervoor dat beide hendels volledig zijn vergrendeld voordat u gaat zitten in uw elektrische rolstoel.

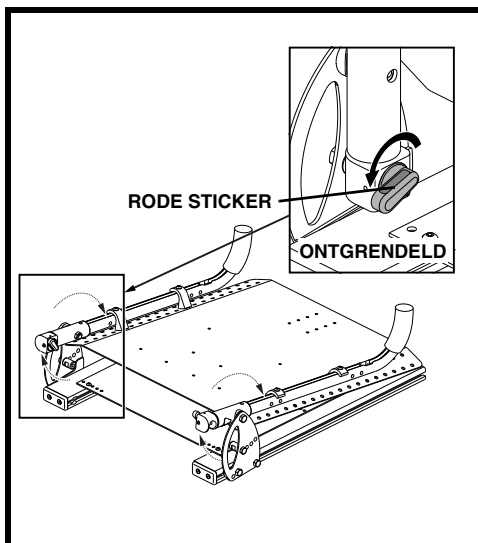

Figuur 9. Opklapbare rugbuizen (Ontgrendeld)

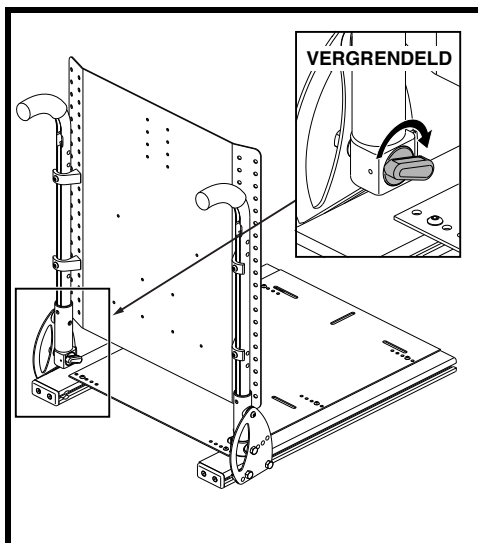

Figuur 10. Opklapbare rugbuizen (Vergrendeld)

NB: Deze handleiding behandelt uitsluitend de schakelknop- en joystick-bediening. Indien uw TRU-Balance Power-positioneringsstelsel is uitgerust met een ander bedieningsapparaat, raadpleeg dan de handleiding van dat apparaat en/of de gebruikershandleiding van uw elektrische rolstoel.

Schakelbediening


Uw TRU-Balance Power-positioneringsstelsel is mogelijk uitgerust met één van twee mogelijke 2-weg schakelknoppen of één van drie verkrijgbare 4-weg schakelknoppen.

NB: Uw TRU-Balance Power-positioneringsstelsel kan uitgerust zijn met een willekeurig aantal van deze functies.


De 2-weg vaste schakelknop en de 2-weg schakelknop met meerdere posities werken op dezelfde manier. Zie figuren 11 en 12.

2-weg schakelknoppen

1. Om naar achteren te kantelen, trekt u de tuimelschakelaar naar achteren.
2. Om terug te keren naar een zittende positie duwt u de tuimelschakelaar naar voren.

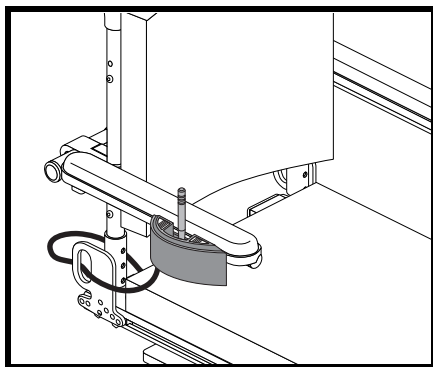

Figuur 11. 2-weg Vaste schakelknopbediening

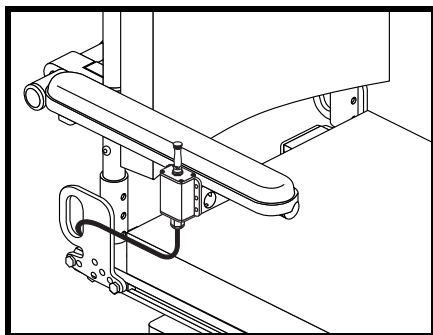

Figuur 12. 2-weg Schakelknopbediening met meerdere posities


4-weg schakelen

■ Kantelfunctie

1. Om naar achteren te kantelen, trekt u de tuimelschakelaar naar achteren.
2. Om terug te keren naar een zittende positie moet u de tuimelschakelaar naar achteren trekken, loslaten en weer naar achteren trekken.

■ Achteroverleunfunctie

1. Om achterover te leunen trekt u de tuimelschakelaar naar achteren.
2. Om terug te keren naar een zittende positie moet u de tuimelschakelaar naar achteren trekken, loslaten en weer naar achteren trekken.

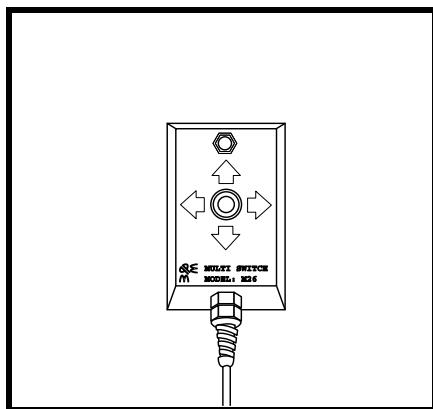

Figuur 13. 4-weg Schakelknopbediening

■ Stoelliftfunctie (optioneel)

1. Om de stoel te verhogen duwt u de tuimelschakelaar naar links.
2. Om de stoel te verlagen moet u de tuimelschakelaar naar links duwen, loslaten en weer naar links duwen.

■ Gecombineerde beensteunfunctie (optioneel)

1. Om beide beensteunen te verhogen duwt u de tuimelschakelaar naar rechts.
2. Om beide beensteunen te verlagen moet u de tuimelschakelaar naar rechts duwen, loslaten en weer naar rechts duwen.

■ Onafhankelijke beensteunfunctie (optioneel)

1. Om de linker beensteun te verhogen duwt u de tuimelschakelaar naar links.
2. Om de linker beensteun te verlagen moet u de linker tuimelschakelaar naar links duwen, loslaten en weer naar links duwen.
3. Om de rechter beensteun te verhogen duwt u de tuimelschakelaar naar rechts.
4. Om de rechter beensteun te verlagen moet u de tuimelschakelaar naar rechts duwen, loslaten en weer naar rechts duwen.

NB: De verhogingsoptie van de elektrisch bedienbare zitting is niet beschikbaar als de onafhankelijke beensteunoptie is geselecteerd.

4-weg Schakelknop

■ Kantelfunctie

1. Om naar achteren te kantelen trekt u de schakelknop naar achteren.
2. Om terug te keren naar een zittende positie moet u de schakelknop naar achteren trekken, loslaten en weer naar achteren trekken.

■ Achteroverleunfunctie

1. Om achterover te leunen trekt u de tuimelschakelaar naar achteren.
2. Om terug te keren naar een zittende positie moet u de schakelknop naar achteren trekken, loslaten en weer naar achteren trekken.

■ Verhogingsfunctie van de zitting (optioneel)


1. Om de zitting te verhogen trekt u de schakelknop naar links.
2. Om de zitting te verlagen moet u de schakelknop naar links duwen, loslaten en weer naar links duwen.

■ Gecombineerde beensteunfunctie (optioneel)

1. Om beide beensteunen te verhogen duwt u de schakelknop naar rechts.
2. Om beide beensteunen te verlagen moet u de schakelknop naar rechts duwen, loslaten en weer naar rechts duwen.

■ Onafhankelijke beensteunfunctie (optioneel)

1. Om de linker beensteun te verhogen duwt u de schakelknop naar links.
2. Om de linker beensteun te verlagen moet u de schakelknop naar links duwen, loslaten en weer naar links duwen.
3. Om de rechter beensteun te verhogen duwt u de schakelknop naar rechts.
4. Om de rechter beensteun te verlagen moet u de schakelknop naar rechts duwen, loslaten en weer naar rechts duwen.

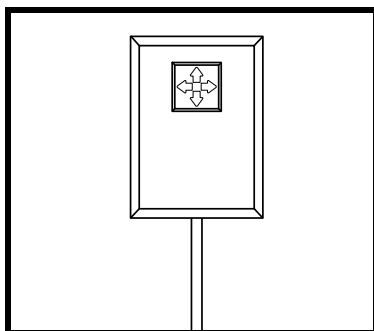

Figuur 14. 4-weg Schakelknopbediening

NB: De verhogingsfunctie van de elektrisch verstelbare stoel is niet beschikbaar als de onafhankelijke beensteunoptie is geselecteerd.

Schakelbediening met vier drukknoppen**■ Kantelfunctie**

1. Om naar achteren te kantelen drukt u op de eerste knop.
2. Om terug te keren naar de zittende positie moet u de knop weer indrukken.

■ Achteroverleunfunctie

1. Om achterover te leunen drukt u op de tweede knop.
2. Om terug te keren naar de zittende positie moet u de knop weer indrukken.

■ Verhogingsfunctie voor zitting (optioneel)


1. Om de zitting te verhogen drukt u op de derde knop.
2. Om de zitting te verlagen drukt u nogmaals op de derde knop.

■ Gecombineerde beensteunfunctie (optioneel)

1. Om beide beensteunen te verhogen drukt u op de vierde knop.
2. Om beide beensteunen te verlagen drukt u nogmaals op de vierde knop.

■ Onafhankelijke beensteunfunctie (optioneel)

1. Om de linker beensteun te verhogen drukt u op de derde knop.
2. Om de linker beensteun te verlagen drukt u nogmaals op de derde knop.
3. Om de rechter beensteun te verhogen drukt u op de vierde knop.
4. Om de rechter beensteun te verlagen drukt u nogmaals op de vierde knop.

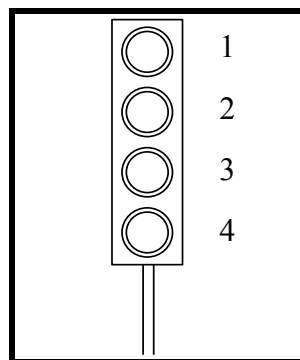


Figuur 15.
Schakelbediening met vier drukknoppen

NB: De verhogingsfunctie van de elektrisch verstelbare zitting is niet beschikbaar als de onafhankelijke beensteunoptie is geselecteerd.

Afstandsbediening plus joystick-bediening


1. Druk op de Aan/Uit-toets om de stoel en de controller aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets om de instellingsmodus van de actuator te selecteren.
3. Druk de joystick naar rechts om door de beschikbare actuatoren te bladeren totdat de gewenste actuator is verlicht op de actuatorindicator.
Zie figuur 16.
4. Trek de joystick naar achteren om de actuator in te schakelen of druk de joystick naar voren om terug te keren naar de originele positie.
5. Druk nogmaals op de modustoets om terug te keren naar de rijmodus.

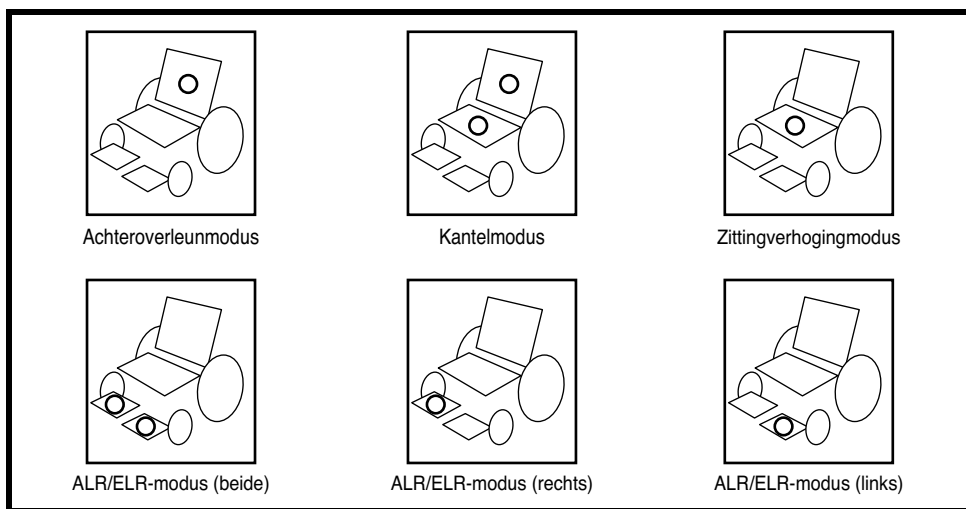

Figuur 16. Actuatormodi (afstandsbediening plus)

Q-Logic-bediening


1. Duw de hendel voor aan/uit- en modusselectie één keer omhoog om de stoel en de controller aan te zetten.
2. Duw de hendel voor aan/uit- en modusselectie meerdere malen omhoog totdat het zittingscherm wordt weergegeven op het LCD-scherm of druk de selectieknop voor Toets 2 één keer in om rechtstreeks naar de actuatoremodus te gaan.
3. Duw de joystick naar links of naar rechts om door de beschikbare actuatoren te bladeren totdat de gewenste actuatoren zijn verlicht op de actuatorindicator. **Zie figuur 17.**
4. Wanneer de gewenste actuator is geselecteerd, geeft u een voorwaartscommando aan de joystick om de positie in één richting aan te passen of geeft u een tegengesteld commando aan de joystick om de positie in de tegenovergestelde richting aan te passen.
5. Duw de hendel voor aan/uit- en modusselectie en laat deze los totdat u terugkeert naar het gewenste rijprofiel.

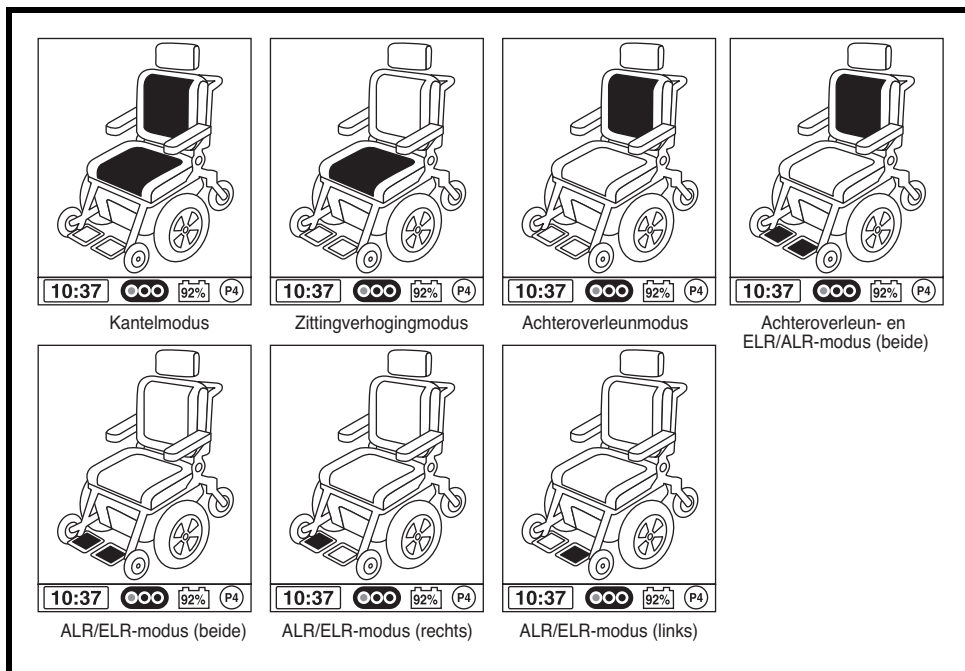

Figuur 17. Actuatoremodi (Q-Logic)

Bedieningsmodule voor begeleiders

Uw zittingsysteem is mogelijk uitgerust met een van de twee beschikbare bedieningsmodules voor begeleiders (**zie figuren 18 en 19**). De actuatoren kunnen door de gebruiker worden aangepast met behulp van de controller of de tuimelschakelaar of door een begeleider met behulp van de bedieningsmodule voor begeleiders. Iedere handeling die wordt uitgevoerd met de bedieningsmodule voor begeleiders heeft voorrang en overschrijft handelingen die door de gebruiker met de tuimelschakelaar zijn gemaakt.

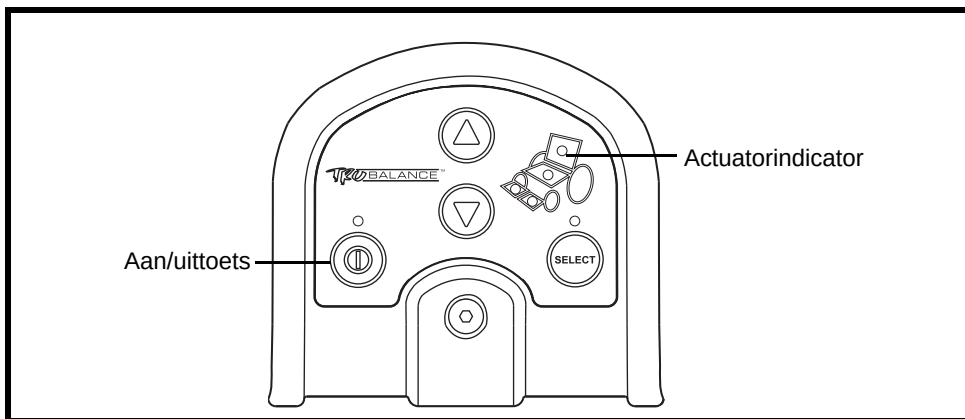

Figuur 18. Afstandsbediening plus bedieningsmodule voor begeleiders

NB: Uw TRU-Balance Power-positioneringsstelsel is mogelijk uitgerust met een aantal van deze functies of met al deze functies.

Afstandsbediening plus bedieningsmodule voor begeleiders

Om een van de actuators te wijzigen, drukt u op Selecteren om te bladeren totdat de gewenste actuator is verlicht op de actuatorindicator (**zie figuur 18**). Druk vervolgens op de pijl omhoog om de actuator te activeren of op de pijl omlaag om terug te gaan naar uw oorspronkelijke positie.

■ Kantelfunctie

1. Druk op de aan/uitknop om de module aan te zetten.
2. Druk op Selecteren totdat de actuators in zowel de rugleuning als de zitting verlicht zijn op de actuatorindicator op de module. Gebruik de pijlen voor omhoog en omlaag om de kanteling te vergroten of verkleinen.
3. Om terug te keren naar een zittende positie drukt u op Selecteren totdat de actuators in zowel de rugleuning als de zitting zijn verlicht op de actuatorindicator op de module en vervolgens drukt u op de pijl omlaag totdat de zitting weer in een zittende positie is.

■ Achteroverleunfunctie

1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk op Selecteren totdat de actuator op de rugleuning is verlicht op de actuatorindicator op de module. Gebruik de pijlen voor omhoog en omlaag om de hoek waarin u achteroverleunt te vergroten of te verminderen.
3. Om terug te keren naar een zittende positie drukt u op Selecteren totdat de actuator op de rugleuning is verlicht op de actuatorindicator op de module en vervolgens drukt u op de pijl omlaag totdat de stoel zich in een verticale positie bevindt.

■ Functie voor zittingverhoging (optioneel)


1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk op Selecteren totdat de actuator op de stoel is verlicht op de actuatorindicator op de module. Gebruik de pijlen voor omhoog en omlaag om de hoogte van de zitting te vergroten of te verminderen.
3. Om de stoel te verlagen tot de oorspronkelijke positie drukt u op Selecteren totdat de actuator op de stoel is verlicht op de actuatorindicator op de module. Vervolgens drukt u op de pijl omlaag totdat de stoel zich in de oorspronkelijke positie bevindt.

■ Beensteunfunctie (optioneel)

1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk op Selecteren totdat de gewenste beensteunactuator is verlicht op de actuatorindicator op de module. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de verhoging te vergroten of te verminderen.
3. Om de beensteun terug te brengen naar een verlaagde positie, drukt u op Selecteren totdat de gewenste beensteun actuator is verlicht op de actuatorindicator op de module. Vervolgens drukt u op de pijl omlaag totdat de beensteun zich in een verlaagde positie bevindt.

■ Onafhankelijke/gecombineerde beensteunfunctie (optioneel)

1. Druk op de aan/uitknop om de module aan te zetten.
2. Druk op Selecteren om te bladeren door de linker, rechter en gecombineerde beensteunen totdat de gewenste beensteunactuator is verlicht op de actuatorindicator op de module. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de mate van verhoging te vergroten of te verminderen.
3. Om de beensteun terug te brengen naar de verlaagde positie, drukt u op Selecteren om te bladeren door de linker, rechter en gecombineerde beensteunen totdat de gewenste beensteunactuator is verlicht op de actuatorindicator op de module en vervolgens drukt u op de pijl omlaag totdat de beensteun zich in de verlaagde positie bevindt.

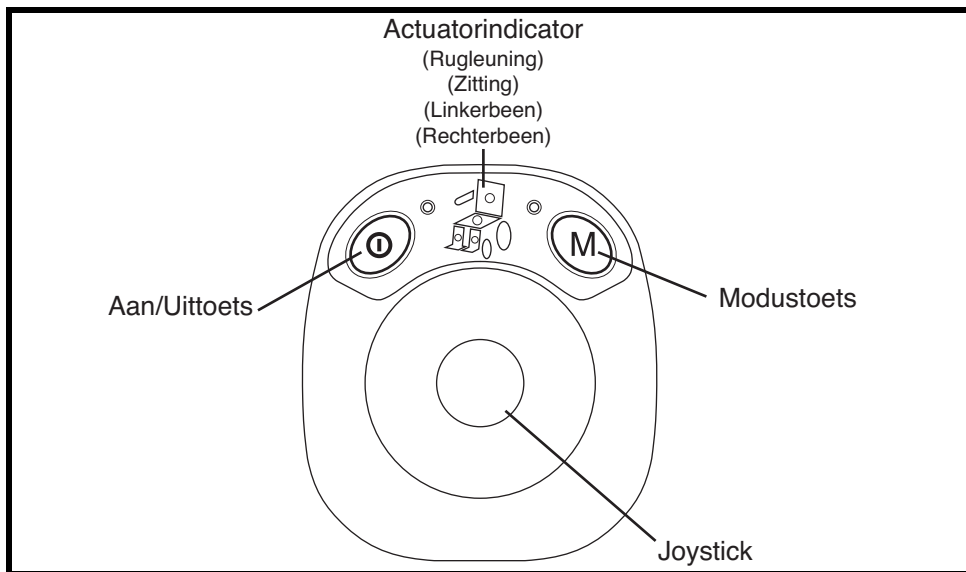

Figuur 19. Q-Logic-module voor bediening door de begeleider

NB: Uw TRU-Balance Power-positioneringsstelsel is mogelijk uitgerust met een aantal van deze functies of al deze functies.

Q-Logic-module voor bediening door de begeleider

Om een van deze actuators te wijzigen drukt u twee keer op de modustoets en vervolgens duwt u de joystick naar rechts om te bladeren totdat de gewenste actuator is verlicht op de actuatorindicator (zie figuur 19). Beweeg de joystick naar voren of naar achteren om de gewenste actuator te activeren.

■ Kantelfunctie

1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets en duw vervolgens de joystick naar rechts totdat de actuators in de rugleuning en in de stoel zijn verlicht op de actuatorindicator op de module. Trek de joystick naar achteren om de mate van kanteling te vergroten.
3. Om terug te keren naar een zittende positie moet u ervoor zorgen dat de actuators in de rugleuning en in de stoel zijn verlicht op de actuatorindicator en vervolgens duwt u de joystick naar voren om de mate van kanteling te verminderen.

■ Achteroverleunfunctie

1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets en duw de joystick naar rechts totdat de actuator in de rug is verlicht op de actuatorindicator op de module. Trek de joystick naar achteren om de hoek voor het achteroverleunen te vergroten.

3. Om terug te keren naar een zittende positie drukt u twee keer op de modustoets en duwt vervolgens de joystick naar rechts totdat de actuator in de rug is verlicht op de actuatorindicator op de module. Duw de joystick naar voren om de hoek voor het achteroverleunen te verminderen.

■ Zittingverhogingfunctie (optioneel)

1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets en duw de joystick naar rechts totdat de actuator in de rug is verlicht op de actuatorindicator op de module. Trek de joystick naar achteren om de hoogte van de stoel te vergroten.
3. Om de stoel te verlagen, drukt u twee keer op de modustoets en duwt vervolgens de joystick naar rechts totdat de actuator in de stoel is verlicht op de actuatorindicator op de module. Duw de joystick naar voren om de hoogte van de stoel te verminderen.

■ Beensteunfunctie (optioneel)

1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets en duw de joystick naar rechts totdat de actuator in de gewenste beensteun is verlicht op de actuatorindicator op de module. Trek de joystick naar achteren om de beensteun omhoog te brengen.
3. Om de beensteun te laten zakken drukt u twee keer op de modustoets en duwt vervolgens de joystick naar rechts totdat de actuator in de gewenste beensteun is verlicht op de actuatorindicator op de module. Duw de joystick naar voren om de hoogte van de beensteun te verminderen.

■ Onafhankelijke/gecombineerde beensteunfunctie (optioneel)

1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets en duw de joystick naar rechts totdat de actuator(en) in de linker, rechter of gecombineerde beensteun is verlicht op de actuatorindicator op de module. Trek de joystick naar achteren om de beensteun(en) omhoog te brengen.
3. Om de beensteun(en) te laten zakken drukt u twee keer op de modustoets en duwt vervolgens de joystick naar rechts totdat de actuator(en) in de linker, rechter of gecombineerde beensteun(en) is/zijn verlicht op de actuatorindicator op de module. Duw de joystick naar voren om de hoogte van de beensteun(en) te verminderen.

ARMLEUNINGOPTIES

De volgende paragrafen beschrijven de armleuningopties en de eventuele aanpassingen voor meer comfort die kunnen worden uitgevoerd. Niet alle armleuningopties zijn beschikbaar op alle TRU-Balance Power-positioneringsystemen. Raadpleeg **figuren 1, 2, 3 en 4** voor beschikbaarheid van armleuningen.

Eventueel hebt u het volgende gereedschap nodig om aanpassingen uit te voeren:

- standaard inbussleutelset.
- standaard steeksleutel.
- kruiskopschroevendraaier.

WAARSCHUWING! Probeer de elektrische rolstoel of het zittingsysteem niet op te tillen of te verplaatsen met behulp van een van de verwijderbare onderdelen, inclusief de armleuning(en), element(en) aan de voorkant, zittingkussens, rugleuning van de zitting, kappen of de controller. Gebruik alleen stevige en niet-verwijderbare frame-onderdelen om uw elektrische rolstoel of het zittingsysteem op te tillen of te verplaatsen.




WAARSCHUWING! Vermijd het plaatsen van uw volle gewicht op de armleuningen van de elektrische rolstoel en gebruik de armleuningen niet als gewichtdragers, bijvoorbeeld bij overplaatsingen. Hierdoor zou de elektrische rolstoel kunnen kantelen, wat kan resulteren in persoonlijk letsel indien u uit de elektrische rolstoel valt.

WAARSCHUWING! De controller en de controller-beugel zijn niet-dragende onderdelen van uw zittingsysteem. Gebruik de controller of de controller-beugel niet als dragers, bijvoorbeeld bij overplaatsingen. Dergelijk gebruik kan leiden tot beschadiging van deze onderdelen, wat kan resulteren in persoonlijk letsel indien u uit de elektrische rolstoel valt.

Opklapbare armleuningen

De opklapbare armleuningen zijn verbonden aan de stoelbuizen en zijn ontworpen om “omhoog te klappen”, zodat ze weggeklapt zijn voor meer gemak bij het overplaatsen naar of van de elektrische rolstoel. Zowel de hoek als de hoogte van de opklapbare armleuningen kan worden aangepast.

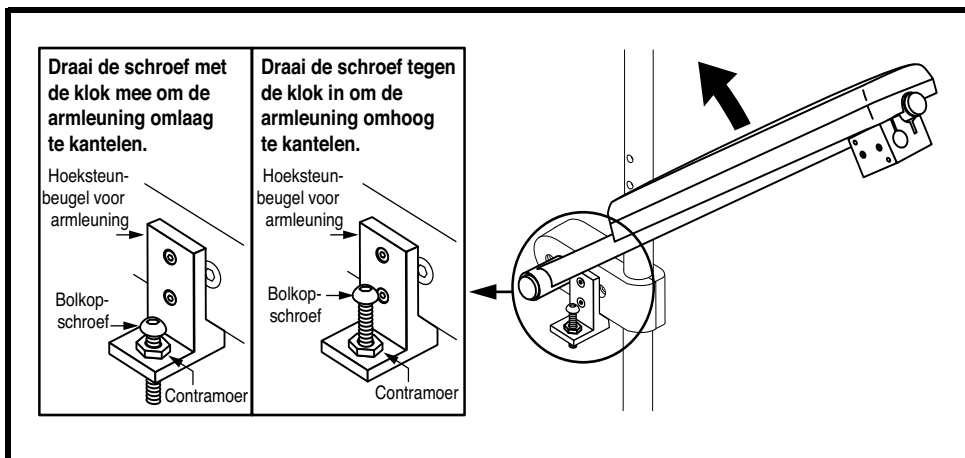


Figuur 20. Aanpassing van de hoek van de opklapbare armleuning

Om de hoek van de armleuning te wijzigen:

1. Klap de armleuningen omhoog en opzij.
2. Draai de stelmoer op de hoeksteunbeugel van de armleuning los. **Zie figuur 20.**
3. Draai de bolcilinderschroef op de hoeksteunbeugel van de armleuning los of vast. Door de bolcilinderschroef los te draaien neemt de hoek van de armleuning toe en door de bolcilinderschroef vast te draaien wordt de hoek van de armleuning kleiner. **Zie figuur 21.**
4. Als de schroef zich in de juiste positie bevindt, draait u de stelmoer vast. **Zie figuur 20.**
5. Breng de armleuningen naar beneden naar de positie.

Om de hoogte van de armleuning te wijzigen:

1. Beweeg de armleuningen omhoog en uit de weg.
2. Draai de stelmoer op de hoeksteunbeugel van de armleuning los. **Zie figuur 20.**
3. Verwijder de bolcilinderschroef en stelmoer van de hoeksteunbeugel van de armleuning. **Zie figuur 20.**
4. Verwijder de twee (2) platte kopschroeven uit de hoeksteunbeugels van de armleuning en verwijder vervolgens de beugel. **Zie figuur 21.**
5. Verwijder de inbusbout uit de armleuningkleem. **Zie figuur 21.**
6. Verhoog of verlaag de armleuningen tot de gewenste hoogte.
7. Plaats de inbusbout terug in de armleuningkleem. **Zie figuur 21.**
8. Plaats de hoeksteunbeugel van de armleuning weer terug en plaats de twee (2) platte kopschroeven terug en draai ze aan. **Zie figuur 21.**
9. Plaats de bolcilinderschroef terug op de hoeksteunbeugel van de armleuning en draai de stelmoer vast. **See figure 20.**
10. Breng de armleuningen naar beneden naar de positie.

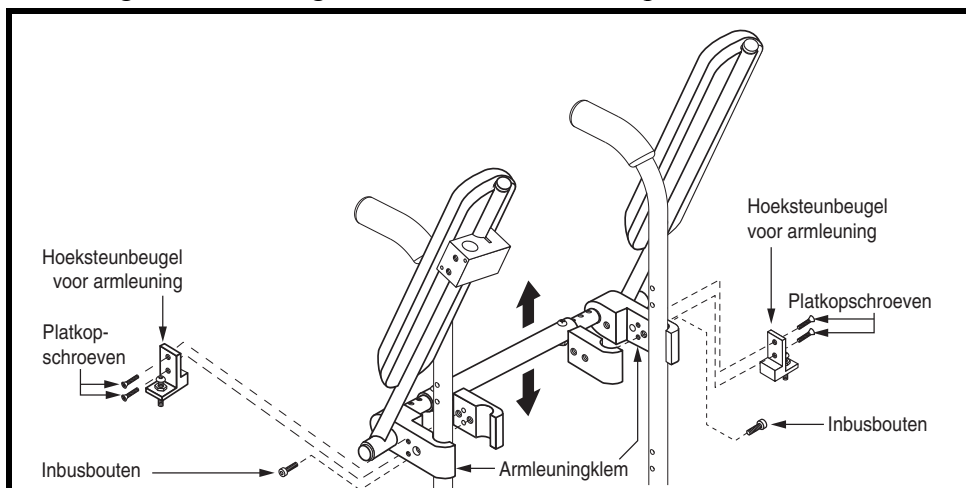**Figuur 21. Aanpassing van de hoogte van de opklapbare armleuning**

Steekleuningen voor zwaar gebruik

De steekleuningen voor zwaar gebruik zijn aan de stoel bevestigd met een vergrendelmechanisme dat is vastgemaakt aan de zijstangen van het zittingstelsel. Deze armleuning kunnen worden verwijderd voor gemakkelijke overplaatsingen van en naar de elektrische rolstoel. De positie van de armleuning op de stoel en ook de totale hoogte van de armleuning kunnen worden aangepast.

Om de assemblage van de armleuning te verwijderen:


1. Draai de vergrendelhendel van de armleuning naar achteren. **Zie figuur 22.**
2. Til de armleuningassemblage op.

Om de assemblage van de armleuning te installeren:

1. Plaats de assemblage van de armleuning in de vergrendeling van de armleuning. **Zie figuur 22.**
2. Draai de vergrendelhendel van de armleuning naar voren.

Om de positie van de armleuning aan te passen:


1. Draai de vergrendelhendel van de armleuning naar achteren en verwijder de armleuning uit de vergrendeling van de armleuning. **Zie figuur 22.**
2. Draai de platte kopschroeven los waarmee de vergrendeling van de armleuning wordt vastgemaakt aan de zijstang van de stoel. **Zie figuur 23.**
3. Schuif de vergrendeling van de armleuning naar voren of naar achteren langs de zijstang van de stoel.
4. Draai de platte kopschroeven vast.
5. Plaats de armleuning in de vergrendeling van de armleuning en draai de vergrendelhendel naar voren. **Zie figuur 23.**
6. Voor de andere kant herhalen, indien gewenst.

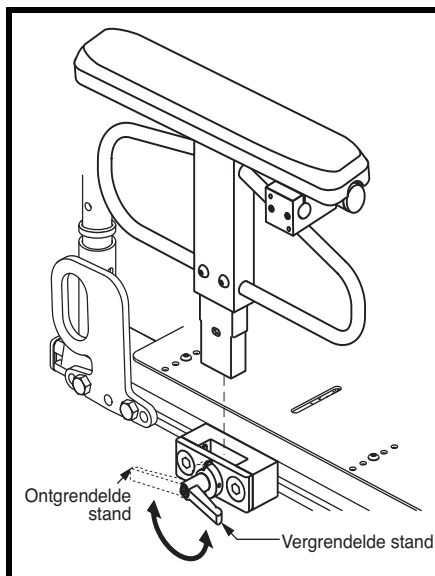


Figuur 22. Verwijdering/plaatsing van de steekleuning voor zwaar gebruik

Om de hoogte van de armleuning aan te passen:

1. Draai de vergrendelhendel van de armleuning naar achteren en verwijder de armleuning uit de vergrendeling. **Zie figuur 24.**
2. Verwijder de twee (2) bolcilinderkopschroeven uit de zijkant van de armleuning.
3. Schuif de armleuning omhoog of omlaag langs de stang van de vergrendeling, tot de gewenste hoogte.
4. Plaats de bolcilinderkopschroeven terug aan de zijkant van de armleuning.
5. Plaats de armleuning in de vergrendeling van de armleuning en draai de vergrendelhendel naar voren.
6. Herhaal dit voor de andere armleuning, indien nodig.

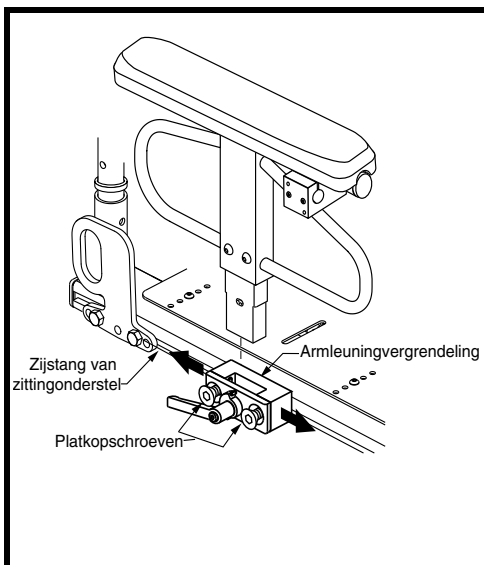

Figuur 23. Positieaanpassing van de steekleuning voor zwaar gebruik

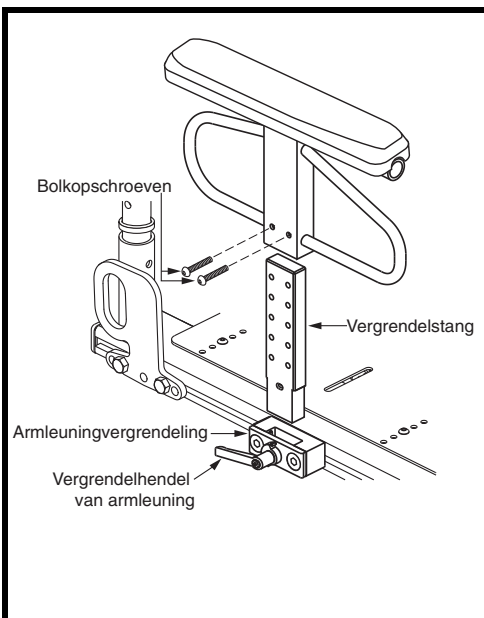

Figuur 24. Aanpassing van de hoogte van de steekleuning voor zwaar gebruik

Snel in hoogte verstelbare steekleuningen met enkele steun

De snel in hoogte verstelbare steekleuningen met enkele steun zijn verwijderbaar, net zoals de steekleuningen voor zwaar gebruik en ze zijn verkrijgbaar in volwassen- en kindermaten.

Om de assemblage van de armleuning te verwijderen:

1. Draai de vergrendelhendel van de armleuning naar voren. **Zie figuur 25.**
2. Til de assemblage van de armleuning op.

Om de assemblage van de armleuning te plaatsen:


1. Plaats de assemblage van de armleuning in de vergrendeling. **Zie figuur 25.**
2. Draai de vergrendelhendel van de armleuning naar achteren.

Hoogteaanpassingen van de armleuning voor volwassen maten kunnen worden uitgevoerd aan zowel de boven- als de onderkant van de armleuning. Het bereik van de totale hoogteaanpassing is 15,24 cm van 27,94-43,18 cm. Dit bereik wordt gemeten vanaf de zitting tot de bovenkant van het kussentje op de armleuning.


Om de bovenste hoogte aan te passen is geen gereedschap nodig. Het bereik van de aanpassingen van de bovenste hoogte is 7,62 cm in stappen van 0,95-cm. Het bereik van de aanpassingen van de onderste hoogte is 7,62 cm in stappen van 2,54-cm.

Om de bovenste hoogte aan te passen:

1. Indien aanwezig, de optionele vergrendeldpin verwijderen. **Zie figuur 26.**

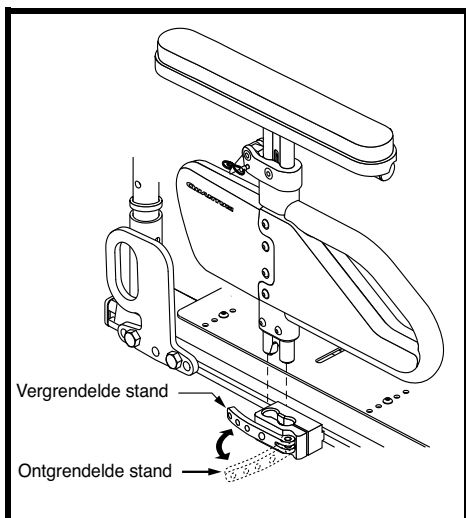

Figuur 25. Verwijdering/installatie van de snel in hoogte verstelbare steekleuning met enkele steun

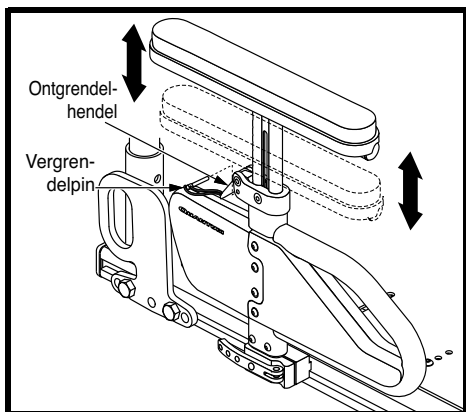


Figuur 26. Bovenste hoogteaanpassing van snel in hoogte verstelbare steekleuning met enkele steun

2. Trek de armleuning omhoog om te verhogen of druk op de ontgrendelhendel om de armleuning te verlagen tot de gewenste hoogte.
3. Indien van toepassing de vergrendelpin terugplaatsen.
4. Herhaal dit, indien nodig, voor de andere armleuning.

Om de onderste hoogte aan te passen:

1. Verwijder de twee bolcilinderkopschroeven uit de vergrendelstang.
Zie figuur 27.
2. Schuif de armleuning omhoog of omlaag.
3. Breng de gaten in de armleuning op één lijn.
4. Plaats de twee bolcilinderkopschroeven terug in de vergrendelstang.
5. Herhaal dit, indien nodig, voor de andere armleuning.

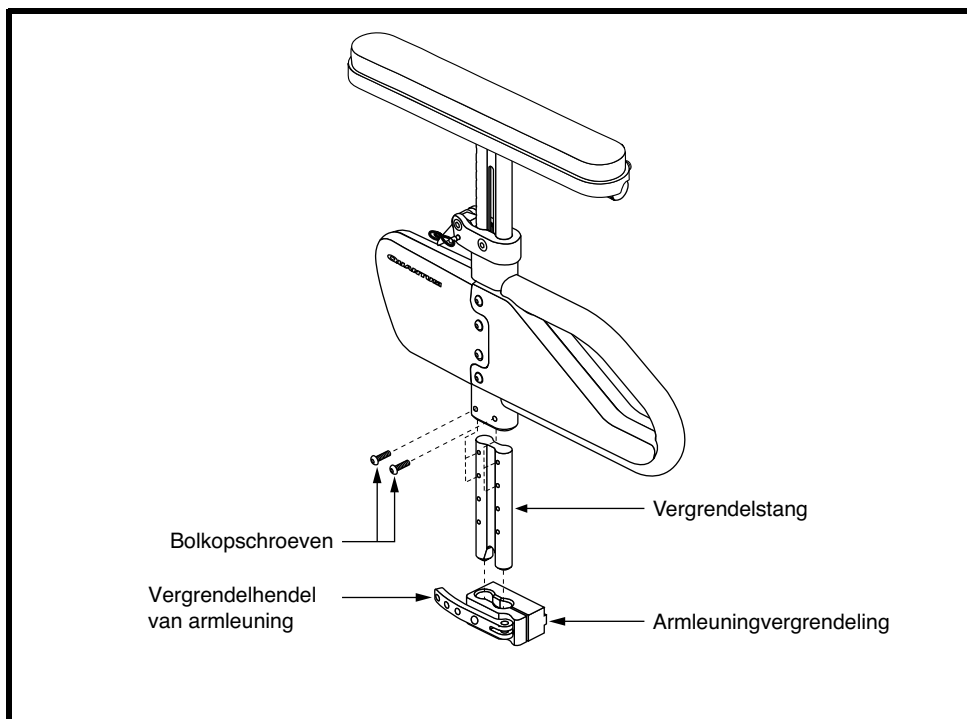

Figuur 27. Onderste hoogteaanpassing van snel in hoogte verstelbare steekleuning met enkele steun

Net zoals de steekleuningen met enkele steun en snelle hoogteaanpassing voor volwassenen, is de armleuning in kindermaten ontworpen om eenvoudig te worden aangepast en verwijderd. Het bereik van de totale hoogteaanpassing is 7,62 cm in stappen van 0,95-cm. Dit bereik wordt gemeten van de bovenkant van de zitting tot de bovenkant van het kussentje op de armleuning. Het bereik van de totale hoogteaanpassing is 19,69-27,31 cm.


De bovenste hoogteaanpassingen vereisen geen gereedschap. Het bereik van de bovenste hoogteaanpassingen is 2,54 cm in stappen van 0,95-cm. Het bereik van de onderste hoogteaanpassingen is 5,08 cm in stappen van 2,54-cm.

Om de bovenste hoogte aan te passen:


1. Verwijder, indien aanwezig, de optionele vergrendelpin. **Zie figuur 28.**
2. Trek de armleuning omhoog om de armleuning te verhogen of druk op de ontgrendelhendel om de armleuning naar de gewenste hoogte te verlagen.
3. Indien van toepassing, de vergrendelpin terugplaatsen.
4. Herhaal dit voor de andere armleuning, indien nodig.

Om de onderste hoogte aan te passen:

1. Verwijder de twee bolcilinderkopschroeven uit de vergrendelstang. **Zie figuur 29.**
2. Schuif de armleuning naar boven of naar beneden tot de gewenste hoogte.
3. Breng de gaten in de armleuning op één lijn.
4. Plaats de twee bolcilinderkopschroeven terug in de vergrendelstang.
5. Herhaal dit, indien nodig, voor de andere armleuning.

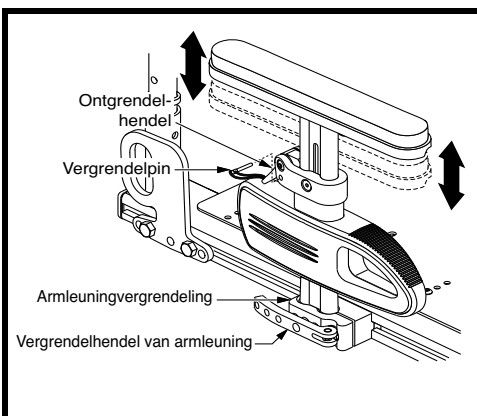

Figuur 28. Bovenste hoogteaanpassing van snel in hoogte verstelbare steekleuning met enkele steun, voor kinderen

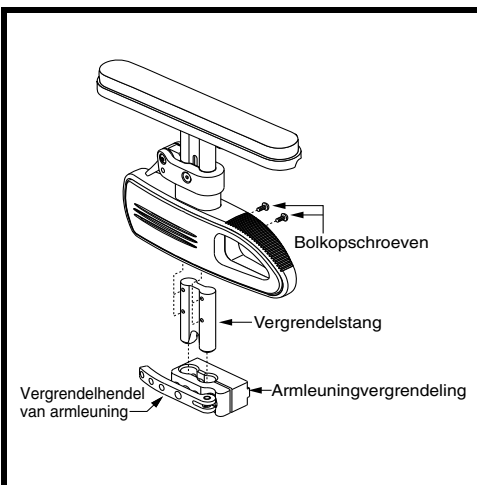

Figuur 29. Onderste hoogteaanpassing van snel in hoogte verstelbare steekleuning met enkele steun, voor kinderen

Opklapbaar en in hoogte verstelbaar met twee steunen


Het bereik van de hoogteaanpassing voor de in hoogte verstelbare en opklapbare armleuning met twee steunen is 10,16 cm in stappen van 2,54-cm. Het bereik van de totale hoogteaanpassing is 25,4-35,56 cm. Dit bereik wordt gemeten vanaf de bovenkant van de stoelstang tot de bovenkant van het kussentje op de armleuning. U kunt de armleuningen ook omhoog klappen of verwijderen voor overplaatsingen. **Zie figuur 30.**

Om de assemblage van de armleuning te verwijderen:

1. Druk de veerhendel naar beneden en trek de voorkant van de armleuning omhoog. **Zie figuur 30.**
2. Verwijder de vergrendelpin uit de achterkant van de stoel. **Zie figuur 30.**
3. Trek de achterkant van de armleuning omhoog om de assemblage te verwijderen.

Om de assemblage van de armleuning te installeren:


1. Plaats de achterkant van de armleuning in de achterste stoelhouder en plaats de vergrendelpin. **Zie figuur 30.**
2. Draai de assemblage van de armleuning naar beneden.
3. Druk de voorkant van de armleuning in de voorste stoelhouder en draai de veerhendel naar de horizontale positie om het op zijn plaats te vergrendelen.

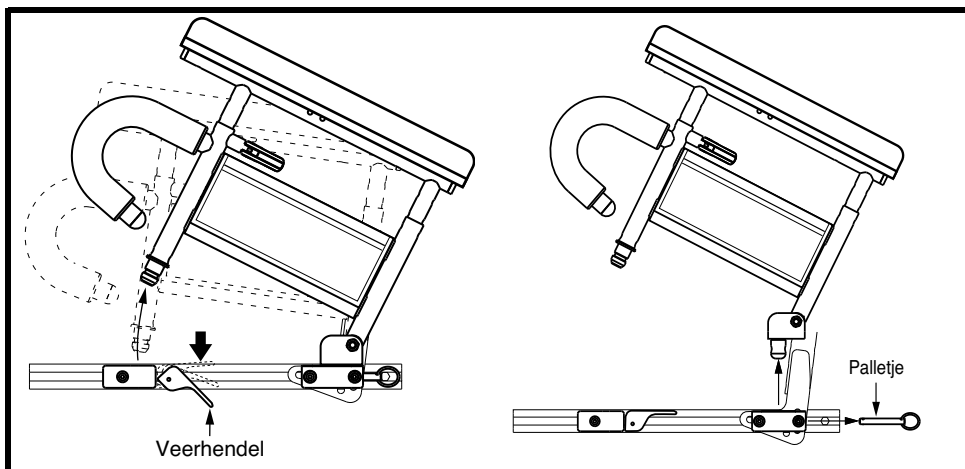

Figuur 30. Verwijdering en installatie van de in hoogte verstelbaar en opklapbaar armleuning met twee steunen

Om de hoogte van de armleuning aan te passen:

1. Druk de veerhendel naar binnen. **Zie figuur 31.**
2. Beweeg de armleuning naar boven of naar beneden tot de gewenste hoogte.
3. Draai de veerhendel naar buiten en vergrendel de armleuning op zijn plaats. Beweeg de armleuning, indien nodig, naar boven of naar beneden om te controleren of de armleuning vast zit.

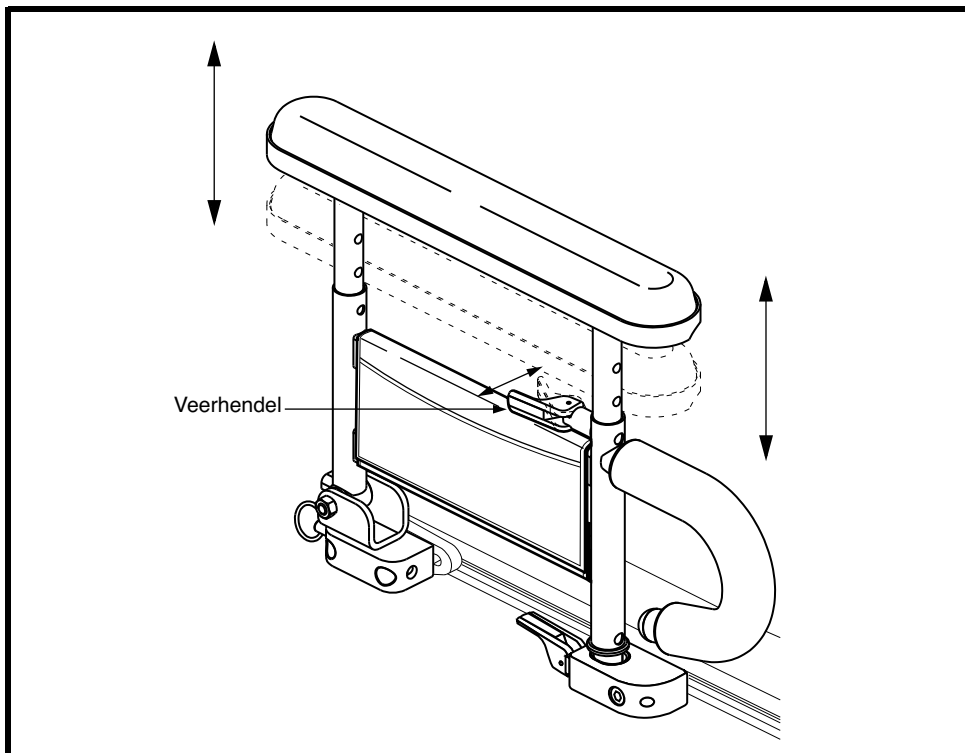


Figuur 31. Hoogteaanpassing van in hoogte verstelbare en opklapbare armleuning met twee steunen

Armleuningen voor schuifbeperking


Armleuningen voor schuifbeperking kunnen alleen worden aangepast door uw Quantum Rehab-leverancier. U kunt de armleuningen echter wel verwijderen, indien nodig.

Om de armleuningen te verwijderen:

1. Trek de vergrendelhendel van de armleuning op de zitting naar u toe. **Zie figuur 32.**
2. Druk op de knop op de zijbuis. **Zie figuur 32.**
3. Trek de armleuning omhoog om hem uit de zitting te verwijderen. **Zie figuur 33.**

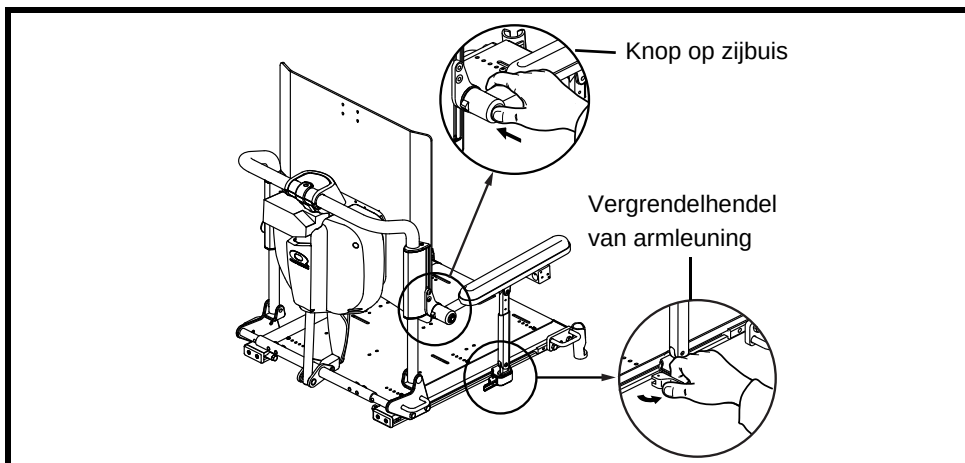

Figuur 32. Ontgrendelen van de armleuning

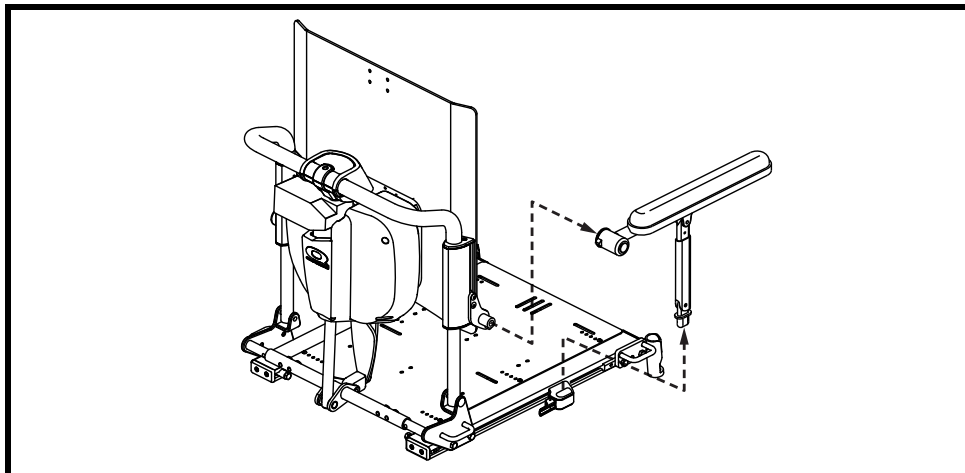

Figuur 33. Verwijdering van de armleuning

CONTROLLER-POSITIE

U kunt de controller voor links- of rechtshandig gebruik plaatsen. U kunt ook de verlenging van de controller vanaf de armleuning aanpassen.




WAARSCHUWING! Zorg dat u de bedrading van de controller zodanig plaatst dat het niet bekneeld kan raken in het frame van de stoel of in het frame van het elektrische onderstel.

Om de controllerpositie te wijzigen:


1. Schakel de stroomvoorziening naar de controller uit.
2. Haal de connector van de controller uit het elektrische onderstel. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het elektrische onderstel.
3. Verwijder eventuele kabelbinders waarmee de controllerkabel aan de armleuning vastzit.
4. Draai de montageschroeven in het bevestigingsblok van de controller los. **Zie figuur 34.**
5. Verplaats het bevestigingsblok van de controller en de controller naar de andere armleuning en draai de montageschroeven vast.
6. Voer de kabel van de controller naar de achterkant van het onderstel en sluit de controller weer aan. **Zie figuur 35.**

Om de verlenging van de controller te wijzigen:

1. Schakel de stroomvoorziening naar de controller uit.
2. Draai de stelschroeven in het bevestigingsblok van de controller los. **Zie figuur 34.**
3. Schuif de controller in of uit de armleuning tot de gewenste positie.
4. Draai de stelschroeven aan om de controller vast te maken.

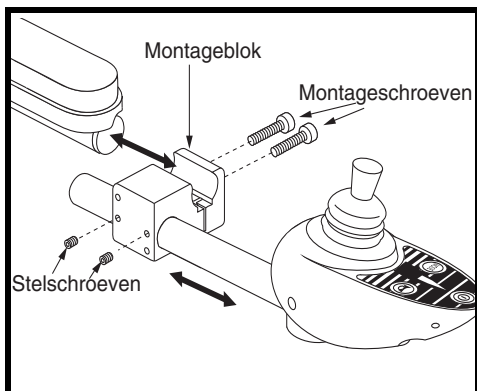

Figuur 34. Controllerpositie (standaard bevestigingsblok en afstandsbediening plus controller getoond)

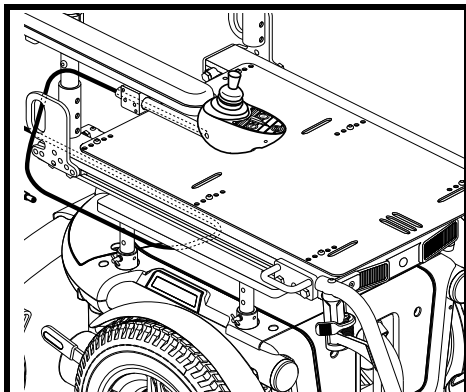

Figuur 35. Kabelvoering

LIFTOPTIE VOOR ELEKTRISCH VERSTELBARE ZITTING

De elektrisch verstelbare zittinglift biedt een verhoging tot 17,78 cm vanaf het elektrische onderstel, met gebruik van een plaat met een enkele steun en actuator. **Zie figuur 36.** De maximale gewichtscapaciteit van de elektrisch verstelbare zittinglift is 136 kg en is verkrijgbaar op een aantal modellen. Neem contact op met uw Quantum Rehab-leverancier voor specifieke informatie. De elektrisch verstelbare zittinglift wordt bediend met de controller of de tuimelschakelaar van de elektrische rolstoel.

NB: Wanneer de zitting is verhoogd, is een 1/4-snelheidrijbeperking ingeschakeld en u zult de zitting niet kunnen kantelen.


NB: Bedieningsinstructies met gebruik van de 4-wegschakelingen van de joystick worden hieronder besproken. Als u een andere schakelaar, de bedieningsmodule van de begeleider of een ander bedieningsapparaat gebruikt, raadpleeg dan de betreffende paragraaf van deze handleiding of de gebruikshandleiding van het betreffende apparaat en/of van uw elektrische rolstoel.

Voor bediening van de elektrische verstelbare zittinglift:

1. Trek de tuimelschakelaar naar achteren om de zitting te verhogen.
2. Duw de tuimelschakelaar naar voren om de stoel te verlagen.



VERBODEN! Vermijd blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of staand water, indien mogelijk. Onderhoud en opslag in schone en droge toestand.

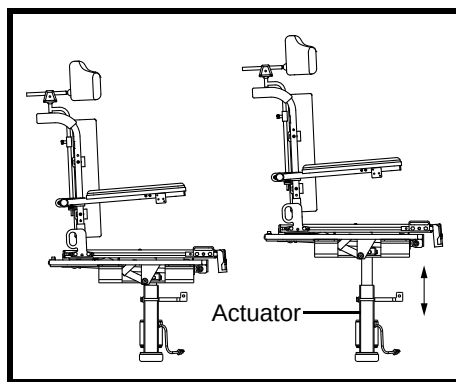


Figuur 36. Elektrisch verstelbare zittingliftoptie

NB: Er zijn geen veiligheidsdrukknoppen indien uw TRU-Balance Power-positioneringsstelsel is uitgerust met een elektrisch verstelbare zittinglift.

HANDMATIGE OPTIE VOOR ACHTEROVERLEUNEN (UITSLUITEND TRU-BALANCE POWER TILT)

Indien uw TRU-Balance Power-positioneringsstelsel over de handmatige optie voor achteroverleunen van Pride beschikt, dan kunt u de rugleuning aanpassen tot hoeken variërend van de minimale leunhoekpositie (90° vanaf het onderstel van de zitting) tot de maximale leunpositie (180° vanaf het onderstel van de zitting). **Zie figuur 37.** Wanneer de zitting meer dan 110° achteroverleunt, bevindt de stoel zich in volledige beperking. Door de zitting weer terug te brengen naar een hoek minder dan 110° graden, zal de stroomvoorziening naar de motoren worden hervat.

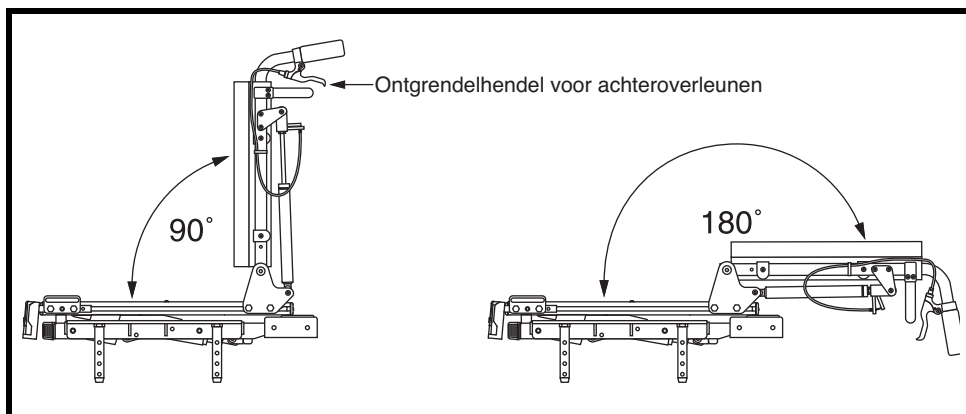


Figuur 37. Minimale en maximale leunhoeken



WAARSCHUWING! Laat de rugleuning nooit achteroverleunen wanneer de stoel is gekanteld. Dit kan resulteren in ernstig letsel van de gebruiker. Een veiligheidsvoorziening zorgt ervoor dat u de zitting niet kunt kantelen wanneer deze verder dan 110° achterover leunt. Om de kantelfunctie weer in te schakelen, dient u de rugleuning terug te brengen in de verticale stand.

Om de rugleuning achterover te laten leunen:

1. Pak de hendels bovenop de rugleuning vast.
2. Knijp gelijktijdig in beide vrijloophendels en plaats de rugleuning in de gewenste hoek. **Zie figuur 38.**
3. Laat de hendels los om de rugleuning op zijn plaats te vergrendelen.

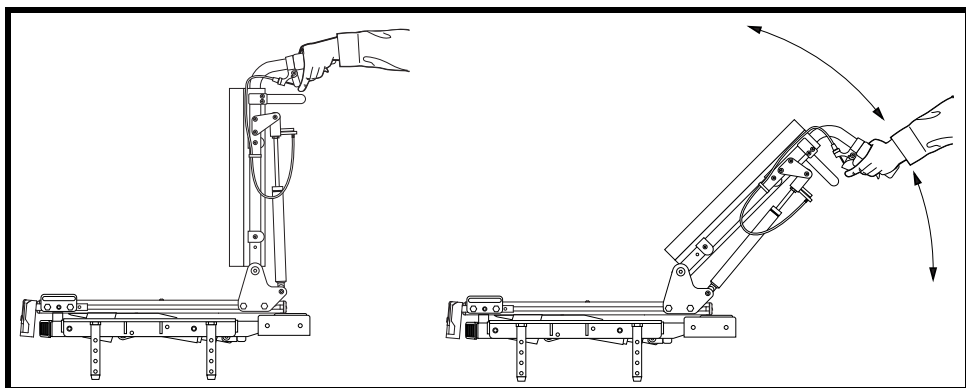

Figuur 38. Handmatige aanpassing van de leunhoek

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat alle bevestigingsmaterialen stevig zijn vastgemaakt, maar draai ze niet té stevig aan.
- Om het zittingsysteem te reinigen neemt u het af met een vochtige doek met milde zeep en water. Grondig laten drogen voor gebruik.



VERBODEN! Vermijd blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of staand water, indien mogelijk. Onderhoud en opslag in schone en droge toestand.



WAARSCHUWING! Pride raadt ten zeerste af dat u rookt terwijl u op het zittingsysteem zit, ondanks het feit dat het systeem de verplichte testeisen voor het roken van sigaretten heeft doorstaan. U dient zich aan de volgende richtlijnen te houden als u besluit sigaretten te roken terwijl u op het zittingsysteem zit.

- Laat brandende sigaretten niet onbeheerd achter.
- Houd asbakken op veilige afstand van het zittingsysteem.
- Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig zijn gedooft voordat u ze weggooit.

GARANTIE

Beperkte garantie van drie jaar

Gedurende drie (3) jaar vanaf de datum van aankoop zal Pride zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging, naar eigen goeddunken en aan de oorspronkelijke koper, van onderstaande onderdelen waarvan na onderzoek door een bevoegde vertegenwoordiger van Pride is gebleken dat zij defecten vertonen in materiaal en/of afwerking:

- Structurele frameonderdelen

Beperkte garantie van twee jaar

Gedurende twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop zal Pride zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging, naar eigen goeddunken en aan de oorspronkelijke koper, van alle onderstaande onderdelen waarvan na onderzoek door een bevoegde vertegenwoordiger van Pride is gebleken dat zij defecten vertonen in materiaal en/of afwerking:

- Elektronica

Garantie van achttien maanden

Gedurende achttien (18) maanden vanaf de datum van aankoop zal Pride zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging, naar eigen goeddunken en aan de oorspronkelijke koper, van alle onderstaande onderdelen waarvan na onderzoek door een bevoegde vertegenwoordiger van Pride is gebleken dat zij defecten vertonen in materiaal en/of afwerking:

- Actuator

Garantieservice kan worden uitgevoerd door een Quantum Rehab-leverancier of door Pride. Stuur geen defecte onderdelen naar Pride zonder voorafgaande goedkeuring. Alle verzendkosten en beschadiging welke is ontstaan tijdens verzending van onderdelen voor reparatie of vervanging zijn voor rekening van de oorspronkelijke koper.

Uitsluiting van garantie

- Bekleding en zitting
- Reparaties en/of wijzigingen van een willekeurig onderdeel die zijn uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Pride
- Omstandigheden buiten de invloedssfeer van Pride
- Arbeidskosten, serviceonderhoud, verzending en andere kosten die zijn ontstaan door reparatie van het product, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door Pride

- Schade veroorzaakt door:
 - Gemorste of gelekte accuvloeistof
 - Misbruik, verkeerd gebruik, ongeluk of nalatigheid
 - Onjuiste bediening, onderhoud of opslag
 - Commercieel gebruik of gebruik dat afwijkt van normaal gebruik

Er bestaat geen andere uitdrukkelijke garantie.

Impliciete garantie, inclusief garantie voor verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel, is beperkt tot één (1) jaar vanaf de datum van aankoop en voorzover wettelijk toegestaan. Enige en alle impliciete garanties zijn uitgesloten. Dit is het enige rechtsmiddel. Aansprakelijkheid voor gevolgschade onder enige en alle garanties is uitgesloten.

Sommige staten geven geen toestemming voor beperking van de duur van impliciete garanties of staan niet toe dat incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten of beperkt. In deze gevallen zijn bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie biedt u specifieke rechten en per staat kunt u bovendien nog andere rechten hebben.

Vul a.u.b. de productregistratiekaart in en stuur deze terug naar Pride Mobility Products Corporation. Op deze manier helpt u Pride in het bieden van de best mogelijke technische service en klantenservice.



QUANTUM REHAB[®]

A DIVISION OF PRIDE MOBILITY PRODUCTS[®] CORP.

Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
UK

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands

Pride[®]
Mobility Products Corp.