


VivaLIFT![®]

POWER RECLINERS

By Pride[®] Mobility Products Corp.

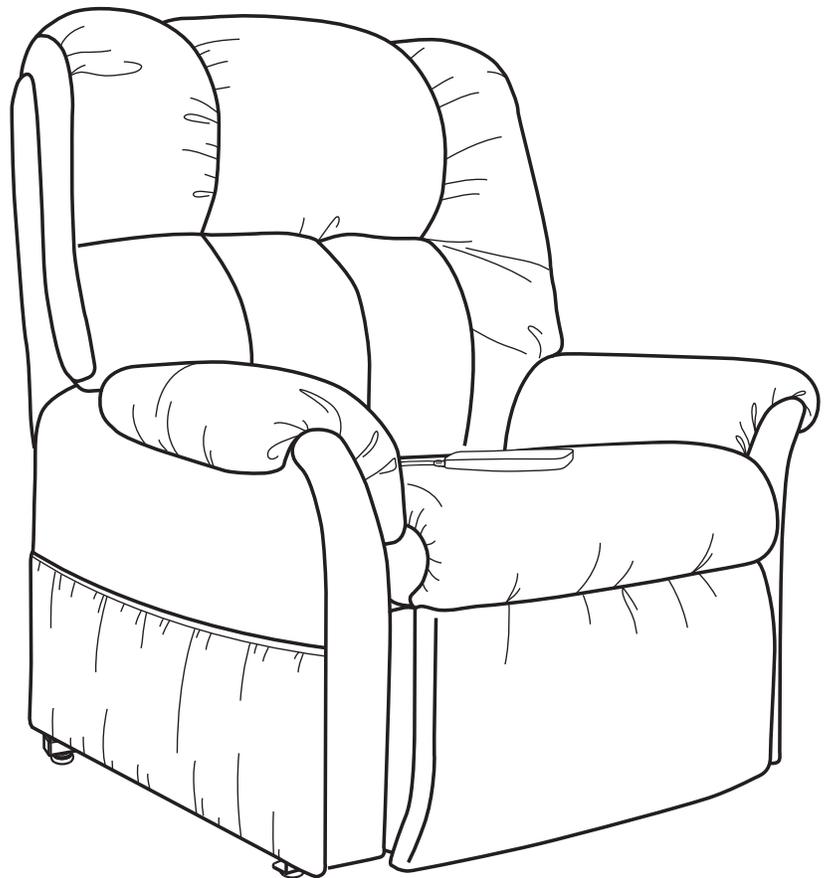

In questo documento sono inclusi: Guida di riferimento per il controllo manuale, cura del tessuto, assemblaggio, garanzia e capacità di peso



NOTA: Questa guida di riferimento rapido fornisce informazioni di base sul montaggio, sulle funzioni del filocomando, informazioni sulla garanzia, la portata massima e le istruzioni per la cura della poltrona. Prima di mettere in funzione la poltrona, leggere attentamente il manuale d'uso e tutti gli altri documenti integrativi relativi alla sicurezza, al funzionamento di base e alla cura e manutenzione.

Le illustrazioni riportano i filocomandi con la funzionalità più elevata. I filocomandi che riceverete potrebbero avere un minor numero di opzioni, ma la funzionalità di base è la stessa.

La funzione principale della "VIVALIFT! power recliner" consiste nella possibilità di regolare il poggiatesta e lo schienale in modo indipendente (solo nelle versioni a due motori), per ottenere la posizione ideale. Per esempio, lo schienale è reclinabile fino a quando non si trova in posizione orizzontale rispetto al suolo. Per farlo, premere e tenere premuto il pulsante "8" (come mostrato nella **figura 1**) fino a quando lo schienale non è completamente reclinato.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI PRINCIPALI DEL FILOCOMANDO

1. PORTA USB

Per collegare o caricare tramite USB i dispositivi abilitati.

NOTA: Gli utenti iPhone devono utilizzare SOLO cavi certificati MFI durante la ricarica dei dispositivi iPhone.

2. PULSANTE "IN" PER POGGIATESTA

Premere e tenere premuto per reclinare il poggiatesta.

3. PULSANTE "OUT" PER POGGIATESTA

Premere e tenere premuto per sollevare il poggiatesta.

4. PULSANTE "IN" PER SUPPORTO LOMBARE

Premere e tenere premuto per disattivare il supporto lombare.

5. PULSANTE "OUT" PER SUPPORTO LOMBARE

Premere e tenere premuto per attivare il supporto lombare.

6. PULSANTE "UP"

Premere e tenere premuto per riportare nella posizione neutra e sollevare la seduta della poltrona.

7. PULSANTE "DOWN"

Premere e tenere premuto per abbassare la poltrona nella posizione seduta o reclinata.

8. PULSANTE "RECLINE" PER SCHIENALE

Premere e tenere premuto per reclinare lo schienale.

9. PULSANTE "INCLINE" PER SCHIENALE

Premere e tenere premuto per sollevare lo schienale.

10. PULSANTE "UP" PER POGGIAPIEDI

Premere e tenere premuto per sollevare il poggiatesta.

11. PULSANTE "DOWN" PER POGGIAPIEDI

Premere e tenere premuto per abbassare il poggiatesta.

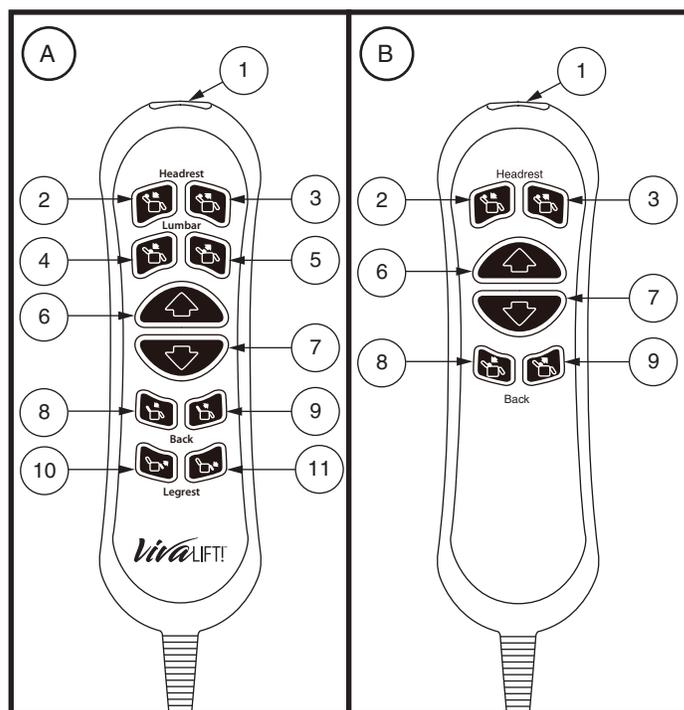


Figura 1. Filocomando - Modelli A e B

INDICAZIONI PER LA CURA DEI TESSUTI

Il rivestimento in tessuto della poltrona è molto resistente, adatto all'uso quotidiano. Pulire solo con detergente neutro o schiuma detergente per tessuti. Evitare il contatto con l'acqua. Non utilizzare solventi spray. Strofinare delicatamente per rimuovere le macchie più ostinate. Provare sempre il detergente in un angolo nascosto del rivestimento per accertarsi che il prodotto utilizzato non danneggi il tessuto. Per un risultato perfetto, lasciare asciugare la poltrona e aspirare.

MONTAGGIO DELLA POLTRONA

NOTA: se la sedia è un modello Infinite, fare riferimento alle istruzioni di montaggio fornite con il sedia. Per il modello a 2 posizioni, i manicotti KD si trovano all'interno come mostrato in figura 2.

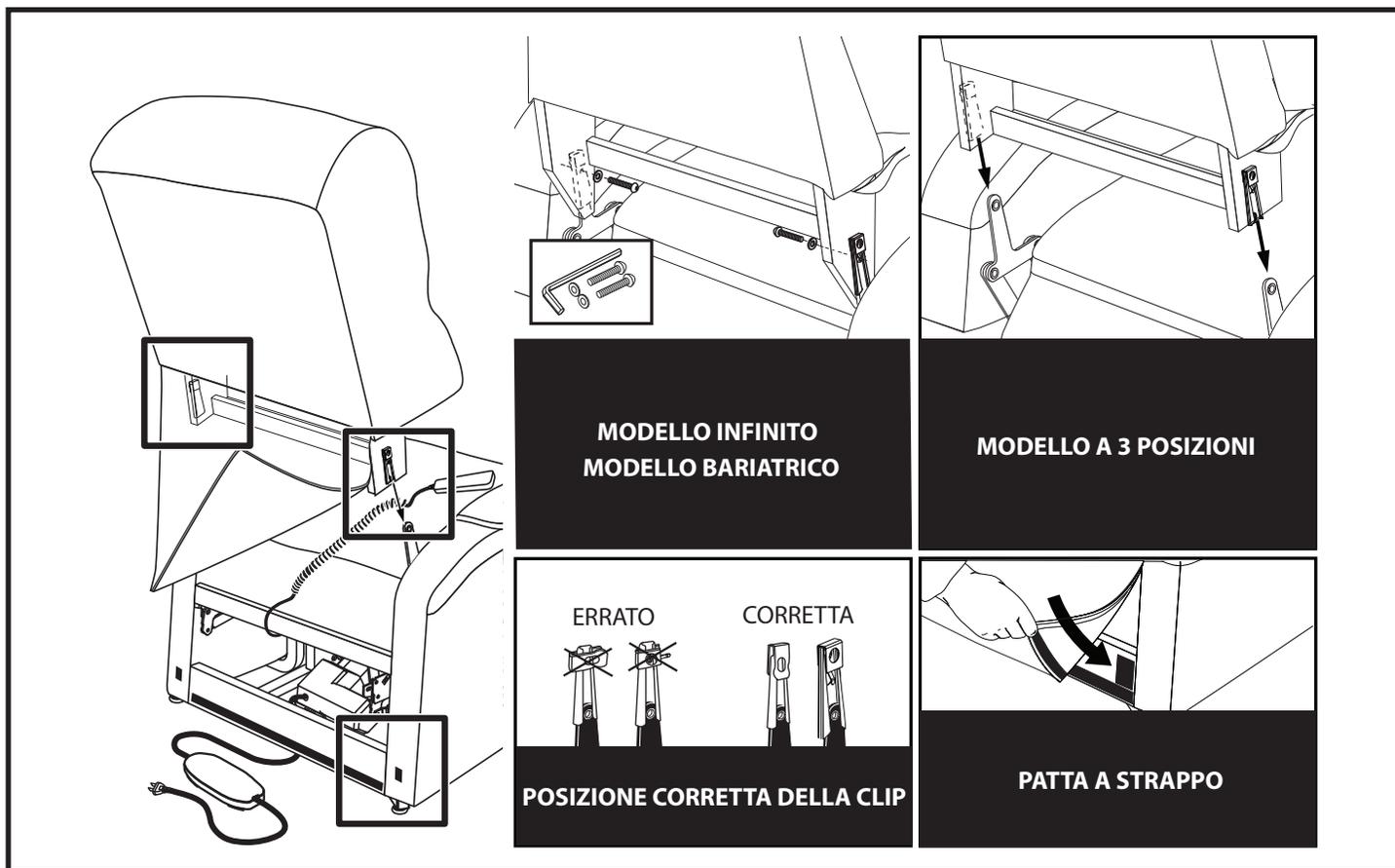


Figura 2. Assembla della presidenza

1. Verificare che il fermaglio di bloccaggio sul retro della poltrona sia in posizione verticale. Riposizionare se necessario.
2. Far passare il comando manuale e il cavo sopra la base della poltrona, quindi far scorrere lo schienale posizionandolo sulla base. Garantire il cavo della pulsantiera passa attraverso la parte posteriore della carrozzina.

NOTA: In base alla larghezza della poltrona, può essere necessario inserire un lato dello schienale alla volta. In questo caso, equilibrare lo schienale della poltrona prima di premere verso il basso per bloccarlo in posizione.

3. Premere con decisione sulla parte superiore dello schienale per bloccarlo in posizione. Si deve sentire uno scatto da ciascun lato della poltrona per garantire che lo schienale sia bloccato in modo corretto.

NOTA: Tirare verso l'alto lo schienale della poltrona per verificare che sia bloccato in posizione.

4. Collegare il cablaggio del comando manuale alla poltrona elevabile e il cablaggio di riscaldamento/massaggio (se presente) alla poltrona elevabile
5. Se il modello è dotato di guide a scorrimento, allineare i manicotti KD e far scorrere la guida verso il basso in posizione, (**vedere la figura 3**). Da notare che sulle staffe c'è un'etichetta. Assemblarle come 1-1 e 2-2.
6. Collegare il cavo del trasformatore allo spinotto che si trova nella parte posteriore della poltrona (**vedere la figura 2**).
7. Collegare il cavo di alimentazione al trasformatore (**vedere la figura 2**).
8. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica vicina al punto in cui la poltrona sarà messa in funzione.

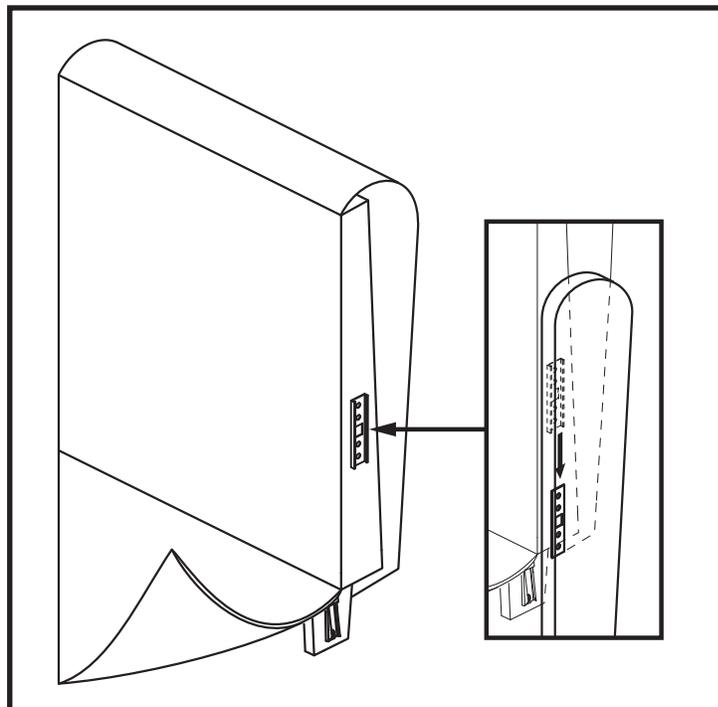


Figura 3. Installazione della guida a scorrimento

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

Per due anni dalla data di acquisto, la Pride riparerà o sostituirà a propria discrezione, all'acquirente originario, la parte riscontrata come difettosa, nei materiali e/o nella lavorazione, dopo esame da parte di un rivenditore autorizzato Pride.

NOTA: Pride si riserva il diritto di sostituire solo la parte che potrebbe essere difettosa, del meccanismo di sollevamento e reclinazione o del telaio della poltrona.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

Questa garanzia non si estende al tessuto ed all'imbottitura, entrambi soggetti ad usura. Pride non è responsabile o obbligata a pagare per la manodopera, le richieste di assistenza, le spese di spedizione e/o qualsiasi altra spesa sostenuta per la riparazione del prodotto. Tutti i costi di trasporto e i danni verificatisi durante la spedizione delle parti per la riparazione o la sostituzione, sono a carico dell'acquirente. Contattare il rivenditore autorizzato Pride per informazioni sui costi relativi all'intervento dell'assistenza.

- Circostanze non imputabili a Pride
- Spese per la manodopera, richieste di assistenza, spedizione e altre spese sostenute per la riparazione del prodotto, se non specificatamente e precedentemente autorizzate da Pride
- Riparazioni e/o modifiche apportate a qualsiasi parte del prodotto senza l'autorizzazione di Pride

Inoltre, sono esclusi i danni alle parti causati da:

- Contaminazione
- Abuso, uso improprio, incidente o negligenza
- Fuoriuscita o perdita del liquido della batteria
- Uso commerciale o altro uso improprio
- Funzionamento, manutenzione o custodia impropri.

La poltrona è stata progettata per la comodità dell'utente. Per informazioni sulla portata, consultare la tabella delle specifiche tecniche qui di seguito. Consultare il manuale utente per ogni ulteriore informazione riguardante la poltrona.

MODELLO	PORTATA
CLASSIC 1 (STL371)	137 kg
CLASSIC 2 (STE371)	158 kg
DELUXE (STL204)	137 kg
DOMINA (STE229)	158 kg
PERFECTA (STE225-HL)	170 kg



OBBLIGATORIO! Non superare la portata massima specificata per la poltrona. Il superamento della portata massima renderà nulla la garanzia.

Rev E/June 2021



I N F I N I T Y B 3 8 9 2