




REACH

MANUEL DE L'UTILISATEUR

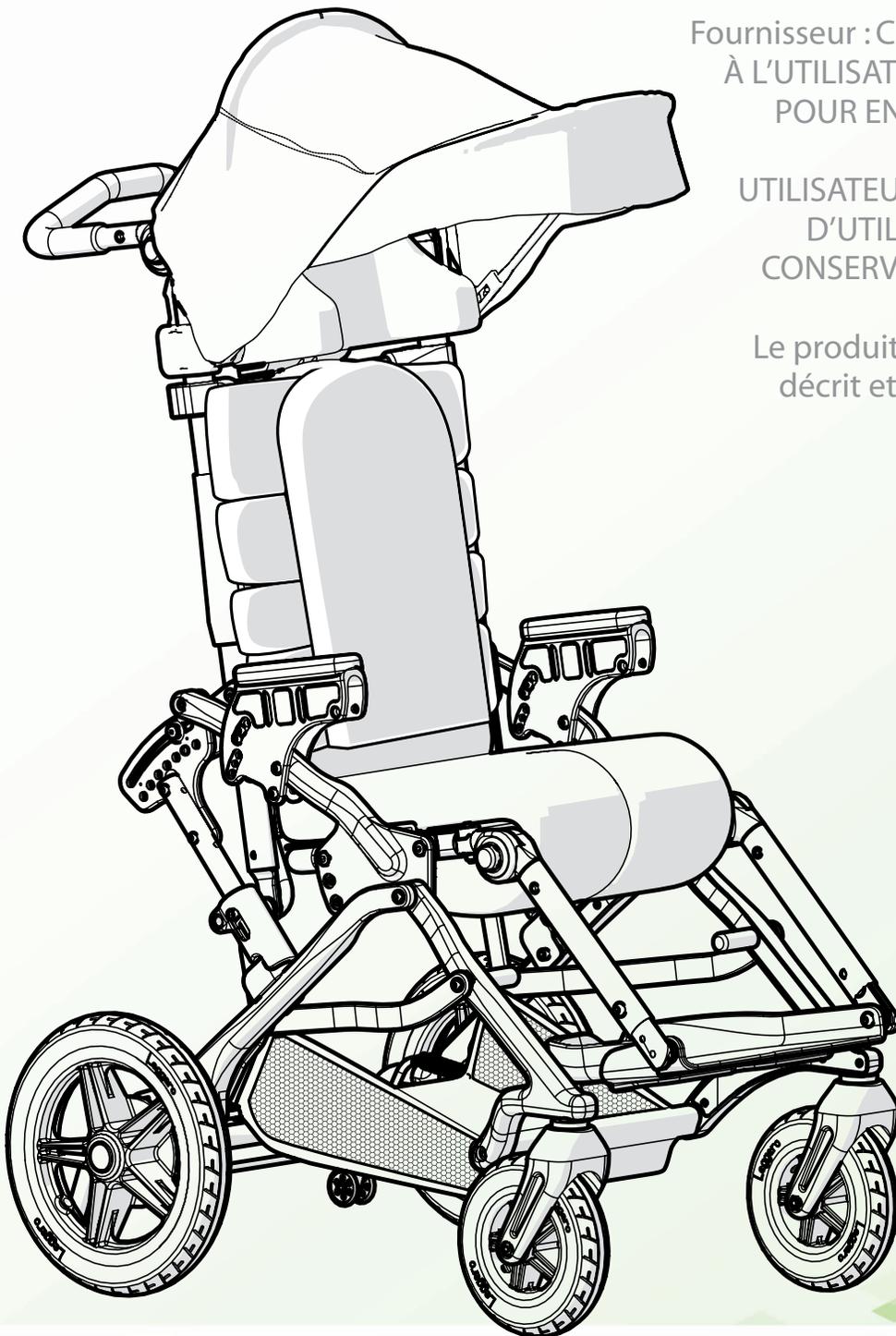

Fournisseur : CE MANUEL DOIT ÊTRE REMIS
À L'UTILISATEUR DE CETTE BASE MOBILE
POUR ENFANTS À MOBILITÉ RÉDUITE

UTILISATEUR : LISEZ CE MANUEL AVANT
D'UTILISER CETTE BASE MOBILE ET
CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION

Le produit fourni peut différer de celui
décrit et représenté dans ce manuel.

Vous avez fait un excellent choix pour votre enfant en choisissant une chaise Leggero.
Nous croyons que chaque enfant doit pouvoir fonctionner au meilleur de ses habiletés.
Vos questions et vos commentaires concernant nos produits et services sont les bienvenus.
Veuillez nous contacter ou contacter un fournisseur autorisé à l'aide de l'information ci-dessous.

Leggero

174 D Shepherd Trail
Bozeman, MT
59718 USA
Sans frais : 1-844-503-KIDS
www.leggero.us

Fournisseur Leggero autorisé :

<i>Nom du fournisseur</i>	
<i>Adresse</i>	
<i>Téléphone</i>	
<i>Courriel</i>	
<i>Site Web</i>	

Distributeur canadien autorisé: Pride Mobility Products Corporation®
5096 South Service Rd., Beamsville (Ontario) L0R 1B3
Téléphone: (888) 570-1113 • Télécopieur: (866) 514-1303



Table des matières

	Page
1re section Introduction et caractéristiques	
1.1 Introduction	4
1.2 Utilisateurs de Reach	4
1.3 Préposés de Reach	4
1.4 Conditions de garantie	4
1.5 Service après-vente et réparation	4
1.6 Caractéristiques	5
1.7 Réglages et spécifications	6
2e section Mises en garde	7
3e section Déballer votre chaise Reach	10
4e section Fonctionnement et réglages	11
4.1 Blocage des roues	11
4.2 Réglage de l'angle du guidon	12
4.3 Réglage de l'angle au niveau des genoux	12
4.4 Réglage de l'angle d'inclinaison du siège	12
4.5 Réglage de l'angle au niveau des hanches	13
4.6 Pliage	13
4.7 Réglage de la hauteur de l'appui-pieds	14
4.8 Réglage de la hauteur du dossier	16
4.9 Réglage de la profondeur du siège	16
4.10 Réglage des accoudoirs	18
4.11 Positionner le plateau	18
4.12 Utiliser la chaise Reach dans un véhicule automobile	19
5e section Garantie limitée	20
6e section Entretien et registre d'entretien	21

1re section Introduction, mises en garde et caractéristiques

1.1 Introduction

Merci d'avoir sélectionné la chaise Reach. Ce manuel explique comment opérer, régler et maintenir votre chaise Reach. Le produit tel que décrit peut être modifié sans préavis.

Nous sommes désolés de ne pouvoir fournir cette information dans un format approprié pour les personnes malvoyantes. Les personnes malvoyantes doivent contacter un fournisseur autorisé Leggero pour obtenir de l'information et des instructions sous forme de communication verbale ainsi qu'une formation pratique si nécessaire.

1.2 Utilisateurs de Reach

Les poussettes de réadaptation et les systèmes de positionnement pédiatriques sont conçus pour les enfants limités à une position assise qui nécessitent de l'aide à la mobilité et au positionnement. Ces individus peuvent avoir une vaste gamme de troubles limitant leur habileté à être mobile sans un tel système. Pour connaître l'occupation maximum et autres caractéristiques, veuillez vous référer à la section 1.7 de ce manuel.

1.3 Préposés de Reach

Les préposés qui opèrent cette chaise doivent être visuellement, mentalement et physiquement aptes à manœuvrer cette chaise sous toutes circonstances. Les préposés doivent lire et suivre toutes les instructions fournies dans ce manuel.


1.4 Conditions de garantie

La garantie ne s'applique que si le produit est utilisé en conformité avec les recommandations du fabricant et aux fins et conditions prévues pour ce produit.

1.5 Service après-vente et réparation

Le service après-vente et les réparations de la chaise Reachne doivent être effectués que par un fournisseur Leggero autorisé. Si le moindre problème venait à surgir, contactez le fournisseur qui vous a vendu la chaise. Les fournisseurs autorisés n'installent et ne remplacent que des pièces Leggero d'origines.

1.6 Caractéristiques

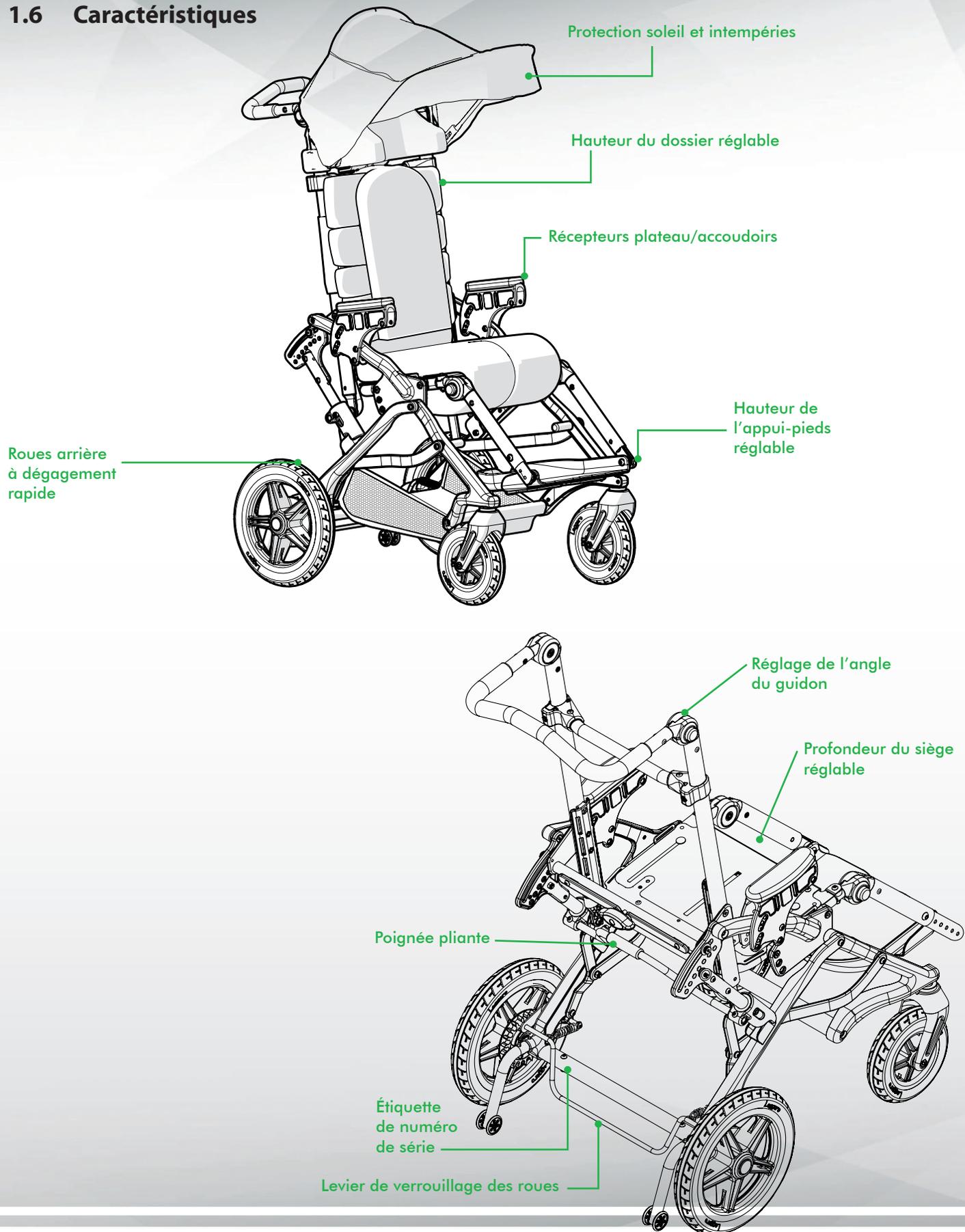

1.7 Réglages et spécifications

Réglages

	Reach 12	Reach 14	Reach 16
<i>Profondeur du siège</i>	8-13" (20-33cm)	11-16" (28-40cm)	13-18" (33-46cm)
<i>Largeur du siège</i>	12" (30 cm)	14" (35 cm)	16" (40 cm)
<i>Du siège au plateau</i>	8-13" (20-33cm)	11-16" (28-40cm)	13-18" (33-46cm)
<i>Hauteur maximum du dossier</i>	18" (46 cm)	21" (53 cm)	24" (61 cm)
<i>Réglage de l'angle au niveau des hanches</i>	85-115 °	85-105 °	85-95 °
<i>Angle du siège</i>	10 °, 20 °, or 30 °	10 °, 20 °, or 30 °	10 °, 20 °, or 30 °

Positionnement du plateau thérapeutique

Spécifications

	Reach 12	Reach 14	Reach 16
<i>Poids maximum de l'utilisateur</i>	80 lb (36 kg)	110 lb (50 kg)	150 lb (68 kg)
<i>Poids de la base mobile</i>	27 lb (12 kg)	29 lb (13 kg)	31 lb (14 kg)
<i>Largeur hors-tout</i>	21,5" (55 cm)	23,5" (60 cm)	25,5" (65 cm)
<i>Diamètre du pneu avant</i>	7" (18 cm)	7" (18 cm)	7" (18 cm)
<i>Diamètre du pneu arrière</i>	16" (40 cm)	16" (40 cm)	16" (40 cm)
<i>Dimensions du produit plié</i>	31 x 21,5 x 18" (79 x 55 x 46cm)	31 x 23,5 x 18" (79 x 60 x 46cm)	33 x 25,5 x 18" (84 x 65 x 46cm)
<i>Inclinaison sécuritaire maximale</i>	5 °	5 °	5 °

2e section Mises en garde

Veillez lire ce manuel au complet avant l'utilisation

Tous les gardiens et/ou préposés doivent lire ce manuel d'utilisation avant de se servir de cette chaise Reach. Familiarisez-vous avec l'emploi et les fonctions de ce produit avant de l'utiliser. Si vous ne comprenez pas toute partie de l'information contenue dans ce manuel, veuillez contacter votre fournisseur Leggero autorisé pour recevoir de l'aide.

Le fait de ne pas respecter les instructions ou les mises en garde contenues dans ce manuel pourrait causer des blessures et endommager la chaise Reach et possiblement annuler la garantie.

Symboles utilisés sur les étiquettes de mises en garde du produit et dans le manuel d'utilisation.



MISE EN GARDE!

Les mots « MISE EN GARDE » et ce symbole indiquent des pratiques qui ne sont pas sécuritaires ou qui sont dangereuses et pourraient entraîner de sérieuses blessures à l'occupant et au préposé.



MISE EN GARDE! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTION

Sélectionnez la bonne chaise et les options de sécurité

Dans le secteur de la mobilité, plusieurs options sont offertes pour répondre aux besoins de votre enfant. Assurez-vous que vous (et votre fournisseur) choisissiez la chaise et les options qui tiennent compte du confort, du positionnement et des limitations physiques de votre enfant et des dangers qui pourraient survenir lors l'usage quotidien.

 **Mises en garde : Le fait de ne pas respecter les mises en garde ci-dessous pourrait causer des blessures graves ou mortelles.**

 **MISE EN GARDE!** Tous les gardiens et/ou préposés doivent lire ce manuel d'utilisation avant de se servir de la chaise Reach. Familiarisez-vous avec l'emploi et les fonctions de ce produit avant de l'utiliser. Si vous ne comprenez pas une partie de l'information contenue dans ce manuel, veuillez contacter votre fournisseur Leggero autorisé pour recevoir de l'aide.

 **MISE EN GARDE!** L'utilisation et la manipulation non conventionnelle de ce produit peuvent être dangereuses. Cette poussette n'est pas appropriée pour le patinage ou toutes autres activités à haute vitesse. Les roues avant pivotantes peuvent osciller à une vitesse supérieure et peuvent causer un arrêt soudain et renverser la chaise. Pour un maximum de sécurité, n'utilisez la chaise qu'à une vitesse de marche normale. Vous ne devez en aucun cas lâcher le guidon en poussant. Ne jamais repousser la chaise.

 **MISE EN GARDE!** L'installation initiale de cette poussette doit être accomplie par un technicien qualifié.

 **MISE EN GARDE!** Toutes procédures autres que celles décrites dans ce manuel doivent être accomplies par un technicien qualifié.

 **MISE EN GARDE!** Le poids transporté par la chaise Reach ne doit pas dépasser le poids limite total de 80lb/36kg pour les chaises 12", 110lb/50kg pour les chaises 14", ou 150lb/68kg pour les chaises 16" (le poids maximum de l'occupant plus le poids des accessoires et des articles transportés).

 **MISE EN GARDE!** Tous réglages faits à la chaise peuvent affecter sa stabilité et accroître les risques de renversement. Les mises au point doivent être accomplies par un fournisseur Leggero autorisé.

 **MISE EN GARDE!** Évitez de mouiller la chaise ou de l'entreposer dans un environnement humide. L'excès d'humidité peut entraîner la rouille et la corrosion, ce qui peut causer une défaillance de composants. Si la chaise est exposée à l'humidité, séchez complètement.

 **MISE EN GARDE!** Ne laissez pas la chaise ou l'enfant au soleil ou près d'autres sources de chaleur, car les surfaces de la chaise peuvent atteindre des températures capables de brûler un enfant. Ne laissez pas la chaise ou l'enfant dehors à des températures froides, car le contact avec une chaise à des températures sous zéro pourrait causer des blessures. L'exposition à des températures extrêmes, chaudes ou froides, peut aussi endommager la chaise.

 **MISE EN GARDE!** La chaise ne devrait être utilisée que sur un sol ferme et plat. N'essayez pas de pousser la chaise par-dessus ou dans des obstacles. Toujours retirer l'enfant de la chaise avant de soulever la chaise pour éviter des obstacles.

 **MISE EN GARDE!** Ne pas utiliser la chaise sur une pente d'une inclinaison supérieure à cinq degrés. Ne laissez pas la chaise garée sur une pente ou un endroit incliné. Soyez particulièrement attentif lorsque vous êtes sur une pente ou dans un endroit incliné pour prévenir la chute de l'enfant hors de la chaise, le renversement de la chaise ou le déplacement accidentel de la chaise.

 **MISE EN GARDE!** Veuillez toujours engager le blocage de roue avant d'asseoir l'occupant ou avant de le sortir. N'utilisez pas le blocage de roue pour arrêter la chaise en mouvement.

 **MISE EN GARDE!** Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la chaise même s'il est attaché et que le blocage de roue est engagé.

 **MISE EN GARDE!** Si l'occupant tend les bras pour saisir des objets devant, à côté ou derrière la chaise, assurez-vous qu'il ne se penche pas trop loin. Le changement du centre de gravité pourrait faire renverser la chaise.

 **MISE EN GARDE!** Ne vous tenez pas sur l'appui-pieds lors du transfert de l'occupant dans ou hors de la chaise.

 **MISE EN GARDE!** Lors du pliage de la chaise, soyez conscient des risques de blessures aux doigts qui pourraient être écrasés ou coincés. Veuillez consulter la section 4.6 de ce manuel pour plus d'information.

 **MISE EN GARDE!** Les courroies du harnais de sécurité ou des ceintures abdominales peuvent se coincer dans le support de verrouillage pliant. Veuillez tailler les courroies aussi courtes que possible. Assurez-vous toujours que le châssis est verrouillé en position verticale avant de continuer l'utilisation. Lors du dépliage, vous entendrez un « clic » au moment du verrouillage du châssis.

 **MISE EN GARDE!** Cette chaise est conçue pour ne transporter qu'un enfant à la fois. Veuillez ne pas transporter plus d'un enfant à la fois.

 **MISE EN GARDE!** Ne soulevez la chaise que par les parties solidement attachées. Dans la mesure du possible, la chaise ne devrait être soulevée que par les éléments de châssis latéraux. Si pliée, tenez la chaise par les tubes du châssis inférieur. Utilisez toujours deux personnes pour soulever la chaise pour éviter de l'endommager.

 **MISE EN GARDE!** Conservez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants. Jetez tout le matériel d'emballage après avoir déballé le produit.

 **MISE EN GARDE!** Si votre chaise n'est pas équipée avec l'option transit, ne l'utilisez pas comme siège de voiture. Transférez l'enfant de la chaise à un siège de voiture approuvé. Si votre chaise est équipée avec l'option transit, veuillez consulter la section 4.12 de ce manuel.

 **MISE EN GARDE!** La chaise doit être inspectée et entretenue selon le tableau de la section 6 : Entretien. Tout problème détecté doit être réparé avant de réutiliser la chaise.

 **MISE EN GARDE!** Plusieurs des attaches utilisées pour fabriquer la chaise Reach sont composées d'un boulon et d'un anneau de sécurité de nylon. Ces raccords doivent être entretenus et sécurisés avec les attaches de l'équipement d'origine et ajustés correctement. Pour ajuster correctement les points de pivot, consultez votre fournisseur de service autorisé.

3e section Déballer votre chaise Reach

1. Retirez la chaise de l'emballage.
2. Jetez tous le matériel d'emballage en plastique.
3. Dépliez le châssis et le dossier du siège, consultez la section 4,6 de ce manuel.
4. Installez les roues arrière, consultez la Figure 1.
5. Vérifiez le bon réglage des essieux à dégagement rapide en tirant la roue vers l'extérieur. La roue devrait rester en place.
6. Engagez le blocage de roue, consultez la section 4,1 de ce manuel.
7. Installez les pieds d'anti-basculement, consultez la Figure 2.

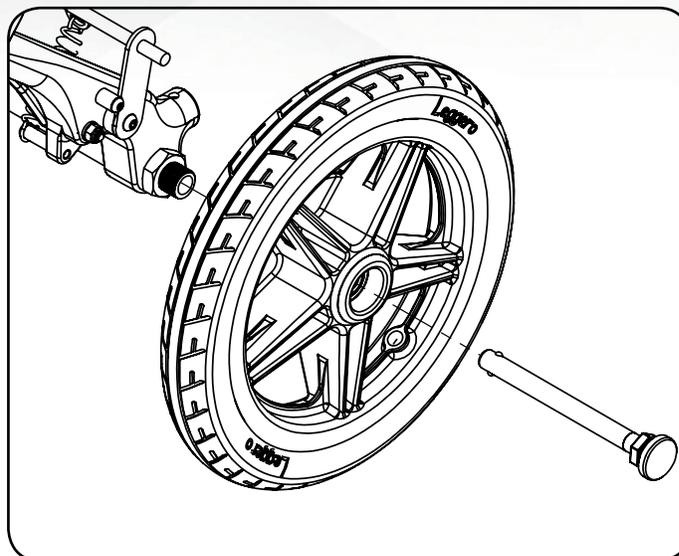


Figure 1

MISE EN GARDE! Conservez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants. Jetez tout le matériel d'emballage après avoir déballé le produit.


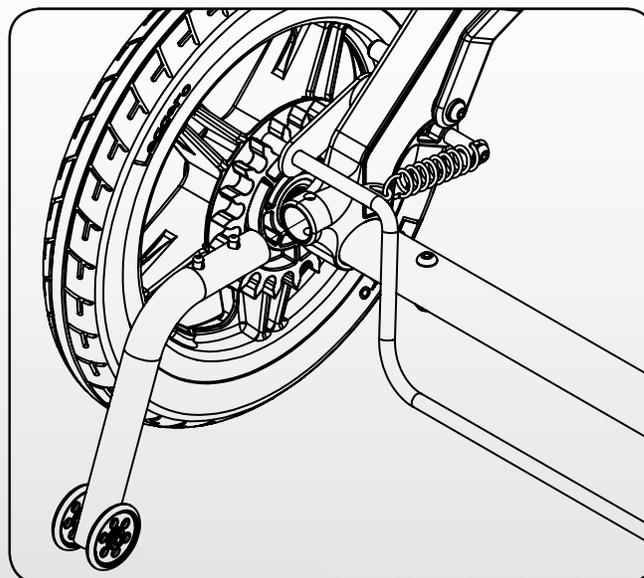



Figure 2

4e section Fonctionnement et réglage


Outils nécessaires :

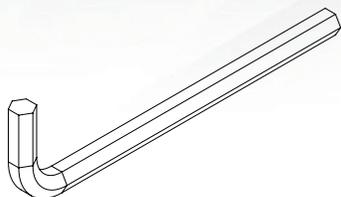

4 mm clé hexagonale

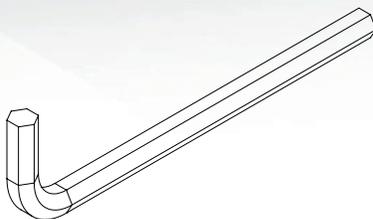

5 mm clé hexagonale

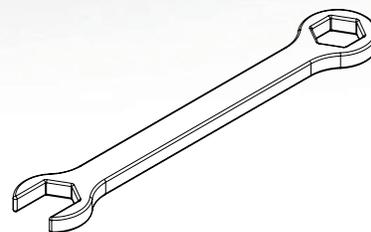

13 mm clé

4.1 Fonctionnement du blocage des roues

1. Pour engager le blocage des roues, pousser la barre transversale vers le bas avec votre pied. Consultez figure 3.
2. Vérifiez que le blocage des roues est engagé de chaque côté en essayant de déplacer la chaise de l'avant à l'arrière.
3. Pour désengager le blocage des roues, tirer la barre transversale avec votre pied. Consultez Figure 4.

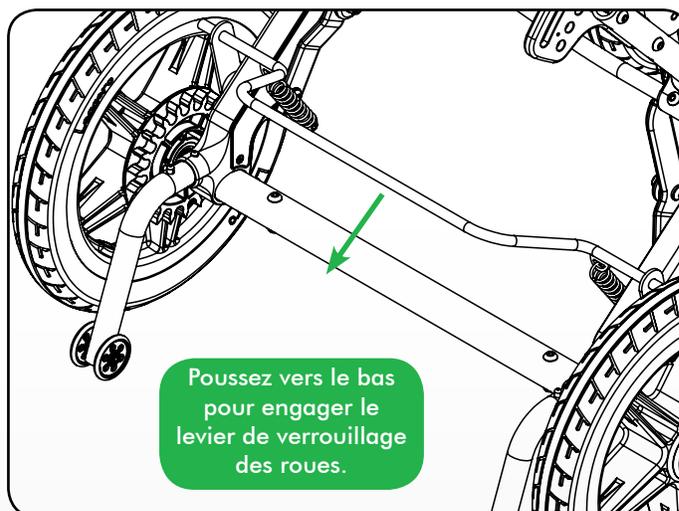


Figure 3

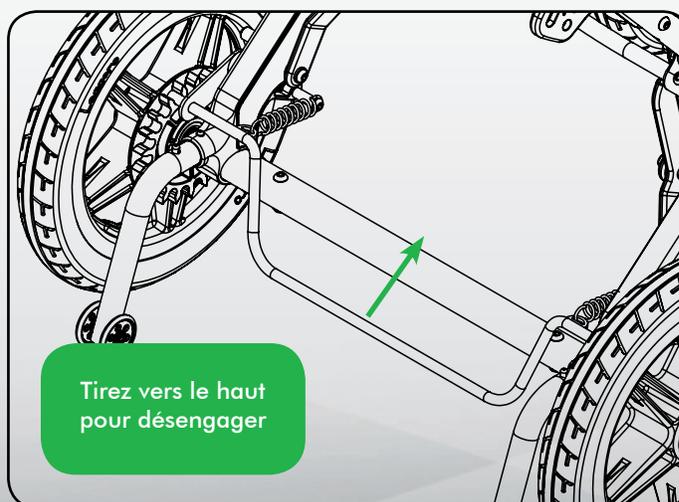


Figure 4

4.2 Réglage de l'angle du guidon

1. Appuyez et tenez les boutons à l'extérieur de chaque encliquetage de réglage, consultez figure 5.
2. Ajustez le guidon à l'angle désiré.
3. Relâchez les boutons.

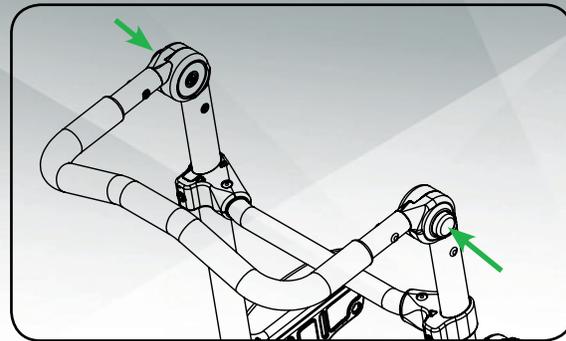


Figure 5

4.3 Réglage de l'angle au niveau des genoux

1. Appuyez et tenez les boutons à l'extérieur de chaque encliquetage de réglage, consultez figure 6.
2. Ajustez les genoux à l'angle désiré.
3. Relâchez les boutons.

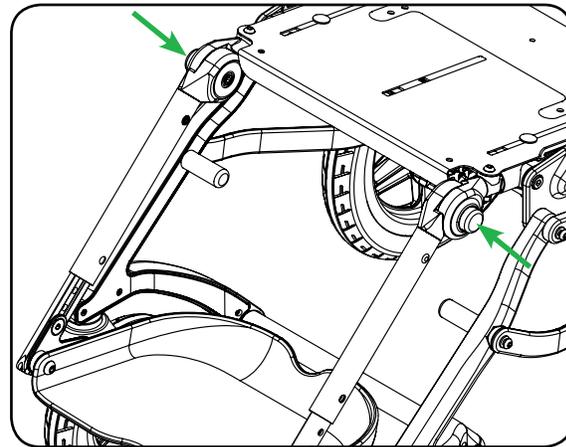


Figure 6

4.4 Réglage de l'angle d'inclinaison du siège

1. Engagez les blocages de roues.
2. Retirez les boulons du côté gauche et du côté droit, consultez figure 7. La clé hexagonale 5mm et la clé 13 mm sont nécessaires.
3. Ajustez le siège à l'angle désiré, consultez figure 8.
4. Installez les boulons, serrez. Ne surcouplez pas, cela pourrait causer des dommages au tube du siège.
5. Ajustez l'angle d'inclinaison, consultez la section 4.5.

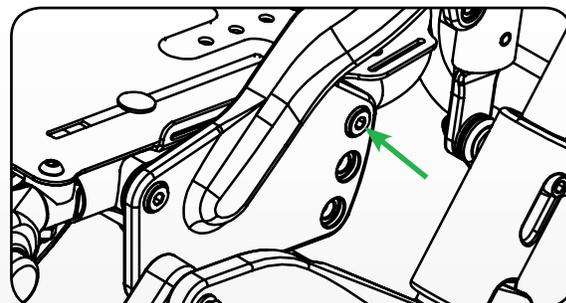


Figure 7



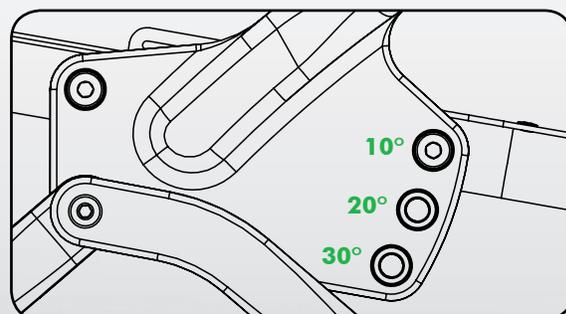


Figure 8

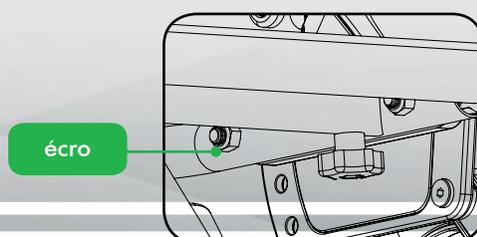


4.5 Ajustement de l'angle au niveau des hanches

1. Engagez les blocages de roues.
2. Placez une main sur le guidon.
3. Faites tourner la poignée dans une ou l'autre direction pour déverrouiller l'angle au niveau des hanches.
4. Ajustez à la position désirée.
5. Libérez la poignée pour verrouiller en position.
6. Pour vous assurer que l'angle au niveau des hanches est verrouillé, vérifiez l'alignement de l'assemblage de la poignée. Les liens devraient être parallèles au tube comme le montre la figure 9.

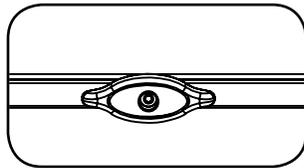

Verrouillé

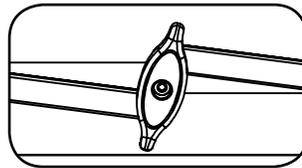

Déverrouillé

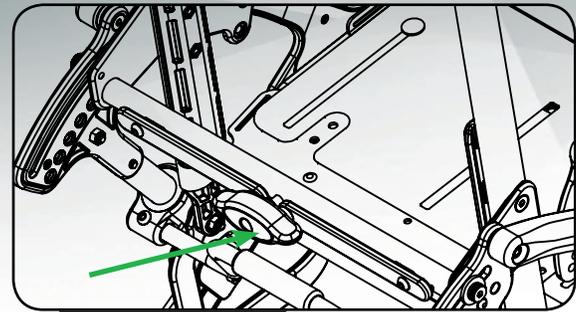


Figure 9 verrouillé


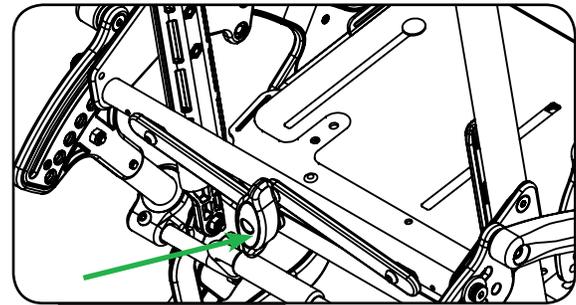



Figure 10 déverrouillé

4.6 Pliage et dépliage


Pliage

1. Engagez le dispositif de blocage des roues [1].
2. Si la chaise dispose d'un angle de siège de 20° ou 30°, réglez l'angle au niveau de la hanche à la position la plus en avant [2].
3. Si la chaise dispose d'un angle d'inclinaison de 10°, réglez l'angle au niveau de la hanche à (1) une position vers l'arrière à partir de la position la plus avancée [3].
4. Placez une main sur le guidon, avec l'autre main tirez la poignée de pliage vers le haut [4].
5. Poussez vers l'avant sur le guidon tout en soulevant le cliquet de réglage de l'angle au niveau du genou pour plier la chaise [5].
6. Poussez le guidon vers l'intérieur [6].
7. Pliez le repose-pied vers le haut [7].
8. Réglez l'angle au niveau du genou le plus possible vers l'intérieur [8].

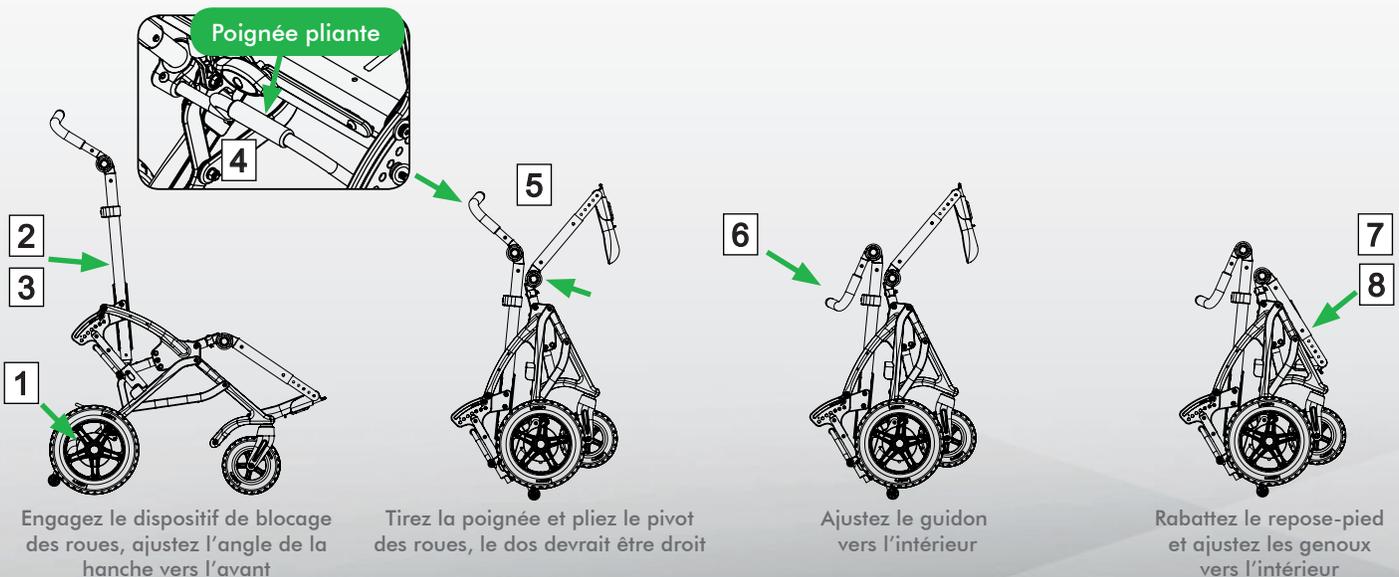


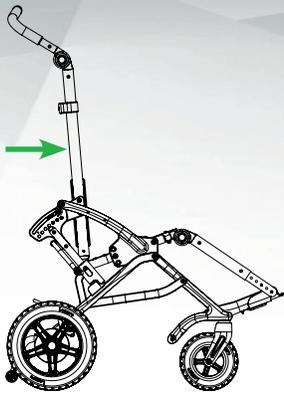


Ajustez l'angle au niveau des hanches vers l'avant

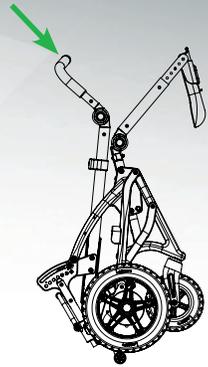

Tirez la poignée et pliez

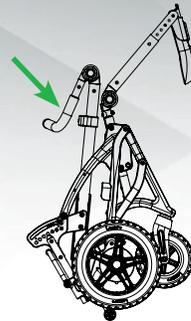

Ajustez le guidon vers l'intérieur

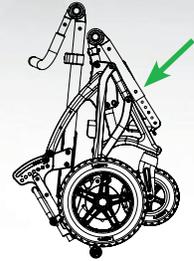

Retournez l'appui-pieds & d'genoux vers l'intérieur

MISE EN GARDE! En pliant et dépliant, gardez les bras, les mains et les pieds à l'écart des pièces en mouvement pour éviter des blessures. Consultez figure 13, les flèches indiquent les endroits qui pourraient pincer.

MISE EN GARDE! Les courroies du harnais de sécurité ou des ceintures abdominales peuvent se coincer dans le support de verrouillage pliant. Veuillez tailler les courroies le plus court possible et attachez les ceintures sous-abdominales avant de plier.

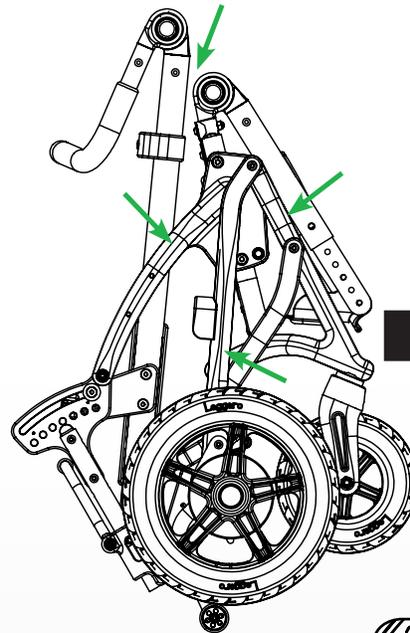


Figure 13

4.7 Réglage de la hauteur de l'appui-pieds

1. Retirez les boulons à tête du côté gauche et du côté droit.

Une clé hexagonale 5mm est nécessaire.

2. Ajustez l'appui-pieds à la hauteur désirée.

3. Réinstallez les boulons.


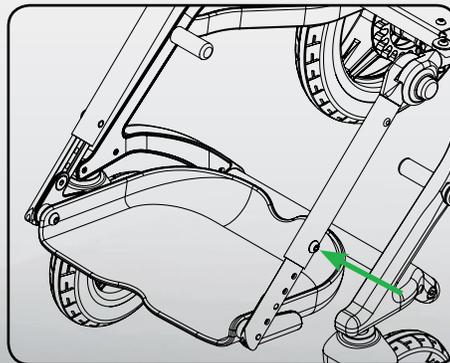


Figure 14

Les courroies ici peuvent empêcher le châssis de se verrouiller

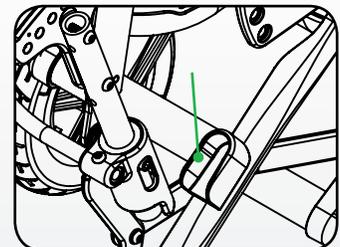

4.7 Réglage de la hauteur de l'appui-pieds (suite)

Si votre appui-pieds est actuellement disposé comme sur la figure 14, il pourrait être nécessaire d'ajuster l'assemblage de l'appui-pieds vers le bas sur l'extension. (Chaises 12" & 14" seulement).

1. Retirez les boulons comme décrit dans la section précédente.
2. Retirez l'assemblage de l'appui-pieds de la chaise.
3. Retirez les boulons à tête plate et à tête ronde du côté gauche et du côté droit, consultez la figure 16. Une clé hexagonale 5mm est nécessaire.
4. Réinstallez les boulons à une position plus basse sur l'extension comme décrit à la figure 17.
5. Réinstallez l'assemblage de l'appui-pieds et ajustez à la hauteur désirée.

Pour les chaises 12", il sera nécessaire de changer l'extension de l'appui-pieds pour obtenir une longueur pour les jambes de plus de 11in/28cm. Des extensions plus longues ont été fournies avec votre chaise, mais si vous ne les avez pas, veuillez contacter votre fournisseur autorisé.

1. Retirez les boulons comme décrit dans la section précédente. Consultez figure 18.
2. Installez les extensions plus longues comme décrit à la figure 19. Pour une longueur plus longue que ce qui était possible avec les extensions plus courtes, installez les boulons à tête plate au septième trou à partir du haut de l'extension.
3. Installez l'assemblage de l'appui-pied dans la chaise et ajustez à la hauteur désirée.

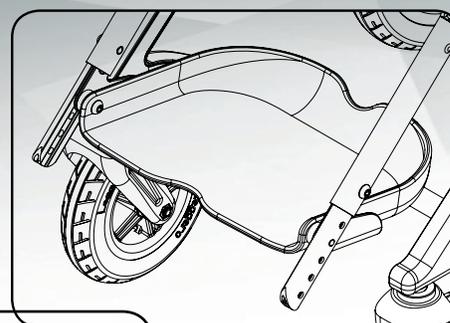


Figure 15

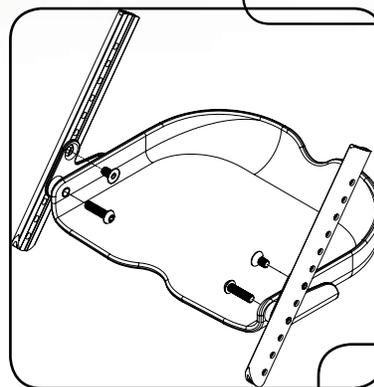


Figure 16

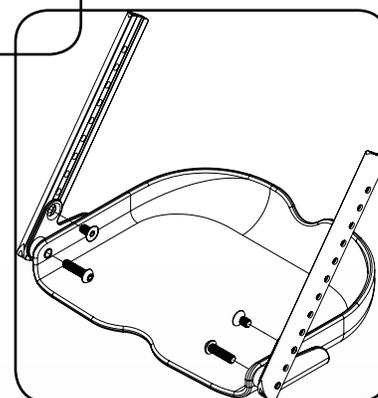


Figure 17

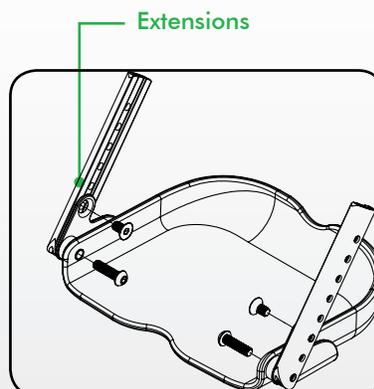


Figure 18

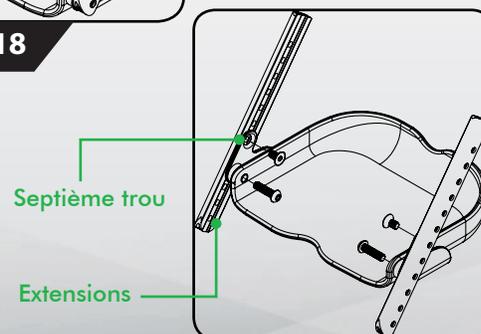


Figure 19

4.8 Réglage de la hauteur du dossier

Dossier réglable

1. Desserrez les boulons aux endroits marqués à la figure 20. Une clé hexagonale 5mm est nécessaire.
2. Ajustez le dossier à la hauteur désirée.
3. Serrez les boulons.

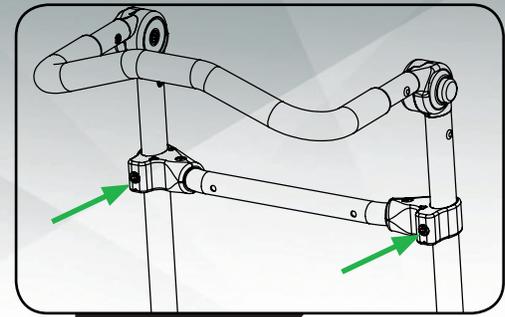


Figure 20

Dossier réglable avec plaque rigide

1. Desserrez les boulons (4) aux emplacements indiqués à la figure 21. Clé hexagonale de 5 mm requise
2. Réglez le dossier à la hauteur désirée.
3. Serrez les boulons.

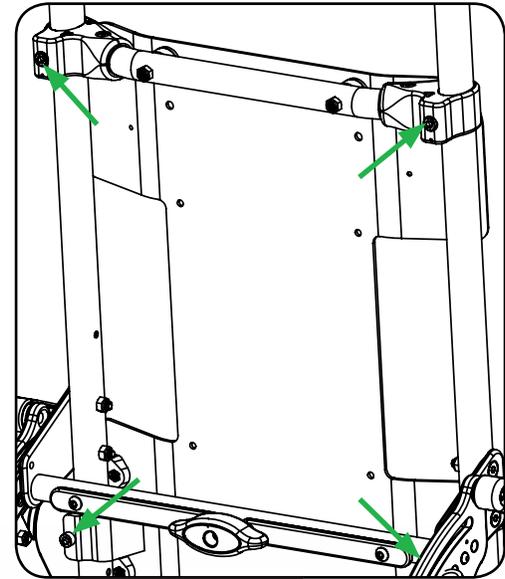


Figure 21

4.9 Réglage de la profondeur du siège

1. Desserrez les courroies du coussin du siège.
2. Desserrez le ou les bouton(s) sous la base du siège. Consultez la figure 22 ou 23.
3. Ajustez l'assemblage du siège avant à la profondeur désirée.
4. Serrez le ou les bouton(s).
5. Serrez les courroies du coussin du siège.

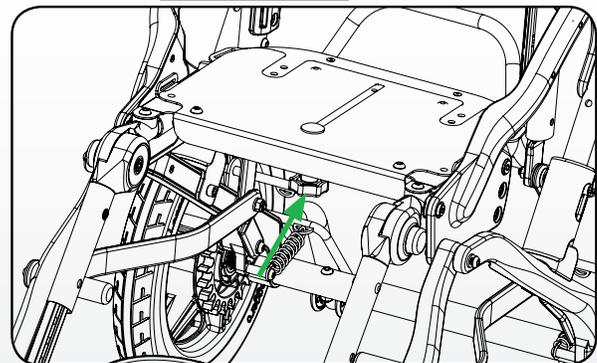


Figure 22

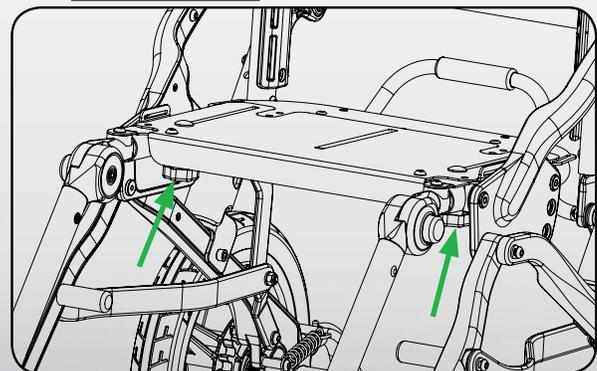


Figure 23

4.9 Réglage de la profondeur du siège (suite)

Pour les chaises 12" et 14", il pourrait être nécessaire d'enlever la base d'ajustement du siège pour en arriver à la profondeur désirée. Avec les chaises 12", la base devra être retirée pour arriver à une profondeur de 11"-13". Avec les chaises 14", la base devra être retirée pour arriver à une profondeur de 14"-16".

1. Retirez le coussin du siège.
2. Retirez les boulons avant **1** avec une clé 10mm et une clé hexagonale 4mm
3. Retirez les boulons et boutons **2** d'ajustement de la profondeur du siège.
4. Retirez l'assemblage de la base du siège de la chaise.
5. Retirez la base d'ajustement de la profondeur du siège **3** de la base du siège avec une clé hexagonale 4mm et une clé 10mm.
6. Réinstallez la base du siège comme décrit à la figure 26.
7. Réinstallez les boulons avants, les boulons d'ajustements de la profondeur du siège et les boutons.
8. Ajustez le siège à la profondeur désirée.
9. Réinstallez le coussin du siège.

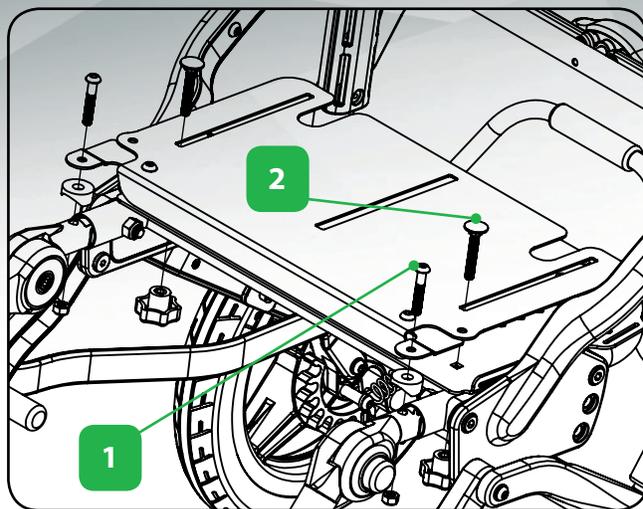


Figure 24

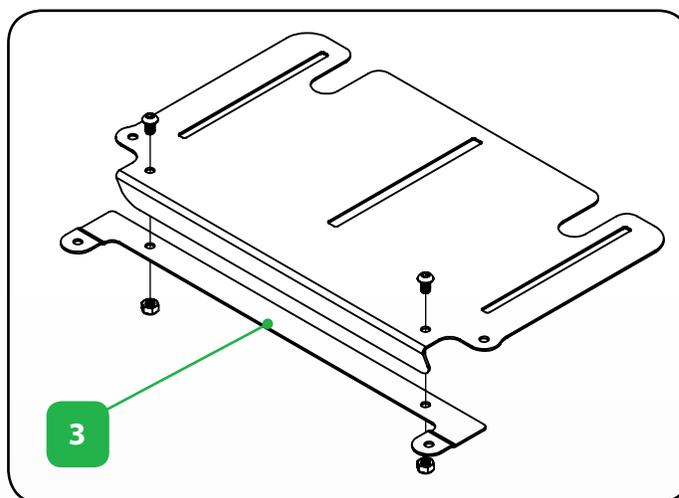


Figure 25

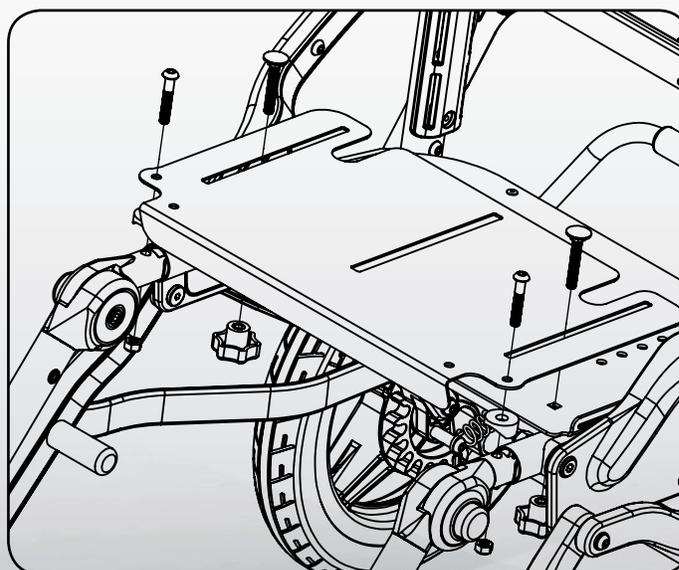


Figure 26

4.10 Réglage des accoudoirs

Pour ajuster la hauteur :

1. Retirez les boulons à tête ronde (4).
Une clé hexagonale 4mm est nécessaire.
Consultez la figure 27.
2. Ajustez à la hauteur désirée.
3. Réinstallez les boulons.

Pour ajuster l'angle :

1. Retirez les boulons arrière à tête ronde (2).
Une clé hexagonale 4mm est nécessaire.
Consultez la figure 28.
2. Ajustez à l'angle désiré.
3. Réinstallez les boulons.

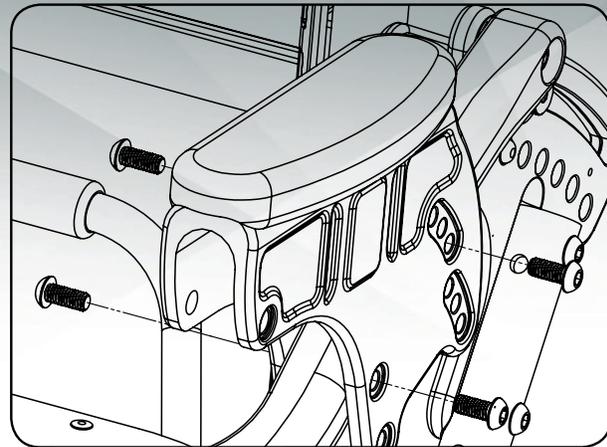


Figure 27

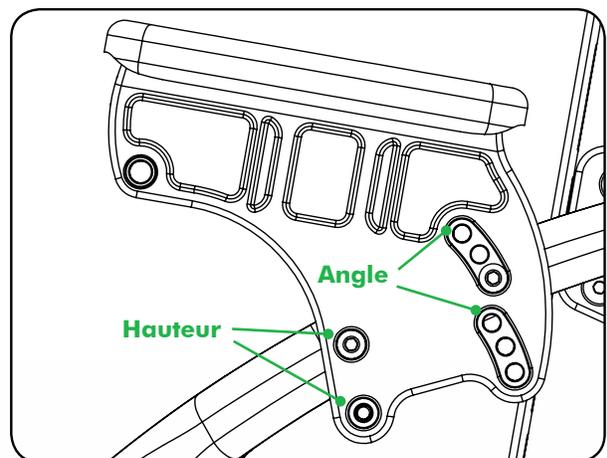


Figure 28

4.11 Positionner le plateau

1. Pour insérer le plateau, faites basculer les dispositifs de blocage par came des deux côtés vers le bas. Consultez figure 29.
2. Glissez le plateau dans l'orifice et ajustez à la profondeur désirée.
3. Faites basculer les dispositifs de blocage par came des deux côtés vers le haut. Consultez figure 30.

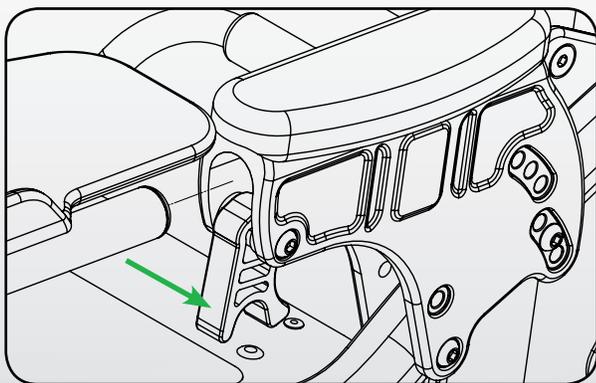


Figure 29

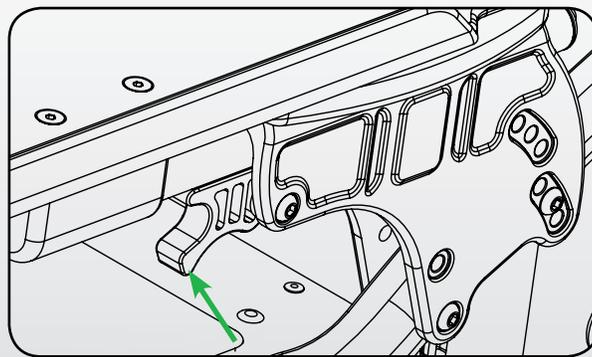


Figure 30

4.12 Utiliser la chaise Reach comme siège dans un véhicule automobile

La chaise Reach est homologuée pour transporter des enfants dans un véhicule automobile lorsqu'elle est équipée avec la fonction OPTIONNELLE transit et utilisée conformément aux instructions suivantes. La chaise doit être sécurisée dans une position orientée vers l'avant avec des ancrages (WTORS) conformes aux exigences de SAE J2249 Pratique recommandée — Systèmes de retenue et de fixation prévus à bord des véhicules automobiles.

INFORMATION IMPORTANTE :

Cette chaise a été testée conforme aux normes ANSI/RESNA WC/Vol. 1 — Section 19.5.3. Veuillez contacter Leggero ou votre fournisseur autorisé si vous avez des questions concernant l'utilisation de cette chaise à bord d'un véhicule automobile. Nos coordonnées se trouvent à la page deux de ce manuel.

MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS :

- La chaise Reach doit être utilisée comme indiqué dans ces instructions et dans les instructions fournies par le fabricant des ancrages installés dans le véhicule.
- L'occupant de la chaise doit être transféré au siège du véhicule et doit utiliser le système de retenue du véhicule autant que possible.
- Ne dépassez pas les maximums de poids inscrits. Consultez la section 1,8 de ce manuel.
- La chaise Reach doit être placée en position orientée vers l'avant lors de son utilisation à bord d'un véhicule automobile. Utilisez un système homologué de courroies quatre points pour la chaise. Utilisez une ceinture homologuée à trois points d'ancrage pour les occupants de plus de 50lb/23kg. Pour les occupants de moins de 50lb/23kg., un harnais de sécurité à cinq points est requis.
- Consultez les figures 31 et 32 pour connaître l'emplacement approuvé des ancrages et des goupilles des harnais et courroies.
- Le système de retenue ne doit pas être éloigné du corps de l'enfant au moyen de pièces ou d'accessoires.
- Les courroies des ceintures et des harnais doivent être bien ajustées et ne pas être lâches. Si vous pouvez pincer les sangles des courroies de ceinture entre vos doigts, ce n'est pas assez ajusté.
- Seules les ceintures qui se conforme aux exigences de ANSI/RESNA WC/Vol. 1 — Section 19 4.9.2-4.9.5 et 5.2 qui ont subi des essais dynamiques conformément à l'annexe A et 5,3, doivent être utilisées sur la chaise comme système de retenue à bord d'un véhicule automobile.

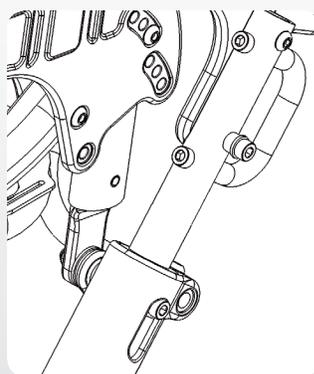
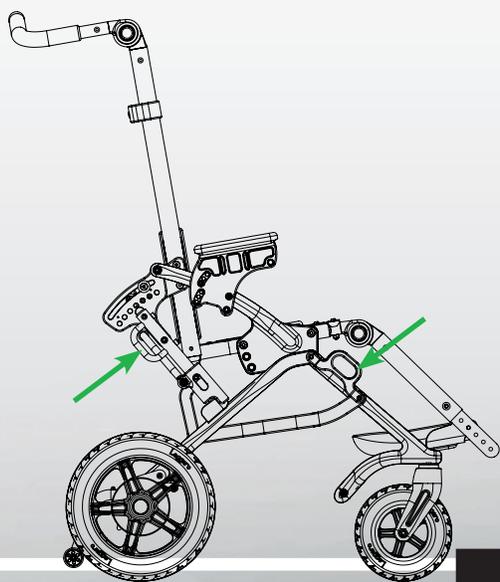


Figure 32 Attaches pour ceinture et harnais

Figure 31

MISE EN GARDE! Si votre chaise n'est pas équipée avec l'option transit, ne l'utilisez pas comme siège de voiture. Transférez l'enfant de la chaise à un siège de voiture approuvé.

5e section Garantie limitée

A. CETTE GARANTIE N'EST VALABLE QUE POUR L'ACHETEUR INITIAL DE NOS PRODUITS.

B. GARANTIE À VIE

Leggero LLC garantit que le châssis et les axes enfichables sont exempts de défauts tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication pour la durée de vie de l'acheteur initial. La durée de vie prévue du châssis est de cinq ans.

C. POUR UN (1) AN

Nous garantissons à l'acheteur initial que l'ensemble des pièces et composants de cette chaise sont exempts de défauts tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat par l'acheteur d'origine.

D. RESTRICTIONS

1. Il n'y a pas de garantie pour :

- Les pneus, les tubes, le rembourrage, les poignées du guidon et les accoudoirs.
- Les dommages résultants de la négligence, mauvais usage ou d'une mauvaise installation ou réparation.
- Les dommages causés par le transport.
- Les dommages causés par le dépassement du poids limite indiqué sur l'étiquette du numéro de série.

2. Cette garantie n'est valide que lorsque le produit est utilisé en conformité avec les conditions spécifiées et conformément aux fins prévues, autrement elle est invalide.

3. Cette garantie ne s'applique pas aux problèmes résultant d'une usure normale, et cette évaluation sera déterminée exclusivement par Leggero LLC.

4. Cette garantie est nulle si le produit a été modifié sans le consentement écrit exprès de Leggero, incluant sans toutefois sans limiter les modifications avec des pièces ou des attachements non autorisés ; produits endommagés en raison de réparations faites à tout composant sans le consentement spécifique de Leggero ; ou un produit endommagé par des circonstances en dehors du contrôle de Leggero, et cette évaluation sera déterminé exclusivement par Leggero LLC.

5. Cette garantie est nulle si le numéro de série d'origine a été supprimé ou modifié.

6. Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis. Vérifiez auprès de votre fournisseur si la garantie internationale s'applique.

E. CE QUE LE FABRICANT FERA

Notre seule responsabilité est de réparer ou de remplacer les parties couvertes. Ceci est le recours exclusif pour les dommages consécutifs.

F. CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Obtenez de nous, pendant que cette garantie est en vigueur, une autorisation préalable pour le retour ou pour la réparation des parties couvertes.

2. Envoyez le produit ou la/les pièce(s), frais de transport prépayés à Leggero LLC. Contactez le service à la clientèle de Leggero au 1-844-503-KIDS pour l'adresse de l'expéditeur et pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (RA#).

3. Payez le coût de la main-d'œuvre pour la réparation, pour enlever ou pour installer des pièces.

G. AVIS AUX CONSOMMATEURS

1. Si la législation le permet, cette garantie tient lieu de toutes les autres garanties, écrites ou oral, explicite ou implicite, y compris les garanties ou conditions de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier.

2. Cette garantie vous accorde certains droits légaux. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.

6e section Entretien

Veillez contacter votre fournisseur autorisé si vous avez des questions concernant l'entretien de votre chaise Reach. L'entretien régulier et complet de votre chaise allongera sa durée de vie. L'entretien inadéquat de votre chaise peut diminuer considérablement sa durée de vie utile. Toutes parties endommagées doivent être réparées avant de réutiliser la chaise. La chaise doit être nettoyée régulièrement et un entretien par un concessionnaire autorisé devrait être effectué une fois par année.

La garantie pourrait être affectée si l'entretien adéquat n'est pas accompli aux intervalles spécifiés. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître le processus d'entretien recommandé et sa fréquence. Une fiche d'entretien disponible sur la page suivante de ce manuel devrait être utilisée pour documenter les activités d'entretien.

<i>Activité d'entretien</i>	<i>Par semaine</i>	<i>Par mois</i>
<i>Vérifier l'état d'usure ou de détérioration des roues et des pneus</i>		✓
<i>Vérifier le fonctionnement du blocage de roues</i>	✓	
<i>Vérifier l'alignement des roulettes</i>		✓
<i>Vérifier que toutes les attaches sont serrées</i>		✓
<i>Vérifier le bon fonctionnement des essieux à dégagement rapide</i>	✓	
<i>Vérifier que le mécanisme anti-bascule est bien engagé</i>	✓	
<i>Vérifier que le mécanisme de réglage de l'inclinaison est bien engagé</i>	✓	
<i>Vérifier l'état d'usure ou de détérioration de tous les composants structurels</i>		✓
<i>Vérifier l'état d'usure ou de détérioration de tous les éléments accessoires</i>		✓

Nous recommandons que la chaise soit nettoyée régulièrement :

- N'utilisez que du détergent doux pour nettoyer le châssis et les parties en plastique.
- Les parties en tissu peuvent être nettoyées. Si vous utilisez une lessiveuse, placez-les dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller. Sécher à l'air.
- Dans la plupart des cas, essuyer avec un chiffon humide est suffisant.
- N'utilisez pas la chaise dans de l'eau salée, cela pourrait causer des dommages graves.
- Évitez d'endommager les roues et les fourchettes de roulettes avec du sable ou toutes autres particules.

Fiche d'entretien

<i>Date</i>	<i>Fournisseur de service</i>	<i>Technicien</i>	<i>Description des services</i>

<i>Date</i>	<i>Fournisseur de service</i>	<i>Technicien</i>	<i>Description des services</i>





Leggero LLC
174 D Shepherd Trail
Bozeman, MT
59718 USA
Sans frais : 1-844-503-KIDS
www.leggero.us
