



**le manuel du propriétaire**

**Stealth Products**

Matériel de rabattement



## Matériel de (FDM) rabattement

---

Manuel d'installation et d'utilisation de Stealth  
pour le matériel de rabattement TWB

Les produits de Stealth visent la satisfaction du client à 100 %. Votre entière satisfaction est importante. Veuillez nous contacter avec vos commentaires ou modifications suggérées qui permettront d'améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos produits. Vous pouvez nous joindre à l'adresse:



104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Téléphone: (512) 715-9995


Numéro sans frais: 1(800) 965-9229

Télécopieur: (512) 715-9954

Numéro sans frais: 1(800) 806-1225

info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com

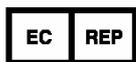

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany



Pour les commandes internationales, veuillez contacter:

Pride Mobility Products

5096 South Service Road

Beamsville, Ontario L0R 1B3 Canada

Téléphone: 888-570-1113 info@pridemobility.com

## Généralités

Lire et comprendre toutes les instructions avant l'utilisation du produit. Le non-respect des instructions et des mises en garde dans ce document peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort. Une mauvaise utilisation du produit résultant du non-respect des instructions annulera la garantie.

Cesser immédiatement d'utiliser le produit si une fonction est compromise, des pièces sont manquantes, lâches, ou s'il présente des signes d'usure excessive. Consulter votre fournisseur pour les réparations, le réglage ou le remplacement.

Si le présent document contient des informations que vous ne comprenez pas, ou en cas de préoccupations au sujet de la sécurité ou du fonctionnement du produit, contacter votre fournisseur.

## Informations Importantes!

Toutes les personnes responsables de l'adaptation, du réglage, et de l'usage quotidien des appareils décrits dans ces instructions doivent connaître et comprendre tous les aspects liés à la sécurité des appareils mentionnés.

Pour que nos produits soient utilisés avec succès, vous devez:

- Lire et comprendre toutes les instructions et les mises en garde.
- Entretienir nos produits selon nos instructions en matière de soins et d'entretien.
- Les appareils devraient être installés et réglés par un technicien qualifié.

## Référence du Fournisseur

Fournisseur: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date d'achat: \_\_\_\_\_

Modèle: \_\_\_\_\_

Avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de ce produit, il est important que vous lisiez et compreniez le contenu de ces consignes d'installation et d'utilisation.

Ces consignes vous guideront à travers les options et les capacités avec le produit.

Les consignes sont rédigées dans l'intention explicite d'utilisation avec des configurations standards. Elles contiennent également des informations importantes sur la sécurité et l'entretien, et décrivent des problèmes potentiels qui peuvent survenir lors de l'utilisation. Pour obtenir de l'aide ou des applications plus avancées, veuillez contacter votre fournisseur ou Pride Mobility Produits au 888-570-1113.

Toujours conserver les consignes d'utilisation dans un endroit sûr afin qu'elles puissent être consultées au besoin.

Toutes les informations, photos, illustrations et spécifications sont basées sur les informations sur les produits qui étaient disponibles au moment de l'impression. Les images et illustrations indiquées dans ces consignes sont des exemples représentatifs et ne sont pas destinées à être des représentations précises des différentes parties du produit.

## Commande de Documents

Vous pouvez télécharger des exemplaires supplémentaires de ce manuel du propriétaire sur le site Web de Pride:

<http://www.pridemobility.com/international/canada/canadaownersmanuals.asp>

Les coussins/housses sont conçus et fabriqués selon les normes les plus élevées. Nos coussins/housses sont garantis exempts de défauts de matériau et de main-d'œuvre pour une période de 24 mois. En cas de défaut de matériau ou de main-d'œuvre, Pride Mobility Products réparera ou remplacera, à sa discrétion, le coussin/housse du produit. Cette garantie ne couvre pas les coussins/housses ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'abus par l'utilisateur et jugé comme tel par Pride Mobility Products.

Les réclamations et les réparations devraient être traitées par le fournisseur de Pride Mobility Produits le plus proche.

Personne n'est autorisé à modifier, à prolonger, ou à renoncer aux garanties de Stealth Produits. Stealth Produits garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de main-d'œuvre:

Matériel: 5 ans

Composants électroniques: 3 ans

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui nécessitent un remplacement en raison de l'usure normale:

- Revêtement extérieur.
- Revêtement intérieur.
- Des circonstances qui échappent au contrôle de Pride.
- La main-d'œuvre, les appels de service, le transport et d'autres frais engagés pour la réparation du produit, sauf autorisation expresse, À L'AVANCE, par Pride Mobility Produits.
- Les réparations et/ou les modifications apportées à une pièce sans l'accord spécifique de Pride.

Les exclusions comprennent également des composants présentant des dommages causés par:

- L'exposition à l'humidité

|   |            |
|---|------------|
| <b>1.0 Satisfaction du client</b> .....               | <b>i</b>   |
| <b>2.0 Informations importantes</b> .....             | <b>ii</b>  |
| <b>3.0 Introduction</b> .....                         | <b>iii</b> |
| <b>4.0 Garantie</b> .....                             | <b>iv</b>  |
| <b>5.0 Table des matières</b> .....                   | <b>v</b>   |
| <b>6.0 Étiquettes de mise en garde</b> .....          | <b>vi</b>  |
| 6.1 Étiquettes de mise en garde .....                 | vi         |
| 6.2 Responsabilité limitée .....                      | vi         |
| 6.3 Tests .....                                       | vi         |
| <b>7.0 Avertissements</b> .....                       | <b>vii</b> |
| <b>8.0 Utilisation prévue</b> .....                   | <b>1</b>   |
| <b>9.0 Pièces et accessoires</b> .....                | <b>2</b>   |
| 9.1 Pièces de rechange .....                          | 2          |
| 9.2 Outils et quincaillerie .....                     | 4          |
| <b>10.0 Matériel de rabattement de l'appui-tête</b>   |            |
| <b>TWB380 et TWB480-QFDM</b> .....                    | <b>5</b>   |
| 10.1 Caractéristiques de FDM380 et TWB480-QFDM .....  | 5          |
| 10.2 Pièces incluses avec FDM380 et FDM480-QFDM ..... | 6          |
| 10.3 Remplacement du FDM380 et du FDM480-QFDM .....   | 7          |
| 10.4 Réglage du collier d'arrêt .....                 | 8          |
| 10.5 Installation sur le dossier du siège .....       | 9          |
| 10.6 Matériel de rabattement .....                    | 10         |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>11.0 Matériel de rabatement de l'appui-tête</b>                                |           |
| <b>TWB480-17FDM et TWB480-1FDM .....</b>  | <b>11</b> |
| 11.1 Caractéristiques de TWB480-17FDM et TWB480-1FDM .....                        | 12        |
| 11.2 Installation .....   | 12        |
| 11.3 Pièces incluses avec TWB480-17FDM et TWB480-1FDM .....                       | 13        |
| 11.4 Ajout / remplacement de la liaison .....                                     | 14        |
| 11.5 Réglage des liaisons .....   | 15        |
| 11.6 Ensemble de rotule de remplacement pour TWB480-17FDM et<br>TWB480-1FDM ..... | 16        |
| <b>12.0 Matériel de rabatement de l'appui-tête</b>                                |           |
| <b>TWB486-17FDM et TWB486-1FDM.....</b>   | <b>17</b> |
| 12.1 Caractéristiques de TWB486-17FDM et TWB486-1FDM .....                        | 18        |
| 12.2 Installation .....   | 18        |
| 12.3 Pièces incluses avec TWB486-17FDM et TWB486-1FDM .....                       | 19        |
| 12.4 Ajout / remplacement de la liaison .....                                     | 20        |
| 12.5 Réglage des liaisons .....   | 21        |
| <b>13.0 Première utilisation .....</b>  | <b>22</b> |
| 13.1 Assistance des concessionnaires .....  | 22        |
| 13.2 Tests par l'utilisateur .....  | 22        |
| 13.3 Conditions d'utilisation .....   | 22        |
| <b>14.0 Entretien .....</b>   | <b>23</b> |
| 14.1 Entretien .....  | 23        |
| 14.2 Nettoyage .....  | 23        |

## Étiquettes de Mise en Garde

### 6.1

Les mises en garde sont incluses pour la sécurité de l'utilisateur, du client, de l'opérateur et de la propriété. Veuillez lire et comprendre ce que les mots indicateurs SÉCURITÉ, AVIS, ATTENTION, MISE EN GARDE et DANGER signifient, comment ils pourraient affecter l'utilisateur, ceux autour de l'utilisateur et la propriété.

|  |  |
|--|--|
|  <b>DANGER</b>       | Identifie une situation <b>imminente</b> qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des <b>blessures graves</b> , la <b>mort</b> , et des <b>dommages matériels</b> .           |
|  <b>MISE EN GARDE</b> | Identifie une situation <b>potentielle</b> qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des <b>blessures graves</b> , la <b>mort</b> , et des <b>dommages matériels</b> .         |
|  <b>ATTENTION</b>     | Identifie une situation <b>potentielle</b> qui (si elle n'est pas évitée) entraînera des <b>blessures mineures à modérées</b> , et des <b>dommages matériels</b> .                 |
| <b>AVIS</b>  | Identifie des informations importantes qui ne sont pas liées à des blessures, mais à des <b>dommages matériels</b> potentiels.   |
| <b>SÉCURITÉ</b>  | Indique les étapes ou les instructions pour des pratiques sûres, des rappels de procédures de sécurité, ou des équipements de sécurité importants qui pourraient être nécessaires. |

## Responsabilité Limitée

### 6.2

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les dommages matériels pouvant découler de l'échec de l'utilisateur ou d'autres personnes de suivre les recommandations, les mises en garde et les instructions dans ce manuel.

Stealth Products n'est pas responsable de l'intégration finale ou de l'assemblage final du produit pour l'utilisateur final. Stealth Products n'est pas responsable de la mort ou des blessures de l'utilisateur.

## Tests

### 6.3

La configuration et conduite initiales doivent être effectuées dans un espace ouvert sans obstacles jusqu'à ce que l'utilisateur soit parfaitement en mesure de conduire en toute sécurité.

Le matériel FDM doit être installé et testé en suivant les instructions de ce manuel du propriétaire.

Les précautions de sécurité suivantes doivent être prises lors du réglage du support du matériel de rabattement:

 **ATTENTION**

Assurez-vous que le manchon rabattable rouge tourne librement. Si le manchon rabattable ne tourne pas, le matériel ne fonctionnera pas correctement.

 **ATTENTION**

Lors du serrage des vis, tournez lentement jusqu'à ce que la vis s'arrête, puis serrer d'un quart de tour additionnel. Un serrage excessif des vis peut entraîner le mauvais fonctionnement du produit et des dommages irréversibles.

**AVIS**

Le manchon doit faire un « clic » audible lorsqu'il est retourné à la position verticale.

**SÉCURITÉ**

Enlevez les mains de la zone du manchon lorsque vous le ramenez à la position verticale. Le manchon pourrait vous pincer lors du déplacement et causer des blessures.

**AVIS**

Il devrait y avoir un mouvement latéral minimal du matériel une fois qu'il a été installé.

**SÉCURITÉ**

Ajoutez du Loctite bleu aux vis de réglage du triangle une fois le réglage terminé.

## Utilisation prévue







Le matériel de rabattement dispose d'une conception élégante, d'une forte résistance et d'un matériel de basculement facile qui permet à l'appui-tête de se rabattre tout en restant attaché au fauteuil, ce qui élimine un mauvais emplacement. Avec l'avantage supplémentaire d'aider à améliorer les problèmes et les transferts liés à la mobilité.

La quincaillerie style « liaison » a également été introduite sur certains supports du matériel de rabattement. Ce matériel offre un réglage illimité pour les appuis-tête de Stealth. Plusieurs plans de réglage permettent un réglage critique de l'antérieur, du postérieur et de l'angle. Des liaisons séparées permettent d'isoler les plans de réglage et les angles, tandis que le réglage individuel des liaisons permet d'obtenir les solutions de soutien de la tête les plus complexes.

Le collier d'arrêt permet au technicien de régler facilement et correctement la hauteur nécessaire du matériel et empêche tout mouvement indésirable en cours d'utilisation. Le matériel FDM rend le positionnement de votre tête et de vos systèmes de positionnement facile et rigide. Le régler à l'endroit exact où vous voulez et il va tenir fermement cette position.

## Pièces de rechange

## 9.1
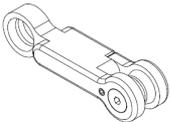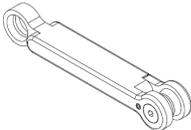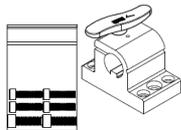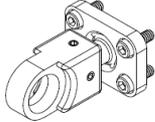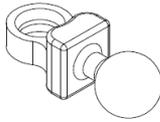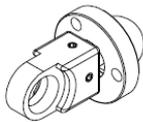
| Numéro de pièce   | Description   |
|-------------------|---|
| <b>TWBM-LINK</b>  | Liaison métrique de remplacement de 3 po<br>   |
| <b>TWBM-LIL-6</b> | Liaison métrique de remplacement de 6 po<br>   |
| <b>SBM400</b>     | Support de dossier pour le matériel TWB480<br> |
| <b>TWB-17MMBK</b> | Rotule à 3 pièces de 17 mm<br>                |
| <b>TWB1"-B</b>    | Rotule d'appui-tête de 1 po<br>              |
| <b>TWB-1" BK</b>  | Ensemble de rotule amovible de 1 po<br>      |

## Outils

## 9.2



| Quincaillerie nécessaire | Description  |
|--------------------------|--|
| 2.5mm T-Handle           | Collier d'arrêt et vis de réglage sur les liaisons |
| 4mm T-Handle             | Toutes les vis sur le triangle et les liaisons     |
| 5mm T-Handle             | Ensemble de vis pour montage du dossier du siège   |

Les outils, le composé antigrippant et la Loctite liquide série 242 de force moyenne bleu ne sont pas fournis.


## Spécifications de couple

## 9.3

Il est recommandé de serrer les vis selon les spécifications de couple, mais cela n'est pas nécessaire.


| Vis                 | Spécifications de couple |
|---------------------|--------------------------|
| Vis à douille M6    | 20,3 Nm                  |
| Vis à douille M5    | 12,0 Nm                  |
| Vis à tête plate M6 | 12,0 Nm                  |
| Vis à tête plate M5 | 6,9 Nm                   |
| Vis de réglage M5   | 4,7 Nm                   |
| Vis de réglage M8   | 17,8 Nm                  |

## **FDM380 & TWB480-QFDM Quincaillerie d'appuie-tête rabattable**

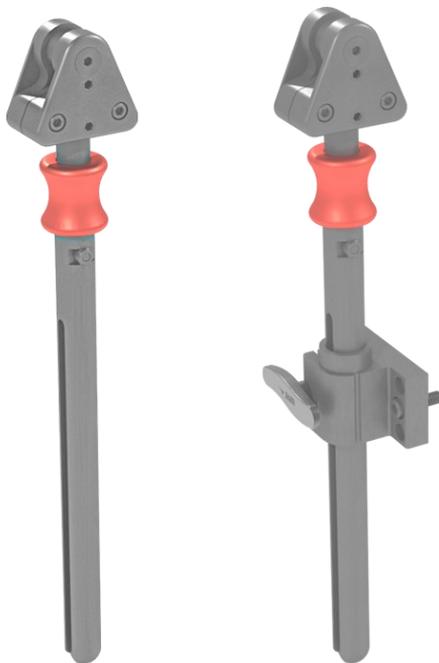


**Caractéristiques de FDM380 et TWB480-QFDM****10.1**

- Réglage de la hauteur de 8 pouces
- Matériel de rabatement facile
- Compatible avec les assemblages:
  - TWB480-17FDM
  - TWB480-1FDM
  - TWB480-TAB
- Versions courtes disponibles (tige de 6 pouces):
  - FDM380-S
  - TWB480-17FDMS
  - TWB480-1FDMS
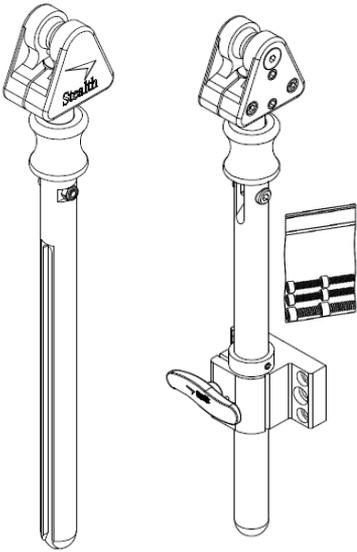
| Numéro de pièce      | Description  |
|----------------------|--|
| FDM380 & TWB480-QFDM |  |

## Pièces incluses avec le FDM380 et FDM480-QFDM

## 10.2

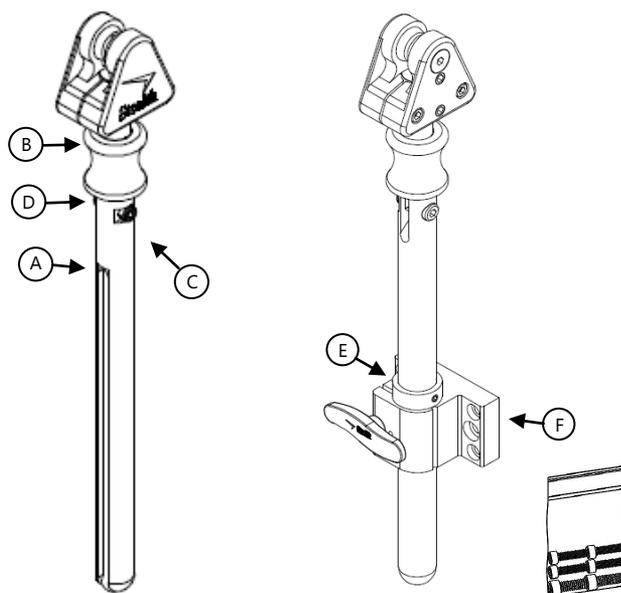

|          | Élément             | Description                           |
|----------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>A</b> | Barre verticale*    | Tige rabattable de 3/4 po de diamètre |
| <b>B</b> | Manchon rabattable* | Manchon FDM                           |
| <b>C</b> | Contre-écrou*       | Contre-écrou M5 (1)                   |
| <b>D</b> | Vis à épaulement *  | M5 x 0,8 x 18 mm SHS (1)              |
| <b>E</b> | Collier d'arrêt     | Support du collier d'arrêt            |
| <b>F</b> | Pince SBM           | Pince de montage du dossier de siège  |

\*Le FDM480-QFDM comprend les mêmes composants que le FDM380.

## Remplacement du FDM380 et FDM480-QFDM

### 10.3


**Étape 1:** Desserrez les vis de réglage sur le support triangulaire avec une poignée en T de 4 mm, mais ne les retirez pas. Desserrez les vis à douille du triangle permettant de dégager le triangle direct du support.

**Étape 2:** Placez les liaisons du matériel de l'appui-tête en ligne avec les triangles directs et filetés. Les points de fixation de la liaison doivent être alignés avec la fente rabattable de la barre verticale pour assurer le mouvement correct du manchon rabattable.

**Étape 3:** Alignez les triangles et resserrez les vis à douille en place.

**Étape 4:** Serrez les vis de réglage. Assurez-vous qu'elles soient bien réglées mais ne les serrez pas trop. Ajoutez du Loctite bleu aux vis de réglage afin d'éviter le desserrage.

**Étape 5:** Serrez la vis et le contre-écrou sur la barre verticale. Il devrait y avoir un mouvement latéral minimum avec l'assemblage.

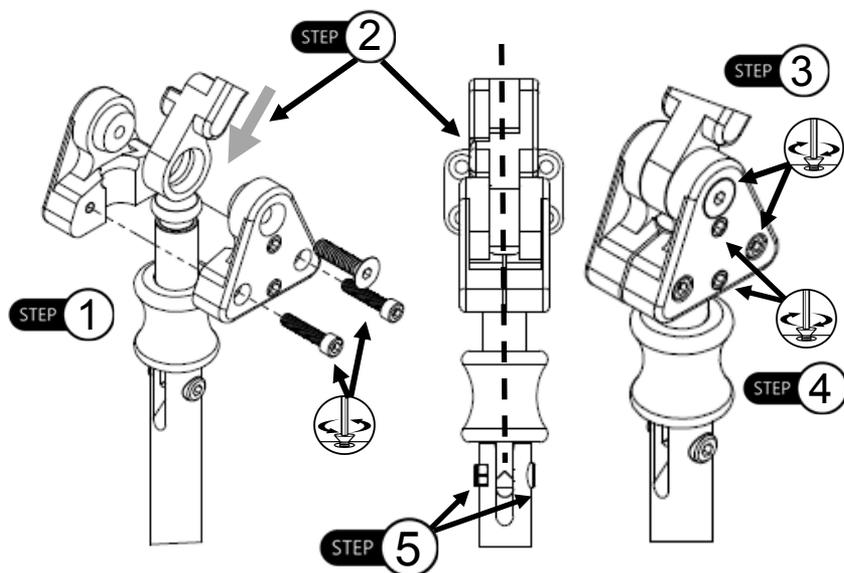

### **⚠ ATTENTION**

Assurez-vous que toutes les vis sont serrées uniformément sur le matériel. Les filets peuvent se désagréger et endommager le matériel s'ils ne sont pas bien serrés.

### **AVIS**

Serrez les vis de réglage avec le client dans le fauteuil et faites les derniers réglages nécessaires.

## Réglage du collier d'arrêt


## 10.4

**Étape 1:** Positionnez le collier d'arrêt le long de la barre verticale à la hauteur requise pour le client.

**Étape 2:** Lorsque la hauteur du collier d'arrêt a été déterminée, serrez la vis de réglage à l'aide d'une poignée en T de 2,5 mm. Ajoutez du Loctite bleu aux vis de réglage afin d'empêcher le desserrage.

**Étape 3:** Desserrez légèrement la poignée du support de dossier. Placez la barre verticale à travers la pince de montage du dossier. Le collier d'arrêt empêche la barre de dépasser le point de montage.

**Étape 4:** Fixez la tige en place en serrant la poignée sur le support du dossier.

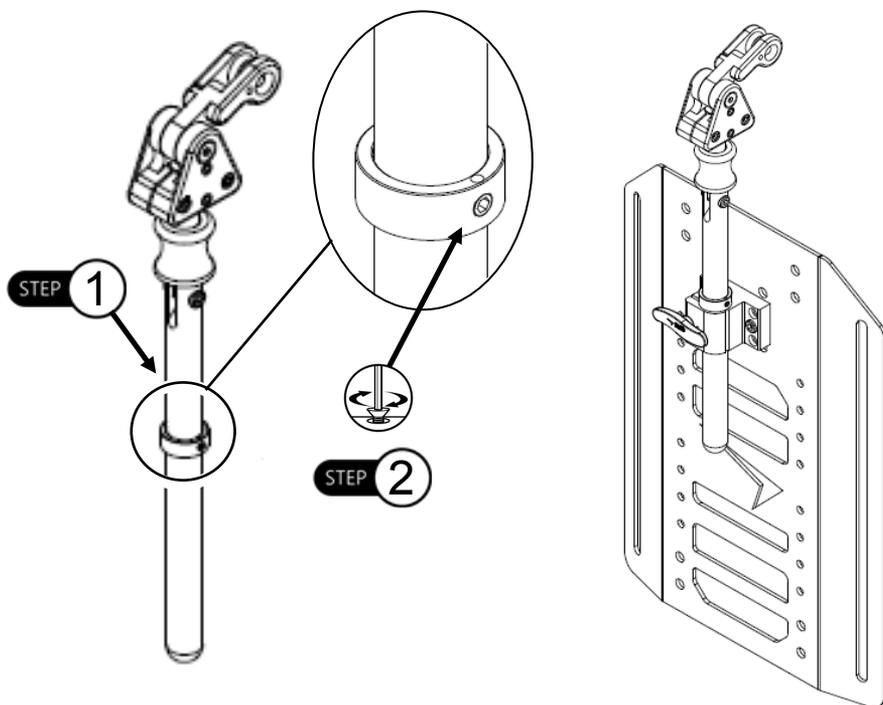

### ATTENTION

Assurez-vous que la vis de réglage est desserrée avant d'essayer de régler le collier d'arrêt.


### MISE EN GARDE

Un serrage excessif de la vis de réglage peut endommager le matériel.

## Installation du support du dossier

## 10.5

- Étape 1:** Alignez le support du dossier sur le dossier à la hauteur nécessaire. Avec les vis à douille nécessaires, fixez le support du dossier au cadre arrière (voir l'option 1 ou l'option 2 ci-dessous). Serrer avec une poignée en T de 5mm.
- Étape 2:** Desserrez légèrement la poignée de montage du dossier afin de créer un dégagement pour la barre verticale.
- Étape 3:** Insérer la barre verticale dans l'ouverture du support du dossier.
- Étape 4:** Fixez la barre verticale au support du dossier en serrant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. \* Assurez-vous que le bas du collier d'arrêt soit affleuré avec le haut de la pince de montage du dossier.

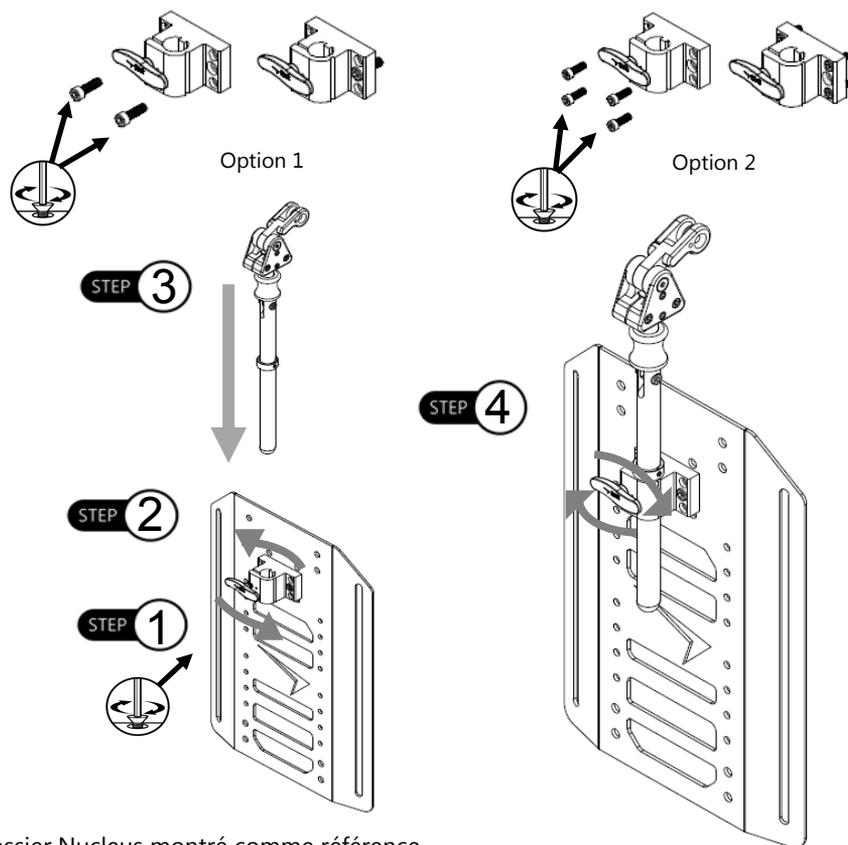

\*Dossier Nucleus montré comme référence

### ⚠ ATTENTION

Assurez-vous que les vis et la poignée du support du dossier du siège soient bien fixées.


## Support du matériel de rabatement

## 10.6

**Étape 1:** Pour rabattre le matériel de rabatement vers le bas et hors de la voie, faites glisser le manchon rabattable rouge vers le haut.

**Étape 2:** Escamotez le matériel en même temps que le manchon rabattable est poussé vers le haut.

**Étape 3:** Pour remettre le matériel en position verticale, ramenez les liaisons à la position verticale. Un « clic » audible devrait se produire, indiquant que le matériel est verrouillé en place.

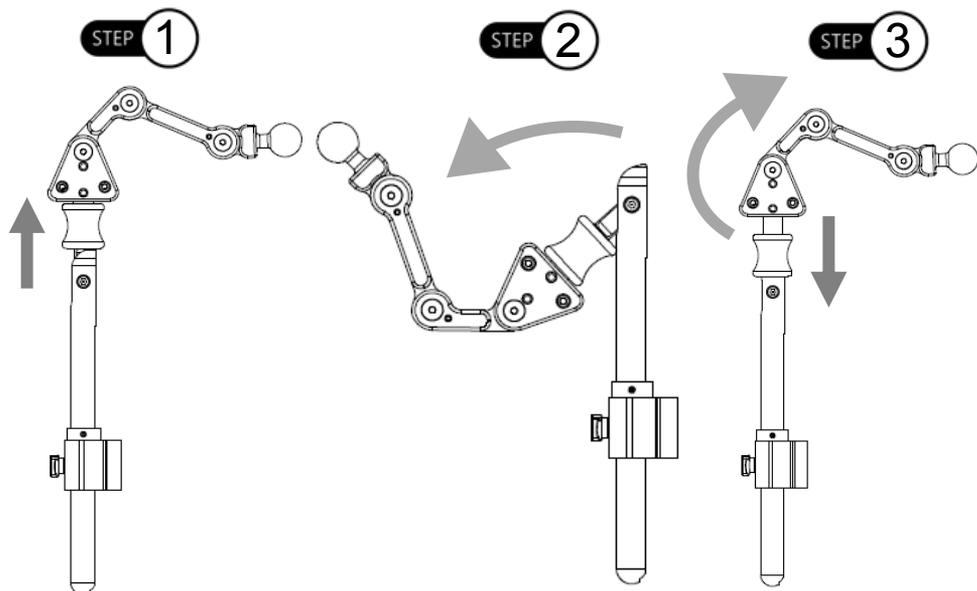

### ⚠ ATTENTION

Assurez-vous que le manchon rabattable rouge tourne librement de 360°. Si le manchon rabattable ne tourne pas, le matériel ne fonctionnera pas correctement.


### ⚠ ATTENTION

Assurez-vous que le support rabattable est complètement engagé avant utilisation.

### SÉCURITÉ

Enlevez les mains de la zone du manchon rabattable lorsque vous le ramenez à la position verticale. Le manchon pourrait vous pincer lors du déplacement et causer des blessures.

## Matériel de rabattement de l'appui-tête TWB480-17FDM et TWB480-1FDM

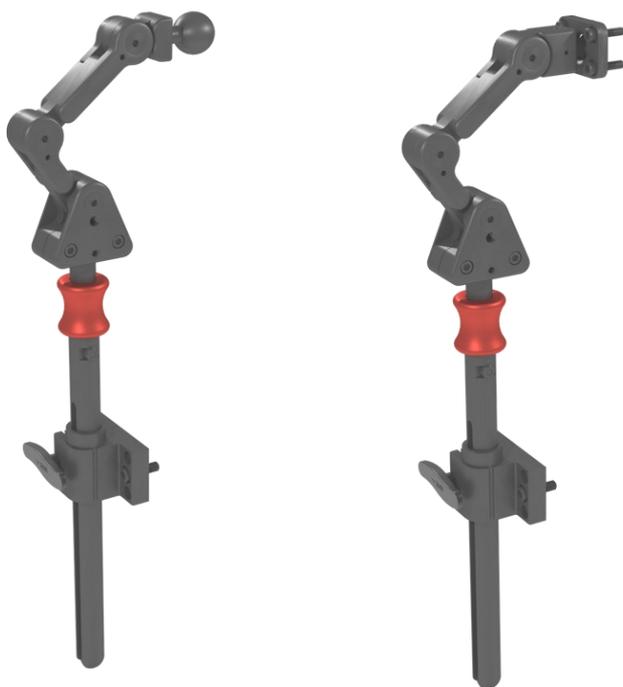

## Caractéristiques

## 11.1

- Réglage de la hauteur de 8 pouces
- Matériel de rabatement facile
- 1 liaison standard de 3 po assemblée avec FDM
- Versions courtes disponibles (tige de 6 pouces)
  - FDM380-S
  - TWB480-17FDMS
  - TWB480-1FDMS

## Montage


## 11.2


Matériel de 17 mm compatible avec:

- i2i
- i-Drive Head Array
- Combo
- Ultra
- Sous-occipital
- Déflecteur de tonalité (TD100)

Matériel de 1 po compatible avec:

- Comfort Plus
- Déflecteur de tonalité
- Tri Comfort Plus
- Déflecteur de tonalité (TD101)
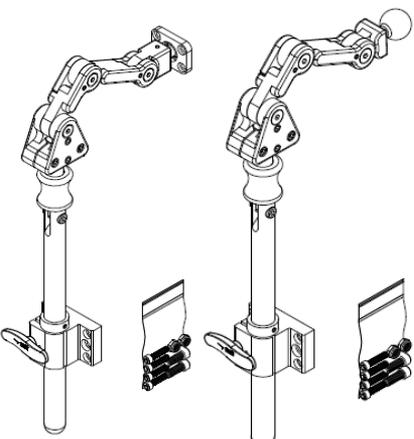
| Numéro de pièce                               | Description   |
|---|---|
| <p>TWB480-17FDM<br/>&amp;<br/>TWB480-1FDM</p> |  |

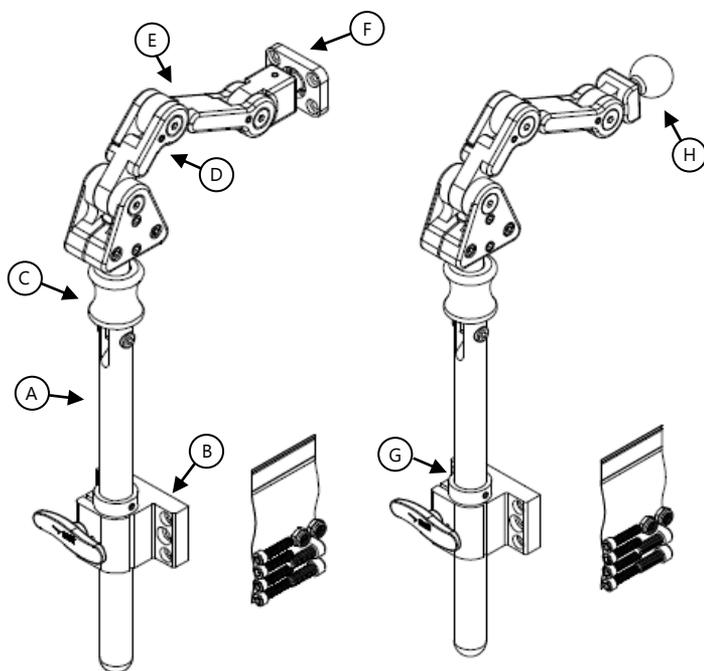**Pièces incluses avec le TWB480-17FDM****et TWB480-1FDM****11.3**

|          | Élément                                |
|----------|--|
| <b>A</b> | Tige rabattable de 3/4 po de diamètre* |
| <b>B</b> | Pince SBM*                             |
| <b>C</b> | Manchon rabattable*                    |
| <b>D</b> | Liaison coudée de 2 po*                |
| <b>E</b> | Liaison en ligne TWB480*               |
| <b>F</b> | Ensemble de support de rotule de 17 mm |
| <b>G</b> | Collier d'arrêt*                       |
| <b>H</b> | Support de rotule de 1 po              |

\*Le TWB480-1FDM comprend les mêmes composants que le TWB480-17FDM.

## Ajout d'une liaison/remplacement


## 11.4

**Étape 1:** Desserrez la vis de réglage sur la liaison coudée avec une poignée en T de 4 mm, mais ne pas les retirer. Retirez la vis à tête plate de la liaison coudée avec une poignée en T de 4 mm, en séparant la liaison coudée de la liaison en ligne et en créant un espace pour la nouvelle liaison à installer.

**Étape 2:** Alignez la nouvelle liaison avec la liaison coudée. Alignez la liaison en ligne et assurez-vous que tous les trous percés correspondent. Installez le nombre de liaisons nécessaires pour atteindre la longueur souhaitée du support rabattable.

**Étape 3:** Lorsque le nombre de liaisons désirées a été ajouté au FDM, serrez toutes les vis à tête plate et assurez-vous que toutes les liaisons soient dans la bonne position. Serrez les vis sans trop serrer. Ajoutez du Loctite bleu aux vis de réglage afin d'empêcher le desserrage.

**Étape 4:** Avant de serrer les vis, ajoutez de la Loctite Bleue pour éviter tout desserrage.

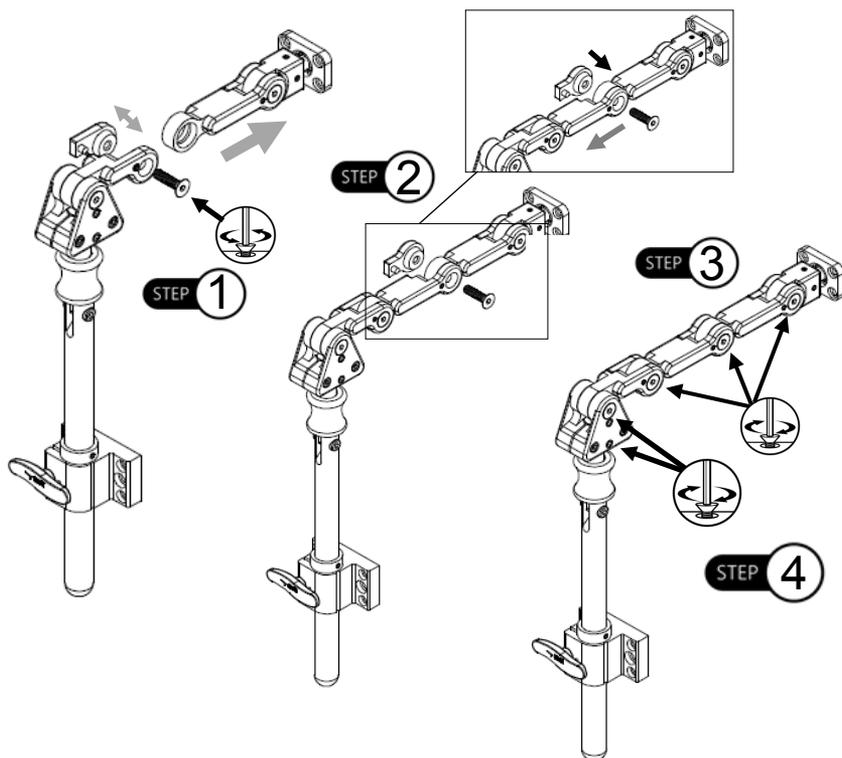

### AVIS

Pour les instructions d'installation du support de dossier, reportez-vous à la page 8.

### AVIS

Avant d'installer la nouvelle liaison, desserrez les vis de réglage.

## Ajustement des liaisons


### 11.5

**Étape 1 :** Desserrez la vis de réglage sur la liaison coudée avec une poignée en T de 4 mm, mais ne pas la retirer. Desserrez la vis à tête plate de la liaison coudée avec une poignée en T de 4mm.

**Étape 2 :** Effectuez les réglages nécessaires aux liaisons. Serrez toutes les vis à tête plate et assurez-vous que toutes les liaisons sont dans la position souhaitée.

**Étape 3 :** Avant de serrer les vis, ajoutez de la Loctite Bleue pour éviter tout desserrage.

**Étape 4 :** Serrez les vis de réglage. Assurez-vous qu'ils sont bien ajustés mais ne les serrez pas trop.

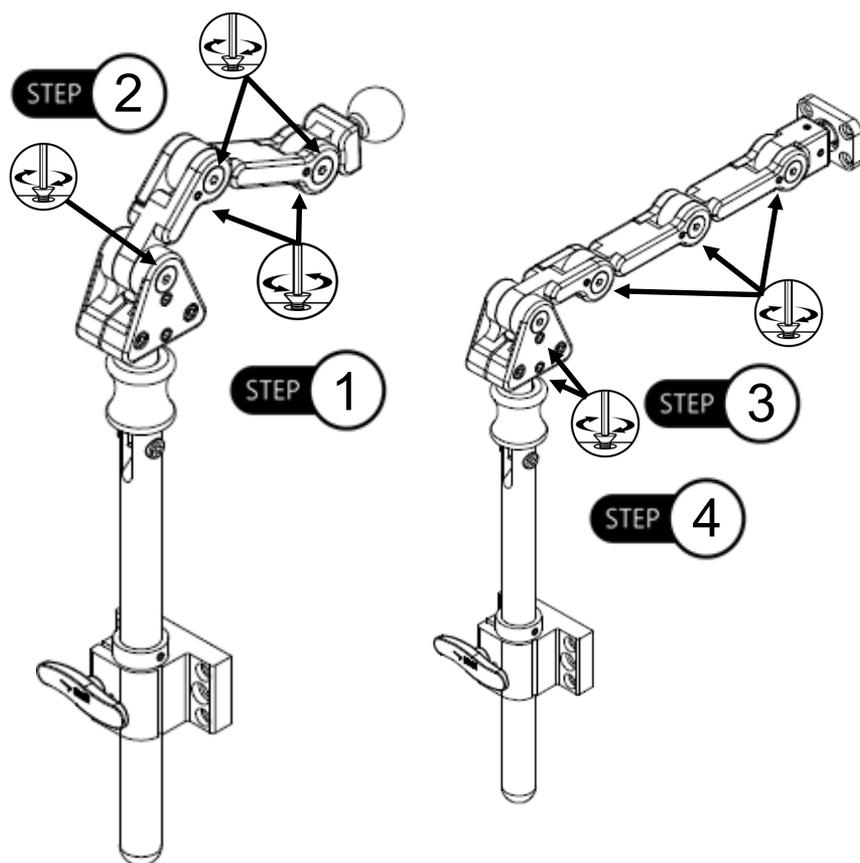


## Rotule de remplacement pour TWB480-17FDM et TWB480-1FDM

11.6

**Étape 1:** Desserrez et retirez la vis à tête plate M6 de la liaison, en créant un espace entre la liaison soudée et l'écrou de la liaison soudée.

**Étape 2:** Remplacez l'ensemble de rotule de 1 po ou 17 mm en alignant la bague de l'ensemble de rotule entre les trous pré-perçés de la liaison soudée et l'écrou de la liaison soudée.

**Étape 3:** Effectuez les réglages aux liaisons et à la position de l'ensemble de rotule. Serrez et fixez les vis après que le matériel soit dans la position désirée.

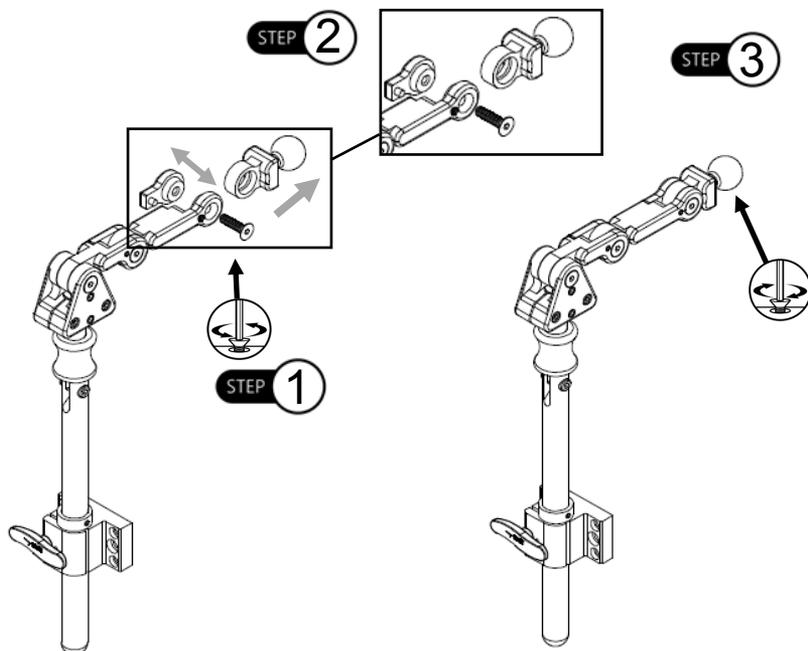

### AVIS

Suivez les mêmes instructions pour remplacer l'ensemble de rotule de 17 mm.


### ⚠ ATTENTION

Si vous remplacez/installez l'ensemble de rotule de 17 mm, serrez la vis de réglage correctement.

### AVIS

Reportez-vous à la page 10 pour les instructions sur le matériel de rabatement.

## Matériel de rabatement de l'appui-tête TWB486-17FDM et TWB486-1FDM

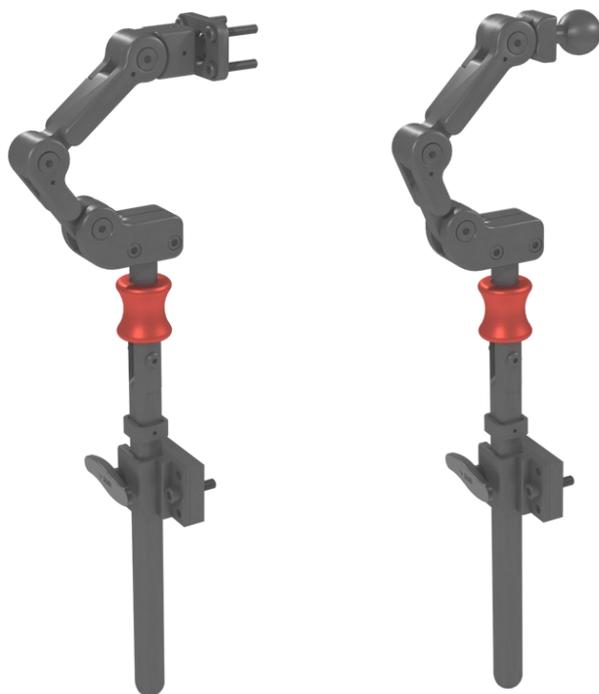

## Caractéristiques

## 12.1

- Réglage de la hauteur de 8 pouces
- Matériel de rabatement facile
- Support du dossier du siège fourni avec la commande
- 1 liaison standard de 3 po assemblée avec FDM

## Montage


## 12.2

Matériel de 17 mm compatible avec:

- i2i
- Combo
- Ultra
- Sous-occipital
- i-Drive Head Array
- Déflecteur de tonalité (TD100)


Matériel de 1 po compatible avec:

- Comfort Plus
- Comfort Plus réglable
- Tri Comfort Plus
- Déflecteur de tonalité (TD101)
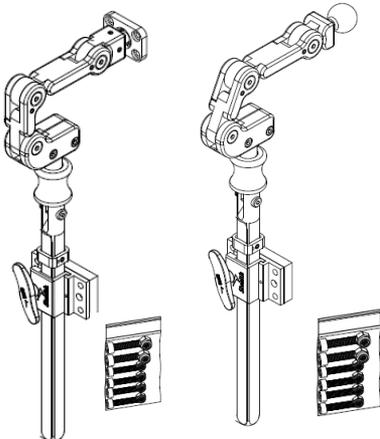
| Numéro de pièce                           | Description   |
|---|---|
| <p>TWB486-17FDM &amp;<br/>TWB486-1FDM</p> |  |

## Pièces incluses avec le TWB486-17FDM et TWB486-1FDM

### 12.3

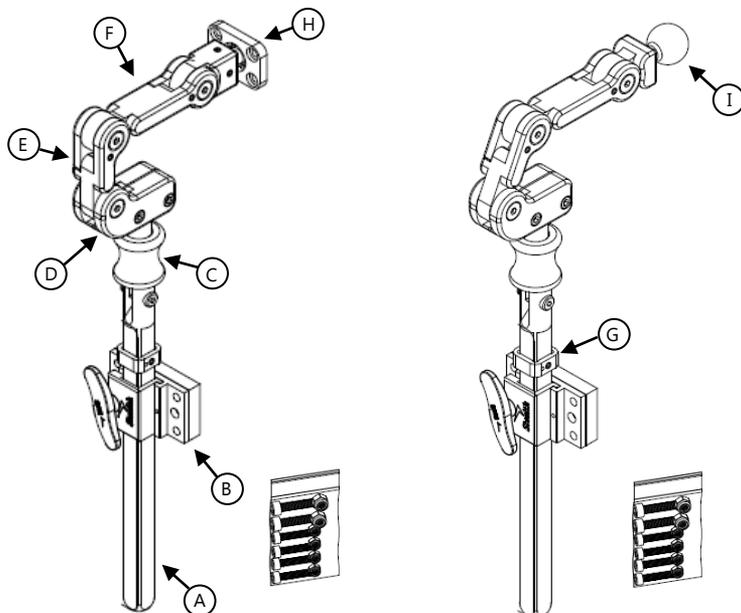

|          | Élément                    |
|----------|----------------------------|
| <b>A</b> | Tige rabattable de 15 mm*  |
| <b>B</b> | Pince SBM*                 |
| <b>C</b> | Manchon rabattable*        |
| <b>D</b> | Liaison coudée*            |
| <b>E</b> | Liaison coudée de 2 po*    |
| <b>F</b> | Liaison en ligne TWB480*   |
| <b>G</b> | Collier d'arrêt*           |
| <b>H</b> | Support de rotule de 17 mm |
| <b>I</b> | Support de rotule de 1 po  |

\*Le TWB486-1FDM comprend les mêmes composants que le TWB486-17FDM.

## Ajout d'une liaison/remplacement


## 12.4

**Étape 1:** Desserrez la vis de réglage sur la liaison et retirez la vis à tête plate de la liaison coudée.

**Étape 2:** Après avoir retiré la vis à tête plate de la liaison coudée, séparez la liaison coudée de la liaison en ligne en créant un espace pour la nouvelle liaison à installer.

**Étape 3:** Installez le nombre de liaisons nécessaires pour atteindre la longueur souhaitée du support rabattable. Alignez les trous pré-perçés sur les liaisons et sécurisez avec une vis à tête plate.

**Étape 4:** Lorsque le nombre de liaisons désirées a été ajouté au FDM, serrez toutes les vis à tête plate et assurez-vous que toutes les liaisons soient dans la bonne position. Ajoutez du Loctite bleu aux vis de réglage afin d'empêcher le desserrage.

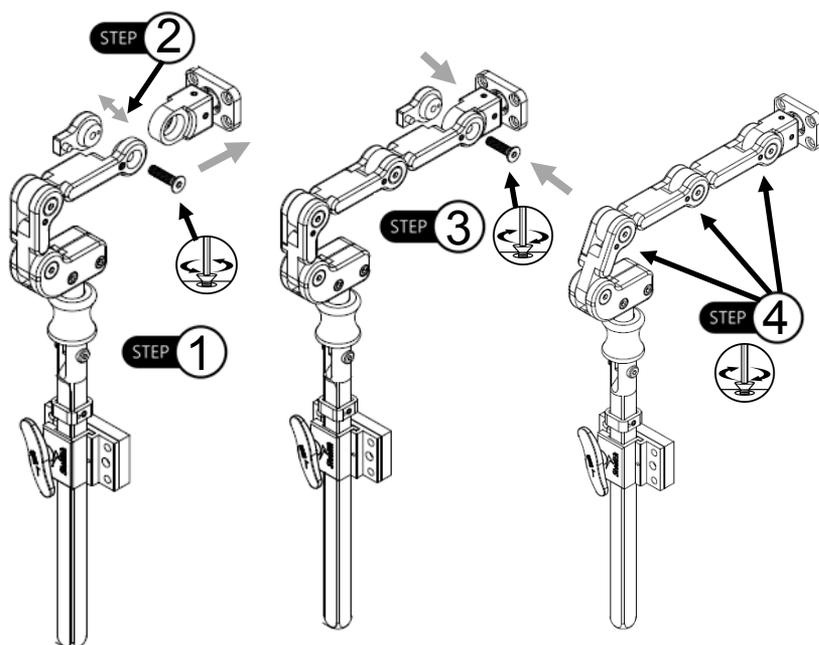

### AVIS

Serrez les vis de réglage avec le client dans le fauteuil et faites les derniers réglages nécessaires.

### AVIS

Reportez-vous à la page 8 pour les instructions d'installation du support de dossier.

### AVIS

Reportez-vous à la page 10 pour les instructions sur le matériel de rabatement.


## Ajustement des liaisons

## 12.5

**Étape 1:** Desserrez la vis de réglage sur la liaison coudée avec une poignée en T de 4 mm, mais ne pas la retirer. Desserrez la vis à tête plate de la liaison coudée avec une poignée en T de 4mm.

**Étape 2:** Effectuez les réglages nécessaires aux liaisons. Serrez toutes les vis à tête plate et assurez-vous que toutes les liaisons sont dans la position souhaitée.

**Étape 3:** Avant de serrer les vis, ajoutez de la Loctite Bleue pour éviter tout desserrage.

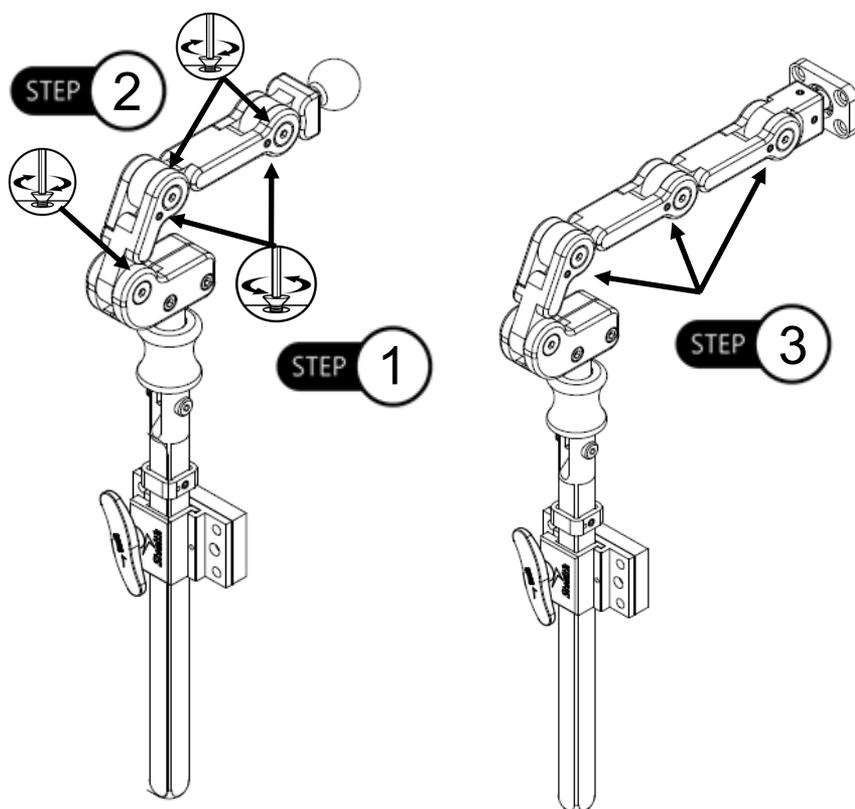

## Assistance des concessionnaires

### 13.1

Lors de la première utilisation par le client, il est conseillé que le concessionnaire ou le technicien d'entretien aide et explique le fonctionnement du matériel au client (l'utilisateur et/ou la personne d'aide).

## Tests par l'utilisateur

### 13.2

Il est important que le client soit parfaitement informé de l'installation du matériel de rabattement, de son fonctionnement et de tout ce qui peut être réglé. En tant que concessionnaire, procédez comme suit:

- Expliquez et montrez au client comment vous avez procédé à l'installation.

Demandez à l'utilisateur de tester l'emplacement du matériel après son installation.

- La position de l'appui-tête est-elle optimale pour l'utilisateur?

## Conditions d'utilisation

### 13.3

Le matériel de rabattement est destiné à être utilisé tel qu'installé par le concessionnaire, selon les instructions d'installation dans ce manuel.

- Les conditions d'utilisation prévues sont communiquées par le concessionnaire ou le technicien d'entretien à l'utilisateur et/ou personne d'aide lors de la première utilisation.
- Si les conditions d'utilisation changent considérablement, veuillez contacter votre concessionnaire ou un technicien qualifié afin d'éviter une usure excessive et déchirure ou des dommages involontaires.

## Entretien

### 14.1

- Toutes les pièces doivent être vérifiées régulièrement et réparées, si nécessaire, par un technicien agréé.
- Cessez d'utiliser après avoir identifié des composants lâches ou cassés.
- Vérifiez périodiquement le manchon rabattable. Vérifiez qu'il s'enclenche correctement et qu'il émet un « clic » audible lorsqu'il revient en position verticale.
- Vérifiez le boulon M5 sur la barre verticale. Serrez-le s'il est desserré.
- Pour éviter que les vis ne grippent, réappliquez du cuivre antigrippant si nécessaire.
- Si vous éprouvez des difficultés à régler les liaisons, passez à la section Réglage des liaisons.
- Si vous observez un mouvement latéral excessif avec le matériel, reportez-vous à l'étape 5 à la page 5 pour les instructions de réglage.

## Nettoyage

### 14.2

- Les surfaces peuvent être nettoyées avec un chiffon humide et un agent nettoyant doux non abrasif.
- Assurez-vous que les nettoyants utilisés pour désinfecter sont approuvés pour nettoyer les surfaces en aluminium.









Stealth Products, LLC. • [info@stealthproducts.com](mailto:info@stealthproducts.com) • [www.stealthproducts.com](http://www.stealthproducts.com)  
+1(800) 965-9229 | +1(512) 715-9995 | 104 John Kelly Drive, Burnet TX 78611