




Stealth Products


Matériel d'appui-tête

Manuel d'installation

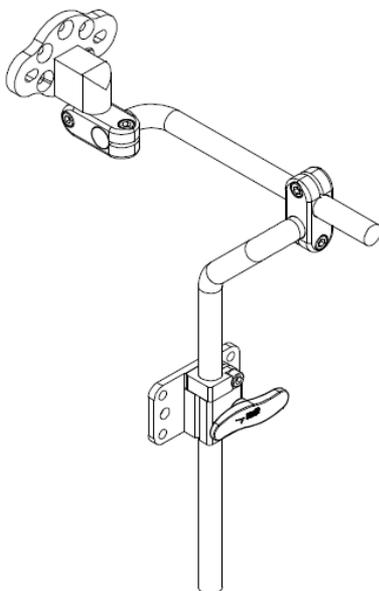

HMO500

Matériel d'appui-tête multiaxes de Stealth

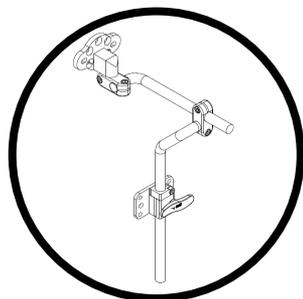

CONSIGNES D'INSTALLATION POUR

Le matériel HMO500 de Stealth

Compatible avec: tous les appuis-tête de Stealth Products

Engagement de Stealth

1.1

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les dommages matériels pouvant découler du défaut de l'utilisateur ou d'autres personnes à suivre les recommandations, les mises en garde et les instructions contenues dans ce manuel:



Stealth Products, LLC

104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Téléphone: (512) 715-9995 Sans frais: 1(800) 965-9229

Télécopieur: (512) 715-9954 Sans frais: 1(800) 806-1225

info@stealthproducts.com www.stealthproducts.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Allemagne



Pour les commandes internationales, veuillez contacter:

Pride Mobility Products

5096 South Service Road

Beamsville, Ontario L0R 1B3 Canada

Téléphone: (888)-570-1113 info@pridemobility.com

Date d'installation:

Revendeur:

Cachet du
concessionnaire

Numéro de série:

Étiquettes de mise en garde

2.1

Les mises en garde sont incluses pour la sécurité de l'utilisateur, du client, de l'opérateur et de la propriété. Veuillez lire et comprendre ce que les mots-indicateurs **SÉCURITÉ**, **AVIS**, **ATTENTION**, **MISE EN GARDE** et **DANGER** signifient, comment ils pourraient affecter l'utilisateur, ceux autour de l'utilisateur et la propriété.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  DANGER | Identifie une situation imminente qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , la mort , et des dommages matériels . |
|  MISE EN GARDE | Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , la mort , et des dommages matériels . |
|  ATTENTION | Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des lésions mineures à modérées , et des dommages matériels . |
| AVIS | identifie des informations importantes qui ne sont pas liées à des blessures, mais à des dommages matériels potentiels. |
| SÉCURITÉ | indique les étapes ou les instructions pour des pratiques sûres, des rappels de procédures de sécurité, ou des équipements de sécurité importants qui pourraient être nécessaires. |

Responsabilité limitée

2.2

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les dommages matériels pouvant découler du défaut de l'utilisateur ou d'autres personnes à suivre les recommandations, les mises en garde et les instructions contenues dans ce manuel.

Stealth Products n'est pas responsable de l'intégration finale ou de l'assemblage final du produit pour l'utilisateur final. Stealth Products n'est pas responsable de la mort ou des blessures de l'utilisateur.

Tests

2.3


La configuration et conduite initiales doivent être effectuées dans un espace ouvert sans obstacles jusqu'à ce que l'utilisateur soit parfaitement en mesure de conduire en toute sécurité.

La quincaillerie d'appuie-tête HMO500 doit toujours être testée sans qu'aucune personne ne soit assise dans le fauteuil jusqu'à ce que toutes les modifications de l'installation ou du réglage physique soient terminées.

| | |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 1.0 Table des matières | i |
| 1.1 Engagement de Stealth | i |
| 2.0 Mises en garde | ii |
| 2.1 Étiquettes de mise en garde | ii |
| 2.2 Responsabilité limitée | ii |
| 2.3 Test | ii |
| 3.0 Table des matières | iii |
| 4.0 Pièces et accessoires | 1 |
| 4.1 Pièces de montage du matériel | 1 |
| 4.2 Trousse de quincaillerie de montage et outils | 2 |
| 4.3 Spécifications de couple | 2 |
| 5.0 Consignes d'installation | 3 |
| 5.1 Réglage de la hauteur | 3 |
| 5.2 Réglage de la profondeur | 5 |
| 5.3 Réglage de l'angle | 6 |
| 5.4 Réglage de la plaque d'adaptation | 9 |
| 6.0 Garantie | 12 |
| 6.1 En cas de défaillance du produit | 12 |

Pièces de montage du matériel


4.1

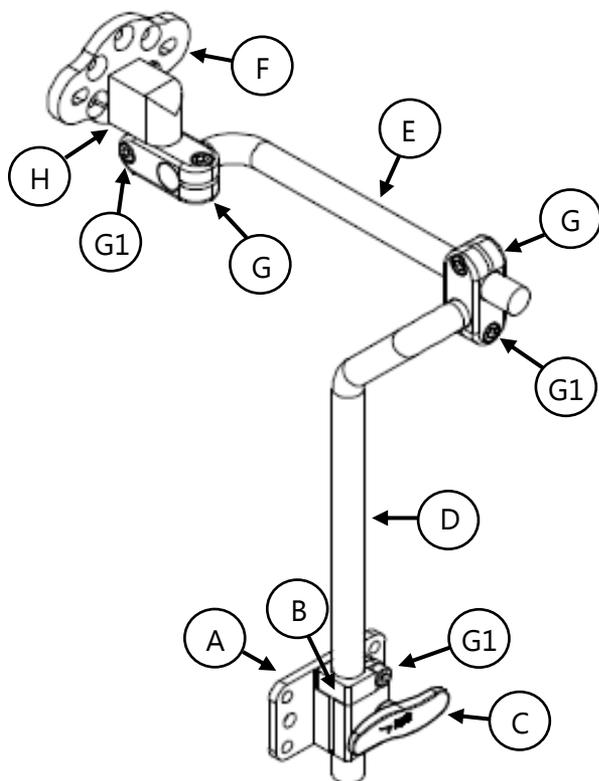

| | Description | Élément | |
|----------|-------------------------------------------------|---------|------------------------|
| A | Support du dossier du siège | | |
| B | Collier d'arrêt | | |
| C | Poignée | | |
| D | Barre verticale | | |
| E | Barre horizontale | | |
| F | Plaqué d'adaptation universelle pour appui-tête | | |
| G | Pince de la barre | G1 | M5 x .8 x 12mm SHS (5) |
| H | Adaptateur du support de l'appui-tête | | |

Trousse de quincaillerie de montage et outils

4.2

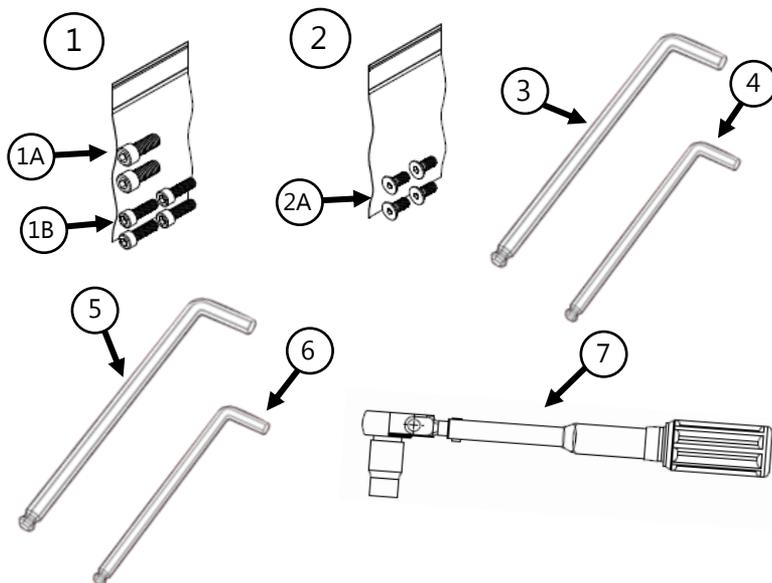

| Élément | La description | | |
|---------|--------------------------|----|------------------------|
| 1 | Trousse de quincaillerie | 1A | 1/4-20 x 5/8 SHS (2) |
| | | 1B | 10-32 x 5/8 SHS (4) |
| 2 | Trousse de quincaillerie | 2A | M5 x .8 x 12mm FHS (4) |

| Outils | |
|--------|-------------------------------------|
| 3 | 3mm Clé Allen / poignée en T* |
| 4 | 4mm Clé Allen / poignée en T* * |
| 5 | 3/16 Clé Allen / poignée en T* * |
| 6 | 5/32"mm Clé Allen / poignée en T* * |
| 7 | Clé dynamométrique * |

Spécifications de couple

4.3

| Élément | Exigence de couple |
|---------|--------------------|
| 1A | 45 in-lbs |
| 1B | 45 in-lbs |
| 2A | 40 in-lbs |
| G1 | 70 in-lbs |


* Outils non inclus

Réglage de la hauteur

5.1

Étape 1: Déterminez les vis nécessaires pour installer correctement le support du dossier au fauteuil. Positionnez le support du siège (A) sur le dossier à la hauteur désirée. Fixez avec les vis correspondantes fournies dans la trousse de quincaillerie (1).

Étape 2: Positionnez le collier d'arrêt (B) sur la barre verticale et fixez les vis. Serrez les vis. Reportez-vous à la *section 4.3* pour les spécifications de couple appropriées.

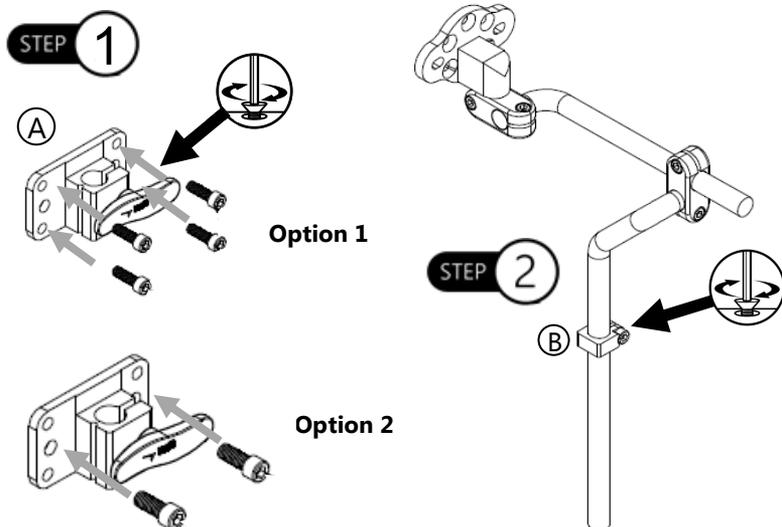

L'option 1 requiert la poignée en T 5/32 / clé Allen.


L'option 2 requiert la poignée en T 3/16 / clé Allen.

AVIS

Les vis à douille #10-32 (1B) sont fournies pour l'option 1 (4 vis), les vis à douille # 1/4-20 (1A) sont fournies pour l'option 2 (2 vis).

AVIS

Reportez-vous aux recommandations de réglage de la hauteur minimum et maximum avant l'installation de l'option 2.

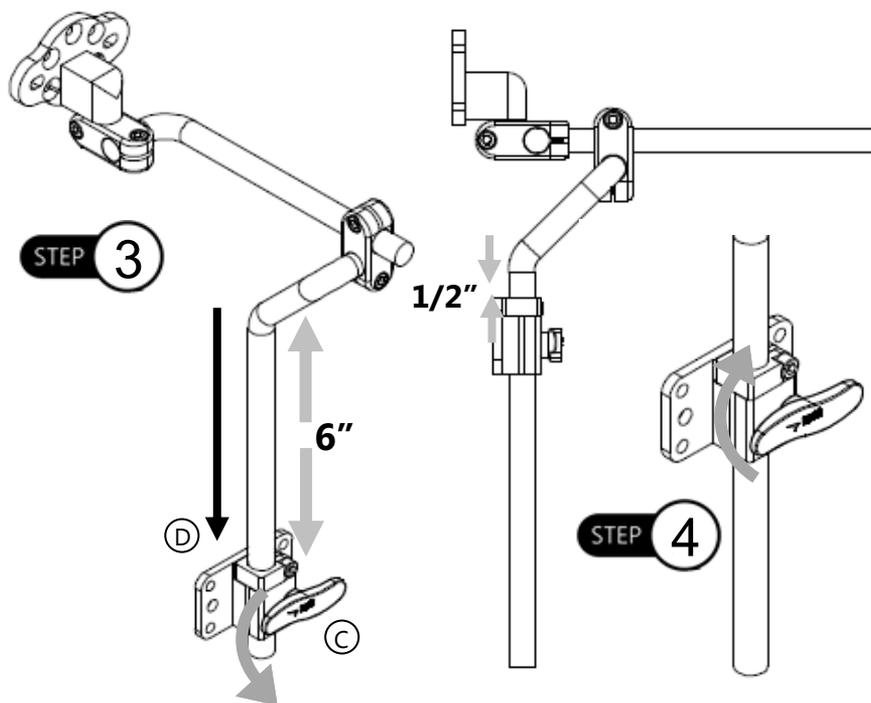

Étape 3: Assurez-vous que la poignée (C) a été tournée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avant de la glisser sur la barre verticale. Insérez la barre verticale (D) dans le support du dossier. Assurez-vous que le collier d'arrêt est affleuré avec le support du dossier.

Étape 4: Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez la poignée en T du dossier du siège pour le verrouiller en position.

SÉCURITÉ

Il est recommandé de ne pas déplacer le support du dossier du siège de plus de 6 pouces à partir du haut de la barre verticale et de moins de 1/2 pouce à partir du haut de la barre.


Réglage de la profondeur

5.2

Étape 1: Desserrez la vis M5 (G1) sur la pince de la barre avec une poignée en T de 4 mm ou une clé Allen.

Étape 2: Glissez la barre horizontale (E) à la profondeur désirée.

Étape 3: Lorsque la barre a été réglée à la profondeur désirée, serrez la vis M5 pour la fixer.
Reportez-vous à la *section 4.3* pour les spécifications de couple appropriées.

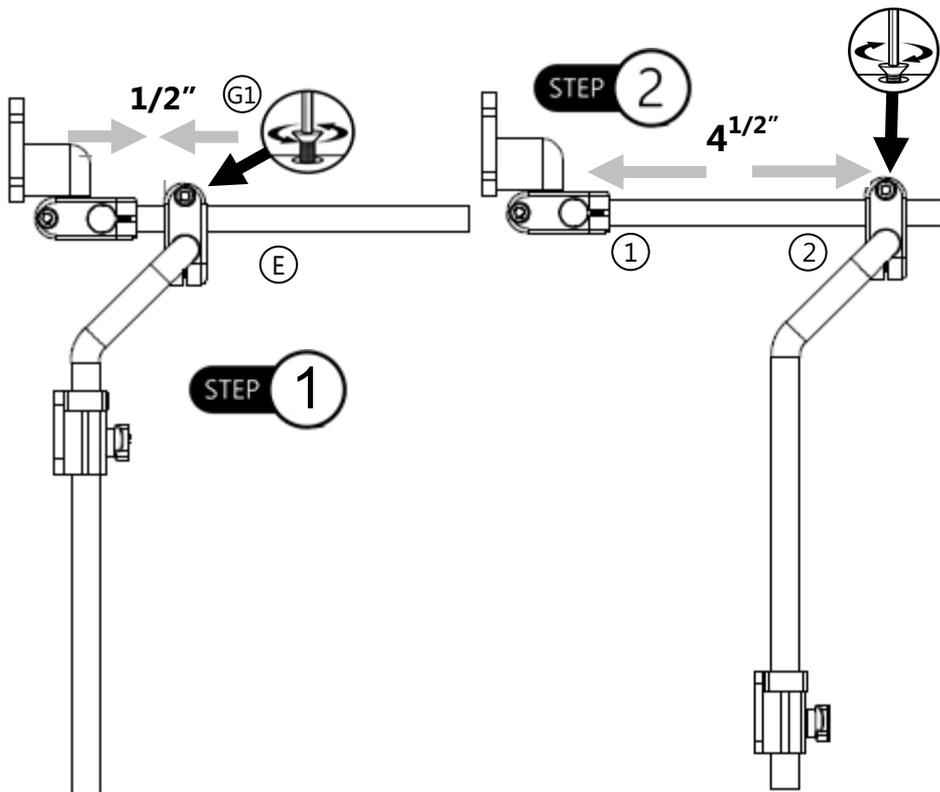

SÉCURITÉ

Il est recommandé que le réglage de la profondeur minimale soit de $1/2$ po dans les extrémités de la barre et de $4^{1/2}$ po maximum entre les points de référence 1 et 2.


Réglage de l'angle

5.3

Deux points de réglage de l'angle sont disponibles avec le matériel HMO500 - l'angle de la barre horizontale peut être réglé, ainsi que l'angle de la plaque d'adaptation de l'appui-tête.

Étape 1: Desserrez la vis M5 (G1) sur la pince de la barre (G) avec une poignée en T de 4 mm ou une clé Allen


Étape 2: Glissez la barre horizontale (E) à la profondeur désirée. Lorsque l'angle désiré est atteint, serrez les vis M5 jusqu'à ce qu'elles soient sécurisées. Reportez-vous à la *section 4.3* pour les spécifications de couple appropriées.

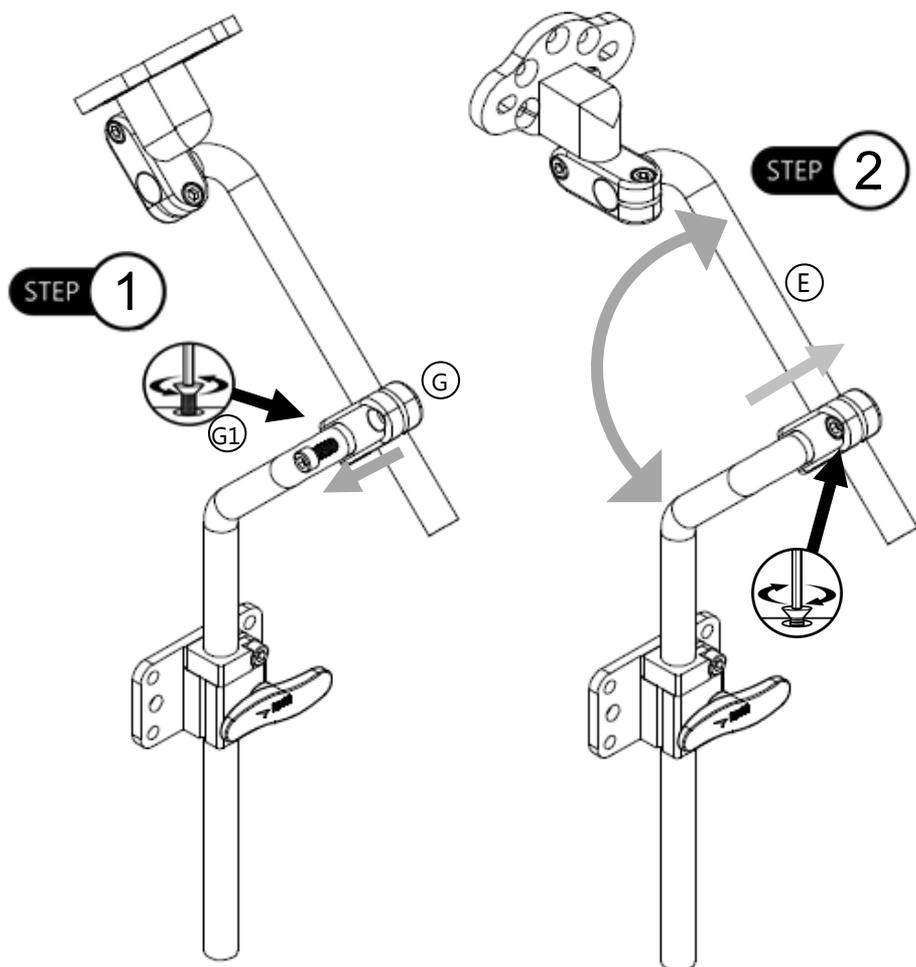

Une fois que la barre horizontale a été réglée correctement à la position désirée, le réglage de l'angle de la plaque d'adaptation doit être réglé afin de pouvoir être aligné avec l'appui-tête. Suivez les étapes ci-dessous pour régler la plaque d'adaptation à la bonne position.


Étape 1: Pour régler l'angle de la plaque d'adaptation (F) sur la barre horizontale, desserrez la vis M5 (G1) sur la pince de la barre à l'aide d'une poignée en T de 4 mm ou d'une clé Allen.

Étape 2: Inclinez la plaque d'adaptation parallèlement au support du dossier. Fixez la vis M5 sur la pince à barre.

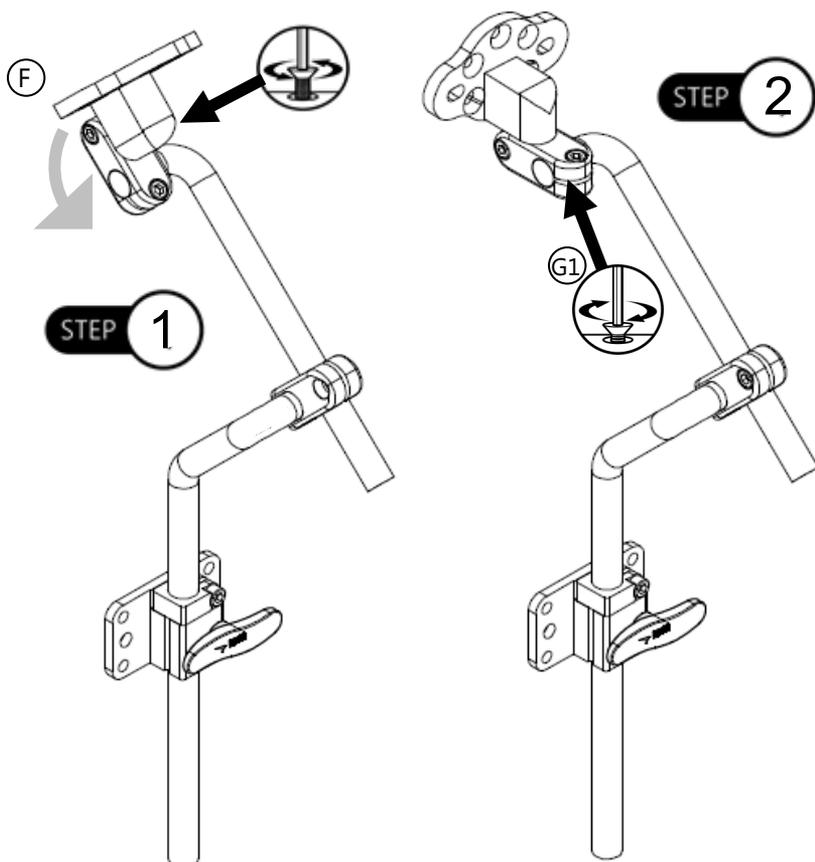

AVIS

Si l'angle de la barre horizontale est réglé, l'angle de la plaque de l'adaptateur de l'appui-tête doit être réglé pour être aligné avec l'appui-tête sur lequel elle sera montée.

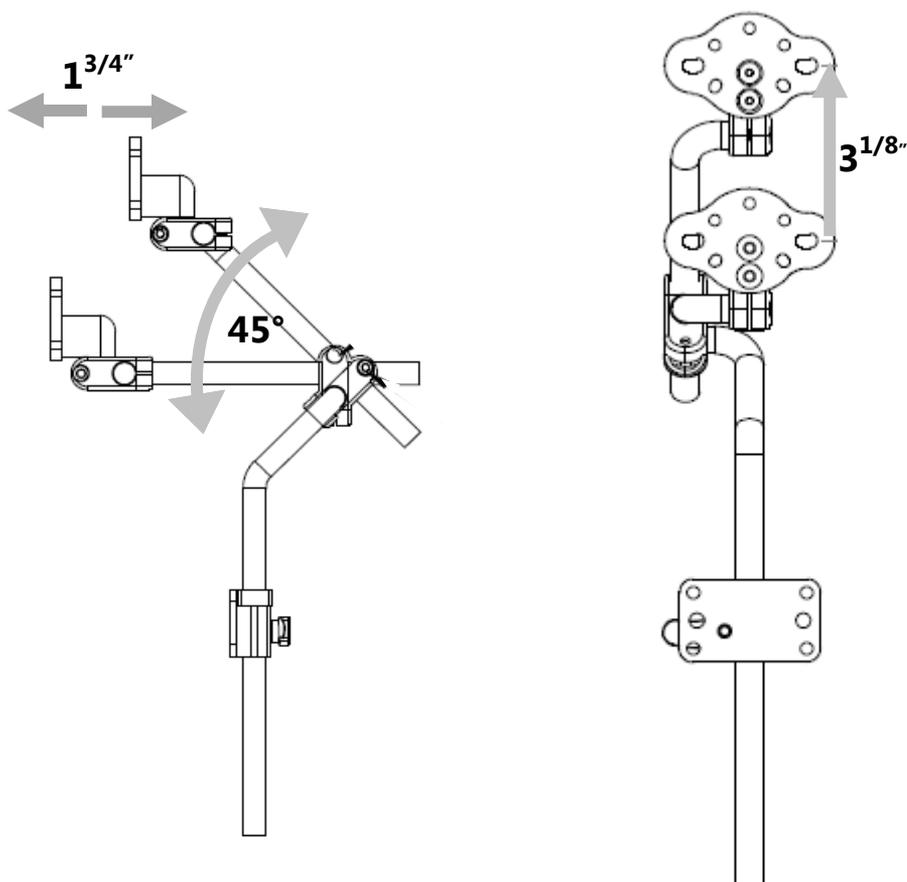**AVIS**

La hauteur de la plaque d'adaptation universelle peut se déplacer d'un maximum de 3 1/8 po verticalement lorsque l'angle de la barre horizontale est réglé.

AVIS

La barre horizontale ne doit pas être réglée à plus de 45°.

AVIS

Jusqu'à 1 3/4 po de hauteur est ajouté lorsque la barre horizontale est réglée.

Réglage de la plaque d'adaptation


5.4

Pour régler la position de la plaque d'adaptation et la direction dans laquelle elle sera montée à l'appui-tête, suivez les instructions ci-dessous:

Étape 1: Desserrez la vis M5 (G1) sur la pince de la barre (G) avec une poignée en T de 4 mm ou une clé Allen.

Étape 2: Déplacez la plaque d'adaptation dans la direction souhaitée.

Étape 3: Une fois le réglage terminé, serrez et fixez la vis M5. Reportez-vous à la *section 4.3* pour les spécifications de couple appropriées.

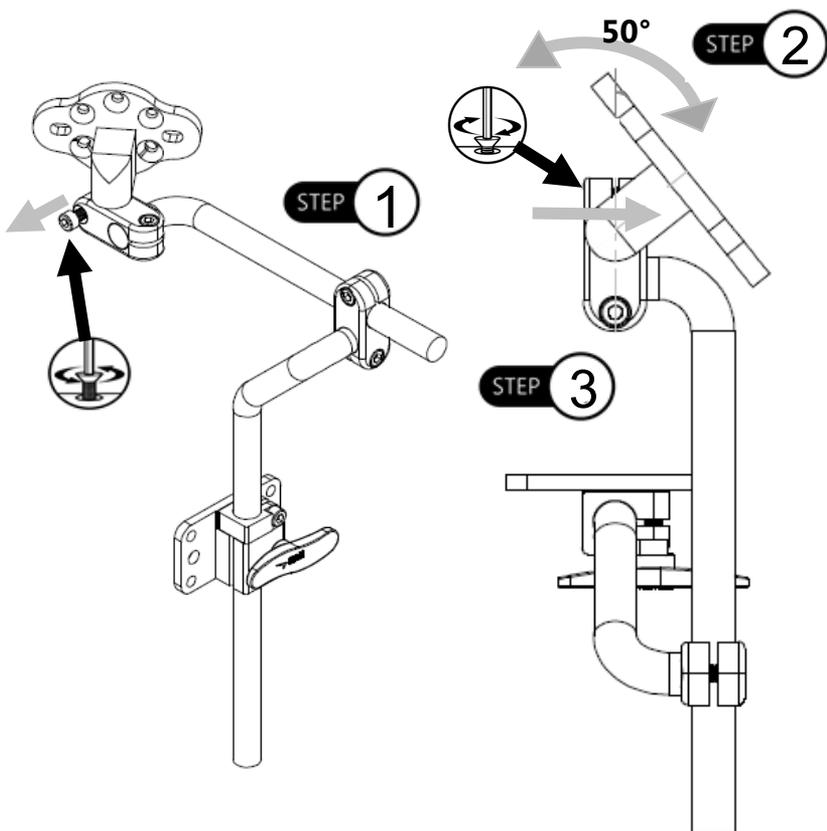

AVIS

La plaque d'adaptation de l'appui-tête ne doit pas être inclinée à un angle de plus de 50° par rapport aux côtés gauche ou droit.


Installation de l'appui-tête

5.6

Pour installer le matériel HMO500 sur un modèle à 3 trous, procédez comme suit:

Étape 1: Déterminez le modèle de trou requis pour l'installation correcte de l'appui-tête. Alignez l'appui-tête avec la plaque d'adaptation universelle

Étape 2: Fixez l'appui-tête sur la plaque d'adaptation avec des vis M5. Utilisez la poignée en T de 3 mm / clé Allen pour serrer. Reportez-vous à la *section 4.3* pour les spécifications de couple appropriées.

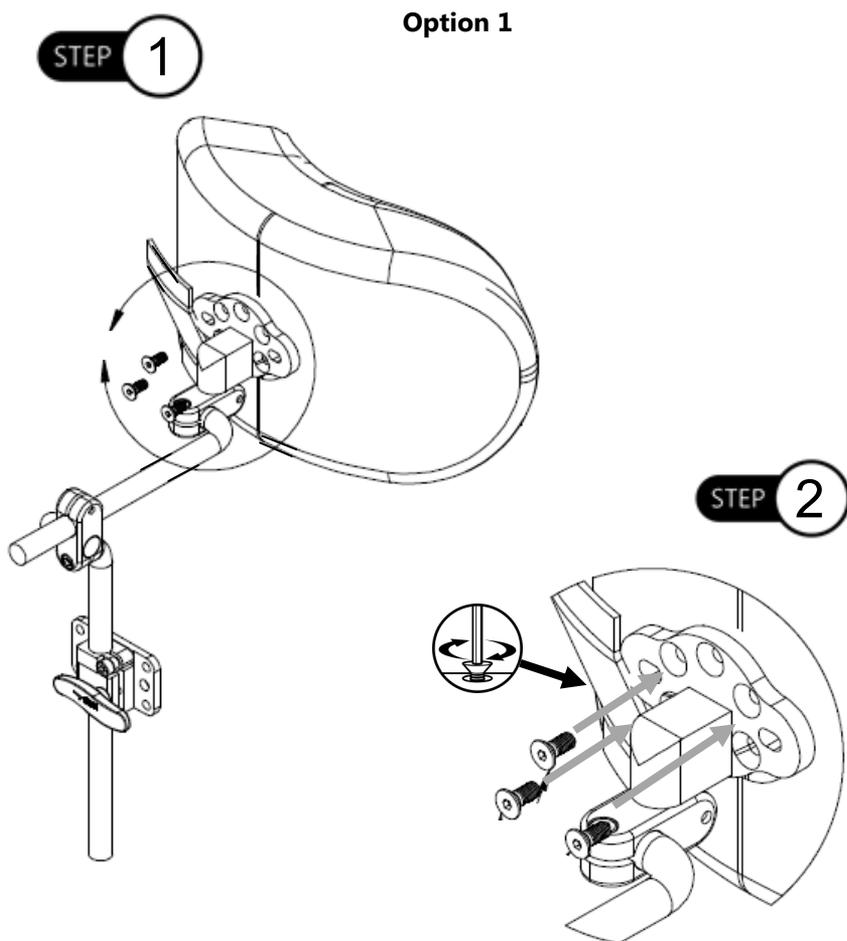


Pour installer le matériel HMO500 sur un modèle à 4 trous, procédez comme suit:

Étape 1: Alignez l'appui-tête avec la plaque d'adaptation universelle.

Étape 2: Fixez l'appui-tête sur la plaque d'adaptation avec des vis M5. Utilisez la poignée en T de 3 mm / clé Allen pour serrer. Reportez-vous à la *section 4.3* pour les spécifications de couple appropriées.

Option 2

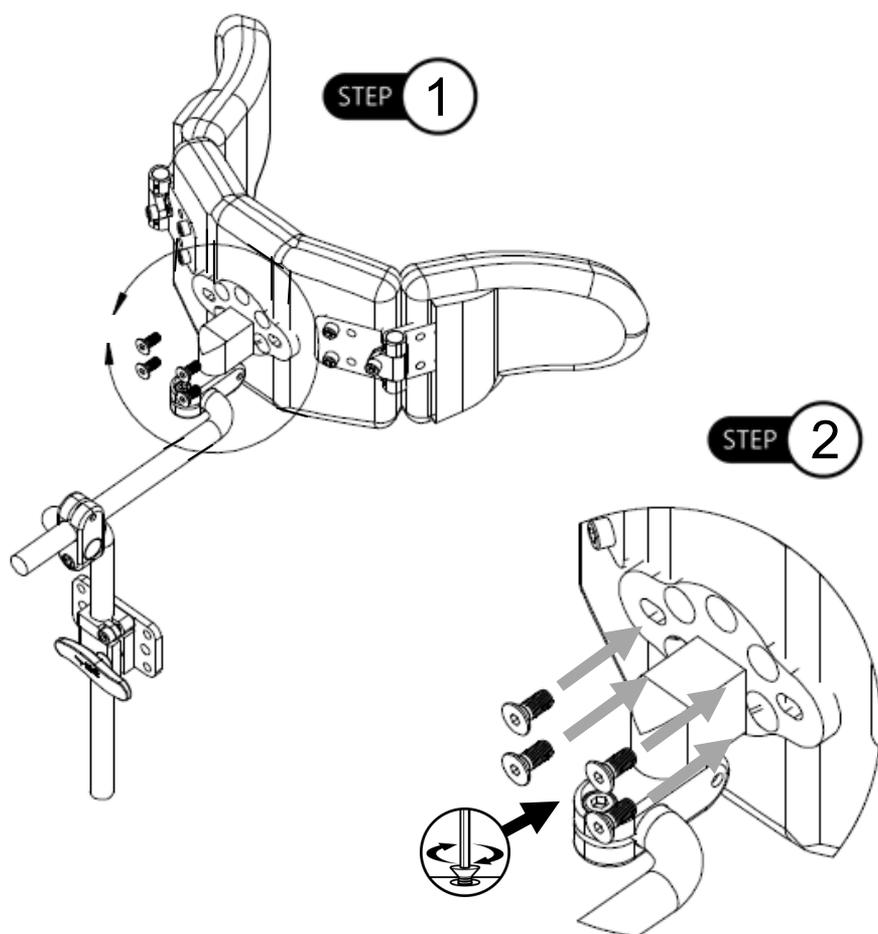

Les coussins/housses sont conçus et fabriqués selon les normes les plus élevées. Nos coussins/housses sont garantis exempts de défauts de matériau et de main-d'œuvre pour une période de 24 mois. En cas de défaut de matériau ou de main-d'œuvre, Pride Mobility réparera ou remplacera, à sa discrétion, le coussin/housse du produit. Cette garantie ne couvre pas les coussins/housses ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'abus par l'utilisateur et jugé comme tel par Pride Mobility Products.

Les réclamations et les réparations devraient être traitées par le fournisseur de Pride Mobility Produits le plus proche.

Personne n'est autorisé à modifier, à prolonger, ou à renoncer aux garanties de Stealth Produits. Stealth Produits garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de main-d'œuvre:

Matériel: 5 ans

Composants électroniques: 3 ans

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui nécessitent un remplacement en raison de l'usure normale:

- Revêtement extérieur.
- Revêtement intérieur.
- Des circonstances qui échappent au contrôle de Pride.
- La main-d'œuvre, les appels de service, le transport et d'autres frais engagés pour la réparation du produit, sauf autorisation expresse, À L'AVANCE, par Pride Mobility Produits.
- Les réparations et/ou les modifications apportées à une pièce sans l'accord spécifique de Pride.

Les exclusions comprennent également des composants présentant des dommages causés par:

- L'exposition à l'humidité



Stealth Products, LLC. • info@stealthproducts.com • www.stealthproducts.com
+1(800) 965-9229 | +1(512) 715-9995 | 104 John Kelly Drive, Burnet TX 78611