



Manuel du Propriétaire

Stealth Products

Positionnement et Support



SUS9 de la Série Escamotable

Le Manuel du Propriétaire et le Guide D'Entretien
de Stealth Pour les SUS9 de la Série Escamotable

Les produits de Stealth visent la satisfaction du client à 100 %. Votre entière satisfaction est importante. Veuillez nous contacter avec vos commentaires ou modifications suggérées qui permettront d'améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos produits.

Vous pouvez nous joindre à l'adresse:

104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Téléphone: (512) 715-9995

Numéro sans frais: 1 (800) 965-9229

Télécopieur: (512) 715-9954

Numéro sans frais: 1 (800) 806-1225

info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com

Généralités

Lire et comprendre toutes les instructions avant l'utilisation du produit. Le non-respect des instructions et des mises en garde dans ce document peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort. Une mauvaise utilisation du produit résultant du non-respect des instructions annulera la garantie.

Cesser immédiatement d'utiliser le produit si une fonction est compromise, des pièces sont manquantes, lâches, ou s'il présente des signes d'usure excessive. Consulter votre fournisseur pour les réparations, le réglage ou le remplacement.

Informations Importantes!

Toutes les personnes responsables de l'adaptation, du réglage et de l'usage quotidien des appareils décrits dans ces instructions doivent connaître et comprendre tous les aspects liés à la sécurité des appareils mentionnés. Pour que nos produits soient utilisés avec succès, vous devez:

- Lire et comprendre toutes les instructions et les mises en garde
- Entretien nos produits selon nos instructions en matière de soins et d'entretien
- Les appareils devraient être installés et réglés par un technicien qualifié

Référence du Fournisseur

Fournisseur: _____

Téléphone: _____

Adresse: _____

Date d'achat: _____

Modèle: _____

Avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de ce produit, il est important que vous lisiez et compreniez le contenu de ces consignes d'installation et d'utilisation. Les consignes de montage vous guideront à travers les possibilités du SUS9 de la série escamotable.

Les consignes sont rédigées dans l'intention explicite d'utilisation avec des configurations standards. Elles contiennent également des informations importantes sur la sécurité et l'entretien. Pour obtenir de l'aide ou des applications plus avancées, veuillez contacter votre fournisseur ou Stealth Products au (512) 715-9995 ou sans frais au 1-800-965-9229.

Toujours conserver les consignes d'utilisation dans un endroit sûr afin qu'elles puissent être consultées au besoin.

Toutes les informations, photos, illustrations et spécifications sont basées sur les informations sur les produits qui étaient disponibles au moment de l'impression. Les images et illustrations indiquées dans ces consignes sont des exemples représentatifs et ne sont pas destinées à être des représentations précises des différentes parties du produit.

Commande de Documents

Vous pouvez télécharger des exemplaires supplémentaires de ce manuel du propriétaire sur le site Web de Stealth:

www.stealthproducts.com

Ou rechercher:

Manuel du propriétaire du SUS9 de la série escamotable dans la barre de recherche en haut de la page.

Les coussins/housses sont conçus et fabriqués selon les normes les plus élevées. Nos coussins/housses sont garantis exempts de défauts de matériau et de main-d'œuvre pour une période de 24 mois. En cas de défaut de matériau ou de main-d'œuvre, Stealth Products réparera ou remplacera, à sa discrétion, le coussin/housse du produit. Cette garantie ne couvre pas les coussins/housses ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'abus par l'utilisateur et jugé comme tel par Stealth Products, LLC.

Les réclamations et les réparations devraient être traitées par le fournisseur de Stealth Products le plus proche.

Personne n'est autorisé à modifier, à prolonger, ou à renoncer aux garanties de Stealth Products, LLC. Stealth Products garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de main-d'œuvre:

Matériel: 5 ans

Composants électroniques: 5 ans

Limitations

4.1

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui nécessitent un remplacement en raison de l'usure normale:

- Revêtements extérieurs
- Revêtements intérieurs
- Des circonstances indépendantes de la volonté de Stealth
- La main-d'œuvre, les appels de service, les frais d'expédition et autres frais engagés pour la réparation du produit, sauf autorisation expresse, PRÉALABLE, par Stealth Products, LLC
- Les réparations et/ou les modifications apportées à une pièce sans l'accord spécifique de Stealth.

1.0 Satisfaction du Client	i
2.0 Informations Imoportantes	ii
3.0 Introduction	iii
4.0 Garantie	iv
4.1 Limitations.....	iv
5.0 Table des Matières	v
6.0 Étiquettes de Mise en Garde	vi
6.1 Étiquettes de Mise en Garde	vi
6.2 Responsabilité Limitée	vi
6.3 Tests.....	vi
7.0 Pièces et Accessoires	vii
7.1 Pièces Fournies	vii
8.0 Consignes D'Installation	1
8.1 Installation de la Quincaillerie de Montage	1
8.2 Installation de la Quincaillerie sur le Matériel du Fauteuil	1
9.0 Montage	3
9.1 Accessoires de Montage.....	3
10.0 Tests	4
10.1 Vérifier le SUS9	4
10.2 Test Opérationnel	4
11.0 Première Utilisation	5
11.1 Assistance des Revendeurs	5
11.2 Tests par L'Utilisateur	5
11.3 Conditions D'Utilisation	5
12.0 Entretien	6
12.1 Nettoyage	6
12.2 Mensuellement	6

Étiquettes de Mise en Garde

6.1

Les mises en garde sont incluses pour la sécurité de l'utilisateur, du client, de l'opérateur et de la propriété. Veuillez lire et comprendre ce que les mots indicateurs **SÉCURITÉ**, **AVIS**, **ATTENTION**, **MISE EN GARDE** et **DANGER** signifient, comment ils pourraient affecter l'utilisateur, ceux autour de l'utilisateur et la propriété.

⚠ DANGER	Identifie une situation imminente qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , la mort , et des dommages matériels .
⚠ MISE EN GARDE	Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , et des dommages matériels .
⚠ ATTENTION	Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) entraînera des blessures mineures à modérées , et des dommages matériels .
AVIS	Identifie des informations importantes qui ne sont pas liées à des blessures, mais à des dommages matériels potentiels .
SÉCURITÉ	Indique les étapes ou les instructions pour des pratiques sûres, des rappels de procédures de sécurité, ou des équipements de sécurité importants qui pourraient être nécessaires.

Responsabilité Limitée

6.2

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les dommages matériels pouvant découler de l'échec de l'utilisateur ou d'autres personnes de suivre les recommandations, les mises en garde et les instructions dans ce manuel.

Tests

6.3


La configuration et conduite initiales doivent être effectuées dans un espace ouvert sans obstacles jusqu'à ce que l'utilisateur soit parfaitement en mesure de conduire en toute sécurité.

Le SUS9 escamotable devrait toujours être réglé avec l'utilisateur dans le fauteuil afin de favoriser la meilleure position et un maximum de confort pour le client.

Pièces Fournies

7.1

- Vis de 10-24 x 1/2 po, 6 fournies
- Vis à épaulement, 2 fournies
- Écrous à épaulement, 2 fournis
- SU260, 2 fournis
- SUS9-E, 2 fournis
- SUS, 1 fourni

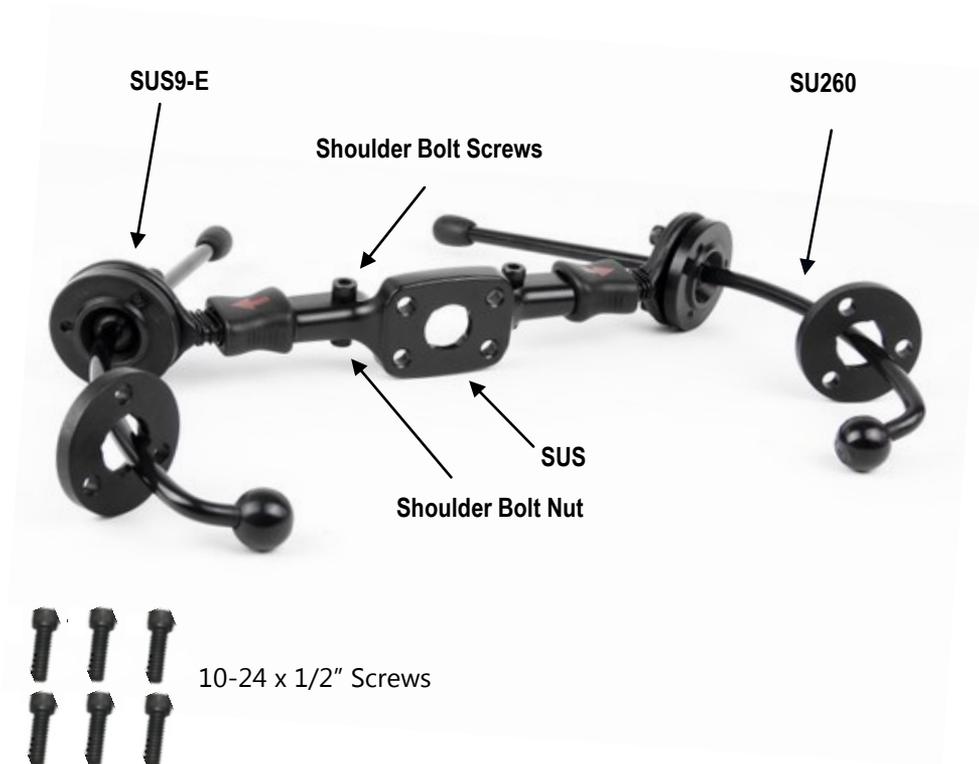

Installation de la Quincaillerie de Montage


8.1

1. Fixer les oreillettes escamotables (SUS 9-E) dans un endroit indiqué sur le support de montage central (SUS).
2. Insérer les vis à épaulement dans les trous indiqués, fixant les écrous à épaulement et les serrer à fond.
3. Régler les vis à douille sur l'oreillette de sorte que la rotule fendue se dilate.
4. Faire glisser les tiges latérales de face (SU260) à travers les rotules fendues.
5. Régler les tiges à la position souhaitée et serrer les vis à douille.


Installation de la Quincaillerie Sur le Matériel du Fauteuil

8.2

1. Retirer la vis de réglage conique du récepteur de la rotule et retirer la rotule en acier de 17 mm.


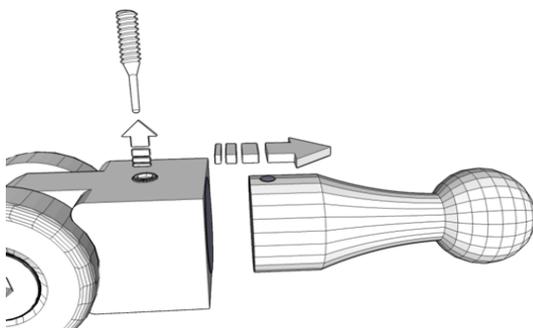


2. Faire glisser l'arrière de la rotule à travers le support de montage escamotable central SUS.

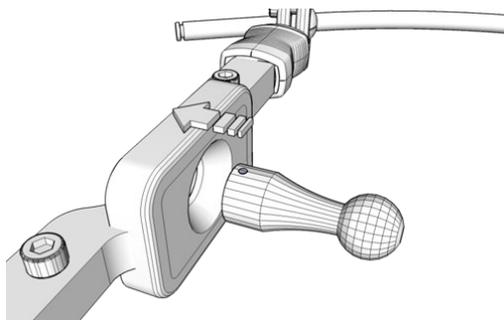

3. Faire glisser à nouveau la rotule en acier de 17 mm avec la quincaillerie escamotable dans le récepteur de la rotule. Resserrer la vis de réglage conique avec une poignée en T de 5/32 po dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Insérer les vis à douille de 10-24x 1/2 po à travers le support du SUS et dans les trous taraudés désignés du support de l'appui-tête.

⚠ MISE EN GARDE Ne pas trop serrer les vis.

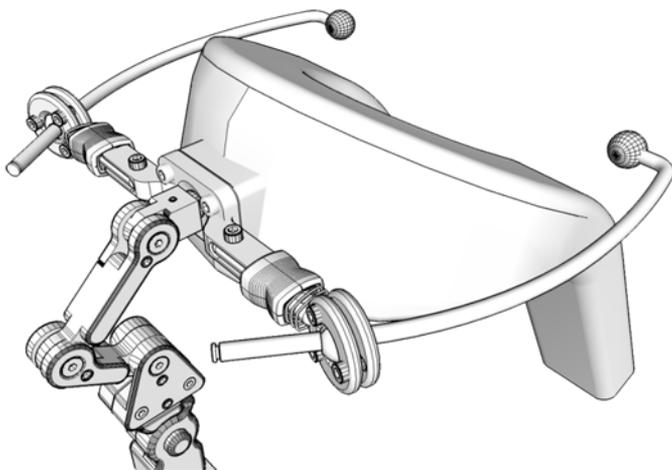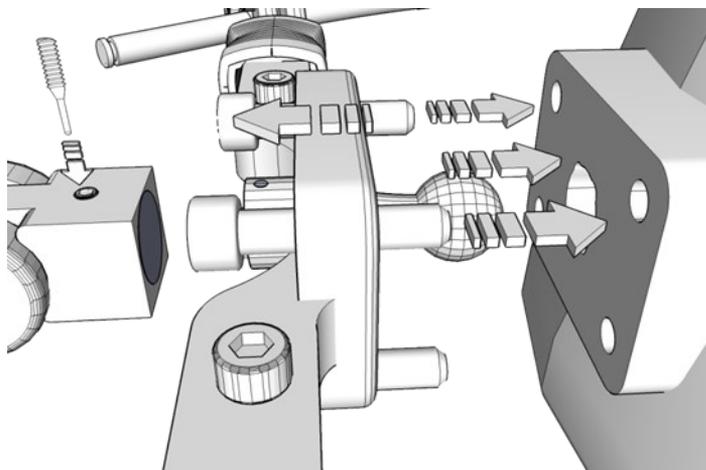


5. Serrer uniformément toutes les vis avec une poignée en T de 5/32 po dans le sens des aiguilles d'une montre.

Accessoires de Montage

9.1

Le système escamotable SUS9 a été conçu pour le montage des coussins faciaux, des interrupteurs ou des contrôles d'entraînement. Cette conception unique permet un réglage et un assemblage avec la poignée en T de 5/32 po. Pour monter des accessoires sur le système escamotable:


1. Après que le système escamotable a été monté sur l'appui-tête, desserrer les vis à douille de 10-24x 1/2 po sur les oreillettes et faire glisser les tiges latérales avec un anneau de montage des accessoires à la position souhaitée.

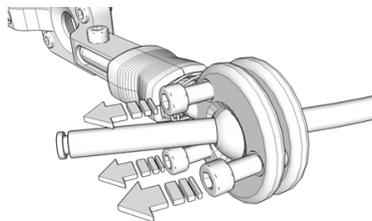

2. Faire glisser l'anneau de montage des accessoires jusqu'à ce qu'il s'adapte autour de la rotule de la tige latérale. Insérer les vis à douille de 10-24 x 1/2 po dans les trous forés et dans les trous filetés du coussin facial/ interrupteurs. Serrer uniformément toutes les vis avec une poignée en T de 5/32 po dans le sens des aiguilles d'une montre.

AVIS

Les coussins faciaux/interrupteurs peuvent être montés sur les tiges latérales escamotables. Les tiges latérales viennent avec des anneaux de montage spécifiques pour fixer les coussins/interrupteurs.

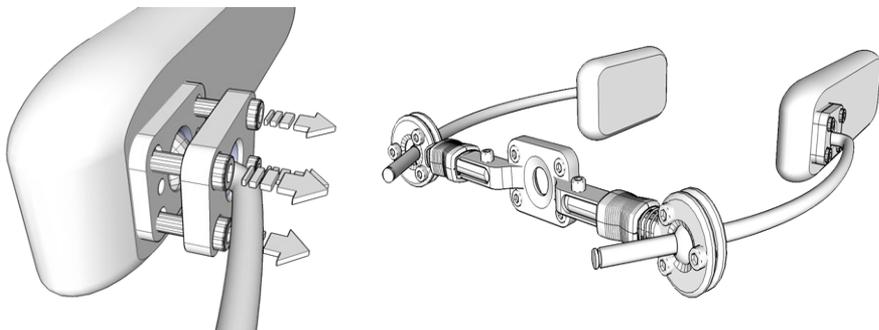**AVIS**

Un coussin facial 930 qui requiert un « anneau rectangulaire » est indiqué ci-dessus. Les coussins faciaux 900, 910 et 920 requièrent un « anneau circulaire ».

Après l'installation du système escamotable, effectuer les tests suivants avant que le fauteuil roulant ne soit livré ou mis en service:

- Vérifier que le SUS9 soit intact
- Test opérationnel

Vérifier le SUS9

10.1

- N'est pas plié ou endommagé.
- Le boîtier et les connecteurs ne sont pas endommagés.
- Revient à la position appropriée au besoin.

Test Opérationnel

10.2

1. Install swing away system correctly.
2. Ensure that the client is properly aligned and that seatbelts are fastened.
3. Test swing away arms to ensure they are properly moving in the correct direction.

Assistance des Revendeurs

11.1

Lors de la première utilisation par le client, il est conseillé que le revendeur ou le technicien d'entretien aide et explique les configurations au client (l'utilisateur et/ou la personne d'aide). Si nécessaire, le revendeur peut faire les derniers réglages.

Test par L'Utilisateur

11.2

Il est important que le client soit pleinement conscient de l'installation, de la façon de l'utiliser, et de ce qui peut être réglé afin d'acquérir autant que possible la mobilité. En tant que revendeur, procéder comme suit:

- Expliquer et montrer au client comment vous avez procédé à l'installation, et expliquer la fonction de chaque élément

Demander au client de tester le système escamotable:

- L'utilisateur peut-il, en toute sécurité, utiliser le fauteuil roulant avec un minimum d'effort?
- La mise en place du SUS9 est-elle dans une position optimale pour l'utilisateur?

Si nécessaire, régler le système escamotable à la position appropriée.

Expliquer au client, les problèmes potentiels et la façon de les résoudre.

Conditions D'Utilisation

11.3

Les SUS9 sont destinés à être utilisés tels qu'installés par le revendeur, selon les consignes d'installation dans ce manuel.

- Les conditions d'utilisation prévues sont communiquées par le revendeur ou le technicien d'entretien à l'utilisateur et/ou à la personne d'aide lors de la première utilisation.
- Si les conditions d'utilisation changent considérablement, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien qualifié afin d'éviter une usure excessive ou des dommages involontaires.

Nettoyage

12.1

- Pour laver la housse du coussin facial, retirer la housse du coussin, laver à la machine, à l'eau froide, sur programme délicat et égoutter.

 **ATTENTION** Éviter de mettre de la mousse dans la sècheuse.

Mensuellement

12.2

- Inspecter régulièrement la quincaillerie pour y déceler des vis desserrées ou des pièces usées. Remplacer ou réparer les pièces si nécessaire.
- Vérifier les coussins latéraux faciaux pour y déceler tout problème avec la mousse et/ou tout métal débordant de la mousse. Cela pourrait être potentiellement dangereux pour le client.

DANGER

Le non-respect de ces mises en garde peut causer de graves blessures corporelles.



Stealth Products, LLC. • info@stealthproducts.com • www.stealthproducts.com
+1(800) 965-9229 | +1(512) 715-9995 | 104 John Kelly Drive, Burnet TX 78611