



Stealth Products

Positionnement et Support

Manuel du Propriétaire



Déflecteur de Tonus

Le Manuel Du Propriétaire Et Le Guide D'Entretien
De Stealth Pour La Quincaillerie Des Solutions
Pour La Tête

Stealth Products vise la satisfaction du client à 100%. Votre entière satisfaction est importante. Veuillez nous contacter avec vos commentaires ou modifications suggérées qui permettront d'améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos produits.

Vous pouvez nous joindre à l'adresse:

104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Téléphone: (512) 715-9995

Numéro Sans Frais: 1(800) 965-9229

Télécopieur: (512) 715-9954

Numéro Sans Frais: 1(800) 806-1225

info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com

Généralités

Lire et comprendre toutes les instructions avant l'utilisation du produit. Le non-respect des instructions et des mises en garde dans ce document peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort. Une mauvaise utilisation du produit résultant du non-respect des instructions annulera la garantie.

Cesser immédiatement d'utiliser le produit si une fonction est compromise, des pièces sont manquantes, lâches, ou s'il présente des signes d'usure excessive. Consulter votre fournisseur pour les réparations, le réglage ou le remplacement.

Informations Importantes!

Toutes les personnes responsables de l'adaptation, du réglage et de l'usage quotidien des appareils décrits dans ces instructions doivent connaître et comprendre tous les aspects liés à la sécurité des appareils mentionnés.

Pour que nos produits soient utilisés avec succès, vous devez:

- Lire et comprendre toutes les instructions et les mises en garde.
- Maintenir nos produits selon nos instructions en matière de soins et d'entretien.
- Les appareils devraient être installés et réglés par un technicien qualifié.

Référence du Fournisseur

Fournisseur: _____

Téléphone: _____

Adresse: _____

Date D'achat: _____

Modèle: _____

Avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de ce produit, il est important que vous lisiez et compreniez le contenu de ces consignes de montage et d'utilisation. Les consignes de montage vous guideront à travers les possibilités du déflecteur de tons.

Les consignes sont rédigées dans l'intention explicite d'utilisation avec des configurations standards. Elles contiennent également des informations importantes sur la sécurité et l'entretien. Pour obtenir de l'aide ou des applications plus avancées, veuillez contacter votre fournisseur ou Stealth Products au (512) 715-9995 ou sans frais au 1-800-965-9229.

Toujours conserver les consignes d'utilisation dans un endroit sûr afin qu'elles puissent être consultées au besoin.

Toutes les informations, photos, illustrations et spécifications sont basées sur les informations sur les produits qui étaient disponibles au moment de l'impression. Les images et illustrations indiquées dans ces consignes sont des exemples représentatifs et ne sont pas destinées à être des représentations précises des différentes parties du produit.

Commande de Documents

Vous pouvez télécharger des copies supplémentaires de ce manuel du propriétaire sur le site Web de Stealth:

www.stealthproducts.com/gui/docs/?type=usr&

Or rechercher:

Manuel du propriétaire du déflecteur de tons dans la barre de recherche en haut de la page.

Les coussins/housses sont conçus et fabriqués selon les normes les plus élevées. Nos coussins/housses sont garantis exempts de défauts de matériau et de main d'œuvre pour une période de 24 mois. En cas de défaut de matériau ou de main d'œuvre, Stealth Products réparera ou remplacera, à sa discrétion, le coussin/housse du produit. Cette garantie ne couvre pas les coussins/housses ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'abus par l'utilisateur et jugé comme tel par Stealth Products, LLC.

Les réclamations et les réparations devraient être traitées par le fournisseur de Stealth Products le plus proche.

Personne n'est autorisé à modifier, à prolonger, ou à renoncer aux garanties de Stealth Products, LLC. Stealth Products garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de main d'œuvre:

Matériel: 5 ans

Composants Électroniques: 3 ans

Limitations

4.1

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui nécessitent un remplacement en raison de l'usure normale:

- Revêtements Extérieurs
- Revêtements Intérieurs
- Des circonstances indépendantes de la volonté de Stealth.
- La main-d'œuvre, les appels de service, les frais d'expédition et autres frais engagés pour la réparation du produit, sauf autorisation expresse, PRÉALABLE, par Stealth Products, LLC.
- Les réparations et/ou les modifications apportées à une pièce sans l'accord spécifique de Stealth.

Les exclusions comprennent également des composants présentant des dommages causés par:

- L'exposition à l'humidité

1.0 Satisfaction de la Clientèle	i
2.0 Informations Importantes	ii
3.0 Introduction	iii
4.0 Garantie	iv
4.1 Limitations.....	iv
5.0 Table des Matières	v
6.0 Étiquettes de Mise en Garde	vi
6.1 Étiquettes de Mise en Garde.....	vi
6.2 Responsabilité Limitée.....	vi
6.3 Tests.....	vi
7.0 Pièces et Accessoires	1
7.1 Pièces Fournies.....	1
8.0 Consignes de Montage	2
8.1 Installation du Déflecteur de Tonus.....	2
9.0 Conception et Fonction	4
9.1 Utilisation Prévue	4
10.0 Première Utilisation	5
10.1 Assistance des Revendeurs.....	5
10.2 Tests des Utilisateurs.....	5
10.3 Conditions D'utilisation.....	5
11.0 Entretien	6
11.1 Entretien et Maintenance.....	6

Étiquettes de Mise en Garde

6.1

Les mises en garde sont incluses pour la sécurité de l'utilisateur, du client, de l'opérateur et de la propriété. Veuillez lire et comprendre ce que les mots indicateurs SÉCURITÉ, AVIS, ATTENTION, MISE EN GARDE et DANGER signifient, comment ils pourraient affecter l'utilisateur, ceux autour de l'utilisateur et la propriété.

 DANGER	Identifie une situation imminente qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , la mort , et des dommages matériels .
 MISE EN GARDE	Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , la mort , et des dommages matériels .
 ATTENTION	Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) entraînera des blessures mineures à modérées , et des dommages matériels .
AVIS	Identifie des informations importantes qui ne sont pas liées à des blessures, mais à des dommages matériels potentiels.
SÉCURITÉ	Indique les étapes ou les instructions pour des pratiques sûres, des rappels de procédures de sécurité, ou des équipements de sécurité importants qui pourraient être nécessaires.

Responsabilité Limitée

6.2

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les dommages matériels pouvant découler de l'échec de l'utilisateur ou d'autres personnes de suivre les recommandations, les mises en garde et les instructions contenues dans ce manuel.

Tests

6.3

La configuration et conduite initiales doivent être effectuées dans un espace ouvert sans obstacles jusqu'à ce que l'utilisateur soit parfaitement en mesure de conduire en toute sécurité.

Le déflecteur de tonus doit toujours être testé sans qu'une personne soit assise dans le fauteuil roulant jusqu'à ce que chaque modification de l'installation physique ou réglage soit terminé.


Pièces Fournies

7.1

Selon le déflecteur de tons commandé, les vis fournies varieront:


- Quatre vis à douille de 10-24x 3/8 po
- Trois vis à douille de 10-32x 3/8 po

Gabarit à 3 trous pour
une rotule de 1"

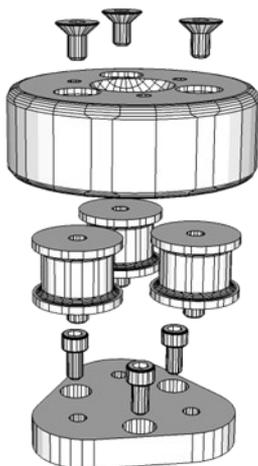

TD101

Gabarit de 4 trous pour
une rotule de 17 mm

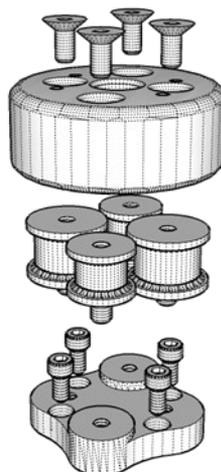

TD100

AVIS

TD100 doit utiliser les vis à douille de 10-24x 9/16 po fournies pour le montage de l'appui-tête. L'utilisation de vis plus courtes endommagera le filetage des trous.

AVIS

TD101 utilise les vis à douille standard de 10-32x 7/8 po pour le montage de l'appui-tête.


Installation du Déflecteur de Tonus

8.1

L'installation d'un déflecteur de tonus requiert quatre étapes.


Pour installer le gabarit de 3 trous du TD101:

1. Une fois démonté, monter la plaque d'adaptation du déflecteur de tonus à l'arrière du coussin de l'appui-tête.
2. Monter les déflecteurs de tonus sur la plaque d'adaptation du déflecteur de tonus.
3. Aligner la housse du déflecteur de tonus sur les déflecteurs.
4. Fixer l'anneau CP en acier sur la housse du déflecteur de tonus.

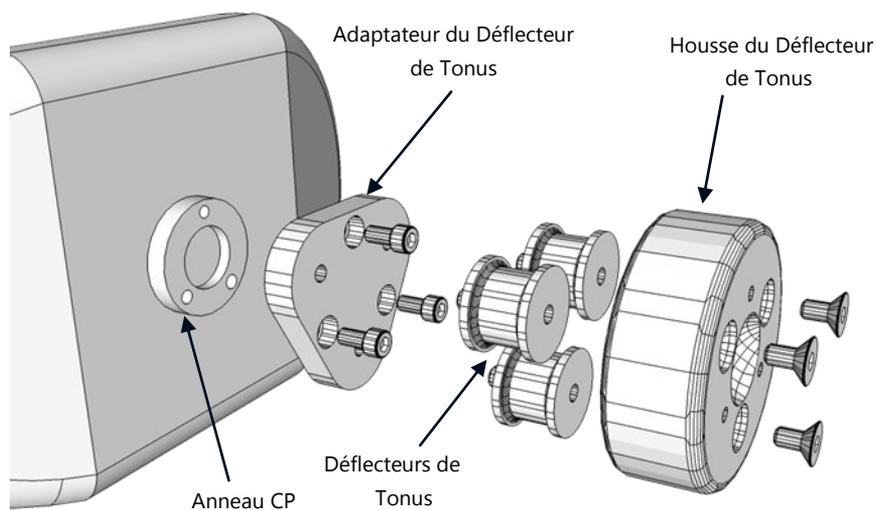

Pour installer le gabarit de 4 trous du TD100:

1. Une fois démonté, monter la plaque d'adaptation du déflecteur de tonus à l'arrière du coussin de l'appui-tête.
2. Monter les déflecteurs de tonus sur la plaque d'adaptation du déflecteur de tonus.
3. Aligner la housse du déflecteur de tonus sur les déflecteurs.
4. Fixer l'anneau SU en acier sur la housse du déflecteur de tonus.

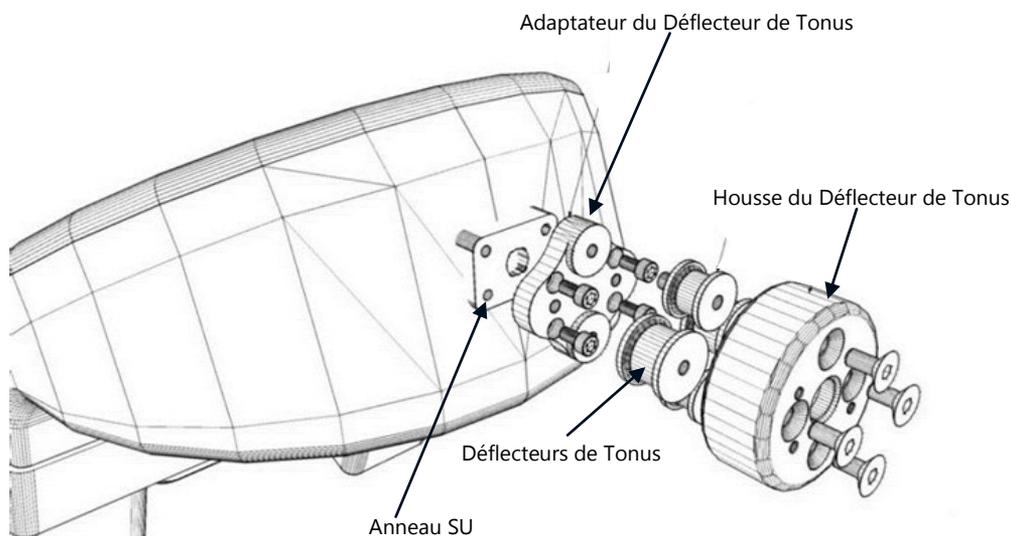

Utilisation Prévue

9.1

Lorsqu'il est installé, le déflecteur de tonus est conçu pour avoir deux fonctions:

- Absorption
- Prévention

La conception du déflecteur de tonus permet d'absorber les forces arrière et angulaires, la compression rapide causée par un impact et empêche la charge à angle incliné jusqu'à 10° dans toutes les directions pour les personnes avec un tonus musculaire élevé.



Assistance des Revendeurs

10.1

Lors de la première utilisation par le client, il est conseillé que le revendeur ou le technicien d'entretien aide et explique les configurations au client (l'utilisateur et/ou la personne d'aide). Si nécessaire, le revendeur peut faire les derniers réglages.

MISE EN GARDE

Le déflecteur de tonus ne doit être prescrit et installé que par des professionnels de la santé qualifiés.

Tests par L'utilisateur

10.2

Il est important que le client soit pleinement conscient de l'installation et de la façon dont le déflecteur de tonus peut être réglé afin d'obtenir le meilleur positionnement. En tant que revendeur, procéder comme suit:

- Expliquer et montrer au client comment vous avez procédé à l'installation, et expliquer la fonction de chaque élément.

Demander au client de tester la position du Déflecteur de Tonus:

- L'appui-tête se trouve-t-il dans la position appropriée pour le client?
- L'utilisateur peut-il faire fonctionner le fauteuil en toute sécurité?
- La mise en place du GAT444-IP est-elle dans une position optimale pour l'utilisateur?

Si nécessaire, régler le déflecteur de tonus.

Expliquer au client, les problèmes potentiels et la façon de les résoudre.

Conditions D'utilisation

10.3

Le déflecteur de tonus est destiné à être utilisé tel installé par le concessionnaire, selon les instructions d'installation dans ce manuel.

- Les conditions d'utilisation prévues sont communiquées par le revendeur ou le technicien d'entretien à l'utilisateur et/ou personne d'aide lors de la première utilisation.
- Si les conditions d'utilisation changent considérablement, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien qualifié afin d'éviter une usure excessive et déchirure ou des dommages involontaires.

Entretien et Maintenance

11.1

- Inspecter régulièrement la quincaillerie pour y déceler des vis desserrées ou des pièces usées.
- Vérifier tout problème avec la quincaillerie. Cela pourrait être potentiellement dangereux pour le client.
- Éliminer délicatement la poussière et la saleté avec un chiffon humide.

SÉCURITÉ

Remplacer ou réparer les pièces si nécessaire.

DANGER

Le non-respect de ces mises en garde peut causer de graves blessures corporelles.



Stealth Products, LLC. • info@stealthproducts.com • www.stealthproducts.com
+1(800) 965-9229 | +1(512) 715-9995 | 104 John Kelly Drive, Burnet TX 78611