



Stealth Products

Quincaillerie de Montage

Manuel du Propriétaire



TWBM480

Le Manuel Du Propriétaire Et Le Guide D'entretien
De Stealth Pour Le Support D'accoudoir Style
Liaison

Stealth Products vise la satisfaction du client à 100 %. Votre entière satisfaction est importante. Veuillez nous contacter avec vos commentaires ou modifications suggérées qui permettront d'améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos produits.

Vous pouvez nous joindre à l'adresse:

104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Téléphone: (512) 715-9995

Numéro Sans Frais: 1(800) 965-9229

Télécopieur: (512) 715-9954

Numéro Sans Frais: 1(800) 806-1225

info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com

Généralités

Lire et comprendre toutes les instructions avant l'utilisation du produit. Le non-respect des instructions et des mises en garde dans ce document peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort. Une mauvaise utilisation du produit résultant du non-respect des instructions annulera la garantie.

Cesser immédiatement d'utiliser le produit si une fonction est compromise, des pièces sont manquantes, lâches, ou s'il présente des signes d'usure excessive. Consulter votre fournisseur pour les réparations, le réglage ou le remplacement.

Informations Importantes!

Toutes les personnes responsables de l'adaptation, du réglage et de l'usage quotidien des appareils décrits dans ces instructions doivent connaître et comprendre tous les aspects liés à la sécurité des appareils mentionnés. Pour que nos produits soient utilisés avec succès, vous devez:

- Lire et comprendre toutes les instructions et les mises en garde.
- Maintenir nos produits selon nos instructions en matière de soins et d'entretien.
- Les appareils devraient être installés et réglés par un technicien qualifié.

Référence du Fournisseur

Fournisseur: _____

Téléphone: _____

Adresse: _____

Date D'achat: _____

Modèle: _____

Avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de ce produit, il est important que vous lisiez et compreniez le contenu de ces consignes d'installation et d'utilisation. Les consignes d'installation vous guideront à travers les possibilités du support d'accouder TWBM480.

Les consignes sont rédigées dans l'intention explicite d'utilisation avec des configurations standards. Elles contiennent également des informations importantes sur la sécurité et l'entretien. Pour obtenir de l'aide ou des applications plus avancées, veuillez contacter votre fournisseur ou Stealth Products au (512) 715-9995 ou sans frais au 1-800-965-9229.

Toujours conserver les consignes d'utilisation dans un endroit sûr afin qu'elles puissent être consultées au besoin.

Toutes les informations, photos, illustrations et spécifications sont basées sur les informations sur les produits qui étaient disponibles au moment de l'impression. Les images et illustrations indiquées dans ces consignes sont des exemples représentatifs et ne sont pas destinées à être des représentations précises des différentes parties du produit.

Commande de Documents

Vous pouvez télécharger des exemplaires supplémentaires de ce manuel du propriétaire sur le site Web de Stealth:

www.stealthproducts.com/gui/docs/?type=usr&

Or rechercher:

Manuel du propriétaire de TWBM480 dans la barre de recherche en haut de la page.

Les coussins/housses sont conçus et fabriqués selon les normes les plus élevées. Nos coussins/housses sont garantis exempts de défauts de matériau et de main d'œuvre pour une période de 24 mois. En cas de défaut de matériau ou de main d'œuvre, Stealth Products réparera ou remplacera, à sa discrétion, le coussin/housse du produit. Cette garantie ne couvre pas les coussins/housses ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'abus par l'utilisateur et jugé comme tel par Stealth Products, LLC.

Les réclamations et les réparations devraient être traitées par le fournisseur de Stealth Products le plus proche.

Personne n'est autorisé à modifier, à prolonger, ou à renoncer aux garanties de Stealth Products, LLC. Stealth Products garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de main-d'œuvre:

Matériel: 5 ans

Composants Électroniques: 3 ans

Limitations

4.1

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui nécessitent un remplacement en raison de l'usure normale:

- Revêtements Extérieurs
- Revêtements Intérieurs
- Des circonstances indépendantes de la volonté de Stealth.
- La main-d'œuvre, les appels de service, les frais d'expédition et autres frais engagés pour la réparation du produit, sauf autorisation expresse, PRÉALABLE, par Stealth Products, LLC.
- Les réparations et/ou les modifications apportées à une pièce sans l'accord spécifique de Stealth.

Les exclusions comprennent également des composants présentant des dommages causés par:

- L'exposition à l'humidité

1.0 Satisfaction du Client	i
2.0 Informations Importantes.....	ii
3.0 Introduction.....	iii
4.0 Garantie	iv
4.1 Limitations.....	iv
5.0 Table des Matières.....	v
6.0 Étiquettes de Mise en Garde.....	vii
6.1 Étiquettes de Mise en Garde.....	vii
6.2 Responsabilité Limitée.....	vii
6.3 Tests.....	vii
7.0 Responsabilité Limitée.....	viii
7.1 Aperçu de la Trousse.....	viii
8.0 Assemblage et Montage.....	1
8.1 Assemblage de la Quincaillerie.....	1
8.2 Montage de la Quincaillerie.....	2
8.3 Support D'accoudoir TBBM480.....	3
8.4 Pince de Fixation à Canne D'Arm 240.....	3
8.5 Montage de Périphérique.....	4
9.0 Réglages.....	5
9.1 Réglages de Liaison.....	5
9.2 Réglage de la Profondeur.....	6

10.0 Liste de Contrôle pour le Transport.....	7
10.1 Avant le Transport.....	7
10.2 Pré-Transport	7
11.0 Première Utilisation.....	8
11.1 Assistance des Revendeurs.....	8
11.2 Tests par L'utilisateur.....	8
11.3 Conditions D'utilisation.....	8
12.0 Entretien.....	9
12.1 Entretien et Maintenance.....	9

Étiquettes de Mise en Garde

6.1

Les mises en garde sont incluses pour la sécurité de l'utilisateur, du client, de l'opérateur et de la propriété. Veuillez lire et comprendre ce que les mots indicateurs **SÉCURITÉ**, **AVIS**, **ATTENTION**, **MISE EN GARDE** et **DANGER** signifient, comment ils pourraient affecter l'utilisateur, ceux autour de l'utilisateur et la propriété.

 DANGER	Identifie une situation imminente qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , la mort , et des dommages matériels .
 MISE EN GARDE	Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , la mort , et des dommages matériels .
 ATTENTION	Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) entraînera des blessures mineures à modérées , et des dommages matériels .
AVIS	Identifie des informations importantes qui ne sont pas liées à des blessures, mais à des dommages matériels potentiels.
SÉCURITÉ	Indique les étapes ou les instructions pour des pratiques sûres, des rappels de procédures de sécurité, ou des équipements de sécurité importants qui pourraient être nécessaires.

Responsabilité Limitée

6.2

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les dommages matériels pouvant découler de l'échec de l'utilisateur ou d'autres personnes de suivre les recommandations, les mises en garde et les instructions contenues dans ce manuel.

Tests

6.3


La configuration et conduite initiales doivent être effectuées dans un espace ouvert sans obstacles jusqu'à ce que l'utilisateur soit parfaitement en mesure de conduire en toute sécurité.

Le TWBM480 doit toujours être réglé sans qu'une personne soit assise dans le fauteuil roulant jusqu'à ce que chaque modification de l'installation physique ou réglage soit terminé.

Aperçu de la Trousse

7.1


1. TWB480-VB
2. TWB480-TR
3. TWB-SOL
4. TWB-LINK
5. TWB-17mmBK TAB-RING
6. ARM240

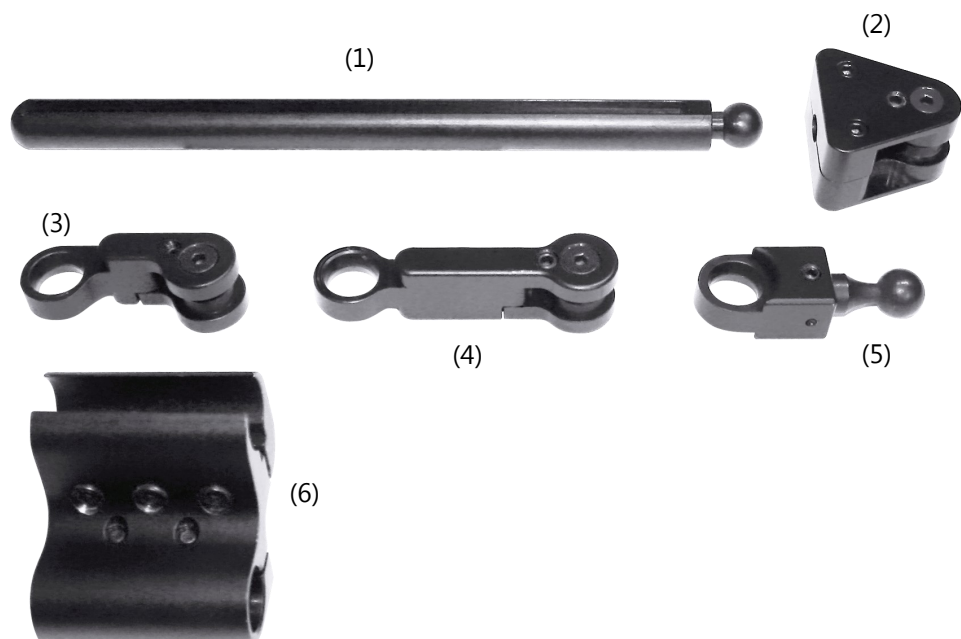

Assemblage de la Quincaillerie

8.1

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Trousse de Rotule de 17 mm | 8. Tige de 3/4 po |
| 2. Liaison en Ligne de 3 po | 9. Plaque de Base |
| 3. Écrou de Liaison en Ligne | 10. Plaque de Serrage ARM240 |
| 4. Liaison D'écart de 2 po | 11. Vis à tête Plate de 1/4 po - 20 x 1 po |
| 5. Écrou de Liaison D'écart | 12. Vis Réglable de 5/16 po x 1/4 po |
| 6. Triangle Fileté | 13. Vis à Douille de 1/4 po - 20 x 1 po |
| 7. Triangle Direct | 14. Vis à Douille de 1/4 po - 20 x 3/4 po |
| | 15. Vis à Douille de 10 - 32 x 1 |

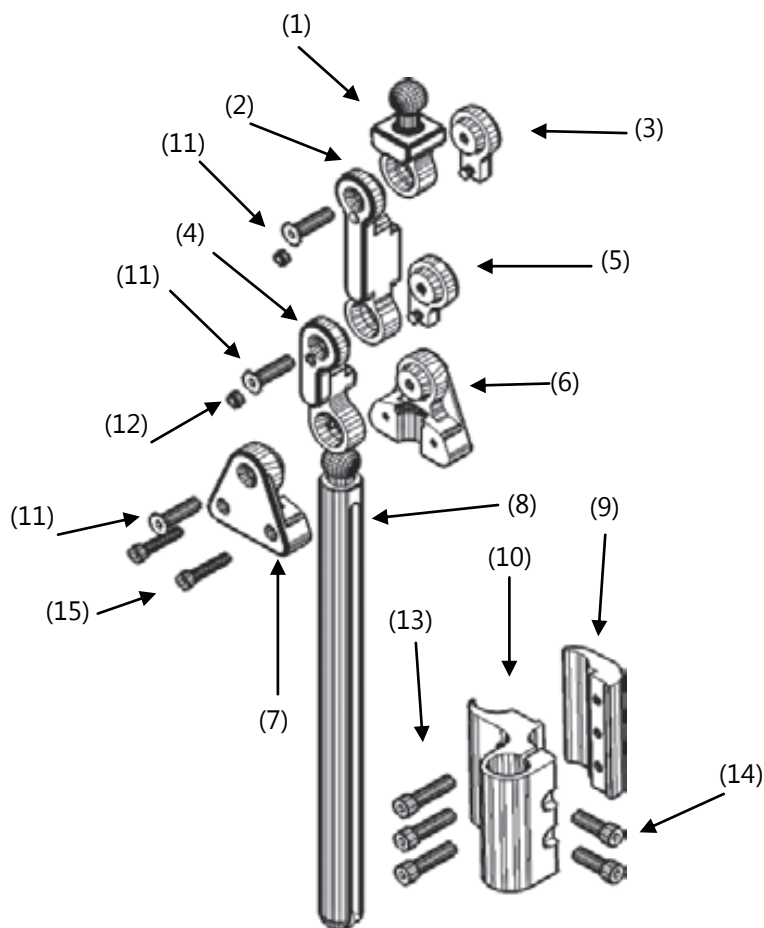


Montage de la Quincaillerie

8.2

La pince de fixation à canne de la plaque ARM240 se monte sous l'accoudoir et accepte des tubes de 3/4 po, 7/8 po et 1 po.

Pour installer la plaque ARM240:

1. Placer les vis (1) dans les trous correspondants sur la plaque de base (2) et sur la plaque ARM240 (3). Visser légèrement les vis dans les trous et les laisser lâches.
2. Placer les côtés opposés des pinces autour du tube de l'accoudoir serrer complètement les vis (1) jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.

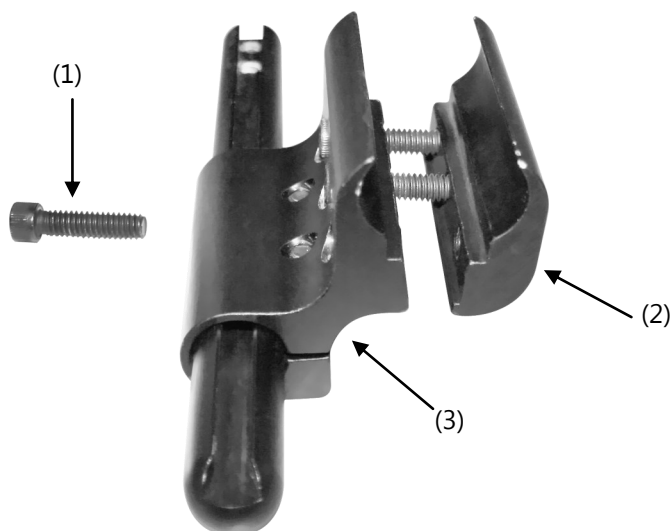

Support D'accoudoir TWBM480

8.3



La quincaillerie de TWBM480 est si polyvalente qu'elle peut être utilisée pour ajouter un périphérique supplémentaire et des composants électroniques presque partout!

La série TWBM480 utilise la quincaillerie style liaison pour permettre un réglage sans limites. Cette quincaillerie rend le positionnement de vos composants électroniques facile et rigide. La régler à l'endroit exact souhaité et elle tiendra fermement sur cette position, PAS D'EXCUSES!

Pince de Fixation à Canne Arm240

8.4

L'ARM240 est une pince de fixation à canne pour les tubes de 3/4 po, 7/8 po et 1 po. Les supports de la quincaillerie se montent sous l'accoudoir d'une base de mobilité et conjointement avec le TWBM480. Non seulement ils permettent le montage, mais aussi le réglage de la profondeur de la quincaillerie, ainsi que l'incroyable adaptabilité de la quincaillerie de liaison de TWBM480.



Peripheral Mounting


8.5

Plusieurs périphériques, composants électroniques, manettes et dispositifs médiatiques sont disponibles pour être montés sur le TWBM480.

Les bagues de passage (4) sont disponibles dans beaucoup de styles pour monter votre appareil. Voici un exemple de montage d'une manette Q-Logic Pride et de la plaque d'interface (9).

Lors du Montage:

1. Démontez la trousse de la rotule.
2. Placer la bague entre la rotule de 17 mm (5) et le récepteur de la rotule (6).
3. Enfin, serrer la vis de réglage en place pour empêcher le mouvement.
4. Insérer la rotule dans le récepteur; visser la vis conique (7) dans le trou correspondant.

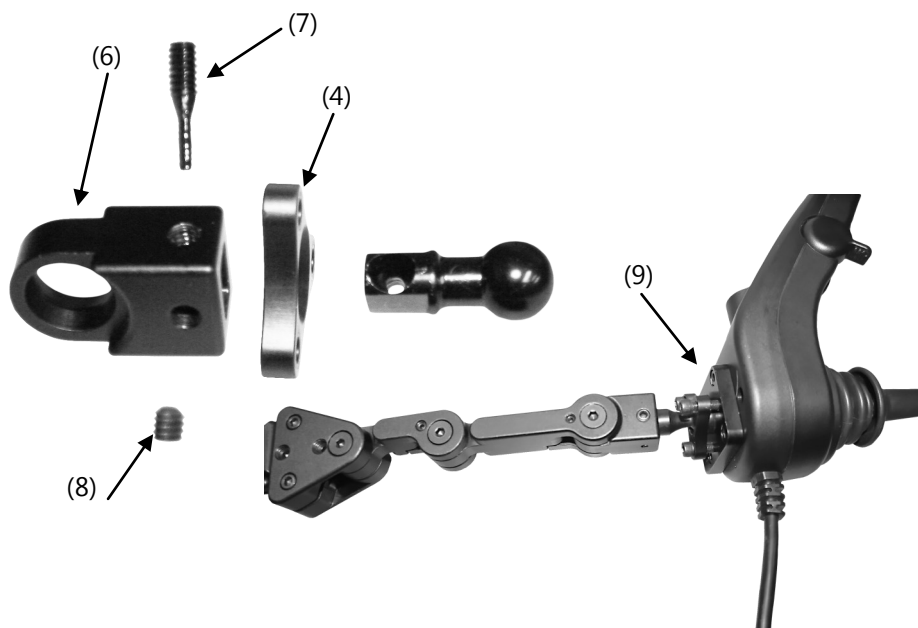


Réglages de Liaison

9.1

Une clé hexagonale de 5/32 po (1) est utilisée pour positionner et ajuster les liaisons.

Pour régler les Liaisons:

1. Desserrer les vis à tête plate (2) en maintenant les raccords ensemble.
2. Pour le réglage de a rotation et de la liaison du triangle (3), desserrer toutes les vis (y compris les vis de réglage) jusqu'à ce que vous soyez en mesure de faire tourner le triangle et de régler la première liaison.
3. Les vis de réglage (4) empêchent un mouvement excessif de la quincaillerie.
4. Pour éviter que la rotule, les liaisons et le triangle ne bougent, serrer les vis de réglage à fond.

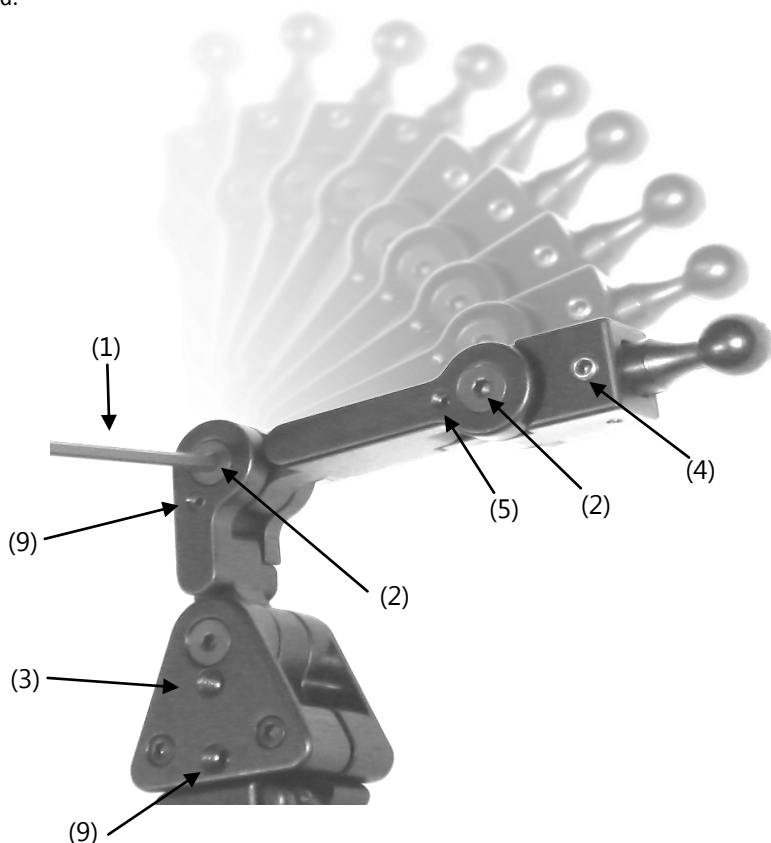

MISE EN GARDE


Ne pas trop serrer les vis.

Réglage de la Profondeur

9.2

Pour régler la quincailerie à la position avant et après:

1. Desserrer les deux vis (5) en maintenant la tige de la quincailerie (6).
2. Positionner la quincailerie à l'endroit désiré.
3. Il peut s'avérer nécessaire de régler la quincailerie davantage vers l'avant ou l'arrière sur l'accoudoir pour atteindre la position souhaitée.

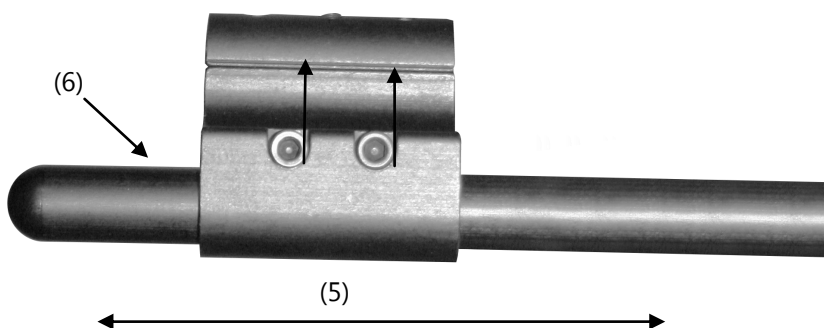

MISE EN GARDE

Ne pas trop serrer les vis.

Avant le Transport

10.1

Avant le Transport:

- Toujours vérifier les dispositifs de retenue et la quincaillerie.
- Sur les dispositifs de retenue et les arrimages, vérifier les déchirures et les sangles usées.
- Vérifier s'il existe des crochets endommagés ou une quincaillerie d'attache lâche.

AVIS

Remplacer au besoin et éviter d'utiliser des sangles déchirées.

- Sur le système de siège, vérifier les vis desserrées qui fixent la quincaillerie au siège. Elles devraient être bien serrées, mais pas trop serrées.
- La quincaillerie des poignées doit être serrée et si les goupilles de transit sont disponibles, elles doivent être insérées. Ces goupilles maintiennent le fauteuil fixé au cadre même dans le cas où une poignée deviendrait lâche et se détacherait du fauteuil.
- S'il existe un plateau ou tout autre élément pouvant s'envoler ou causer des blessures en

Pré-Transport

10.2

- Le siège est en position orientée vers l'avant
- Toute la quincaillerie est vérifiée pour y déceler des vis desserrées ou des composants endommagés
- Vérifier que toutes les sangles d'attaches sont sécurisées et que les sangles de retenue ne sont pas vrillées
- Tous les objets mobiles sont retirés et placés dans des zones sécurisées.
- Des ceintures de sécurité de sièges conformes à ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Section 19/ISO 7176-19 sont utilisées

ATTENTION

Dans le cas où le véhicule dans lequel le siège est installé, est impliqué dans une collision, vérifier minutieusement toute la quincaillerie du siège pour détecter des dommages. Si elle présente des signes de dommages, faire appel à un technicien d'entretien qualifié afin qu'il inspecte et remplace les composants endommagés ou l'envoyer à Stealth Products pour une remise à neuf complète pour garantir la sécurité à l'avenir.

Assistance des Revendeurs

11.1

Lors de la première utilisation par le client, il est conseillé que le revendeur ou le technicien d'entretien aide et explique la configuration au client (l'utilisateur et/ou la personne d'aide). Si nécessaire, le revendeur peut faire les derniers réglages.

MISE EN GARDE

Le TWBM480-TAB ne doit être prescrit et installé que par des professionnels de la santé qualifiés.

Tests par L'utilisateur

11.2

Il est important que le client soit pleinement conscient de l'installation et de la façon dont l'appui-tête peut être réglé afin d'obtenir, autant que possible, le meilleur positionnement. En tant que revendeur, procéder comme suit:

- Expliquer et montrer au client comment vous avez procédé à l'installation, et expliquer la fonction de chaque élément.

Demander au client de tester le système escamotable:

- La quincaillerie se trouve-t-elle dans la position appropriée pour le client?
- L'utilisateur peut-il faire fonctionner le fauteuil en toute sécurité?
- La mise en place de la quincaillerie est-elle dans une position optimale pour l'utilisateur?

Si nécessaire, régler le TWBM480 à la position appropriée.

Expliquer au client, les problèmes potentiels et la façon de les résoudre.

Conditions D'utilisation

11.3

Le TWBM480 est destiné à être utilisé tel qu'installé par le concessionnaire, selon les consignes d'installation dans ce manuel.

- Les conditions d'utilisation prévues sont communiquées par le revendeur ou le technicien d'entretien à l'utilisateur et/ou personne d'aide lors de la première utilisation.
- Si les conditions d'utilisation changent considérablement, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien qualifié afin d'éviter une usure excessive déchirure ou des dommages involontaires.

Entretien et Maintenance

12.1

- S'assurer que la quincaillerie que vous utilisez demeure en bon état de marche en l'entretenant et en la maintenant constamment.
- Inspecter régulièrement la quincaillerie pour y déceler des vis desserrées ou des pièces usées.
- Pour la nettoyer, utiliser un nettoyeur pour usage général.
- Serrer les vis de réglage jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées.

AVIS

Remplacer ou réparer les pièces si nécessaire.

AVIS

Ne pas trop serrer les vis. Un serrage excessif des vis empêche le bon fonctionnement de la quincaillerie et peut causer des dommages irréversibles à la quincaillerie.

 DANGER

Le non-respect de ces mises en garde peut causer de graves blessures.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Stealth Products, LLC. • info@stealthproducts.com • www.stealthproducts.com
+1(800) 965-9229 | +1(512) 715-9995 | 104 John Kelly Drive, Burnet TX 78611