

Sistema di seduta Synergy

Istruzioni di base

ACN# 088 609 661



QUANTUM
REHAB

MOVING AT THE SPEED OF LIFE™

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso -ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 - Fiano Romano (RM)

INDICAZIONI E ICONE DI SICUREZZA

I seguenti simboli sono utilizzati in tutto il manuale per indicare avvertenze, cautele e note. È importante leggerle e comprenderle completamente.



ATTENZIONE! Situazione potenzialmente pericolosa, con il rischio di provocare morte o gravi infortuni alle persone.



ATTENZIONE! Situazione potenzialmente pericolosa, con il rischio di provocare infortuni di moderata entità alle persone e danni alle cose.



NOTA: Indicazioni importanti ai fini dell'utilizzo del prodotto.

L'utilizzo in sicurezza del prodotto dipende dalla diligenza nel seguire avvertenze, cautele, note e istruzioni contenute nel presente manuale. Dipende altresì dal buon senso dell'Utente e del fornitore, dell'assistente o del personale sanitario.

ATTENZIONE! Si prega di leggere e osservare tutte le istruzioni di cui al presente manuale prima di cominciare ad utilizzare il Prodotto. In caso di mancata comprensione di qualunque informazione fornita nel presente manuale, o si necessiti ulteriore assistenza per la preparazione all'utilizzo del Prodotto, si prega di contattare il Rivenditore Autorizzato Pride.



ATTENZIONE! Il sistema di seduta SynergyTilt non è indicato per l'uso come sedile nei veicoli. I passeggeri di un veicolo dovrebbero assicurarsi ai sedili tramite apposite cinture di sicurezza conformi alle specifiche rilasciate dal produttore del veicolo.

Pride non può essere ritenuta responsabile di infortuni o danni provocati dall'utilizzo incauto del prodotto, ovvero causati dalla mancata osservanza di avvertenze, cautele e istruzioni espresse nel presente manuale, in altre comunicazioni rilasciate da Pride e/o stampigliate sul prodotto stesso.

Questo manuale Pride è redatto sulla base delle ultime specifiche ed informazioni di prodotto disponibili al momento della pubblicazione. Pride si riserva il diritto di apportare modifiche qualora si rendessero necessarie. Qualsiasi modifica apportata ai prodotti Pride potrebbe generare lievi differenze tra le illustrazioni e le spiegazioni di cui al presente manuale e il prodotto acquistato dall'Utente.

INDICE

INDICAZIONI E ICONE DI SICUREZZA	2
INTRODUZIONE	4
IL SISTEMA DI SEDUTA SYNERGY	4
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	6
RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DEL SEDILE	7
BRACCIOLI - LE OPZIONI DISPONIBILI	8
BRACCIOLI SOLLEVABILI	8
Regolazione dell'inclinazione	8
Regolazione dell'altezza	9
BRACCIOLI REMOVIBILI TIPO "RINFORZATO"	10
Rimozione/Installazione	10
Regolazione estensione braccioli	11
Regolazione altezza braccioli	12
BRACCIOLI REMOVIBILI A REGOLAZIONE RAPIDA	13
Regolazione altezza braccioli (versione adulto)	13
Regolazione altezza braccioli (versione bambino)	15
BRACCIOLI SOLLEVABILI A DOPPIO PIANTONE	16
Rimozione/Installazione dei braccioli a doppio piantone	16
Regolazione altezza bracciolo a doppio piantone	17
SCHIENALE RECLINABILE MANUALMENTE (OPZIONALE)	18
CURA E MANUTENZIONE	19
GARANZIA	19

INTRODUZIONE

Benvenuti in Quantum Rehab, la divisione Pride dedicata alla personalizzazione delle Carrozze elettroniche per gli Utenti con esigenze più avanzate in termini di mobilità e riabilitazione. Quantum Rehab, inoltre, amplia il margine di controllo delle funzioni della Carrozzina ad opera dell'assistente sanitario, offrendo così direttamente all'Utente un supporto di secondo livello, puntuale secondo le necessità.

Il presente manuale descrive le funzioni di base del solo sistema di seduta Synergy, e va consultato e letto congiuntamente al manuale utente fornito con la Carrozzina acquistata. Si prega di leggere completamente entrambi i manuali prima di procedere all'utilizzo del prodotto e/o della Carrozzina.

Il manuale vuole essere un compendio al training offerto dal Rivenditore Autorizzato Pride. In caso di dubbi o problemi inerenti al sistema di seduta Synergy, si prega di rivolgersi al proprio Rivenditore Autorizzato Pride.

IL SISTEMA DI SEDUTA SYNERGY – CONTROLLI

Il Synergy è un sistema di seduta unico nel proprio genere, studiato appositamente per le Carrozze della linea Jazzy. Completamente regolabile, si adatta alle esigenze di ciascun utente; si installa sulla base delle Jazzy per offrire il massimo della manovrabilità.


Il presente manuale fornisce all'Utente/operatore informazioni utili sul sistema di seduta Synergy. Si prega di leggerlo completamente prima di qualunque tentativo di utilizzare il sistema Synergy.

Le fascette riutilizzabili incluse nell'imballo servono al fissaggio del cuscino del sedile alla base del sistema di seduta Synergy, e NON vanno utilizzate nel caso in cui il cuscino sia realizzato in materiale antiscivolo.



ATTENZIONE! NON utilizzare le fascette riutilizzabili nel caso in cui il cuscino del sedile sia realizzato in materiale antiscivolo. L'utilizzo di fascette riutilizzabili per il fissaggio di un cuscino antiscivolo potrebbe danneggiarlo.

La figura 1 illustra i vari tipi di braccioli utilizzabili in combinazione con il sistema Synergy.

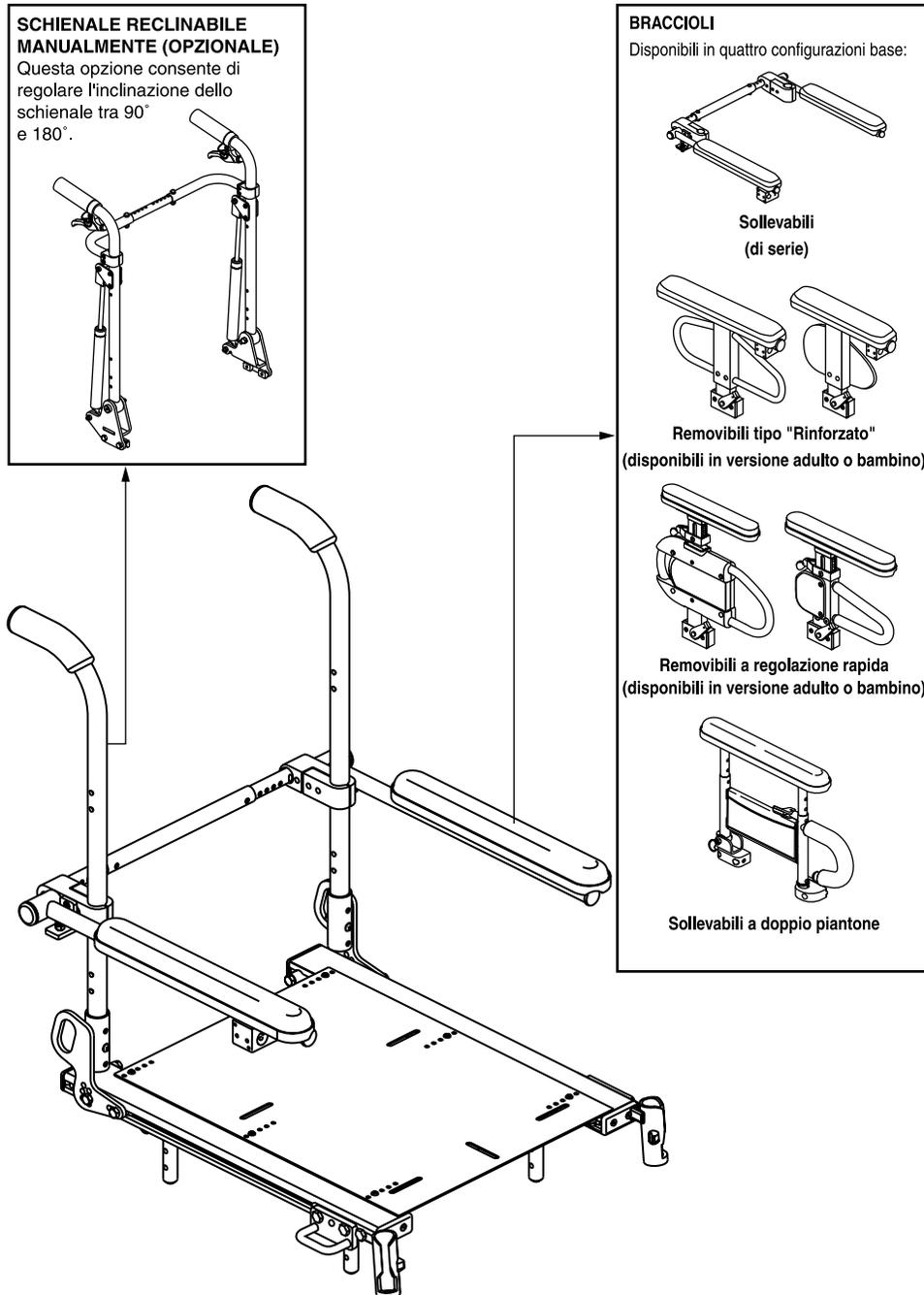**Figura 1. Braccioli del sistema Synergy**

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di passare ad utilizzare il sistema Synergy, leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza. Dette precauzioni sono redatte a beneficio dell'Utente e assicurano l'utilizzo in sicurezza del sistema di seduta Synergy.

- togliere l'alimentazione prima di accedere al sedile Synergy.
- Seduti sul sedile Synergy, accertarsi di avere sempre un aiuto a disposizione (in caso di necessità).
- Attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza dettagliate nel manuale di istruzioni fornito con la Carrozzina elettronica acquistata, dedicando particolare attenzione alla sezione che descrive le cautele contro le interferenze radio ed elettromagnetiche (IEM/IRF).



ATTENZIONE! Il Rivenditore Autorizzato Pride ha personalizzato il sistema di seduta Synergy in base alle esigenze specifiche dell'Utente. Non alterare le configurazioni effettuate senza previa consultazione del Rivenditore Autorizzato Pride.



ATTENZIONE! In caso di allentamenti delle giunture o del sistema di montaggio, riferire immediatamente la circostanza al Rivenditore Autorizzato Pride. Fissaggi non saldi possono provocare gravi infortuni alle persone, oltreché danni al sistema di seduta Synergy e/o alla Carrozzina elettronica.



ATTENZIONE! La portata massima del sistema di seduta Synergy è di 73 kg. Il superamento dei limiti di peso indicati può causare infortuni alle persone o danni al sistema di seduta.



NOTA: Si prega di consultare il Rivenditore Autorizzato Pride e/o lo specialista in riabilitazione in caso di mancata o incompleta comprensione delle istruzioni di cui al presente manuale.

RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DEL SEDILE

Per facilitare il trasporto o il rimessaggio, è possibile rimuovere il sedile Synergy dal gruppo motore elettrico.



ATTENZIONE! Per effettuare la rimozione e l'installazione del sedile Synergy sono necessarie almeno due persone.

Rimozione del sedile Synergy dal gruppo motore:

1. Sfilare i perni di blocco a T dai connettori del gruppo sedile. Si veda figura 2.
2. Sollevare il sedile Synergy, in due persone che sollevino contemporaneamente da davanti e da dietro, fino a liberarlo completamente dai connettori del gruppo sedile.

Installazione del sedile Synergy sul gruppo motore:

1. Sollevare il sedile Synergy e posizionarlo al di sopra del gruppo motore, in corrispondenza dei connettori; l'operazione va effettuata da due persone, che sollevino contemporaneamente da davanti e da dietro.
2. Abbassare il sedile inserendo i quattro piantoni nei corrispondenti connettori del gruppo sedile. Si veda figura 2.
3. Senza sfilare i piantoni dai connettori, trovare la posizione in cui i fori combacino, consentendo così l'inserimento dei perni di blocco a T, che assicurano il sedile all'altezza desiderata.
4. Se si desidera una posizione di seduta inclinata, regolare la parte anteriore su un foro più alto rispetto a quello scelto per l'estremità posteriore. La massima inclinazione all'indietro consentita dal sistema è pari a 20°.

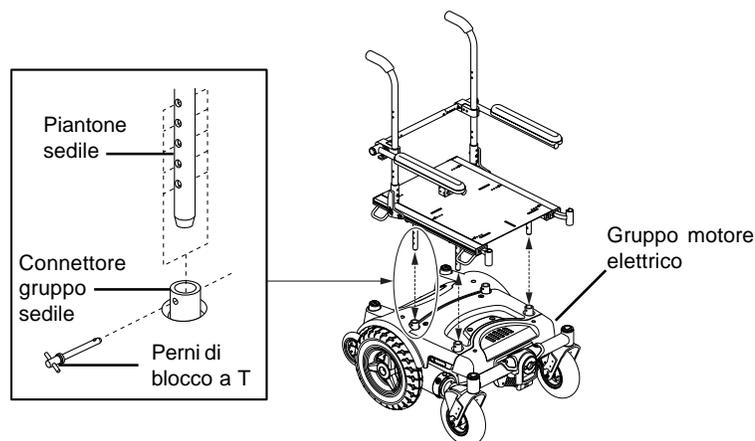


Figura 2. Installazione/Rimozione del sedile

BRACCIOLI – LE OPZIONI DISPONIBILI

È possibile installare quattro diversi tipi di braccioli sul sistema di seduta Synergy: sollevabili, removibili di tipo “Rinforzato”, removibili a regolazione rapida (in altezza), sollevabili a doppio piantone e regolabili (in altezza). Si veda figura 1.

Le pagine seguenti illustrano le caratteristiche dei vari tipi di braccioli e le regolazioni di comodità disponibili.

BRACCIOLI SOLLEVABILI

I braccioli sollevabili sono agganciati alle canne posteriori del sedile. La loro peculiarità è quella di sollevarsi, rendendo agevole gli spostamenti da e verso il sedile della Carrozzina.

I braccioli sollevabili sono regolabili sia in inclinazione che in altezza.

Regolazione dell'inclinazione

Può essere effettuata sollevando o abbassando la punta del bracciolo.

Attrezzi necessari:

- Chiave esagonale da 6 mm.
- Chiave aperta da 13 mm.

Regolazione dell'inclinazione:

1. Sollevare i braccioli, come per liberare l'accesso al sedile.
2. Allentare il dado di blocco sul supporto bracciolo regolabile con la chiave aperta da 13 mm. Si veda figura 3.
3. Regolare l'inclinazione agendo con la chiave esagonale da 6 mm. sul bullone situato sul supporto regolabile del bracciolo. Allentando, l'estremità del bracciolo si abbassa; stringendo, essa si solleva, consentendo una comoda regolazione dell'inclinazione del bracciolo.
4. Una volta ottenuta l'inclinazione desiderata, serrare il dado di blocco.
5. Abbassare i braccioli e controllare la posizione.

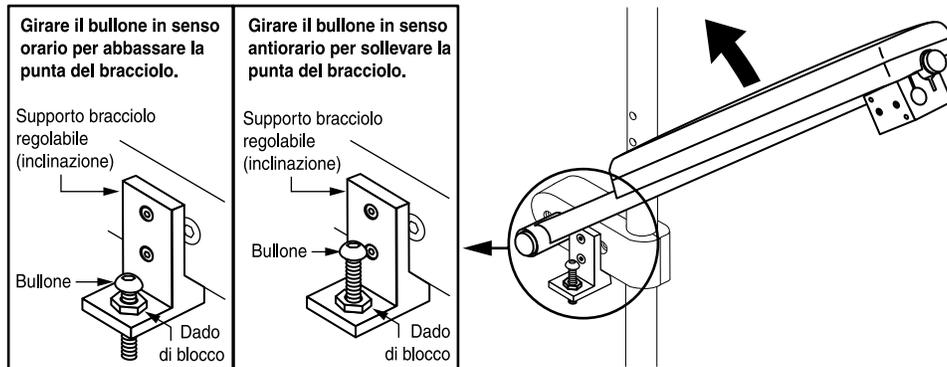


Figura 3. Regolazione inclinazione braccioli sollevabili

Regolazione dell'altezza

L'altezza dei braccioli sollevabili può essere incrementata o diminuita spostando la pinza che fissa i braccioli alle canne posteriori del sedile.

Attrezzi necessari:

- Chiave esagonale da 6 mm.
- Chiave esagonale da 4 mm.
- Chiave aperta da 13 mm.
- Chiave esagonale da 8 mm.

1. Sollevare i braccioli, come per liberare l'accesso al sedile.
2. Allentare il dado di blocco sul supporto regolabile bracciolo con una chiave aperta da 13 mm. Si veda figura 4.
3. Estrarre il bullone e il dado di blocco dal supporto regolabile del bracciolo con una chiave esagonale da 6 mm.
4. Estrarre le 2 (due) viti a testa piatta dal supporto regolabile del bracciolo con una chiave esagonale da 4 mm, dunque rimuovere tutto il supporto. Si veda figura 4.
5. Rimuovere il bullone a brugola dalla pinza braccioli con una chiave esagonale da 8 mm.
6. Abbassare o sollevare i braccioli fino a raggiungere l'altezza desiderata.
7. Reinscrivere il bullone a brugola nella pinza braccioli.
8. Reinstallare il supporto regolabile braccioli, e successivamente le 2 (due) viti a testa piatta; serrare a dovere.
9. Reinscrivere i due bulloni nel supporto regolabile del bracciolo, dunque serrare il dado di blocco con una chiave aperta da 13 mm.
10. Abbassare i braccioli e controllarne la posizione.

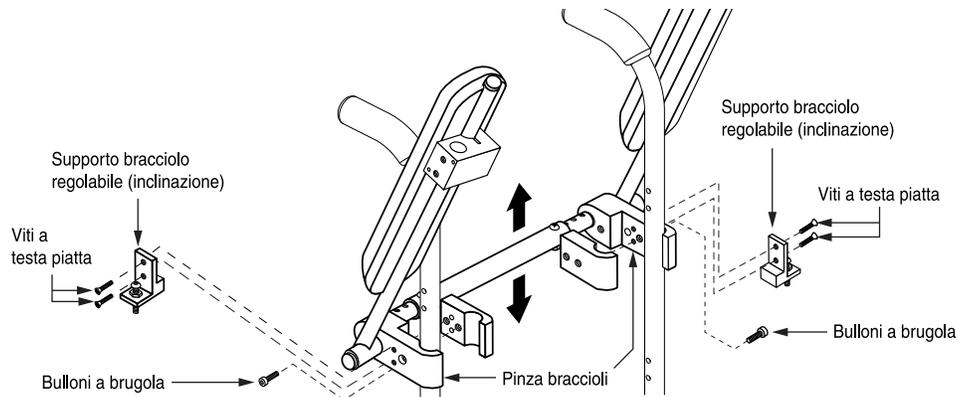


Figura 4. Regolazione altezza braccioli sollevabili

BRACCIOLI REMOVIBILI TIPO “RINFORZATO”

I braccioli removibili tipo “Rinforzato” sono fissati alla Carrozzina tramite un meccanismo di blocco, installato a propria volta sui binari laterali del sedile Synergy. Questo tipo di braccioli può essere rimosso per facilitare l’accesso al sedile. L’estensione e l’altezza generale dei braccioli possono essere regolate dall’Utente.

I braccioli removibili tipo “Rinforzato” sono disponibili in versione adulto e bambino. Le procedure di regolazione rimangono le stesse.

Rimozione/Installazione dei braccioli

Rimozione del gruppo braccioli:

1. Far ruotare la leva di blocco all’indietro. Si veda figura 5.
2. Sollevare il bracciolo.

Installazione del gruppo braccioli:

1. Introdurre il gruppo braccioli nel meccanismo di blocco. Si veda figura 6.
2. Far ruotare la leva di blocco in avanti.

Regolazione estensione braccioli

L'estensione del bracciolo dal sedile può essere regolata facendo scorrere i braccioli in avanti o all'indietro lungo il binario laterale.

Attrezzi necessari:

- Chiave esagonale da 6 mm.
- Chiave aperta da 13 mm.

Regolazione della posizione del bracciolo:

1. Rimuovere il bracciolo dal meccanismo di blocco. Si veda sopra, "Rimozione/installazione dei braccioli".
2. Con una chiave esagonale da 6mm, allentare le viti a testa piatta che assicurano il meccanismo di blocco braccioli al binario laterale del sedile. Si veda figura 6.
3. Far scorrere il meccanismo di blocco braccioli in avanti o all'indietro lungo il binario laterale alla base del sedile.
4. Serrare le viti a testa piatta.
5. Installare il bracciolo nell'apposito meccanismo di blocco. Si veda figura 5.
6. Se si desidera regolare l'altro bracciolo, ripetere le istruzioni di cui ai punti da 1 a 5.

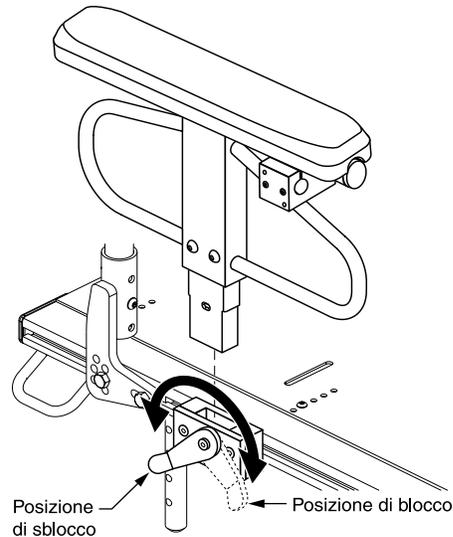


Figura 5. Rimozione del bracciolo

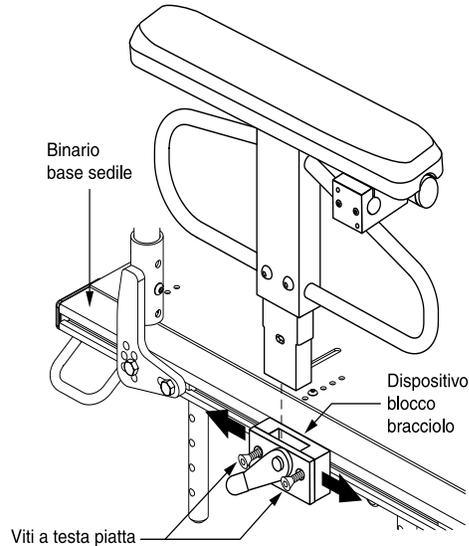


Figura 6. Regolazione posizione bracciolo

Regolazione altezza braccioli

L'altezza del bracciolo si regola facendo scorrere il bracciolo stesso sulla apposita barra di supporto con l'ausilio dell'attrezzo necessario, di seguito specificato.

Attrezzo necessario:

- Chiave esagonale da 4 mm.

Regolazione dell'altezza bracciolo:

1. Girare la leva di blocco bracciolo all'indietro e disinstallare il bracciolo dall'apposito meccanismo di blocco. Si veda figura 7.
2. Utilizzare una chiave esagonale da 4 mm. per estrarre i 2 (due) bulloni dalle impanature a lato del bracciolo.
3. Far scorrere il bracciolo sull'apposita barra di supporto fino ad ottenere l'altezza desiderata.
4. Inserire nuovamente i bulloni nelle impanature a lato del bracciolo.
5. Se si desidera regolare l'altro bracciolo, ripetere le istruzioni di cui ai punti da 1 a 5.

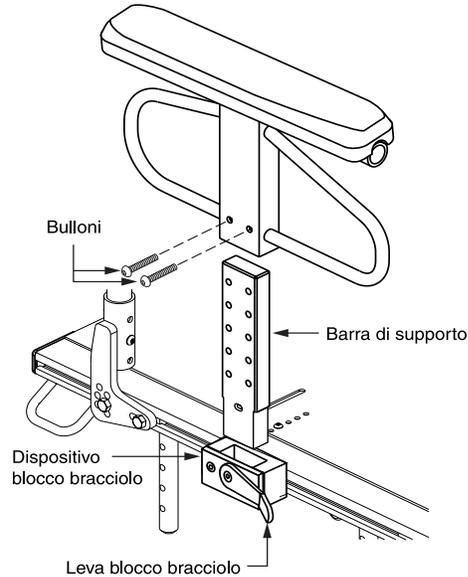


Figura 7. Regolazione altezza braccioli removibili tipo "Rinforzato"

BRACCIOLI REMOVIBILI A REGOLAZIONE RAPIDA IN ALTEZZA

Anche i braccioli a regolazione rapida sono removibili come quelli di tipo rinforzato. Inoltre, la superficie di appoggio del braccio può essere sollevata o abbassata grazie ad una leva di sblocco posizionata proprio sotto la superficie stessa. Si veda figura 8. I braccioli removibili a regolazione rapida sono disponibili nelle misure adulto e bambino.



NOTA: I braccioli removibili a regolazione rapida, sia nella versione adulto che in quella bambino, utilizzano lo stesso meccanismo di blocco di quelli di tipo rinforzato. Dunque, le procedure di rimozione e regolazione sono le stesse. Si vedano figure 5 e 6.

Regolazione altezza braccioli (versione adulto)

Il bracciolo può essere regolato in altezza con due metodi: regolazione dell'altezza della superficie di appoggio (superiore) e regolazione del supporto inferiore, tramite l'apposita barra. La corsa totale è pari a circa 15 cm (da 28 a 43 cm circa), misurata dal binario sedile superiore alla superficie superiore di appoggio sul bracciolo.

La regolazione dell'altezza della superficie di appoggio non richiede alcun attrezzo. La corsa in altezza è pari a circa 7,5 cm, con scatti progressivi di circa 13 mm, così come per il supporto inferiore.

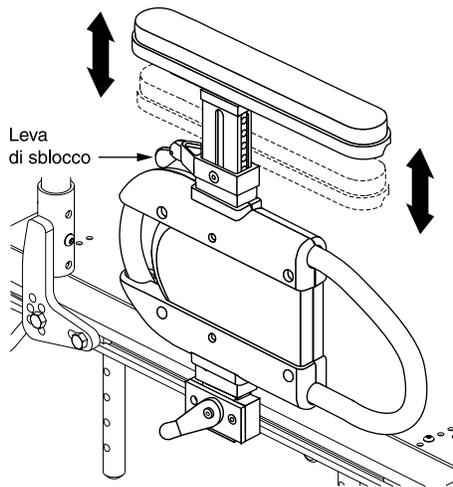


Figura 8. Regolazione parte superiore braccioli removibili a regolazione rapida

Regolazione dell'altezza (superficie di appoggio superiore):

1. Ruotare la leva di sblocco verso l'interno o verso l'esterno, a seconda della posizione originaria. Si veda figura 8.
2. Far scorrere il bracciolo verso l'alto o verso il basso, secondo comodità.
3. Ruotare nuovamente la leva nella posizione originaria; il bracciolo si blocca sulla regolazione prescelta.

Attrezzi necessari:

- Cacciavite per viti a testa Phillips
- Chiave esagonale da 3 mm.
- Chiave esagonale da 4 mm.

Regolazione in altezza del supporto inferiore bracciolo:

1. Con il cacciavite Phillips, togliere le 4 (quattro) viti Pan da 9 mm. Si veda figura 9.
2. Con la chiave esagonale da 3 mm, togliere le 2 (due) viti a testa piatta da 8 mm. Togliere anche la guaina protettiva in plastica.
3. Con la chiave esagonale da 4 mm, togliere le 2 (due) viti a testa piatta da 13 mm dalla barra di supporto inferiore.
4. Far scorrere in alto o in basso il bracciolo.
5. Allineare i fori di posizionamento sul bracciolo.
6. Reinscrivere le 2 (due) viti a testa piatta da 13 mm.
7. Reinscrivere la guaina protettiva in plastica.

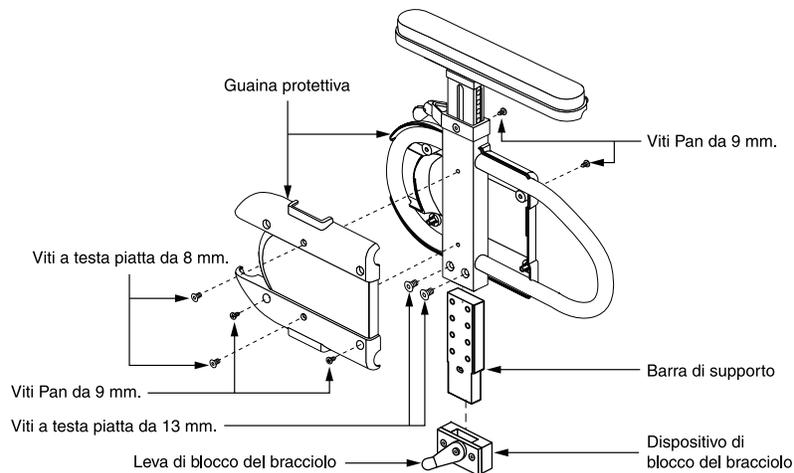


Figura 9. Regolazione altezza minima braccioli removibili a regolazione rapida

Regolazione altezza bracciolo (versione bambino)

La versione bambino dei braccioli removibili a regolazione rapida è facilmente smontabile e regolabile, proprio come la versione adulto. La corsa in altezza è di circa 7 cm, con scatti da 13 mm, misurata dal binario sedile superiore alla superficie superiore di appoggio. Le altezze variano da 20 cm a 28 cm circa.

A differenza della versione adulto, sulla versione bambino non è possibile regolare la barra di supporto inferiore.

Regolazione dell'altezza del bracciolo:

1. Ruotare la leva di sblocco verso l'interno o verso l'esterno, a seconda della posizione precedente. Si veda figura 10.
2. Far scorrere il bracciolo in alto o in basso.
3. Ruotare nuovamente la leva di sblocco nella posizione in cui si trovava prima della regolazione; il bracciolo si blocca.

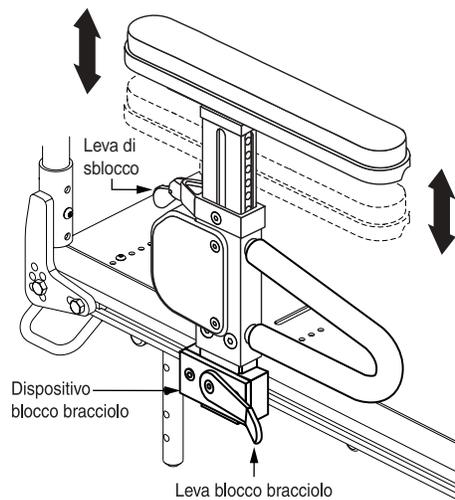


Figura 10. Regolazione altezza bracciolo removibile a regolazione rapida (versione bambino)

BRACCIOLI SOLLEVABILI A DOPPIO PIANTONE (REGOLABILI IN ALTEZZA)

La corsa totale in altezza dei braccioli sollevabili a doppio piantone è pari circa 10 cm, con scatti progressivi di circa 2,5 cm (da 25 a 35cm circa), misurata dall'estremità superiore del binario sedile alla superficie superiore di appoggio sul bracciolo. È altresì possibile sollevare o staccare i braccioli per agevolare l'accesso al sedile. Si veda figura 11.

Rimozione/Installazione dei braccioli a doppio piantone

Rimozione del gruppo bracciolo:

1. Afferrare la parte anteriore del bracciolo e tirare verso l'alto. Si veda figura 11.
2. Estrarre il perno di blocco dal retro del sedile. Si veda figura 11.
3. Afferrare la parte posteriore del bracciolo e tirare verso l'alto per rimuovere il gruppo bracciolo.

Installazione del gruppo bracciolo:

1. Incastrare la parte posteriore del bracciolo nella sede apposita e inserire il perno di blocco. Si veda figura 11.
2. Ruotare il gruppo bracciolo verso il basso.
3. Spingere la parte anteriore del gruppo bracciolo nell'apposito alloggiamento fino ad avvertire lo scatto; il gruppo bracciolo è ora sistemato nella sede.

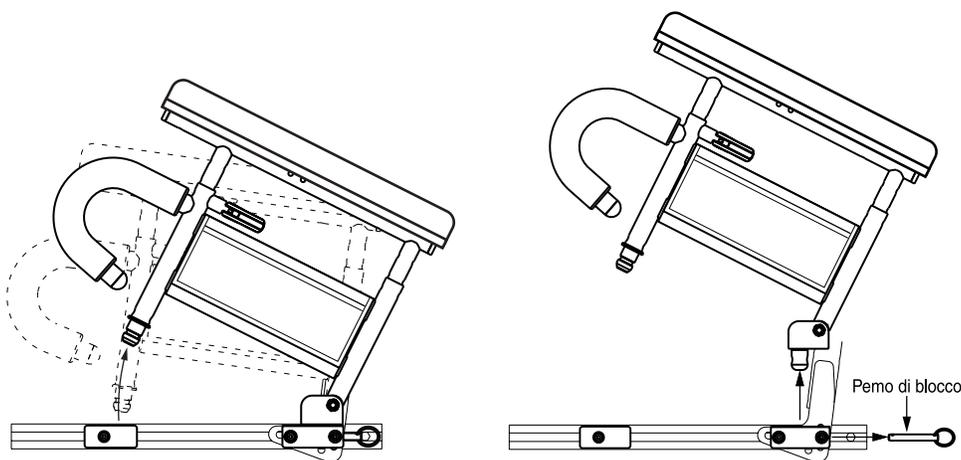
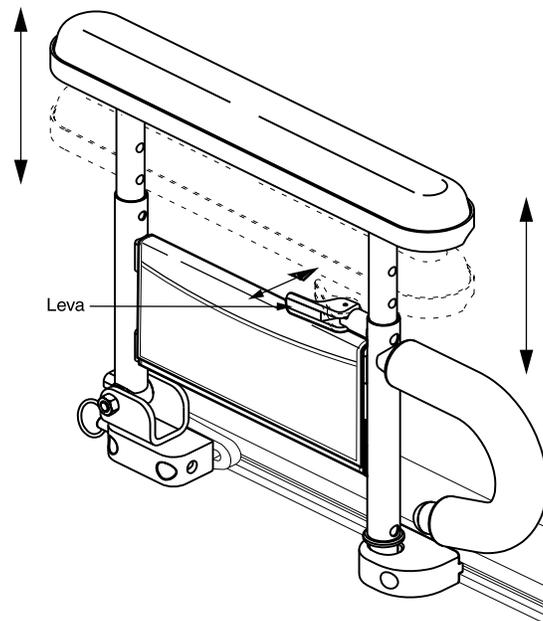


Figura 11. Smontaggio e montaggio bracciolo sollevabile a doppio piantone

Regolazione altezza bracciolo a doppio piantone

1. Tirare verso l'interno la leva caricata a molla. Si veda figura 12.
2. Estrarre il perno di blocco dal bracciolo.
3. Sollevare o abbassare il bracciolo fino a raggiungere l'altezza desiderata.
4. Ruotare la leva caricata a molla verso l'esterno e inserire nuovamente il perno di blocco per fissare il bracciolo in sede. Se necessario, muovere in alto e in basso il bracciolo per accertarsi dell'avvenuto fissaggio.

**Figura 12. Regolazione altezza bracciolo sollevabile a doppio piantone**

SCHIENALE RECLINABILE MANUALMENTE (OPZIONALE)

Se il sistema di seduta Synergy acquistato prevede l'opzione schienale reclinabile manualmente, è possibile regolare l'inclinazione dello schienale da un minimo di 90° dalla base sedile fino ad un massimo di 180°. Si veda figura 13.



ATTENZIONE! A schienale inclinato di 110° o inclinazioni superiori, entra in azione un interruttore di sicurezza che interrompe l'alimentazione del motore elettronico della Carrozzina. Riportando lo schienale ad una inclinazione minore di 110°, si ristabilisce il flusso di corrente ai motori.

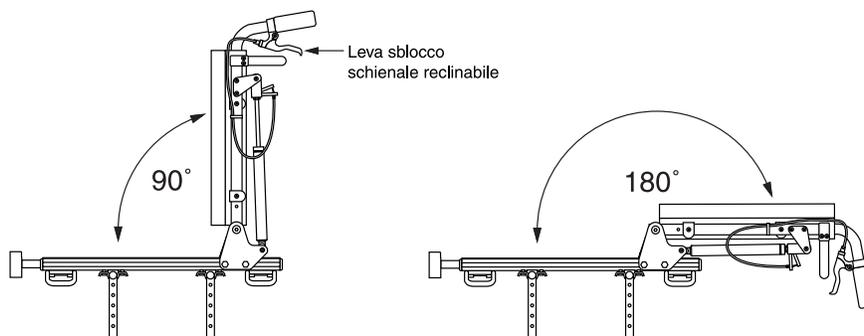


Figura 13. Schienale reclinabile (inclinazione minima e massima)

Azionamento dello schienale reclinabile manualmente:

1. Afferrare i manubri situati in cima allo schienale.
2. Tirare simultaneamente le due leve di sblocco del meccanismo di inclinazione, e sistemare lo schienale all'inclinazione desiderata. Si veda figura 14.
3. Rilasciare la pressione sulle leve di sblocco; lo schienale si blocca sull'inclinazione desiderata.

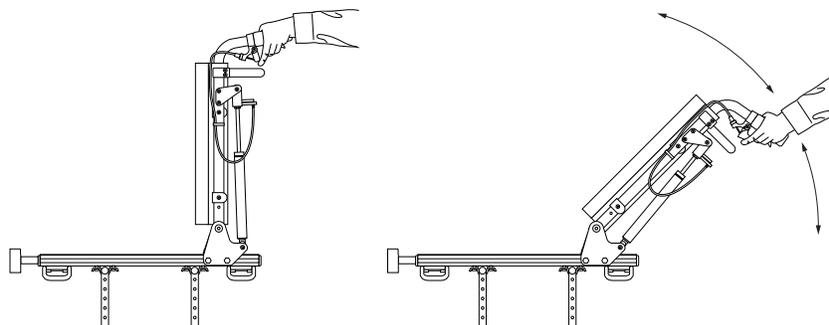


Figura 14. Regolazione dell'inclinazione

CURA E MANUTENZIONE

- Accertarsi che la minuteria sia ben serrata, ma non eccessivamente.
- Per la pulizia del sistema di seduta Synergy, passare un panno morbido inumidito con acqua e detersivi non aggressivi. Assicurarsi del completo asciugamento prima di riprendere il normale utilizzo.



ATTENZIONE! Non esporre il sistema di seduta Synergy ad umidità di qualunque genere (pioggia, neve, brina, risciacqui). L'umidità può danneggiare il sistema ed inficiarne il normale funzionamento. Nel caso in cui il sistema di seduta Synergy dovesse essere esposto ad umidità, non riprendere il normale utilizzo fino al completo asciugamento.

GARANZIA

Limitata 3 (tre) anni

Entro 3 (tre) anni dalla data di acquisto, Pride si impegna con l'acquirente originale del prodotto a provvedere alla riparazione o sostituzione, a proprio insindacabile giudizio, di qualunque pezzo compreso tra quelli elencati di seguito che sia risultato difettoso nei materiali e/o nella lavorazione:

- Componenti strutturali del telaio

L'assistenza in garanzia può essere effettuata solo da un Rivenditore Autorizzato Pride. Non procedere alla spedizione di parti ritenute difettose prima di aver ricevuto il consenso espresso del Rivenditore Autorizzato Pride. Qualsivoglia costo di trasporto e danno patito nella spedizione di parti inviate a scopo di riparazione o di sostituzione è a carico dell'acquirente originale; così come sono a carico dell'acquirente eventuali costi relativi a manodopera e diritto di chiamata, anche per interventi tecnici effettuati su parti coperte da garanzia.

Limiti della garanzia:

- Tappezzeria e sedute
- Riparazioni e/o modifiche effettuate su qualsivoglia componente senza previo consenso scritto da parte di Pride
- Qualsivoglia circostanza che sfugga al controllo di Pride
- Manodopera, diritto di chiamata, spedizione e altri costi che insorgano per la riparazione del prodotto, a meno di autorizzazione esplicita da parte di Pride.

- Eventuali danni causati da:
 - Fuoriuscite o percolamenti di liquidi dalle batterie
 - Uso improprio, non congruo, o negligenza; a totale e insindacabile giudizio di Pride
 - Utilizzo, manutenzione, o rimessaggio impropri
 - Utilizzo commerciale o uso diverso dalla normale destinazione d'uso.

Non ci sono altre garanzie esplicite.

Le garanzie implicite, ivi incluse quella di commerciabilità e idoneità ad uso specifico, sono limitate ad 1 (un) anno dalla data d'acquisto ovvero fanno riferimento alle norme di legge vigenti. Ai sensi della presente garanzia, le garanzie implicite perdono la propria validità. Pride solleva ogni responsabilità per qualsivoglia danno considerato coperto dalle garanzie implicite.

Alcune leggi locali non consentono la limitazione temporale delle garanzie implicite, né la loro invalidazione in caso di danni. La presente limitazione potrebbe non avere valore per gli utenti residenti in luoghi ove tali leggi vigono.

La presente garanzia fornisce diritti specifici all'utente; altri diritti potrebbero essere garantite dalle norme di legge locali.

Si prega di riempire e rispedire il certificato di garanzia a Pride. Tale prassi agevola Pride nella fornitura del miglior servizio tecnico e assistenza Clienti.



NOTA: in caso di smarrimento del Certificato di Garanzia o del presente manuale, si prega di notificare la circostanza a Pride, che sarà lieta di inviare tempestivamente i duplicati richiesti.

Il mio Rivenditore Autorizzato Pride:

Nome: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Prodotto Pride acquistato:

Numero di serie: _____

Data dell'acquisto: _____

QUANTUM

REHAB

MOVING AT THE SPEED OF LIFE™

www.quantumrehab.com
www.pridemobility.com

Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643
USA

Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
Unit 106, Heyford Park Camp Road
Upper Heyford, Oxfordshire OX25 5HA

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
21 Healey Road
Dandenong, 3175
Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands

INFMANU2446/REV A

Pride