


Synergy Structure™

Basic Operation Instructions

ACN# 088 609 661

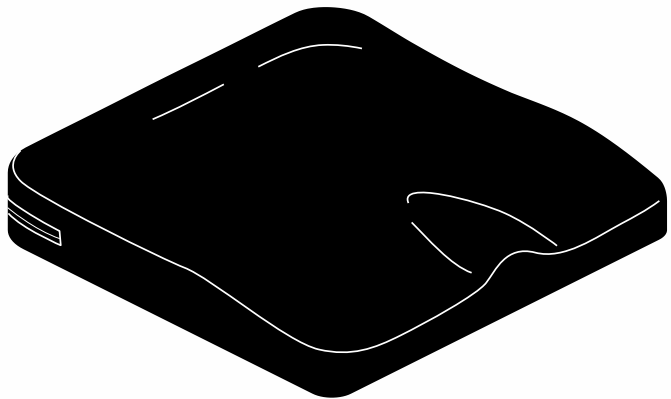

QUANTUM®
REHAB
INNOVATIVE REHAB SOLUTIONS

A Division of Pride Mobility Products® Corp.

ETICHETTE INFORMAZIONI

I simboli riportati in basso vengono utilizzati nel presente manuale e su prodotto per identificare avvertenze, attenzioni e informazioni importanti. È molto importante leggerli e comprenderli completamente.



AVVERTENZA! La mancata osservanza delle procedure previste può provocare lesioni alle persone, danni ai componenti o malfunzionamento (simbolo nero su triangolo giallo con bordo nero).



Leggere e seguire le informazioni contenute nel manuale per l'utente.

Copyright © 2006

Pride Mobility Products Corporation

INFMANU3275/RevA/March2006

INDICE

INTRODUZIONE	4
USO	6
PULIZIA	7
MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI POSIZIONAMENTO	8
CONSERVAZIONE	10
GARANZIA	10

INTRODUZIONE

BENVENUTI alla Quantum Rehab, una divisione della Pride Mobility Products Corporation (Pride). Il prodotto acquistato unisce componenti allo stato dell'arte con **sicurezza**, comfort e stile. Siamo certi che queste caratteristiche del design Vi forniranno tutte le comodità attese durante le attività quotidiane. La comprensione dell'uso e della cura **sicuri** del prodotto Vi garantiranno anni di funzionamento e servizio senza problemi.

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta **leggere e osservare** tutte le istruzioni, le avvertenze e le note contenute nel presente manuale e nel resto della documentazione acclusa. Inoltre, la Vostra **sicurezza** dipende dal buon senso dell'utente, del fornitore, dell'assistente o del professionista sanitario.

Il presente manuale deve essere usato unitamente al manuale per l'utente fornito con la carrozzina. Se il manuale contiene informazioni di difficile comprensione, oppure in caso sia necessaria assistenza per l'installazione o l'uso, si prega di contattare il proprio specialista Quantum Rehab. **La mancata osservanza delle istruzioni, avvertenze e note contenute nel presente manuale ed applicate sul prodotto Pride può comportare lesioni alle persone e/o danni al prodotto ed annullare la garanzia del prodotto Pride.**

CONTRATTO D'ACQUISTO

Accettando la fornitura di questo prodotto, Vi impegnate a non cambiare, modificare o alterare il prodotto, né a rimuovere o rendere inutilizzabili o insicuri dispositivi di protezione, schermi o altre funzioni di sicurezza del prodotto; e a non evitare, rifiutare o dimenticare di installare i kit di adattamento forniti regolarmente dalla Pride per migliorare o preservare l'uso sicuro del prodotto.

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Siamo lieti di ricevere domande, commenti e suggerimenti in merito a questo manuale. Desideriamo anche conoscere la Vostra opinione rispetto alla sicurezza e all'affidabilità del nuovo prodotto Pride e all'assistenza ricevuta dallo specialista della Quantum Rehab. Comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo in modo che sia possibile inviare informazioni importanti in merito alla sicurezza, ai nuovi prodotti e alle nuove opzioni che possono migliorare l'utilizzo della carrozzina e la relativa soddisfazione.

Per contattare Pride, scrivere al seguente indirizzo:

Pride Mobility Products Italia srl
Via Del Progresso - ang. Via Del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 - Fiano Romano
Roma

NOTA: in caso di smarrimento del presente manuale, è possibile contattarci e saremo lieti di inviarne immediatamente uno nuovo.

Il mio specialista Quantum Rehab è:

Nome: _____

Indirizzo: _____

Numero di telefono: _____

Data dell'acquisto: _____

USO

Synergy Structure è etichettato per garantire un corretto posizionamento sulla carrozzina.



AVVERTENZA! La modifica della posizione impostata dall'assistente sanitario può causare incastramento, abrasioni cutanee o ulcere/piaghe da decubito. Mantenere il cuscino nella posizione prescritta per garantire un uso sicuro e confortevole.

NOTA: Synergy Structure è dotato di inserti per il posizionamento laterale grandi e piccoli e di cuscinetti per le gambe soffici e solidi. Questi elementi devono essere disposti da un professionista medico prima dell'uso del cuscino. Se in qualunque momento durante l'uso è necessario regolare gli elementi di posizionamento, avvertire il fornitore sanitario.

Per posizionare Synergy Structure sulla carrozzina:

1. Localizzare l'etichetta "Fondo anteriore" sotto il cuscino.
2. Posizionare il cuscino sul sedile in modo che l'etichetta "Fondo anteriore" sia sul lato anteriore del sedile, con il lato dell'etichetta rivolto verso il basso. La cerniera sul cuscino è rivolta verso la parte posteriore del sedile. Vedere figura 1.

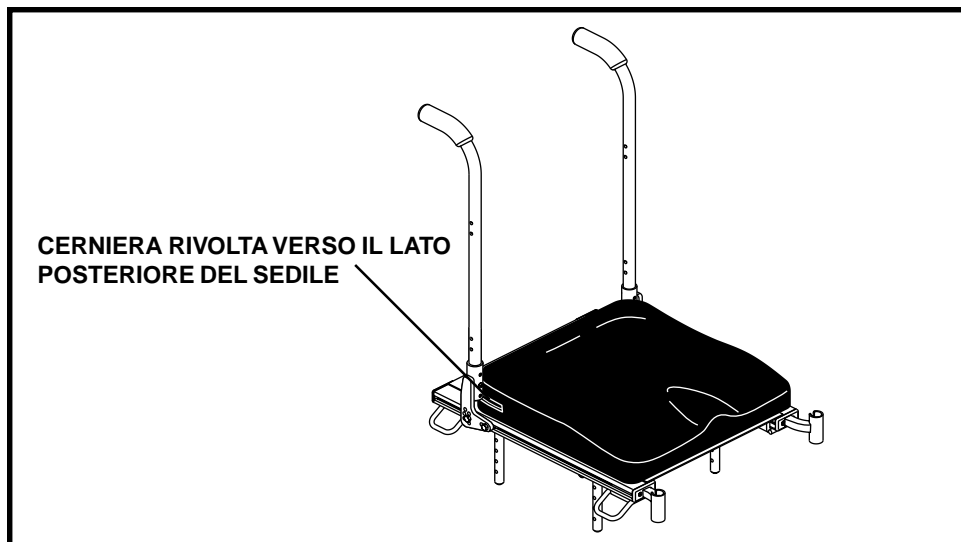


Figura 1. Collocazione del cuscino

PULIZIA

Synergy Structure si pulisce facilmente.

Per pulire Synergy Structure:

1. Localizzare la cerniera sul lato posteriore della fodera traspirante. Vedere figura 2.
2. Aprire la fodera traspirante ed estrarre il cuscino interno, che è avvolto in una fodera per incontinenza.
3. Lavare la fodera traspirante in lavatrice a FREDDO.



AVVERTENZA! Per prevenire danni alla copertura del sedile, non usare candeggina quando si lava la fodera traspirante.

4. Spruzzare la fodera per incontinenza con un disinfettante, quindi pulirla.



AVVERTENZA! Per non danneggiare il cuscino interno, non immergerlo in acqua.

5. Asciugare la fodera traspirante e la fodera per incontinenza all'aria.



AVVERTENZA! Per prevenire il restringimento della fodera traspirante, non asciugarla con un'asciugatrice.

6. Una volta che le due fodere sono asciutte, inserire il cuscino interno nella fodera traspirante. Chiudere la cerniera della fodera traspirante e riporre Synergy Structure sul sedile della carrozzina.



Figura 2. Synergy Structure

MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEGLI INSERTI DI POSIZIONAMENTO

NOTA: Pride raccomanda che gli inserti di posizionamento di Synergy Structure siano montati e regolati solamente dal Vostro assistente sanitario. Questi inserti devono essere disposti da un professionista medico prima dell'uso del cuscino. Non cercare di regolare gli inserti di posizionamento mentre si è seduti sul cuscino.

Synergy Structure è fornito smontato e con inserti di posizionamento aggiuntivi laterali grandi e piccoli e cuscinetti per le gambe morbidi e solidi che si “attaccano” alla base con un sistema a velcro. Possono essere utilizzati in qualunque combinazione per massimizzare la comodità dell'utente e sono regolabili secondo quanto necessario.

Per montare Synergy Structure:

1. Posizionare gli inserti e gli elementi aggiuntivi di posizionamento secondo quanto necessario per il massimo vantaggio terapeutico. Vedere figura 3.
2. Unire il foam a bassa memoria con tessuto bioelastico sulla parte anteriore della base, quindi su quella posteriore. Vedere figura 3.
3. Fissare i lati del foam a bassa memoria superiore con le linguette nel tessuto bioelastico. Vedere figura 3.
4. Posizionare l'intero cuscino nella fodera per incontinenza e chiudere la cerniera.
5. Posizionare il cuscino nella fodera traspirante e chiudere la cerniera.

Per regolare gli elementi di posizionamento:

1. Rimuovere la fodera traspirante e la fodera per incontinenza.
2. Rimuovere il foam a bassa memoria superiore dalla base.
3. Regolare gli elementi di posizionamento secondo quanto necessario.
4. Rimontare il cuscino come descritto sopra.



AVVERTENZA! Se il tessuto bioelastico che contiene il foam a bassa memoria superiore deve essere lavato, estrarre il foam a bassa memoria e lavare in lavatrice il tessuto solo in acqua fredda. Lasciarlo asciugare all'aria prima di rimontare il cuscino. Non lavare il foam.

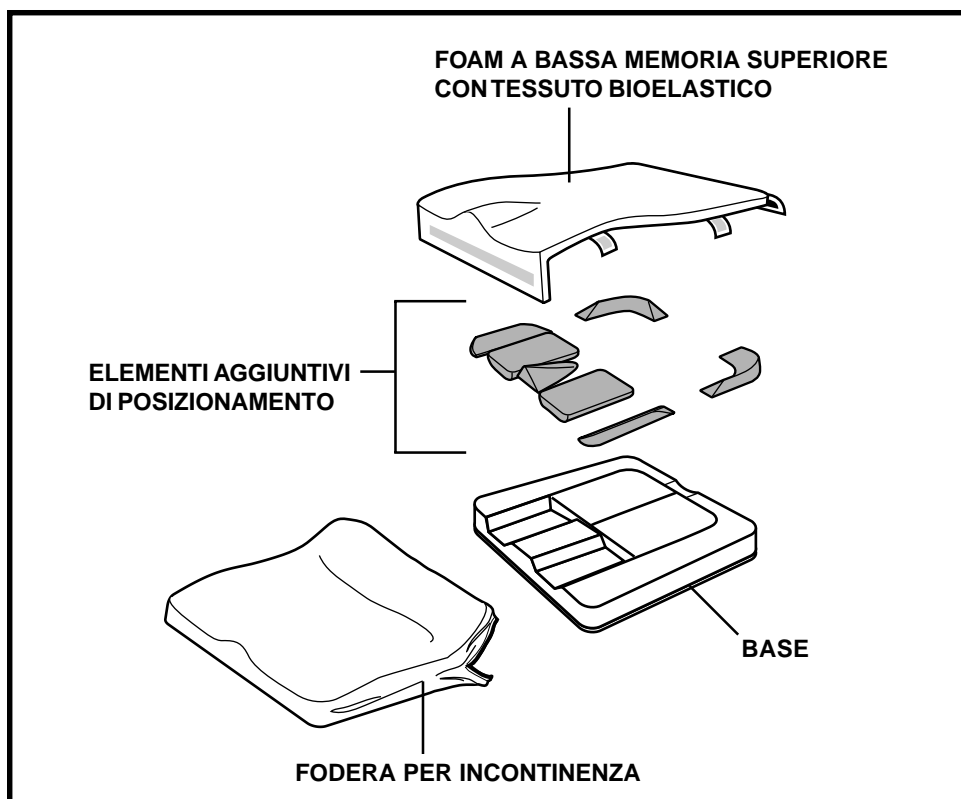


Figura 3. Il cuscino Structure, smontato (fodera traspirante non illustrata)

MAGAZZINAGGIO

Synergy Structure non va conservato a temperature estremamente calde o fredde.

GARANZIA

Il cuscino Synergy Structure è studiato e prodotto secondo i massimi standard. Il cuscino Synergy è garantito privo di difetti materiali e di produzione per un periodo di 24 mesi. In caso di difetti materiali e di lavorazione, Pride Mobility Products Italia riparerà o sostituirà, a nostra discrezione, il cuscino Synergy. Questa garanzia non è applicabile a cuscini maltrattati o male utilizzati dall'utente e ritenuti tali da Pride Mobility Products Italia.

I reclami e le riparazioni devono essere presentati attraverso lo specialista locale Quantum Rehab.

NOTE

QUANTUM[®]

REHAB

INNOVATIVE REHAB SOLUTIONS

A Division of Pride Mobility Products[®] Corp.

www.quantumrehab.com
www.pridemobility.com

Pride Mobility Products Corporation

182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643
USA

Pride Mobility Products Company

380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.

Unit 106, Heyford Park Camp Road
Upper Heyford, Oxfordshire OX25 5HA

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.

21 Healey Road
Dandenong, 3175
Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia s.r.l.

Via del Progresso-ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.

Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
Paesi Bassi

* I NFMANU3275 *

Pride