

LCD Controlepaneel



Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Het bedrijsgereed maken van dit product en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde Pride-leverancier of een bevoegde monteur te geschieden.

Lees eerst deze handleiding aandachtig door en volg alle instructies op, voordat u van plan bent uw product voor het eerst te gaan gebruiken. De volgende symbolen zullen in deze handleiding worden gebruikt om waarschuwing en gevaar aan te geven.



WAARSCHUWING! Geeft een toestand of situatie aan die mogelijk gevaarlijk kan zijn. Indien de aangegeven procedures niet opgevolgd worden, kunnen hierdoor persoonlijke verwondingen, beschadiging van onderdelen, of storingen veroorzaakt worden. Op het product wordt deze afbeelding weergegeven als een zwart symbool op een gele driehoek met een zwart kader.



VERPLICHT! Deze handelingen dienen uitgevoerd te worden zoals is voorgeschreven. Indien verplichte handelingen niet uitgevoerd worden, kunnen hierdoor persoonlijke verwondingen en/of beschadiging van de apparatuur veroorzaakt worden. Op het product wordt deze afbeelding weergegeven als een wit symbool op een blauwe stip met een wit kader.



VERBODEN! Deze handelingen zijn verboden. Deze handelingen dienen op geen enkel ogenblik, of onder welke omstandigheden dan ook, uitgevoerd te worden. Indien een verboden handeling uitgevoerd wordt, kunnen hierdoor persoonlijke verwondingen, en/of beschadiging van de apparatuur veroorzaakt worden. Op het product wordt deze afbeelding weergegeven als een zwart symbool met een rode cirkel en een rode schuine streep.

OPMERKING: Deze eigenaarhandleiding is samengesteld uit de laatste specificaties en product informatie op de tijd van publicatie. We reserveren het recht om veranderingen aan te brengen als die nodig worden. Enige veranderingen aan onze producten kunnen geringe verschillen tussen de illustraties en de verklaringen in deze handleiding tot stand brengen en het product welk u gekocht heeft. De meest recente/huidige versie van deze handleiding is via onze website verkrijgbaar.

NB: Dit product is conform de richtlijnen en vereisten van WEEE, RoHS en REACH.

NB: Dit product voldoet aan IPX4 classificatie (IEC 60529).

NB: Dit product en de bijbehorende onderdelen zijn niet vervaardigd met natuurlijke rubberlatex. Raadpleeg de fabrikant met betrekking tot eventuele onderdelen en/of accessoires.



Pictogrammen overzicht.....	4
Inleiding	5
EMI/RFI	6
LCD Controlepaneel	7
Instelwaarden van uw LCD scherm en controlepaneel.....	9
Diagnostische fout codes	12
Verzorging en onderhoud	13
Garantie	13

Product veiligheid symbolen

De symbolen hieronder zijn gebruikt op de product om waarschuwingen, verplichte handelingen, and verboden handelingen aan te geven. Het is ten eerste belangrijk dat u deze leest en volkomen begrijpt.

OPMERKING: *Er zijn meer waarschuwingen geïdentificeerd en uitgelegd in de Gids voor consumentenveiligheid die bij uw scooter is geleverd. Raak vertrouwd met alle waarschuwingen en veiligheidsinformatie in de Gids voor consumentenveiligheid.*



Lees en volg de informatie in de gebruikers handleiding.



Voorkomt blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of staand water wanneer mogelijk. Onderhoudt en sla op in een schone en droge conditie.



EMI-RFI - Dit product is getest en voldoet aan de immuniteitseis van 20 V/m.



Afval en recyclage: Neem contact op met uw bevoegde Pride Leverancier voor informatie over de correcte manier van het van de hand doen en recyclage van uw Pride product en verpakking.

WELKOM bij Pride Mobility Products (Pride). Het product dat u gekocht hebt combineert state of the art onderdelen met **veiligheid**, comfort en styling. Wij zijn er zeker van dat de ontwerp kenmerken u van de gemakken zullen voorzien die u verwacht in het dagelijkse leven. Begrijpen hoe u dit product **veilig** moet bedienen en verzorgen zullen u jaren probleemloos dienst en service geven.

Lees en **volg** alle voorschriften, waarschuwingen en aantekeningen in uw handleiding vooraleer u probeert uw product voor de eerste maal te besturen. U moet ook alle voorschriften, waarschuwingen en aantekeningen lezen in alle supplementaire handleidingen bij uw scooter, vooraleer u de scooter voor de eerste maal bestuurt. Daarnaast berust uw **veiligheid** op u, en op uw leverancier, hulpverlener of medische begeleider, en op uw gezond verstand.

Deze handleiding moet gebruikt worden tesamen met de handleiding die bij uw scooter zat. Als er enige informatie is in deze handleiding die u niet begrijpt, of als u verdere hulp nodig heeft in de assemblage of bediening, neem alstublieft contact op met uw bevoegde Pride Leverancier. **Nalatigheid om de voorschriften, waarschuwingen, en aantekeningen in deze handleiding te volgen en deze op uw Pride product kunnen persoonlijk letsel of schade aan het product als gevolg hebben en de Pride product garantie laten vervallen.**

Leverancier overeenkomst

Door ontvangst van dit product belooft u dat u dit product niet zult veranderen, wijzigen, of modificeren, of enige beschermingen, beveiligingen of andere veiligheidskarakteristieken van dit product zult verwijderen of onbruikbaar zult maken; U belooft tevens dat u niet zult nalaten, weigeren of verzuimen om enige vernieuwing kits van tijd tot tijd te installeren die door Pride worden voorzien om het veilige gebruik van dit product te verbeteren of te behouden.

LET OP: Als u ooit uw kopie van deze handleiding, neem aub contact op met ons, en we sturen u graag meteen een nieuwe op.

Electromagnetische en radio frequentie invloed (EMI/RFI)



WAARSCHUWING! Laboratorium testen hebben uitgewezen dat elektromagnetische en radio frequentie golven een negatief effect hebben op de prestaties van elektrisch aangedreven voertuigen.

Elektromagnetische en radio frequentie invloed kan worden veroorzaakt door bronnen als mobiele telefoons, mobiele twee-weg radio's (zoals walkietalkies), radio stations, TV stations, amateur radio (HAM) zenders, draadloze computers, magnetron, semafoon en middellange afstand mobiele ontvangers die worden gebruikt door hulpverleningsvoertuigen. In sommige gevallen kunnen dergelijke golven onbedoelde bewegingen veroorzaken of schade toebrengen aan het controle systeem. Ieder elektrisch aangedreven voertuig beschikt over een bepaalde immuniteit (of weerstand) tegen EMI. Hoe hoger het niveau van immuniteit, des te groter de bescherming tegen EMI. Dit product is getest en voldoet aan een immuniteitsniveau 20 van V/M.



WAARSCHUWING! Houd er rekening mee dat mobiele telefoons, twee-weg radio's, laptops, elektrische generatoren of krachtige stroombronnen en andere soorten radiozenders onbedoelde bewegingen van uw elektrisch aangedreven voertuig kunnen veroorzaken als gevolg van EMI. Schakel geen persoonlijke communicatietoestellen AAN die in de hand worden gehouden, zoals 27 MC-(CB) radio's of mobiele telefoons, terwijl de scootmobiel is ingeschakeld. Wees voorzichtig als u een van deze toestellen gebruikt terwijl u in uw elektrische voertuig rijdt en zorg ervoor dat u niet te dicht in de buurt van radio- en tv-zenders komt.



WAARSCHUWING! Het toevoegen van accessoires of onderdelen aan uw elektrisch aangedreven voertuig kan de gevoeligheid van het voertuig ten opzichte van EMI verhogen. Verander uw Scootmobiel alleen met goedkeuring van Pride.

WAARSCHUWING! Het elektrisch aangedreven voertuig zelf kan ook storingen veroorzaken aan andere elektrische apparatuur in de buurt, zoals alarm systemen.


LET OP: Voor meer informatie over EMI/RFI, bezoekt u de website van Resource Center op www.pridemobility.com. Indien onbedoelde bewegingen of remmen optreden, schakelt u de Scootmobiel zo snel mogelijk uit als veiligerwijze mogelijk is. Neem contact op met een erkende leverancier om het incident te melden.

LCD Controlepaneel

Het LCD controlepaneel bevat alle controles en aanwijzers die u nodig heeft om uw scooter te besturen, zoals daar zijn de snelheidsaanpasser, informatie omtrent uw tocht, lichttoetsen, hoorntoetsen, toestand van de batterij en de algemene toestand van uw scooter.



VERBODEN! Stel uw bedieningspaneel niet bloot aan vocht. Indien het toch wordt blootgesteld aan vocht, probeer dan uw scootmobiel niet te gebruiken voordat het paneel volledig is opgedroogd.

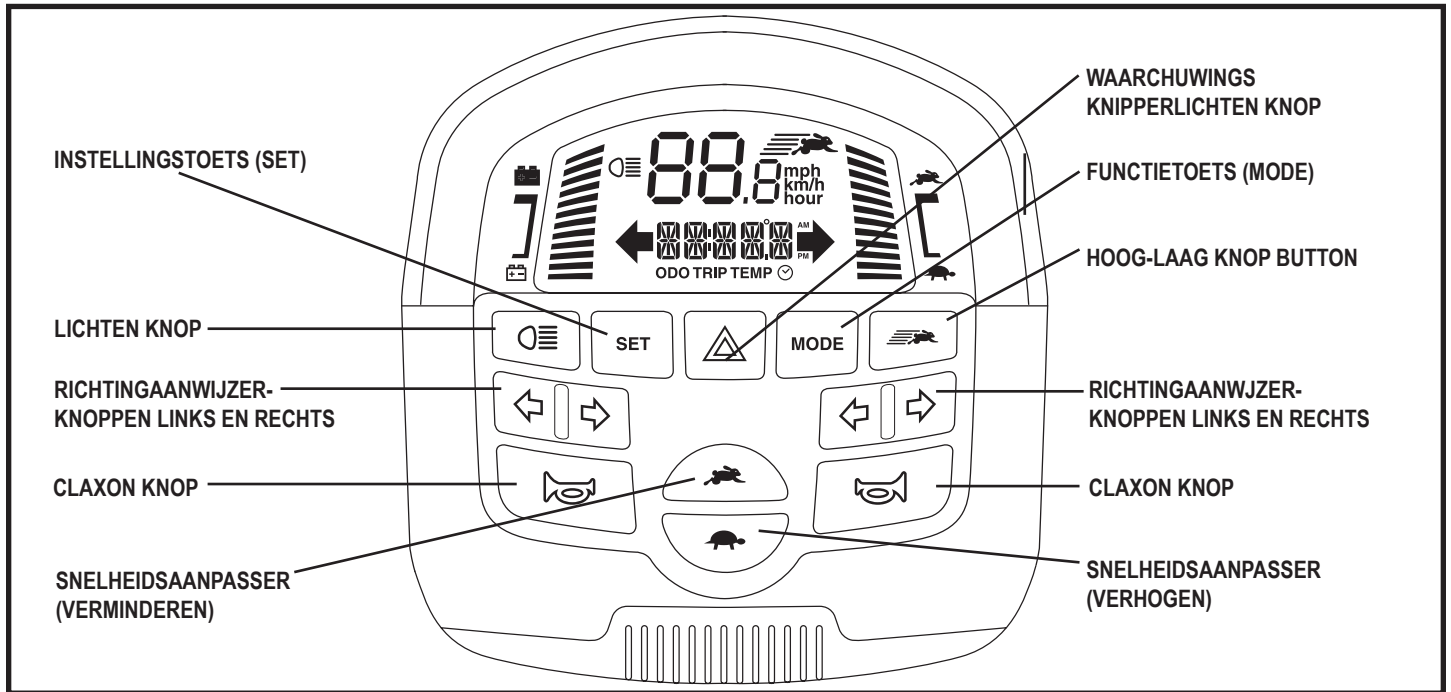

Figuur 1. LCD Controlepaneel

Lichten Knop

- Druk eenmaal op de lichttoets om de lichten te activeren. Het lichtsymbool zal oplichten op uw LCD scherm
- Druk nogmaals op de lichttoets om de lichten opnieuw uit te schakelen.



WAARSCHUWING! Scooterberijders zijn verplicht licht te voeren wanneer het zicht beperkt is—dag en nacht.

Richtingaanwijzerknoppen

- Druk eenmaal op de gewenste richtingsaanwijzer om die te activeren. Het licht voor de richtingsaanwijzer zal oplichten op uw LCD scherm.
- Druk op dezelfde toets om uit te schakelen.

NOTA: De richtingsaanwijzers zijn geprogrammeerd om na 15 seconden vanzelf uit te gaan. U zal een waarschuwingsbiep horen zolang de aanwijzer aanstaat. Zie figuur 8 voor volumecontrole.

Gevaarslicht toets

Deze toets activeert de vier knipperlichten op uw scooter.

- Druk eenmaal op de toets om de knipperlichten te activeren.
- Druk nog eenmaal op de toets om de knipperlichten uit te schakelen.

NOTA: *Terwijl de 4 knipperlichten aanstaan zal u een waarschuwingsbiep horen, die pas uitgaat als de knipperlichten uitgaan. Zie figuur 8 voor volumecontrole.*

Claxon

Deze toets activeert de claxon. Uw scooter moet aanstaan indien u wil dat de claxon functioneert. Pas dan kan de claxon functioneren. Aarzel niet uw claxon te gebruiken in gevaarlijke situaties.

De Hoog-Laag Toets

Deze toets regelt de snelheid van uw scooter tussen hoog en laag.

- Druk eenmaal op de **Hoog-Laag** toets om de snelheid naar boven aan te passen. Het Hoog-Laag licht zal op uw LCD scherm verschijnen. **Zie figuur 2.** Door deze instelwaarde te gebruiken tesamen met de toetsen om uw snelheid aan te passen, zal het voor uw scooter mogelijk maken om die maximum snelheden te halen die voor uw scooter zijn voorgeprogrammeerd.
- Druk nog eenmaal op de **Hoog-Laag** toets om de snelheid naar omlaag aan te passen. Het Hoog-Laag licht zal niet op uw LCD scherm oplichten. Door deze instelwaarde te gebruiken tesamen met de toetsen om uw snelheid aan te passen, zal het voor uw scooter mogelijk zijn om half zo snel te gaan als voor uw scooter als maximum is voorgeprogrammeerd.

Snelheidstoetsen

Deze instellingstoetsen maken het u mogelijk om de snelheid van de scooter te voorselecteren en te limiteren, zoals dat aangegeven wordt door de maximum snelheidsaanwijzer op uw LCD scherm. **Zie figuur 2.**

- Druk op de **schildpad** om uw snelheid te verlagen.
- Druk op het **konijn** om uw snelheid te verhogen.


NOTA: *Hoe meer balken er verschijnen op de maximum snelheidsaanwijzer, hoe hoger de voorgeselecteerde maximum snelheid is. Zie figuur 2.*

Functietoets

Gebruik deze toets om te schakelen van snelheidsmeter naar tochtmeter, temperatuur en horloge.

Instelwaarden van uw LCD scherm en controlepaneel

Het LCD controlepaneel biedt gemakkelijk informatie aan via het LCD scherm. **Zie figuur 2.** Het LCD scherm wordt ook gebruikt tijdens de inschakeling (activatie) van de verscheidene instelwaarden van het controlepaneel.

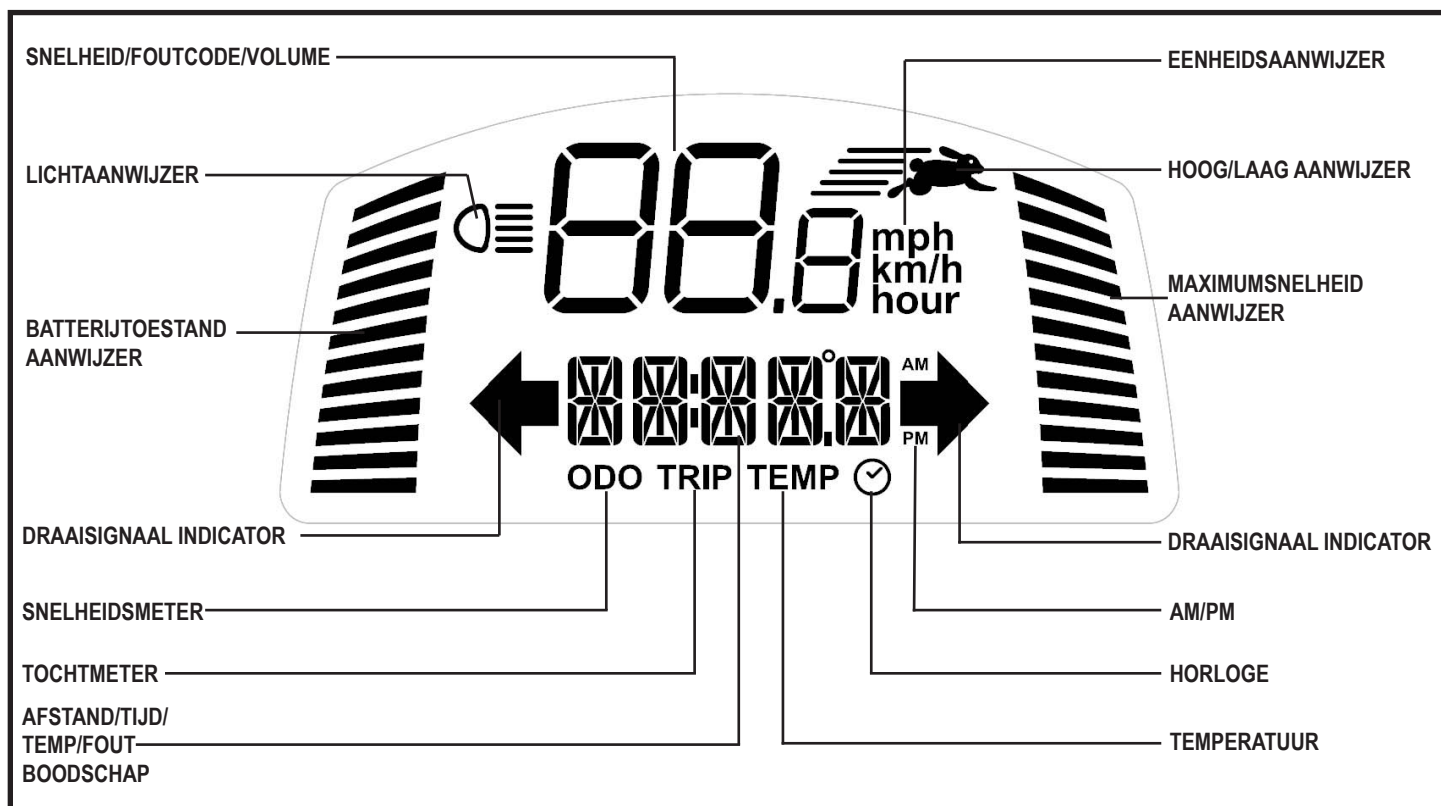

Figuur 2. LCD scherm

Kilometerteller (ODO)


De kilometerteller duidt de totale afstand aan die afgelegd werd tijdens de levensduur van de scooter en kan teruggezet worden. **Zie figuur 3.**

Kies tussen:

- Mph = mijl per uur
- Km/h= kilometer per uur
- Uren = aantal uren in gebruik

Om de kilometerteller in te stellen:

1. Druk op de functietoets tot wanneer **ODO** verschijnt op het scherm.
2. Druk en houd de **SET** toets, en druk tegelijkertijd op de **MODE** toets totdat de keuzes oplicht.
3. Ga door de opties door de **SET** toets in te drukken.
4. Wanneer de gewenste keuze oplicht, druk op gelijk welke toets behalve de **SET** toets om te verlaten.

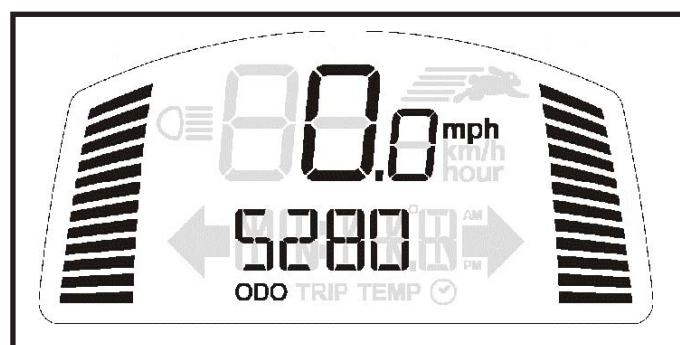

Figuur 3. Odometer functie

Tochtmeter Functie (TRIP)

De tochtmeter vertelt u de afstand van de laatste trip, en deze meter kan ten allen tijde terug op nul gezet worden. **Zie figuur 4.**

Om de tochtmeter terug te zetten:

1. Druk op de **MODE** toets tot **TRIP** op uw LCD scherm verschijnt.
2. Druk en houd de **SET** toets ingedrukt, en druk tegelijkertijd op de **MODE** toets voor 2 seconden en laat los.
3. Druk op de **SET** toets tot de tochtmeter zich op 0.0 terugzet.
4. Druk op gelijk welke toets behalve **SET** om te verlaten.

Temperatuur Functie (TEMP)

Deze functie toont de temperatuur in Fahrenheit of Celsius. **Zie figuur 5.**

Om de temperatuur in te stellen:

1. Druk op de **MODE** toets tot **TEMP** verschijnt op het LCD scherm.
2. Druk en houd de **SET** toets ingedrukt, en druk tegelijkertijd op de **MODE** toets tot de keuze van instelwaarden oplicht.
3. Kijk naar de keuzes (F of C) door de **SET** toets in te drukken.
4. Wanneer uw keuze oplicht, druk op gelijk welke toets behalve **SET** om te verlaten.

Horloge functie (☺)

Het uurwerk kan zowel in de 12 uur of 24 uur opsplitsing ingesteld worden. **Zie figuur 6.**


Om de horlogefunctie in te stellen:

1. Druk op de **MODE** toets totdat het uurwerk-symbool op uw LCD scherm verschijnt.
2. Druk en houd de **SET** toets ingedrukt, en druk tegelijkertijd op de **MODE** toets totdat de nummers van het uur verschijnen.
3. Gebruik de **SET** toets om het correcte uur in te toetsen.
4. Blijf de **MODE** en **SET** toets gebruiken om de minuten en voor- en namiddag in te stellen.
5. Druk op gelijk welke toets behalve **MODE** en **SET** om te verlaten.


NOTA: Indien voor of namiddag niet gekozen wordt, zal het uurwerk automatisch het 24-uur systeem gebruiken.




Figuur 4. Tochtmeter functie

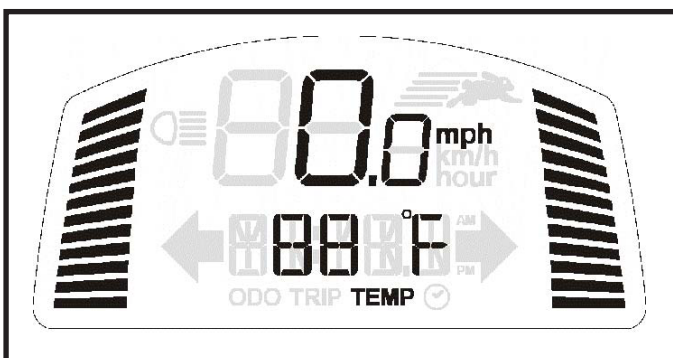

Figuur 5. Temperatuur functie

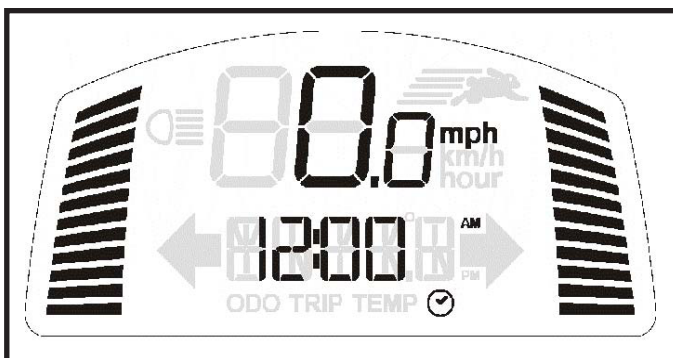

Figuur 6. Uurwerkfunctie

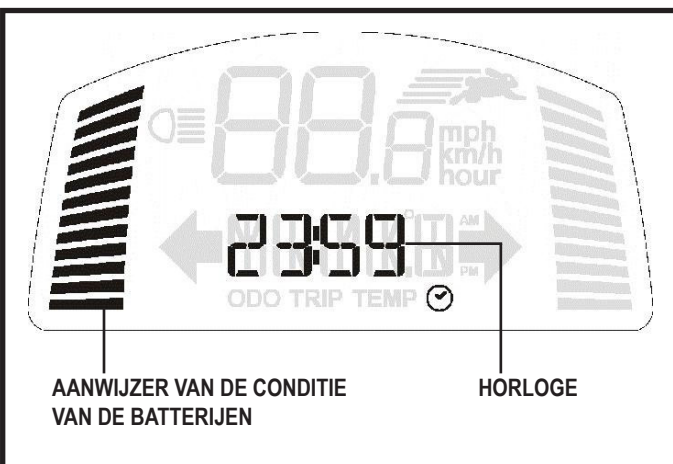

Figuur 7. Opladen van de batterijen

Het opladen van de batterijen

Terwijl de batterijen aan het opladen zijn, zal het uurwerk en de aanwijzer van de conditie van de batterijen op het console opgelicht worden. **Zie figuur 7.**

Aanwijzer van de conditie van de batterijen

Wanneer de scooter 'AAN' staat, zal het LED scherm een sterkte van de batterij bij benadering weergeven. **Zie figuur 7.**

Wanneer de batterijen van de scooter stilaan leeglopen, zal u eenmaal een waarschuwingsbiep horen, en dat duidt aan dat de batterijen moeten opgeladen worden. Deze waarschuwingsbiep zal niet opnieuw weerklinken totdat de scooter opnieuw is opgestart of de gashendel is ingedrukt.

De LED die de maximum snelheid aanduidt

De LED die de maximum snelheid aanduidt, duidt die maximum snelheid aan die gekozen werd met de snelheidsaanpasser toets. Hoe meer balken opgelicht zijn, hoe hoger die snelheid. De maximum snelheid van de scooter wordt bepaald door de HOOG-LAAG instelwaarde, die de snelheid van de scooter tot de helft reduceert indien die waarde op LAAG staat. De eigenlijke snelheid zal op de snelheidswijzer van het LCD scherm aangeduid worden. **Zie figuur 2.**


Volume Controle

Het volume van de gevaarslichten, de hoorn, de lage batterij, richtingsaanwijzers en de bieps van de foutboodschappen kunnen afzonderlijk verhoogd, verlaagd of zelfs afgezet worden. **Zie figuur 8.**

Om het volume in te stellen:

1. De scooter staat op 'AF'.
2. Druk tegelijkertijd op de twee toetsen die u nodig heeft (zoals in de tabel aangeduid), en zet uw scooter 'AAN'.
3. Eenmaal het scherm van de volumecontrole verschijnt, laat dan de toetsen los.
4. Druk op het konijn om het volume te verhogen en op de schildpad om het volume te verlagen (0 is af en 4 is het hoogste volume).
5. Druk op gelijk welke toets om te verlaten, behalve de schildpad of het konijn.

NOTA: De taal voor de foutboodschap wordt op dezelfde manier ingesteld als het volume.

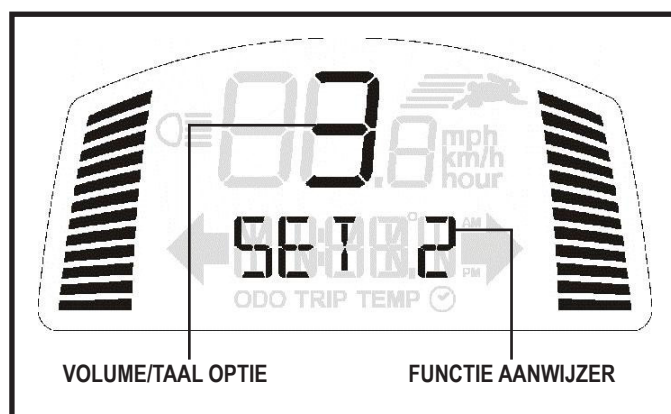


Figuur 8. Volume controle scherm

FUNCTIE	TOETSEN	FUNCTIEANWUZER
Gevaarslichten	SET + GEVAARSLICHTEN	SET 1
Hoorn	SET + HOORN	SET 2
Lage batterij	SET + LINKER RICHTINGSAANWIJZER	SET 3
Richtingaanwijzer	SET + RECHTER RICHTINGSAANWIJZE	SET 4
Foutboodschap Taal Keuze	SET + LICHTEN	SET 5 6 - Spaans 5 - Italiaans 4 - Frans 3 - Duits 2 - Nederlands 1 - Engels 0 - Sluit

Diagnostische fout codes

De diagnostische fout codes voor uw scootmobiel zijn bestemd om u te helpen om makkelijk en vlug de basis problemen op te lossen. Een fout code en foutboodschap zullen verschijnen (zie **figuur 9**), in het geval een van de omstandigheden voorvalt, zoals beschreven.

LET OP: Uw scooter zal niet werken tenzij de fout code is opgelost en de scooter af- en weer aangezet is.

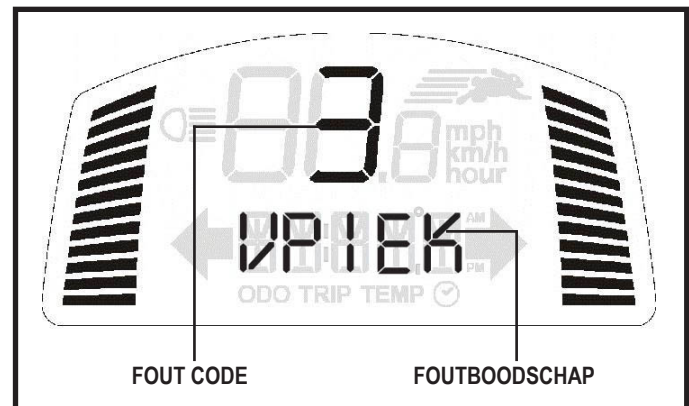

Figuur 9. Fout code scherm

FOUT CODE	CONDITIE	OPLOSSING	FOUTMELDING
1	Batterijen moeten opgeladen worden	Laad de accu's zo vlug mogelijk op.	N/A
2	De accu-voltage is te laag	Laad de accu's zo vlug mogelijk op.	LEEG
3	De accu-voltage is te hoog	Ontkoppel de lader en draai de sleutel uit en dan weer aan.	VPIEK
4	Teveel stroom	Draai de scootmobiel uit voor een paar minuten Draai de scootmobiel dan weer aan.	A[OEL
5	Fout met de remmen bij het parkeren	Neem de sleutel uit het slot, zet de manuele vrijwielhendel in de rijpositie (achterwaarts) en start de scooter opnieuw.	REM
6	Gaspedaal control hendel niet in de midden positie gedurende het opstarten	Breng de gaspedaal control hendel naar de midden positie, draai de scootmobiel af, en dan aan.	GASHE
7	De gashendel is kapot of gebroken	Bel uw Pride-Leverancier voorassistentie/hulp.	GASHE
8	Motor voltage fout	Bel uw Pride-Leverancier voorassistentie/hulp.	MOTOR
9	Andere interne fout	Bel uw Pride-Leverancier voorassistentie/hulp.	OVRIG

Verzorging en onderhoud

Raadpleeg de handleiding van uw scootmobiel voor instructies omtrent het degelijk reinigen en de recycling ervan.

Garantie

Raadpleeg de handleiding van uw scootmobiel voor specifieke informatie omtrent de garentie van het product.

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale
Auckland, New Zealand 0600
www.pridemobility.co.nz

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

B.V.

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
The Netherlands
www.pride-mobility.nl

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it

France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.pridemobility.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923-Madrid
www.pridemobility.com

