

INTERACTIVE ASSIST

POUR L'UTILISATEUR CONCESSIONNAIRE UNIQUEMENT

The desktop interface includes a menu on the left with the following items:

- Commande manuelle (HC)
- Commande manuelle avec éclairage (HC)
- Affichage amélioré (ED)
- Joystick adaptatif secondaire (SAJ)
- Commande Tierce-Personne (AC)
- SCIM
- Sip N Puff
- iAccess Bouton Plat
- iAccess Bouton Basculer
- Output Module (ECM)
- Module de vérins (AM)
- Module de 1 vérin (AM)
- Module de 2 vérins (A)

The data table on the desktop screen contains the following information:

HC Vitesse (%)	21,3
HC Détection du centre	Non
HC Direction (%)	-4,5

The smartphone screen displays the Interactive Assist logo and the text "INTERACTIVE ASSIST".

The tablet screen displays the following text:

Se connecter à Interactive Assist

INTERACTIVE ASSIST
BY QUANTUM®

Veillez vous assurer que Interactive Assist est démarré et connecté au fauteuil roulant. Demandez ensuite le canal et le code d'accès.

Canal:

Code d'accès:

OK Annuler

Remaining Offline Time: 13-04:25:10
Délais à distance: 00:45:46

QUANTUM®

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

 **MISE EN GARGE!**

Votre détaillant Quantum Rehab ou un technicien qualifié doit faire le montage initial de ce fauteuil motorisé et suivre toutes les procédures énumérées dans ce manuel.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et moments d'attention particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.

 **MISE EN GARGE!**

Indique une condition/situation potentiellement dangereuse. Vous devez respecter les consignes sous peine de vous blesser, de causer des dommages ou un mauvais fonctionnement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire sur un triangle jaune avec bordure noire.

 **OBLIGATOIRE!**

Indique une condition/situation potentiellement dangereuse. Vous devez respecter les consignes sous peine de vous blesser, de causer des dommages ou un mauvais fonctionnement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire sur un triangle jaune avec bordure noire.

 **INTERDIT!**

Ces actions sont interdites. Vous ne devez sous aucune considération, entreprendre ces actions. Ces actions peuvent entraîner des blessures et/ou dommages à votre équipement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire avec un rond rouge et barre rouge.

***REMARQUE:** Ce manuel a été préparé à partir des spécifications et informations les plus récentes disponibles au moment de la publication. Nous réservons le droit d'apporter les changements nécessaires de temps à autre. Ces changements au produit peuvent causer des variations entre les illustrations et explications contenues dans ce manuel et le produit que vous avez acheté. La dernière version de ce manuel est sur notre site Internet.*



 **MISE EN GARDE!**

INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE À LA CHAISE POWER UTILISATEURS, CONSERVATEURS, FOURNISSEURS HME ET TECHNICIENS EN LIEN AVEC LE SAFE UTILISATION DE CE LOGICIEL D'ASSISTANCE INTERACTIVE APPLICATION ("IAA"). AU COURS DE CHAQUE UTILISATION DE IAA L'UTILISATION INDIVIDUELLE DE IAA DOIT FAIRE LA SUIVANT RECONNAISSANCE.

ATTESTATION DES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AUX UTILISATEURS, PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN, FOURNISSEURS D'EQUIPEMENTS MÉDICAUX À DOMICILE ET TECHNICIENS DE FAUTEUILS ÉLECTRIQUES:

PAR LA POURSUITE DE L'UTILISATION DE CETTE APPLICATION LOGICIELLE D'ASSISTANCE INTERACTIVE («AAI»), JE RECONNAIS QUE J'AL LU ET QUE JE ME CONFORMERAI AUX INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS ÉNONCÉS CI-APRÈS CONCERNANT L'UTILISATION SÛRE ET EFFICACE DE L'AAI.

L'AAI permet un accès à distance sécurisé à la programmation électronique d'un fauteuil électrique. Afin d'assurer une utilisation sûre efficace et appropriée de l'AAI, les INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS suivants doivent être observés:

 **MISE EN GARDE!**

1. Un utilisateur de fauteuil électrique ou un préposé à l'entretien d'un fauteuil électrique ne doit fournir le canal et le mot de passe de l'AAI qu'à un représentant de confiance du fournisseur d'équipements médicaux à domicile.
2. Un fournisseur d'équipements médicaux à domicile ne doit employer que des techniciens qualifiés qui utilisent l'AAI pour établir un accès à distance au système de commande d'un fauteuil électrique.
3. L'accès à distance de l'AAI ne doit être utilisé que pour:
 - a. Identifier les réglages actuels du système de commande et/ou les informations de dépannage du fauteuil électrique,
 - b. Modifier les réglages du système de commande du fauteuil électrique qui ne sont pas liés aux performances. Ces modifications ne doivent être apportées que par un technicien qualifié qui connaît bien les dimensions, l'état physique et médical de l'utilisateur du fauteuil électrique et les contraintes environnementales.
4. Les utilisateurs de fauteuils électriques et les fournisseurs d'équipements médicaux à domicile doivent protéger soigneusement les informations de connexion afin de garantir un accès sécurisé et la sécurité des utilisateurs de fauteuils électriques.

5. Les fournisseurs d'équipements médicaux à domicile et leurs techniciens qualifiés qui utilisent l'accès à distance de l'AAI doivent faire preuve d'un jugement clinique éclairé en ce qui concerne l'identification, l'évaluation et/ou la modification de tout réglage du système de commande du fauteuil électrique.
6. L'AAI ne doit pas être utilisée par un fournisseur d'équipements médicaux à domicile et/ou un utilisateur ou un préposé à l'entretien d'un fauteuil électrique pour remplacer une évaluation et une programmation correctes en personne d'un fauteuil électrique, notamment de son système de commande pour répondre aux besoins spécifiques et aux exigences de sécurité d'un utilisateur particulier du fauteuil électrique.
7. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER UN ACCÈS INAPPROPRIÉ ET/OU UNE IDENTIFICATION, UNE ÉVALUATION ET/OU UNE MODIFICATION INAPPROPRIÉES DES RÉGLAGES DU CONTRÔLEUR DU FAUTEUIL ÉLECTRIQUE. UNE MODIFICATION INCORRECTE DE CES RÉGLAGES PEUT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL DU FAUTEUIL ÉLECTRIQUE, CE QUI PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES POUR L'UTILISATEUR DU FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ET LES PERSONNES PRÉSENTES, Y COMPRIS NOTAMMENT SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, UN DÉSÉQUILIBRE, UN ACCÉLÉRATION OU UN ARRÊT NON INTENTIONNELS, UNE COLLISION OU UN BASCULEMENT, POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES POUR L'UTILISATEUR OU TOUTE PERSONNE QUI SE TROUVE À CÔTÉ DU FAUTEUIL ÉLECTRIQUE.

REMARQUE: Cet avertissement doit être acquitté dans l'application avant de pouvoir utiliser Interactive Assist.

QUANTUM®

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

Introduction

Le guide Interactive Assist.

Ce guide Interactive Assist traite de l'application interactive Interactive Assist de Q-Logic 3.

Q-Logic 3 Interactive Assist

L'électronique Q-Logic 3 peut connecter un fournisseur Quantum Rehab à un fauteuil électrique situé au même endroit que le fournisseur.

Application d'Interactive Assist

L'application Interactive Assist est disponible pour les appareils iOS et Android. L'application connecte l'électronique Q-Logic 3 via Bluetooth à la fonction Econ-W à distance via l'accès Internet de l'appareil.

Lorsqu'ils sont connectés à l'électronique Q-Logic 3, un canal et un code d'accès sont affichés. Le canal et le code d'accès sont envoyés au fournisseur pour assurer la connexion au fauteuil d'alimentation approprié.

Table des matières


App Interactive Assist - Android, Q-Logic 3	5
Application Interactive Assist - Présentation de l'appareil Android	6
Connexion Android Interactive Assist avec accès revendeur à utilisateur	9
App Interactive Assist - Android, Q-Logic 3e	19
Application Interactive Assist - Présentation de l'appareil Android	20
Connexion Android Interactive Assist avec accès revendeur à utilisateur	23

**INTERACTIVE ASSIST APP
POUR ANDROID UNIQUEMENT
Q-LOGIC 3**




Interactive Assist App - Appareil Android

L'application Interactive Assist pour un appareil Android peut être téléchargée via Google Play Store. L'application Interactive Assist est compatible avec les appareils Android exécutant Android 5.0 (Lollipop) ou supérieur.

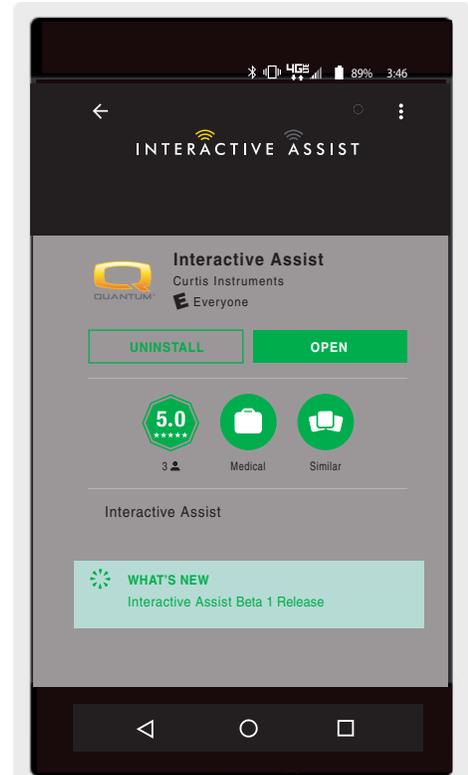

Android Figure 1. Google Play Store

L'application Interactive Assist se trouve dans le Google Play Store en recherchant «Interactive Assist».

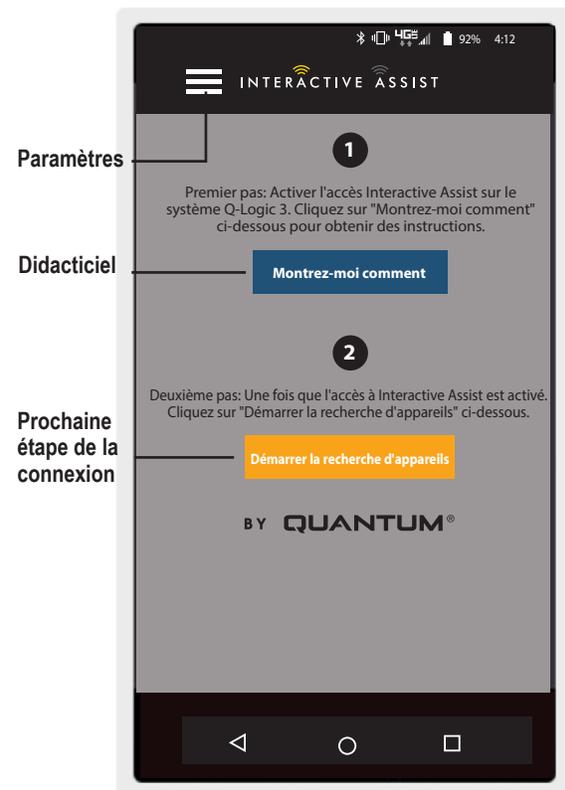


Android Figure 2. Sélection du menu

Paramètres

Connexion du fournisseur - Activer / Désactiver


La connexion du fournisseur ajoute un écran à l'écran d'accueil de l'application pour saisir les informations de connexion du fournisseur. La fonction fournisseur uniquement est utilisée lorsque le fournisseur est sur place avec le fauteuil motorisé pour modifier les paramètres du fournisseur.

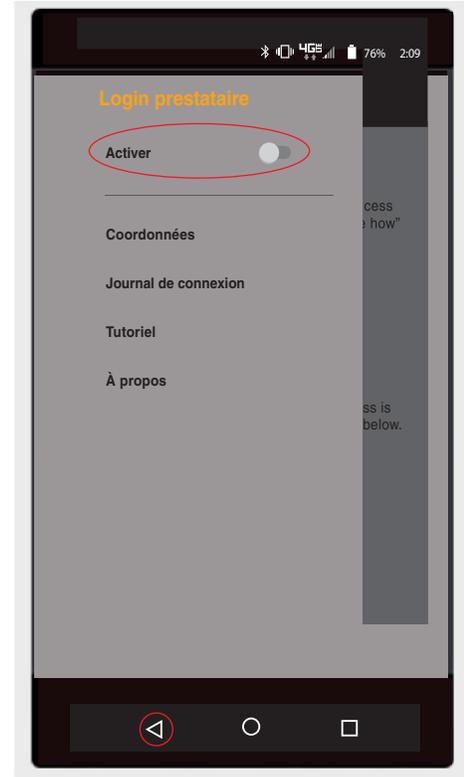

Android Figure 3. Connexion du fournisseur activée avec le bouton de menu

Informations de contact

- Informations de contact – Nom de l'entreprise du fournisseur
 - Nom du contact – Nom du contact chez le fournisseur
 - Numéro du contact – Numéro de téléphone du contact chez le fournisseur
 - Email du contact – Adresse e-mail du contact chez le fournisseur
 - Nom du client – Nom de l'utilisateur du fauteuil motorisé
- L'application utilise les informations de contact pour les emails directs et les appels au fournisseur.

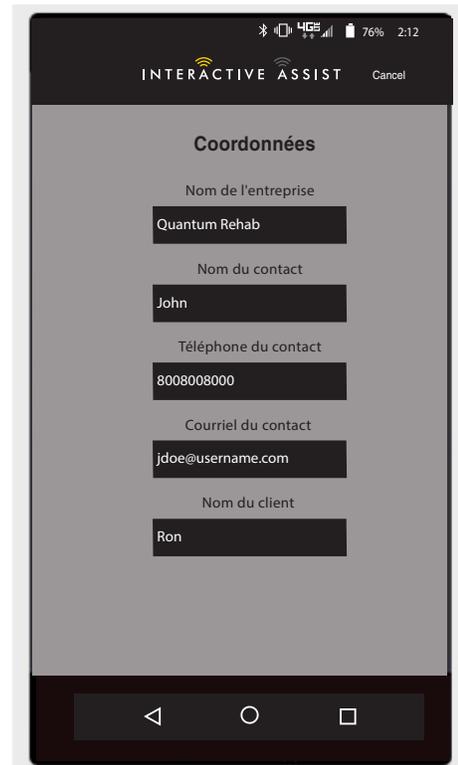

Android Figure 4. Informations de contact

Journal de connexion


Affiche les connexions Interactive Assist du périphérique. Cliquez sur "Afficher les détails" pour afficher l'écran des détails de la connexion.



Android Figure 5. Journal de connexion

Didacticiel

Instructions pas à pas sur la manière d'établir la connexion Interactive Assist.

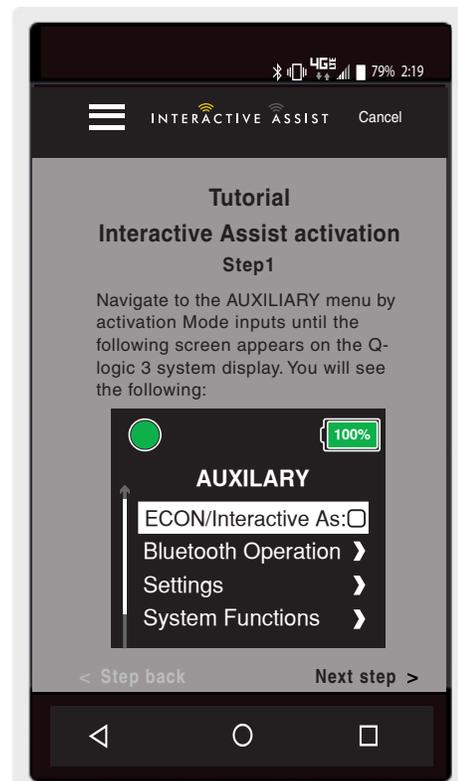

Android Figure 6. Didacticiel

Sur

Version de l'application Interactive Assist.



Android Figure 7. À propos de

Connexion Android Interactive Assist avec un accès de revendeur à utilisateur

1. Allumez le système Q-Logic 3 et naviguez jusqu'à l'écran Aux en utilisant la commande mode.

REMARQUE: Si disponible, naviguez jusqu'à l'écran Aux en utilisant le bouton d'accueil et deux entrées à gauche.



Android Figure 8. Périphérique d'entrée de l'écran auxiliaire Q-Logic 3

- Effectuez une entrée vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance «Econ / Interactive Assist», puis effectuez une entrée droite pour activer Interactive Assist.

REMARQUE: La case sera cochée lorsqu'elle est activée. Une autre entrée de droite décochera ou désactivera Interactive Assist.

- Notez l'ID en haut de l'écran.




Android Figure 9. Econ / Assistant interactif auxiliaire Q-Logic 3



Android Figure 10. Q-Logic 3 Auxiliary Econ/Interactive Assist Selection

4. Activez l'application Interactive Assist.
5. Cliquez sur "Lancer la recherche de périphériques".

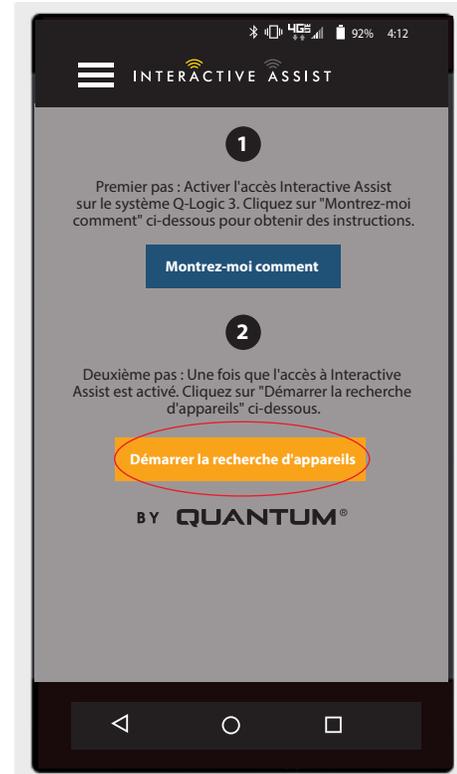

Android Figure 11. Recherche de périphériques

6. Cliquez sur la chaise qui correspond à l'ID: numéro en haut de l'écran Q-Logic 3.


REMARQUE: Si le fauteuil n'est pas déjà associé au Bluetooth de l'appareil Android, une confirmation d'appariement s'affiche sur l'écran Q-Logic 3 et sur le périphérique Android. Comparez les codes d'appariement. S'ils correspondent, à la confirmation sur le système Q-Logic 3 et sur l'appareil Android.



Android Figure 12. Choisissez le périphérique à connecter


7. Donnez à votre fournisseur Quantum Rehab les informations sur le canal et le code d'accès pour démarrer la connexion Interactive Assist.

REMARQUE: Si les informations du fournisseur (voir les informations de contact) ont été saisies, le fournisseur peut recevoir par courrier électronique le canal et le mot de passe ou les appeler directement à partir de cet écran.

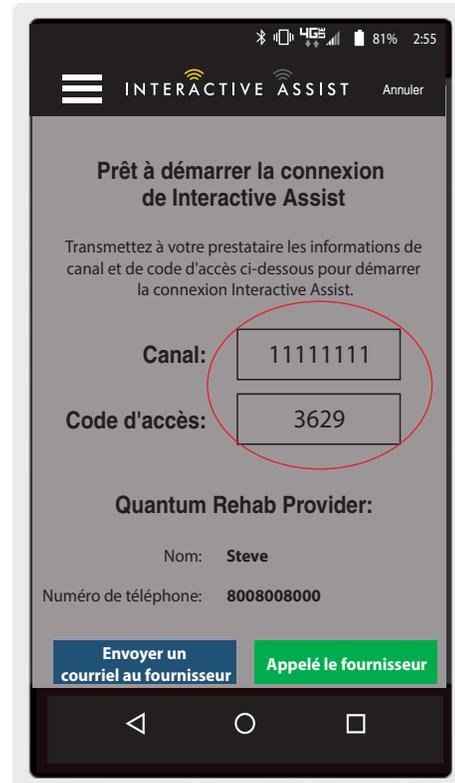


Android Figure 13. Canal Android et code d'accès

8. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" entre le canal et le code d'accès, un écran d'accusé de réception apparaît sur le système Q-Logic. Une entrée directe acceptera la connexion Interactive Assist.
9. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" se connecte, l'écran suivant apparaît, confirmant la connexion Q-Assist.

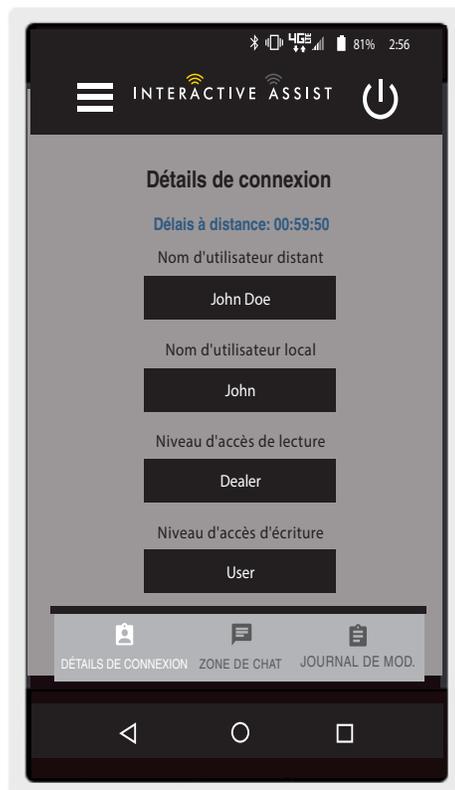

Android Figure 14. Détails de la connexion

10. Cliquez sur le bouton «Zone de discussion» pour ouvrir une fenêtre de discussion entre l'application Interactive Assist et le Remote Econ-W. Cette fenêtre de discussion peut être lancée à partir de l'application Interactive Assist ou de l'Econ-W. La fenêtre de discussion comprend un bouton «Envoyer une image», pour envoyer des images déjà sur votre appareil, et un bouton «Prendre une photo» pour utiliser l'appareil photo de votre appareil pour prendre et envoyer une photo via la fenêtre de discussion.

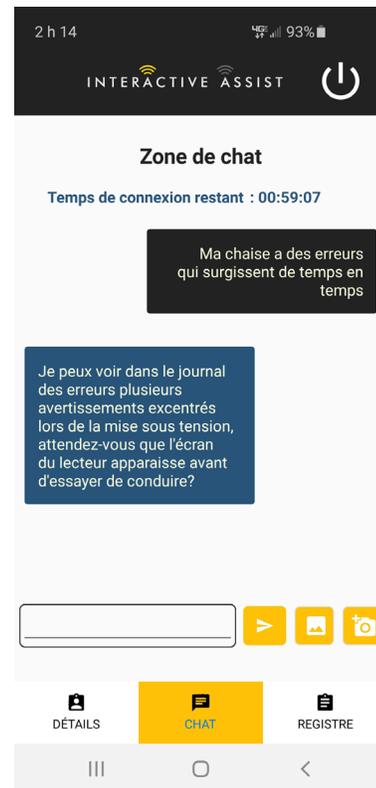

Android Figure 15. Zone de conversation

11. Cliquez sur le bouton «Modifier le journal» pour afficher les modifications apportées par l'Econ-W à la chaise.

REMARQUE: Le niveau d'accès Interactive Assist détermine le niveau des modifications autorisées.



Android Figure 16. Journal des modifications

Accès fournisseur à fournisseur (fournisseur uniquement)

1. Allumez le système Q-Logic 3 et naviguez jusqu'à l'écran Aux en utilisant la commande mode.

REMARQUE: Lorsque disponible, accédez à l'écran Aux en utilisant le bouton d'accueil et deux entrées à gauche.



Android Figure 17. Dispositif d'entrée de changement d'écran auxiliaire Q-Logic 3

2. Effectuez une entrée vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance "Econ / Interactive Assist", puis effectuez une entrée droite pour activer Interactive Assist.



Android Figure 18. Econ / Assistant interactif auxiliaire Q-Logic 3


REMARQUE La case sera cochée lorsqu'elle est activée. Une autre entrée de droite décochera ou désactivera Interactive Assist.

3. Notez l'ID en haut de l'écran.




Android Figure 19. Sélection auxiliaire Econ / Assistant interactif Q-Logic 3

4. Activez l'application Interactive Assist.
5. Cliquez sur "Lancer la recherche de périphériques".

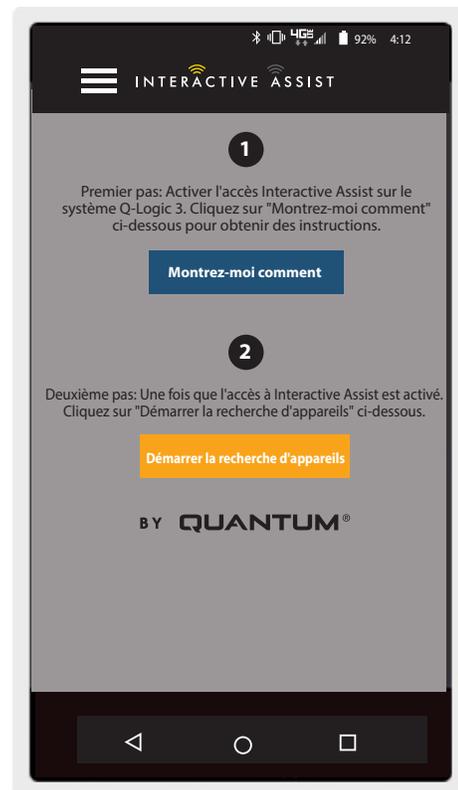

Android Figure 20. Recherche de périphériques


6. Cliquez sur Connexion du fournisseur pour activer, puis cliquez sur le bouton Précédent pour fermer la boîte de paramètres.

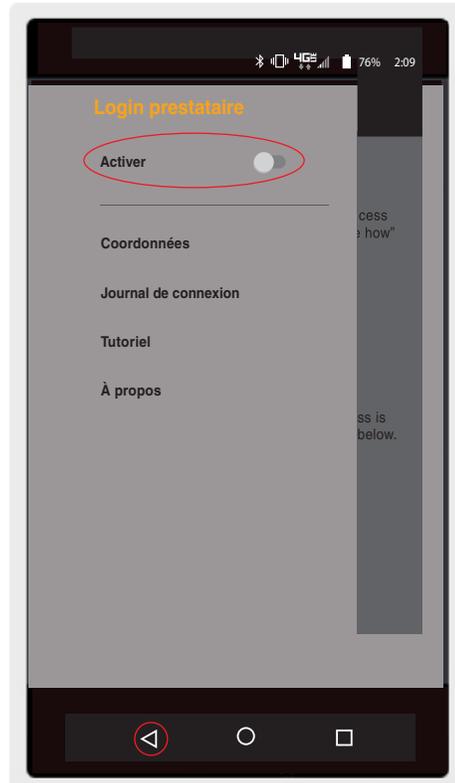

Android Figure 21. Bouton retour de connexion du fournisseur

7. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe (identique à Econ-W) du fournisseur avec le fauteuil.

REMARQUE: La connexion à l'application Interactive Assist ne peut pas être identique à la connexion à distance Econ-W.

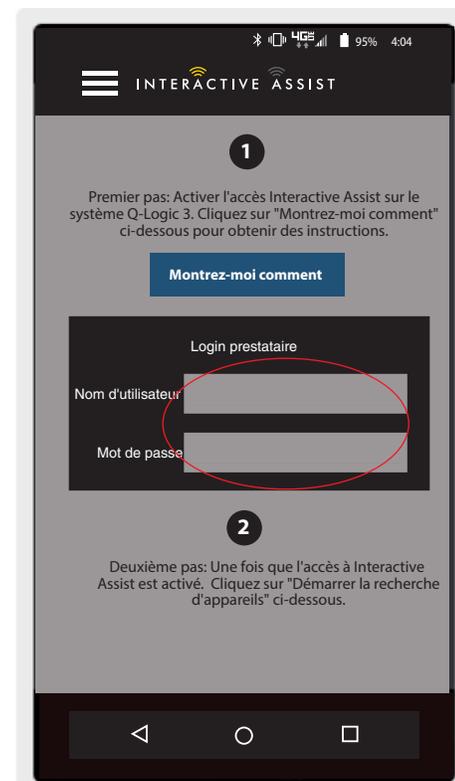

Android Figure 22. Connexion à la page d'accueil

8. Cliquez sur "Rechercher des périphériques".



Android Figure 23. Recherche de périphériques
Connexion

9. Cliquez sur la chaise qui correspond à l'ID: numéro en haut de l'écran Q-Logic 3.

REMARQUE: Si le fauteuil n'est pas déjà associé au Bluetooth de l'appareil Android, une confirmation d'appariement affiche sur l'écran Q-Logic 3 et sur le périphérique Android. Comparer les codes d'appariement. S'ils correspondent, validez sur le système Q-Logic 3 et sur l'appareil Android.



Android Figure 24. Choisissez le périphérique à connecter


10. Fournissez à votre fournisseur Quantum Rehab les informations sur le canal et le code d'accès pour démarrer la connexion Interactive Assist.

REMARQUE: Si les informations du fournisseur (voir les informations de contact) ont été saisies, le fournisseur peut recevoir par courrier électronique le canal et le mot de passe ou les appeler directement à partir de cet écran.



Android Figure 25. Écran de modification de l'écran auxiliaire Q-Logic 3

11. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" entre le canal et le code d'accès, un écran d'accusé de réception apparaît sur le système Q-Logic. Une entrée directe acceptera la connexion Interactive Assist.
12. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" se connecte, l'écran suivant apparaît pour confirmer la connexion Q-Assist.

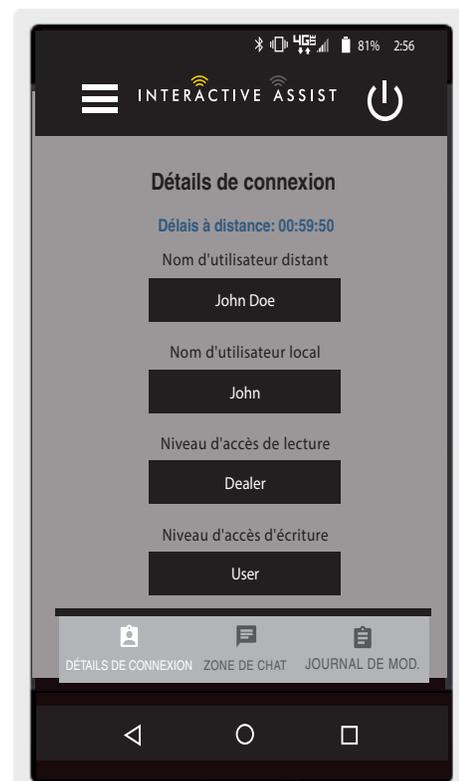


Android Figure 26. Détails de connexion

**INTERACTIVE ASSIST APP
POUR ANDROID UNIQUEMENT
Q-LOGIC 3e**




Interactive Assist App - Appareil Android

L'application Interactive Assist pour un appareil Android peut être téléchargée via Google Play Store. L'application Interactive Assist est compatible avec les appareils Android exécutant Android 5.0 (Lollipop) ou supérieur.

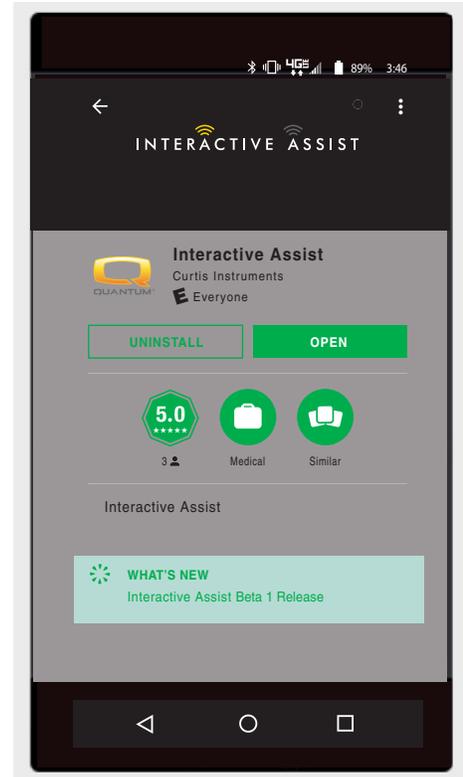

Android Figure 1. Google Play Store

L'application Interactive Assist se trouve dans le Google Play Store en recherchant «Interactive Assist».

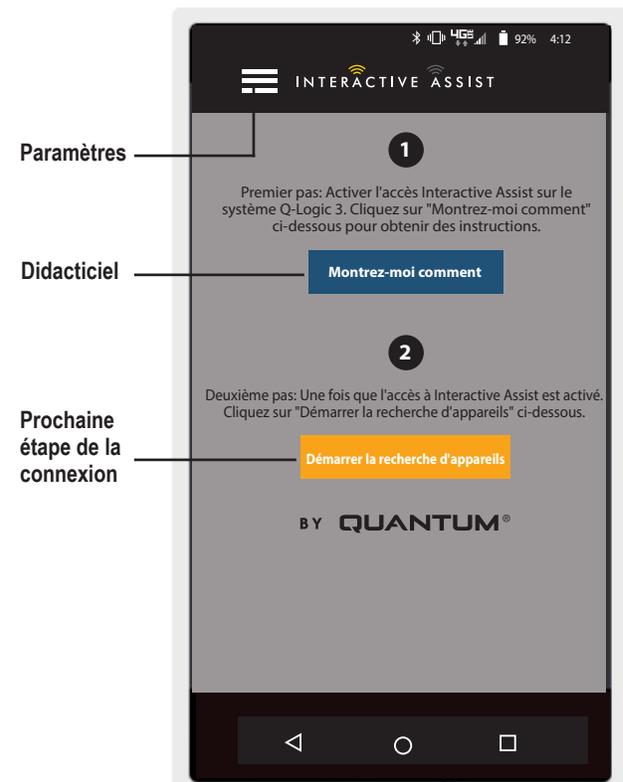


Android Figure 2. Sélection du menu

Paramètres

Connexion du fournisseur - Activer / Désactiver


La connexion du fournisseur ajoute un écran à l'écran d'accueil de l'application pour saisir les informations de connexion du fournisseur. La fonction fournisseur uniquement est utilisée lorsque le fournisseur est sur place avec le fauteuil motorisé pour modifier les paramètres du fournisseur.

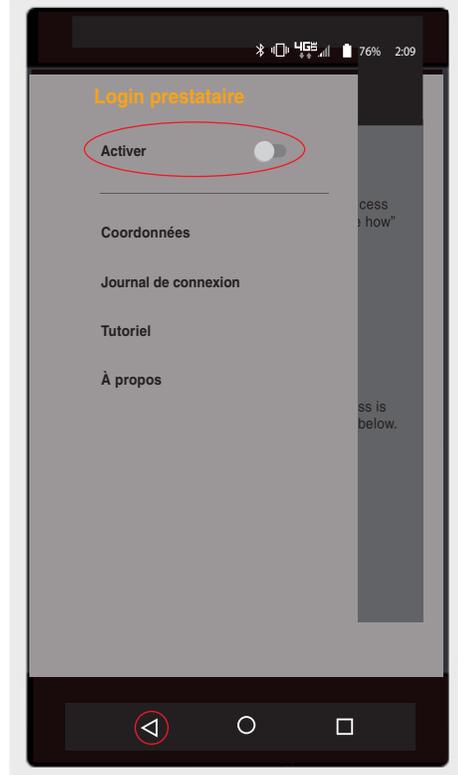

Android Figure 3. Connexion du fournisseur activée avec le bouton de menu

Informations de contact

- Informations de contact – Nom de l'entreprise du fournisseur
 - Nom du contact – Nom du contact chez le fournisseur
 - Numéro du contact – Numéro de téléphone du contact chez le fournisseur
 - Email du contact – Adresse e-mail du contact chez le fournisseur
 - Nom du client – Nom de l'utilisateur du fauteuil motorisé
- L'application utilise les informations de contact pour les emails directs et les appels au fournisseur.

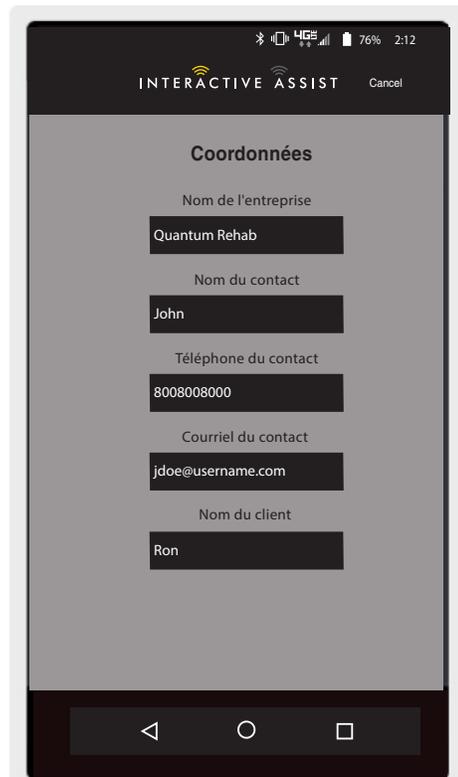

Android Figure 4. Informations de contact

Journal de connexion


Affiche les connexions Interactive Assist du périphérique. Cliquez sur "Afficher les détails" pour afficher l'écran des détails de la connexion.



Android Figure 5. Journal de connexion

Didacticiel

Instructions pas à pas sur la manière d'établir la connexion Interactive Assist.

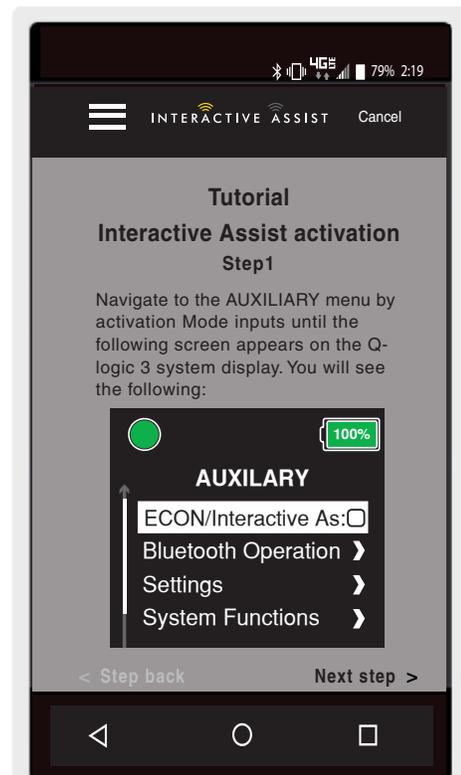

Android Figure 6. Didacticiel

Sur


Version de l'application Interactive Assist.



Android Figure 7. À propos de

Connexion Android Interactive Assist avec un accès de revendeur à utilisateur


1. Allumez le système Q-Logic 3e naviguez jusqu'à l'écran Aux en utilisant la commande mode.

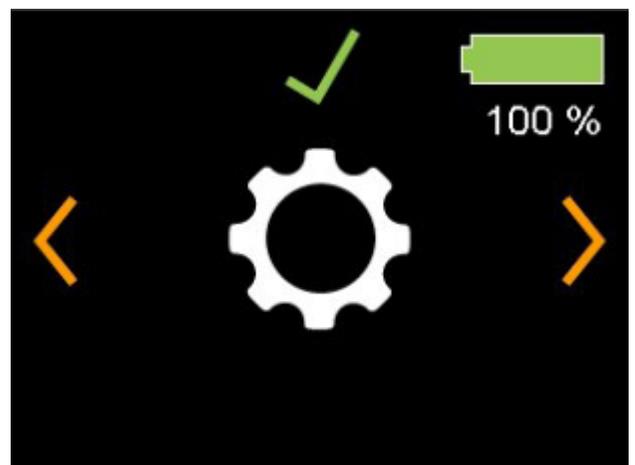

Écran du contrôleur Q-Logic 3e

Android Figure 8. Paramètres Q-Logic 3e d'Android

- Effectuez une entrée droite pour accéder à l'écran Bluetooth. Effectuez une entrée en avant pour activer Bluetooth.

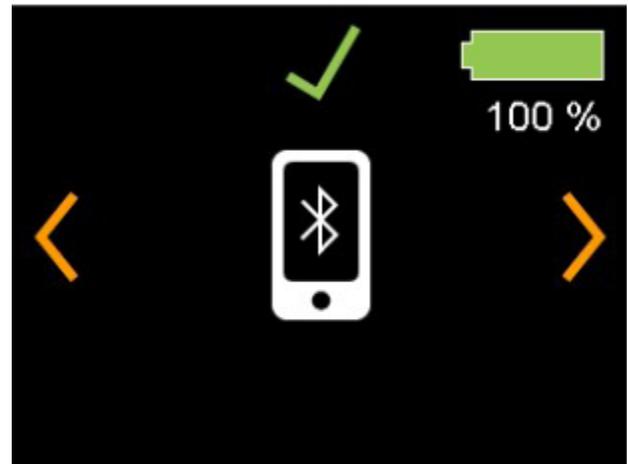

Écran du contrôleur Q-Logic 3e

Android Figure 9. Paramètres Q-Logic 3e d'Android

Notez le numéro d'identification au bas de l'écran.



Écran du contrôleur Q-Logic 3e

Android Figure 10. Paramètres Q-Logic 3e d'Android

3. Activez l'application Interactive Assist.
4. Cliquez sur "Démarrer la recherche de périphériques".




Android Figure 11. Recherche de périphériques

5. Cliquez sur la chaise qui correspond à l'ID numéro en haut de l'écran Q-Logic 3e



Android Figure 12. Choisissez le périphérique à connecter

REMARQUE: Si le fauteuil n'est pas déjà associé au Bluetooth de l'appareil Android, une confirmation d'appariement s'affiche sur l'écran Q-Logic 3e et sur le périphérique Android. Comparez les codes d'appariement. S'ils correspondent, à la confirmation sur le système Q-Logic 3e et sur l'appareil Android.

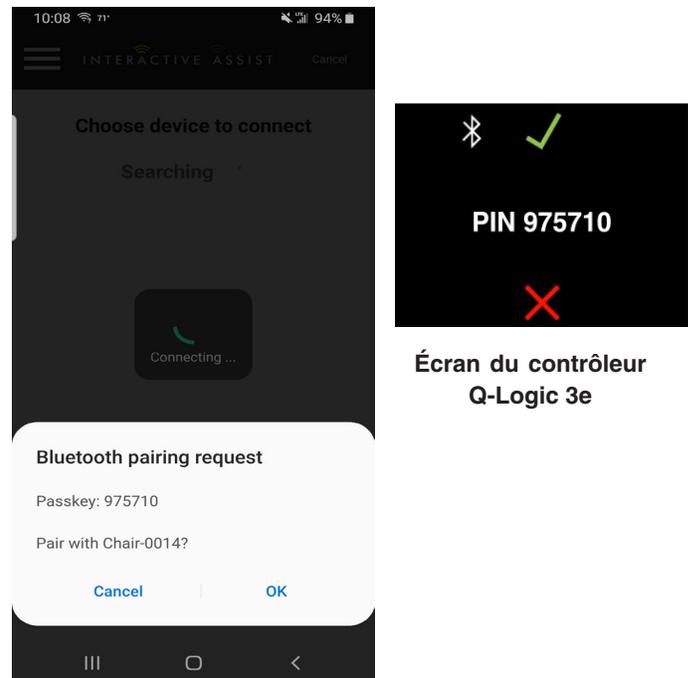

Android Figure 13. Choisissez le périphérique à connecter.


- Donnez à votre fournisseur Quantum Rehab les informations sur le canal et le code d'accès pour démarrer la connexion Interactive Assist.

REMARQUE: Si les informations du fournisseur (voir les informations de contact) ont été saisies, le fournisseur peut recevoir par courrier électronique le canal et le mot de passe ou les appeler directement à partir de cet écran.



Android Figure 14. Canal Android et code d'accès


7. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" entre le canal et le code d'accès, un écran d'accusé de réception apparaît sur le système Q-Logic 3e. Une entrée directe acceptera la connexion Interactive Assist.

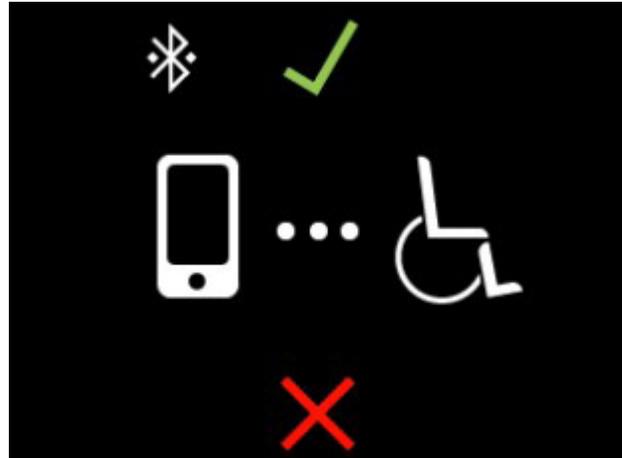

Écran du contrôleur Q-Logic 3e


Android Figure 15. Détails de la connexion

8. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" se connecte, l'écran suivant apparaît, confirmant la connexion Q-Assist.

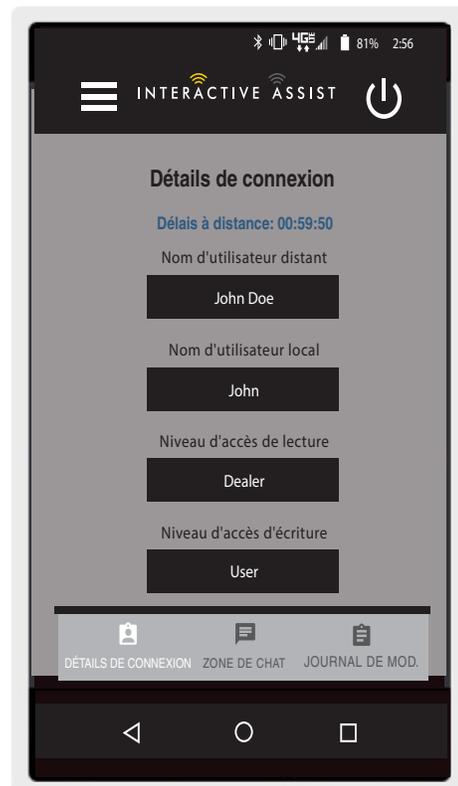

Android Figure 16. Détails de la connexion

9. Cliquez sur le bouton «Zone de discussion» pour ouvrir une fenêtre de discussion entre l'application Interactive Assist et le Remote Econ-W. Cette fenêtre de discussion peut être lancée à partir de l'application Interactive Assist ou de l'Econ-W. La fenêtre de discussion comprend un bouton «Envoyer une image», pour envoyer des images déjà sur votre appareil, et un bouton «Prendre une photo» pour utiliser l'appareil photo de votre appareil pour prendre et envoyer une photo via la fenêtre de discussion.

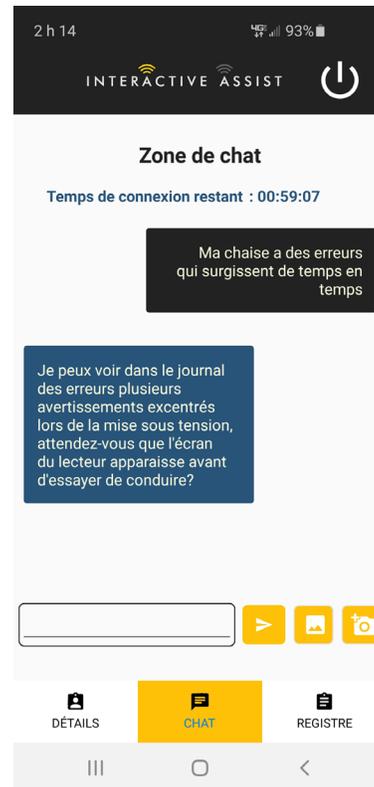


Android Figure 17. Zone de conversation

10. Cliquez sur le bouton «Modifier le journal» pour afficher les modifications apportées par l'Econ-W à la chaise.

REMARQUE: *Interactive Assist expirera après une heure.*

REMARQUE: *Le niveau d'accès Interactive Assist détermine le niveau des modifications autorisées.*

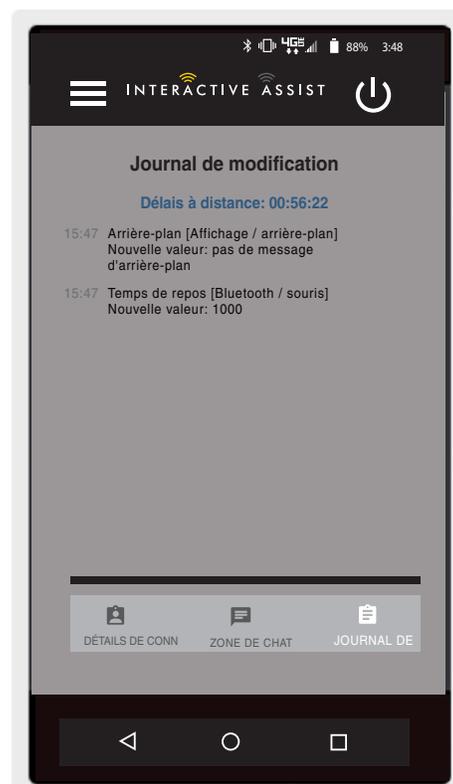

Android Figure 18. Journal des modifications

Accès fournisseur à fournisseur (fournisseur uniquement)


1. Allumez le système Q-Logic 3e naviguez jusqu'à l'écran Aux en utilisant la commande mode.



Écran du contrôleur Q-Logic 3e

Android Figure 19. Paramètres Q-Logic 3e d'Android

2. Effectuez une entrée droite pour accéder à l'écran Bluetooth. Effectuez une entrée en avant pour activer Bluetooth.

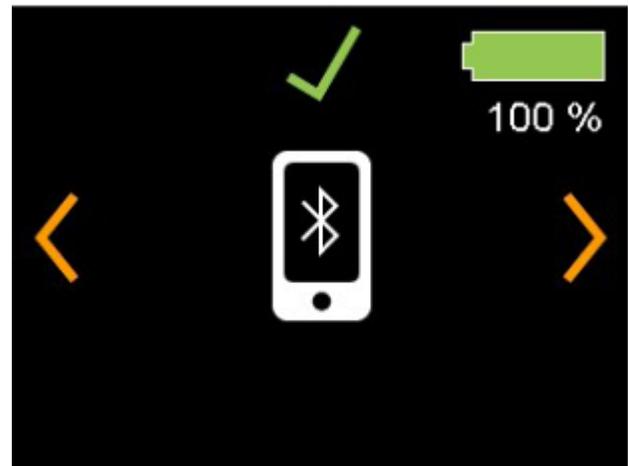

Écran du contrôleur Q-Logic 3e

Android Figure 20. Paramètres Q-Logic 3e'Android


Notez le numéro d'identification au bas de l'écran.



Q-Logic 3e Controller Screen

Android Figure 21. Paramètres Q-Logic 3e d'Android

3. Activez l'application Interactive Assist.
4. Cliquez sur "Démarrer la recherche de périphériques".

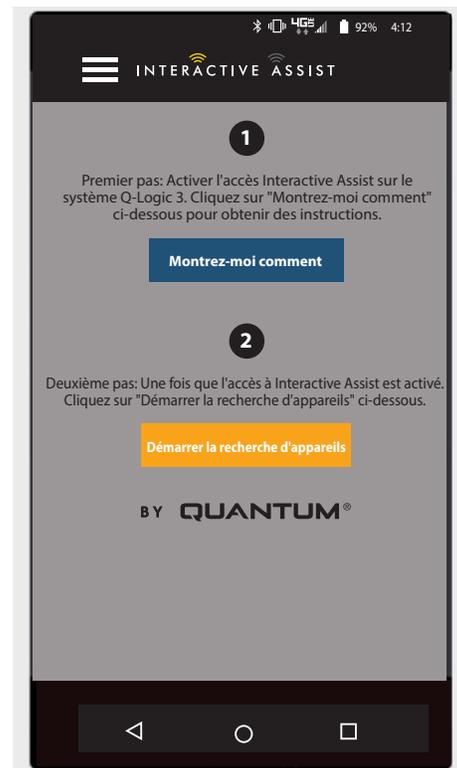

Android Figure 22. Recherche de périphériques


5. Cliquez sur Connexion du fournisseur pour activer, puis cliquez sur le bouton Précédent pour fermer la boîte de paramètres.



Android Figure 23. Bouton retour de connexion du fournisseur

6. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe (identique à Econ-W) du fournisseur avec le fauteuil.

REMARQUE: La connexion à l'application Interactive Assist ne peut pas être identique à la connexion à distance Econ-W.

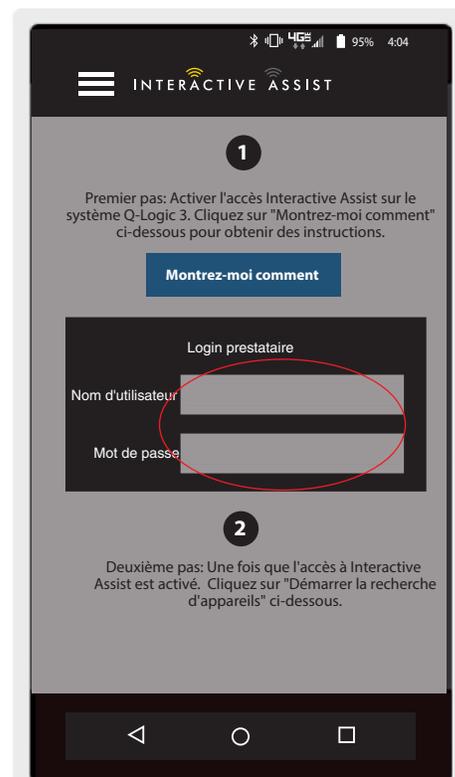


Android Figure 24. Connexion à la page d'accueil

7. Cliquez sur "Démarrer des périphériques".




Android Figure 25. Recherche de périphériques Connexion

8. Cliquez sur la chaise qui correspond à l'ID numéro en haut de l'écran Q-Logic 3e.

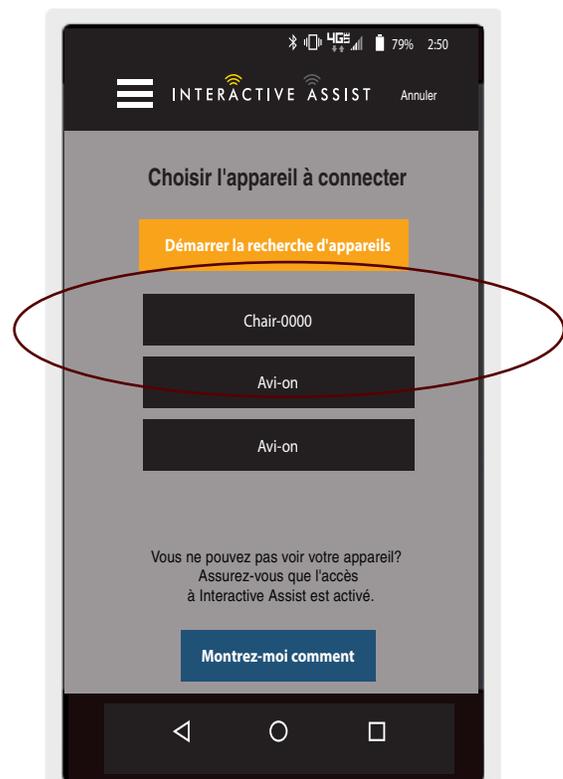

Android Figure 26. Choisissez le périphérique à connecter


REMARQUE: Si le fauteuil n'est pas déjà associé au Bluetooth de l'appareil Android, une confirmation d'appariement affiche sur l'écran Q-Logic 3e et sur le périphérique Android. Comparer les codes d'appariement. S'ils correspondent, validez sur le système Q-Logic 3e et sur l'appareil Android.

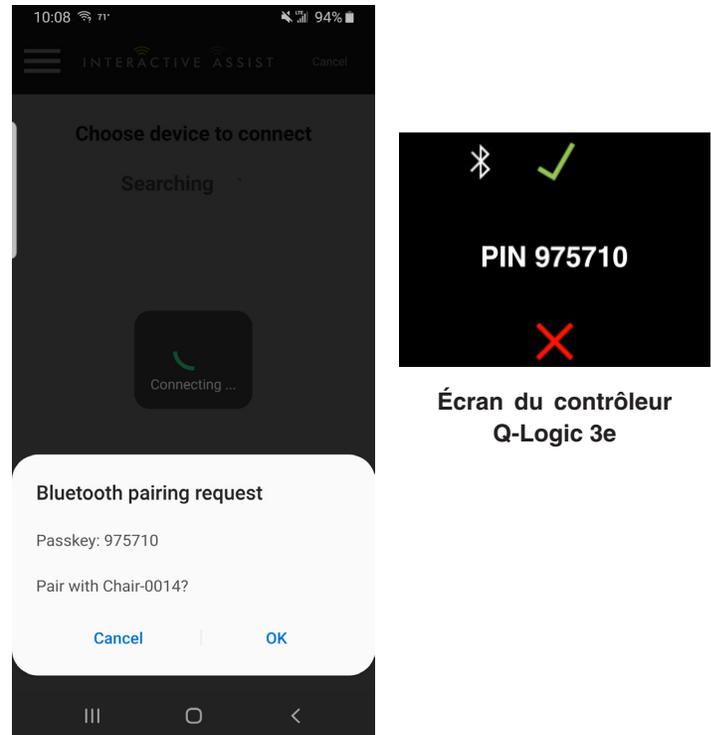

Android Figure 27. Choisissez le périphérique à connecter.


- Fournissez à votre fournisseur Quantum Rehab les informations sur le canal et le code d'accès pour démarrer la connexion Interactive Assist.

REMARQUE: Si les informations du fournisseur (voir les informations de contact) ont été saisies, le fournisseur peut recevoir par courrier électronique le canal et le mot de passe ou les appeler directement à partir de cet écran.

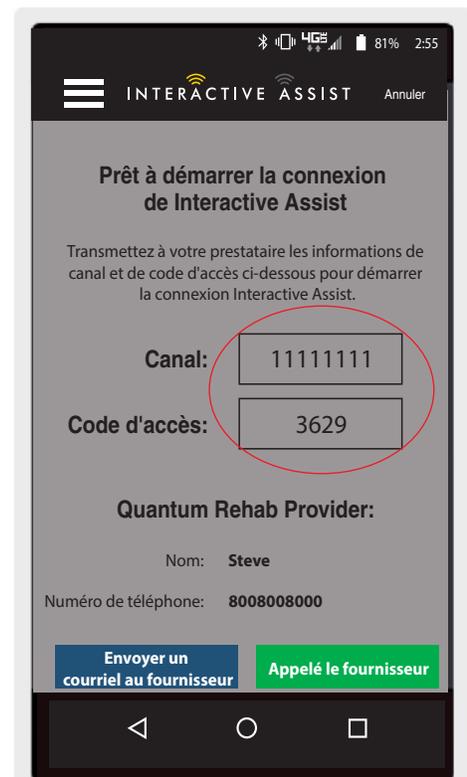

Android Figure 28. Écran de modification de l'écran auxiliaire Q-Logic 3e


10. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" entre le canal et le code d'accès, un écran d'accusé de réception apparaît sur le système Q-Logic 3e. Une entrée directe acceptera la connexion Interactive Assist.

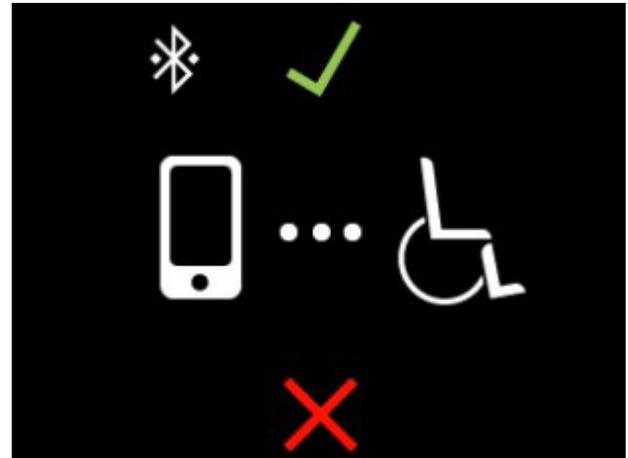

Q-Logic 3e Controller Screen

Android Figure 29. Détails de connexion

11. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" se connecte, l'écran suivant apparaît pour confirmer la connexion Q-Assist.

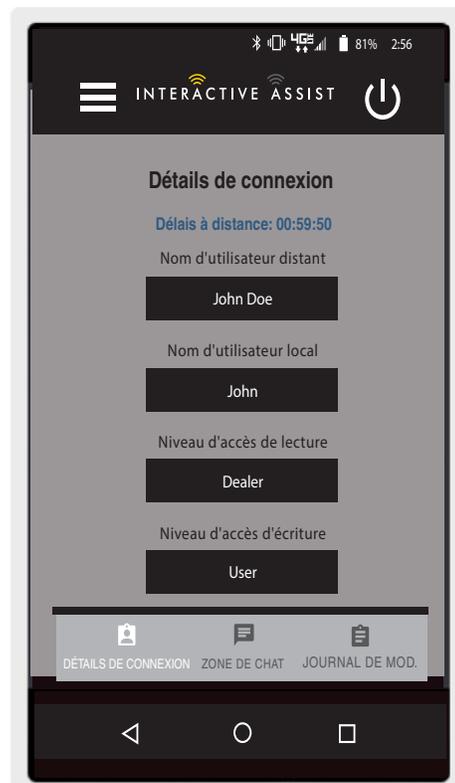

Android Figure 30. Détails de connexion

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.quantumrehab.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
www.quantumrehab.com

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.quantumrehab.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale, Auckland 0600
www.pridemobility.co.nz

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.quantumrehab.co.uk

Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.quantumrehab.eu

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.quantumrehab-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.quantumrehab.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.quantumrehab.es

Germany

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.quantumrehab.de

China

Room 508, Building #4
TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road
Pudong New Area
Shanghai 201318
www.pridechina.cn



I N F M A N U S 0 3 7