

INTERACTIVE ASSIST

POUR LES UTILISATEURS D'APPAREIL APPLE UNIQUEMENT



QUANTUM[®]

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

 **MISE EN GARDE!**

Un détaillant Quantum Rehab ou un technicien qualifié doit effectuer l'installation initiale de ce produit et doit exécuter toutes les instructions de ce manuel.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel et sur le fauteuil motorisé pour indiquer les mises en garde et les informations importantes. Il est très important pour vous de les lire et de les comprendre.

 **MISE EN GARDE!**

Indique une condition/situation potentiellement dangereuse. Le non-respect de ces procédures peut entraîner des blessures, des dommages aux composants, ou un dysfonctionnement. Sur le produit, cette icône est représentée par un symbole noir sur un triangle jaune avec une bordure noire.

 **OBLIGATOIRE!**

Ces actions doivent être effectuées comme indiqué. Ne pas effectuer les actions obligatoires peut causer des blessures et/ou endommager l'équipement. Sur le produit, cette icône est représentée par un symbole blanc sur point bleu avec une bordure blanche.

 **INTERDIT!**

Ces actions sont interdites. Ces actions ne doivent pas être effectuées à tout moment et en toute circonstance. Effectuer une action interdite peut causer des blessures et/ou endommager l'équipement. Sur le produit, cette icône est représentée par un symbole noir avec un cercle rouge avec une barre oblique rouge.

REMARQUE: Ces instructions ont été compilées à partir des spécifications et des informations sur le produit disponibles au moment de la publication. Nous réservons le droit d'apporter des modifications au fur et à mesure qu'elles deviennent nécessaires. Toutes les modifications apportées à nos produits peuvent causer des variations entre les illustrations et les explications contenues dans ce manuel et le produit que vous avez acheté. La dernière version/ courante de ce manuel est disponible sur notre site web.



 **MISE EN GARDE!**

INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE À LA CHAISE POWER UTILISATEURS, CONSERVATEURS, FOURNISSEURS HME ET TECHNICIENS EN LIEN AVEC LE SAFE UTILISATION DE CE LOGICIEL D'ASSISTANCE INTERACTIVE APPLICATION ("IAA"). AU COURS DE CHAQUE UTILISATION DE IAA L'UTILISATION INDIVIDUELLE DE IAA DOIT FAIRE LA SUIVANT RECONNAISSANCE.

ATTESTATION DES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AUX UTILISATEURS, PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN, FOURNISSEURS D'EQUIPEMENTS MÉDICAUX À DOMICILE ET TECHNICIENS DE FAUTEUILS ÉLECTRIQUES:

PAR LA POURSUITE DE L'UTILISATION DE CETTE APPLICATION LOGICIELLE D'ASSISTANCE INTERACTIVE («AAI»), JE RECONNAIS QUE J'AL LU ET QUE JE ME CONFORMERAI AUX INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS ÉNONCÉS CI-APRÈS CONCERNANT L'UTILISATION SÛRE ET EFFICACE DE L'AAI.

L'AAI permet un accès à distance sécurisé à la programmation électronique d'un fauteuil électrique. Afin d'assurer une utilisation sûre efficace et appropriée de l'AAI, les INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS suivants doivent être observés:

 **MISE EN GARDE!**

1. Un utilisateur de fauteuil électrique ou un préposé à l'entretien d'un fauteuil électrique ne doit fournir le canal et le mot de passe de l'AAI qu'à un représentant de confiance du fournisseur d'équipements médicaux à domicile.
2. Un fournisseur d'équipements médicaux à domicile ne doit employer que des techniciens qualifiés qui utilisent l'AAI pour établir un accès à distance au système de commande d'un fauteuil électrique.
3. L'accès à distance de l'AAI ne doit être utilisé que pour:
 - a. Identifier les réglages actuels du système de commande et/ou les informations de dépannage du fauteuil électrique,
 - b. Modifier les réglages du système de commande du fauteuil électrique qui ne sont pas liés aux performances. Ces modifications ne doivent être apportées que par un technicien qualifié qui connaît bien les dimensions, l'état physique et médical de l'utilisateur du fauteuil électrique et les contraintes environnementales.
4. Les utilisateurs de fauteuils électriques et les fournisseurs d'équipements médicaux à domicile doivent protéger soigneusement les informations de connexion afin de garantir un accès sécurisé et la sécurité des utilisateurs de fauteuils électriques.

5. Les fournisseurs d'équipements médicaux à domicile et leurs techniciens qualifiés qui utilisent l'accès à distance de l'AAI doivent faire preuve d'un jugement clinique éclairé en ce qui concerne l'identification, l'évaluation et/ou la modification de tout réglage du système de commande du fauteuil électrique.
6. L'AAI ne doit pas être utilisée par un fournisseur d'équipements médicaux à domicile et/ou un utilisateur ou un préposé à l'entretien d'un fauteuil électrique pour remplacer une évaluation et une programmation correctes en personne d'un fauteuil électrique, notamment de son système de commande pour répondre aux besoins spécifiques et aux exigences de sécurité d'un utilisateur particulier du fauteuil électrique.
7. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER UN ACCÈS INAPPROPRIÉ ET/OU UNE IDENTIFICATION, UNE ÉVALUATION ET/OU UNE MODIFICATION INAPPROPRIÉES DES RÉGLAGES DU CONTRÔLEUR DU FAUTEUIL ÉLECTRIQUE. UNE MODIFICATION INCORRECTE DE CES RÉGLAGES PEUT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL DU FAUTEUIL ÉLECTRIQUE, CE QUI PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES POUR L'UTILISATEUR DU FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ET LES PERSONNES PRÉSENTES, Y COMPRIS NOTAMMENT SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, UN DÉSÉQUILIBRE, UN ACCÉLÉRATION OU UN ARRÊT NON INTENTIONNELS, UNE COLLISION OU UN BASCULEMENT, POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES POUR L'UTILISATEUR OU TOUTE PERSONNE QUI SE TROUVE À CÔTÉ DU FAUTEUIL ÉLECTRIQUE.

REMARQUE: Cet avertissement doit être acquitté dans l'application avant de pouvoir utiliser Interactive Assist.

QUANTUM®

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

Introduction

Ce guide Interactive Assist traite de l'application interactive Interactive Assist de Q-Logic 3.

Q-Logic 3 Interactive Assist

L'électronique Q-Logic 3 peut connecter un fournisseur Quantum Rehab à un fauteuil électrique situé au même endroit que le fournisseur

Application Interactive Assist

L'application Interactive Assist est disponible pour les appareils iOS et Android. L'application connecte l'électronique Q-Logic 3 via Bluetooth à la fonction Econ-W à distance via l'accès Internet de l'appareil.

Lorsqu'ils sont connectés à l'électronique Q-Logic 3, un canal et un code d'accès sont affichés. Le canal et le code d'accès sont envoyés au fournisseur pour assurer la connexion au fauteuil d'alimentation approprié.

Table des matières

App Interactive Assist - Apple, Q-Logic 3	5
Application Interactive Assist - Présentation du périphérique Apple	6
Connexion Apple Interactive Assist avec accès revendeur à utilisateur	9
App Interactive Assist - Apple, Q-Logic 3e	19
Application Interactive Assist - Présentation du périphérique Apple	20
Connexion Apple Interactive Assist avec accès revendeur à utilisateur	23


**INTERACTIVE ASSIST APP
POUR APPAREILS APPLE
Q-LOGIC 3**



Application d'assistance interactive pour périphérique Apple


L'application Interactive Assist pour un appareil Apple peut être téléchargée via l'App Store. L'application Interactive Assist est compatible avec iOS 9 et les versions ultérieures.

L'application Interactive Assist se trouve dans l'App Store en recherchant "Interactive Assist."

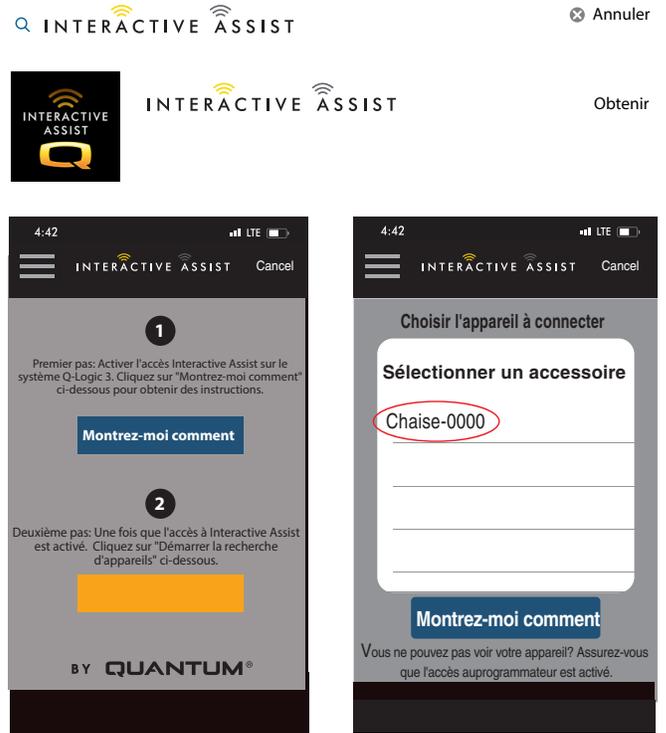

Apple Figure 1. App Store

Écran de démarrage de l'application Interactive Assist

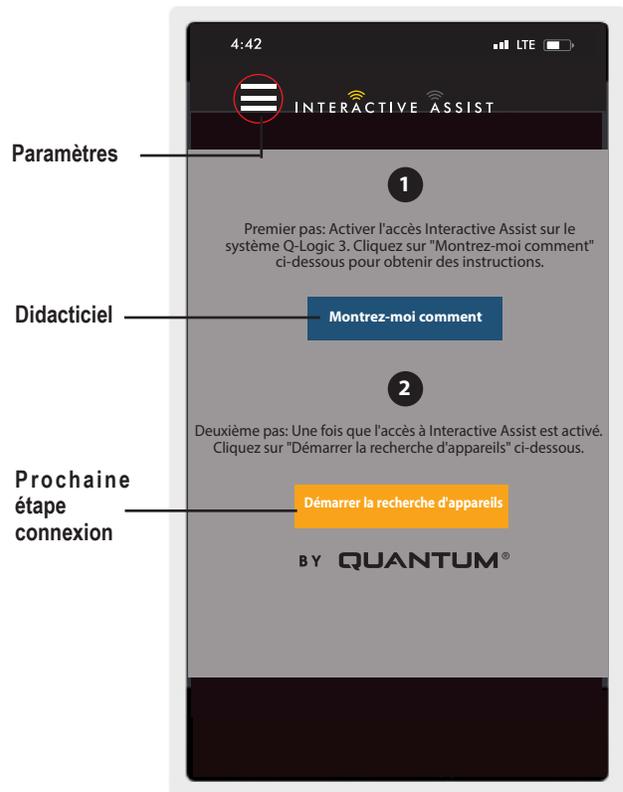


Apple Figure 2. Écran de démarrage

Paramètres

Connexion du fournisseur - Activer / Désactiver

La connexion du fournisseur ajoute un écran à l'écran d'accueil de l'application pour saisir les informations de connexion du fournisseur. La fonction fournisseur uniquement est utilisée lorsque le fournisseur est sur place avec le fauteuil motorisé pour modifier les paramètres du fournisseur.

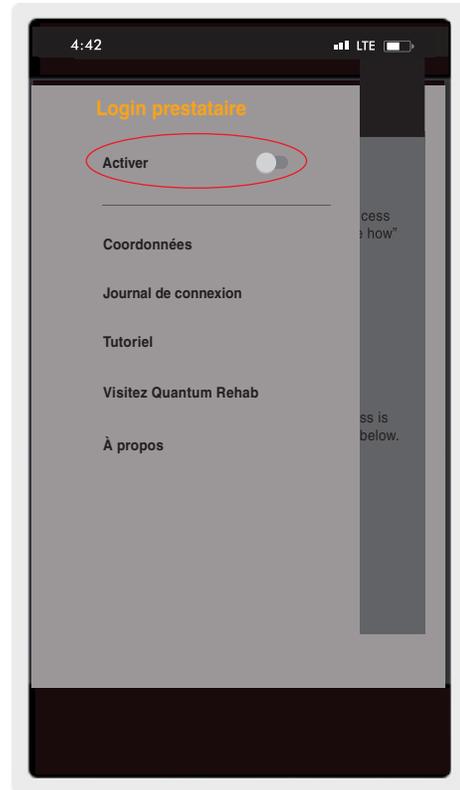

Apple Figure 3. Activer le journal du fournisseur

Informations de contact

- Informations de contact – Nom de l'entreprise du fournisseur
 - Nom du contact – Nom du contact chez le fournisseur
 - Numéro du contact – Numéro de téléphone du contact chez le fournisseur
 - Email du contact – Adresse e-mail du contact chez le fournisseur
 - Nom du client – Nom de l'utilisateur du fauteuil motorisé
- L'application utilise les informations de contact pour les emails directs et les appels au fournisseur.



Apple Figure 4. Informations de contact

Journal de connexion

Affiche les connexions Interactive Assist du périphérique. Cliquez sur "Afficher les détails" pour afficher l'écran de détails des connexions.



Apple Figure 5. Journal de connexion

Didacticiel

Instructions pas à pas sur la manière d'établir la connexion Interactive Assist.



Apple Figure 6. Didacticiel

Sur

Version de l'application Interactive Assist.



Apple Figure 7. À propos

Connexion Apple Interactive Assist avec un accès de revendeur à utilisateur

1. Allumez le système Q-Logic 3 et accédez à l'écran Auxiliary à l'aide de la commande mode.

REMARQUE: Lorsque disponible, accédez à l'écran *Auxiliaire* en utilisant le bouton d'accueil et deux entrées gauche.



Apple Figure 8. Ecran Auxiliaire Q-Logic 3

- Effectuez une entrée vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance "Econ / Interactive Assist", puis effectuez une entrée droite pour activer Interactive Assist.



Apple Figure 9. Econ / Assistant interactif auxiliaire Q-Logic 3

REMARQUE: La case sera cochée si elle est activée, une autre entrée à droite désélectionnera ou désactivera Interactive Assist.

- Notez l'ID en haut de l'écran.



Apple Figure 10. Sélection auxiliaire Econ / Assistant interactif Q-Logic 3

4. Activez l'application Interactive Assist.
5. Cliquez sur "Lancer la recherche de périphériques".



Apple Figure 11. Recherche de périphériques

6. Cliquez sur la chaise qui correspond à l'ID: numéro en haut de l'écran Q-Logic 3.


REMARQUE: Si le fauteuil n'est pas déjà associé au Bluetooth du périphérique Apple, une confirmation d'appariement s'affiche sur l'écran Q-Logic 3 et sur le périphérique Apple. Comparez les codes d'appariement. S'ils correspondent, validez sur le système Q-Logic 3 et sur le périphérique Apple.



Apple Figure 12. Sélectionnez un accessoire


7. Fournissez à votre fournisseur Quantum Rehab les informations sur le canal et le code d'accès pour démarrer la connexion à Interactive Assist.

REMARQUE: Si les informations du fournisseur (voir les informations de contact) ont été saisies, le fournisseur peut recevoir par courrier électronique le canal et le mot de passe ou les appeler directement à partir de cet écran.

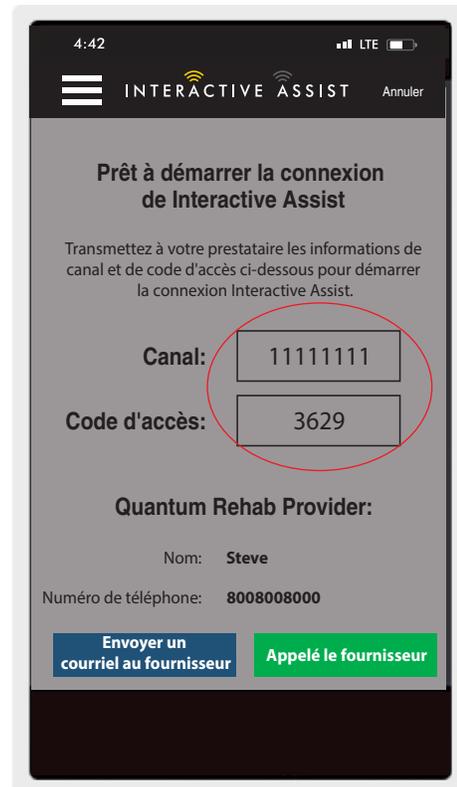


Apple Figure 13. Canal et code d'accès

8. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" entre le canal et le code d'accès, un écran d'accusé de réception apparaît sur le système Q-Logic. Une entrée directe acceptera la connexion Interactive Assist.
9. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" se connecte, l'écran suivant apparaît pour confirmer la connexion Interactive Assist.

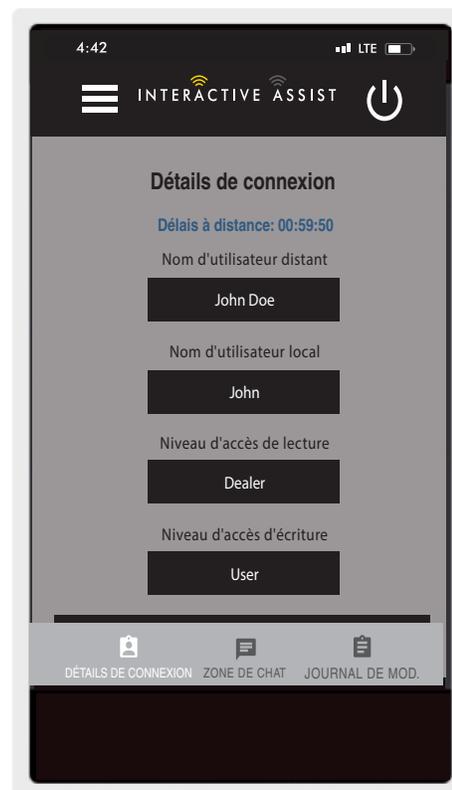

Apple Figure 14. Détail de connexion revendeur à utilisateur


10. Cliquez sur le bouton «Zone de discussion» pour ouvrir une fenêtre de discussion entre l'application Interactive Assist et le Remote Econ-W. Cette fenêtre de discussion peut être lancée à partir de l'application Interactive Assist ou de l'Econ-W. La fenêtre de discussion comprend un bouton «Envoyer une image», pour envoyer des images déjà sur votre appareil, et un bouton «Prendre une photo» pour utiliser l'appareil photo de votre appareil pour prendre et envoyer une photo via la fenêtre de discussion.

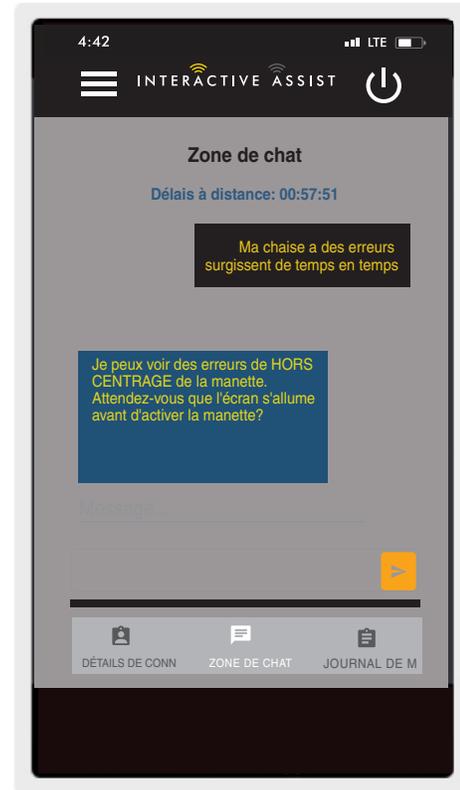

Apple Figure 15. Zone de conversation

11. Cliquez sur le bouton «Modifier le journal» pour afficher les modifications apportées par l'Econ-W à la chaise.

REMARQUE: Le niveau d'accès Interactive Assist détermine le niveau des modifications autorisées.

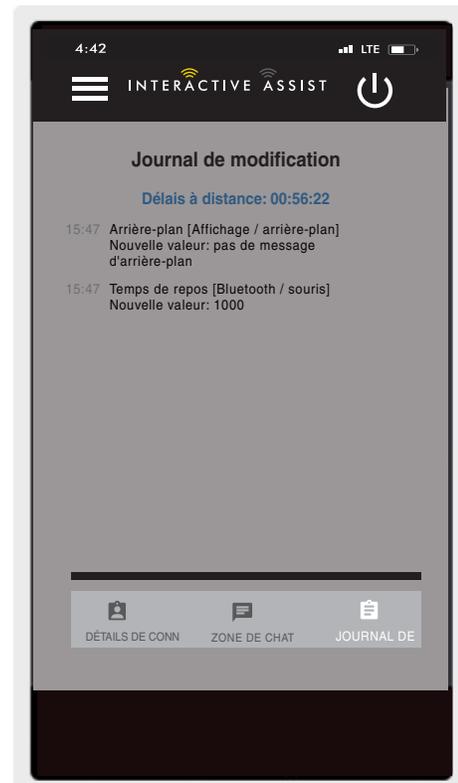

Apple Figure 16. Journal des modifications

Accès fournisseur à fournisseur

1. Allumez le système Q-Logic 3 et naviguez jusqu'à l'écran Aux en utilisant la commande mode.

REMARQUE: Si disponible, naviguez jusqu'à l'écran Aux en utilisant le bouton d'accueil et deux entrées à gauche.

2. Effectuez une entrée vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance «Econ / Interactive Assist», puis effectuez une entrée droite pour activer Interactive Assist.

REMARQUE: La case sera cochée lorsqu'elle est activée. Une autre entrée à droite décochera ou désactivera l'assistance interactive.



Apple Figure 17. Périphérique d'entrée de changement auxiliaire Q-Logic 3




Figure 18. Econ / Assist Interactive Auxiliaire Q-Logic 3

3. Notez l'ID en haut de l'écran.




Apple Figure 19. Sélection Econ / Assist Interactive Auxiliaire Q-Logic 3

-
4. Activez l'application Interactive Assist.
 5. Cliquez sur "Lancer la recherche de périphériques".

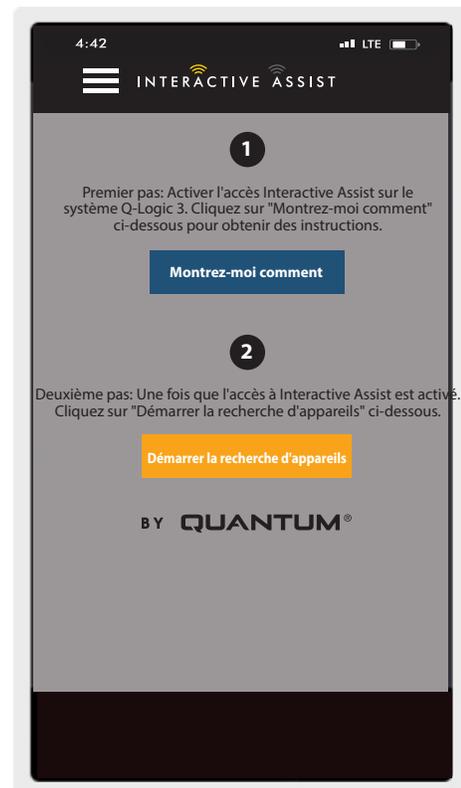

Apple Figure 20. Rechercher des appareils


6. Cliquez sur Connexion du fournisseur pour activer, puis cliquez à nouveau sur le bouton Menu pour fermer la boîte de paramètres.

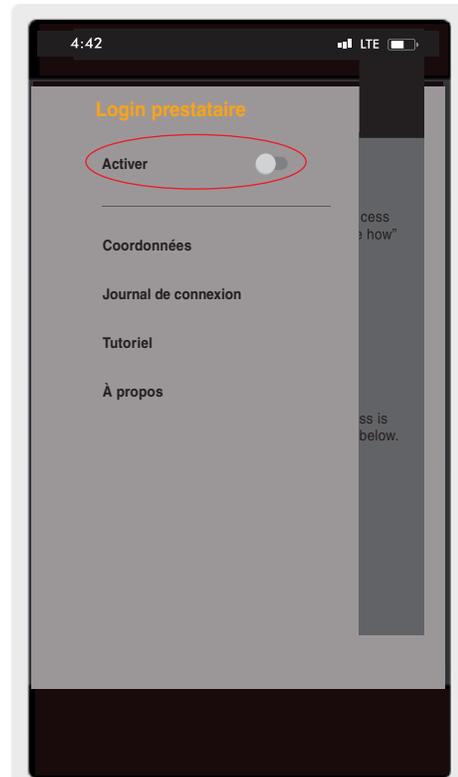

Apple Figure 21. Journal du fournisseur Apple Activer avec le bouton Menu

7. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe (identique à celui utilisé pour Econ-W) du fournisseur avec le fauteuil.

REMARQUE: La connexion à l'application Interactive Assist ne peut pas être identique à la connexion Econ-W.

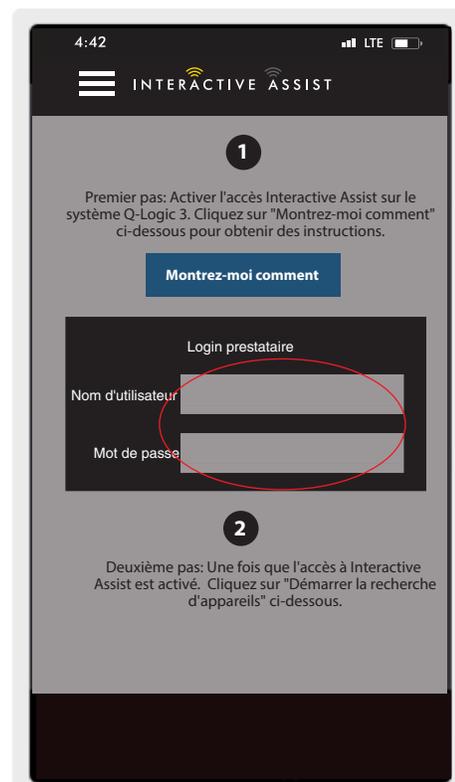

Apple Figure 22. Connexion à la page de démarrage


8. Cliquez sur "Lancer la recherche de périphériques".



Apple Figure 23. Rechercher des appareils

9. Cliquez sur la chaise qui correspond à l'ID en haut de l'écran Q-Logic 3.


REMARQUE: Si le fauteuil n'est pas déjà associé au Bluetooth du périphérique Apple, une confirmation d'appariement s'affiche sur l'écran Q-Logic 3 et sur le périphérique Apple. Comparer les codes d'appariement. S'ils correspondent, validez sur le système Q-Logic 3 et sur le périphérique Apple.

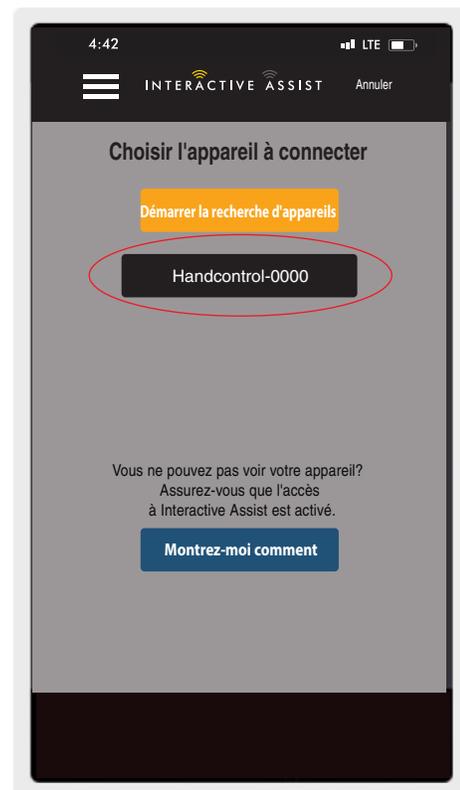

Apple Figure 24. Choisir le périphérique à connecter


10. Fournissez à votre fournisseur Quantum Rehab les informations sur le canal et le code d'accès pour démarrer la connexion Interactive Assist.

REMARQUE: Si les informations du fournisseur (voir les informations de contact) ont été saisies, le fournisseur peut recevoir par courrier électronique le canal et le mot de passe ou les appeler directement à partir de cet écran.

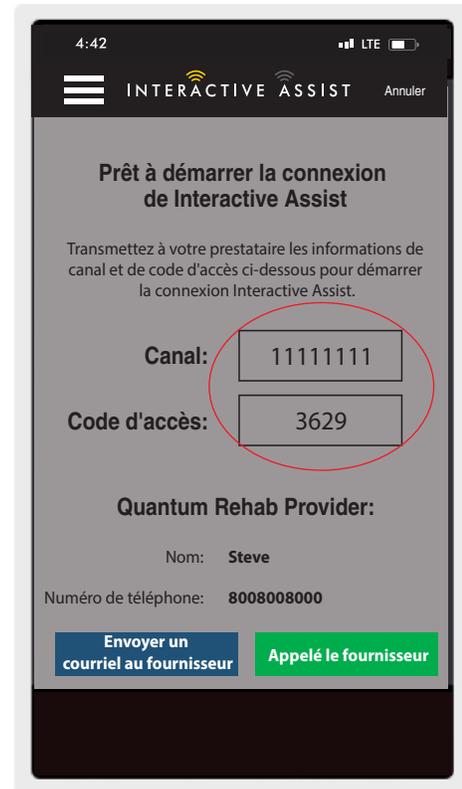

Apple Figure 25. Canal et code d'accès

11. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" entre le canal et le mot de passe, le système Q-Logic 3 requiert une entrée directe pour que l'utilisateur reconnaisse la connexion.
12. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" se connecte, l'écran suivant apparaît pour confirmer la connexion Interactive Assist.

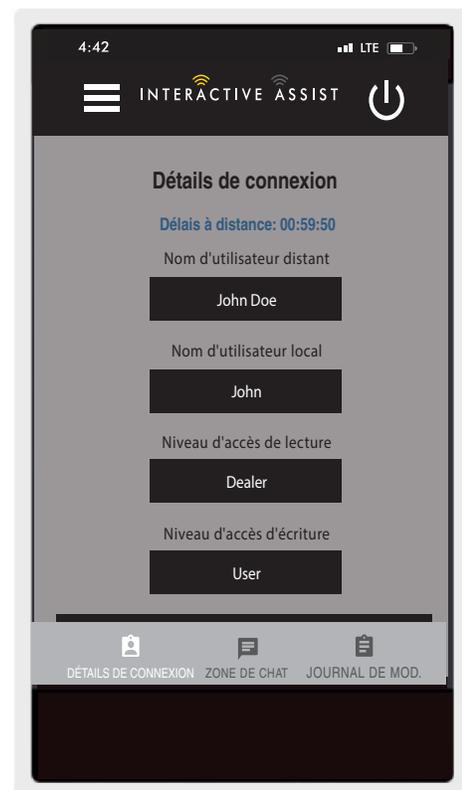

Apple Figure 26. Détail de connexion revendeur à revendeur


**INTERACTIVE ASSIST APP
POUR APPAREILS APPLE
Q-LOGIC 3e**



Application Interactive Assist pour périphérique Apple


L'application Interactive Assist pour un appareil Apple peut être téléchargée via l'App Store. L'application Interactive Assist est compatible avec iOS 9 et les versions ultérieures.

L'application Interactive Assist se trouve dans l'App Store en recherchant "Interactive Assist."

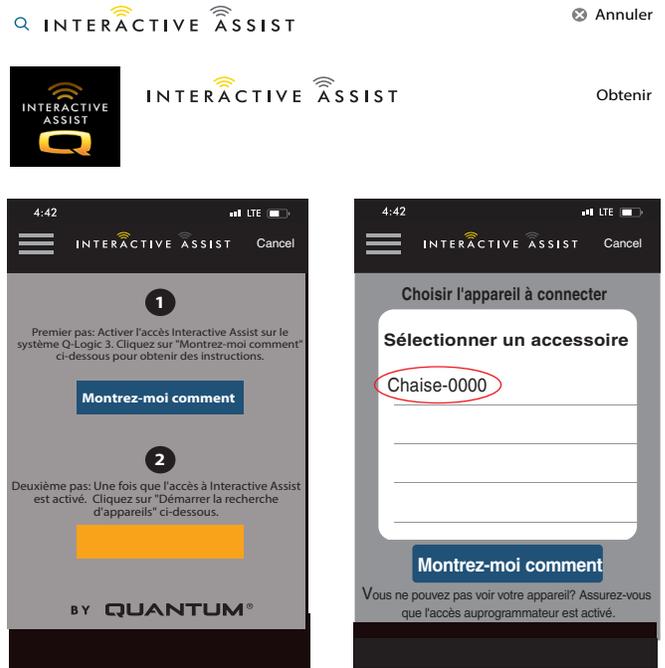

Apple Figure 1. App Store

Écran de démarrage de l'application Interactive Assist

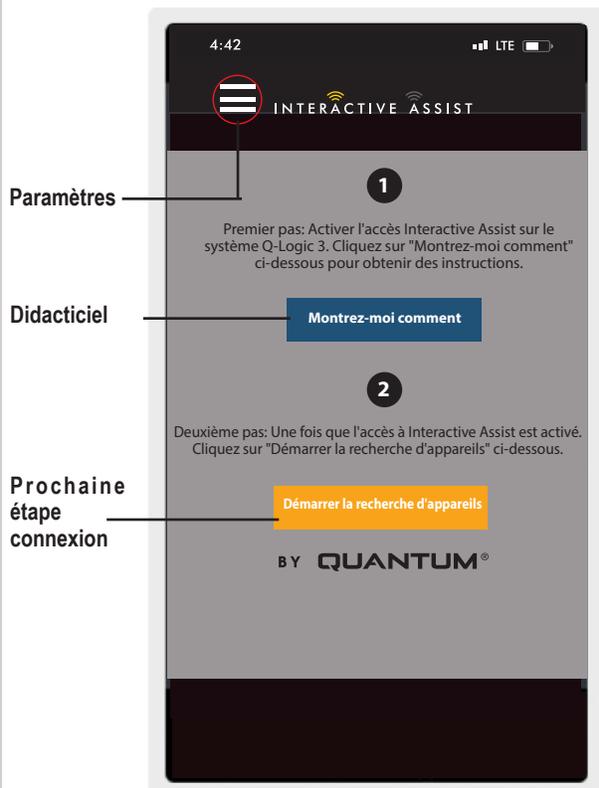


Apple Figure 2. Écran de démarrage

Paramètres

Connexion du fournisseur - Activer / Désactiver

La connexion du fournisseur ajoute un écran à l'écran d'accueil de l'application pour saisir les informations de connexion du fournisseur. La fonction fournisseur uniquement est utilisée lorsque le fournisseur est sur place avec le fauteuil motorisé pour modifier les paramètres du fournisseur.

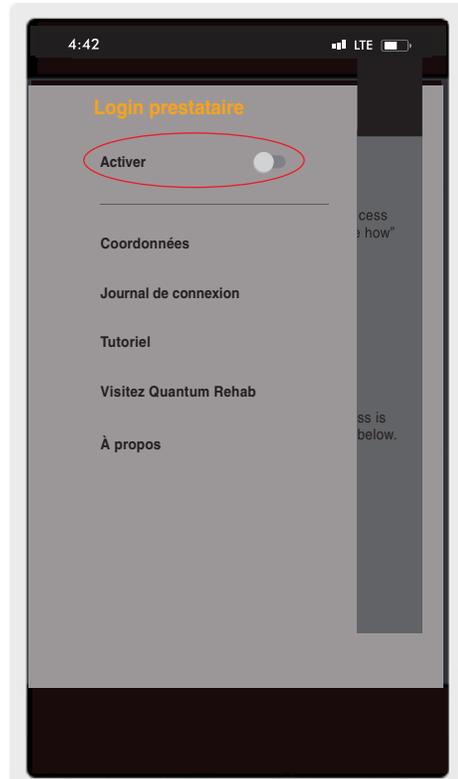

Apple Figure 3. Journal du fournisseur Activer

Informations de contact


- Informations de contact – Nom de l'entreprise du fournisseur
 - Nom du contact – Nom du contact chez le fournisseur
 - Numéro du contact – Numéro de téléphone du contact chez le fournisseur
 - Email du contact – Adresse e-mail du contact chez le fournisseur
 - Nom du client – Nom de l'utilisateur du fauteuil motorisé
- L'application utilise les informations de contact pour les emails directs et les appels au fournisseur.



Apple Figure 4. Informations de contact

Journal de connexion

Affiche les connexions Interactive Assist du périphérique. Cliquez sur "Afficher les détails" pour afficher l'écran de détails des connexions.

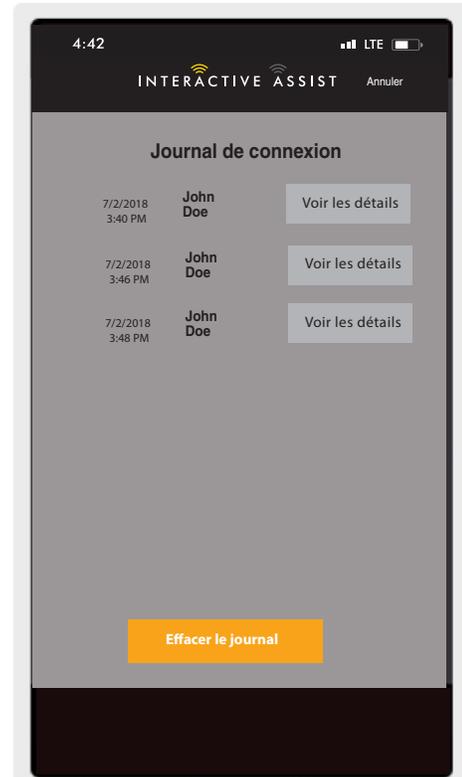

Apple Figure 5. Journal de connexion

Didacticiel


Instructions pas à pas sur la manière d'établir la connexion Interactive Assist.



Apple Figure 6. Didacticiel

Sur


Version de l'application Interactive Assist.

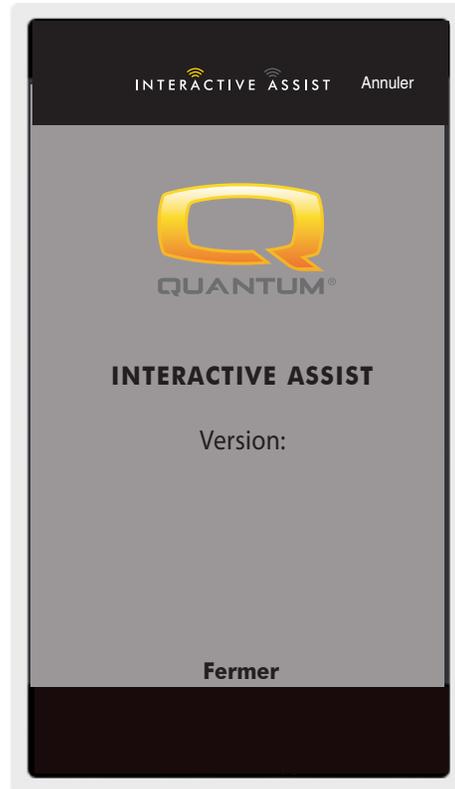

Apple Figure 7. À propos

Connexion Apple Interactive Assist avec un accès de revendeur à utilisateur


1. Allumez le système Q-Logic 3e et accédez à l'écran Auxiliary à l'aide de la commande mode.

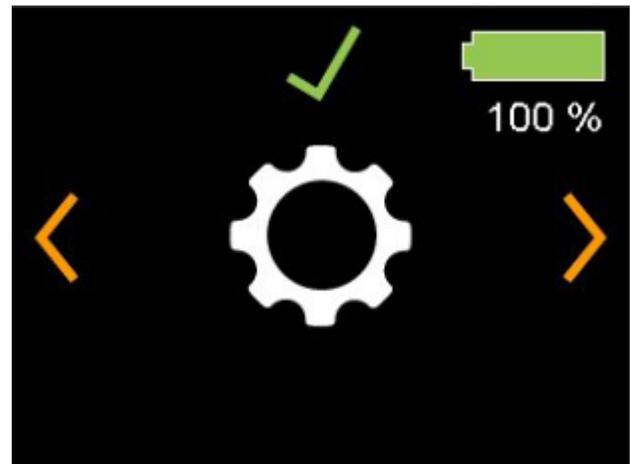

Écran du contrôleur Q-Logic 3e

Apple Figure 8. Ecran Auxiliaire Q-Logic 3

2. Effectuez une entrée droite pour accéder à l'écran Bluetooth. Effectuez une entrée en avant pour activer Bluetooth.

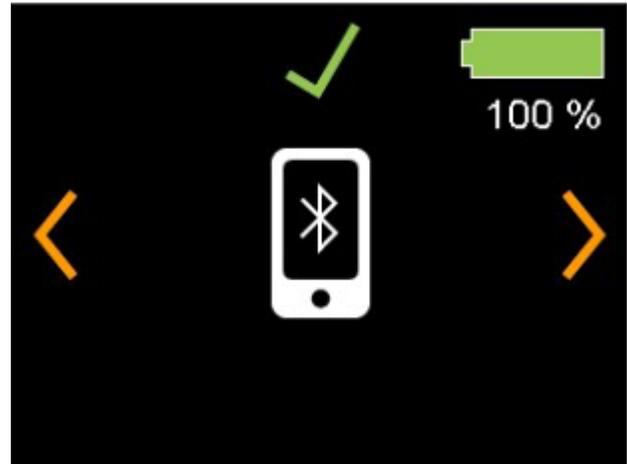

Écran du contrôleur Q-Logic 3e

Android Figure 9. Écran Bluetooth Q-Logic 3e

Notez Le numéro d'identification au bas de l'écran.



Écran du contrôleur Q-Logic 3e

Android Figure 10. Écran Q-Logic 3e activé par Bluetooth

3. Activez l'application Interactive Assist.
4. Cliquez sur "Démarrer la recherche de périphériques".





Apple Figure 11. Recherche de périphériques

5. Cliquez sur la chaise qui correspond à l'ID numéro en haut de l'écran Q-Logic 3.



Apple Figure 12. Sélectionnez un accessoire


REMARQUE: Si le fauteuil n'est pas déjà associé au Bluetooth du périphérique Apple, une confirmation d'appariement s'affiche sur l'écran Q-Logic 3e et sur le périphérique Apple. Comparer les codes d'appariement. S'ils correspondent, validez sur le système Q-Logic 3e et sur le périphérique Apple.

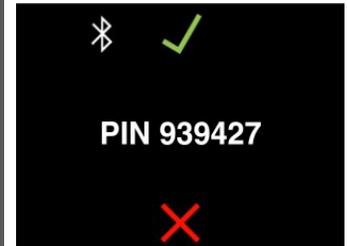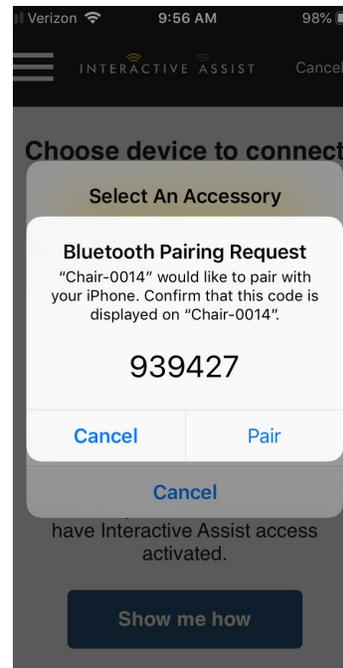

Apple Figure 13. Sélectionnez un Accessoire

6. Fournissez à votre fournisseur Quantum Rehab les informations sur le canal et le code d'accès pour démarrer la connexion à Interactive Assist

REMARQUE: Si les informations du fournisseur (voir les informations de contact) ont été saisies, le fournisseur peut recevoir par courrier électronique le canal et le mot de passe ou les appeler directement à partir de cet écran.

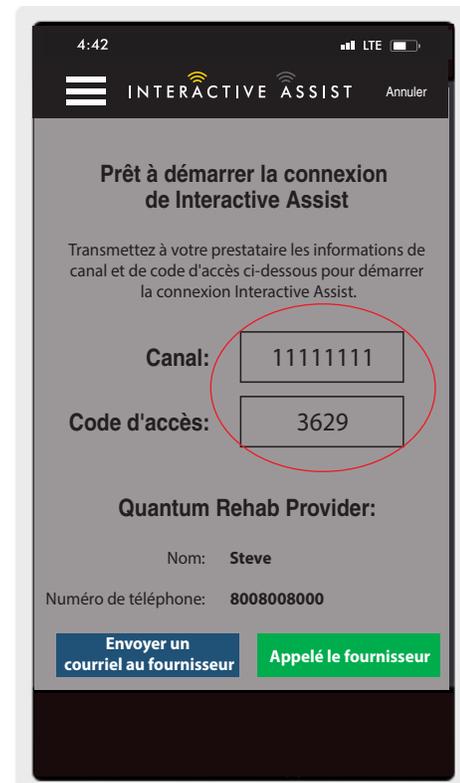

Apple Figure 14. Canal et code d'accès


7. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" entre le canal et le code d'accès, un écran d'accusé de réception apparaît sur le système Q-Logic 3e. Une entrée directe acceptera la connexion Interactive Assist.



Écran du contrôleur Q-Logic 3e


Apple Figure 15. Détail de la connexion

8. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" se connecte, l'écran suivant apparaît pour confirmer la connexion Interactive Assist.

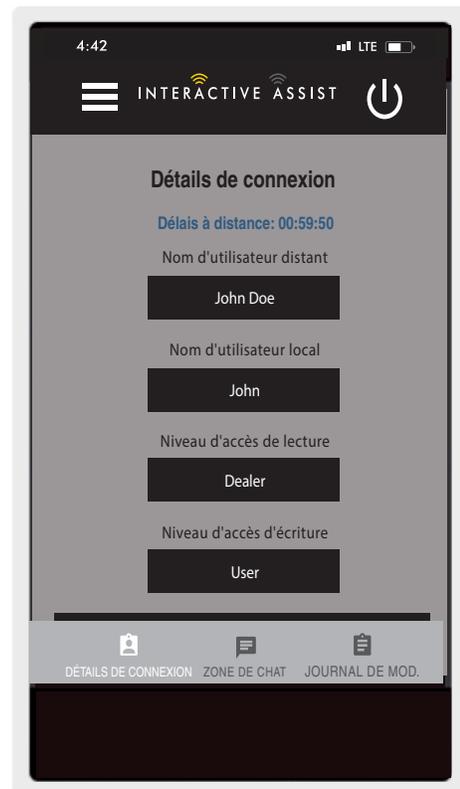

Apple Figure 16. Détail de la connexion

9. Cliquez sur le bouton «Zone de discussion» pour ouvrir une fenêtre de discussion entre l'application Interactive Assist et le Remote Econ-W. Cette fenêtre de discussion peut être lancée à partir de l'application Interactive Assist ou de l'Econ-W. La fenêtre de discussion comprend un bouton «Envoyer une image», pour envoyer des images déjà sur votre appareil, et un bouton «Prendre une photo» pour utiliser l'appareil photo de votre appareil pour prendre et envoyer une photo via la fenêtre de discussion.

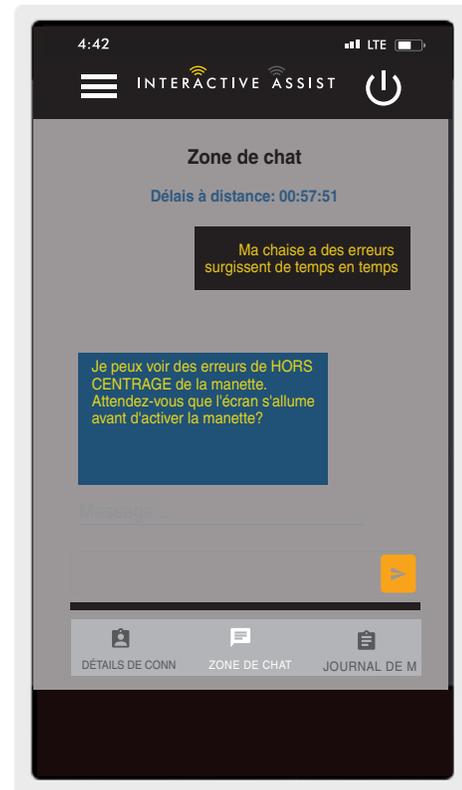


Apple Figure 17. Zone de conversation

10. Cliquez sur le bouton «Modifier le journal» pour afficher les modifications apportées par l'Econ-W à la chaise.

REMARQUE: *Interactive Assist expirera après une heure.*


REMARQUE: *Le niveau d'accès Interactive Assist détermine le niveau des modifications autorisées.*

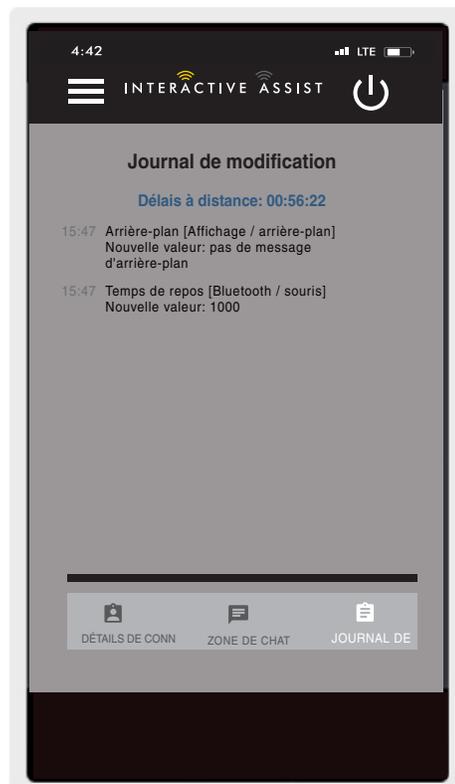

Apple Figure 18. Journal des modifications

Accès fournisseur à fournisseur (fournisseur uniquement)


1. Allumez le système Q-Logic 3e et accédez à l'écran Paramètres à l'aide du bouton de mode.

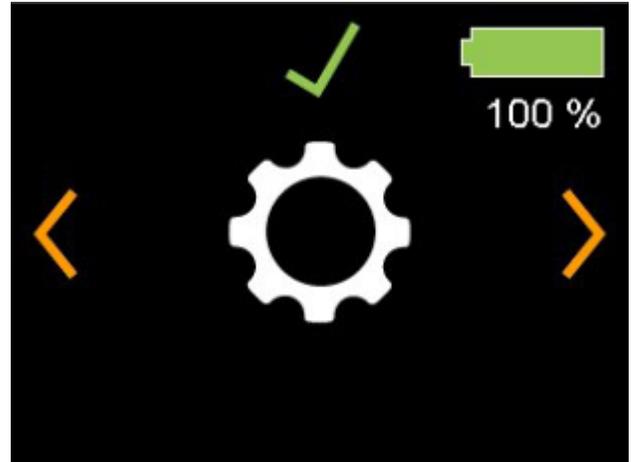

Écran du contrôleur Q-Logic 3e

Android Figure 19. Écran de paramètres Q-Logic 3e

2. Effectuez une entrée droite pour naviguer vers l'écran Paramètres. Exécutez une entrée avant pour activer Bluetooth.

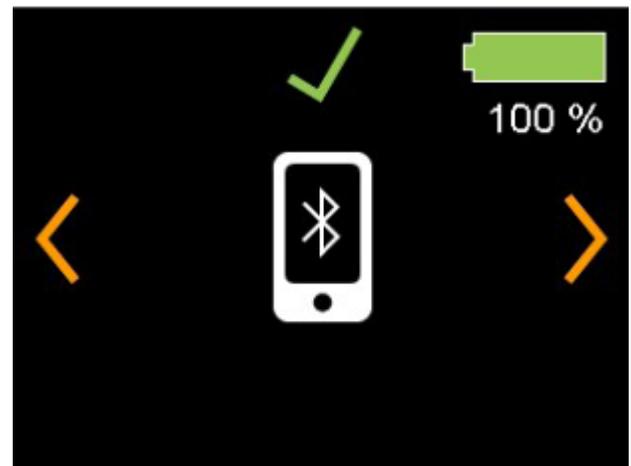

Écran du contrôleur Q-Logic 3e

Android Figure 20. Écran Bluetooth Q-Logic 3e Bluetooth


Notez le numéro d'identification au bas de l'écran.



Écran du contrôleur Q-Logic 3e


Android Figure 21. Écran Q-Logic 3e activé par Bluetooth

3. Activez l'application Interactive Assist.
4. Cliquez sur "Démarrer la recherche de périphériques".

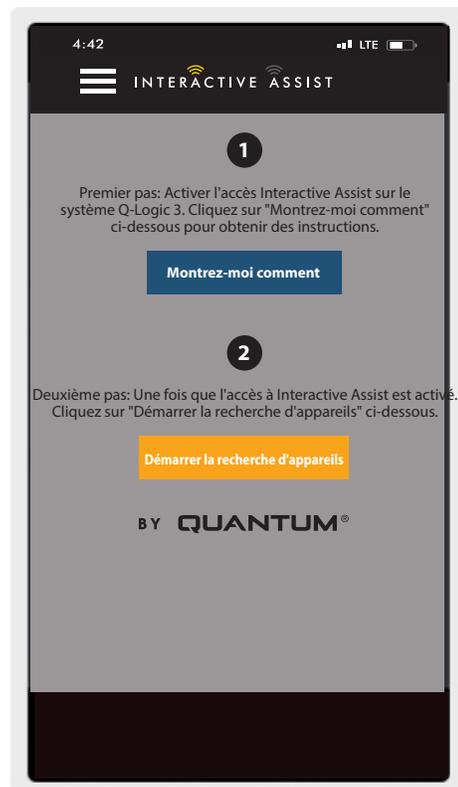

Apple Figure 22. Rechercher des appareils


5. Cliquez sur Connexion du fournisseur pour activer, puis cliquez à nouveau sur le bouton Menu pour fermer la boîte de paramètres.

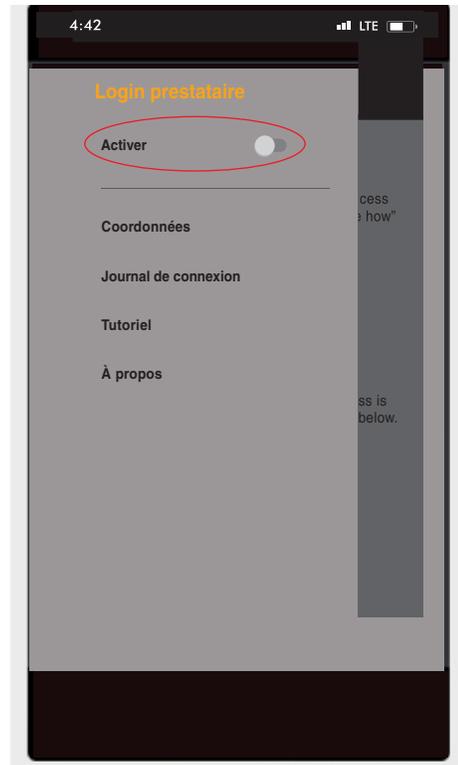

Apple Figure 23. Journal du fournisseur Apple activé


6. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe (identique à celui utilisé pour Econ-W) du fournisseur avec le fauteuil.

REMARQUE: La connexion à l'application Interactive Assist ne peut pas être identique à la connexion Econ-W.

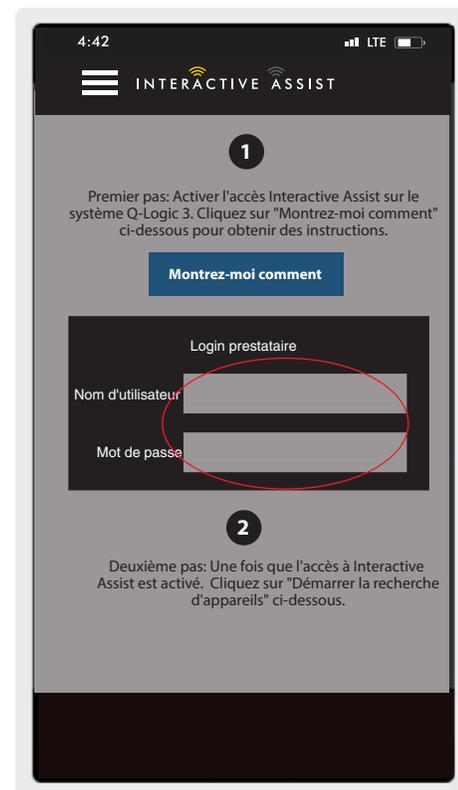

Apple Figure 24. Connexion à la page de démarrage

7. Cliquez sur "Démarrer la recherche de périphériques".

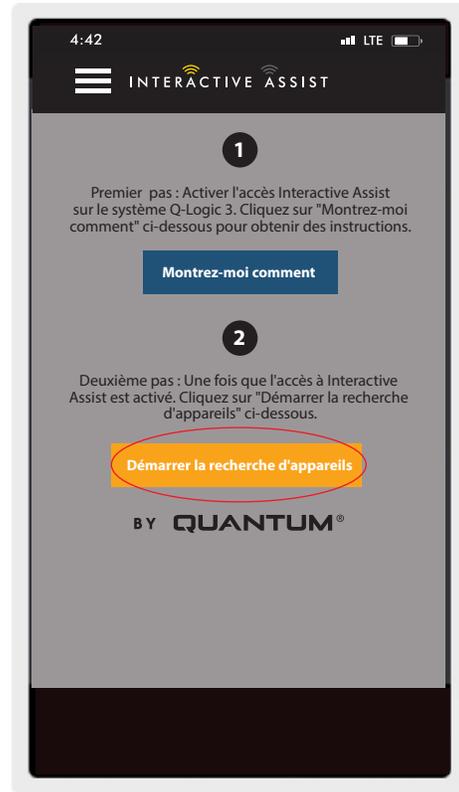



Apple Figure 25. Recherche de périphériques

8. Cliquez sur la chaise qui correspond à l'ID numéro en haut de l'écran Q-Logic 3e.



Apple Figure 26. Sélectionnez un accessoire

REMARQUE: Si le fauteuil n'est pas déjà associé au Bluetooth du périphérique Apple, une confirmation d'appariement s'affiche sur l'écran Q-Logic 3e et sur le périphérique Apple. Comparez les codes d'appariement. S'ils correspondent, validez sur le système Q-Logic 3e et sur le périphérique Apple.

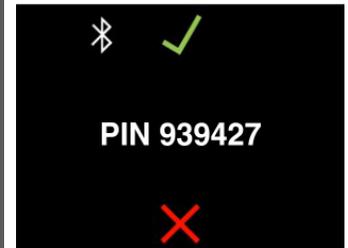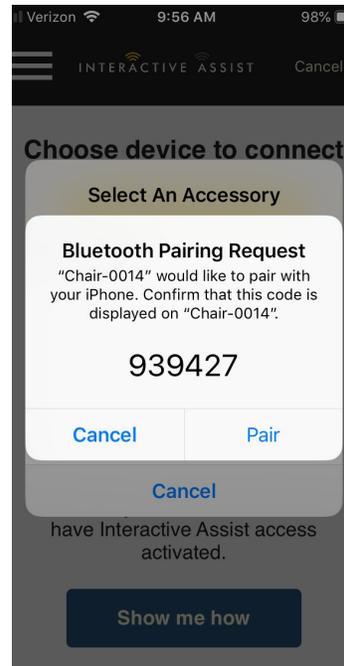

Écran du contrôleur
Q-Logic 3e

Apple Figure 27. Sélectionnez un Accessoire

9. Fournissez à votre fournisseur Quantum Rehab les informations sur le canal et le code d'accès pour démarrer la connexion à Interactive Assist

REMARQUE: Si les informations du fournisseur (voir les informations de contact) ont été saisies, le fournisseur peut recevoir par courrier électronique le canal et le mot de passe ou les appeler directement à partir de cet écran.



Apple Figure 28. Canal et code d'accès


10. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" entre le canal et le code d'accès, un écran d'accusé de réception apparaît sur le système Q-Logic 3e. Une entrée directe acceptera la connexion Interactive Assist.



Écran du contrôleur Q-Logic 3e

Apple Figure 29. Détail de la connexion d'un concessionnaire à un autre

11. Lorsque le "Remote Quantum Rehab Provider" se connecte, l'écran suivant apparaît pour confirmer la connexion Interactive Assist.

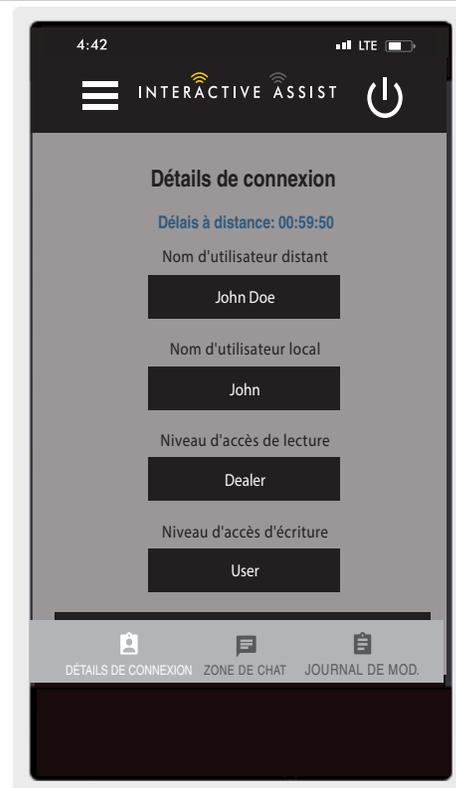

Apple Figure 30. Détail de la connexion revendeur à utilisateur

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.quantumrehab.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
www.quantumrehab.com

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.quantumrehab.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale, Auckland 0600
www.pridemobility.co.nz

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.quantumrehab.co.uk

Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.quantumrehab.eu

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.quantumrehab-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.quantumrehab.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.quantumrehab.es

Germany

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.quantumrehab.de

China

Room 508, Building #4
TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road
Pudong New Area
Shanghai 201318
www.pridechina.cn



I N F M A N U 5 0 4 9