



**VR2**

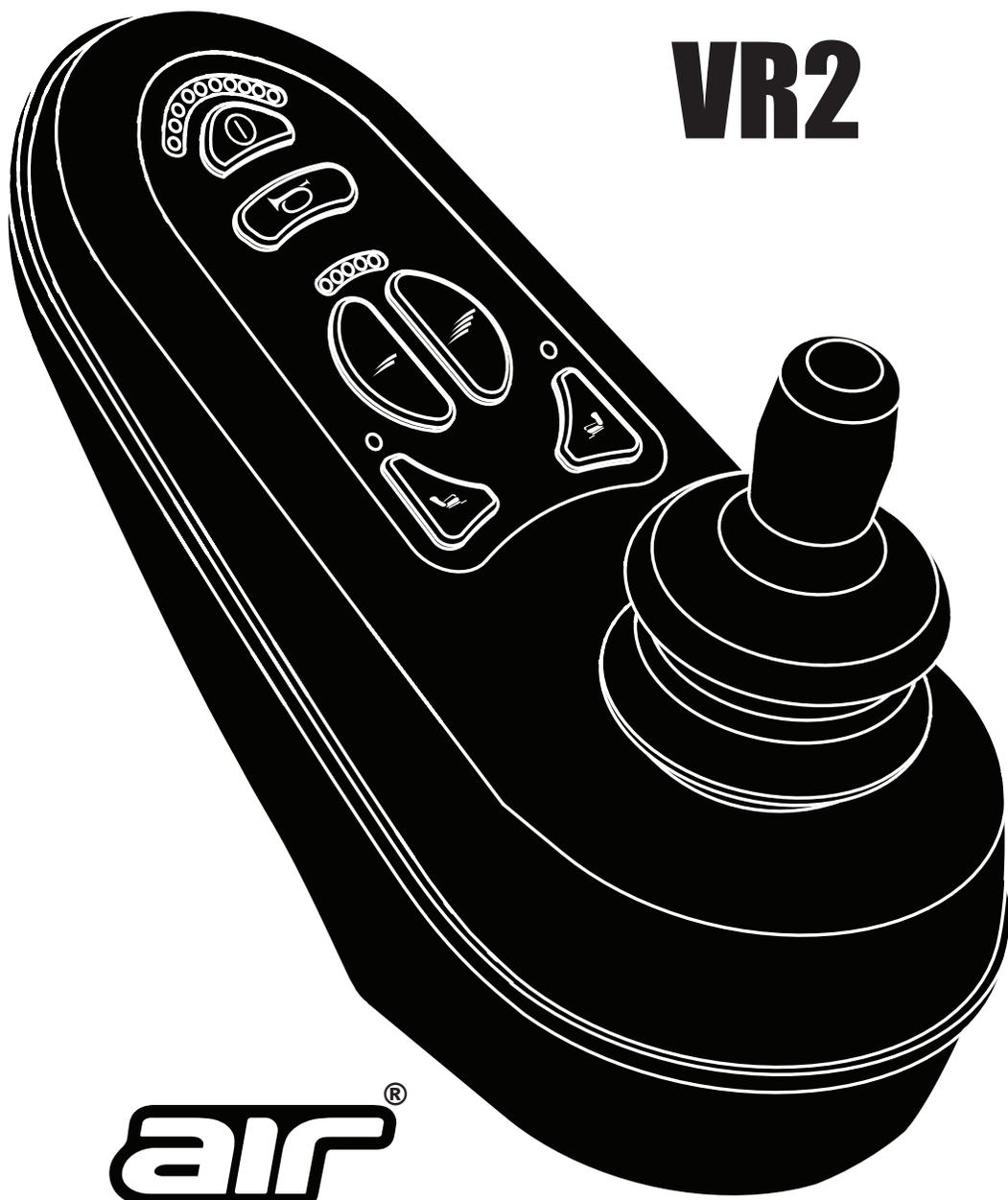

**air**<sup>®</sup>

# Cle 'Identification

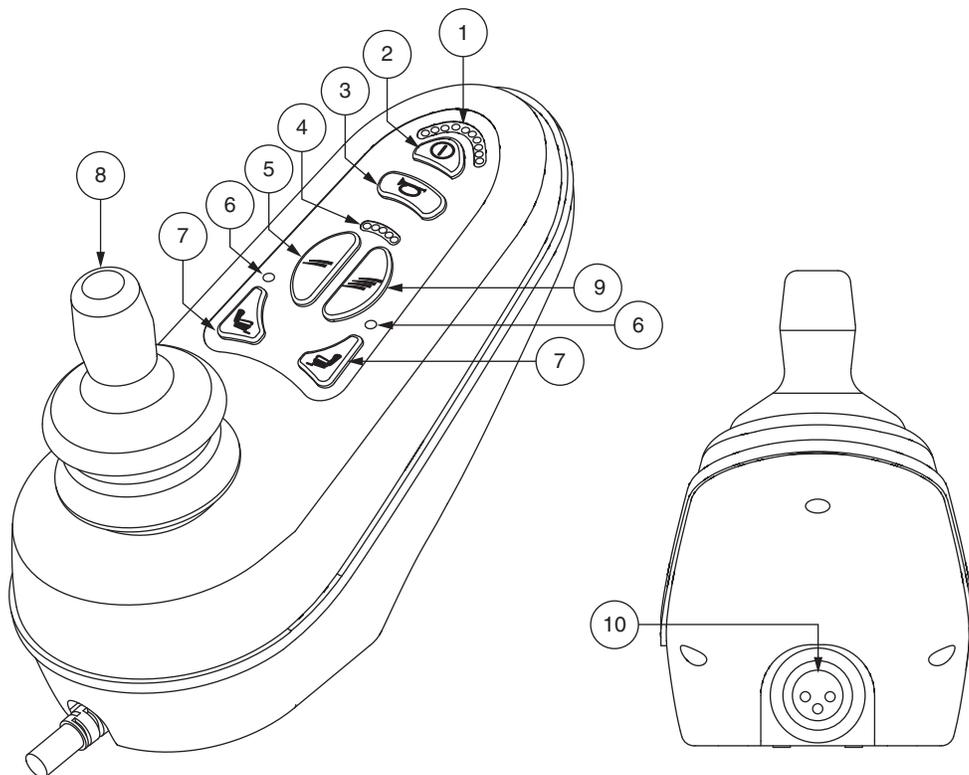

 <b>Contrôleur</b>	 <b>Jauge à batterie</b>	 <b>Clé de contact</b>	 <b>Klaxon</b>
 <b>Vitesse maximale/ indicateur de profil</b>	 <b>Bouton de réduction de la vitesse / profil</b>	 <b>Voyants de «Mode»</b>	 <b>Boutons de l'actionneur</b>
 <b>Manette</b>	 <b>Bouton d'augmentation de la vitesse / profil</b>	 <b>Réceptacle du chargeur</b>	



## Addenda au produit

**REMARQUE:** L'information suivante est un complément à l'information contenue dans les instructions opérationnelles fournies avec votre contrôleur VR2. Elle explique comment utiliser votre système de levage du siège motorisé Jazzy Air. Veuillez conserver ces informations dans vos dossiers et si vous avez des questions, veuillez contacter votre détaillant autorisé Pride.

### Jazzy Air

Votre fauteuil motorisé est équipé d'une fonction qui sera utilisée en conjonction avec votre Jazzy Air. La fonction Jazzy Air est montée sur une base motorisée de Pride pour une meilleure stabilité lorsque le système de siège est élevé.

Il existe certaines situations, y compris des conditions médicales, où l'utilisateur du fauteuil motorisé devra pratiquer à faire fonctionner le fauteuil motorisé équipé de Jazzy Air dans la présence d'une personne d'aide formée à cet effet. Une personne d'aide formée peut être définie comme un membre de la famille ou un professionnel de la santé spécialement formé pour aider un utilisateur de fauteuil motorisé dans diverses activités de la vie quotidienne.

Lorsque vous commencerez à utiliser Jazzy Air durant les activités quotidiennes, vous serez confronté à des situations dont vous aurez besoin d'un peu de pratique. Il suffit de prendre votre temps et vous serez bientôt en mesure d'avoir le contrôle total et vous serez plus confiant.

### Elevation

La fonction Jazzy Air peut être activée en sélectionnant l'actionneur élévateur du siège.

### Pour sélectionner et régler l'élévation du siège à l'aide du contrôleur VR2:

1. Poussez bouton On/Off une fois pour alimenter le contrôleur.
2. Appuyez sur le bouton actionneur jusqu'à ce que les voyants de mode sont allumés.
3. Poussez la manette vers la gauche ou la droite pour faire défiler le mode élévateur de siège l'indicateur de l'actionneur est allumé.
4. Si vous souhaitez revenir à un autre profil, appuyez et relâchez le bouton de l'actionneur jusqu'à ce que vous reveniez au profil d'entraînement souhaité.

**REMARQUE:** Si vos paramètres VR2 sont différents de ceux décrits, contactez votre détaillant autorisé Pride. Votre détaillant autorisé Pride peut avoir changé la programmation de votre contrôleur VR2.

### Pour activer la fonction Jazzy Air en utilisant un interrupteur simple:

1. Appuyez sur l'interrupteur simple une fois pour soulever le siège et activer Jazzy Air.
2. Appuyez sur l'interrupteur simple une fois pour abaisser le siège.

**REMARQUE :** La fonction Jazzy Air est automatiquement activée lorsque le système de levage du siège est activé, et le voyant DEL de vitesse maximale / profil clignote sur votre contrôleur.

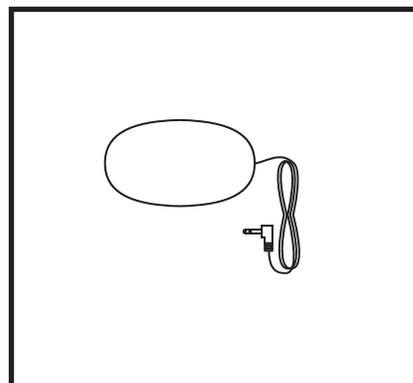


Figure 1. Interrupteur

Le fauteuil motorisé doit être utilisé à l'intérieur sur une surface nivelée, comme les centres commerciaux, les bureaux et/ou les installations médicales afin d'activer Jazzy Air. Une fois que l'actionneur du système de siège a démarré, la fonction Jazzy Air limite le mouvement des roulettes avant et la capacité de montée du fauteuil motorisé.

**MISE EN GARDE!** La fonction Jazzy Air ne doit être utilisée que sur une surface plane, nivelée, intérieure, comme dans les centres commerciaux, les bureaux et/ou installations médicales. Ne jamais élever le siège de sa position la plus basse lorsque vous utilisez votre fauteuil motorisé sur des surfaces accidentées ou inégales. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner le renversement du fauteuil.

**MISE EN GARDE!** La fonction Jazzy air est conçue pour une utilisation limitée en plein airt uniquement sur des surfaces planes, nivelées et dures. Si vous n'êtes pas sûr de votre environnement, n'utilisez pas Jazzy Air à l'extérieur.



**INTERDIT!** Ne jamais utiliser Jazzy Air à l'extérieur sur un terrain accidenté (gravier, collines ou autre terrain qui n'est pas compact) ou dans des champs.



**MISE EN GARDE!** Ne jamais élever le siège dans Jazzy Air lorsque vous utilisez votre fauteuil motorisé sur des surfaces bosselées ou accidentées. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner le renversement du fauteuil.

**MISE EN GARDE:** Toujours attacher la ceinture de positionnement lors de l'utilisation du fauteuil motorisé.


**MISE EN GARDE!** Ne pas activer Jazzy Air ou changer la hauteur du siège de quelque manière que ce soit pendant que votre fauteuil est placé sous un objet fixe, comme une table ou un bureau. Garder l'endroit dégagé avant et pendant le mouvement. Garder l'endroit dégagé avant et pendant le mouvement.

**MISE EN GARDE!** Lorsque les dispositifs de verrouillage de Jazzy Air ne sont pas engagés, une alarme sonore vous avertira et l'indicateur d'état de la batterie affichera et fera défiler 10 barres. La vitesse sera réduite à 25%, lorsque le siège est élevé. Si cette mise en garde apparaît toujours sur une surface plane, veuillez cesser d'utiliser Jazzy Air et consulter votre détaillant autorisé Pride pour l'assistance.

**REMARQUE :** La fonction Jazzy Air est équipée d'un système qui permet au fauteuil motorisé de se déplacer à une vitesse de sécurité prédéterminée, lorsque le siège est élevé. Toujours vérifier pour être sûr que ce système fonctionne correctement avant d'utiliser votre fauteuil motorisé.





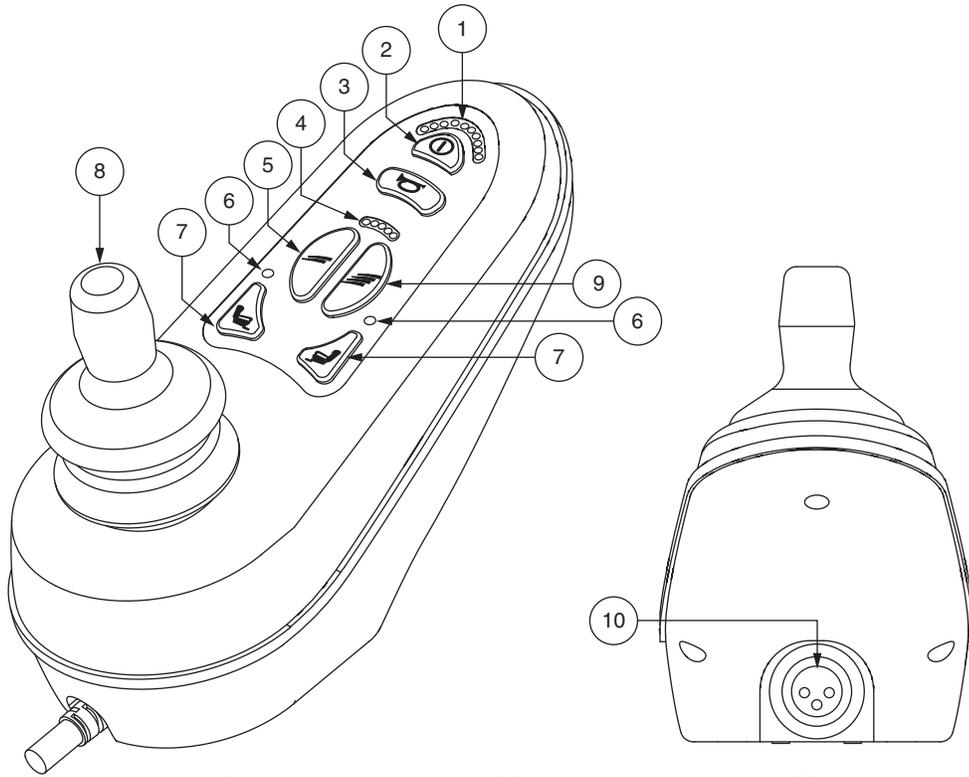

 <b>Contrôleur</b>	<p>1</p>  <b>Jauge à batterie</b>	<p>2</p>  <b>Clé de contact</b>	<p>3</p>  <b>Klaxon</b>
<p>4</p>  <b>Vitesse maximale/ indicateur de profil</b>	<p>5</p>  <b>Bouton de réduction de la vitesse / profil</b>	<p>6</p>  <b>Voyants de «Mode»</b>	<p>7</p>  <b>Boutons de l'actionneur</b>
<p>8</p>  <b>Manette</b>	<p>9</p>  <b>Bouton d'augmentation de la vitesse / profil</b>	<p>10</p>  <b>Réceptacle du chargeur</b>	

## **USA**

401 York Avenue  
Duryea, PA 18642

182 Susquehanna Avenue  
Exter, PA 18643-2694

## **Canada**

5096 South Service Road  
Beamsville, Ontario L0R 1B3

## **UK**

32 Wedgwood Road  
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL  
[www.pride-mobility.co.uk](http://www.pride-mobility.co.uk)

## **Australia**

20-24 Apollo Drive  
Hallam, Victoria 3803  
[www.pridemobility.com.au](http://www.pridemobility.com.au)

## **New Zealand**

38 Lansford Crescent  
Avondale  
Auckland, New Zealand 1007  
[www.pridemobility.co.nz](http://www.pridemobility.co.nz)

## **Italy**

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro  
Loc. Prato della Corte  
00065 Fiano Romano (RM)  
[www.pride-italia.it](http://www.pride-italia.it)

## **B.V.**

Castricummer Werf 26  
1901 RW Castricum  
The Netherlands  
[www.pride-mobility.nl](http://www.pride-mobility.nl)

[www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com)

---

Product Serial #

