


Beipackzettel









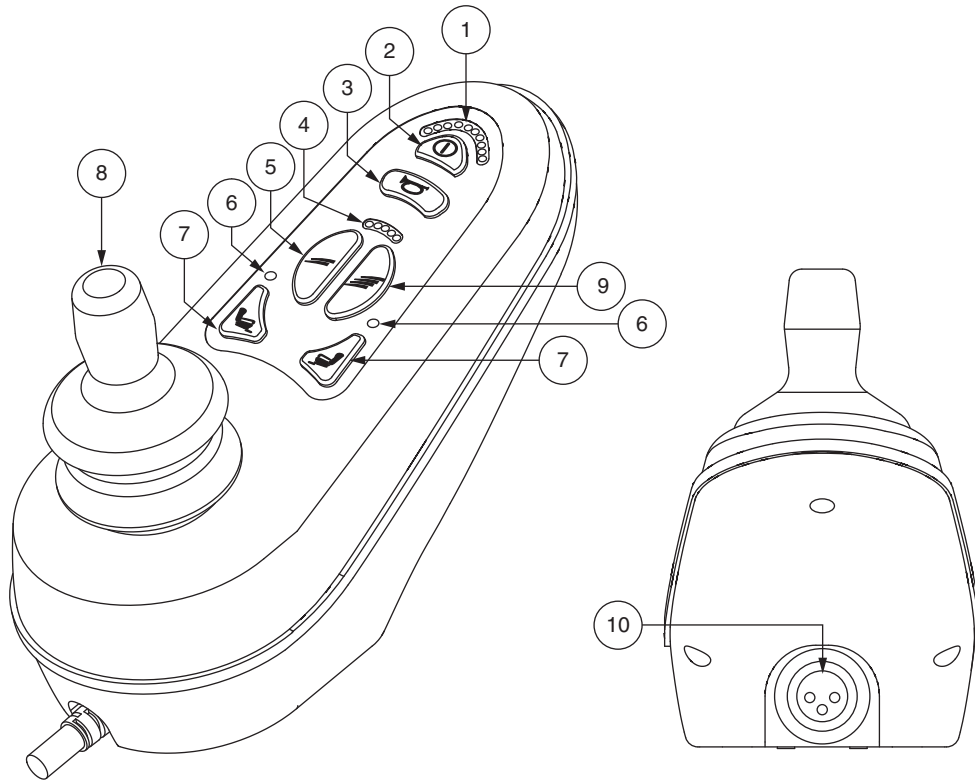


VR2

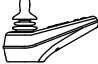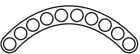

air®

Legende



 Steuerung	 Batterieanzeiger	 An/Aus Taste	 Hupetaste
 Maximale Geschwindigkeit/ Profilindikator	 Geschwindigkeits- /Profilsteigerungstaste	 LED Modus	 Stellantriebstasten
 Joystick	 Geschwindigkeits- /Profilverringernstaste	 Ladegerätanschluss	



Beipackzettel

HINWEIS: Die folgenden Informationen ergänzen die Grundlegenden Betriebsanweisungen, die mit Ihrer VR2-Steuerung bereitgestellt wurden. Hierin wird die Bedienung des höhenverstellbaren Jazzy Air-Sitzes erläutert. Bitte bewahren Sie diese Informationen auf und wenden sich bei Fragen an Ihren Pride-Vertragshändler.

Jazzy Air

Ihr Elektrorollstuhl ist mit einem System ausgestattet, das in Verbindung mit Ihrem Jazzy Air-Sitz eingesetzt wird. Das Jazzy Air-System ist an der Pride-Antriebsbasis angebracht, um bei angehobenem Sitzsystem die Stabilität zu verbessern

In bestimmten Situationen, z. B. bei manchen gesundheitlichen Beschwerden, kann es notwendig sein, dass der Rollstuhlnutzer die Verwendung des mit Jazzy Air ausgestatteten Rollstuhls in Anwesenheit einer entsprechend geschulten Begleitperson übt. Eine ausgebildete Fachkraft kann als ein Familienmitglied oder eine speziell ausgebildete Person definiert werden, das/die dem Benutzer des Stuhls in verschiedenen Aktivitäten des täglichen Lebens zur Seite steht.

Während Sie mit der alltäglichen Verwendung von Jazzy Air vertraut werden, kommt es wahrscheinlich zu Situationen, die einige Übung erfordern. Nehmen Sie sich einfach Zeit und Sie werden bald in voller Kontrolle und zuversichtlich sein.

Höhe

Das Jazzy Air-System kann durch Auswahl des Sitzstellantriebs aktiviert werden.

Auswählen und Anpassen der Sitzhöhe mit der VR2-Steuerung:

1. Drücken Sie die Stellantriebstaste, bis der Sitzbildschirm angezeigt wird.
2. Drücken Sie den Betätigungsknopf, bis die Modus-LEDs beleuchtet werden.
3. Schieben Sie den Joystick nach links oder rechts, um den Höheneinstellungs-Modus zu durchlaufen; dies wird in dem Aktuator Indikator angezeigt.
4. Zum Wechseln zu einem anderen Profil die Stellantriebstaste drücken und loslassen, bis das gewünschte Fahrprofil erreicht wurde.

HINWEIS: Falls Ihre VR2-Einstellungen von den beschriebenen abweichen, kontaktieren Sie Ihren Pride-Vertragshändler. Ihr Pride-Vertragshändler hat die Programmierung Ihrer VR2-Steuerung möglicherweise modifiziert.

Aktivierung von Jazzy Air mit einem Direktschalter:

1. Drücken Sie den Direktschalter einmal, um den Sitz anzuheben und Jazzy Air zu aktivieren.
2. Drücken Sie den Direktschalter einmal, um den Sitz abzusenken.

HINWEIS: Das Jazzy Air-System wird automatisch aktiviert, wenn der elektrisch verstellbare Sitz aktiviert wird, und eine LED an der Maximalgeschwindigkeits-/Profilanzeige blinkt auf Ihrer Steuerung.

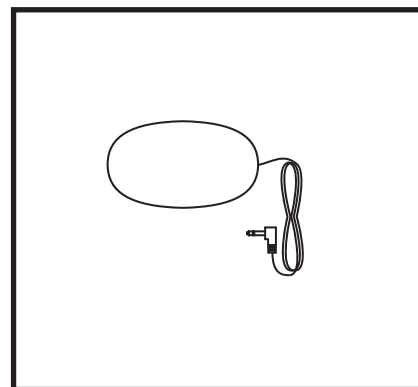


Bild 1. Direktschalt

Zur Aktivierung des Jazzy Air-Systems muss sich der Rollstuhl auf einer ebenen Fläche im Innenbereich befinden, beispielsweise in einem Kaufhaus, Büro oder Krankenhaus. Wenn der Sitzsystem-Stellantrieb gestartet wird, begrenzt Jazzy Air die Bewegung der Schwenkräder vorne und schränkt die Steigefähigkeit des Rollstuhls ein.

WARNUNG! Das Jazzy Air-System darf nur auf flachem, ebenem Untergrund im Innenbereich benutzt werden, beispielsweise in Kaufhäusern, Büros und/oder Krankenhäusern. Auf einer Schrägen darf der Sitz nie über seine niedrigste Position angehoben werden.

WARNUNG! Das Jazzy Air-System ist zur Verwendung im Freien nur in begrenztem Umfang auf flachen, ebenen und befestigten Flächen bestimmt. Wenn Sie mit der Umgebung nicht vertraut sind, verwenden Sie das Jazzy Air System nicht im Freien.



VERBOTEN! Verwenden Sie das Jazzy Air-System niemals auf unebenem Untergrund (Kies, Hügel oder anderer unebener, loser Untergrund) oder in Feldern.




WARNUNG! Heben Sie den Sitz niemals mit Jazzy Air an, wenn Sie sich auf holprigem oder unebenem Untergrund befinden. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann im Elektrorollstuhl führen Umkippen.










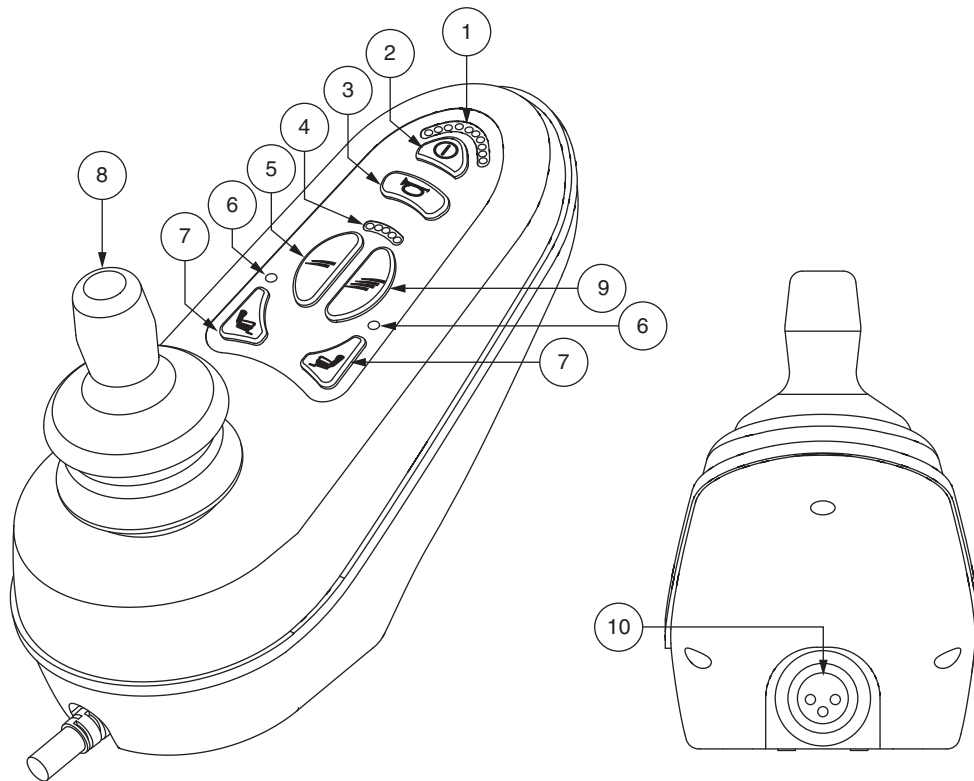

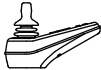WARNUNG! Legen Sie immer den Positionierungsgurt an, wenn Sie den Stuhl benutzen.

WARNUNG! Während sich Ihr Elektrorollstuhl unter einem festen Objekt wie z. B. einem Tisch befindet, dürfen Sie Jazzy Air nicht verwenden und die Sitzhöhe auf keine Weise verändern. Achten Sie vor und während der Bewegung darauf, dass keine Hindernisse vorhanden sind.

WARNUNG! Wenn die Jazzy Air-Sperren nicht aktiviert sind, ertönt ein akustisches Alarmsignal und die Batterieladeanzeige durchläuft 10 Balken. In erhöhtem Zustand wird die Geschwindigkeit auf 25 % reduziert. Wenn diese Warnung auch auf ebenem Grund angezeigt wird, benutzen Sie das Jazzy Air System nicht weiter und wenden sich für Hilfe an Ihren Pride-Vertragshändler.

HINWEIS: Das Jazzy Air-System umfasst eine Funktion, die es ermöglicht, mit dem Elektrorollstuhl bei angehobenem Sitz mit einer vorgegebenen, sicheren Geschwindigkeit zu fahren. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Elektrorollstuhls immer, ob diese Funktion fehlerfrei arbeitet.



 Steuerung	 Batterieanzeiger	 An/Aus Taste	 Hupetaste
 Maximale Geschwindigkeit/ Profilindikator	 Geschwindigkeits- /Profilsteigerungstaste	 LED Modus	 Stellantriebstasten
 Joystick	 Geschwindigkeits- /Profilverringertaste	 Ladegerätanschluss	

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642

182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale
Auckland, New Zealand 1007
www.pridemobility.co.nz

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it

B.V.

Castricum Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands

www.pride-mobility.nl

www.pridemobility.com



I N F I N F B 3 5 0 7