

Q TB-FLEX™

ISTRUZIONI DI BASE



QUANTUM®

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

 **AVVERTENZA!**

Il montaggio iniziale di questo prodotto conformemente alle istruzioni di questo manuale va delegato ad un fornitore della Quantum Rehab o ad un tecnico qualificato.

I simboli qui sotto sono utilizzati in tutto il manuale dell'utente e sono presenti sulla carrozzina elettrica così da permettere l'identificazione di avvisi e informazioni importanti. È molto importante leggere i simboli riportati e comprenderli a fondo.

 **AVVERTENZA!**

Questo simbolo indica una condizione/situazione potenzialmente rischiosa. Non seguendo le procedure indicate si può andare incontro a lesioni personali, o a danni delle componenti del sistema o a malfunzionamenti. Sul prodotto questa icona è rappresentata come un simbolo nero su un triangolo giallo con il bordino nero.

 **OBBLIGATORIO!**

Queste azioni dovrebbero essere compiute così come specificato. Non seguendo tali azioni obbligatorie si può andare incontro a lesioni personali e/o a danni dell'equipaggiamento. Sul prodotto questa icona è rappresentata come un simbolo bianco su un punto blu con il bordino bianco.

 **PROIBITO!**

Queste azioni sono proibite. Sono azioni che non dovrebbero essere mai fatte indipendentemente dal momento e dalle circostanze. Compiendo un'azione proibita si può andare incontro a lesioni personali e/o a danni dell'equipaggiamento. Sul prodotto questa icona è rappresentata da un simbolo nero con un cerchio rosso e una linea obliqua rossa.

Progetto di impiego

Un componente della carrozzina è un dispositivo destinato a scopi medici che è generalmente venduto come parte integrante di una carrozzina, ma che può anche essere venduto separatamente come parte di ricambio.

Utilizzo su prescrizione (valido solo per Stati Uniti)

 **AVVERTENZA!**

ATTENZIONE! La legge Federale limita la vendita del dispositivo su prescrizione di un medico o altro personale certificato a ciò autorizzato dalla legge dello Stato (solo Stati Uniti d'America) o della regione in cui detto personale è abilitato ad esercitare o a prescrivere l'utilizzo del dispositivo.

NOTA: Il presente manuale per l'utente è redatto sulla base delle ultime specifiche tecniche e sulle informazioni del prodotto, disponibili al momento della pubblicazione. Quantum Rehab si riserva il diritto di apportare modifiche qualora fossero necessarie. Qualsiasi modifica apportata ai nostri prodotti può generare lievi differenze tra le illustrazioni e le spiegazioni contenute nel presente manuale ed il prodotto acquistato. La versione più recente del presente manuale è disponibile sul nostro sito web.

NOTA: Questo prodotto è conforme alle direttive ed ai requisiti WEEE, RoHS e REACH.

NOTA: Questo prodotto soddisfa classificazione IPX4 (IEC 60529).

NOTA: Questo prodotto e le sue componenti sono stati fabbricati in lattice di gomma NON naturale. Per qualsiasi accessorio del mercato post-vendita si prega di consultare prima il produttore.



Sommario

Simboli di sicurezza del prodotto	4
Il sistema di postura “TB-Flex™ Seat”	5
Linee guida pre-utilizzo.....	5
Funzioni del sistema di postura “TB-Flex Seat” ..	6
Gamma dei movimenti.....	6
Schienale pieghevole in avanti	7
Braccioli rimovibili TB-Flex.....	7
Braccioli a due perni.....	10
Barre di trasferimento	11
Posizione del joystick	11
Opzione di reclino manuale.....	12
Schienale TB-Flex	13
Montaggio ed uso	13
Pulizia	13
Regolazione del poggiatesta	14
Rimessaggio	14
Cura e manutenzione	14
Garanzia	16



Simboli di sicurezza del prodotto

I simboli sotto riportati sono utilizzati sul sistema di postura per identificare le avvertenze, le azioni obbligatorie e quelle proibite. È molto importante leggere i simboli riportati e comprenderli a fondo.



Leggere e seguire le indicazioni riportate nel manuale dell'utente.



Evitare, laddove possibile, che il prodotto sia esposto a pioggia, neve, ghiaccio, salsedine o ad acqua stagnante. Mantenere e conservare in luoghi puliti e asciutti.




Interferenza ElettroMagnetica (IEM)/ Interferenza in RadioFrequenza (IFR)—Questo prodotto è stato collaudato ed approvato con un livello di immunità pari a 20 V/m.



Portata massima



Sono presenti punti di aggancio/schiacciamento.

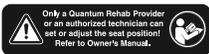

Prima di apportare qualsiasi cambiamento nella configurazione del sistema di postura, consultare il proprio rivenditore Quantum.



Non esporre a fonti di calore come fiamma libera o scintille.



Non fumare



Solo per il rivestimento—Temperatura massima di lavaggio di 60°C



Non mettere in asciugatrice.



Non stirare.



Non candeggiare.



Il sistema di postura “TB-Flex™ Seat”

Il sistema di postura “TB-Flex Seat” è un sistema di seduta unico nel suo genere progettato per le carrozzine elettroniche Quantum. È completamente adattabile ai bisogni individuali dell’utente ed è montato su una base elettronica Quantum allo scopo di garantirne la massima manovrabilità.

Il sistema è fornito con velcri per il fissaggio del cuscino sulla piastra seduta. Questi velcri non devono essere utilizzati con cuscini rivestiti in materiale anti-scivolo perché lo stesso materiale potrebbe essere danneggiato.

La figura 1 fornisce informazioni sulle componenti del sistema di postura “TB-Flex Seat”. Lo schienale TB-Flex è descritto in “Regolazioni di Altezza e Larghezza per lo Schienale TB-Flex” (figura 13). Utilizzare questo diagramma per conoscere la funzione e l’ubicazione di ogni componente prima di usare il sistema di postura “TB-Flex Seat”.

NOTA: Per le informazioni sul joystick e sulle relative operazioni di controllo, fate riferimento al relativo manuale. Se il vostro sistema di postura “TB-Flex Seat” è equipaggiato con un dispositivo di funzionamento differente, fate riferimento al manuale operativo fornito assieme a quel dispositivo e/o al manuale utente della vostra carrozzina elettrica.

Linee guida pre-utilizzo

Prima di mettere in funzione il sistema di postura “TB-Flex Seat”, si prega di leggere quanto segue. Si tratta di linee guida che vi aiuteranno a far funzionare in maniera sicura questo sistema di postura.

- Spegnerne la carrozzina (OFF) prima di sedersi sul sistema di postura “TB-Flex Seat”.
- Fatevi sempre assistere quando siete seduti sul sistema di postura “TB-Flex Seat”.
- Seguite tutte le procedure e prestate attenzione alle avvertenze così come spiegato nel manuale utente della vostra carrozzina elettrica e nella Guida per la Sicurezza del Consumatore.

AVVERTENZA!

Il centro di gravità del vostro sistema di postura è stato impostato dall’azienda in modo da soddisfare le necessità della maggior parte degli utenti. Il vostro rivenditore Quantum ha già collaudato il vostro sistema di postura ed ha apportato tutte le necessarie regolazioni per adattarlo ai vostri requisiti specifici. Non cambiate la configurazione del sistema di postura senza aver prima contattato il vostro rivenditore Quantum.

Se i fissaggi del vostro sistema di postura dovessero allentarsi, si prega di riferire immediatamente questo problema al rivenditore Quantum.

Nell’eventualità di una interruzione nell’alimentazione della carrozzina elettrica, trasferitevi in una posizione sicura e, se necessario, chiedete assistenza. Contattate il vostro rivenditore Quantum immediatamente per riferire l’incidente.

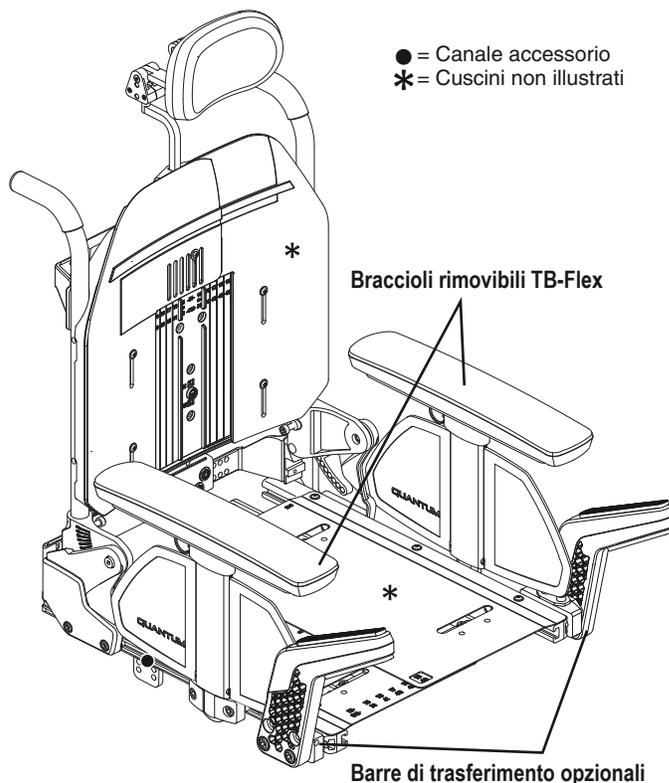


Figura 1. Componenti del sistema di postura “TB-Flex Seat”

AVVERTENZA!

Il vostro sistema di postura non è omologato per essere utilizzato come sedile all’interno di un veicolo. Negli autoveicoli fate uso dei debiti sedili e rispettate le limitazioni per i passeggeri fornite dal produttore del veicolo stesso.

L’azienda Quantum raccomanda vivamente che non fumiate sigarette mentre state seduti sul vostro sistema di postura nonostante quest’ultimo abbia superato i relativi test di collaudo. Se decidete di fumare mentre state seduti sul vostro sistema di postura, dovete seguire scrupolosamente le seguenti linee guida per la sicurezza.

- Non lasciate sigarette accese incustodite.
- Tenete il portacenere a distanza di sicurezza dal sistema di postura.
- Prima di gettarle via, controllare sempre che le sigarette siano completamente spente.

PROIBITO!

Evitare, laddove possibile l’esposizione a pioggia, neve, ghiaccio, salsedine o acqua stagnante. Tenere e conservare il sistema di postura in luogo pulito e asciutto.

OBBLIGATORIO!

Non caricate il sistema di postura oltre la portata massima della vostra carrozzina elettrica e comunque NON oltre il valore di sicurezza di 136 kg.

Le funzioni del sistema di postura "TB-Flex Seat"

Il sistema di postura "TB-Flex Seat" può essere equipaggiato con uno schienale regolabile in larghezza e altezza e può essere dotato di attuatori per la movimentazione elettrica della seduta.

Gamma dei movimenti

Il vostro sistema di postura "TB-Flex Seat" è basculabile sino a 30° può sollevarsi sino ad un massimo di 25,4 cm ed è in grado di reclinare di 85°, che possono raggiungere i 120° se in abbinamento con la basculazione massima di 30°. **Vedere figura 3.**

Il sistema di postura "TB-Flex Seat" è dotato di un sistema di inibizione che impedisce la guida quando lo schienale supera una certa soglia di inclinazione. Un'inibizione completa si attiverà ad un angolo di basculamento programmato impostato all'origine. **Vedere figura 2.**

AVVERTENZA!

Non tentare di bypassare, rimuovere, riprogrammare e/o regolare le inibizioni totali o parziali che sono pre-programmate all'origine. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni.

Prima di attivare le funzioni di basculamento, inclinazione, reclino e/o sollevamento, controllare l'area immediatamente circostante per assicurarsi che nulla rimanga incastrato nel meccanismo di basculamento/reclino. Accertarsi che l'area rimanga libera sia prima che durante il movimento.

NOTA: Non modificare la configurazione del sistema di postura senza aver prima contattato il vostro rivenditore Quantum.

	Inibizione reclino	Inibizione bascula	Inibizione elevazione	Riduzione della velocità ad 1/4 della velocità max	Inibizione guida
Sollevato				X	
Basculato oltre i 20°			X		X
Reclinato oltre i 20°			X		X
Basculato/reclinato oltre 110°	X	X	X		X

Figura 2. Schema dei vari tipi di inibizione

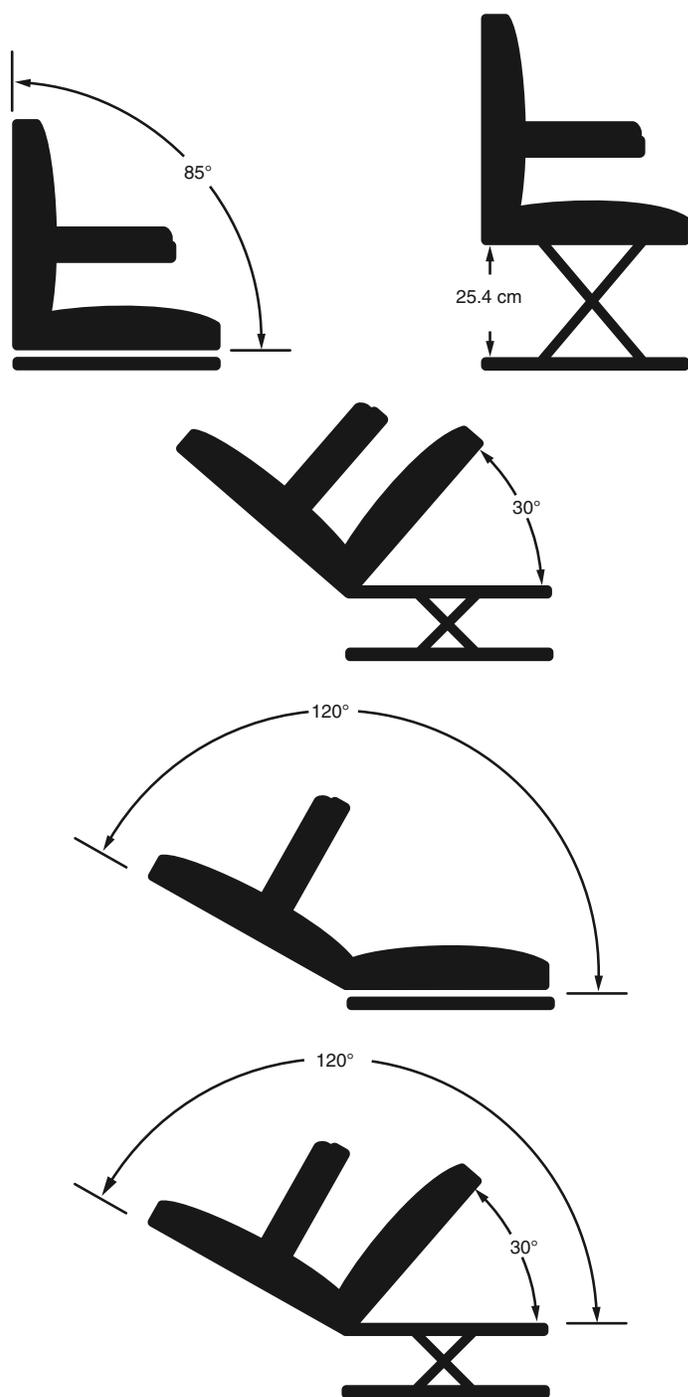


Figura 3. Gamma dei movimenti del sistema di postura "TB-Flex Seat"

Schienale pieghevole in avanti (Opzionale)

Lo schienale pieghevole in avanti permette all'utente di inclinare in avanti lo schienale della carrozzina in modo da facilitarne il trasporto. **Vedere figura 4.** Il vostro sistema di seduta può essere equipaggiato con schienale pieghevole in avanti.

Per piegare in avanti lo schienale:

1. Rimuovere il perno di blocco. **Vedere figura 5.**
2. Piegare in basso lo schienale.

Per riportare lo schienale in posizione verticale:

1. Sollevare verso l'alto lo schienale e posizionarlo verticalmente.
2. Inserire nuovamente il perno di blocco e accertarsi che tutte le componenti siano ben fissate. **Vedere figura 5.**

AVVERTENZA!

Accertarsi che il perno di blocco sia correttamente inserito prima di sedersi sulla carrozzina.

Braccioli rimovibili TB-Flex

I braccioli rimovibili TB-Flex sono disponibili con un sistema di smontaggio a sgancio rapido o con leva. In entrambi i casi possono essere regolati e facilmente rimossi per agevolare la seduta e la discesa dalla carrozzina. La regolazione massima in altezza corrisponde a 12,7 cm con scatti di 2,54 cm. Questo dato si misura partendo dalla superficie della piastra della seduta fino alla parte superiore dell'imbottitura del bracciolo. Il range totale di regolazione in altezza va dai 22,86 ai 35,56 cm.

Per le regolazioni di comodità potreste avere bisogno di quanto segue:

- set di chiavette esagonali metriche
- chiave inglese metrica a punte aperte
- cacciavite Phillips

AVVERTENZA!

Non tentare di sollevare o di spostare la vostra carrozzina elettrica o il vostro sistema di postura afferrandoli dalle parti removibili, qualunque esse siano compresi uno (o entrambi) i braccioli, le pedane e gli attacchi, i cuscini, lo schienale, le scocche o il joystick. Per sollevare o muovere la vostra carrozzina elettrica o il vostro sistema di postura si afferrino esclusivamente le robuste componenti del telaio fisse.

Evitare di appoggiare tutto il vostro peso sui braccioli della vostra carrozzina elettrica e non usare i braccioli come punti di appoggio per sostenere il vostro peso come accade nei trasferimenti. Un uso inappropriato di questo genere può causare il ribaltamento della carrozzina elettrica, con conseguente caduta e lesioni personali.

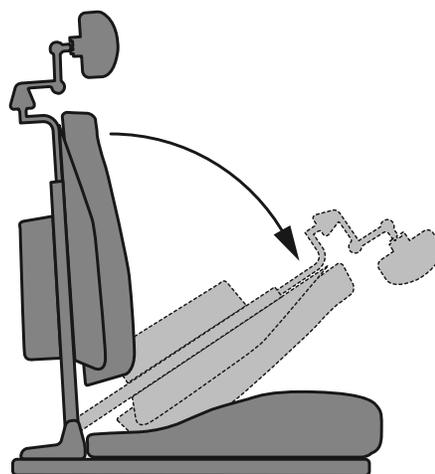


Figura 4. Schienale pieghevole in avanti (sbloccato)

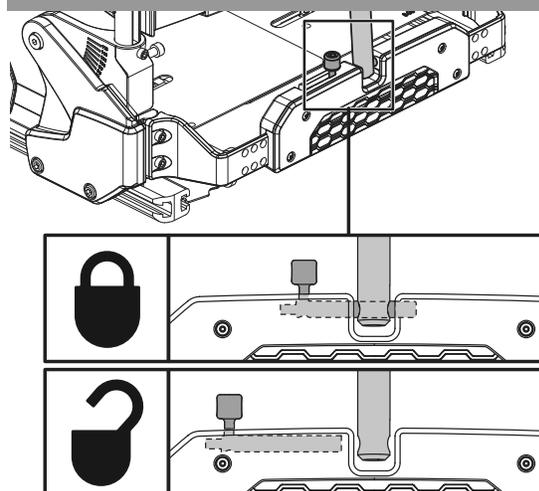


Figura 5. Schienale pieghevole in avanti (perno di blocco)

⚠ AVVERTENZA!

Componenti di questo sistema quali il joystick e i suoi attacchi non sono adeguati a sopportare carichi. Non utilizzare il joystick ed i suoi attacchi come punti di appoggio per il sostegno del vostro peso. Un uso inappropriato di questo genere può causare il ribaltamento della carrozzina elettrica, con conseguente caduta e lesioni personali.

Per rimuovere l'assemblaggio del bracciolo a sgancio rapido:

1. Ruotare la leva del bracciolo in senso antiorario.
2. Sollevare l'assemblaggio bracciolo. **Vedere figura 6.**

Per installare l'assemblaggio del bracciolo a sgancio rapido:

1. Posizionare l'assemblaggio bracciolo all'interno del blocco del bracciolo. **Vedere figura 6.**
2. Ruotare la leva del bracciolo in senso orario.

Per regolare l'altezza:

1. Allentare ma non rimuovere la vite di fissaggio ruotandola in senso antiorario con una chiave esagonale da 2 mm. **Vedere figura 6.**
2. Tirare il perno di arresto. Sollevare o abbassare il bracciolo all'altezza desiderata, quindi rilasciare il perno di arresto.
3. Stringere la vite di fissaggio ruotandola in senso orario con una chiave esagonale da 2 mm.
4. Se necessario ripetere l'operazione anche sull'altro bracciolo.

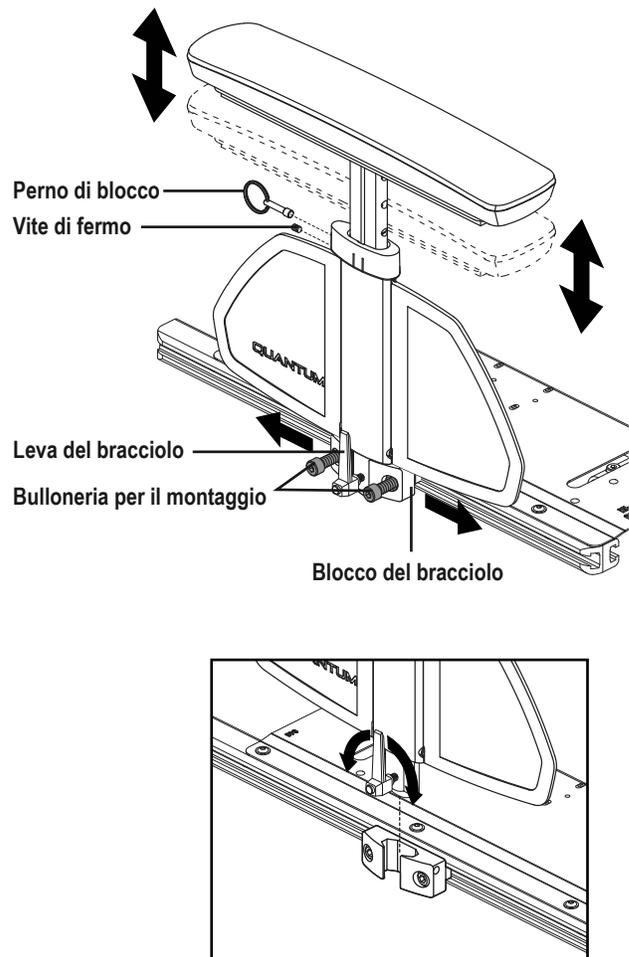


Figura 6. Rimozione/Installazione del bracciolo TB-Flex a sgancio rapido

Per rimuovere l'assemblaggio del bracciolo utilizzando la leva:

1. Ruotare la leva del bracciolo in avanti. **Vedere figura 7.**
2. Sollevare l'assemblaggio bracciolo.

Per installare l'assemblaggio del bracciolo utilizzando la leva:

1. Posizionare l'assemblaggio bracciolo all'interno del blocco del bracciolo. **Vedere figura 7.**
2. Ruotare la leva del bracciolo all'indietro.

Per regolare l'altezza:

1. Allentare ma non rimuovere la vite di fissaggio ruotandola in senso antiorario con una chiave esagonale da 2 mm. **Vedere figura 7.**
2. Tirare il perno di arresto. Sollevare o abbassare il bracciolo all'altezza desiderata, quindi rilasciare il perno di arresto.
3. Stringere la vite di fissaggio ruotandola in senso orario con una chiave esagonale da 2 mm.
4. Se necessario ripetere l'operazione anche sull'altro bracciolo.

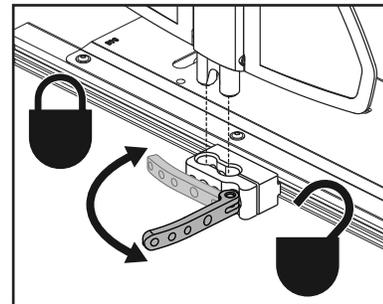
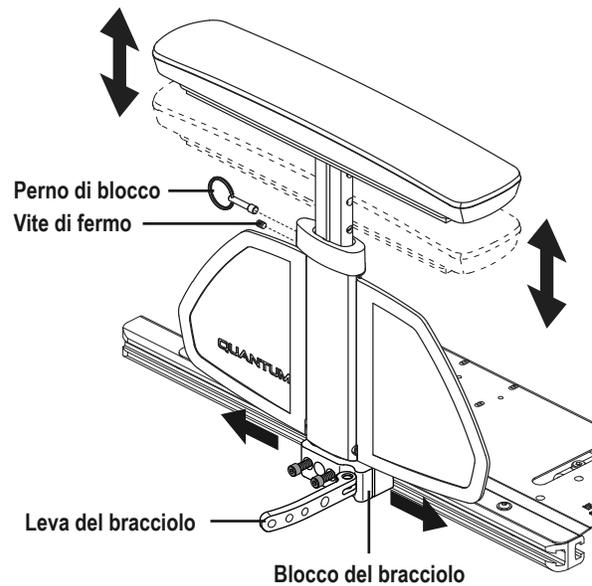


Figura 7. Rimozione/Installazione dei braccioli TB-Flex con la leva

Il bracciolo a due perni (Accessorio)

L'intervallo di regolazione per l'altezza del bracciolo a due perni è di 22,86-33,02 cm con incrementi di 2,54 cm. Questo intervallo viene misurato dalla zona più alta della guida del sedile alla zona più alta del cuscinetto del bracciolo. Per il trasferimento dell'utente, potete anche piegare in alto i braccioli o rimuoverli. **Vedere figura 8.**

Per rimuovere il gruppo bracciolo:

1. Premere in basso la leva a molla e tirare in alto la porzione anteriore del bracciolo. **Vedere figura 8.**
2. Rimuovere il perno di sicurezza dallo schienale del sedile. **Vedere figura 8.**
3. Per rimuovere il gruppo bracciolo, tirare in alto afferrandolo dalla sua parte posteriore.

Per montare il gruppo bracciolo:

1. Posizionare la parte posteriore del bracciolo nella zona posteriore della guida del sedile ed inserire il perno di sicurezza. **Vedere figura 8.**
2. Ruotare verso il basso il gruppo bracciolo.
3. Premere la porzione anteriore del bracciolo nella zona anteriore della guida del sedile e, per bloccarlo in posizione, ruotare la leva a molla in posizione orizzontale.

Per regolare l'altezza del bracciolo:

1. Premere la leva a molla verso l'interno. **Vedere figura 9.**
2. Posizionare il bracciolo, in alto o in basso, all'altezza desiderata.
3. Ruotare la leva a molla verso l'esterno e bloccare il bracciolo in posizione. Se necessario, tirare il bracciolo in alto o in basso così da assicurarsi che sia ben saldo.

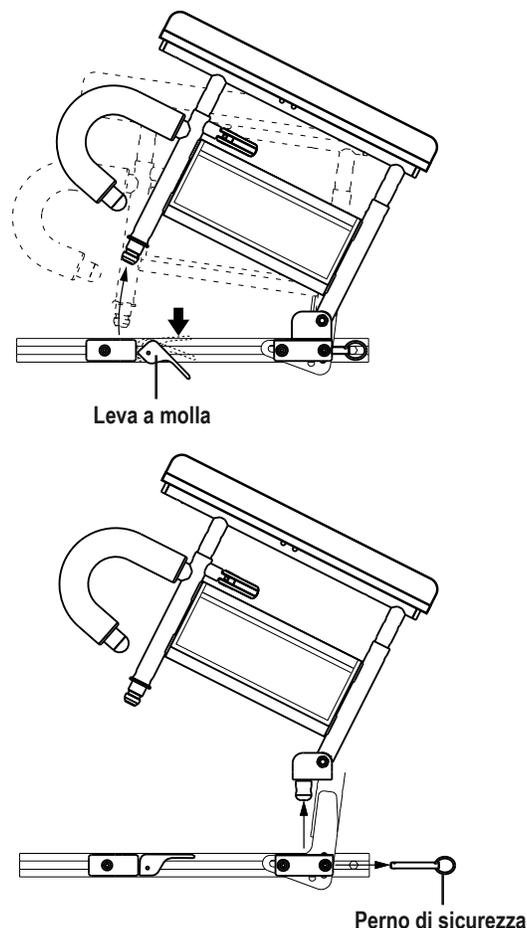


Figura 8. Rimozione e montaggio di un bracciolo a due perni

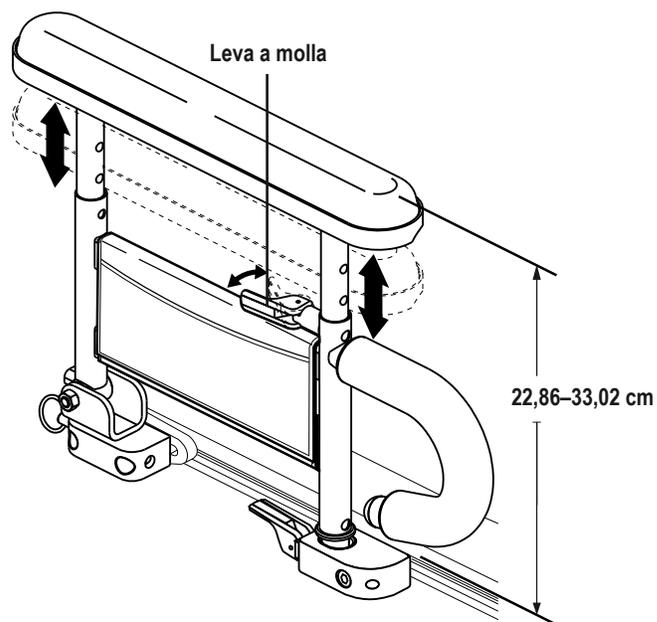


Figura 9. Regolazione dell'altezza di un bracciolo a due perni

Barre di trasferimento (Opzionale)

All'occorrenza sono disponibili delle barre di trasferimento opzionali. Queste barre di trasferimento hanno un design tale da facilitare sia il riposizionamento da seduti nella carrozzina elettrica, sia il trasferimento da e sulla carrozzina. Per maggiori informazioni sui trasferimenti fate riferimento alla Guida per la Sicurezza del Consumatore fornita unitamente al Manuale Utente della carrozzina. **Vedere figura 10.**

Posizione del joystick

Potete posizionare il joystick sia per i destrimani che per i mancini. La distanza mano-joystick può essere regolata direttamente da sotto i braccioli, così come l'altezza.

AVVERTENZA!

Onde evitare che il cavo joystick resti impigliato nelle ruote in movimento, o che si incastri nel telaio del sedile o che si danneggi passando attraverso le porte, fate un uso corretto dei punti di fissaggio appositamente studiati per accogliere il cavo joystick.

Per modificare la distanza mano-joystick:

1. Spegnerne la carrozzina (OFF).
2. Rimuovere la clip che fissa il cavo joystick al bracciolo.
3. Per allentare il morsetto, piegare e poi ruotare la leva di sgancio. **Vedere figura 11.**
4. Per raggiungere la posizione desiderata, far scorrere il joystick avanti o indietro.
5. Per stringere il morsetto, ruotare e poi piegare la leva di sgancio.

Per cambiare l'altezza del joystick:

1. Spegnerne la carrozzina (OFF).
2. Per allentare il morsetto, piegare e poi ruotare la leva di sgancio. **Vedere figura 11.**
3. Regolare il joystick all'altezza desiderata.
4. Per stringere il morsetto, ruotare e poi piegare la leva di sgancio.
5. Portare il cavo del joystick sulla parte posteriore della carrozzina.

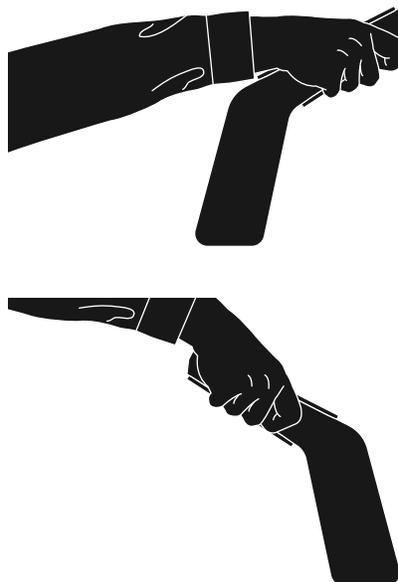


Figura 10. Barre di trasferimento (opzionale)

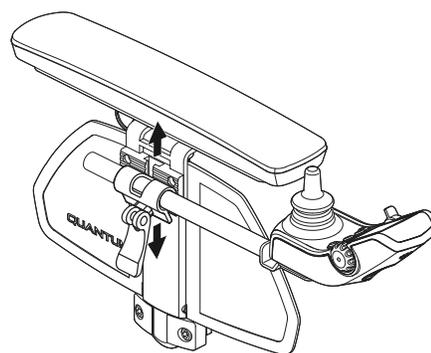
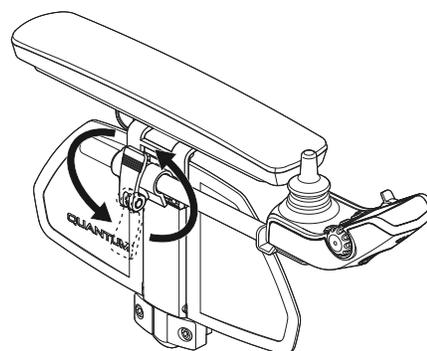


Figura 11. Regolazione dell'altezza del joystick

Opzione di reclino manuale

Se il vostro sistema di postura "TB-Flex Seat" è provvisto dell'opzione di reclino manuale, potete regolare lo schienale ad angoli che vanno dalla posizione di reclino minimo (85° dalla base del sedile) alla posizione di reclino massimo (120° dalla base del sedile). **Vedere figura 12.** Quando il sedile viene reclinato oltre i 110°, la carrozzina va in inibizione completa. Riportando il sedile ad un angolo minore di 110° sarà rimossa l'inibizione.

⚠ AVVERTENZA!

Non reclinare mai lo schienale quando la carrozzina è basculata. Così facendo si richiano gravi lesioni personali. Un sistema di sicurezza previene che possiate basculare il sedile quando lo schienale è reclinato oltre i 110°. Per riattivare la funzione di basculazione del sedile, riportate lo schienale in posizione verticale.

Per reclinare manualmente lo schienale:

1. Afferrare le impugnature nella parte superiore dello schienale.
2. Tenendo premute le leve sotto alle impugnature, reclinare lo schienale nella posizione desiderata. **Vedere figura 12.**
3. Rilasciare le impugnature per bloccare lo schienale nella posizione desiderata.

Regolazione dell'angolazione (opzionale)

Se il vostro sistema di postura "TB-Flex Seat" è provvisto dell'opzione di regolazione dell'angolazione, potete regolare lo schienale ad angoli che vanno dalla posizione di reclino minimo (85° dalla base del sedile) alla posizione di reclino massimo (135° dalla base del sedile). **Vedere figura 13.** Quando il sedile viene reclinato oltre i 110°, la carrozzina va in inibizione completa. Riportando il sedile ad un angolo minore di 110° l'inibizione verrà rimossa.

⚠ AVVERTENZA!

Non reclinare mai lo schienale quando la carrozzina è basculata. Così facendo si richiano gravi lesioni personali. Un sistema di sicurezza previene che possiate basculare il sedile quando lo schienale è reclinato oltre i 110°. Per riattivare la funzione di basculazione del sedile, riportate lo schienale in posizione verticale.

Per regolare lo schienale:

1. Afferrare la cinghia nella parte inferiore dello schienale.
2. Tirare la cinghia per rilasciare lo schienale, e posizionare lo schienale all'angolazione desiderata. **Vedere figura 13.**
3. Rilasciare la cinghia per bloccare lo schienale nella posizione desiderata.

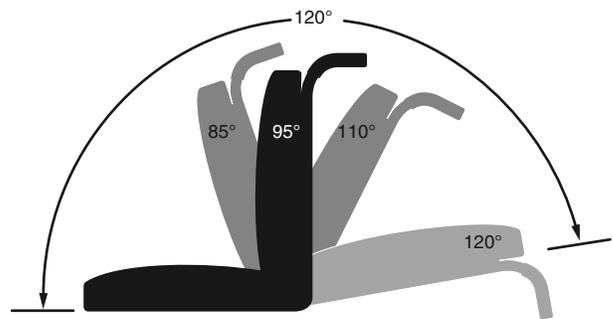


Figura 12. Opzione di reclino manuale—angoli di reclino massimo e minimo

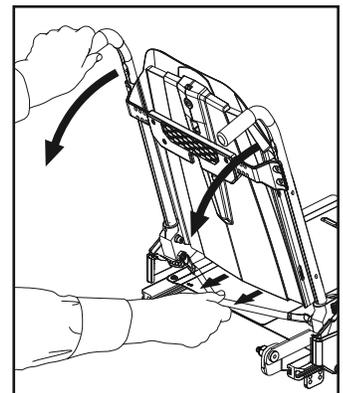
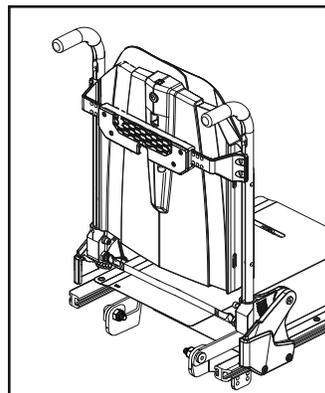
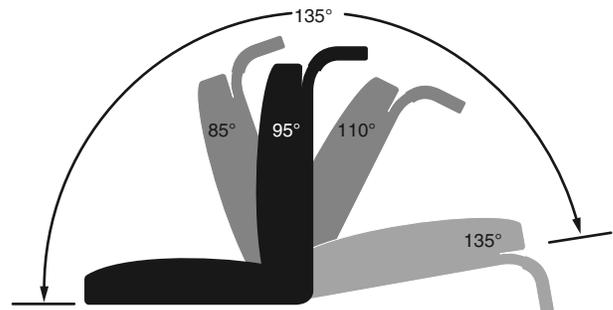


Figura 13. Opzione di regolazione dell'angolazione—angoli di reclino massimo e minimo

Lo schienale TB-Flex (Opzionale)

Lo schienale TB-Flex è regolabile in altezza e larghezza.

Per regolare l'altezza e/o la larghezza dello schienale:

1. Allentare i bulloni. **Vedere figura 14.**
2. Posizionare lo schienale all'altezza e/o larghezza desiderata.
3. Stringere il bulloni.

Montaggio ed uso

Lo schienale TB-Flex è formato da un cuscino schienale e da un supporto lombare che possono essere posizionati come necessario per il comfort ed un corretto posizionamento dell'utente. Sono ancorati allo schienale o con chiusure riutilizzabili in velcro o con viti e dadi.

Come fissare alla carrozzina le componenti della cuscineria TB-Flex:

1. Posizionare il cuscino schienale così che le linguette delle chiusure riutilizzabili in velcro siano rivolte verso lo schienale. Fissare il cuscino allo schienale usando le chiusure riutilizzabili in velcro.

AVVERTENZA!

Le temperature estreme possono influenzare la temperatura delle componenti del cuscino, con conseguente rischio di irritazioni cutanee. Siate cauti qualora la carrozzina elettrica sia utilizzata o tenuta in ambienti soggetti ad escursioni termiche.

Assicuratevi che tutta la bulloneria sia montata e avvitata in maniera appropriata.

Pulizia

Il cuscino schienale può essere pulito con facilità.

AVVERTENZA!

Non usare candeggina per il lavaggio del rivestimento esterno. Così facendo si corre il rischio di danneggiare il rivestimento stesso.

Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per l'uso appropriato del disinfettante e/o detergente prima di utilizzarlo sul prodotto. La mancata osservanza di tali istruzioni può provocare irritazioni cutanee o prematuro deterioramento del rivestimento e/o delle finiture della carrozzina.

Per pulire il rivestimento del cuscino schienale:

1. Rimuovere il cuscino schienale dallo schienale prima staccando le chiusure riutilizzabili in velcro tra cuscino e schienale e, poi, tirando il cuscino verso di sé.
2. Individuare la cerniera lampo alla base del cuscino.
3. Aprire la cerniera del rivestimento e tirare fuori il cuscino.
4. Lavare il rivestimento in lavatrice a temperature uguali o inferiori a 60°C.
5. Far asciugare il rivestimento all'aria aperta.

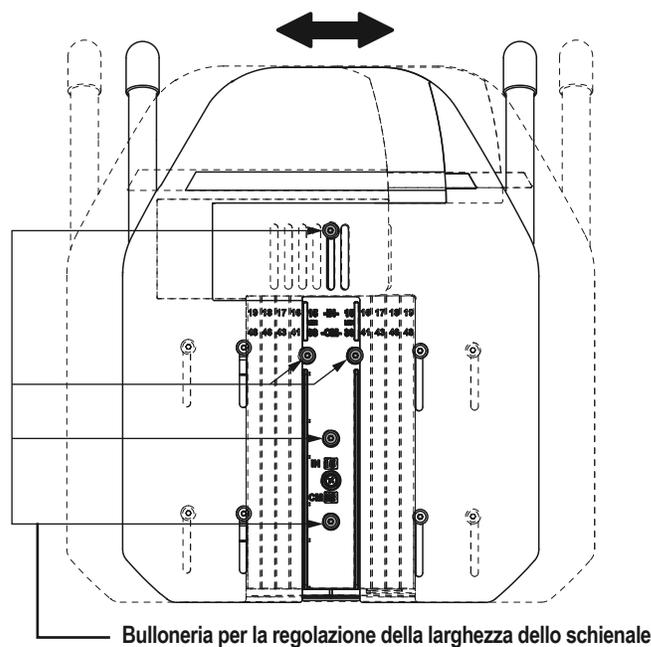
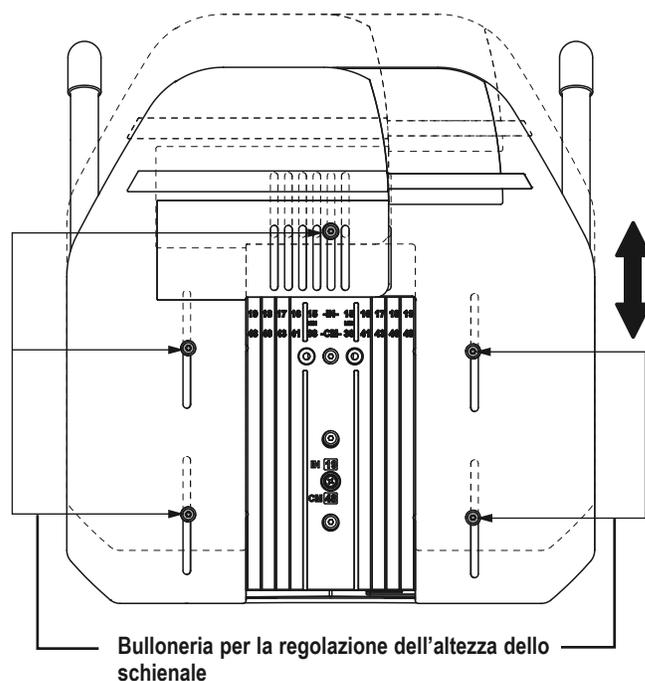


Figura 14. Regolazioni di altezza e larghezza per lo schienale TB-Flex

⚠ AVVERTENZA!

Non utilizzare la candeggina per il lavaggio: ciò potrebbe danneggiare il rivestimento.

Non immergere MAI in acqua il cuscino schienale: ciò potrebbe provocarne il danneggiamento.

Non utilizzare l'asciugatrice per il rivestimento: ciò potrebbe causare il restringimento del rivestimento stesso.

- Una volta che il rivestimento è asciutto, rifoderare il cuscino e posizionarlo sullo schienale in modo tale che le linguette delle chiusure in velcro siano rivolte verso lo schienale stesso. Sistemare il cuscino sopra ogni supporto lombare e poi fissare il cuscino allo schienale facendo uso delle chiusure in velcro.

⚠ AVVERTENZA!

Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per l'uso appropriato del disinfettante e/o detergente prima di utilizzarlo sul prodotto. La mancata osservanza di tali istruzioni può provocare irritazioni cutanee o prematuro deterioramento del rivestimento e/o delle finiture della carrozzina.

Regolazione del poggiatesta

Il poggiatesta può essere regolato con facilità a differenti altezze, profondità e angolazioni.

Per regolare altezza, profondità o angolo del poggiatesta:

- Allentare le viti di regolazione che corrispondono alle regolazioni desiderate. **Vedere figura 15.**
- Regolare il poggiatesta nella posizione desiderata.
- Stringere le viti di regolazione.

NOTA: Una volta che sono state fatte le varie regolazioni e che il poggiatesta si trova nella posizione desiderata, assicuratevi che tutta la bulloneria sia ben avvitata.

⚠ AVVERTENZA!

Non estendere l'altezza globale del poggiatesta a più di 17,78 cm sopra la staffa del poggiatesta stesso.

Rimessaggio

Alcune parti della vostra carrozzina elettrica sono sensibili alle variazioni termiche estreme. Conservate sempre la vostra carrozzina elettrica in ambienti aventi una temperatura compresa tra i -8°C ed i 50°C. È opportuno che venga conservata in luoghi puliti, asciutti e a temperatura ambiente.

Cura e manutenzione

Il vostro ausilio può essere smaltito solo e soltanto conformemente alle disposizioni di legge vigenti a livello locale e a livello nazionale. Per informazioni sulle corrette modalità di smaltimento degli imballaggi del prodotto, delle componenti del telaio in metallo, delle componenti di plastica, di quelle elettroniche, delle batterie e dei materiali in neoprene, silicone e poliuretani, contattate gli uffici del territorio competenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

- Assicuratevi che tutte le viti o i dadi siano fissati in maniera appropriata, senza tuttavia stringerle troppo.
- Per pulire il sistema di postura "TB-Flex Seat", strofinatevi sopra un panno inumidito con acqua e sapone delicato. Asciugare bene prima dell'uso. Per pulire in maniera appropriata il cuscino schienale TB-Flex, seguite le linee guida riportate nella sezione "Schienale TB-Flex" di questo manuale.

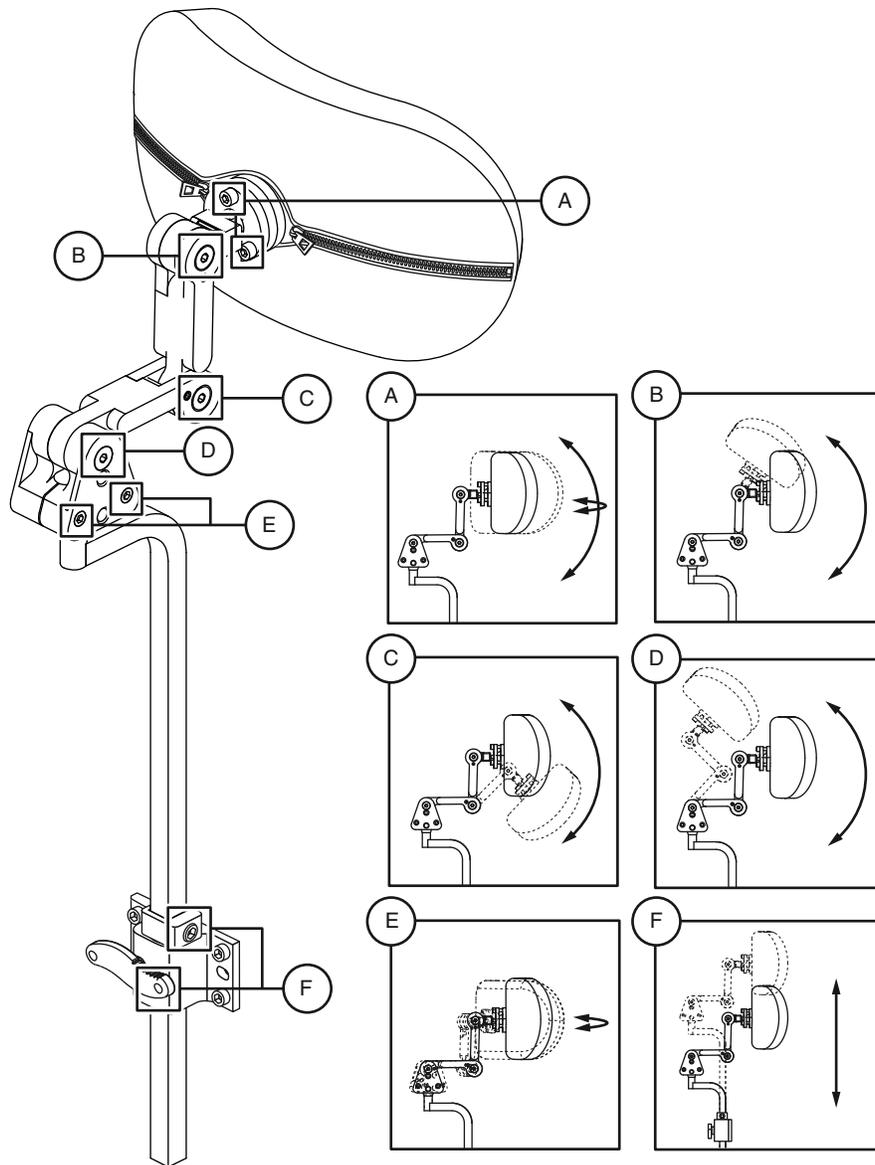


Figura 15. Le componenti di regolazione per il poggiatesta

Garanzia

Garanzia limitata di 2 anni

Per due (2) anni dalla data di acquisto, la Quantum riparerà e sostituirà (a propria discrezione), nei confronti dell'acquirente originale e senza alcun costo aggiuntivo, qualunque delle seguenti parti che, a seguito di un esame da parte di personale autorizzato, risultino difettose per problemi di materiale e/o di fabbricazione:

- Componenti strutturali a carico del telaio
- Parti elettroniche
- Cuscino schienale
- Attuatore elettrico

Il servizio di garanzia può essere effettuato solo tramite un rivenditore Quantum. Non verrà accettato il rientro delle parti difettose se non previo rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal rivenditore Quantum. Tutti i costi di trasporto e quelli conseguenti ad eventuali danni subiti dalle parti durante il trasporto per riparazione o sostituzione sono a carico dell'acquirente originale.

Esclusioni di garanzia

- Rivestimenti e sedili (se non diversamente ed espressamente specificato)
- Riparazioni e/o modifiche a carico di qualsiasi componente senza specifico consenso da parte della Quantum
- Circostanze al di là del controllo della Quantum
- Costi di laboratorio, per chiamate di servizio, per spedizioni e di altro tipo sostenuti per riparare il prodotto qualora questi non siano stati autorizzati specificatamente dalla Quantum
- Danni causati da:
 - Fuoriuscita o perdite di fluidi dalla batteria
 - Abuso, uso improprio, fatti accidentali o negligenza
 - Operazioni, manutenzione o rimessaggio impropri
 - Uso commerciale o uso diverso dal normale

Non esiste altra garanzia esplicita.

Le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità a scopi particolari, sono limitate ad anni uno (1) a partire dalla data di acquisto e nei limiti permessi dalla legge. Sono escluse tutte le altre garanzie implicite.

In quest'ultimo caso le riparazioni sono escluse dalla nostra garanzia. Si esclude la responsabilità per problemi successivi alla data di scadenza di qualsiasi tipo di garanzia descritta sopra.

Alcuni paesi non consentono limitazioni alla durata di una garanzia implicita o non consentono l'esclusione o la limitazione di danni da incidente o di danni consequenziali e per questo la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non essere valida nel vostro caso.

Questa garanzia vi offre specifici diritti; potreste inoltre avere altri diritti variabili da Paese a Paese.



**USA**

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.quantumrehab.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
www.quantumrehab.com

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.quantumrehab.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale, Auckland 0600
www.pridemobility.co.nz

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.quantumrehab.co.uk

Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.quantumrehab.eu

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.quantumrehab-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.quantumrehab.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.quantumrehab.es

Germany

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.quantumrehab.de

China

Room 508, Building #4
TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road
Pudong New Area
Shanghai 201318



I N F M A N U 4 7 4 1