



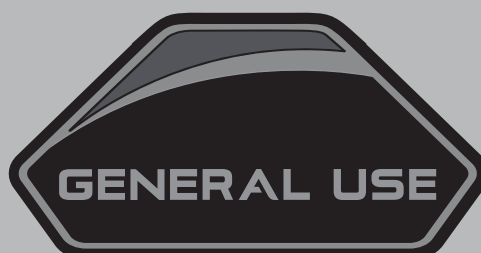

INSTALLATIE EN VERZORGING INSTRUCTIES

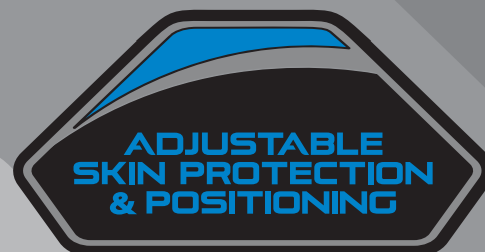

KUSSEN KENMERKEN TABEL

Zitkussen	Buitenste Cover	Vloeistofbestendige Binnenste Cover	Schuimkussen	Schuimvulling	Gelvulling	Wiguitrusting	Gewicht capaciteit in kg (lbs.)		
							159 (350)	204 (450)	298 (650)
Stealth® Simplicity G	x		x				x		
Stealth® Solution® SPP	x	x	x		x		x		
Stealth® Solution® 1 SP	x	x	x		x		x		
Stealth® Spectrum® Gel SPP	x	x	x		x		x		
Stealth® Spectrum® Foam SPP	x	x	x	x					x
TRU-Comfort 2 SPP	x	x-optioneel	x					x	
Essence SPP	x	x-optioneel	x			x-optioneel	x		
Essence Plus SPP	x	x-optioneel	x		x	x	x		

¹ Solution® 1 SPP heeft gel deklagen in plaats van een gelvulling.

² Essence Plus SPP maakt gebruik van gelbekleding (optioneel).

WAARSCHUWING!

Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder benzopyreen, een stof die in de staat Californië bekend staat als kankerverwekkend. Voor meer informatie kunt u terecht op www.P65Warnings.ca.gov.

AANTEKENING: Deze instructies zijn samengesteld volgens de laatste specificaties en productinformatie die beschikbaar waren op het moment van publicatie. Wij behouden het recht om veranderingen aan te brengen wanneer dit noodzakelijk is. Elke verandering aan onze producten kan kleine verschillen veroorzaken tussen de illustraties, de uitleg in deze handleiding en het product dat u hebt gekocht. De nieuwste/meest recente versie van deze handleiding is beschikbaar op onze website.

AANTEKENING: Dit product is conform WEEE, RoHS, en REACH-richtlijnen en vereisten.

AANTEKENING: Dit product voldoet aan de IPX4 classificatie (IEC 60529).

AANTEKENING: Het product en de onderdelen zijn niet vervaardigd uit natuurlijke rubber latex. Raadpleeg de fabrikant betreffende accessoires die later aangebracht zijn.



Inhoudsopgave

Veiligheid Richtlijnen	3
Introductie	4
Het Stealth®/Quantum Kussen	5
Opslag	7
Verzorging en Onderhoud	7
Garantie	7

Veiligheid Richtlijnen

WAARSCHUWING!

Een Stealth®/Quantum® Leverancier of een gekwalificeerde technicus moet de originele setup uitvoeren van dit mobiliteitsapparaat en moet alle procedures uitvoeren volgens deze handleiding.

De onderstaande symbolen worden door de hele handleiding gebruikt en ook op het mobiliteitsapparaat, om waarschuwingen en belangrijke informatie te identificeren. Het is erg belangrijk dat u deze volledig leest en begrijpt.

WAARSCHUWING!

Geeft een potentiële gevaarlijke conditie/situatie aan. Het nalaten van het opvolgen van deze aangegeven procedures kan persoonlijke verwondingen veroorzaken, schade aan de componenten of storing. Op het product wordt dit icoon gerepresenteerd door een zwart symbool op een gele driehoek met een zwarte rand.

VERPLICHT!

Deze handelingen moeten uitgevoerd worden zoals aangegeven. Het niet uitvoeren van verplichte handelingen kan persoonlijke letsels en/of schade aan apparatuur veroorzaken. Op het product staat dit pictogram afgebeeld als een wit symbool op een blauwe stip met een witte rand.

VERBODEN!

Deze acties zijn verboden. Deze acties mogen onder geen enkele voorwaarde op geen enkel moment uitgevoerd worden. Het uitvoeren van een verboden actie kan persoonlijk letsel en/of schade aan het materiaal tot gevolg hebben. Op het product is dit icoon gerepresenteerd als een zwart symbool met een rode cirkel en rode lijn erdoor.

Product Veiligheid Symbolen

De onderstaande symbolen worden op het mobiliteitsapparaat gebruikt om waarschuwingen, verplichte acties en verboden acties te identificeren. Het is erg belangrijk dat u deze compleet leest en begrijpt.



Lees en volg de instructies op van de handleiding



Stel niet bloot aan hittebronnen zoals open vuur of vonken.



Niet roken



Weggooiën en recycling – Neem contact op met uw Stealth/Quantum Leverancier voor informatie over de correcte manier van opruimen en recyclen van uw Stealth/Quantum product en de verpakkingsmaterialen.



Alleen de Cover - Maximum wastemperatuur 140°F (60°C)



Niet centrifugeren



Niet strijken



Geen bleekmiddel gebruiken

Introductie

WELKOM bij Stealth/Quantum Producten. Het product wat u hebt gekocht combineert eersteklas onderdelen, met het oog op **veiligheid**, comfort en styling. Wij zijn ervan overtuigd dat deze ontwerp-kenmerken u de gemakken leveren die u verwacht tijdens uw dagelijkse activiteiten. Als u eenmaal begrijpt hoe u er **veilig** mee kunt werken en hoe u moet zorgen voor uw mobiliteitsapparaat, zou het u jarenlang zorgeloze en probleemvrije werking en service moeten verlenen.

Lees alle instructies, waarschuwingen en aantekeningen in deze handleiding **en volg** ze ook op voordat u probeert uw mobiliteitsapparaat voor de eerste keer te gebruiken. U moet ook alle instructies, waarschuwingen en aantekeningen lezen in alle bijgevoegde instructieboekjes voor de bediening, voorste uitrusting en/of het zitsysteem die bijgesloten zijn bij uw mobiliteitsapparaat, voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Uw **veiligheid** hangt af van het feit dat uzelf, zowel als de leverancier, verzorger of gezondheidszorg professional het in goed overleg en goed geïnformeerd gebruikt.

Deze handleiding moet gebruikt worden samen met de handleiding voor eigenaars die bijgesloten was bij uw stoel. Als er enige informatie is in deze handleiding die u niet volledig begrijpt, of als u meer assistentie nodig hebt voor de setup of het gebruik, neem dan a.u.b. contact op met uw Stealth/Quantum Leverancier. **Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding en die op uw mobiliteitsapparaat staan, kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het mobiliteitsapparaat, inclusief de ongeldig verklaring van de garantie.**

Overeenkomst van de Koper

Door levering van dit product te accepteren, belooft u dat u aan dit product niets zult wijzigen, veranderen of aanpassen, noch enige bescherming, kappen of andere veiligheidsmaatregelen zult verwijderen of inoperabel maken van dit product; falen, weigeren of verzuimen om van tijd tot tijd enige retrofit kits te installeren die voorzien worden door Stealth/Quantum Producten om het veilige gebruik van dit product te verbeteren of te bewaren.

Verzending en Levering

Alvorens uw mobiliteit apparaat te gebruiken, verzeker u ervan dat de levering compleet is, aangezien sommige componenten individueel verpakt kunnen zijn. Als u geen complete levering ontvangt, neem dan a.u.b. onmiddellijk contact op met uw Stealth/Quantum Leverancier. Als er schade is ontstaan tijdens het transport, hetzij aan de verpakking of aan de inhoud, neem dan contact op met het verantwoordelijke leveringsbedrijf of met uw Stealth/Quantum Leverancier.

OPMERKING: Als u ooit uw exemplaar van deze handleiding verliest of kwijtraakt, neem dan gerust contact met ons op en we zullen u met plezier een nieuw exemplaar sturen.

Het Stealth/Quantum Kussen


Onze kussens zijn van labels voorzien om correcte plaatsing op de stoel te verzekeren.

⚠ WAARSCHUWING!

Als u de afgemeten positie verandert die door uw gezondheidszorg professional ingesteld is, kan dat leiden tot afknellen, huid ontvellingen, of doorliggen/decubitus zweren. Hou het kussen in de voorgeschreven positie om veilig, comfortabel gebruik te verzekeren.

Het Stealth/Quantum kussen op de stoel plaatsen:

1. Vind het "Achter Knop" label aan de onderkant van het kussen.
2. Plaats het kussen zodanig op de zitting dat het "Achter Knop" label zich bevindt aan de achterkant van de zitting, met het label naar beneden geplaatst. De ritssluiting van het kussen zit dan aan de achterkant van de zitting. **Zie figuur 1.**

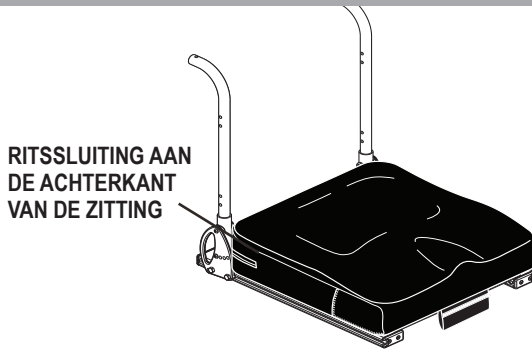

Figuur 1. Plaatsing van het Kussen

⚠ WAARSCHUWING!

Extreme temperaturen kunnen effect hebben op de onderdelen van uw kussen en kunnen huidirritaties veroorzaken. Wees voorzichtig als uw mobiliteitsapparaat in een extreem hete of koude omgeving is gebruikt of opgeslagen.

Het kussen is niet bedoeld voor direct contact met de blote huid. Als u het toch zo gebruikt, kan het resulteren in huidirritatie.


Overschrijd het maximum aangegeven gewicht niet zoals vermeld is in de handleiding van uw mobiliteitsproduct of op de Kenmerken Tabel van Stealth/Quantum Kussens op blz. 2, gebruik de minste waarde.

De Wiguitrusting


Wiggen kunnen georiënteerd worden op een manier die de eindgebruiker toelaat zijn of haar positie te roteren om zo plaats te bieden aan het bekken.

Indien wiguitrustingen nodig zijn voor meer contour, zijn ze beschikbaar in lage, medium en grote profielen. **Zie figuur 2.**


OPMERKING: De wiggen links en rechts zijn opgenomen in een wig set.

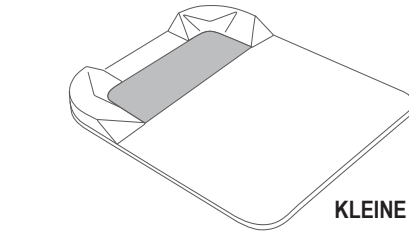

KLEINE PROFIELWIGS

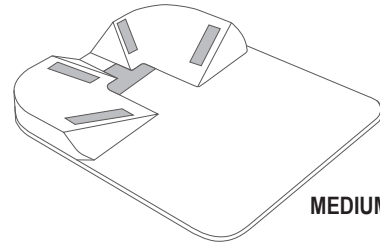

MEDIUM PROFIELWIGS

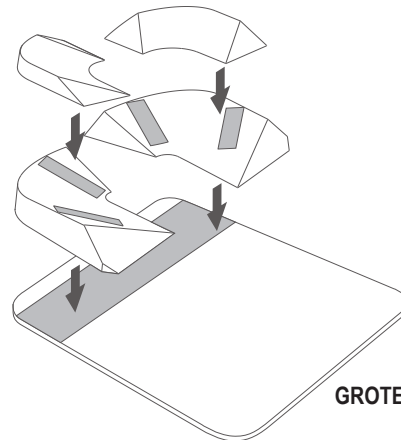


GROTE PROFIELWIGS

Figuur 2. De Wiguitrusting

ABS Contourvorm (ACM) Pan

Het plastic inzetstuk dat tussen de stoelrails van het zitsysteem past om de stoelbekleding te ondersteunen. De ACM pan wordt onder de kussenhoes geplaatst wanneer het kussen zich reeds aan de binnenkant bevindt.

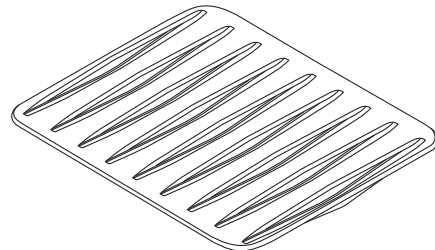

Figuur 3. ACM Pan

⚠ WARNING!

De maximale gewichtslimiet voor de ACM pan is 158 Kg..

Schoonmaken

Het kussen kan gemakkelijk worden schoongemaakt. Wij bevelen aan om de overtrek te wassen voor het eerste gebruik. Regelmatige reiniging van de kussenhoes wordt aanbevolen.

Om de kussenhoes te reinigen:

1. Vind de ritsluiting aan de achterkant van de buitenste overtrek. **Zie figuur 4.**
2. Maak de rits los van de buitenste cover en haal de verschillende binnen-componenten van het kussen eruit. Als uw kussen een vloeistof-afstotende binnen overtrek heeft, dan mag het binnenste kussen niet verwijderd worden van de vloeistof-afstotende binnen overtrek, tenzij u het binnenste kussen vervangt. Zie de Kenmerken Tabel van het Stealth/Quantum Kussen op **blz. 2** om te bepalen of uw kussen een vloeistof-afstotende binnenste overtrek heeft.
3. Was de buitenste overtrek in de wasmachine op KOUD. Het wassen dient regelmatig te gebeuren gebaseerd op gebruik.

WAARSCHUWING!

Gebruik geen bleekmiddel of wasverzachter bij het reinigen van de buitenhoes. Dit kan schade toebrengen aan de cover.

4. U mag het binnenkussen afvegen met een vochtige doek of een ontsmettingsmiddel. Als uw kussen een vloeistof-afwerende binnenste overtrek heeft, spray dan de vloeistof-afwerende cover met een desinfecterend middel. Zie de Kenmerken Tabel van het Stealth/Quantum Kussen aan de binnenkant van de voorste cover om te bepalen of uw kussen een vloeistof-afwerende binnenste overtrek heeft.

WAARSCHUWING!


Dompel uw kussen nooit onder in water. Als u dat doet, kan het kussen beschadigd raken.

5. Laat de buitenste kussenovertrek en de binnenste kussenonderdelen in de lucht drogen.

WAARSCHUWING!

Probeer niet om de buitenste overtrek in een droger te drogen en laat het ook niet uitstomen. Dit kan krimpen veroorzaken.

6. Als het overtrek en de binnenste kussenonderdelen droog zijn, stop de verzamelde binnenste onderdelen van het kussen dan weer terug in de cover. Maak de ritsluiting dicht en plaats het kussen weer terug op de zitting van uw stoel.

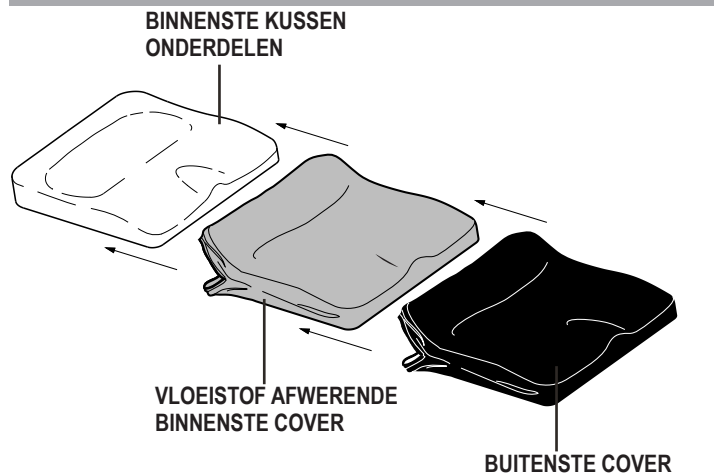

Figuur 4. Verborgen kussen

Opslag

Het kussen mag niet bewaard worden in extreme hoge of lage temperaturen. Het moet opgeslagen worden bij kamertemperatuur en in een schone en droge omgeving.

- Opslag temperaturen: -40°F/-40°C tot 158°F/70°C
- Bedrijfstemperaturen: -13°F/-25°C tot 122°F/50°C.

Verzorging en Onderhoud

Uw mobiliteitsproduct moet worden opgeruimd volgens de geldende lokale en nationale statutaire regelgeving.

VERPLICHT!

Neem contact op met uw lokale vuilophaaldienst of met uw Stealth/Quantum Leverancier voor informatie over de juiste manier van verwijdering van verpakkingsmaterialen van het mobiliteitsproduct, de onderdelen van het metalen frame, de plastic onderdelen, elektronica, accu's, neopreen, silicone en polyurethaan materialen.

Wees u bewust van veiligheid kwesties als u rookt.

WAARSCHUWING!

Stealth Producten beveelt ten sterkste aan dat u niet rookt terwijl u op het kussensysteem zit, hoewel het kussensysteem aan de nodige test vereisten voldoet voor het roken van sigaretten. U moet zich houden aan de volgende veiligheid richtlijnen als u besluit om sigaretten te roken terwijl u op het kussensysteem zit.

- Laat geen brandende sigaretten onbeheerd achter.
- Hou asbakken op een veilige afstand van het kussensysteem.
- Wees er altijd zeker van dat de sigaretten helemaal uit zijn voordat u ze weggooit.

Hoewel de gebruikte plastic onderdelen van uw mobiliteitsproduct getest zijn en voldoen aan de brandbaarheidstandaarden, beveelt Stealth/Quantum Producten aan dat u uw mobiliteitsproduct niet blootstelt aan open vuur.

Wees vooral heel voorzichtig als u zuurstof gebruikt dicht bij elektrische circuits en ontvlambare materialen. Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor informatie over veilig zuurstof gebruik.

Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het brandgevaar te verminderen.

Wees er op attent dat het wassen van beklede items de weerstand tegen ontbranding van de stof kan verminderen.

Garantie

Het Stealth/Quantum kussen is ontworpen en gemaakt volgens de hoogste standaarden. Ons kussen is gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van 24 maanden. Als er een defect in het materiaal of in de afwerking wordt gevonden, dan zal Stealth/Quantum Producten het kussen repareren of vervangen, naar onze keuze. Deze garantie geldt niet voor kussens die mishandeld of misbruikt zijn door de gebruiker en als zodanig worden bevonden door Stealth/Quantum Producten.

Claims en reparaties moeten worden verwerkt door de dichtstbijzijnde Stealth/Quantum Producten Leverancier.

--	--

**USA**

401 York Avenue
Duryea, PA 18642

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.quantumrehab.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale
Auckland, New Zealand 1007
www.pridemobility.co.nz

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.quantumrehab.co.uk

B.V.

(Authorised EU Representative)
Castricum Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands
www.quantumrehab.eu

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.quantumrehab-italia.it

France

26 rue Monseigneur Ancel
69 800 Saint-Priest
www.quantumrehab.fr

Spain

Calle Velazquez 80 6D
28001 Madrid
www.quantumrehab.com

Stealth Products, Inc.
104 John Kelly Drive
Burnet, TX 78611
www.stealthproducts.com

