

Q TRU-BALANCE[®] 3

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING



QUANTUM[®]

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

WAARSCHUWING!

Een Quantum Rehab-leverancier of een bevoegd technicus moet de initiële installatie van dit product uitvoeren en dient alle instructies in deze handleiding uit te voeren.

Onderstaande symbolen worden overal in deze gebruikshandleiding en op de elektrische rolstoel gebruikt ter aanduiding van waarschuwingen en belangrijke informatie. Het is zeer belangrijk dat u deze symbolen doorneemt en volledig begrijpt.

WAARSCHUWING!

Wijst op een mogelijk gevaarlijke omstandigheid/situatie. Verzuim in het naleven van de voorgeschreven procedures kan leiden tot persoonlijk letsel, beschadiging van onderdelen of defecten. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een zwart symbool op een gele driehoek met een zwarte rand.

VERPLICHT!

Deze handelingen dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven. Verzuim in het uitvoeren van verplichte handelingen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van apparatuur. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een wit symbool op een blauwe stip met een witte rand.

VERBODEN!

Deze handelingen zijn verboden. Deze handelingen mogen op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid worden uitgevoerd. Het uitvoeren van verboden handelingen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van apparatuur. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een zwart symbool met een rode cirkel en een rode schuine streep.

Beoogd Gebruik

Een rolstoelcomponent is een apparaat dat bedoeld is voor medische doeleinden en dat over het algemeen wordt verkocht als een integraal onderdeel van een rolstoel, maar kan ook afzonderlijk worden verkocht als een vervangend onderdeel.

Met Betrekking tot Apparaten voor Voorgeschreven Gebruik

WAARSCHUWING!

PAS OP! Onder de federale wetgeving mag dit apparaat uitsluitend verkocht worden door of op voorschrift van een arts of ander bevoegd personeel met een wettelijke licentie, van de staat (uitsluitend in de VS) of de regio waar dit personeel werkzaam is, om dit apparaat te gebruiken of voor te schrijven.

NB: Deze instructies zijn samengesteld uit de meest recente specificaties en productinformatie die beschikbaar was ten tijde van publicatie. We behouden ons het recht voor om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen. Eventuele wijzigingen aan onze producten kunnen resulteren in lichte afwijkingen tussen de afbeeldingen en de uitleg in deze handleiding en het product dat u hebt gekocht. De nieuwste/meest recente versie van deze handleiding is beschikbaar op onze website.

NB: Dit product is conform de richtlijnen en vereisten van WEEE, RoHS en REACH.

NB: Dit product voldoet aan IPX4 classificatie (IEC 60529).

NB: Dit product voldoet en de bijbehorende onderdelen zijn niet vervaardigd met natuurlijke rubberlatex. Raadpleeg de fabrikant met betrekking tot eventuele onderdelen en/of accessoires.



Inhoudsopgave

Veiligheidssymbolen van het product	4
Het TRU-Balance® 3 Power-positionering- systeem	4
Voorzorgsmaatregelen	4
Bediening van het TRU-Balance® 3 Power- positioneringssysteem	6
Bewegingsberiek	6
iLevel®-functie	7
Neerklapbare rugleuning	9
Armleuningopties.....	10
Optionele schakelknopbediening.....	15
Overplaatsingen	16
Controllerpositie.....	16
De rugleuning	18
TRU-Comfort	18
Installatie en gebruik	18
Reiniging.....	19
Zijsteunen aanpassen	20
Verstellen van de hoofdsteen	22
Opslag	22
Verzorging en onderhoud	22
Garantie.....	23



Veiligheidssymbolen van het product

Onderstaande symbolen worden op het zittingsysteem gebruikt ter aanduiding van waarschuwingen en verplichte en verboden handelingen. Het is zeer belangrijk dat u deze symbolen doorneemt en volledig begrijpt.



Lees de informatie in de gebruikershandleiding door en volg deze op.



Vermijd blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of staand water indien mogelijk. Onderhoud en opslaan in schone en droge toestand.




EMI/RFI—Dit product is getest en doorstaat een immuñiteitsniveau van 20 V/m.



Maximaal zittinggewicht



Er zijn klem-/Pletpunten.

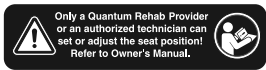

Raadpleeg uw Quantum Rehab-leverancier voordat u wijzigingen aanbrengt in de configuratie van uw zittingsysteem.



Niet blootstellen aan hittebronnen zoals open vuur of vonken.



Niet roken



Alleen de hoës—Maximale wastemperatuur 60°C



Niet in de wasdroger drogen.



Niet strijken.



Niet bleken.

Het TRU-Balance® 3 Power-positioneringssysteem

Het TRU-Balance 3 Power-positioneringssysteem is een uniekzittingssysteem dat speciaal is ontworpen voor de elektrische rolstoel van Quantum. Het systeem is volledig verstelbaar om tegemoet te komen aan de persoonlijke behoeften van de gebruiker en het wordt geplaatst op een onderstel van Quantum voor maximale beweeglijkheid.

Herbruikbare haak- en lussluitingen bevinden zich in uw gebruikerspakket voor gebruik bij bevestiging van het zittingkussen op het onderstel van de zitting. Deze bevestigingsmiddelen zijn niet bedoeld voor gebruik bij kussens met antislip-materiaal, omdat zij het zittingkussen zouden kunnen beschadigen.

Figuur 1 geeft informatie over de getoonde onderdelen van het TRU-Balance 3 Power-positioneringssysteem met een standaard rugleuning. De onderdelen van de rugleuning van de TRU-Comfort worden beschreven in “Onderdelen van TRU-Comfort” (**figuur 22**). Gebruik deze diagrammen om vertrouwd te raken met de functie en locatie van ieder onderdeel, voordat u gebruik gaat maken van het TRU-Balance 3 Power-positioneringssysteem.

NB: Deze handleiding behandelt uitsluitend de schakelknopbediening. Raadpleeg de handleiding die werd geleverd met uw controller voor informatie over bediening met de joystick of bediening door de begeleider. Indien uw TRU-Balance 3 Power-positioneringssysteem is uitgerust met een ander bedieningsapparaat, raadpleeg dan de handleiding van dat apparaat en/of de gebruikshandleiding van uw elektrische rolstoel.

Voorzorgsmaatregelen

Lees het onderstaande zorgvuldig door, voordat u gebruik gaat maken van het TRU-Balance 3 Power-positioneringssysteem. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u te helpen bij de veilige bediening van het zittingssysteem.

- Schakel de stroomvoorziening uit voordat u gaat zitten in het TRU-Balance 3 Power-positioneringssysteem.
- U dient altijd hulp te krijgen als u gaat zitten in het TRU-Balance 3 Power-positioneringssysteem.
- Volg alle procedures en besteed aandacht aan de waarschuwingen die worden beschreven in de gebruikershandleiding van uw elektrische rolstoel en Consumentenveiligheid Gids.

⚠ WAARSCHUWING!

Het zwaartepunt van uw zittingsysteem is in de fabriek ingesteld op een positie die overeenkomt met de behoeften van de demografische meerderheid van de gebruikers. Uw Quantum Rehab-leverancier heeft uw zittingsysteem beoordeeld en eventuele noodzakelijke aanpassingen aangebracht om tegemoet te komen aan uw specifieke behoeften. Neem contact op met Quantum Rehab of uw Quantum Rehab-leverancier, voordat u wijzigingen aanbrengt in de configuratie van uw zitting. Indien de onderdelen op uw zittingsysteem los gaan zitten, meld dit probleem dan onmiddellijk bij uw Quantum Rehab-leverancier.

Indien er een onderbreking optreedt in de stroomvoorziening van uw elektrische rolstoel, verplaats u dan naar een veilige plek en vraag om hulp, indien nodig. Neem onmiddellijk contact op met uw Quantum Rehab-leverancier om het incident te melden.

Uw zittingsysteem is niet goedgekeurd voor gebruik als een zitplaats in een voertuig. Gebruik de zitplaatsen en de inzittendengordels die zijn geleverd door de fabrikant van het voertuig.

Quantum Rehab raadt ten sterkste af dat u sigaretten rookt terwijl u op het zittingsysteem zit, ondanks het feit dat het zittingsysteem de noodzakelijke test-eisen voor het roken van sigaretten heeft doorstaan. U dient zich aan de volgende veiligheidsrichtlijnen te houden als u besluit sigaretten te roken terwijl u op het zittingsysteem zit.


- Laat brandende sigaretten niet onbeheerd achter.
- Houd asbakken op veilige afstand van het zittingsysteem.
- Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig zijn gedoofd voordat u ze weggooit.

⊘ VERBODEN!



Vermijd blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of staand water, indien mogelijk. Onderhoud en opslaan in droge toestand.

■ VERPLICHT!

De gewichtscapaciteit van uw elektrische rolstoel niet overschrijden of een maximaal gewicht van 204 kg hanteren.

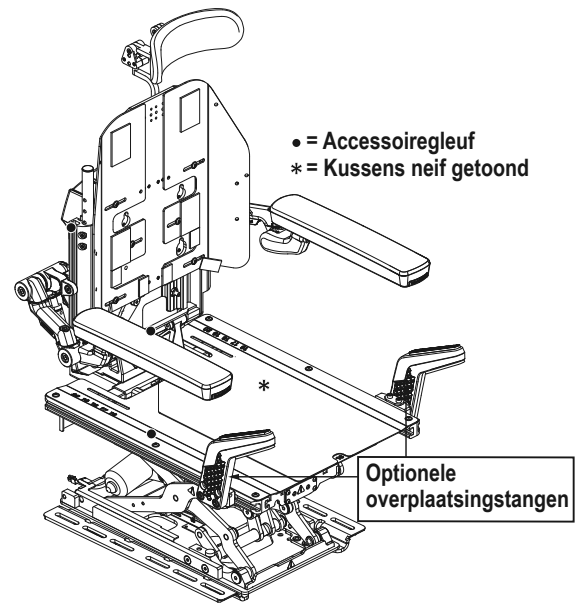

Armleuningen

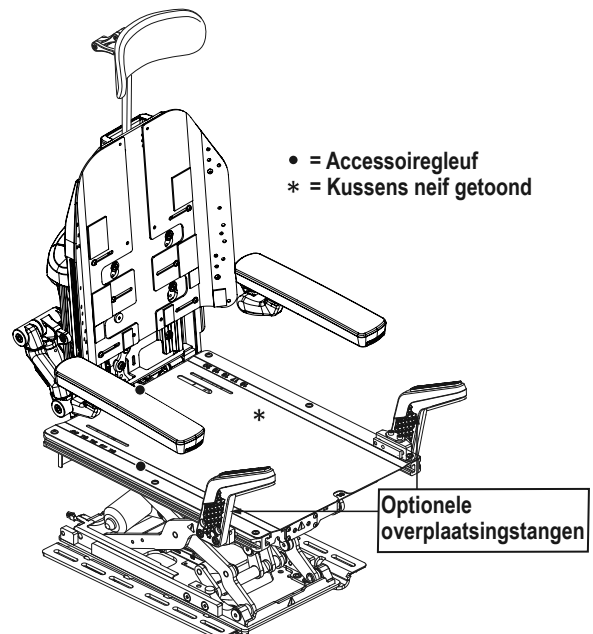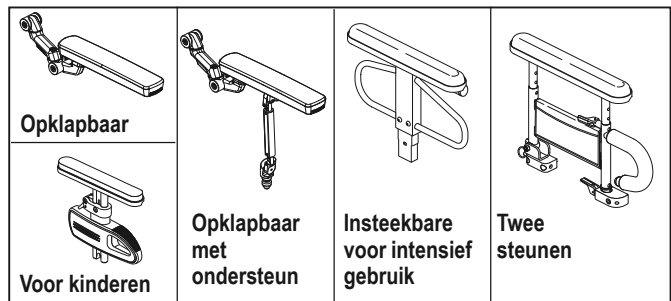

Figuur 1. Onderdelen van TRU-Balance® 3 Power-positioneringsysteem

Bediening van het TRU-Balance 3 Power-positioneringsysteem

Het TRU-Balance 3 Power-positioneringsysteem is uitgerust met een in de breedte verstelbare rugleuning en kan bediend worden met een controller, met een speciale controller of met een schakelknop (zie figuur 15).

Bewegingsbereik

Uw TRU-Balance 3-zittingsysteem biedt een kanteling van maximaal 50°, 30,5 cm heffing en achterover leunen tot 85°–175°, en kan tot 175° heffen/achterover leunen. **Zie figuur 2.**

NB: Bepaalde configuraties van een TRU-Balance 3 Power Tilten Quantum-onderstel hebben een maximale heffingshoek van minder dan 50°.


Uw TRU-Balance 3 Power Positioning System heeft een stroombeperking, zodat u niet met uw elektrische rolstoel kunt rijden in de gekantelde positie. Er wordt een volledige rijbeperking geactiveerd bij een van tevoren door de fabriek ingestelde kantelhoek. **Zie figuur 3.**

WAARSCHUWING!

Het is niet toegestaan te proberen de volledige of gedeeltelijke beperkingen die van tevoren door de fabriek zijn ingesteld om te leiden, te verwijderen, te herprogrammeren en/of aan te passen. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot letsel.

Controleer de directe omgeving om ervoor te zorgen dat er niets in het mechanisme zit, voordat de functies voor kantelen, achterover leunen en/of verhoging worden gebruikt. Houd de omgeving voorafgaand en tijdens de bewegingen vrij.

NB: De toevoeging van een ventilatielade aan uw TRU-Balance 3 Power-positioneringsysteem kan het totale gewicht en/of het zwaartepunt van uw elektrische rolstoel wijzigen. Neem contact op met uw Quantum Rehab-leverancier, voordat u wijzigingen aanbrengt aan de zittingconfiguratie.

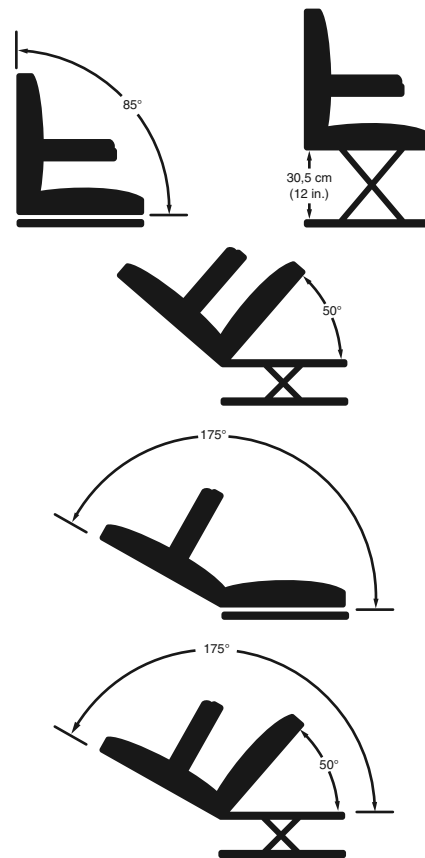

Figuur 2. Bewegingsbereik van het TRU-Balance 3 Power-positioneringsysteem

	Verhoogd	Meer dan 20° gekanteld	Meer dan 20° achterover geleund	Neer dan 125° gekanteld/ achterover geleund
Achterover leunen vergrendeling				X
Kantelen				X
Verhogen		X	X	X
1/4-snelheid	X			
Vol vermogen vergrendeling		X	X	X
iLevel	X			

Figuur 3. Overzicht van beperkingen

iLevel® Functie (optioneel)

Uw elektrische rolstoel is mogelijk uitgerust met de iLevel-functie die wordt gebruikt in combinatie met het elektrische positioneringssysteem TRUBalance 3. De iLevel-functie is gemonteerd op een Quantum-onderstel voor maximale stabiliteit als het zittingsysteem is verhoogd. **Zie figuur 4.**

NB: Indien uw elektrische rolstoel uitgerust is met een TRU-Balance 3 Positioningssysteem, kijk naar de informatie geleverd in aparte handleiding.

 VERPLICHT!

Lees het onderstaande zorgvuldig door voordat u de iLevel-functie in gebruik neemt. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u te helpen bij de veilige bediening van de iLevel-functie. Schakel de voeding uit voordat u gaat zitten in uw elektrische rolstoel.

- Bediening van de iLevel-functie. Schakel de voeding uit voordat u gaat zitten in uw elektrische rolstoel.
- Zorg dat u altijd hulp krijgt als u gaat zitten in of wordt overgeplaatst naar uw elektrische rolstoel.
- Volg alle procedures en neem de waarschuwingen in acht, zoals uitgelegd in de gebruikshandleiding, de aanvullende handleidingen en de Zeiligheidshandleiding voor de consument.

 WAARSCHUWING!




Het zwaartepunt van uw elektrische rolstoel is in de fabriek ingesteld op een positie die voldoet aan de eisen van de demografische meerderheid van gebruikers. Uw Quantum Rehab-leverancier heeft uw elektrische rolstoel beoordeeld en eventueel noodzakelijke aanpassingen aangebracht voor uw specifieke vereisten. Breng geen wijzigingen aan in de zittingconfiguratie zonder eerst contact op te nemen met Quantum Rehab of uw Quantum Rehab-leverancier.

Sommige onderdelen van elektrische rolstoelen zijn zwaar. Mogelijk hebt u hulp nodig om ze op te tillen of te dragen. Raadpleeg de specificatietabel voor het gewicht van specifieke onderdelen, voordat u de elektrische rolstoel demonteert.

Haal de inzittende uit de elektrische rolstoel voordat eventuele aanpassingen worden uitgevoerd.

NB: De iLevel-functie wordt automatisch ingeschakeld als de elektrisch verhoogde zitting wordt geactiveerd en de iLevel indicator wordt weergegeven op uw controller.

De iLevel-functie is bereikbaar via de controller of enkele schakelaar, en de elektrische rolstoel moet zich op een vlakke ondergrond binnenshuis bevinden om iLevel te activeren. Nadat de schakelaar van het zittingsysteem is gestart, maken de iLevel-blokkeringen (zie figuur 4) beweging van de voorste zwenkwielen onmogelijk en wordt de elektrische rolstoel beperkt tot een klimvermogen van 2,54 cm–3,81 cm. Het zittingsysteem kan tot 20% achterover of omhoog worden gekanteld als de iLevel-functie is ingeschakeld.

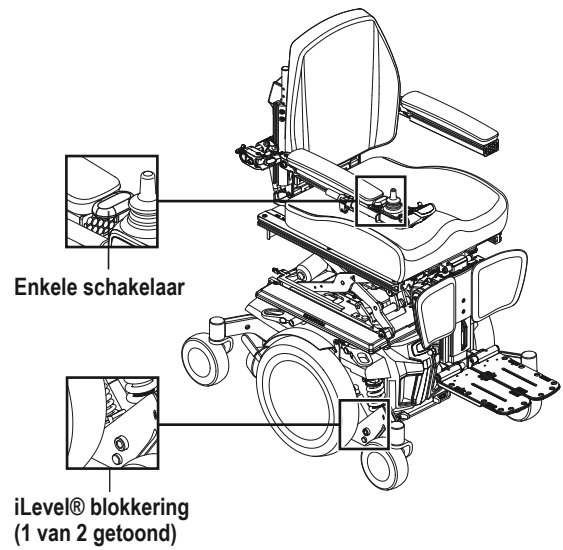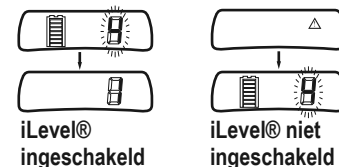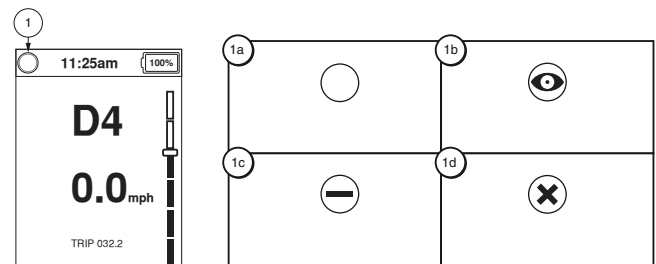**NE+-controller****Q-Logic 3-controller****Q-Logic 3 Besturing Indicators**

1a–Geen restricties

1b–Veilige hoogte

1c–Verminderde snelheid restrictie

1d–Rijblokkering

Figuur 4. TRU-Balance 3 met de iLevel-functie en controllerindicatoren

NB: Raadpleeg de basishandleiding van uw controller voor meer informatie over de waarschuwingmeldingen van iLevel.

Voor activering van de iLevel met een enkele schakelaar:

1. Druk de enkele schakelaar in en houd deze ingedrukt om de zitting te verhogen en iLevel te activeren.
2. Druk de enkele schakelaar in en houd deze ingedrukt om de zitting te verlagen.

WAARSCHUWING!

De iLevel niet gebruiken en de zittinghoogte op geen enkele wijze veranderen terwijl de elektrische rolstoel zich onder een vast object bevindt, zoals een tafel of een bureau. Houd de omgeving vrij, zowel voorafgaand aan als tijdens verplaatsing.

De iLevel-functie dient alleen te worden gebruikt op vlakke en egale ondergronden binnenshuis, zoals in winkelcentra, kantoren en/of medische faciliteiten, en alleen op beperkte vlakke, egale en harde ondergronden buitenshuis.

Terwijl de iLevel-functie in gebruik is, de elektrische rolstoel kan rijden op een vooraf bepaalde, veilige snelheid. Raadpleeg de specificatietabel voor meer informatie over vermindering van de maximale snelheid.

WAARSCHUWING!

De iLevel-functie dient alleen te worden gebruikt op vlakke en egale ondergronden binnenshuis, zoals in winkelcentra, kantoren en/of medische faciliteiten. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot het omkiepen van de elektrische rolstoel.

De iLevel-functie is bedoeld voor beperkt gebruik buitenshuis en uitsluitend op een vlakke, egale en harde ondergrond. Als u twijfels hebt over uw omgeving, gebruik iLevel dan niet buitenshuis.

De zitting mag nooit vanuit de laagste positie worden verhoogd als uw elektrische rolstoel wordt gebruikt op een hobbelige of ongelijke ondergrond. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot het omkiepen van de elektrische rolstoel.

De veiligheidsgordel moet altijd vastgemaakt.

VERBODEN!

Gebruik de iLevel nooit buitenshuis op oneffen terrein (grind, heuvels of ander ongelijk, nietcompact terrein) of in een veld.

NB: De iLevel-functie is voorzien van een systeem waarmee de elektrische rolstoel kan rijden op een vooraf bepaalde, veilige snelheid als de stoel is verhoogd. Controleer altijd of dit systeem correct functioneert voordat u de elektrische rolstoel in gebruik neemt.

NB: Als er een waarschuwing of een visuele melding verschijnt op uw controller met de melding dat de iLevel niet is ingeschakeld, ordt de snelheid van de elektrische rolstoel tot 25% verminderd als de stoel is verhoogd. Als deze waarschuwing verschijnt terwijl u zich op een vlakke ondergrond bevindt, stop dan met het gebruik van de iLevel-functie en vraag uw Quantum Rehab-leverancier om hulp.

Neerklapbare rugleuning (optioneel)

Met de neerklapbare rugleuning kan de gebruiker de rugleuning naar voren kantelen voor gemakkelijk vervoer. **Zie figuur 5.** Uw zittingsysteem is mogelijk uitgerust met één of twee naar voren kantelbare rugleuningen.

Om de rugleuning naar voren te kantelen:




1. Verwijder de achterpan.
1. Verwijder de vergrendelpin (zie figuur 6) OF draai de ontgrendelhendel op beide achterstokken naar de achterkant van de stoel om de rugleuning los te maken. **Zie figuur 7.**
2. Klap de rug van de zitting omlaag.

Zo plaatst u de rugleuning van de zitting weer in de verticale positie:

1. Til de rugleuning van de zitting op en plaats deze in de verticale positie.
2. Plaats de vergrendelpin terug en controleer of alle onderdelen goed vast zitten (zie figuur 6) OF draai de ontgrendelhendel op beide achterstokken naar de voorkant van de stoel om de achterstokken vast te maken. Zorg ervoor dat er geen rode staaf zichtbaar is op de ontgrendelhendel. **Zie figuur 7.**
3. Installeer de achterpan opnieuw.

⚠ WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de vergrendelpin op de juiste wijze is ingevoerd OF dat de ontgrendelhendel op de juiste wijze is vastgemaakt, voordat u in uw elektrische rolstoel gaat zitten.

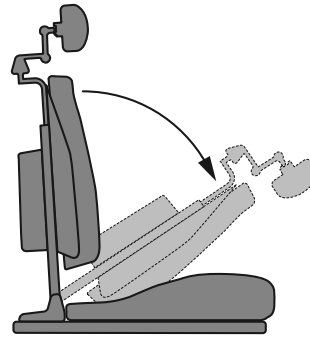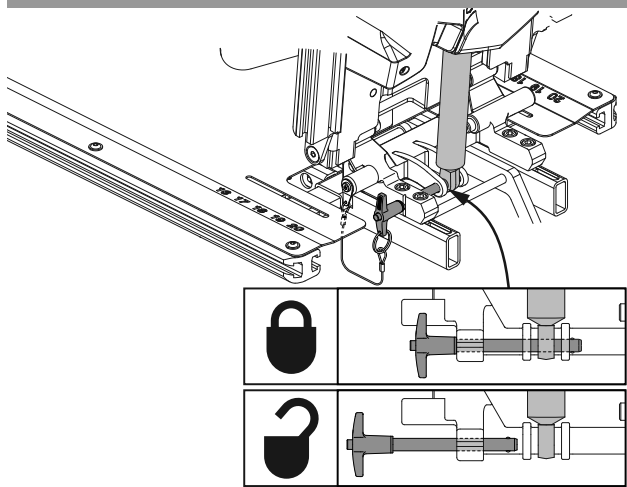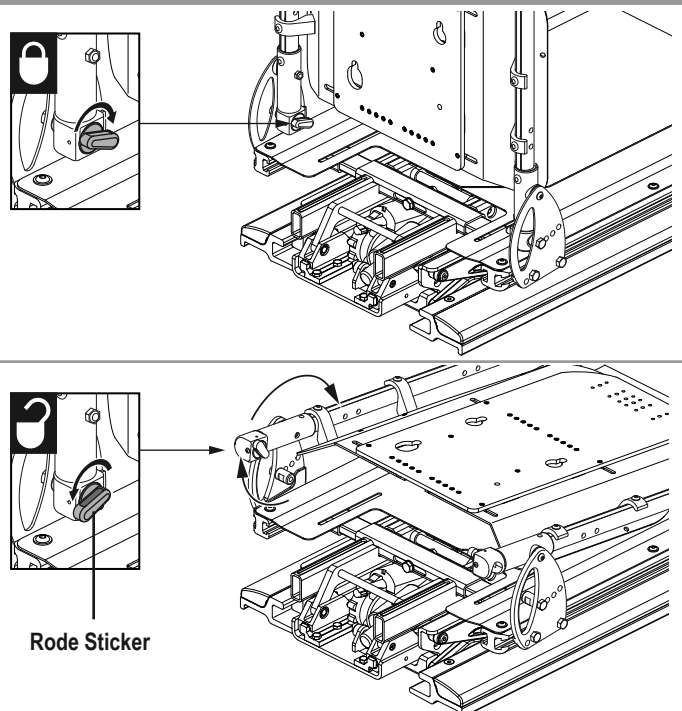**Figuur 5. Neerklapbare rugleuning (Onvergrendeld)****Figuur 6. Neerklapbare rugleuning (Vergrendelpin)****Figuur 7. Neerklapbare rugleuning (Ontgrendelhendel)**

Armleuningopties

De volgende paragrafen beschrijven de armleuningopties en de mogelijke aanpassingen voor meer gemak. Niet alle armleuningopties zijn beschikbaar op alle TRU-Balance 3 Power-positioneringssystemen.

OPMERKING: *Breng geen veranderingen inzake uw stoelconfiguratie aan zonder contact op te nemen met uw Quantum Rehab-leverancier.*

U heeft mogelijk het volgende nodig om comfortaanpassingen te maken:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ■ 4 mm inbussleutel | ■ 8 mm inbussleutel |
| ■ 5 mm inbussleutel | ■ 13 mm steeksleutel |
| ■ 6 mm inbussleutel | ■ 18 mm steeksleutel |

WAARSCHUWING!

Probeer de elektrische rolstoel niet op te tillen of te verplaatsen met behulp van een van de verwijderbare onderdelen, inclusief de armleuning(en), bedrading aan de voorkant, zittingkussens, rugleuning van de zitting, kappen of de controller. Gebruik alleen stevige en niet-verwijderbare frameonderdelen om uw elektrische rolstoel of het zittingsysteem op te tillen of te verplaatsen.

Vermijd het plaatsen van uw volle gewicht op de armleuningen van de elektrische rolstoel en gebruik de armleuningen niet als gewichtdragers, bijvoorbeeld bij overplaatsingen. Hierdoor zou de elektrische rolstoel kunnen kantelen, wat kan resulteren in persoonlijk letsel indien u uit de elektrische rolstoel valt.

De controller en de controller-beugel zijn niet-dragende onderdelen van uw zittingsysteem. Gebruik de controller of de controller-beugel niet als dragers, bijvoorbeeld bij overplaatsingen. Dergelijk gebruik kan leiden tot beschadiging van deze onderdelen, wat kan resulteren in persoonlijk letsel indien u uit de elektrische rolstoel valt.

Opklapbare armleuningen

De opklapbare armleuningen zijn ontworpen om “omhoog te klappen”, zodat ze weggeklapt zijn voor meer gemak bij het overplaatsen naar of van de elektrische rolstoel. De hoogte, de hoek, de breedte en de draai van de armleuning kunnen worden aangepast.

OPMERKING: *Door de hoogte van de armleuning te veranderen, verandert ook de hoek van de armleuning. We raden aan eerst de hoogte van de armleuning aan te passen en vervolgens de hoek van de armleuning aan te passen.*

Om de hoogte van de armleuning aan te passen:

1. Zorg ervoor dat de armleuning in de hoogte wordt versteld tot een hoek van minimaal 95° ten opzichte van de zitplaats.
2. Draai de achterste schroef op de steun van de achterste armleuning los. **Zie figuur 8.**
3. Zorg ervoor dat de achterste scharnierverbinding op de rugleuning op de juiste hoogte is gemonteerd ten opzichte van de achterkant. **Zie figuur 8.**

4. Zorg ervoor dat de armleuning onder een hoek van 95° blijft
5. Breng de armleuning omhoog of omlaag om de armleuning op de gewenste hoogte of op het locatieteken in te stellen. **Zie figuur 8.**
6. Zorg ervoor dat de tanden van de scharnierverbinding en de tanden van de achterste steun van de achterste arm zijn vergrendeld voordat u de achterste schroef van de steun van de achterste armleuning vastzet.
7. Draai de voorste schroef op de steun van de voorste armleuning los. **Zie figuur 8.**
8. Breng de armleuning omhoog of omlaag om de armleuning op de gewenste hoogte in te stellen.
9. Draai de voorste schroef op de steun van de voorste armleuning vast. **Zie figuur 8.**
10. Herhaal, indien nodig, de andere armleuning.

Om de hoek van de armleuning:

1. Draai voor het verstellen van de hoek de voorste schroef op de steun van de voorste armleuning los en stel deze in.
2. Draai de moer zo nodig los. **Zie figuur 8.**
3. Stel de spanschroef in om de armleuning in de gewenste hoek te plaatsen.
4. Draai de voorste schroef op de steun van de voorste armleuning vast. **Zie figuur 8.**
5. Draai indien nodig de moer vast. **Zie figuur 8.**
6. Herhaal, indien nodig, voor de andere armleuning.


OPMERKING: *Nadat u de hoogte van de armleuning hebt aangepast, moet u mogelijk de hoek van de armleuning aanpassen. We adviseren u eerst de hoek van de armleuning te controleren en vervolgens de hoek aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw Quantum Rehab-leverancier.*

Om de breedte van de armleuning aan te passen:

1. Draai de onderste schroef onderaan de achterkant van de armleuningsteun los en stel deze af op de gewenste breedte. **Zie figuur 8.**
2. Draai de onderste schroef vast bij de gewenste breedte.
3. Maak de bovenste schroef bovenop de steun van de armleuning los en stel deze af zodat de armleuning loodrecht op de zitting staat. **Zie figuur 8.**
4. Nadat de armleuning correct is afgesteld, draait u hem vast.

Om de armleuning te verwijderen:

1. Hou de armleuning op zijn plaats.
2. Verwijder de achterste schroef van de ondersteunende verbinding van de achterste armleuning. **Zie figuur 8.**
3. Ondersteun het gewicht van de armleuning en trek de armleuning van de armleuningpaal af.

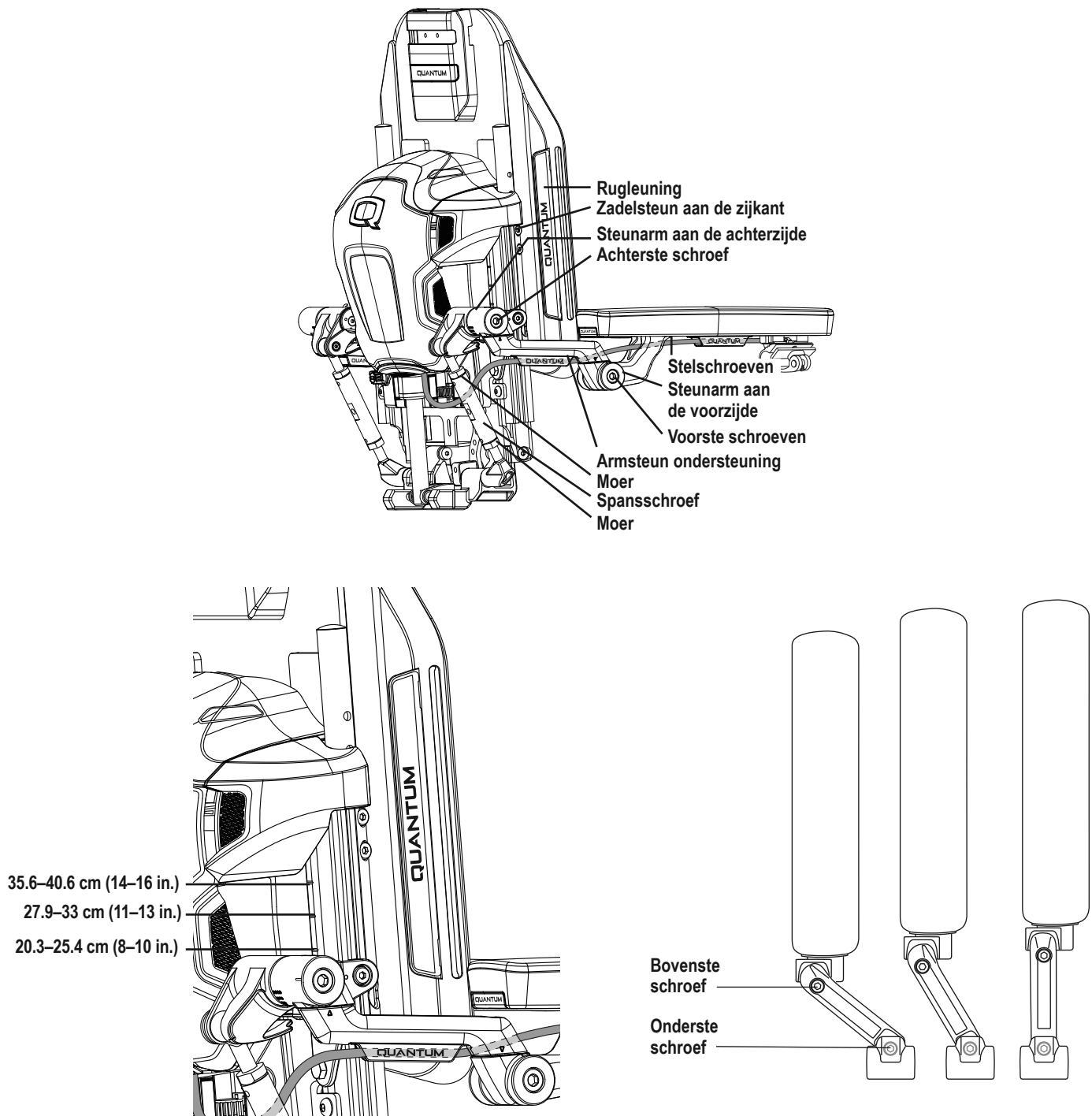

Figuur 8. Aanpassing van de hoogte en de hoek van de opklapbare armleuning

OPMERKING: Als u de achterste schroef van de achterste steun van de armleuning verwijdert zonder de armleuning vast te houden, kan de armleuning volledig loskomen. We raden aan om de armleuning vast te houden voordat u de achterste schroef verwijdert.

WAARSCHUWING!

Sommige onderdelen van de elektrische rolstoel zijn zwaar en u hebt misschien hulp nodig bij het optillen of dragen van deze onderdelen.

Om de armleuning te installeren:

1. Ondersteuning van het gewicht van de armleuning. **Zie figuur 8.**
2. Breng de achterste schroef van de steun van de achterste armleuning aan en draai vast.
3. Volg de instructies om de hoogte en breedte van de armleuning aan te passen.

De armleuningarmleuning aanpassen:

1. Draai de stelschroeven onder de armleuning los.
2. Pas de gewenste hoek aan.
3. Tighen setscrews.

ArMLEuning met twee steunen

Het instelbereik van de hoogte van de armleuning met twee steunen is 22,9–33 cm in stappen van 2,54 cm. Dit bereik wordt gemeten vanaf de bovenkant van de zittingstang tot de bovenkant van het armkussen. U kunt de armleuningen ook omhoog klappen of ze verwijderen voor vervoer. **Zie figuur 9.**

Voor verwijdering van de armleuningmontage:


1. Druk de veerhendel omlaag en trek de voorkant van de armleuning omhoog. **Zie figuur 9.**
2. Verwijder de vergrendelpin van de rugleuning van de zitting. **Zie figuur 9.**
3. Trek de achterkant van de armleuning omhoog om de montage te verwijderen.

Voor installatie van de armleuningmontage:


1. Plaats de achterkant van de armleuning in de achterste zittinghouders installeer de vergrendelpin. **Zie figuur 9.**
2. Draai de armleuningmontage omlaag.
3. Druk de voorkant van de armleuning in de voorste zittinghouder endraai de veerhendel naar de horizontale positie om te vergendelen.

Aanpassing van de hoogte van de armleuning:

1. Druk de veerhendel naar binnen. **Zie figuur 10.**
2. Beweeg de armleuning omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte
3. Draai de veerhendel naar buiten en vergrendel de armleuning op zijn plaats. Beweeg de armleuning, indien gewenst, omhoog of omlaag totdat deze vergrendeld is.

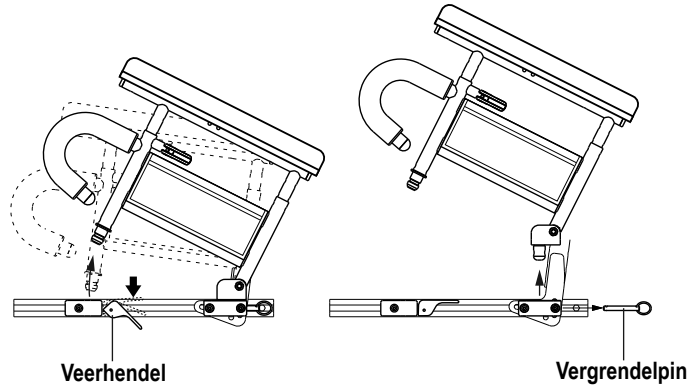

Figuur 9. Verwijdering en installatie van de armleuning met twee steunen

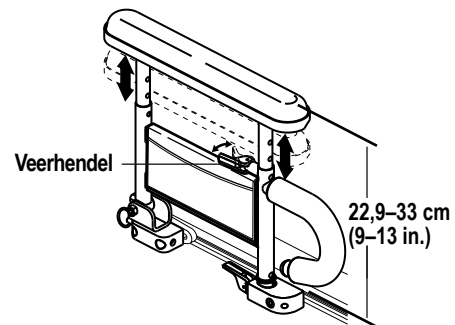

Figuur 10. Aanpassing van de hoogte van de armleuning met twee steunen

Insteekbare armleuningen voor intensief gebruik

De armleuningen voor intensief gebruik kunnen worden verwijderd, zodat het gemakkelijker is om op de elektrische rolstoel plaats te nemen en ervan af te stappen. **Zie figuur 11.** De hoogte en de positie van de armleuning kunnen worden aangepast. **Zie figuur 12.**

Voor verwijdering van het armleuningdeel:

1. Draai de armleuninghendel naar achteren. **Zie figuur 11.**
2. Til het armleuningdeel omhoog.

Voor installatie van het armleuningdeel:


1. Plaats het armleuningdeel in het armleuningblok. **Zie figuur 11.**
2. Draai de armleuninghendel naar voren.

Voor aanpassing van de positie van de armleuning:


1. Draai de armleuninghendel naar achteren en haal de armleuning uit het armleuningblok. **Zie figuur 11.**
2. Draai schroeven 1 en 2 los. **Zie figuur 12.**
3. Schuif het armleuningblok naar de gewenste positie.
4. Draai schroeven 1 en 2 vast.
5. Plaats de armleuning in het armleuningblok en draai de armleuninghendel naar voren. **Zie figuur 12.**
6. Herhaal dit, indien nodig, voor de andere kant.

Voor aanpassing van de hoogte van de armleuning:

1. Verwijder de schroeven 3 en 4. **Zie figuur 12.**
2. Schuif de armleuning omhoog of omlaag langs de vergrendelstang tot de gewenste hoogte.
3. Plaats schroeven 3 en 4 weer terug. **Zie figuur 12.**
4. Herhaal dit, indien nodig, bij de andere armleuning.

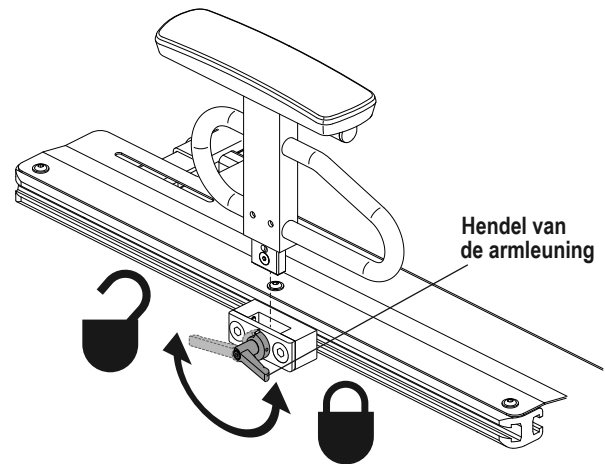

Figuur 11. Verwijdering/montage van insteekbare armleuning voor intensief gebruik

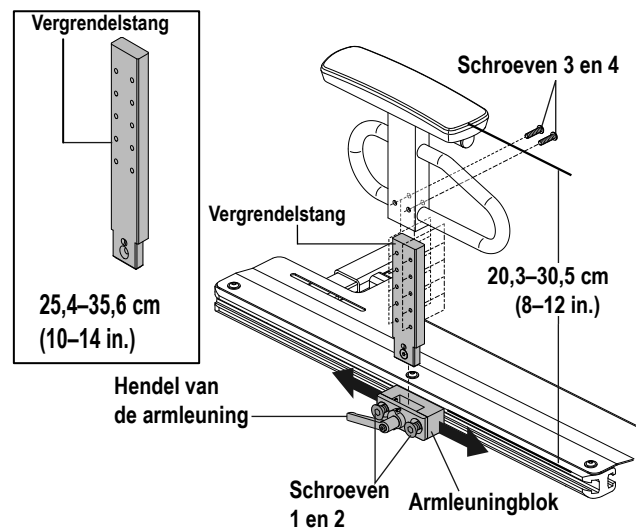

Figuur 12. Aanpassing van positie en hoogte van insteekbare armleuning voor intensief gebruik

Snel in hoogte verstelbare insteekarmleuningen voor kinderen, met enkele steun

De snel in hoogte verstelbare insteekarmleuningen voor kinderen, met enkele steun, kunnen worden aangepast en eenvoudig worden verwijderd voor eenvoudige verplaatsing naar en vanaf de elektrische rolstoel. Het totale bereik van de hoogteaanpassing is 7,62 cm in stappen van 0,95 cm. Dit bereik wordt gemeten vanaf de bovenkant van de zitting tot de bovenkant van de armlegger. Het totale bereik van de hoogteaanpassing is 19,7–27,3 cm.

Verwijderen van de armleuningcombinatie:

1. Draai de hendel van de armleuning naar voren. **Zie figuur 13.**
2. Til de armleuningcombinatie omhoog.

Plaatsen van de armleuningcombinatie:

3. Plaats de armleuningcombinatie in het armleuningblok. **Zie figuur 13.**
4. Draai de hendel van de armleuning naar achteren.


Bovenste hoogteaanpassingen vereisen geen gereedschap. Het bereik van de bovenste hoogteaanpassing is 2,54 cm in stappen van 0,95 cm. Het bereik van de onderste hoogteaanpassing is 5,08 cm in stappen van 2,54 cm.

Aanpassing van de bovenste hoogte:


1. Indien aanwezig, de vergrendelpin verwijderen. **Zie figuur 13.**
2. Trek de armleuning omhoog om deze naar boven te halen en of druk op de ontgrendelhendel om de armleuning te laten zakken tot de gewenste hoogte.
3. De vergrendelpin opnieuw inbrengen, indien van toepassing.
4. Herhaal dit voor de andere armleuning, indien gewenst.

Aanpassen van de hoogte van de onderkant:




1. Verwijder schroeven 1 en 2 uit de vergrendelstang. **Zie figuur 14.**
2. Schuif de armleuning omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte.
3. Plaats de gaten in de armleuning op één lijn.
4. Plaats schroeven 1 en 2 terug in de vergrendelstang.
5. Herhaal dit voor de andere armleuning, indien gewenst.

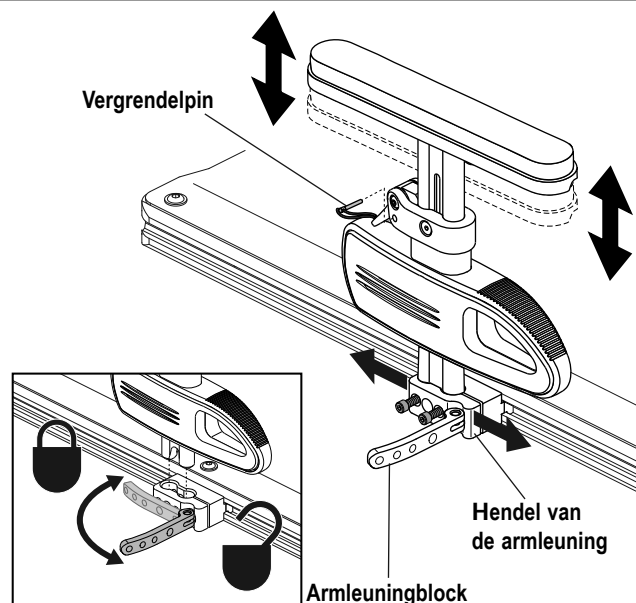

Figuur 13. Verwijdering/installatie van de snel in hoogte verstelbare insteekarmleuning voor kinderen, met enkele steun

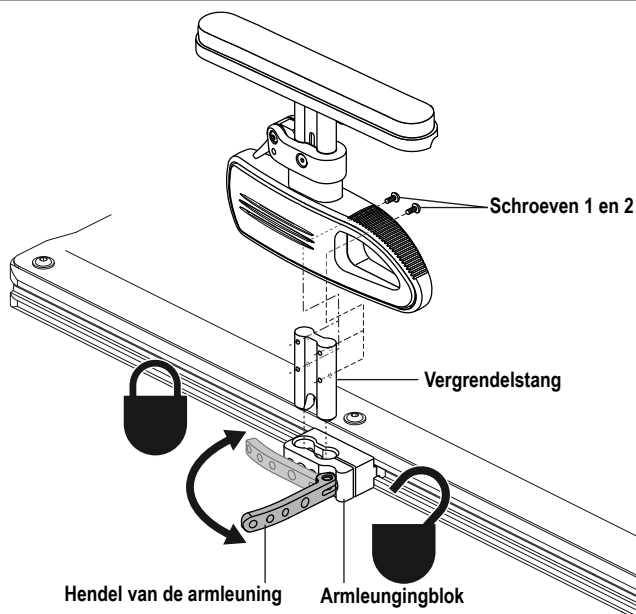

Figuur 14. Aanpassing van snel in hoogte verstelbare insteek voor kinderen, met enkele steun

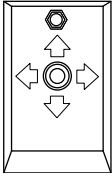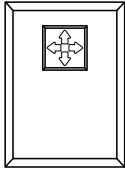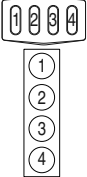Schakelknop Operatie				
				
Kantelen			1	
Terugplaatsen in de vaste positie			1	
Achteroverleunen			2	Niet beschikbaar
Terugplaatsen in de vaste positie			2	Niet beschikbaar
Zitting verhogen			3	Niet beschikbaar
Terugplaatsen in de vaste positie			3	Niet beschikbaar
Gecombineerde beensteunen/voetplaat omhoog			4	Niet beschikbaar
Gecombineerde beensteunen/voetplaat omlaag			4	Niet beschikbaar
Losse beensteunen omhoog	Links 		3	Niet beschikbaar
	Rechts 		4	
Losse beensteunen omlaag	Links 		3	Niet beschikbaar
	Rechts 		4	

Figuur 15. Optionele schakelknopbediening

Overplaatsingen

Er zijn optionele overplaatsingstangen verkrijgbaar. Overplaatsingstangen zijn ontworpen om verplaatsing tijdens het zitten in de elektrische rolstoel en overplaatsingen in of uit van de elektrische rolstoel te vereenvoudigen. Raadpleeg voor meer informatie over overplaatsingen de Gids voor consumentveiligheid die met de gebruikshandleiding van uw elektrische rolstoel werd geleverd. **Zie figuur 16.**

Controllerpositie


U kunt de controller voor links- of rechtshandig gebruik plaatsen. U kunt ook de verlenging van de controller vanaf de armleuning en de hoogte van de controller aanpassen.

WAARSCHUWING!


Gebruik de juiste verbindingpunten voor de bedrading van de controller, zodat de bedrading niet verstrikt kan raken in de aandrijfwielen of afgekneld worden in het frame van de zitting of beschadigd raken bij het rijden door deuropeningen.

Voor wijziging van de controller-positie:

1. Schakel de stroomvoorziening naar de controller uit.
2. Verwijder de bedrading van de controller uit de clips waarmee het aan de armleuning is verbonden.
3. Draai de montageschroeven in het bevestigingsblok van de controller los. **Zie figuur 17.**
4. Beweeg het bevestigingsblok van de controller en de controller naar de andere armleuning, draai de montageschroeven vast en zorg ervoor dat de vrijloophendel vast zit.

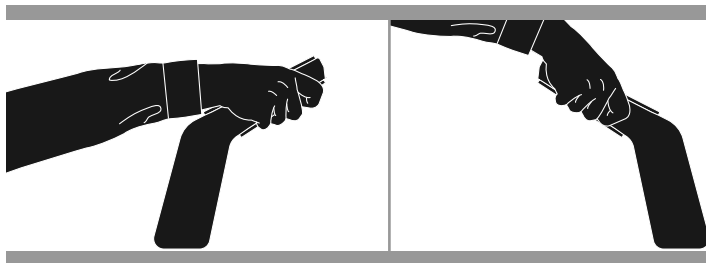

Figuur 16. Overplaatsingstangen

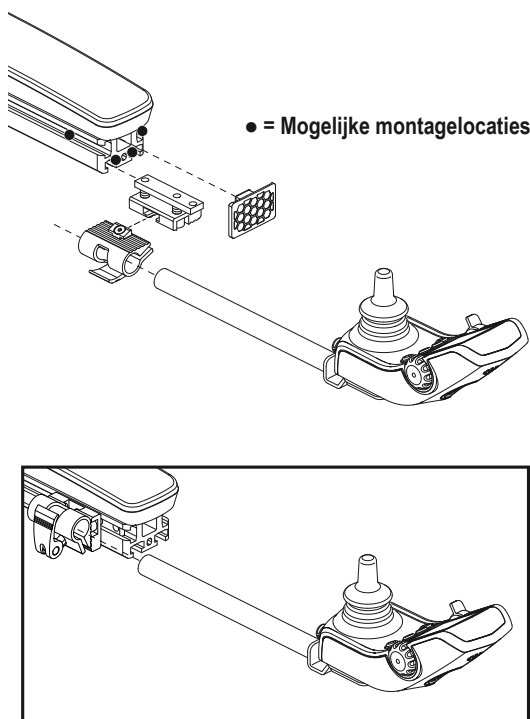


Figuur 17. Positie van de controller (Standaard bevestigingsblok wordt getoond)

Om de verlenging van de controller te wijzigen:


1. Schakel de stroomvoorziening naar de controller uit.
2. Verwijder de bedrading van de controller uit de clips waarmee hetaan de armleuning is bevestigd.
3. Klap het om en draai vervolgens de vrijloophendel om de klem los te maken. **Zie figuur 18 of 19.**
4. Schuif de controller in of uit de armleuning tot de gewenste positie is bereikt.
5. Draai de vrijloophendel en klap deze om, zodat de klem vastgemaakt kan worden.
6. Voer de bedrading van de controller naar de achterkant van het onderstel en maak het vast met clips. **Zie figuur 20.**

Om de hoogte van de controller te wijzigen:


1. Schakel de stroomvoorziening naar de controller uit.
2. Verwijder de bedrading van de controller uit de clips waarmee het aan de armleuning is bevestigd.
3. Klap het om en draai vervolgens de vrijloophendel om de klem los te maken. **Zie figuur 18 of 19.**
4. Breng de controller op de gewenste hoogte.
5. Draai de vrijloophendel en klap deze om, zodat de klem vastgemaakt kan worden.
6. Voer de bedrading van de controller naar de achterkant van het onderstel en maak het vast met clips. **Zie figuur 20.**

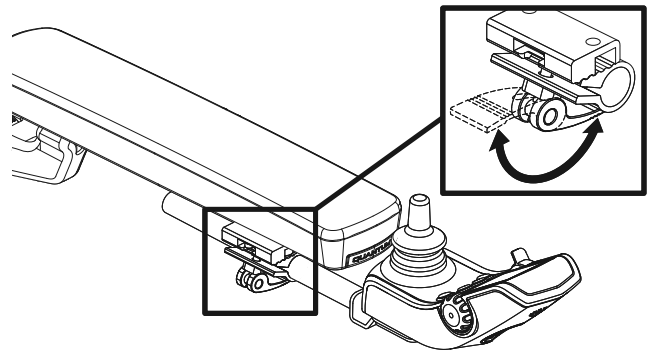

Figuur 18. Hoogteverstelling van de controller (Opklapbare armleuningen)

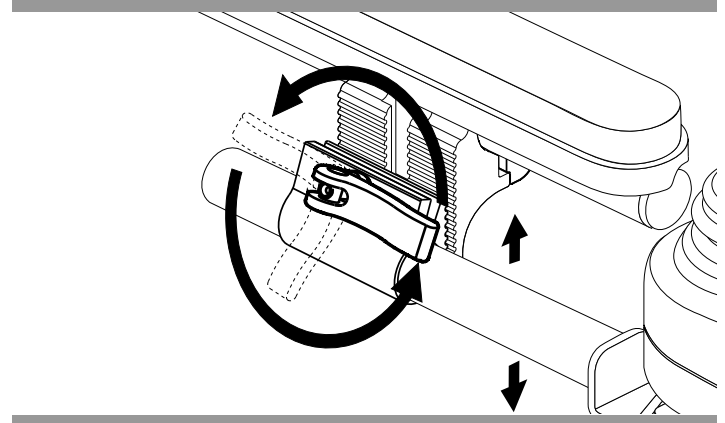

Figuur 19. Hoogteverstelling van de controller (ArMLEUNINGEN met twee steunen en insteekbare armleuningen voor intensief gebruik)

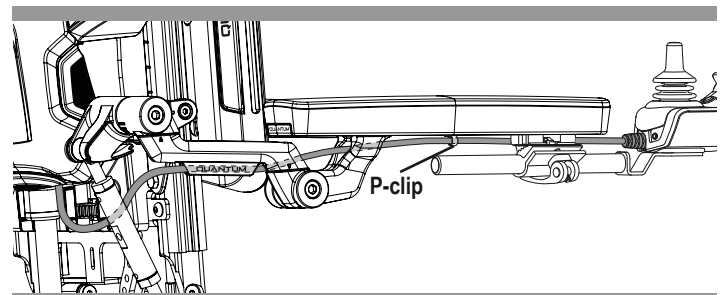

Figuur 20. Kabelvoering

De rugleuning

De rugleuning kan in hoogte en breedte worden aangepast.

Voor aanpassing van de hoogte en/of de breedte van de rugleuning:

1. Draai de bevestigingsmaterialen los. **Zie figuur 21.**
2. Zet de rugleuning op de gewenste hoogte en/of de gewenste breedte.
3. Draai de bevestigingsmaterialen vast.

TRU-Comfort

De TRU-Comfort is een unieke rugleuning die beschikbaar is om te beantwoorden aan de behoeften van de gebruiker en de mogelijkheid voor positionering. **Figuur 22** biedt informatie over de verwijderbare en verstelbare onderdelen van TRU-Comfort. Gebruik dit diagram om vertrouwd te raken met de functie en de locatie van ieder onderdeel, voordat u de TRU-Comfort in gebruik neemt. **Zie figuren 22 en 23** om te bepalen welke rugleuning zich op uw elektrische rolstoel bevindt.

Installatie en gebruik

De TRU-Comfort bestaat uit een rugleuningkussen, lumbale steun, zijsteunen, zijvleugels en/of borstkassteunen die, indien gewenst, geplaatst kunnen worden ten behoeve van het comfort van de gebruiker en positionering. Ze zijn verbonden met de rugleuning door middel van herbruikbare haak- en lussluitingen of met bevestigingsmaterialen. Ze kunnen aan de rugleuning worden bevestigd met herbruikbare klittenbandbevestigingen of hardware, of ze kunnen in het rugkussen worden verwerkt.

Om de positioneringsonderdelen van de TRU-Comfort op de stoel te plaatsen:


1. Plaats de lumbale steun(en) en de steun(en) voor de borstkas, indien gewenst, voor het comfort van de gebruiker en voor positioneringsdoeleinden met de platte kant naar beneden en duw ze in de rugleuning. Plaats de zijsteunen en de zijvleugels, indien gewenst, en maak ze vast met bevestigingsmaterialen. **Zie figuur 22.**
2. Plaats het rugkussen zodanig dat de herbruikbare klittenbandriemen tegenover de rugleuning zitten. Plaats het kussen op lumbale, laterale en thoracale ondersteuning (en). Bevestig het kussen aan de rugleuning door de twee (2) lange lusstropdassen door de ankerhaken te schuiven en de twee (2) korte haakbevestigingsriemen tegen de langere riemen te drukken. **Zie figuur 22 of 23.**




WAARSCHUWING!

Extreme temperaturen kunnen de temperatuur van de kussenonderdelen beïnvloeden en tot huidirritatie leiden. Wees voorzichtig als uw elektrische rolstoel gebruikt of opgeslagen is in een extreem hete of koude omgeving.

Controleer of alle bevestigingsmaterialen op de juiste wijze zijn geïnstalleerd en vastgemaakt.

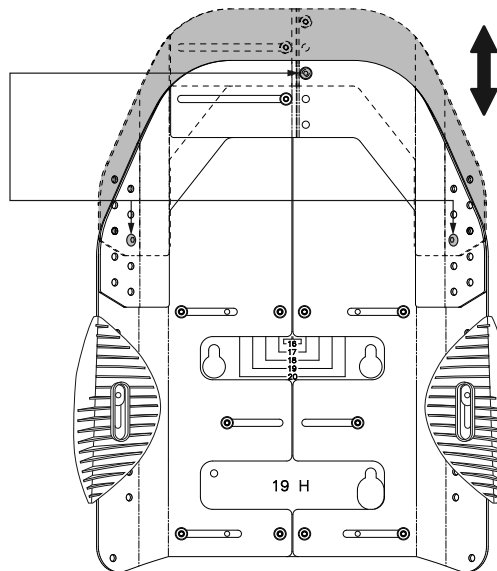

Bevestigingsmaterialen voor aanpassing van de hoogte van de rugleuning

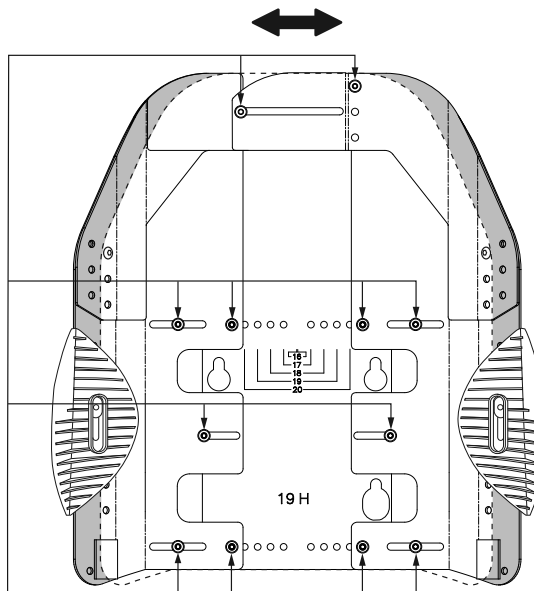

Bevestigingsmaterialen voor aanpassing van de breedte van de rugleuning

Figuur 21. Aanpassing voor de hoogte en de breedte van de rugleuning

Reiniging

Het kussen van de rugleuning is eenvoudig te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik geen bleek bij het wassen van de buitenste hoes om te voorkomen dat de hoes beschadigd raakt.

Volg alle veiligheidsinstructies op voor het juiste gebruik van het desinfecterende en/of reinigingsmiddel, voordat u het op uw product gebruikt. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dit leiden tot huidirritatie of voortijdige aantasting van de bekleding en/of de afwerking van de elektrische rolstoel.

Reiniging van de hoes van het kussen van de rugleuning:

1. Verwijder het rugkussen van de rugleuning door de herbruikbare klittenbandsluitriemen los te maken, evenals de herbruikbare sluitingen waarmee het kussen aan de rugleuning wordt bevestigd en trek vervolgens het kussen naar u toe. **Zie figuur 22 of 23.**
2. Zoek de rits aan de onderkant van het kussen.
3. Maak de rits open en trek het kussen eruit.
4. Was de hoes met de hand of in een niet-roerende wasmachine op of onder een temperatuur van 60°C (140°F).
5. Laat de hoes aan de lucht drogen.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik geen bleek bij het wassen van de buitenste hoes. Dit kan leiden tot beschadiging van de hoes.


Dompel het kussen van de rugleuning nooit onder in water. Dit kan leiden tot beschadiging van het kussen.

Plaats de hoes niet in de wasdroger. Hierdoor zou de hoes kunnen krimpen.


6. Zodra de hoes droog is, dek je het rugkussen opnieuw af en plaats je het rugkussen op de herbruikbare sluitingen op de rugleuning. Bevestig het kussen aan de rugleuning met behulp van de herbruikbare bevestigingsmiddelen op de rugleuning en de herbruikbare klittenbandsluitriemen. **Zie figuur 22 of 23.**

⚠ WAARSCHUWING!

Volg alle veiligheidsinstructies op voor het juiste gebruik van het desinfecterende en/of reinigingsmiddel, voordat u het op uw product gebruikt. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dit leiden tot huidirritatie of voortijdige aantasting van de bekleding en/of de afwerking van de elektrische rolstoel.

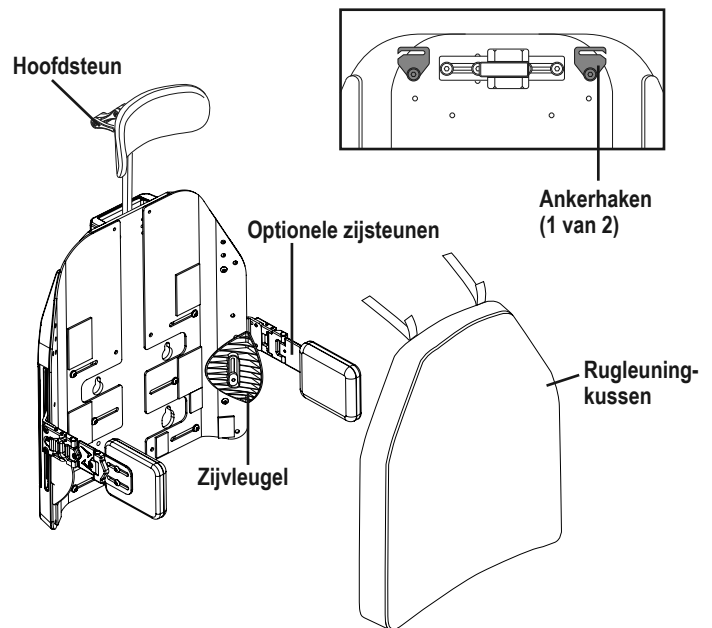

Figuur 22. Onderdelen van de TRU-Comfort 4

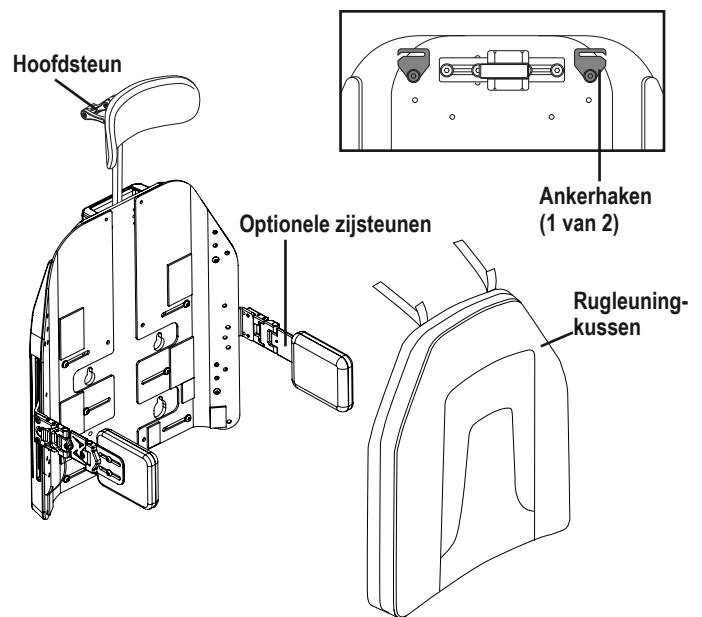

Figuur 23. Onderdelen van de Sport Back 4

Zijsteunen aanpassen

De zijsteunen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en aangepast aan verschillende hoogtes en breedtes.

NB: *Zijsteunen kunnen uitsluitend door uw Quantum Rehab-leverancier worden geïnstalleerd en aangepast.*


Om zijsteunen te installeren:

1. Plaats de bevestigingsschroeven in het zijspoor, maar draai ze niet vast.
2. Schuif de zijsteun door de gleuf, zoals getoond in **figuur 24**.
3. Schuif de zijsteun tot de gewenste hoogte en breedte. **Zie figuur 24.**
4. Draai de schroeven in het zijspoor aan.
5. Herhaal dit, indien nodig, voor de andere kant.

Om de zijsteunen aan te passen:

1. Draai de bevestigingsschroeven in het zijspoor los.
2. Schuif de zijsteun tot de gewenste hoogte en breedte. **Zie figuur 24.**
3. Draai de schroeven in het zijspoor aan.
4. Herhaal dit, indien nodig, voor de andere kant.

NB: *Afhankelijk van de hoogte van de zitting zijn er mogelijk extra gaten aanwezig/beschikbaar voor aanpassing van de algemene hoogte van zijgeleiders.*

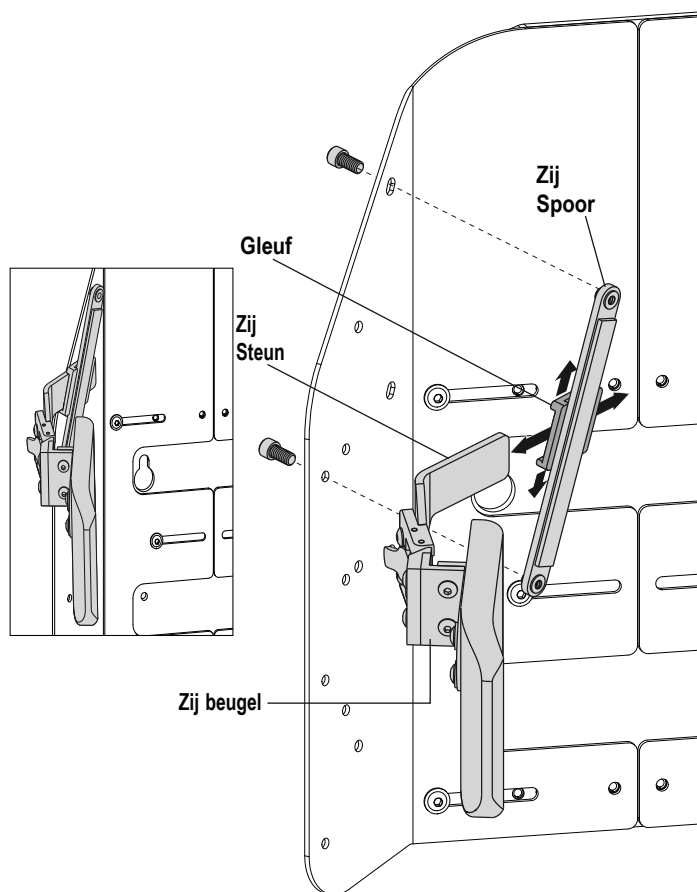

Figuur 24. Zijsteunen met HD-zittingsysteem

NB: Zijsteunen kunnen uitsluitend door uw Quantum Rehab-leverancier worden geïnstalleerd en aangepast.


OPMERKING: Als de elektrische rolstoel bezet is tijdens het installeren of afstellen van de zijtakken, moet u er eerst voor zorgen dat de inzittende zich in een veilige positie bevindt. Neem contact op met uw Quantum Rehab Leverancier als u nog meer vragen hebt.

Om zijsteunen te installeren:

1. Verwijder de plastic mantel van de zijuitworp aan de zijkant van de rugleuning.
2. Steek de vierkante plaatmoer met de pijl omhoog in de gleuf van de zijuitworp.
3. Installeer de zijsteun in de zijdelingse extrusie. **Zie figuur 25.**
4. Steek het afstandsstuk en de twee (2) bouten door de zijsteun en de vierkante plaatmoer. Draai niet volledig vast.
5. Schuif de zijsteun tot de gewenste hoogte en breedte.
6. Draai de bouten aan die in de zijuitvoering worden gestoken.
7. Plaats de plastic omhulling opnieuw op de laterale extrusie.
8. Herhaal dit, indien nodig, voor de andere kant.

Om de zijsteunen aan te passen:

1. Maak de twee (2) bouten los in de zijdelingse extrusie.
2. Schuif de zijsteun tot de gewenste hoogte en breedte. **Zie figuur 25.**
3. Draai de bouten aan die in de zijdelingse extrusie worden gestoken.
4. Herhaal dit, indien nodig, voor de andere kant.

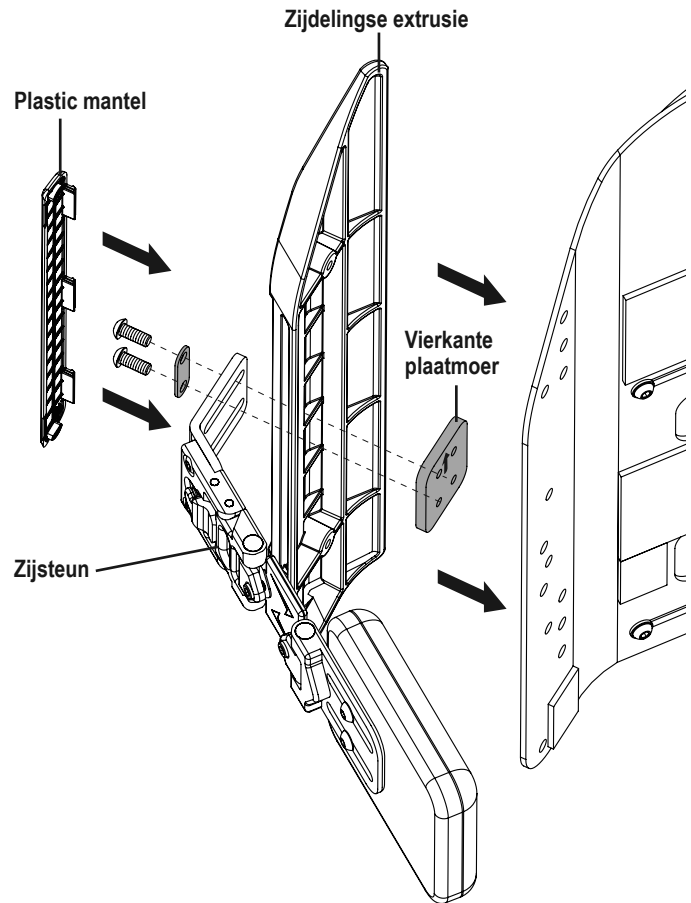

Figuur 25. Zijsteunen

Verstellen van de hoofdsteun

De hoofdsteun kan eenvoudig voor verschillende hoogtes, dieptes en hoeken worden aangepast

Om de hoogte, diepte of hoek van de hoofdsteun te verstellen:

1. Draai de verstelschroeven die bij de gewenste aanpassing horen, los. **Zie figuur 26.**
2. Plaats de hoofdsteun in de gewenste positie.
3. Draai de verstelschroeven vast.

NB: Nadat de aanpassingen zijn uitgevoerd en de hoofdsteun zich in de gewenste positie bevindt, moet u controleren of alle bevestigingsmaterialen stevig zijn vastgemaakt.

⚠ WAARSCHUWING!

De totale hoogte van de hoofdsteun mag niet hoger zijn dan 17,78 cm boven de beugel van de hoofdsteun.

Om de hoofdsteun aan de rugleuning te bevestigen:

1. Bevestig het spoor aan de rugleuning met vier (4) platte kopschroeven.
2. Schuif het hoofdsteunblok op de baan naar de gewenste locatie.
3. Draai de stelschroef, die zich onder de hendel bevindt, vast om het blok op zijn plaats te vergrendelen.
4. Steek de hardware van de hoofdsteun in de vierkante opening en zet deze op de gewenste hoogte.

Opslag

Sommige onderdelen van uw elektrische rolstoel zijn gevoelig voor extreme temperatuurswijzigingen. Houd uw elektrische rolstoel altijd bij temperaturen tussen -8°C en 50°C. De stoel dient te worden opgeslagen bij kamertemperatuur en op een schone en droge plaats.


Verzorging en onderhoud

Verwijdering van uw mobiliteitsproduct dient te gebeuren overeenkomstig lokale en nationale wettelijke voorschriften. Neem contact op met uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf of uw Quantum Rehab-leverancier voor informatie over de juiste verwijdering van verpakkingsmateriaal van mobiliteitsproducten en metalen frameonderdelen, kunststof onderdelen, elektronica, accu's en neopreen-, siliconen- en polyurethaanmateriaal.

⚠ WAARSCHUWING!

Plastic zakken zijn verstikkingsgevaar. Gooi plastic zakken op de juiste manier weg en laat kinderen niet met ze spelen.

- Zorg ervoor dat alle bevestigingsmaterialen stevig zijn vastgemaakt, maar draai bevestigingsmaterialen niet té stevig aan.

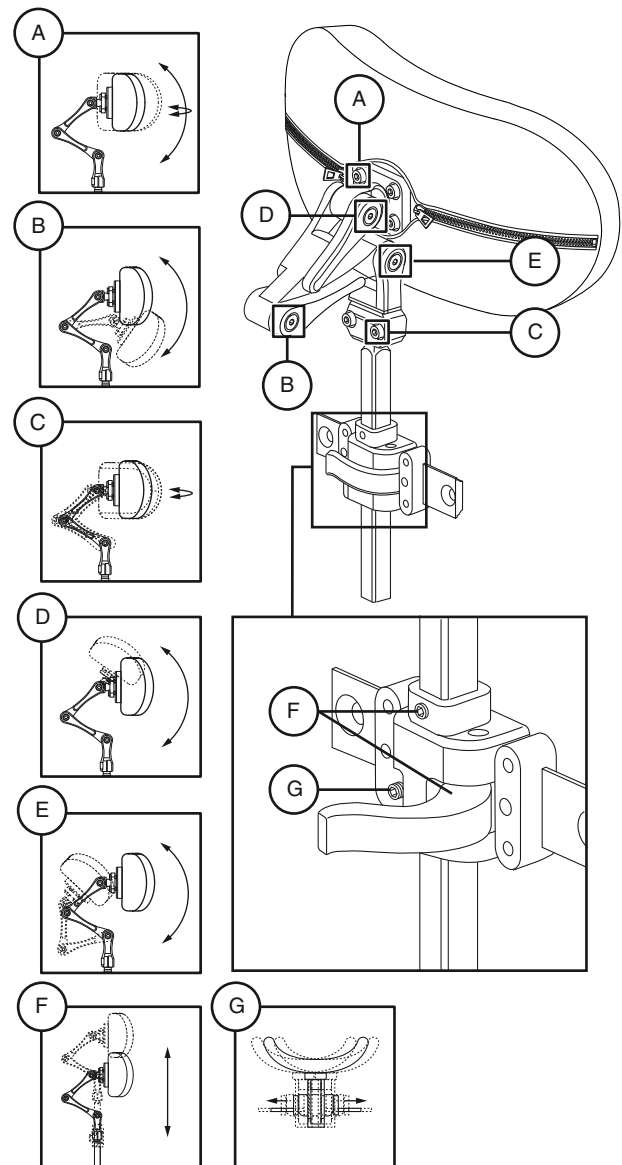

Figuur 26. Onderdelen voor het verstellen van de hoofdsteun

- Om het zittingsysteem van de TRU-Balance 3 te reinigen, neemt u het af met een vochtige doek met milde zeep en water. Laat het onderdeel goed drogen voor gebruik. Voor juiste reiniging van het rugkussen van de TRU-Comfort, zie de reinigingsinstructies in het hoofdstuk "TRU-Comfort" van deze handleiding.

Garantie

Beperkte garantie van drie jaar

Gedurende drie (3) jaar vanaf de datum van aankoop zal Quantum zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging, naar eigen goeddunken en aan de oorspronkelijke koper, van alle onderstaande onderdelen waarvan na onderzoek door een bevoegde vertegenwoordiger van Quantum is gebleken dat het defecten vertoont in materiaal en/of afwerking:

- Structurele frameonderdelen

Beperkte garantie van twee jaar

Beperkte garantie van twee jaar Gedurende twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop zal Quantum zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging, naar eigen goeddunken en aan de oorspronkelijke koper, van alle onderstaande onderdelen waarvan na onderzoek door een bevoegde vertegenwoordiger van Quantum is gebleken dat het defecten vertoont in materiaal en/of afwerking:

- Elektronica
- Kussen van de rugleuning van de TRU-Comfort
- Kussen van de rugleuning van de Sport Back

Garantie van achttien maanden

Gedurende achttien (18) maanden vanaf de datum van aankoop zal Quantum zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging, naar eigen goeddunken en aan de oorspronkelijke koper, van alle onderstaande onderdelen waarvan na onderzoek door een bevoegde vertegenwoordiger van Quantum is gebleken dat het defecten vertoont in materiaal en/of afwerking:

- Regelaar

Garantieservice kan worden uitgevoerd door een Quantum Rehab-leverancier of door Quantum. Stuur geen defecte onderdelen naar Quantum zonder voorafgaande goedkeuring. Alle verzendkosten en beschadiging welke is ontstaan tijdens verzending van onderdelen voor reparatie of vervanging zijn voor rekening van de oorspronkelijke koper.

Uitsluiting van garantie

- Bekleding en zitting (tenzij anders vermeld)
- Reparaties en/of wijzigingen die zijn uitgevoerd zonder specifieke toestemming van Quantum
- Omstandigheden buiten de invloedssfeer van Quantum
- Arbeidskosten, serviceonderhoud, verzending en andere kosten die zijn ontstaan door reparatie van het product, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door Quantum
- Schade veroorzaakt door:
 - Gemorste of gelekte accuvloeistof
 - Misbruik, verkeerd gebruik, ongeluk of nalatigheid
 - Onjuiste bediening, onderhoud of opslag
 - Commercieel of ongewoon gebruik

Er bestaat geen andere uitdrukkelijke garantie.

Impliciete garantie, inclusief garantie voor verhandelbaarheid en geschiktheid voor het specifieke doel, is beperkt tot één (1) jaar vanaf de datum van aankoop en voorzover wettelijk toegestaan. Enige en alle impliciete garanties zijn uitgesloten. Dit is het enige rechtsmiddel. Aansprakelijkheid voor gevolgschade onder enige en alle garanties is uitgesloten.

Sommige staten geven geen toestemming voor beperking van de duur van impliciete garanties of staan niet toe dat incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten of beperkt. In deze gevallen zijn bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie voorziet u van specifieke rechten en per staat kunt u bovendien nog andere rechten hebben.



**USA**

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.quantumrehab.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
www.quantumrehab.com

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.quantumrehab.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale, Auckland 0600
www.pridemobility.co.nz

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.quantumrehab.co.uk

Holland

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
The Netherlands
www.quantumrehab.eu

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.quantumrehab-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.quantumrehab.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.quantumrehab.es

Germany

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof

China

Room 508, Building #4
TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road
Pudong New Area
Shanghai 201318



I N F M A N U 4 7 7 3