

Q TB-FLEX™

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO



QUANTUM®

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

¡ADVERTENCIA!

Sólo un proveedor de Quantum Rehab o un técnico calificado podrán realizar la configuración inicial de este producto, así como cualquier otro procedimiento indicado en este manual.

Los símbolos que se muestran a continuación son utilizados en este manual de usuario y en la silla de ruedas eléctrica para identificar advertencias y avisos importantes. Asegúrese de que los ha leído y comprendido perfectamente.

¡ADVERTENCIA!

Indica una situación o circunstancia potencialmente peligrosa. De no seguir los procedimientos indicados, podría sufrir lesiones, daños en el material, o provocar un funcionamiento incorrecto de la silla. En el producto, este icono tiene forma de símbolo negro dentro de un triángulo amarillo con borde negro.

¡OBLIGATORIO!

Pasos que han de realizarse tal y como se indica. De no realizar las acciones obligatorias, podría sufrir lesiones o daños en el material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo blanco sobre un círculo azul con borde blanco.

¡PROHIBIDO!

Estas acciones están prohibidas. Estas acciones no deberán realizarse bajo ninguna circunstancia. La realización de acciones prohibidas puede provocar lesiones físicas o daños en el material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo negro con un círculo y raya rojos.

Uso indicado

Un componente de silla de ruedas es un dispositivo destinado a fines médicos que generalmente se vende como parte integral de una silla de ruedas; también se puede vender por separado como pieza de repuesto.

Con respecto a los dispositivos recetados

¡ADVERTENCIA!

¡ATENCIÓN! La ley federal limita a este dispositivo a su venta por parte de o por orden de un médico u otro profesional certificado con licencia conforme a la ley del estado (sólo en los EE.UU.) o de la región en donde ejerce este profesional para usar u ordenar el uso de este dispositivo.

NOTA: El presente manual recoge las últimas especificaciones e informaciones del producto disponibles en el momento de su publicación. Nos reservamos el derecho a aportar modificaciones en caso de ser necesario. Cualquier modificación en nuestros productos puede provocar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones de este manual y el producto que ha comprado. En nuestro sitio web encontrará la versión última/actual de este manual.

NOTA: Este producto cumple con las directivas y normativas WEEE, RoHS y REACH.

NOTA: Este producto cumple con la clasificación IPX4 (IEC 60529).

NOTA: Ni este producto o sus componentes están fabricados con látex de goma natural. Consulte al fabricante con respecto a cualquier accesorio o pieza de repuesto.



Índice

Símbolos de seguridad en el producto	4
El asiento TB-Flex™	5
Directrices de seguridad.....	5
Funcionamiento del asiento TB-Flex	6
Amplitud de movimientos	6
Respaldo abatible	7
Reposabrazos removibles del TB-Flex	7
Reposabrazos de dos pies	10
Traslados	11
Posición del mando.....	11
Opción de reclinación manual	12
Respaldo del TB-Flex	13
Instalación y uso.....	13
Limpieza	13
Ajuste de reposacabezas	14
Almacenamiento.....	14
Cuidado y mantenimiento.....	14
Garantía.....	16



Símbolos de seguridad en el producto

Estos símbolos aparecen en su producto y sirven para identificar advertencias y acciones obligatorias o prohibidas. Asegúrese de que los ha leído y comprendido perfectamente.



Lea con atención la información del manual de usuario.



Evite el contacto con la lluvia, la nieve, el hielo, la sal o el agua estancada siempre que sea posible. Mantenga y guarde su silla en un lugar limpio y seco.



EMI/RFI—Este producto ha sido probado y aprobado para un nivel de inmunidad de 20 V/m.



Peso máximo sportado



Existen puntas afiladas/punzantes.



Consulte a su proveedor Quantum Rehab antes de realizar cualquier cambio en la configuración de su asiento.



No exponer a fuentes de calor como llama viva u chispas.



No fumar



Sólo la funda—Temperatura máxima de lavado 60°C (140°F)



No lavar en seco.



No planchar.



No usar lejía.



El asiento TB-Flex™

El asiento TB-Flex es un tipo de asiento especial desarrollado específicamente para la silla de ruedas eléctrica Quantum. Este asiento se adapta a las necesidades individuales de cualquier usuario y va acoplado a la base eléctrica de la silla Quantum para ofrecer una maniobrabilidad óptima.

Incluye un sistema de ajuste tipo velcro para sujetar el cojín a la base del asiento. Este sistema de sujeción no puede ser utilizado con cojines de material antideslizante ya que podría dañar el cojín.

Figura 1 proporciona información sobre los componentes del asiento TB-Flex. El respaldo del TB-Flex se describe en “Ajustes de altura y ancho para el respaldo del TB-Flex” (**figura 13**). Consulte estos diagramas para familiarizarse con la función y ubicación de cada componente antes de usar el asiento TB-Flex.

NOTA: Consulte el manual suministrado con su mando para obtener información sobre el funcionamiento de la palanca de mando. Si su asiento TB-Flex está equipado con otro dispositivo de control, consulte el manual de funcionamiento de ese dispositivo y/o el manual de usuario de su silla de ruedas.

Directrices de seguridad

Antes de manejar el asiento TB-Flex, lea lo siguiente. Estas directrices fueron redactadas por su propio bien, con objeto de ayudarle a manejar de forma segura este producto.

- Antes de sentarse en el asiento TB-Flex, asegúrese de que éste esté apagado.
- Solicite la ayuda de otra persona para sentarse en el asiento TB-Flex.
- Siga todos los procedimientos y advertencias indicados en el manual de usuario de su silla de ruedas eléctrica y Guía de consumo de seguridad.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El centro de gravedad del asiento viene predeterminado de fábrica para adecuarse a las necesidades de la mayoría de usuarios. Su proveedor de Quantum Rehab ha evaluado este asiento y ha realizado los ajustes necesarios para adaptarlo a sus necesidades. Antes de cambiar la configuración de su asiento, póngase en contacto con Quantum o su proveedor de Quantum Rehab.

Si se afloja cualquier pieza del asiento, notifique de inmediato el problema a su proveedor de Quantum Rehab.

En caso de fallo de energía en la silla de ruedas eléctrica, colóquese en una posición segura, solicitando ayuda si es necesario. Contáctese de inmediato con su proveedor de Quantum Rehab para notificar el incidente.

Este asiento no está pensado para ser utilizado como asiento de otro vehículo. Utilice los asientos y sistemas de sujeción proporcionados por el fabricante del vehículo.

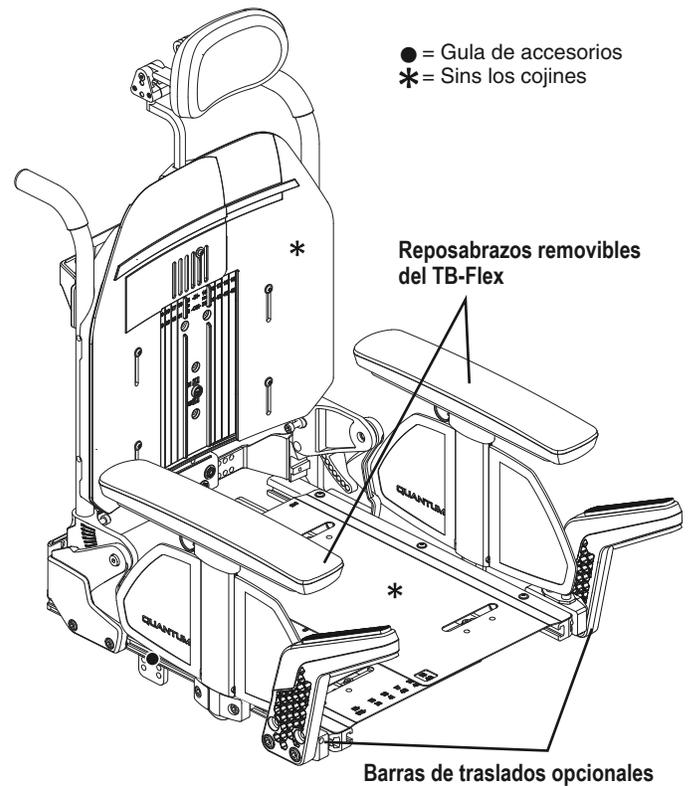


Figura 1. Componentes del asiento TB-Flex

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Quantum recomienda encarecidamente no fumar cigarrillos mientras esté sentado en el asiento, si bien éste ha superado con éxito las pruebas requeridas contra quemaduras de cigarrillos. Si decide fumar mientras permanece sentado en el asiento, deberá cumplir con las siguientes directrices de seguridad.

- No deje cigarrillos encendidos cerca del asiento.
- No acerque los ceniceros al asiento.
- Antes de tirar un cigarrillo, asegúrese de que esté bien apagado.

🚫 ¡PROHIBIDO!

Evite el contacto con la lluvia, la nieve, el hielo, la sal o el agua estancada siempre que sea posible. Mantenga y guarde el producto en un lugar limpio y seco.

🚰 ¡OBLIGATORIO!

No supere el peso máximo de su silla de ruedas o 136 kg (300 lbs.), el menor de ambos.

Funcionamiento del asiento TB-Flex

El asiento TB-Flex está equipado con un respaldo, cuyo ancho y altura son ajustables, y que puede manejarse con un mando o un mando especial.

Amplitud de movimientos

Su asiento TB-Flex proporciona hasta 30° de inclinación (basculación) y 25.4 cm (10 pulgadas) de elevación, pudiendo reclinarse 85°-120°, e inclinarse/reclinarse hasta un máximo de 120°. **Ver figura 3.**

Su asiento TB-Flex cuenta con un sistema de bloqueo que impide la conducción de la silla en posición inclinada. Se activará un inhibidor total de conducción en un ángulo de inclinación predeterminado programado desde fábrica. **Ver figura 2.**

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No intente ignorar, retirar, reprogramar y/o ajustar los inhibidores totales o parciales que están pre-programados desde fábrica. No hacer caso de esta advertencia puede provocar una lesión.

Antes de activar las funciones de basculación, reclinación o elevación, inspeccione la zona inmediata para asegurarse de que nada entorpezca el mecanismo. Mantenga la zona despejada durante estos movimientos.

NOTA: *Contáctese con su proveedor de Quantum Rehab antes de realizar cualquier cambio en la configuración de su asiento.*

	Bloqueo de reclinación	Bloqueo de basculación	Bloqueo de elevación	Un cuarto de velocidad	Bloqueo de conducción
Elevado				X	
Basculado más de 20°			X		X
Reclinado más de 20°			X		X
Basculado/Reclinado más de 110°	X	X	X		X

Figura 2. Matriz del sistema de bloqueo

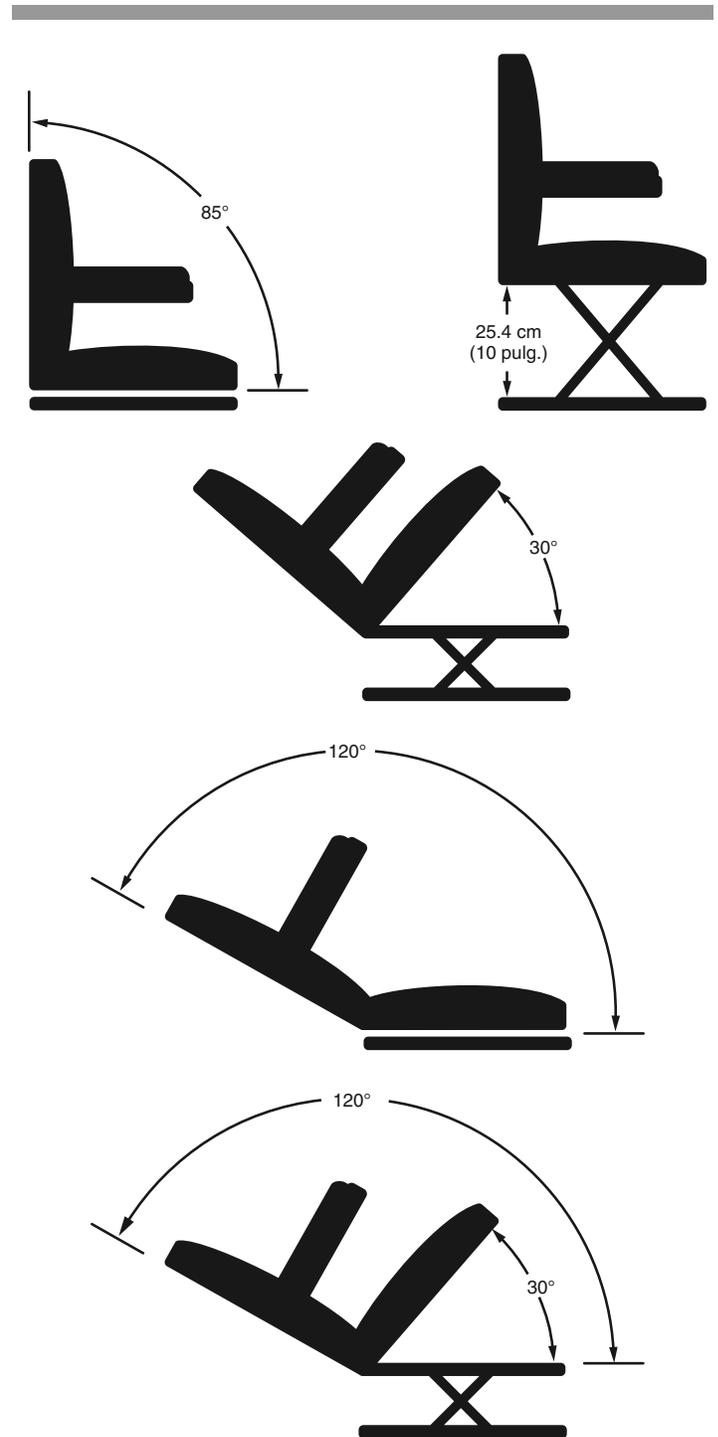


Figura 3. Amplitud de movimientos del asiento TB-Flex

Respaldo abatible (opcional)

El respaldo abatible permite al usuario replegar el respaldo hacia delante para facilitar su transporte. **Ver figura 4.** Su sistema de asiento puede estar equipado con uno o dos respaldos abatibles hacia delante.

Para abatir el respaldo:

1. Retire el pasador de detención. **Ver figura 5.**
2. Recline hacia abajo el respaldo.

Para volver el respaldo a su posición vertical:

1. Levante el respaldo y colóquelo en posición vertical.
2. Vuelva a colocar el pasador y compruebe que todo esté en su sitio. **Ver figura 5.**

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Compruebe que el pasador de detención esté insertado correctamente antes de volver a subirse a la silla.

Reposabrazos removibles del TB-Flex

Los reposabrazos removibles del asiento TB-Flex están disponibles en sus versiones con liberación rápida o con una palanca de reposabrazos. Ambos tipos pueden ser ajustados y removidos fácilmente para que subir y bajar de la silla de ruedas eléctrica resulte más sencillo. Su altura total puede ajustarse en incrementos de 2.54 cm (1 pulgada) hasta llegar a 12.7 cm (5 pulgadas). Dicho intervalo corresponde a la distancia que separa la parte superior del riel del asiento de la parte superior de la almohadilla del reposabrazos. El intervalo de ajuste total es de 22.86–35.56 cm (9–14 pulgadas) de altura.

Para optimizar el confort de su producto, necesitará las siguientes herramientas:

- Un juego de llaves Allen métricas
- Llave plana (de boca fija) métrica
- Destornillador Phillips

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No intente levantar ni mover la silla de ruedas o el asiento agarrando sus piezas extraíbles, como los reposabrazos, el reposapiés, los cojines del asiento, el respaldo o el mando. Agarre únicamente los componentes estructurales macizos y no extraíbles para levantar o mover la silla de ruedas o el asiento.

No apoye todo su peso sobre los reposabrazos y no utilice estos para llevar colgados objetos o transportar cosas, ya que se podría desequilibrar la silla y usted podría caer al suelo y lastimarse.

No cuelgue objetos del mando ni de su soporte. No utilice el mando ni su soporte para transportar objetos, como por ejemplo durante los traslados. Dicha utilización podría dañar estos componentes, provocar un vuelco en la silla y producirle lesiones personales.

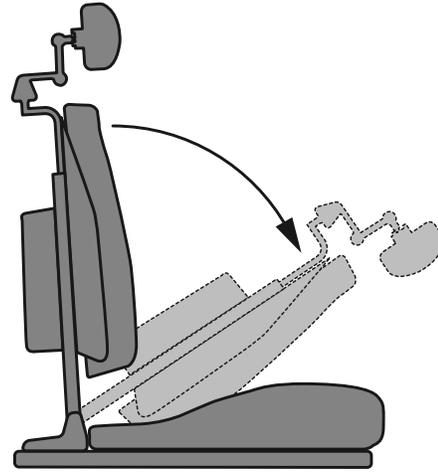


Figura 4. Respaldo abatible (libre)

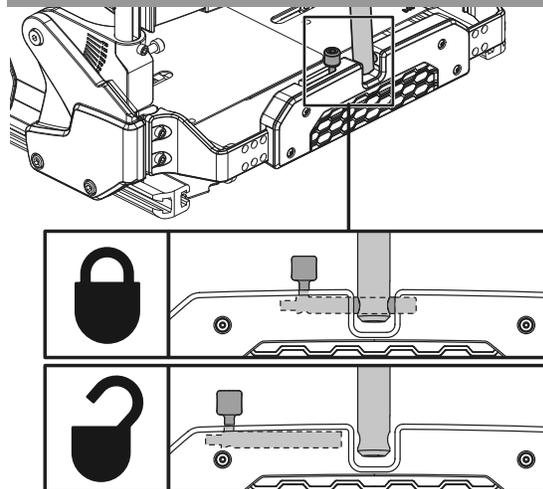


Figura 5. Respaldo abatible (pasador de detención)

Para remover el ensamblaje del reposabrazos de liberación rápida:

1. Gire la palanca del reposabrazos en sentido antihorario.
2. Levante el conjunto del reposabrazos a su bloque de sujeción. **Ver figura 6.**

Para instalar el ensamblaje del reposabrazos de liberación rápida:

1. Acople el conjunto del reposabrazos a su bloque de sujeción. **Ver figura 6.**
2. Gire la palanca del reposabrazos en el sentido de la agujas del reloj.

Para ajustar la altura:

1. Afloje pero no retire el tornillo de fijación girándolo en sentido antihorario con una llave hexagonal de 2 mm. **Ver figura 6.**
2. Tire del pasador de retención. Levante o baje el reposabrazos a la altura deseada y luego suelte el pasador de retención.
3. Apriete el tornillo de fijación girándolo en sentido horario con una llave hexagonal de 2 mm.
4. En caso necesario, repita la acción del lado opuesto.

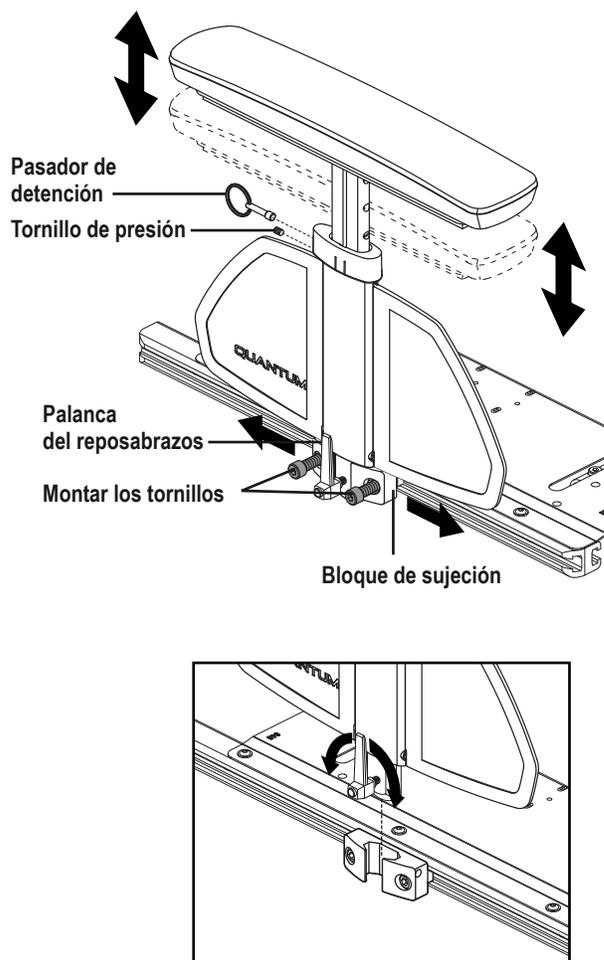


Figura 6. Instalación/extracción de los reposabrazos de liberación rápida del TB-Flex

Para remover el ensamblaje del reposabrazos usando la palanca del reposabrazos:

1. Gire hacia delante la palanca del reposabrazos. **Ver figura 7.**
2. Levante el conjunto del reposabrazos.

Para instalar el ensamblaje del reposabrazos usando la palanca del reposabrazos:

1. Acople el conjunto del reposabrazos a su bloque de sujeción. **Ver figura 7.**
2. Gire hacia atrás la palanca del reposabrazos.

Para ajusta la altura:

1. Afloje pero no retire el tornillo de fijación girándolo en sentido antihorario con una llave hexagonal de 2 mm. **Ver figura 7.**
2. Tire del pasador de retención. Levante o baje el reposabrazos a la altura deseada y luego suelte el pasador de retención.
3. Apriete el tornillo de fijación girándolo en sentido horario con una llave hexagonal de 2 mm.
4. En caso necesario, repita la acción del lado opuesto.

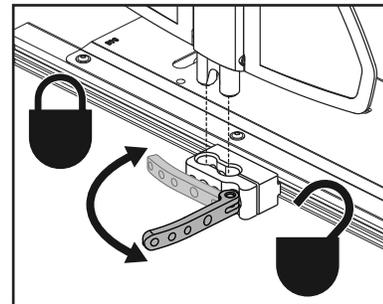
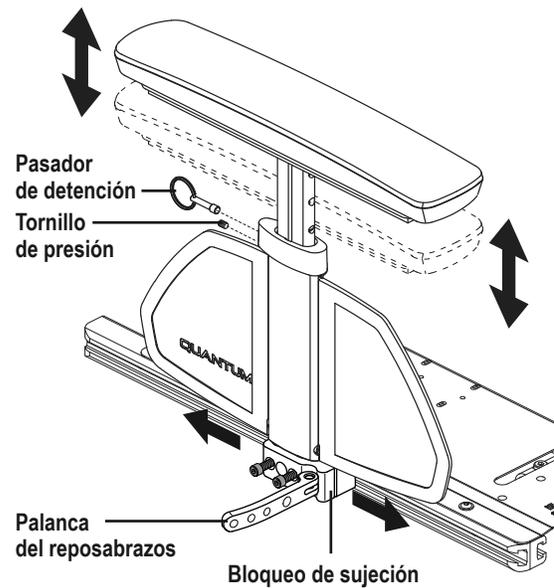


Figura 7. Instalación/extracción de los reposabrazos del TB-Flex con palanca en el reposabrazos

Reposabrazos de dos pies (opcional)

En el reposabrazos de dos pies, la altura puede variar es 22.86–33.02 cm (9–13 pulgadas) en incrementos de 2.54 cm (1 pulgada). Dicho intervalo corresponde a la distancia que separa la parte superior del riel del asiento de la cima de la almohadilla reposabrazos. También puede plegar hacia arriba los reposabrazos o extraerlos para facilitar el traslado. **Ver figura 8.**

Para quitar el conjunto del reposabrazos:

1. Empuje la palanca por resorte hacia abajo y tire hacia arriba de la parte frontal del reposabrazos. **Ver figura 8.**
2. Retire el pasador de detención de la parte posterior del asiento. **Ver figura 8.**
3. Tire hacia arriba de la parte posterior del reposabrazos para extraer el conjunto.

Para instalar el conjunto del reposabrazos:

1. Coloque la parte posterior del reposabrazos en el receptáculo posterior del asiento e inserte el pasador. **Ver figura 8.**
2. Gire el conjunto del reposabrazos hacia abajo.
3. Empuje la parte frontal del reposabrazos en el receptáculo frontal del asiento y gire la palanca por resorte hasta la posición horizontal para sujetarlo en su sitio.

Para ajustar la altura del reposabrazos:

1. Empuje hacia dentro la palanca por resorte. **Ver figura 9.**
2. Suba o baje el reposabrazos a la altura deseada.
3. Gire la palanca por resorte hacia fuera para sujetar el reposabrazos su sitio. En caso necesario, intente subir o bajar el reposabrazos comprobar que esté bien sujeto.

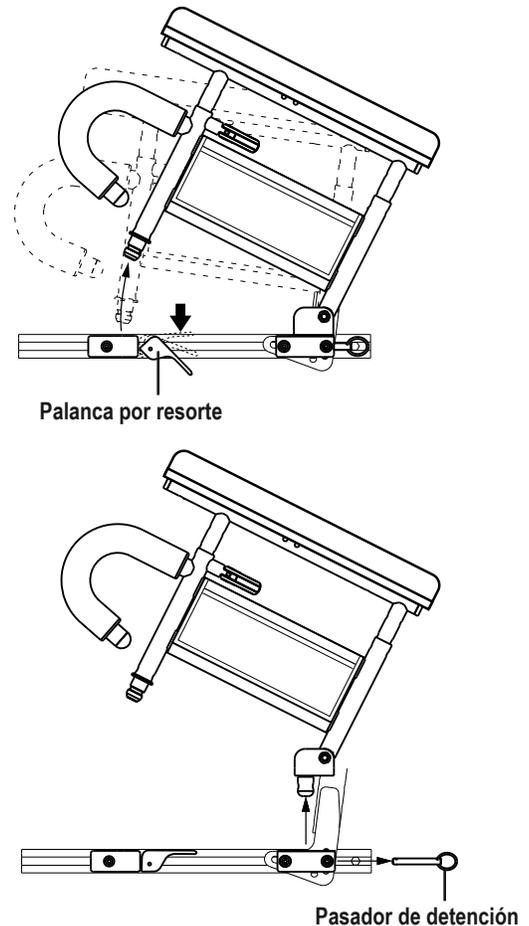


Figura 8. Instalación y extracción del reposabrazos de dos pies

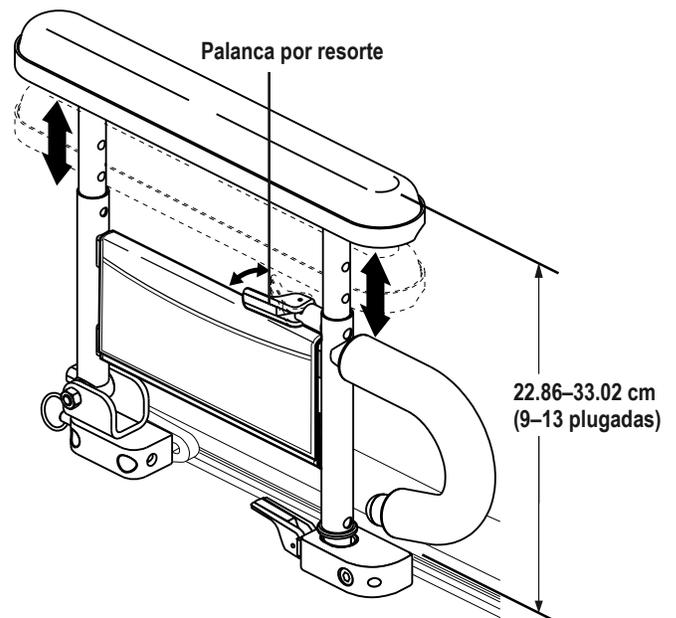


Figura 9. Ajuste de la altura del reposabrazos de dos pies

Traslados (opcional)

Existen barras de traslado opcionales. Las barras de traslado están pensadas para facilitar el cambio de postura, mientras está sentado en la silla, y en o fuera de de la silla de ruedas. Consulte la Guía de Seguridad del Usuario suministrada con el manual de su silla para obtener más información sobre los traslados. **Ver figura 10.**

Posición del mando

El mando puede adaptarse para usuarios diestros o zurdos. También puede ajustar la posición horizontal del mando en el reposabrazos y la altura del mismo.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Utilice los puntos de sujeción correctos para evitar que el cable del mando quede atrapado en las ruedas motrices, pinzado en la estructura del asiento o que se dañe al pasar por una puerta.

Para cambiar la posición horizontal del mando:

1. Apague el mando.
2. Extraiga el cable del mando de los clips que lo sujetan al reposabrazos.
3. Abra y luego gire la pestaña de extracción para aflojar el cepo. **Ver figura 11.**
4. Deslice el mando a lo largo del reposabrazos hasta lograr la posición deseada.
5. Gire y cierre la pestaña de extracción para apretar el cepo.

Para cambiar la altura del mando:

1. Apague el mando.
2. Abra y luego gire la pestaña de extracción para aflojar el cepo. **Ver figura 11.**
3. Ajuste el mando a la altura deseada.
4. Gire y cierre la pestaña de extracción para apretar el cepo.
5. Lleve el cable del mando hacia la parte posterior de la base eléctrica.

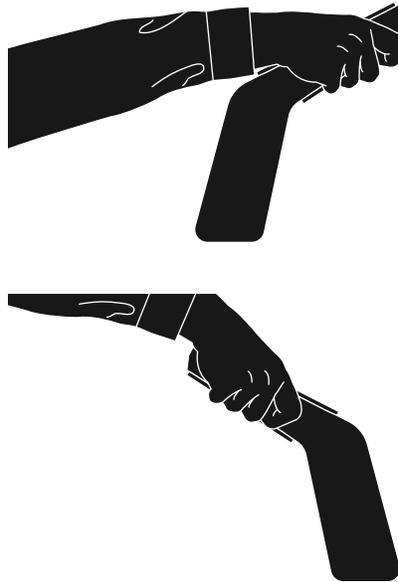


Figura 10. Barras de traslado (opcional)

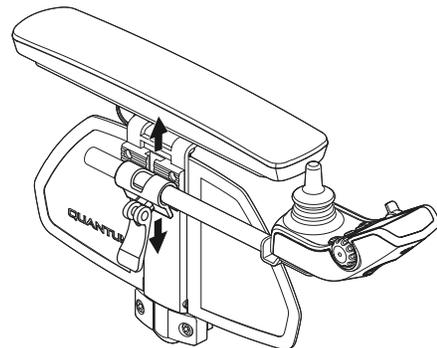
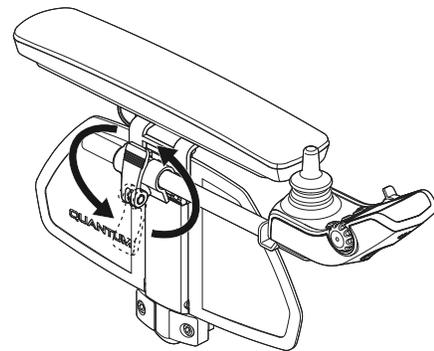


Figura 11. Ajuste del mando en altura

Opción de inclinación manual

Si su asiento TB-Flex está equipado con la opción de inclinación manual, podrá ajustar el respaldo en ángulos que van de la mínima (85° con respecto a la base del asiento) a la máxima inclinación posible (120° con respecto a la base del asiento). **Ver figura 12.** Cuando el asiento está inclinado por encima de 110°, la silla bloqueará todo el sistema. La reducción del ángulo de inclinación por debajo de 110° volverá a activar los motores.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Nunca recline el respaldo con la silla en basculación ya que podría causar una grave lesión al usuario. Un mecanismo de seguridad evita bascular el asiento con éste inclinado por encima de 110°. Para volver a activar la basculación, lleve el respaldo a su posición vertical.

Para inclinar el respaldo:

1. Agarre el puño en la parte superior del respaldo.
2. Apriete la palanca de inclinación y coloque el respaldo en el ángulo deseado. **Ver figura 12.**
3. Suelte la palanca para bloquear el respaldo en su sitio.

Opción de ajuste del ángulo

Si su asiento TB-Flex está equipado con la opción de ajustar el ángulo podrá ajustar el respaldo en ángulos que van de la mínima (85° con respecto a la base del asiento) a la máxima inclinación posible (135° con respecto a la base del asiento). **Ver figura 13.** Cuando el asiento está inclinado por encima de 110°, la silla bloqueará todo el sistema. La reducción del ángulo de inclinación por debajo de 110° volverá a activar los motores.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Nunca recline el respaldo con la silla en basculación ya que podría causar una grave lesión al usuario. Un mecanismo de seguridad evita bascular el asiento con éste inclinado por encima de 110°. Para volver a activar la basculación, lleve el respaldo a su posición vertical.

Para ajustar el respaldo del asiento:

1. Agarre la correa en la parte inferior del respaldo.
2. Tire de la correa para liberar el respaldo y coloque el respaldo en el ángulo deseado. **Ver figura 13.**
3. Suelta la correa para bloquear el respaldo en su sitio.

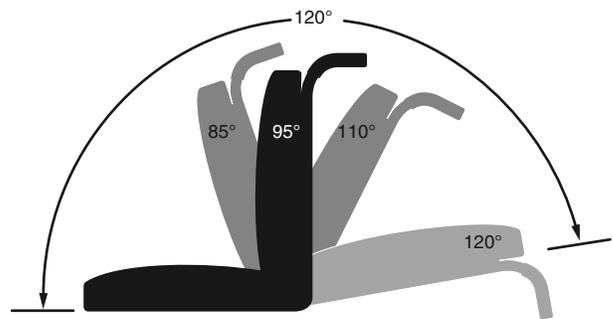


Figura 12. Opción de inclinación manual—ángulos de inclinación mínimo y máximo

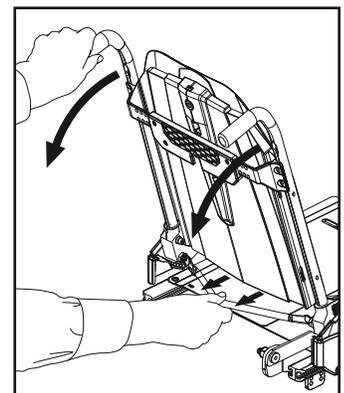
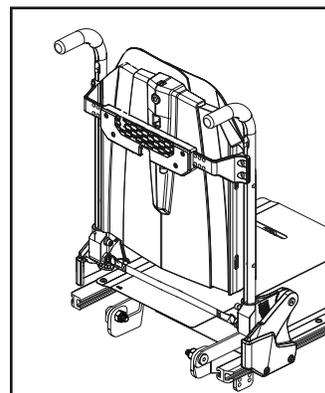
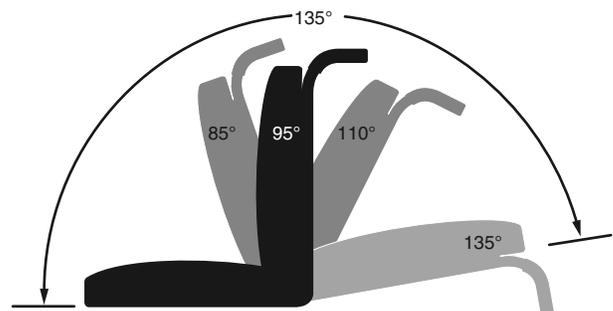


Figura 13. Opción de ajuste del ángulo—ángulos de inclinación mínimo y máximo

El respaldo del TB-Flex (opcional)

El respaldo del TB-Flex se puede ajustar en altura y ancho.

Para ajustar la altura y/o el ancho del respaldo:

1. Afloje los tornillos. Ver figura 14.
2. Coloque el respaldo a la altura deseada y/o el ancho deseado.
3. Ajuste los tornillos.

Instalación y uso

El respaldo del TB-Flex consiste de un cojín del respaldo y un soporte lumbar que puede ser colocado según sea necesario para comodidad y posicionamiento del usuario. Dichos componentes se unen al respaldo mediante tiras adherentes de tipo velcro u otros elementos de sujeción.

Para colocar los cojines del TB-Flex en la silla:

1. Posicione el cojín del respaldo de tal forma que las pestañas de las tiras de ajuste queden mirando hacia el respaldo. Coloque el cojín sobre cualquier soporte lumbar y luego sujételo al respaldo mediante las tiras de ajuste tipo velcro.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Las temperaturas extremas pueden afectar a la temperatura de los componentes del cojín y provocar irritación cutánea. Extreme la precaución si su silla de ruedas eléctrica ha sido utilizada o guardada en un entorno con temperaturas muy altas o muy bajas.

Compruebe que todas las piezas están instaladas y sujetas correctamente.

Limpieza

El cojín del respaldo se limpia fácilmente.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No utilice lejía para lavar la funda exterior, ya que podría resultar dañada.

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad para la utilización correcta del desinfectante o agente limpiador antes de aplicarlo a su producto. El incumplimiento de estas indicaciones podría provocar irritaciones cutáneas o daños en la tapicería o el acabado de su silla eléctrica.

Para limpiar la funda del cojín del respaldo:

1. Para retirar el cojín del respaldo, despegue las tiras de ajuste que sujetan el cojín al respaldo y tire del cojín hacia usted.
2. Localice la cremallera en la parte inferior del cojín.
3. Abra la cremallera de la funda y extraiga el cojín.
4. Lave la funda a máquina a una temperatura igual o inferior a 60°C (140°F).
5. Deje secar la funda al aire libre.

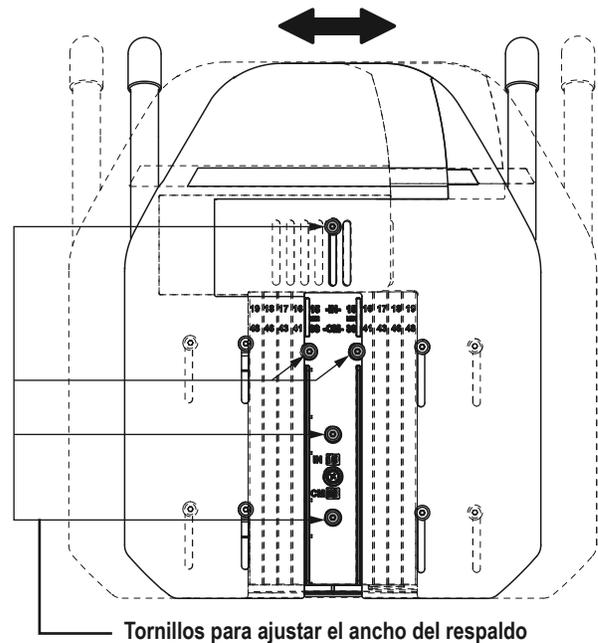
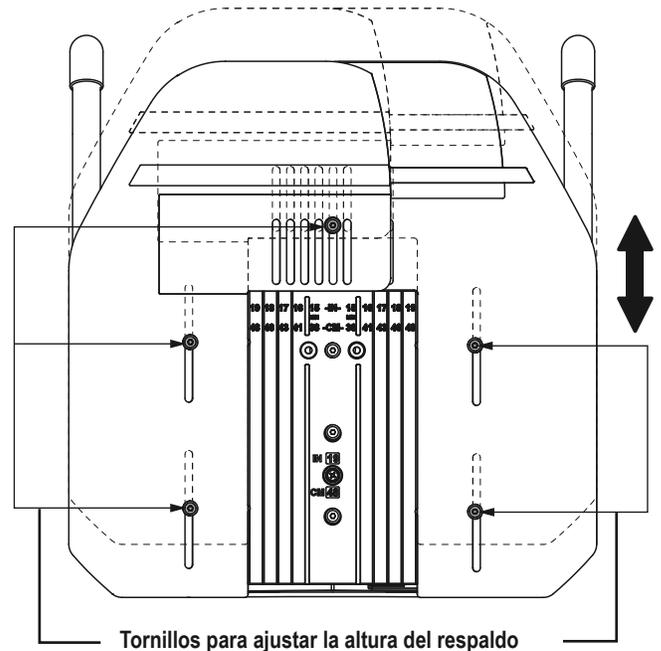


Figura 14. Ajustes de altura y ancho del respaldo del TB-Flex

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No utilice lejía para lavar la funda exterior, ya que podría resultar dañada.

No sumerja nunca el cojín del respaldo en agua, ya que podría resultar dañado.

No trate de meterla en una secadora, ya que podría encogerse.

- Una vez seca la funda, vuelva a colocar la funda en el cojín del respaldo y coloque éste de tal forma que las pestañas de las tiras de ajuste queden mirando hacia el respaldo. Coloque el cojín sobre cualquier soporte lumbar, lateral o torácico y luego sujételo al respaldo mediante las tiras adherentes tipo velcro.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad para la utilización correcta del desinfectante o agente limpiador antes de aplicarlo a su producto. El incumplimiento de estas indicaciones podría provocar irritaciones cutáneas o daños en la tapicería o el acabado de su silla eléctrica.

Ajuste del reposacabezas

El reposacabezas se puede ajustar fácilmente en diferentes alturas, ángulos y profundidades.

Para ajustar la altura, ángulo o profundidad del reposacabezas:

- Afloje los tornillos de ajuste correspondientes a los ajustes deseados. **Ver figura 15.**
- Ajuste el reposacabezas en la posición deseada.
- Apriete los tornillos de ajuste.

NOTA: Una vez realizados los ajustes y el reposacabezas en la posición deseada, compruebe que las piezas de sujeción estén bien apretadas.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No prolongue la altura del reposacabezas más allá de las 17.78 cm (7 pulgadas) por encima del soporte del reposacabezas.

Almacenamiento

Algunos componentes de su silla pueden resultar expuestos a cambios extremos de temperatura. Mantenga siempre la silla de ruedas eléctrica entre -8°C (18°F) y 50°C (122°F). Guárdela a temperatura ambiente en un lugar limpio y seco.

Cuidado y mantenimiento

Para deshacerse de su producto de movilidad deberá tener en cuenta la normativa vigente aplicable en su país. Póngase en contacto con la agencia local de eliminación de residuos o con su proveedor de Quantum Rehab para saber cómo deshacerse correctamente del empaque del producto, los componentes estructurales metálicos, los elementos plásticos, el sistema electrónico, las baterías y los materiales de neopreno, silicona y poliuretano.

- Compruebe que todas las piezas de sujeción como tornillos, pernos etc. están apretadas correctamente (no las apriete en exceso).
- Para la limpieza del asiento TB-Flex, utilice un paño humedecido con jabón suave y agua. Seque la unidad por completo antes de usarla. Para limpiar adecuadamente el cojín del respaldo del TB-Flex, consulte las instrucciones de limpieza en la sección "Respaldo del TB-Flex" de este manual.

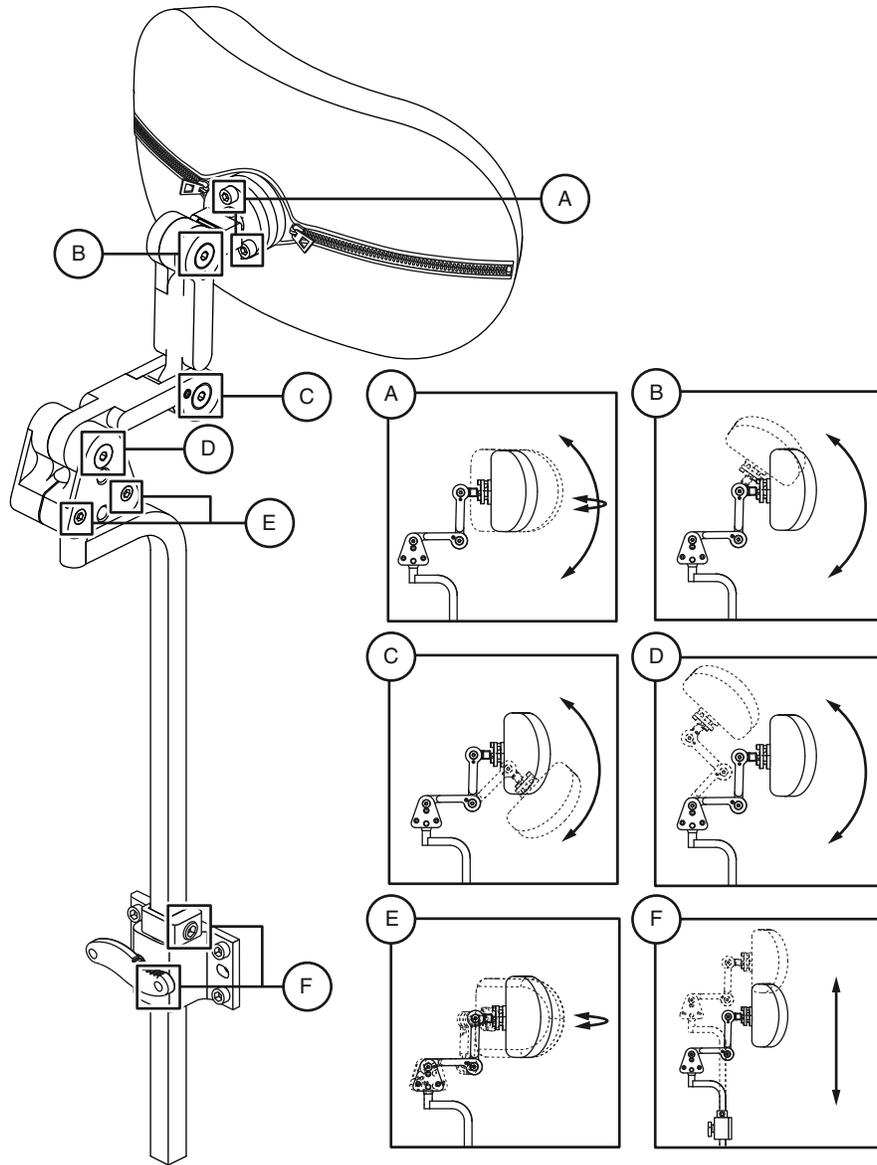


Figura 15. Componentes del ajuste del reposacabezas

Garantía

Garantía limitada de dos años

Durante dos (2) años a partir de la fecha de compra, Quantum se compromete a reparar o cambiar—a discreción de Quantum—sin cargo alguno y a favor del comprador original cualquiera de las piezas descritas a continuación, previo examen efectuado por un representante autorizado de Quantum que atestigüe que el producto presenta un defecto de material o fabricación:

- Los componentes que forman el marco estructural
- Componentes electrónicos
- Cojín de respaldo

Garantía de dieciocho meses (garantía limitada de dos años en Canadá y Europa)

Durante dieciocho (18) meses (dos [2] años en Canadá y Europa) a partir de la fecha de compra, Quantum se compromete a reparar o cambiar—a discreción de Quantum—sin cargo alguno y a favor por un representante autorizado de Quantum que atestigüe que el producto presenta un defecto de material o fabricación:

- Pulsador

La garantía puede ser ejecutada por un proveedor de Quantum Rehab o por Quantum. No envíe piezas averiadas a Quantum sin autorización previa. Los costes de transporte y envío en que se incurra al enviar componentes para su reemplazo o reparación serán a cargo del comprado original.

Exclusiones de la garantía

- Tapizado y asiento (salvo especificación previa de Quantum)
- Reparaciones o modificaciones efectuadas sin la autorización previa de Quantum
- Razones de fuerza mayor, ajenas a Quantum
- Gastos laborales, telefónicos, envíos y otros cargos en que se incurra al realizar la reparación del producto, excepto autorización expresa por parte de Quantum
- Daños causados por:
 - Pérdidas de líquido de las baterías
 - Utilización incorrecta, accidente o negligencia
 - Manejo, mantenimiento o almacenamiento incorrectos
 - Uso comercial u otra utilización indebida

No existe ninguna otra garantía expresa.

Las garantías implícitas, incluidas la de comercialización y aptitud a fines específicos, están limitadas a un (1) año a partir de la fecha de compra y dentro de los límites permitidos por la ley. Queda excluida cualquier otra garantía implícita. Ésta es la única vía de recurso. El fabricante no se hará responsable de los daños indirectos que pudieran ocurrir.

Algunos estados no contemplan las limitaciones acerca de la duración de las garantías implícitas ni permiten la exclusión de los daños fortuitos o indirectos. En dicho caso, las limitaciones y exclusiones anteriores no serían aplicables.

Esta garantía reconoce al usuario determinados derechos que pueden ser completados con otros derechos dependiendo del estado.

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.quantumrehab.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
www.quantumrehab.com

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.quantumrehab.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale, Auckland 0600
www.pridemobility.co.nz

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.quantumrehab.co.uk

Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.quantumrehab.eu

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.quantumrehab-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.quantumrehab.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.quantumrehab.es

Germany

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.quantumrehab.de

China

Room 508, Building #4
TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road
Pudong New Area
Shanghai 201318

